

## ThinPrep™ EA värvilahus

## Kasutusjuhend

**KASUTUSOTSTARVE**

Värvilahus ThinPrep™ EA on mõeldud kasutamiseks Papanicolaou värvimisprotseduuris koos mistahes tuumavärviga ThinPrep, värvi loputuslahusega ThinPrep, värvi sinetamislahusega ThinPrep ja värvilahusega ThinPrep Orange G. Professionaalseks kasutamiseks.

**KOKKUVÕTE JA SELGITUS**

ThinPrep EA lahus on alkoholilahus, mida kasutatakse rakkude tsütoplasmi värvimiseks tsütoloogiliseks hindamiseks mõeldud alusklaaside ettevalmistamisel.

**PROTSEDUURI PÕHIMÕTTED**

Kasutamisel koos värvimislahustega ThinPrep ja tsütoloogiliste alusklaaside ettevalmistamisel värvib ThinPrep EA lahus rakkude tsütoplasmi, ilma et see mõjutaks tuumavärvimist või morfoloogiat.

**KOOSTIS**

Etanooli, isopropüülalkoholi, metanooli ja patenditud bioloogiliste värvainete alkoholilahus. CAS-64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0

**HOIATUSED**

**Oht.** Tuleohtlik. Sisaldab etanooli, isopropüülalkoholi, metanooli.

H302. Allaneelamisel kahjulik.

H312. Nahale sattumisel kahjulik.

H319. Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H371. Võib kahjustada elundeid.

H225. Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

*In vitro* diagnostiliseks kasutamiseks. Ei ole mõeldud väliseks ega sisemiseks kasutamiseks inimestel ega loomadel. Ei saa muuta mittemürgiseks.

**ETTEVAATUSABINÕUD**

P210. Hoidke eemale kuumusest / sädemetest / lahtisest leegist / kuumadest pindadest. — Mitte suitsetada.

P280. Kandke kaitsekindaid ja silma-/näokaitset.

P260. Ärge hingake tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pritsmeid.

P301 + P310. ALLANEELAMISEL: helistage kohe MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile.

P303 + P361 + P353. NAHALE (või juustesse) SATTUMISEL: eemaldage seljast kohe kõik saastunud riided. Loputage nahka veega / minge duši alla.

P305 + P351 + P338. SILMA SATTUMISEL: loputage ettevaatlikult veega mitu minutit. Kontaktläätsede esinemise korral eemaldage need, kui seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.

P304 + P340. SISSEHINGAMISEL: toimetage kannatanu värske õhu kätte ja hoidke asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

P309 + P311. Kokkupuutel või kui tunnete end halvasti: helistage MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile.

P370 + P378. Tulekahju korral: kustutamiseks kasutage kuiva liiva, kuiva kemikaali või alkoholikindlat vahtu.

P403 + P233. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida anum tihedalt suletuna.

P501. Kõrvaldage sisu/anum kohalike/regionalaasete/riiklike/rahvusvaheliste määruste kohaselt.

# ThinPrep™ EA värvilahus

Pärast käsitsemist peske käsi põhjalikult. Kui seda otseselt ei kasutata, hoidke anum tihedalt suletuna. Kasutage piisava ventilatsiooniga kohas. Tulemusi mitte-ThinPrepi tsütoloogia proovidega pole hinnatud. Ärge kasutage, kui esmane pakend on kahjustatud.

## **EELTÖÖTLEMINE**

Lahustada, segada ega lahjendada pole vaja.

## **HOIULEPANEK**

Hoidke ThinPrep EA lahust 15 °C (59 °F) kuni 30 °C (86 °F) juures kaasasolevas anum. Ärge kasutage ThinPrep EA lahust pärast anumal märgitud kõlblikkusaega.

## **VÄLIMUS JA TERVIKLIKKUS**

Läbipaistmatu mittesteriilne lahust.

## **PROOVIDE KOGUMINE JA ETTEVALMISTAMINE**

Kasutamiseks günekoloogiliste tsütoloogia proovidega, mis on ette valmistatud mis tahes töötlemise ThinPrep™.

## **PROTSEDUUR**

Vaadake konkreetseid värvimisprotokolle värvi ThinPrep kasutusjuhendist.

## **PROTSEDUURI PIIRANGUD**

Tuleb kasutada värvi ThinPrep kasutusjuhendis toodud juhiste järgi. ThinPrep EA lahust ei saa asendada ühegi teise lahusega.

## **OHUTUS JA TOIMIVUSNÄITAJAD**

Suuniste järgi kasutamisel värvib ThinPrep EA lahust rakkude tsütoplasmid tsütoloogilisel alusklaasil.

Selle tootega või sellega kasutatavate komponentidega seotud tõsiste juhtumite korral teatage sellest ettevõtte Hologic tehnilisele toele ning patsiendi ja/või kasutaja kohalikule pädevale asutusele.

Lugege kuvamissüsteemi ThinPrep kasutusjuhendit.

## **KÕRVALDAMINE**

Kõrvaldage kehtivate eeskirjade kohaselt.

## **ESMAABIMEETMED**

ALLANEELAMISEL: kui tunnete end halvasti, helistage MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile. Kogu ohutuskaardi leiate veebisaidilt [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com).

## **Läbivaatamise ajalugu**

Läbivaatamine	Kuupäev	Kirjeldus
AW-24896-2702 vers 001	03.2022	Juhiste täpsustamine. Lisatud juhised seoses tõsistest juhtumitest teatamisega.

## ThinPrep™ EA värvilahus



Tootja



Kataloogi number



Tuleohtlik



Vaadake kasutusjuhendit



Kõlblikusaeg



Ärritav, hingamisteede ärritus, naha sensibilisaator



*In vitro* diagnostiline meditsiiniseade



Partii kood



Hingamisteede sensibilisaator, toksilisus sihtorganile



Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses



Temperatuuri piirid



Avage siit



Kogus



Valmistatud USA-s



Ühendkuningriigi vastavushindamine (Suurbritannia)

EtOH Etanool



Toode vastab CE-märgise nõuetele vastavalt EL-i IVD määrusele 2017/746



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Tel: +32 2 711 46 80

Austraalia sponsor: Hologic (Austraalia ja Uus-Meremaa) Pty Ltd. • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Austraalia • Tel: 02 9888 8000

Vastutav isik Ühendkuningriigis: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Ühendkuningriik