

# Värvi loputuslahus ThinPrep™

## Kasutusjuhend



### **KASUTUSOTSTARVE**

Värvi loputuslahus ThinPrep™ on mõeldud kasutamiseks Papanicolaou värvimisprotseduuris koos tuumavärviga ThinPrep, värvi sinetamislahusega ThinPrep, värvilahusega ThinPrep Orange G ja värvilahusega ThinPrep EA. Professionaalseks kasutamiseks.

### **KOKKUVÕTE JA SELGITUS**

Loputuslahus ThinPrep on puhastav vesilahus, mis eemaldab tsütoloogilise hindamise alusklaasi ettevalmistustel rakukomponentidelt liigse tuumavärvi ThinPrep.

### **PROTSEDUURI PÕHIMÕTTED**

Värvimislahusega ThinPrep koos kasutamisel ja tsütoloogilise alusklaasi ettevalmistamisel eemaldab loputuslahus ThinPrep rakukomponentidelt liigse tuumavärvi ThinPrep, võimendades tuumavärvimist ja muutes tsütoplasma selgemaks.

### **KOOSTIS**

Sobiv pindaktiivne vesilahus.

### **HOIATUSED**

*In vitro* diagnostiliseks kasutamiseks.

Ei ole mõeldud väliseks ega sisemiseks kasutamiseks inimestel ega loomadel. Kokkupuutel võib põhjustada ärritust.

### **ETTEVAATUSABINÕUD**

Vältige kokkupuudet silmadega.

Kandke lahuse käsitsemise ajal kindaid ja silmakaitseid.

Kui seda otseselt ei kasutata, hoidke anum suletuna.

Tulemusi mitte-ThinPrepi tsütoloogia proovidega pole hinnatud.

Ärge kasutage, kui esmane pakend on kahjustatud.

### **EELTÖÖLEMINE**

Lahustada, segada ega lahjendada pole vaja.

### **HOIULEPANEK**

Hoidke kasutamata loputuslahust ThinPrep 15 °C (59 °F) kuni 30 °C (86 °F) juures kaasasolevas anumas. Ärge kasutage loputuslahust ThinPrep pärast anumal märgitud kõlblikkusaega.

### **VÄLIMUS JA TERVIKLIKKUS**

Selge mittesteriilne lahus.

### **PROVIDE KOGUMINE JA ETTEVALMISTAMINE**

Kasutamiseks günekoloogiliste tsütoloogia proovidega, mis on ette valmistatud mis tahes töötles ThinPrep™.

### **PROTSEDUUR**

Vaadake konkreetseid värvimisprotokolle värvi ThinPrep kasutusjuhendist.

## Värvi loputuslahus ThinPrep™

### PROTSEDUURI PIIRANGUD

Tuleb kasutada värvi ThinPrep kasutusjuhendis toodud juhiste järgi. Loputuslahust ThinPrep ei saa asendada ühegi teise lahusega.

### OHUTUS JA TOIMIVUSNÄITAJAD

Kui seda kasutatakse tsütoloogilise alusklaasi ettevalmistamise suuniste kohaselt, eemaldab loputuslahus ThinPrep rakukomponentidelt liigse tuumavärvi ThinPrep.

Selle seadmega või sellega kasutatavate komponentidega seotud tõsiste juhtumite korral teatage sellest ettevõtte Hologic tehnilisele toele ning patsiendi ja / või kasutaja kohalikule pädevale asutusele.

Lugege kuvamissüsteemi ThinPrep kasutusjuhendit.

### KÕRVALDAMINE

Kõrvaldage kehtivate eeskirjade kohaselt.

### ESMAABIMEETMED

Kahjulikke tagajärgi pole oodata. Kogu ohutuskaardi leiata veebisaidilt [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

### Läbivaatamise ajalugu

Läbivaatamine	Kuupäev	Kirjeldus
AW-24890-2702 vers 001	03.2022	Juhiste täpsustamine. Lisatud juhised seoses tõsistest juhtumitest teatamisega.



Tootja



Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses



Partii kood



Vaadake kasutusjuhendit



Kataloogi number



Temperatuuri piirid



In vitro diagnostiline meditsiiniseade



Kõlblikkusaeg



Avage siit



Kogus



Valmistatud USA-s



Ühendkuningriigi vastavushindamine (Suurbritannia)



Toode vastab CE-märgise nõuetele vastavalt EL-i IVD määrusele 2017/746



Ettevaatust! Föderaalsete (USA) piirangute kohaselt tohib seda seadet müüa ainult arst või mistahes muu praktiseeriv meditsiinitöötaja, kes on litsentseeritud selle osariigi seaduste alusel, kus meditsiinitöötaja seadet kasutab või annab ettekirjutuse selle kasutamiseks, ning kes on koolitatud ja kogunud toote kasutamise alal, või tohib seda müüa sellise meditsiinitöötaja ettekirjutusel.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Tel: +32 2 711 46 80

Austraalia sponsor: Hologic (Austraalia ja Uus-Meremaa) Pty Ltd. • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Austraalia • Tel: 02 9888 8000

Vastutav isik Ühendkuningriigis: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Ühendkuningriik