

Sinetamislahus ThinPrep™ II

Kasutusjuhend



KASUTUSOTSTARVE

Värvi sinetamislahus ThinPrep™ II on mõeldud kasutamiseks Papanicolaou värvimisprotseduuris koos tuumavärviga ThinPrep, värvi loputuslahusega ThinPrep II, värvilahusega ThinPrep Orange G ja värvilahusega ThinPrep EA. Professionaalseks kasutamiseks.

KOKKUVÕTE JA SELGITUS

Sinetamislahus ThinPrep II on leeliseline vesilahus, mis muudab tuumavärviga ThinPrep värvitud rakukomponendid tumedamaks, et need oleksid tsütoloogilise hindamise jaoks ettevalmistatud alusklaasidel sinist/lillat värvi.

PROTSEDUURI PÕHIMÕTTED

Värvimislahusega ThinPrep koos kasutamisel ja tsütoloogilise alusklaasi ettevalmistamisel muudab sinetamislahus ThinPrep II need tuumavärviga ThinPrep värvitud rakukomponendid tumedamaks, võimendades nukleaarset morfoloogiat.

KOOSTIS

Trisi vesipuhver.

HOIATUSED

In vitro diagnostiliseks kasutamiseks.

Ei ole mõeldud väliseks ega sisemiseks kasutamiseks inimestel ega loomadel. Võib ärritada silmi. Võib ärritada nahka. Võib ärritada hingamisteesid. Allaneelamisel võib olla kahjulik.

ETTEVAATUSABINÕUD

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Vältige kokkupuudet naha ja silmadega. Pärast käsitsemist peske käsi põhjalikult.

Kui seda otseselt ei kasutata, hoidke anum tihedalt suletuna.

Tulemusi mitte-ThinPrepi tsütoloogia proovidega pole hinnatud.

Ärge kasutage, kui esmane pakend on kahjustatud.

EELTÖÖLEMINE

Lahustada, segada ega lahjendada pole vaja.

HOIULEPANEK

Hoidke kasutamata sinetamislahust ThinPrep II 15 °C (59 °F) kuni 30 °C (86 °F) juures kaasasolevas anumus jahedas kuivas hästi ventileeritavas kohas eemal soojusallikatest, põlevatest materjalidest ja kokkusobimatutest ainetest. Ärge kasutage sinetamislahust ThinPrep II pärast animal märgitud kõlblikkusaega.

VÄLIMUS JA TERVIKLIKKUS

Selge mittesteriilne lahus.

PROVIDE KOGUMINE JA ETTEVALMISTAMINE

Kasutamiseks günekoloogiliste tsütoloogia proovidega, mis on ette valmistatud mis tahes töötlejas ThinPrep™.

PROTSEDUUR

Vaadake konkreetseid värvimisprotokolle värvi ThinPrep kasutusjuhendist.

Sinetamislahus ThinPrep™ II

PROTSEDUURI PIIRANGUD

Tuleb kasutada värvi ThinPrep kasutusjuhendis toodud juhiste järgi. Sinetamislahust ThinPrep II ei saa asendada ühegi teise lahusega.

OHUTUS JA TOIMIVUSNÄITAJAD

Kui seda kasutatakse tsütoloogilise alusklaasi ettevalmistamise suuniste kohaselt, muudab sinetamislahus ThinPrep II tuumavärviga ThinPrep värvitud rakukomponendid tumedamaks.

Selle seadmega või sellega kasutatavate komponentidega seotud tõsiste juhtumite korral teatage sellest ettevõtte Hologic tehnilisele toele ning patsiendi ja/või kasutaja kohalikule pädevale asutusele.

Lugege kuvamissüsteemi ThinPrep kasutusjuhendit.

KÕRVALDAMINE

Kõrvaldage kehtivate eeskirjade kohaselt.

ESMAABIMEETMED

Kui tunnete end halvasti, pöörduge arsti poole.

Kogu ohutuskaardi leiate veebisaidilt www.hologicds.com.

Läbivaatamise ajalugu

Läbivaatamine	Kuupäev	Kirjeldus
AW-24902-2702 vers 001	03.2022	Juhiste täpsustamine. Lisatud juhised seoses tõsistest juhtumitest teatamisega.



Tootja



Kataloogi number



Partii kood



Vaadake kasutusjuhendit



Kõlblikusaeg



Temperatuuri piirid



In vitro diagnostiline meditsiiniseade



Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses



Avage siit



Valmistatud USA-s



Ühendkuningriigi vastavushindamine (Suurbritannia)



Kogus



Toode vastab CE-märgise nõuetele vastavalt EL-i IVD määrusele 2017/746



Ettevaatust! Föderaalsete (USA) piirangute kohaselt tohib seda seadet müüa ainult arst või mistahes muu praktiseeriv meditsiinitöötaja, kes on litsentseeritud selle osariigi seaduste alusel, kus meditsiinitöötaja seadet kasutab või annab ettekirjutuse selle kasutamiseks, ning kes on koolitatud ja kogunud toote kasutamise alal, või tohib seda müüa sellise meditsiinitöötaja ettekirjutusel.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Tel: +32 2 711 46 80

Austraalia sponsor: Hologic (Austraalia ja Uus-Meremaa) Pty Ltd. • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Austraalia • Tel: 02 9888 8000

Vastutav isik Ühendkuningriigis: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Ühendkuningriik

Värvi sinetamislahus ThinPrep II

Kasutusjuhend

Eesti keel AW-24902-2702 vers 001 03.2022

