

# Loputuslahus ThinPrep™ II

## Kasutusjuhend

UK  
CA CE



### **KASUTUSOTSTARVE**

Värvi loputuslahus ThinPrep™ II on mõeldud kasutamiseks Papanicolaou värvimisprotseduuris koos tuumavärviga ThinPrep, värvi sinetamislahusega ThinPrep II, värvilahusega ThinPrep Orange G ja värvilahusega ThinPrep EA. Professionaalseks kasutamiseks.

### **KOKKUVÕTE JA SELGITUS**

Loputuslahus ThinPrep II on alkoholilahus, mis eemaldab tsütoloogilise hindamise alusklaasi ettevalmistustel rakukomponentidelt liigse tuumavärvi ThinPrep.

### **PROTSEDUURI PÕHIMÕTTED**

Värvimislahusega ThinPrep koos kasutamisel ja tsütoloogilise alusklaasi ettevalmistamisel eemaldab loputuslahus ThinPrep II rakukomponentidelt liigse tuumavärvi ThinPrep, võimendades tuumavärvimist ja muutes tsütoplasma selgemaks.

### **KOOSTIS**

Etüülalkoholi, etüleenglükooli ja isopropanooli alkoholilahus. CAS 64-17-5, CAS 107-21-1, CAS 67-63-0

### **HOIATUSED**

**Oht.** Tuleohtlik. Sisaldab etüülalkoholi, etüleenglükooli.

H302. Allaneelamisel kahjulik.

H319. Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H225. Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

*In vitro* diagnostiliseks kasutamiseks. Ei ole mõeldud väliseks ega sisemiseks kasutamiseks inimestel ega loomadel.

### **ETTEVAATUSABINÕUD**

P210. Hoidke eemale kuumusest / sädemetest / lahtisest leegist / kuumadest pindadest. — Mitte suitsetada.

P280. Kandke kaitsekindaid/kaitserõivaid/silmakaitset/näokaitset.

P308 + P313. Kui olete kokku puutunud või kahtlustate seda: pöörduge arsti poole.

P301 + P312. ALLANEELAMISEL: kui tunnete end halvasti, helistage MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile.

P305 + P351 + P338. SILMA SATTUMISEL: loputage ettevaatlikult veega mitu minutit. Kontaktläätsede esinemise korral eemaldage need, kui seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.

P302 + P352. NAHALE SATTUMISEL: peske rohke seebi ja veega.

P403 + P233. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida anum tihedalt suletuna.

P370 + P378. Tulekahju korral: kustutamiseks kasutage kuiva liiva, kuiva kemikaali või alkoholikindlat vahtu.

P501. Kõrvaldage sisu/anum kohalike/regionlaasete/riiklike/rahvusvaheliste määruste kohaselt.

### **ELTÖÖTLEMINE**

Lahustada, segada ega lahjendada pole vaja.

### **HOIULEPANEK**

Hoidke kasutamata loputuslahust ThinPrep II 15 °C (59 °F) kuni 30 °C (86 °F) juures kaasasolevas anumus jahedas kuivas hästi ventileeritavas kohas eemal soojusallikatest, põlevatest materjalidest, otsesest päikesevalgusest ja kokkusobimatutest ainetest. Ärge kasutage loputuslahust ThinPrep II pärast anumal märgitud kõlblikusaega.

# Loputuslahus ThinPrep™ II

## **VÄLIMUS JA TERVIKLIKKUS**

Selge mittesteriilne lahus.

## **PROOVIDE KOGUMINE JA ETTEVALMISTAMINE**

Kasutamiseks günekoloogiliste tsütoloogia proovidega, mis on ette valmistatud mis tahes töötles ThinPrep™.

## **PROTSEDUUR**

Vaadake konkreetseid värvimisprotokolle värvi ThinPrep kasutusjuhendist.

## **PROTSEDUURI PIIRANGUD**

Tuleb kasutada värvi ThinPrep kasutusjuhendis toodud juhiste järgi. Loputuslahust ThinPrep II ei saa asendada ühegi teise lahusega.

## **OHUTUS JA TOIMIVUSNÄITAJAD**

Kui seda kasutatakse tsütoloogilise alusklaasi ettevalmistamise suuniste kohaselt, eemaldab loputuslahus ThinPrep II rakukomponentidelt liigse tuumavärvi ThinPrep.

Selle seadmega või sellega kasutatavate komponentidega seotud tõsiste juhtumite korral teatage sellest ettevõtte Hologic tehnilisele toele ning patsiendi ja/või kasutaja kohalikule pädevale asutusele.

Lugege kuvamissüsteemi ThinPrep kasutusjuhendit.

## **KÕRVALDAMINE**

Kõrvaldage kehtivate eeskirjade kohaselt.

## **ESMAABIMEETMED**

ALLANEELAMISEL: kui tunnete end halvasti, helistage MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile. Kogu ohutuskaardi leiate veebisaidilt [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

## **Läbivaatamise ajalugu**

Läbivaatamine	Kuupäev	Kirjeldus
AW-24900-2702 vers 001	03.2022	Juhiste täpsustamine. Lisatud juhised seoses tõsistest juhtumitest teatamisega.

## Loputuslahus ThinPrep™ II



Tootja



Kataloogi number



Tuleohtlik



Vaadake kasutusjuhendit



Kõlblikusaeg



Ärritav, hingamisteede ärritus, naha sensibilisaator



*In vitro* diagnostiline meditsiiniseade



Partii kood



Avage siit



Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses



Temperatuuri piirid



Kogus



Valmistatud USA-s



Ühendkuningriigi vastavushindamine (Suurbritannia)

**EtOH** Etanool



Toode vastab CE-märgise nõuetele vastavalt EL-i IVD määrusele 2017/746



Ettevaatust! Föderaalseaduse (USA) piirangute kohaselt tohib seda seadet müüa ainult arst või mistahes muu praktiseeriv meditsiinitöötaja, kes on litsentseeritud selle osariigi seaduste alusel, kus meditsiinitöötaja seadet kasutab või annab ettekirjutuse selle kasutamiseks, ning kes on koolitatud ja kogenud toote kasutamise alal, või tohib seda müüa sellise meditsiinitöötaja ettekirjutusel.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Tel: +32 2 711 46 80

Austraalia sponsor: Hologic (Austraalia ja Uus-Meremaa) Pty Ltd. • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Austraalia • Tel: 02 9888 8000

Vastutav isik Ühendkuningriigis: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Ühendkuningriik