




10 Überprüfen Sie das Bild.

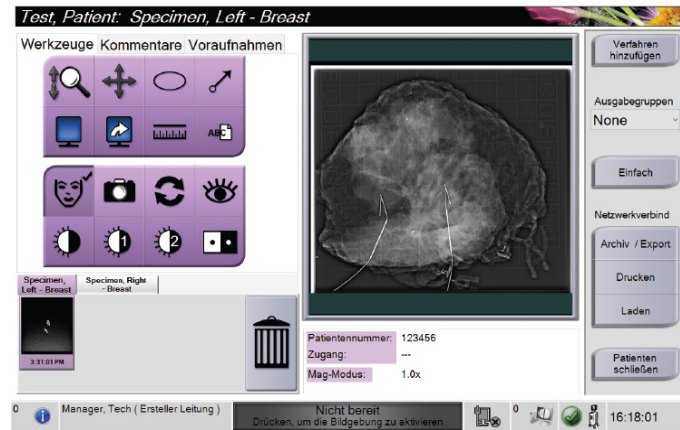



11 Archivieren oder exportieren Sie die Bilder und schließen Sie dann den Patienten.

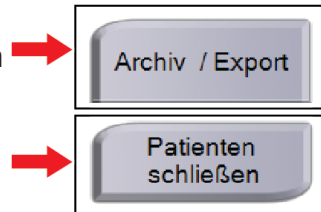

12 Nehmen Sie das Probenblett aus der Bildgebungskonsole heraus. Befolgen Sie bei der Handhabung der Proben die Richtlinien der Einrichtung.

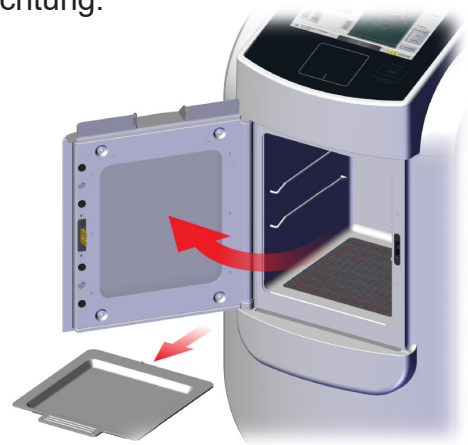

13 Schalten Sie das System aus.

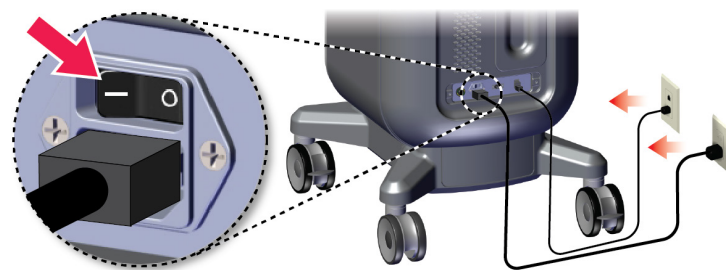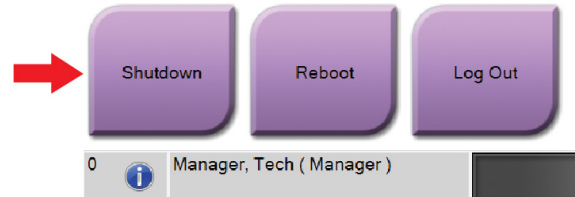

Faxitron™ Trident® HD

Specimen Radiography System

KURZANLEITUNG



- 1 Bildanzeige-Monitor
- 2 Kontrollanzeige mit integriertem Touchpad und Aktivierungstaste „Röntgen“
- 3 Bildgebungskonsole

! Sicherheitsinformationen und vollständige Anleitungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.


1 Bringen Sie die Konsole in die korrekte Position.



2 Stellen Sie die Laufrollen fest.



3 Schließen Sie das System an das Stromnetz und das Netzwerk an.

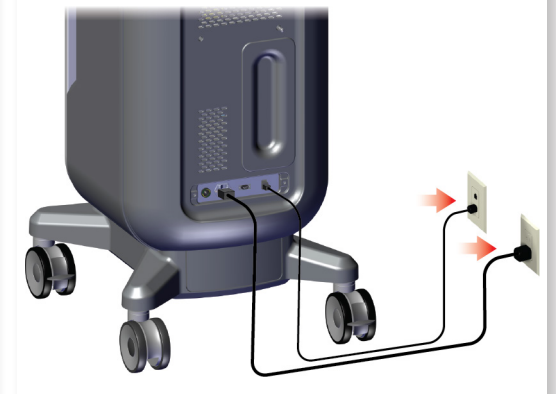

Hologic Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
Tel: +1.877.371.4372

EC REP Hologic Ltd.
Heron House Oaks Business Park
Crewe Road
Wythenshawe, Manchester
M23 9HZ, UK
Tel: +44 (0)161 946 2206



Brazilian Imex Medical Group do Brasil
Contact: Rua das Embaúbas, 601- Fazenda
Santo Antônio
São José /SC - Brasil - 88104-561
+55 48 3251-8800
www.imexmedicalgroup.com.br

HOLOGIC®

Weitere internationale Standorte können Sie auf unserer Unternehmenswebseite finden.
© 2019 Hologic, Inc. Gedruckt in den USA. Diese Bedienungsanleitung wurde ursprünglich in der englischen Sprache verfasst.


Hologic Faxitron, Trident und zugehörige Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle Marken, eingetragenen Marken und Produktnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.
Dieses Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische oder ausländische Patente, wie unter www.Hologic.com/patents angegeben, geschützt sein.

4 Starten Sie das System und melden Sie sich an.

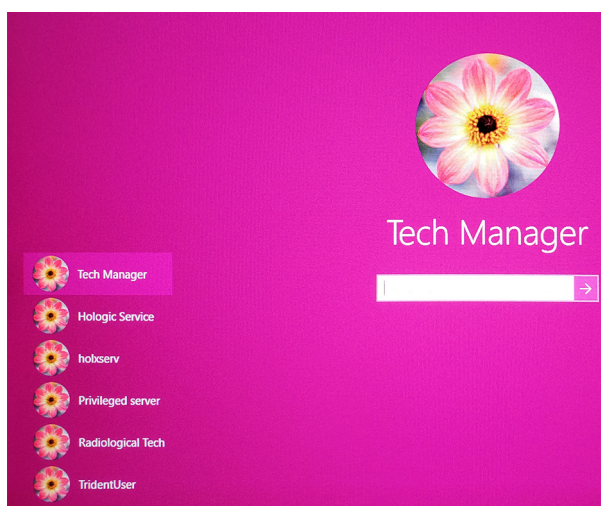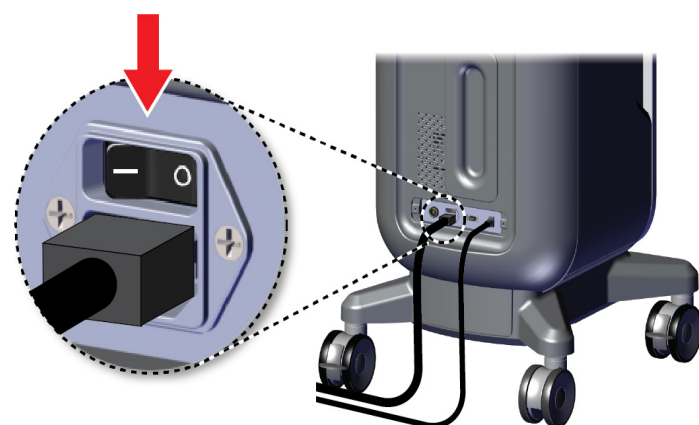

5 Wählen Sie den Patienten und das Verfahren aus.


Faxitron[™]
Trident[®] HD
Specimen Radiography System

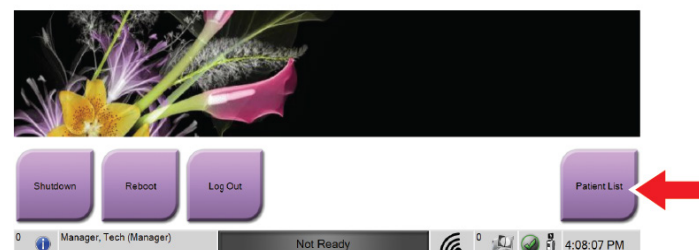


Name	Geburtsdatum	Untersuchung
Patient patient*Test	08.04.1973	Specimen, Un...
Test*Patient	02.01.1965	Specimen, Left...
Patient*Test	04.02.1979	Specimen, Rig...
Test test*Patient	06.03.1962	Specimen, Left...




6 Bereiten Sie die Probe gemäß der Richtlinie der Einrichtung vor und zentrieren Sie sie auf dem Probenblett.

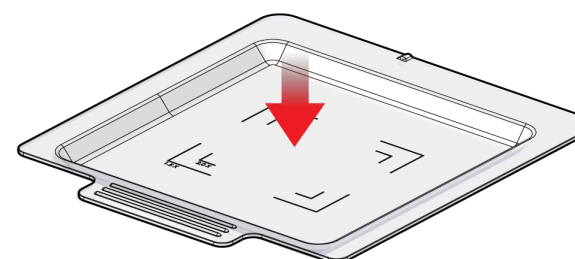

7 Positionieren Sie das Probenblett entsprechend der gewünschten Vergrößerung in der Bildgebungskonsole.

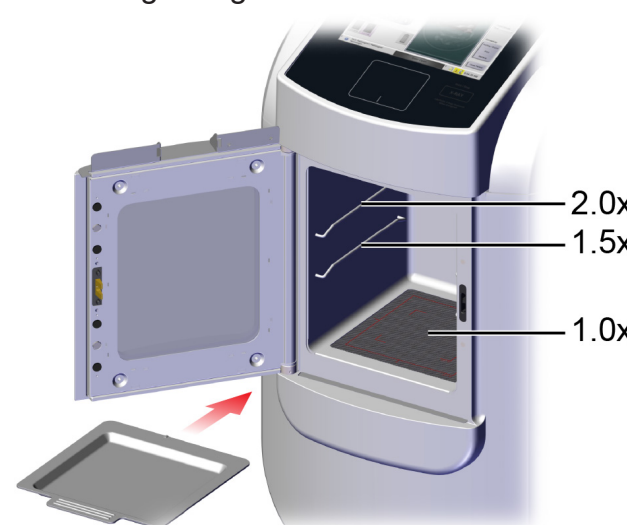

8 Schließen Sie die Tür.

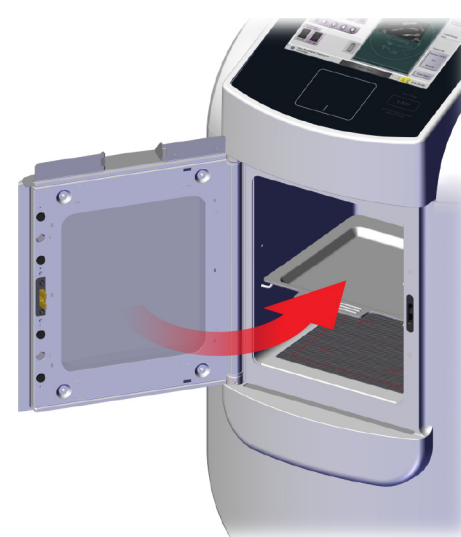

9 Nehmen Sie das Bild auf.

