

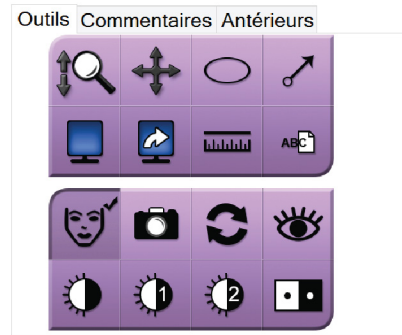


10 Vérifiez l'image.

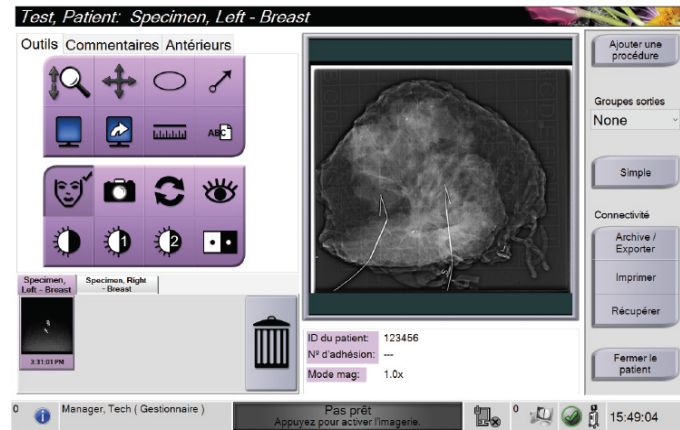


11



Archivez ou exportez les images, puis fermez le patient.

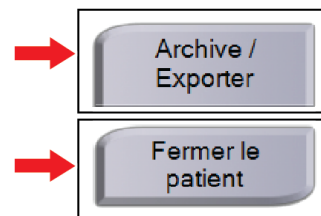

12 Retirez le plateau de spécimens de l'armoire d'imagerie. Suivez les directives du site sur la manipulation des spécimens.

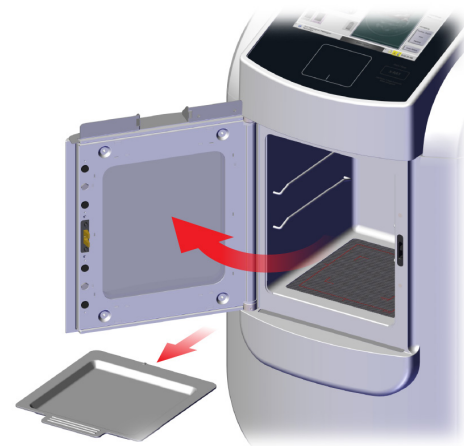

13 Éteignez le système.

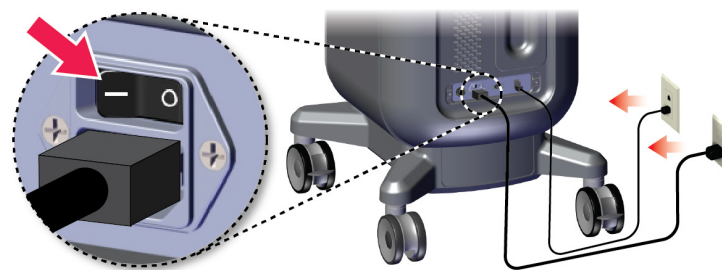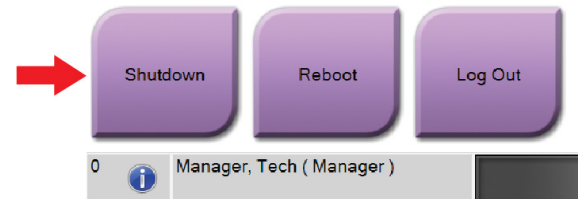

Faxitron™ Trident® HD

Specimen Radiography System

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE



- 1 Moniteur d'affichage d'image
- 2 Affichage des commandes avec Pavé tactile intégré et Bouton d'activation des rayons X
- 3 Armoire d'imagerie



Reportez-vous au Guide de l'utilisateur pour obtenir des informations relatives à la sécurité et des instructions complètes.


1 Déplacez la console vers l'emplacement adéquat.



2 Verrouillez les roulettes.



3 Branchez le système à l'alimentation électrique et au réseau.

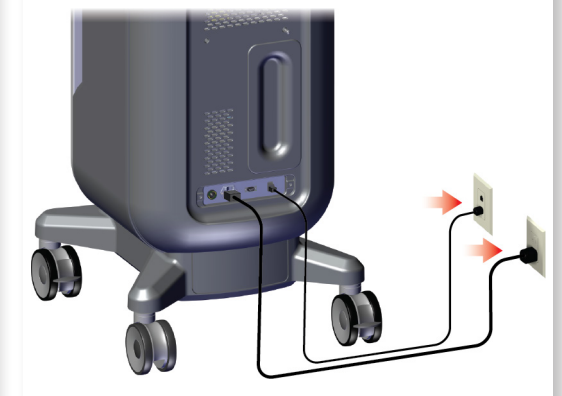

Hologic Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
Tel: +1.877.371.4372

EC REP Hologic Ltd.
Heron House Oaks Business Park
Crewe Road
Wythenshawe, Manchester
M23 9HZ, UK
Tel: +44 (0)161 946 2206



Brazilian Imex Medical Group do Brasil
Contact: Rua das Embaúbas, 601- Fazenda
Santo Antônio
São José /SC - Brasil - 88104-561
+55 48 3251-8800
www.imexmedicalgroup.com.br

HOLOGIC®


Référez-vous au site Web de l'entreprise pour connaître les différentes installations dans le monde.
© 2019 Hologic, Inc. Imprimé aux États-Unis. La version originale du présent guide est rédigée en anglais.

Hologic, Faxitron, Trident et les logos associés sont des marques commerciales et/ou déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits, marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains ou étrangers, comme indiqué sur le site www.Hologic.com/patents.


4 Démarrez le système et connectez-vous.

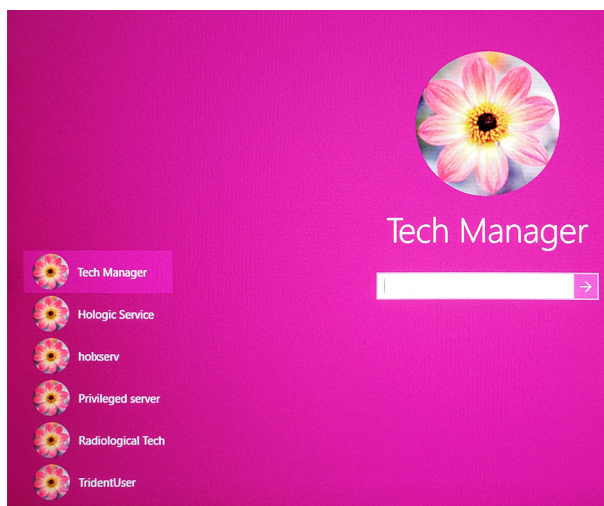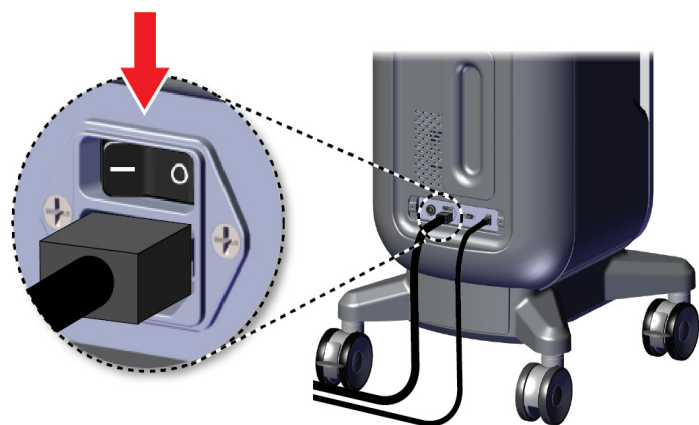


5 Sélectionnez le patient et la procédure.

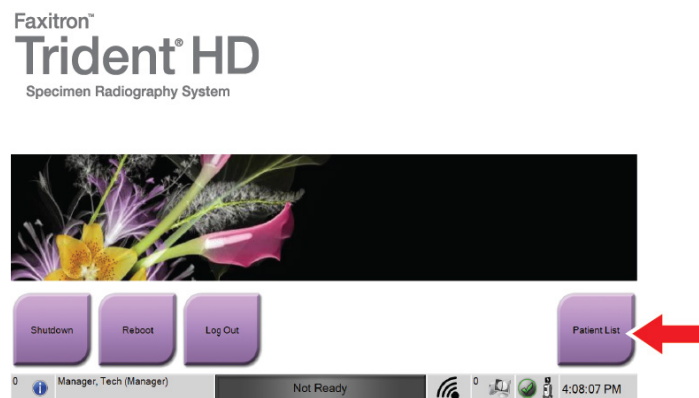


Nom	Date de naissa...	Examen
Patient patient*Test	08/04/1973	Specimen, Un...
Test*Patient	02/01/1965	Specimen, Left...
Patient*Test	04/02/1979	Specimen, Rig...
Test test*Patient	06/03/1962	Specimen, Left...

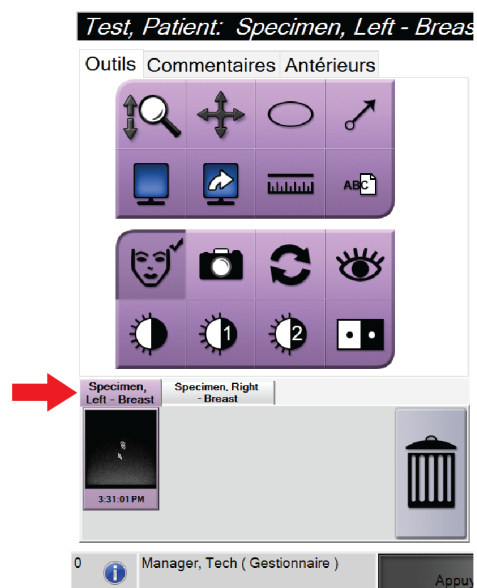


6 Préparez le spécimen selon les directives du site et centrez-le sur le plateau de spécimens.

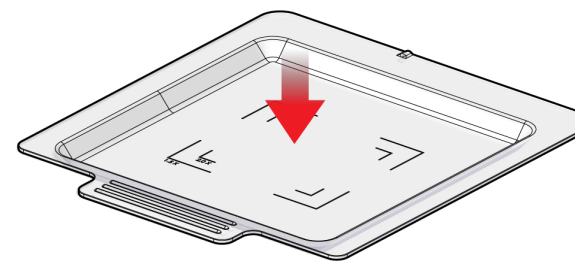

7 Positionnez le plateau de spécimens dans l'armoire d'imagerie en fonction du niveau d'agrandissement souhaité.

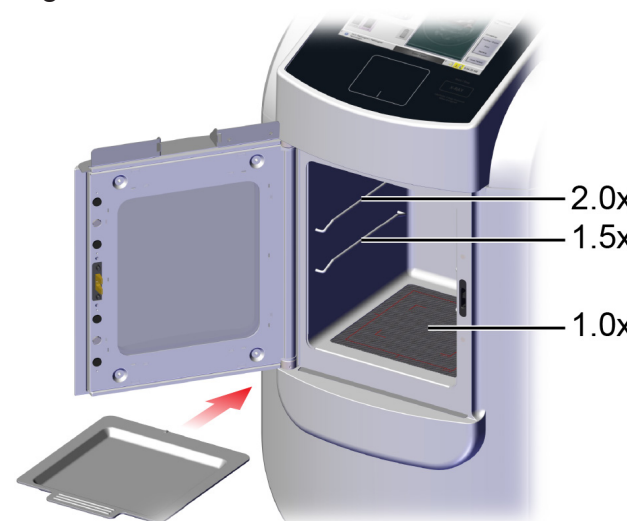

8 Fermez la porte.

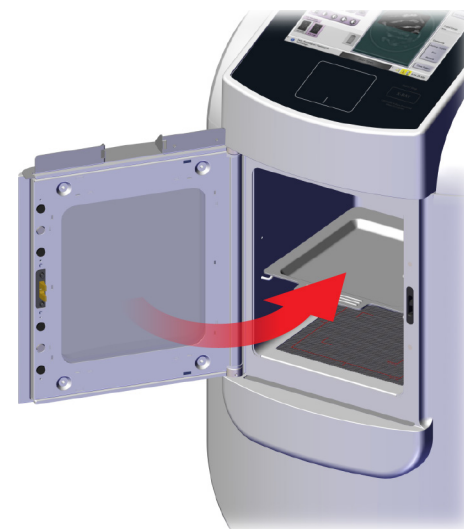

9 Procédez à l'acquisition de l'image.

