

Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetarvikesarja (Tigris™ DTS™ -järjestelmä)

In vitro diagnostiseen käyttöön.

Rx only

Käyttötarkoitus

Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetarvikesarjaa käytetään Aptima-määritysten kanssa Tigris DTS-järjestelmässä. Käytä järjestelmänesteen säilöntäainetarvikesarjaa asianmukaisen määrityksen pakkausselosteessa annettujen ohjeiden ja *Tigris DTS-järjestelmän käyttäjän oppaan* (Tigris DTS System Operator's Manual) mukaisesti.

Reagenssit

Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetarvikesarjan reagenssit annetaan alla Tigris DTS-järjestelmälle. Reagenssin nimen vieressä on myös annettu reagenssin tunnistussymbolit.

Pakkauksessa olevat tarvikkeet

Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetarvikesarja (1 laatikko) (tuotenro 302380)

Tuotteen osa	Määrä	Kuvaus
Aptima-järjestelmänesteen säilöntäaine	1 x 200 ml	Järjestelmänesteen säilöntäaine sisältää 2,5 % natriumhypokloriittia, joka estää mikrobin kasvua vesipohjaisessa liuoksessa.

Tarvittavat materiaalit, jotka on hankittava erikseen

Sopiva(t) Aptima-määritystarvikesarja(t)

Tigris DTS-järjestelmä

Vesi Tigris DTS-järjestelmälle. Tigris DTS-järjestelmän vettä koskevat tiedot, ks. *Tigris DTS-järjestelmän käyttäjän opas* (Tigris DTS System Operator's Manual).

Hologic saatavilla olevat materiaalit

Sopiva(t) Aptima-määritystarvikesarja(t)


Tigris DTS-järjestelmä (tuotenro 105118)

Varoitukset ja varotoimet


- Laimentamaton järjestelmänesteen säilöntäaine on syövyttävää.
- Syövyttävä/Varottava järjestelmänesteen säilöntäaineen joutumista iholle, silmiin ja limakalvoihin. Pese altistunut alue vedellä, jos joudut kosketuksiin tämän nesteen kanssa. Jos tämä neste roiskuu, laimenna vedellä ennen pyyhkimistä kuivaksi.
- Noudata laboratorion tavanomaisia varotoimia. Älä pipetoi suulla. Älä aterioi, juo tai tupakoi laboratorion työskentelyalueella. Pese kädet perusteellisesti Aptima-määritysnesteiden käsittelyn jälkeen.
- Älä täytä järjestelmänesteen säilöntäaineen säiliötä piripintaan.
- Jotkin tämän tarvikesarjan reagenssit on merkitty riski- ja turvamerkinnoilla.

Huomautus: *Maaillanlaajuisesti markkinoitujen tuotteiden merkintöjen vaaralausekkeet edustavat Yhdysvaltain ja EU:n käyttöturvallisuustiedotteiden (SDS) luokituksia. Katso omaa aluettasi koskevia tietoja maakohtaisesta käyttöturvallisuustiedotteesta, joka on käyttöturvallisuustiedotteiden kirjastossa verkkosivulla www.hologiccsds.com.*

Yhdysvaltojen vaaratiedot

	<p>System Fluid Preservative SODIUM HYPOCHLORITE 1 – 5% DANGER</p> <p>H314 – Causes severe skin burns and eye damage H410 – Very toxic to aquatic life with long lasting effects. H400 – Very toxic to aquatic life. EUH031 – Contact with acids liberates toxic gas P260 – Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician P303 + P361 + P353 – IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower P363 – Wash contaminated clothing before reuse P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician P301 + P330 + P331 – IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting P405 – Store locked up</p>
---	--

EU:n vaaratiedot

	<p>System Fluid Preservative SODIUM HYPOCHLORITE 1 – 5 % VAARA</p> <p>H314 – Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa H410 – Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia EUH031 – Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa P280 – Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta P260 – Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta P303 + P361 + P353 – JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä P280 – Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta P305 + P351 + P338 – JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista P310 – Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin P273 – Vältettävä päästämistä ympäristöön P280 – Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta</p>
---	--

Säilytys- ja käsittelyohjeet

- A. Aptima-järjestelmänesteen säilöntäaine pysyy stabiilina avaamattomassa pakkauksessa 15–30 °C viimeiseen käyttöpäivään saakka.
- B. Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. **Ei saa jäätyä.** Avattuna Aptima-järjestelmänesteen säilöntäaine on stabiili 30 päivän ajan huoneenlämmössä säilytettynä.
- C. Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetta voidaan käyttää lämpötilassa 15–30 °C ja suhteellisessa kosteudessa 20–85 %.

Toimenpidehuomautuksia

Järjestelmäneste

Kaada koko järjestelmänesteen säilöntäaineen pullo tyhjään Tigris DTS-järjestelmänesteen säiliöön. Täytä järjestelmänesteen säiliö Tigris DTS-järjestelmää varten tarkoitettulla vedellä, kunnes nestepinta on säiliön kahden yhtenäisen viivan välissä. Tigris DTS -järjestelmän vettä koskevat spesifikaatiot, ks. *Tigris DTS-järjestelmän käyttäjän opas* (Tigris DTS System Operator's Manual). Järjestelmäneste on stabiili 30 päivän ajan huoneenlämmössä säilytettynä (15–30 °C) ja sitä voidaan käyttää korkeintaan 14 päivää Tigris DTS-järjestelmään lataamisen jälkeen.

Rajoitukset

Määritykset on suoritettava ja tulokset tulkittava asianmukaisen määritystarvikesarjan pakkausselosteen ohjeiden ja *Tigris DTS-järjestelmän käyttäjän oppaan* (Tigris DTS System Operator's Manual) mukaisesti.

Näistä toimenpiteistä poikkeaminen voi aikaansaada epäluotettavia tuloksia. Vanhentuneen Aptima-järjestelmänesteen säilöntäaineen käyttö voi antaa virheellisiä tuloksia.

Odotetut arvot

Odotetut arvot on annettu asianmukaisen määrityksen pakkausselosteessa.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Asiakastuki: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com
Tekninen tuki: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Lisää yhteystietoja osoitteessa www.hologic.com



Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Tämä tuote voi olla suojattu yhdellä tai useammalla www.hologic.com/patents-sivustolla mainitulla US-patentilla.

©2001–2018 Hologic, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

501531FI Versio 003
2018-01