

Faxitron[™] Core

Specimen Radiography System

SCHNELLSTARTANLEITUNG

1. EINSCHALTEN

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der Rückseite des Faxitron Core-Schranks auf die Position „**on**“ (ein) gestellt ist
- Drehen Sie den Schlüssel an der Vorderseite des Faxitron Core-Schranks auf „on“ (ein)
- Schalten Sie Computer und Monitor ein

2. SOFTWARE STARTEN

- Vergewissern Sie sich, dass die Faxitron Core-Probenschublade leer ist
- Doppelklicken Sie auf das Symbol **Vision** in der Mitte des Desktops

3. KALIBRIEREN

- Nach dem Einloggen werden Sie aufgefordert, die Kalibrierung durchzuführen. Drücken Sie die Taste „**Calibrate**“ (Kalibrieren), um fortzufahren

4. PATIENTENDATEN

- Starten Sie das Verfahren
- Treffen Sie in der Arbeitsliste eine Auswahl
- Suchen Sie nach dem Namen des Patienten und klicken Sie doppelt darauf
- Füllen Sie alle fehlenden Pflichtfelder wie z. B. Lateralität aus
- Annehmen

5. RÖNTGENAUFNAHME

- Legen Sie die Probe(n) in das Faxitron Core-Probentablett
- Legen Sie das Probentablett in die Schublade
- Schließen Sie die Faxitron Core-Schublade
- Drücken Sie die grüne Taste **x-ray** (Röntgenaufnahme) zum Aktivieren der Röntgenstrahlen – das Bild erscheint nach wenigen Sekunden

6. BILDMANIPULATION

- Halten Sie die **linke Maustaste** gedrückt und ziehen Sie die Maus, um Helligkeit und Kontrast für die Fensterungsfunktion zu ändern
- **Passen Sie den Zoom an**, um das Bild zur Ansicht zu vergrößern

7. SPEICHERUNG IN PACS

- Wählen Sie die Taste **PACS Store** (PACS-Speicher) auf der linken Seite des Bildschirms aus

8. DRUCKEN

- Wählen Sie die Taste **PACS Print** (PACS-Druck) auf der linken Seite des Bildschirms aus

9. HERUNTERFAHREN

- Wählen Sie die Taste **System Shutdown** (System herunterfahren) auf der linken Seite aus und klicken Sie dann auf **OK**
- Drehen Sie den **Schlüssel** am Faxitron Core-Schrank auf **off** (aus)

www.faxitron.com/support | servicedept-faxitron@hologic.com | +1 520.399.8139

Faxitron Core-System, auch bekannt als CoreVision™-System.

04-4046-00-800 Rev. 031 (08.2019) Hologic Inc. ©2019 Alle Rechte vorbehalten. Hologic, CoreVision, Faxitron und The Science of Sure sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Diese Informationen richten sich an medizinische Fachkräfte in den USA und anderen Märkten und sind nicht als Produktverkaufsangebote oder Werbung gedacht, wo solche Aktivitäten verboten sind. Materialien von Hologic werden über Websites, eBroadcasts und Handelsmessen verbreitet. Daher kann nicht immer gesteuert werden, wo solche Materialien erscheinen. Weitere Informationen zum Produktangebot in einem bestimmten Land erhalten Sie von Ihrem regionalen Hologic-Vertreter.