

# Faxitron<sup>™</sup> OR

Specimen Radiography System

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### 1. MISE EN MARCHÉ

- Verrouillez les roues arrière avant de passer à la mise en marche
- Assurez-vous que l'interrupteur situé à l'arrière de l'armoire Faxitron OR\* est réglé sur la position « **Marche** »
- Appuyez sur le bouton gris **Marche/Arrêt** jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse

### 2. DÉMARRAGE DU LOGICIEL

- Vérifiez qu'il n'y a rien dans la chambre à rayons X du Faxitron OR
- Le logiciel **Vision** démarrera automatiquement et demandera le mot de passe
- Saisissez le mot de passe ; le mot de passe par défaut est « **faxitron** »

### 3. ÉTALONNAGE

- Vous serez invité à effectuer l'étalonnage une fois que vous vous serez connecté. Appuyez sur le bouton « **Calibrate** » (Étalonnage) pour continuer

### 4. DONNÉES DU PATIENT

- Démarrez la procédure
- Effectuez la sélection dans la liste de travail
- Recherchez le nom du patient et double-cliquez dessus
- Saisissez les champs obligatoires manquants tels que Laterality (Latéralité)
- Acceptez

### 5. IMAGERIE À RAYONS X

- Placez le(s) échantillon(s) dans la chambre à rayons X du Faxitron OR — utilisez un plateau d'agrandissement si vous le souhaitez
- Appuyez sur le bouton vert **X-ray** (Rayons X) pour activer les rayons X — l'image apparaîtra au bout de quelques secondes

### 6. MANIPULATION DES IMAGES

- Maintenez le **bouton gauche de la souris** enfoncé et faites glisser la souris pour modifier la luminosité et le contraste pour la fonction fenêtre/niveau
- **Régler le zoom** pour agrandir l'image à visualiser

### 7. ENREGISTREMENT PACS

- Sélectionnez le bouton **PACS Store** (Enregistrement PACS) sur le côté gauche de l'écran

### 8. IMPRESSION

- Sélectionnez le bouton **PACS Print** (Impression PACS) sur le côté gauche de l'écran

### 9. ARRÊT

- Sélectionnez le bouton **Arrêt du système** sur le côté gauche, puis cliquez sur **OK**
- Un bip sonore retentit lorsque le système est complètement arrêté

\*Si l'une des situations suivantes se produit : le système indique qu'il est sur batterie lorsqu'il est branché, le système émet des bips sans saisie, le système s'éteint de manière inattendue, assurez-vous que l'interrupteur situé près du câble d'alimentation est sur Marche.

[www.faxitron.com/support](http://www.faxitron.com/support) | [servicedept-faxitron@hologic.com](mailto:servicedept-faxitron@hologic.com) | +1 520.399.8139

*Système Faxitron OR, également connu sous le nom de système BioVision™.*

05-5765-00-900 Rév. 031 (6/19) Hologic Inc. ©2019 Tous droits réservés. Hologic, BioVision, Faxitron et The Science of Sure sont des marques de commerce et/ou des marques déposées d'Hologic, Inc., et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces informations sont destinées aux professionnels du secteur médical aux États-Unis et sur d'autres marchés et ne représentent pas une sollicitation ou la promotion d'un produit lorsque ces activités sont proscrites. Étant donné que les documents de Hologic sont distribués par le biais de sites Web, de diffusions par voie électronique et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible de contrôler le lieu d'apparition de ces documents. Pour des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, veuillez contacter votre représentant Hologic local.