

Faxitron[™] Path

Specimen Radiography System

SNABBSTARTSGUIDE

1. PÅSLAGNING

- Se till att strömbrytaren på baksidan av Faxitron Path-skåpet är i läge **"på"**
- Vrid **nyckeln** på framsidan av Faxitron Path-skåpet till **på**
- Slå **på** datorn och skärmen

2. STARTA PROGRAMVARAN

- Verifiera att Faxitron Paths röntgenkammare är tom
- Dubbelklicka på ikonen **Faxitron Path** på mitten av skrivbordet

3. KALIBRERA

- Du kommer att bli ombedd att kalibrera när du har loggat in. Tryck på knappen **"Calibrate"** (kalibrera) för att fortsätta

4. PATIENTDATA

- Starta procedur
- Välj från arbetslista
- Leta upp patientens namn och dubbelklicka på det
- Fyll i tomma obligatoriska fält som t.ex. Laterality (lateralitet)
- Klicka på knappen Accept (spara)

5. RÖNTGENAVBILDNING

- Placera prov i Faxitron Paths röntgenkammare – använd förstoring om så önskas
- Tryck på den gröna knappen **x-ray** (röntga) för att aktivera röntgenstrålar – bilden visas efter några sekunder

6. BILDMANIPULATION

- Håll nere den **vänstra musknappen** och rör musen för att ändra ljusstyrka och kontrast för funktionen fönster/nivå
- **Justera förstoring** för att förstora bilden vid visning

7. LAGRA I PACS

- Välj knappen **PACS Store** (lagra i PACS) till vänster på skärmen

8. UTSKRIFT

- Välj knappen **PACS Print** (skriv ut PACS) till vänster på skärmen

9. AVSTÄNGNING

- Välj knappen **System Shutdown** (systemavstängning) till vänster på skärmen och klicka sedan på OK
- Vrid nyckeln på Faxitron Paths skåp till **av**

www.faxitron.com/support | servicedept-faxitron@hologic.com | +1 520.399.8139

Faxitron Path-systemet är även känt som PathVision™-systemet.

5081-4001-1601 Rev. 021 (6/19) Hologic Inc. © 2019 Med ensamrätt. Hologic, CoreVision, Faxitron och The Science of Sure är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Denna information är avsedd för medicinsk personal i USA och på andra marknader och är inte avsedd som produktreklam eller kampanjmaterial där sådana aktiviteter är förbjudna. Eftersom Hologic-material distribueras via webbplatser, elektroniska utsändningar och mässor, är det inte alltid möjligt att kontrollera var sådant material kan dyka upp. För närmare information om vilka produkter som finns tillgängliga för försäljning i ett visst land, kontakta din lokala Hologic-representant.