

Vejledning til hurtig opsætning



Faxitron™ Path

Specimen Radiography System



Faxitron™ Path

Specimen Radiography System

TJEK INDHOLDET

Faxitron Path-systemet leveres i 1 KASSE:


INDHOLD

- Faxitron Path-enhed
- Faxitron Path Startvejledning
- 1 x systemskærm med stativ
- 1 x computer
- 1 x skærmerkabel
- 1 x tastatur
- 1 x mus
- 1 x Faxitron Path-forstørrelsesbakke
- 2 x nøgler
- 1 x USB-kabel
- 2 x netværkscabler
- 3 x strømkabler
- 1 x flashdrev til systeminstallation (indeholder brugervejledningen)

Kontrollér, at igen af delene i kassen har taget skade.

Hvis der er skader, bedes du ringe til Hologic-supportteamet på:

+1 520 399 8139

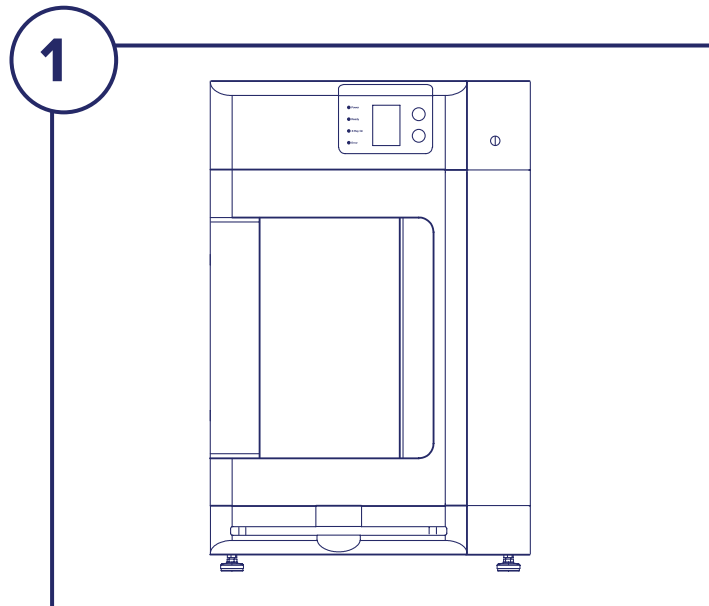


TRIN ET

Åbn **KASSEN**, og pak enheden ud.


Kontrollér **Faxitron Path** for skader (revnet eller defekt plast, beskadiget LCD-skærm, osv.)

Enheden vejer næsten 500 lbs (227 kg), så man skal være flere til at løfte PathVision ud af kassen og til den ønskede placering.

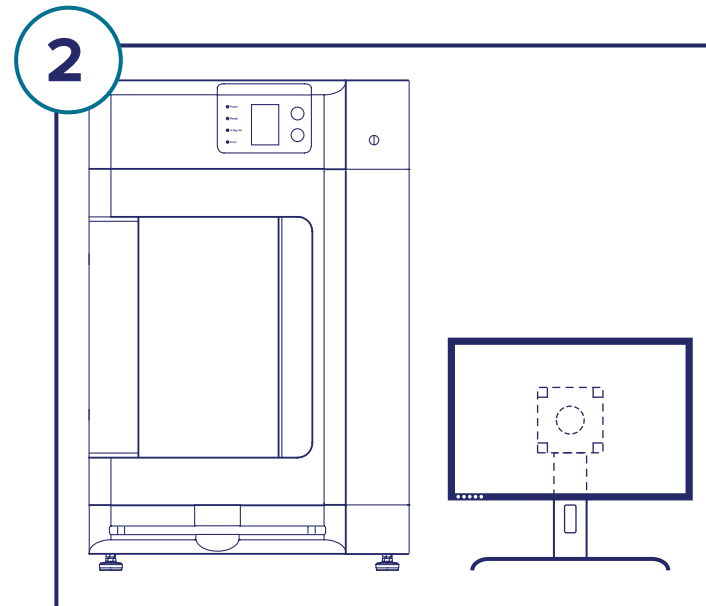

TRIN TO


Tag skærmen og stativet ud af kassen, og pak dem ud.

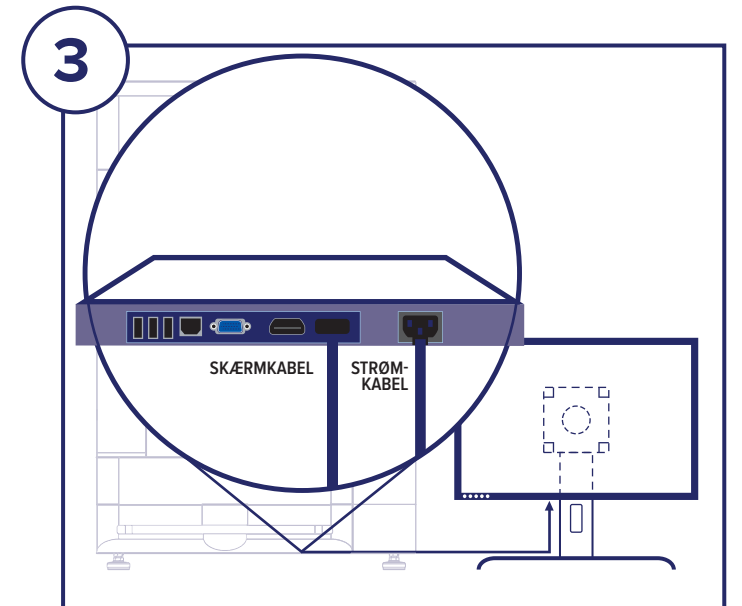

TRIN TRE


Åbn **Faxitron Path**-døren, og tag forstørrelsesbakken, computeren, tastaturet og den lille kasse med dokumenter, kabler, ledninger, nøgler og mus ud. Åbn den lille kasse, og tag alt indhold ud. Pak computeren ud, og placer den i nærheden af **Faxitron Path**-enheden og skærmen.

Slut strømkablet og skærmerkablet til skærmen. Det viste billede er en tilnærmelse og kan variere en smule.

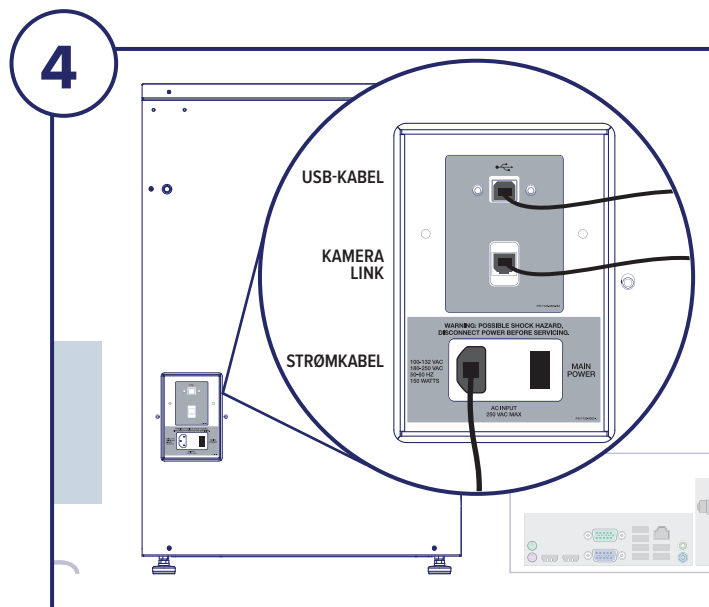

TRIN FIRE


Find USB-kablet, Ethernet-kablet og strømkablet, og tilslut dem på bagsiden af **Faxitron Path**.

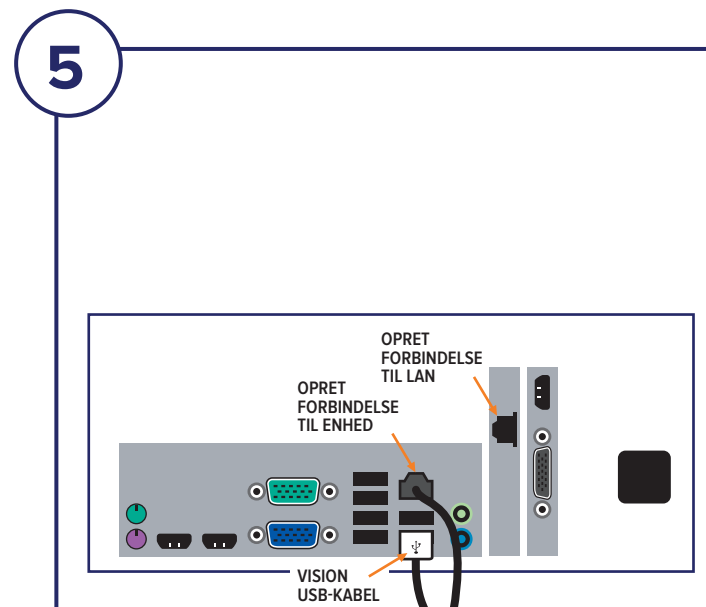

TRIN FEM

Slut de andre ender af USB- og Ethernet-kablerne til computeren.


Sørg for at sætte USB-kablet i porten "Vision USB" og slutte enhedens Ethernet-kablet til det rigtige punkt på computeren, som vist.

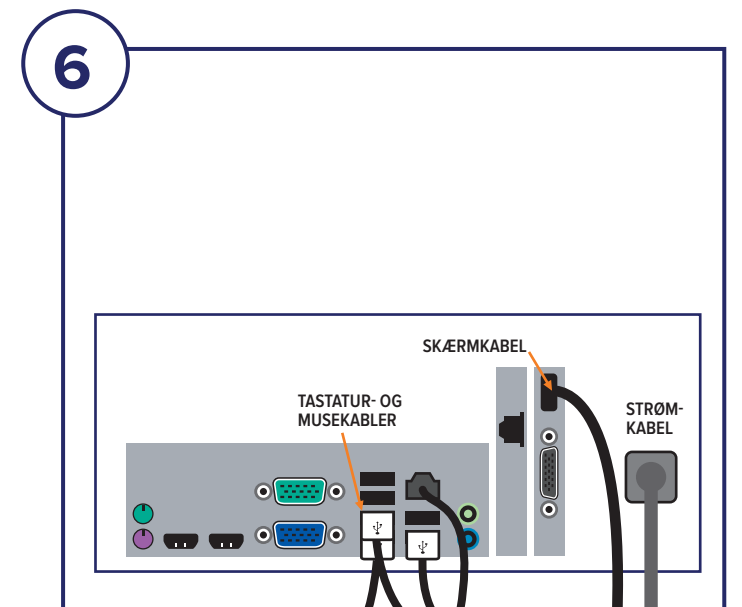

TRIN SEKS

Tilslut skærmerkablet og strømkablet bag på computeren som vist.


Pak tastaturet og musen ud. Tilslut dem bag på computeren som vist. Slut strømkablerne til computeren, skærmen og enheden til en stikkontakt.

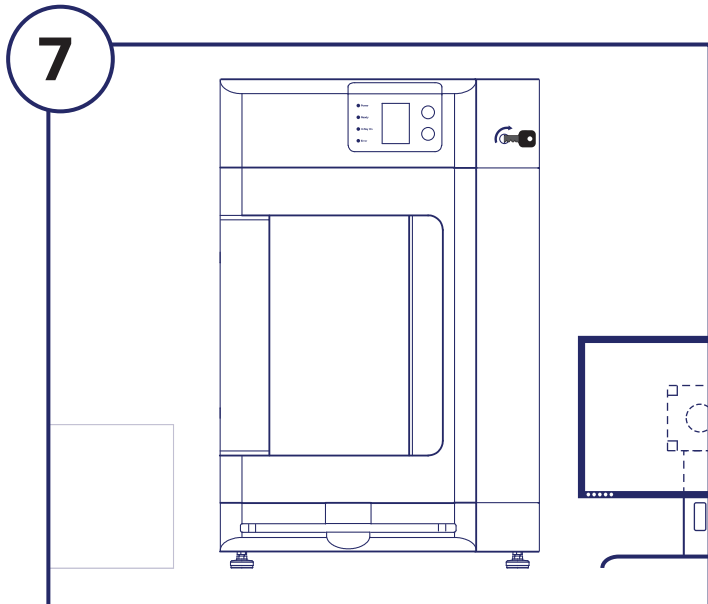

TRIN SYV

Find **Faxitron Path**-nøglerne, og sæt dem ind i nøglekontakten på forsiden af enheden.

Tænd computeren og skærmen, og vent på, at Windows starter.

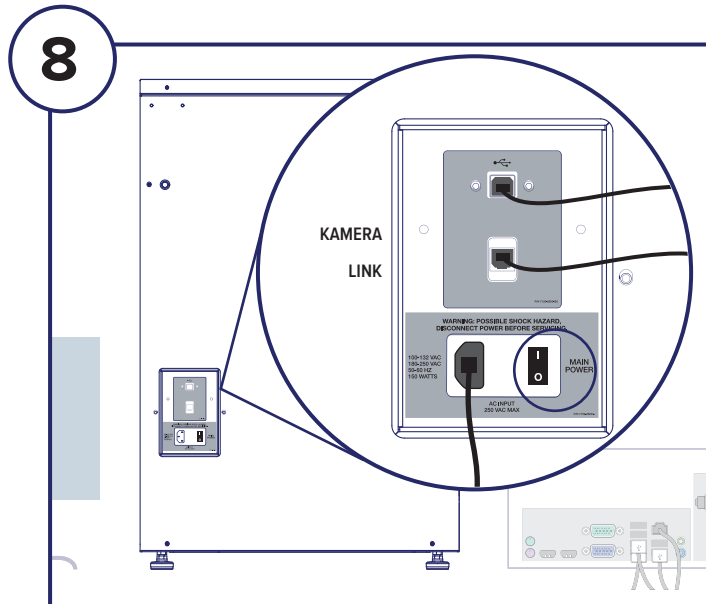

TRIN OTTE

Tænd for afbryderen på bagsiden af **Faxitron Path**-enheden.

Drej nøglen med uret til ON (TIL).

Dobbeltklik på VISION-ikonet.

Systemet registrerer **Faxitron Path**-enheden og starter automatisk kalibreringen.

For oplysninger om systemdrift henvises der til startvejledningen i dokumentpakken.

Faxitron Path-systemet er også kendt som PathVision™-systemet.

Faxitron Bioptics LLC

3440 E. Britannia Dr, Ste 150,

Tucson, AZ 85706, USA

servicedept-faxitron@hologic.com

+1 520 399 8139

www.faxitron.com/support