

# Snabbguide för installation



## Faxitron™ Path Specimen Radiography System



# Faxitron™ Path

Specimen Radiography System

## KONTROLLERA INNEHÅLLET

Faxitron Path-systemet levereras i 1 LÅDA:

## INNEHÅLL

Faxitron Path-enhet

Faxitron Path Snabbstartsguide

1 x Systemmonitor med stativ

1 x Dator

1 x Monitorokabel

1 x Tangentbord

1 x Mus

1 x Faxitron Path förstöringsbricka

2 x Nyckel

1 x USB-kabel

2 x Nätverkskabel


3 x Nätkabel

1 x Flashminne för systeminstallation  
(inkluderar användarmanual)

Kontrollera att trälåren levererades utan större synliga skador på delarna.

Om det finns skador, ring **Hologics** kundsupport på:

**+1 520 399 8139**

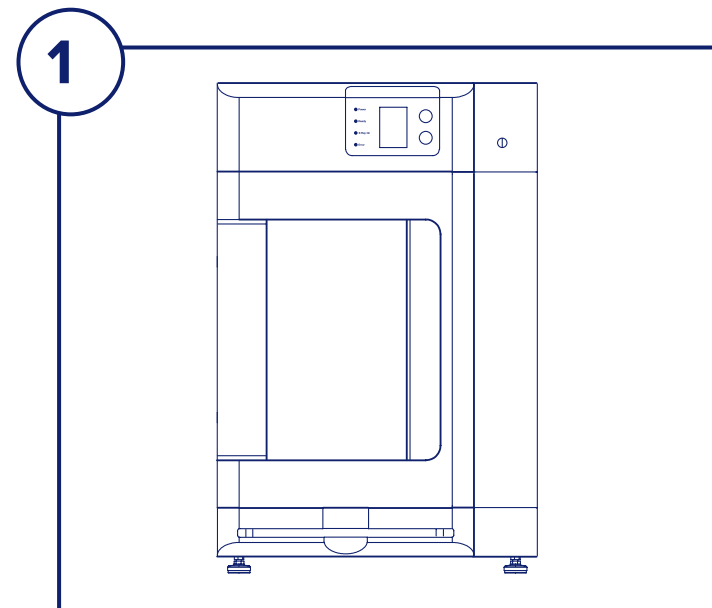


### STEG ETT

Öppna **TRÄLÅREN** och packa upp enheten.


Kontrollera **Faxitron Path** för skador (spruckna eller trasiga plastdelar, skadad LCD-skärm, etc.)

*Enheten väger ca 500 pounds [220 kg], ta hjälp av andra personer för att flytta PathVision från trälåren till önskad plats på ett säkert sätt.*

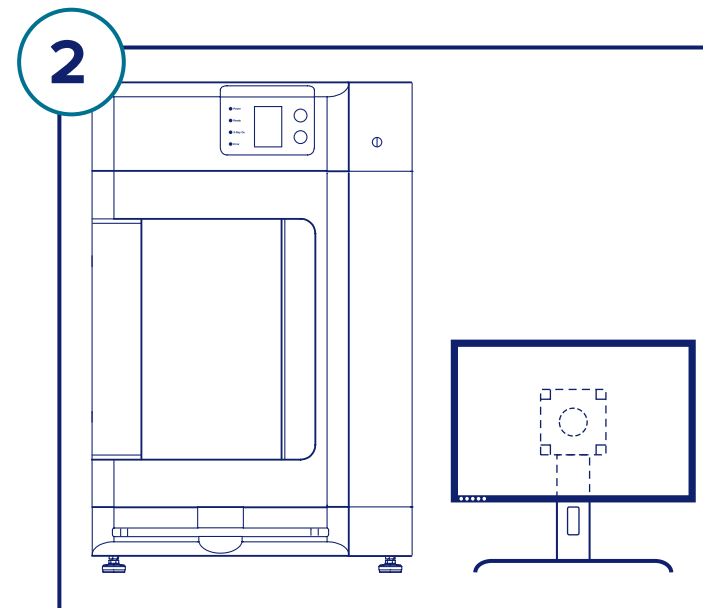

### STEG TVÅ


Lyft ur och packa upp monitor och stativ.

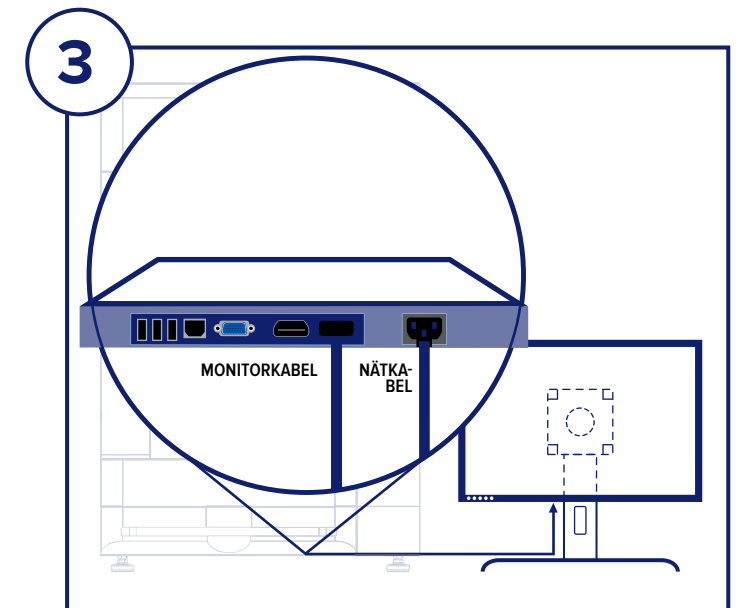

### STEG TRE


Öppna dörren på **Faxitron Path** och ta ur förstöringsbricka, dator, tangentbord, en liten låda med dokument, kablar, sladdar, nycklar samt mus. Öppna den lilla lådan och ta ur allt innehåll. Packa upp datorn och placera den nära **Faxitron Path**-enheten och monitorn.

Anslut nätkabel och monitorokabel till monitorn. Bilden som visas är ungefärlig och kan skilja sig lite från verkligheten.

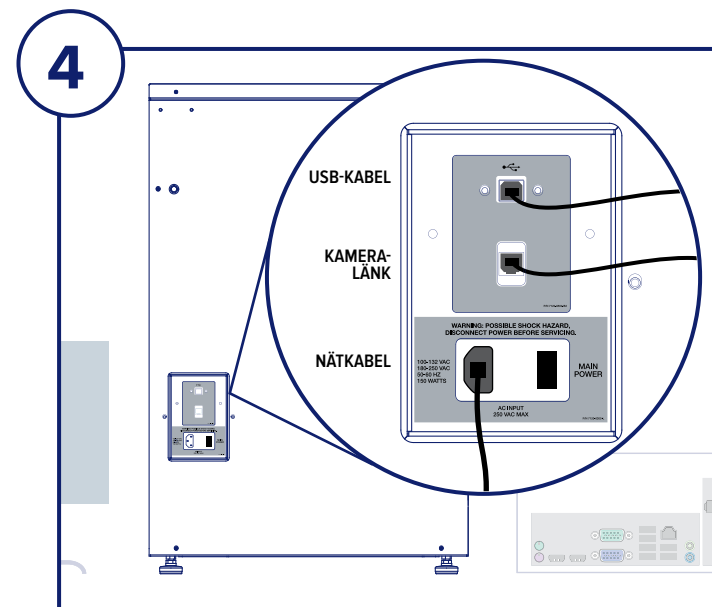

### STEG FYRA


Lokalisera USB-kabel, Ethernet-kabel och nätkabel och anslut dem på baksidan av **Faxitron Path**.

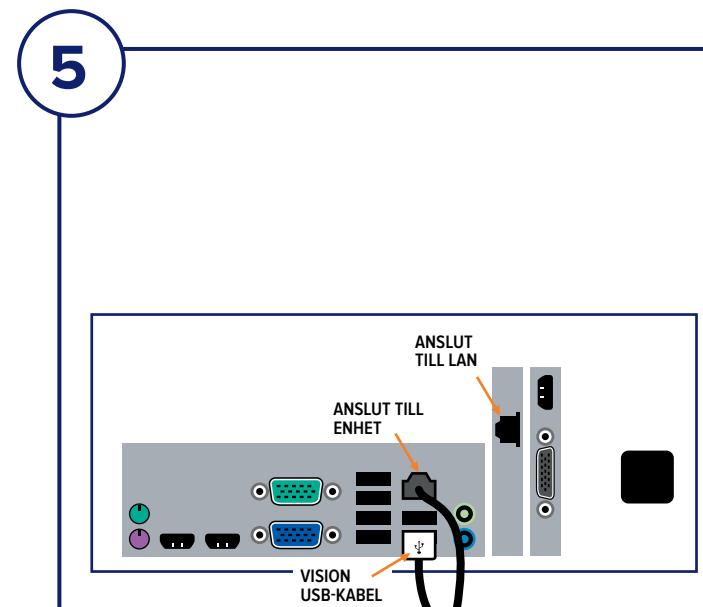

### STEG FEM

Anslut de andra ändarna av USB- och Ethernet-kablarna till datorn.

Se till att ansluta USB-kabeln till ingången märkt "Vision USB" och att ansluta enhetens Ethernet-kabeln till rätt kontakt på datorn enligt bilden.

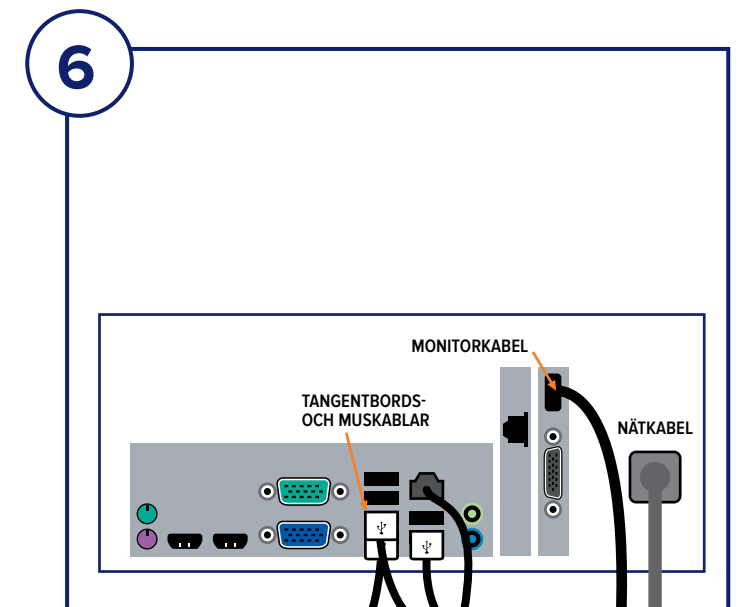


### STEG SEX

Anslut monitorokabeln och nätkabeln på baksidan av datorn enligt bilden.

Packa upp tangentbord och mus. Anslut på baksidan av datorn enligt bilden. Anslut nätkablar från dator, monitor och enhet till ett eluttag.

7

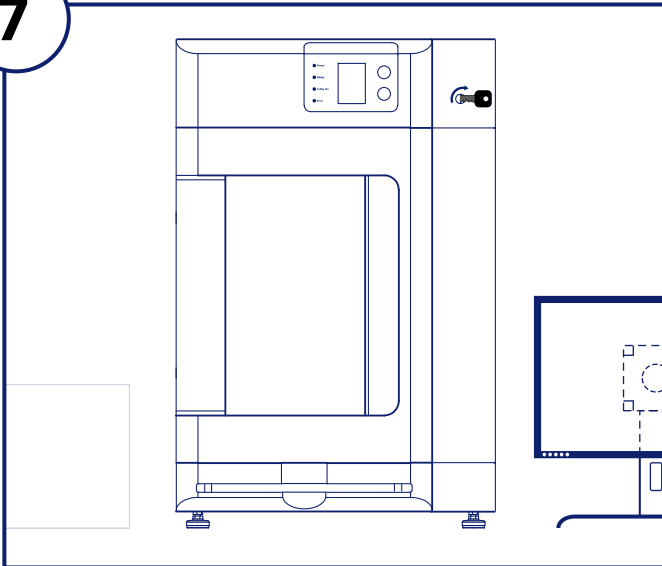


## STEG SJU

Lokalisera nycklarna till **Faxitron Path** och sätt i dem i nyckelströmbrytaren på enhetens framsida.

Slå på datorn och skärmen och vänta tills Windows har startat.

8

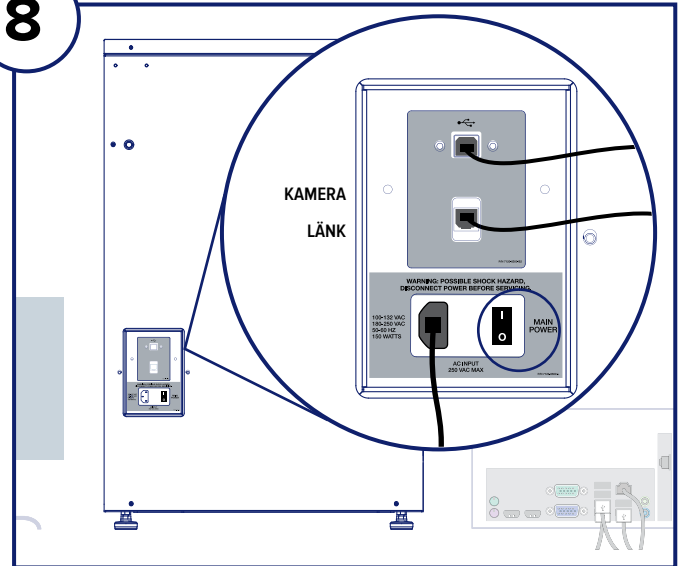

## STEG ÅTTA

Slå på strömbrytaren på baksidan av **Faxitron Path**-enheten.

Vrid nyckelströmbrytaren medurs till PÅ.

Dubbeklicka på VISION-ikonen.

Systemet kommer att detektera **Faxitron Path**-enheten och påbörjar automatiskt kalibrering.

För drift av systemet, se Snabbstartsguiden i dokumentpaketet.

*Faxitron Path-systemet är även känt som PathVision™-systemet.*



## Faxitron Bioptics LLC

3440 E. Britannia Dr, Ste 150,

Tucson, AZ 85706, USA

servicedept-faxitron@hologic.com

+1 520 399 8139

www.faxitron.com/support