

Faxitron[™] OR

Sistema de Radiografia de Espécime

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

1. INICIALIZAÇÃO

- Trave as rodas posteriores antes de proceder com a Inicialização.
- Certifique-se de que o interruptor de energia na parte posterior do gabinete do Faxitron OR* esteja na posição **“on”** [ligado]
- Pressione o botão cinza **on/off** [liga/ desliga] até um bipe sonoro ser ouvido

2. INICIAR SOFTWARE

- Verifique se não há nada na câmara de raios X do Faxitron OR.
- O software **Vision** irá iniciar automaticamente e solicitar a senha
- Insira a senha, o padrão é **“faxitron”**

3. CALIBRAR

- Será solicitado que você calibre assim que fizer o login. Pressione o botão **“Calibrate”** [Calibrar] para proceder

4. DADOS DO PACIENTE

- Inicie o procedimento
- Selecione a partir da Lista de Trabalho
- Localize o nome do paciente e clique duas vezes nele
- Insira quaisquer campos exigidos faltantes, como Lateralidade
- Aceite

CAPTURA DE IMAGENS PORRAIOS X

- Posicione o(s) espécime(s) na câmara de raios X do Faxitron OR - utilize a bandeja de aumento caso desejado
- Pressione o botão verde **x-ray** [raios X] para ativar os raios X - uma imagem irá aparecer após alguns segundos

5. MANIPULAÇÃO DE IMAGEM

- Segure o **botão esquerdo do mouse** e arraste o mouse para mudar o brilho e contraste para a função janela/ nível
- **Ajuste o zoom** para ampliar a imagem para visualização

6. ARMAZENAMENTO PARA PACS

- Escolha o botão **PACS Store** [Armazenamento de PACS] no lado esquerdo da tela

7. IMPRESSÃO

- Escolha o botão **PACS Print** [Impressão de PACS] no lado esquerdo da tela

8. DESLIGAMENTO

- Selecione o botão **System Shutdown** [Desligamento do Sistema] no lado esquerdo e então clique em **OK**
- Um bipe sonoro é ouvido quando o sistema tiver desligado completamente

"Caso você encontre uma situação em que ocorra o que segue: o sistema indica que está utilizando a bateria quando conectado à energia, o sistema emite um bipe sem qualquer entrada, o sistema desliga de forma inesperada, por favor, certifique-se de que o interruptor de energia perto do cabo de entrada de energia esteja ligado.

www.faxitron.com/support I servicedept-faxitron@hologic.com I +1520.399.8139

Sistema Faxitron OR, também conhecido como Sistema BioVision™.

05-5765-00-2300 Rev. 031 (6/19) Hologic Inc. ©2019 Todos os direitos reservados. Hologic, BioVision, Faxitron e The Science of Sure são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Hologic, Inc., e/ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. Estas informações são pretendidas para profissionais médicos nos E.U.A. e outros mercados, e não são pretendidas como uma solicitação ou promoção de produto onde essas atividades são proibidas. Uma vez que os materiais da Hologic são distribuídos por meio de websites, eBroadcasts [transmissões eletrônicas] e exposições comerciais, não é sempre possível controlar onde esses materiais aparecem. Para informações específicas sobre quais produtos estão disponíveis para