

# 3Dimensions™



## **Gebruikershandleiding**

MAN-11061-1502 Revisie 002

**HOLOGIC®**



# 3Dimensions™

Systeem voor digitale mammografie

Systeem voor digitale tomosynthese

## Gebruikershandleiding

voor softwareversie 2.3

Onderdeelnummer MAN-11061-1502

Revisie 002

Mei 2024

## **Productondersteuning**

VS: +1.877.371.4372

Europa: +32 2 711 4690

Azië: +852 37487700

Australië: +1 800 264 073

Alle Andere: +1 781 999 7750

E-mail: [BreastHealth.Support@hologic.com](mailto:BreastHealth.Support@hologic.com)

© 2024 Hologic, Inc. Gedrukt in de Verenigde Staten. Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels.

Hologic, 3Dimensions, 3D, 3D Mammography, 3DQuorum, Affirm, C-View, Dimensions, FAST Paddle, Genius, Genius AI, Hologic Clarity HD, I-View, ImageChecker, Quantra, Selenia, SmartCurve, en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Hologic, Inc., en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken en productnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Dit product kan worden beschermd door een of meer Amerikaanse of buitenlandse octrooien, zoals aangegeven op [www.Hologic.com/patent-information](http://www.Hologic.com/patent-information).



# Inhoudsopgave

Lijst van figuren .....	xi
-------------------------	----

Lijst van tabellen .....	xv
--------------------------	----

## 1: Inleiding 1

1.1	Beogd gebruik .....	1
1.1.1	Beogd gebruik 3Dimensions-systeem.....	1
1.1.2	Beogd gebruik Genius AI Detection .....	2
1.1.3	Contra-indicaties.....	2
1.2	Beschrijvingen van Waarschuwingen, aandachtspunten en opmerkingen.....	2
1.3	Beogde gebruiker.....	3
1.4	Beogde patiëntengroep .....	3
1.5	Klinische voordelen.....	3
1.6	Mogelijke ongewenste gevolgen van mammografiesystemen voor de gezondheid.....	3
1.7	Mogelijkheden van het systeem.....	4
1.8	Info over Genius 3D Mammography-onderzoek.....	4
1.9	Meer informatie over tomosynthese .....	4
1.10	Info over C-View- en Intelligent 2D-beeldvormingstechnieken.....	6
1.10.1	Waarschuwingen voor C-View- en Intelligent 2D-beeldvormingstechnieken .....	6
1.10.2	Werkingsprincipe van C-View- en Intelligent 2D-beeldvormingstechnieken.....	7
1.11	Over 3DQuorum-software.....	8
1.11.1	Waarschuwingen voor 3DQuorum-software .....	8
1.11.2	Werkingsprincipe van de 3DQuorum-software.....	9
1.12	Over Genius AI Detection-software .....	10
1.12.1	Aandachtspunten voor Genius AI Detection-software .....	11
1.13	Gebruikersprofielen.....	11
1.13.1	Mammografietechnicus .....	11
1.13.2	Radioloog.....	11
1.13.3	Medisch fysicus.....	11
1.14	Trainingsvereisten .....	12
1.15	Kwaliteitsbewakingsvereisten .....	12
1.16	Waar u instructies voor installatie kunt vinden .....	12
1.17	Waar kunt u technische beschrijvingsinformatie vinden.....	12
1.18	Garantieverklaring.....	13
1.19	Technische ondersteuning.....	13
1.20	Klachten over het product.....	13
1.21	Cybersecurity-verklaring van Hologic .....	14
1.22	Antivirusinformatie.....	14
1.23	Symbolen.....	14
1.24	Conventies voor dit document.....	18

## 2: Algemene informatie 19

2.1	Systeemoverzicht .....	19
2.1.1	Overzicht C-arm .....	20
2.2	Veiligheidsinformatie .....	20
2.3	Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.....	21
2.4	Nooduitschakelingsschakelaars.....	26
2.5	Vergrendelingen.....	26
2.6	Naleving.....	27
2.6.1	Nalevingsvereisten.....	27
2.6.2	Conformiteitsverklaringen .....	29
2.7	Locatie van systeemplakjes.....	30
<b>3: Bedieningselementen en indicatoren van het systeem</b> .....		<b>31</b>
3.1	Bedieningselementen van de systeemvoeding .....	31
3.2	Bedieningselementen en indicatoren van de buisstandaard .....	32
3.2.1	Display op buiskop.....	33
3.2.2	Bedieningselementen en display van het compressieapparaat.....	33
3.2.3	Bedieningspanelen op C-arm.....	34
3.2.4	Bedieningspanelen op gantry .....	34
3.2.5	Voetschakelaar met dubbele functie .....	35
3.3	Bedieningselementen en displays van het Universele verwervingswerkstation.....	35
<b>4: Opstarten, Functionele tests en Afsluiten</b> .....		<b>37</b>
4.1	Het systeem opstarten.....	37
4.2	Log In (Aanmelden).....	40
4.3	De functionele tests uitvoeren.....	41
4.3.1	Functionele compressietests.....	42
4.3.2	Functionele tests van de C-armbeweging .....	43
4.3.3	Collimatie.....	51
4.3.4	Paddles verschuiven.....	52
4.4	Functionaliteit nooduitschakelingsschakelaars .....	53
4.5	Het systeem uitschakelen.....	53
4.6	Het systeem spanningsloos maken .....	53
<b>5: Gebruikersinterface</b> .....		<b>55</b>
5.1	Schermbalk te voeren functie selecteren.....	55
5.2	Info over de taakbalk .....	56
5.3	Het scherm Patiënt selecteren .....	59
5.3.1	Info over het tabblad Meldingen .....	61
5.3.2	Een patiënt openen .....	61
5.3.3	Een nieuwe patiënt toevoegen.....	61
5.3.4	De patiëntinformatie bewerken .....	62
5.3.5	De patiëntendossiers scheiden.....	62
5.3.6	Een patiënt verwijderen.....	64
5.3.7	Filters voor patiënten .....	65
5.3.8	De werklijst vernieuwen.....	66

5.3.9	De werkljst doorzoeken.....	67
5.3.10	Admin (Beheer).....	67
5.3.11	Afmelden .....	67
5.3.12	Advanced Workflow Manager .....	67
5.4	Procedurescherm .....	68
5.4.1	De knop voor implantaat aanwezig gebruiken.....	69
5.4.2	De paddleverschuivingsfunctie gebruiken.....	69
5.4.3	Dialogvenster Informatie over procedure.....	70
5.4.4	Een procedure toevoegen.....	73
5.4.5	Een weergave toevoegen (of verwijderen).....	75
5.4.6	Een weergave bewerken.....	76
5.4.7	Ophalen.....	76
5.4.8	Een patiënt sluiten.....	77
5.5	De beeldbeoordelingsfuncties openen.....	78
5.6	Uitvoergroepen .....	78
5.6.1	Selecteer een uitvoergroep .....	79
5.6.2	Een uitvoergroep toevoegen of bewerken .....	79
5.6.3	SmartSlices-uitvoergroepen .....	80
5.6.4	Aangepaste uitvoer .....	81
5.7	Uitvoeren op verzoek.....	82
5.7.1	Archief.....	82
5.7.2	Exporteren .....	83
5.7.3	Afdrukken .....	84
<b>6: Beeldvorming</b>		<b>87</b>
6.1	Scherm Beeldweergave .....	87
6.2	De belichtingsparameters instellen .....	88
6.2.1	De beeldverwervingsmodus (tomosyntheseoptie) selecteren.....	88
6.2.2	De belichtingsmodus selecteren .....	88
6.2.3	De AEC-sensor gebruiken .....	88
6.3	Een beeld verwerven.....	89
6.3.1	Volgorde van gebeurtenissen bij conventionele beeldvorming.....	90
6.3.2	Volgorde van gebeurtenissen bij tomosynthesebeeldvorming.....	91
6.3.3	Een afgewezen beeld accepteren.....	91
6.3.4	Een beeld in behandeling accepteren of afwijzen .....	91
6.3.5	Helderheid huidlijn.....	92
6.4	Een beeld met een implantaat verwerven .....	92
6.4.1	Implantaat dat zich niet bij de tepel bevindt .....	93
6.4.2	Implantaat dat zich bij de tepel bevindt.....	94
6.4.3	Weergaven van verplaatst implantaat.....	96
6.4.4	Helderheid implantaat.....	97
6.5	Beelden met implantaten corrigeren en opnieuw verwerken .....	98
6.5.1	Als het beeld niet wordt geaccepteerd .....	98
6.5.2	Als het beeld wordt geaccepteerd .....	98
6.6	De beelden beoordelen.....	99

6.6.1	Tabblad Hulpmiddelen beeldbeoordeling.....	100
6.6.2	Tabblad Meldingen .....	101
6.6.3	Andere hulpmiddelen voor beeldbeoordeling.....	102
6.6.4	Projectie-indicator.....	103
6.6.5	Plakindicator .....	103
6.7	De beelden naar de uitvoerapparaten verzenden .....	103
6.8	I-View contrastversterkte 2D-beelden.....	104
6.8.1	Indicator voor buisbelasting.....	107
6.8.2	De contrastinstellingen configureren.....	109
6.9	Specimenbeelden .....	110
<b>7: Accessoires</b> .....		<b>113</b>
7.1	Accessoires installeren op de C-arm .....	113
7.2	Gezichtsschermen voor de patiënt .....	114
7.2.1	Het intrekbare gezichtsscherm installeren en verwijderen.....	114
7.2.2	Het intrekbare gezichtsscherm gebruiken.....	115
7.2.3	Het conventionele gezichtsscherm installeren en verwijderen .....	116
7.3	Compressiepaddles.....	117
7.3.1	Paddles voor routinescreening .....	118
7.3.2	Contactpaddle en spot-compressiepaddle .....	119
7.3.3	Vergrotingspaddles .....	119
7.3.4	Lokalisatiepaddles.....	120
7.3.5	Grote echografiepaddle .....	120
7.3.6	Een compressiepaddle plaatsen en verwijderen .....	121
7.3.7	Onderhoud en reiniging paddles .....	122
7.3.8	Paddleverschuiving.....	122
7.3.9	FAST-compressiemodus.....	122
7.4	Vergrotingsstandaard.....	123
7.4.1	De vergrotingsstandaard installeren en verwijderen .....	124
7.5	Apparaten met dradenkruis .....	125
7.5.1	Het lokalisatieapparaat met dradenkruis installeren en verwijderen .....	125
7.5.2	Het lokalisatieapparaat met dradenkruis gebruiken.....	126
7.5.3	Het vergrotingsapparaat met dradenkruis installeren en verwijderen .....	126
7.5.4	Het apparaat met dradenkruis uitlijnen.....	127
7.6	Instructies om het MammoPad-borstkussen aan te brengen.....	128
<b>8: Klinische procedures</b> .....		<b>131</b>
8.1	Standaard werkstroom.....	131
8.1.1	Vorbereiding .....	131
8.1.2	Op de gantry.....	132
8.1.3	Op het verwervingswerkstation.....	132
8.2	Voorbeeld van een screeningsprocedure.....	133
8.2.1	Positionering van de patiënt .....	133
8.2.2	De belichtingstechnieken instellen.....	134
8.2.3	De belichting verwerven.....	134

8.3	Procedure voor naaldlokalisatie met tomosynthese .....	135
<b>9: Onderhoud en reiniging</b> .....		<b>139</b>
9.1	Reiniging .....	139
9.1.1	Algemene informatie over reiniging .....	139
9.1.2	Voor algemene reiniging .....	139
9.1.3	Ter voorkoming van mogelijk letsel of beschadiging van apparatuur .....	140
9.1.4	Verwervingswerkstation .....	140
9.2	Onderhoud .....	142
9.2.1	Schema's voor preventief onderhoud .....	142
9.2.2	Info over vrijmaken .....	144
<b>10: Systeembeheerinterface</b> .....		<b>145</b>
10.1	Scherf Admin (Beheer) .....	145
10.2	Scherf Info .....	148
10.2.1	Tabblad Toestemming geven .....	149
10.3	De taalvoorkeur van de gebruiker wijzigen .....	150
10.4	Automatisch hangen en automatisch koppelen instellen .....	150
10.5	Tabbladen voor ingrepen met meerdere regels instellen .....	151
10.6	Het hoogtegeheugen inschakelen en instellen .....	152
10.7	De standaardhoogte inschakelen en instellen .....	154
10.8	Automatisch accepteren en Automatisch markeren als in behandeling van beelden instellen .....	156
10.9	De standaard contrastinstellingen instellen .....	157
10.10	Voorkeursinstellingen voor Genius AI Detection-software instellen .....	158
10.11	Systeemhulpmiddelen .....	160
10.11.1	Systeemhulpmiddelen voor de manager van radiologisch technologen .....	160
10.11.2	Externe toegang tot beeldrapporten .....	161
10.12	Archiveringshulpmiddel .....	164
<b>Bijlage A: Specificaties</b> .....		<b>167</b>
A.1	Meetwaarden product .....	167
A.1.1	Buisstandaard (gantry met C-arm) .....	167
A.1.2	Verwervingswerkstations .....	168
A.2	Bedrijfs- en opslagomgeving .....	170
A.2.1	Algemene bedrijfsvoorwaarden .....	170
A.2.2	Opslagomgeving .....	170
A.3	Stralingsscherf .....	171
A.4	Elektrische ingangssignalen .....	171
A.4.1	Buisstandaard .....	171
A.4.2	Verwervingswerkstation .....	171
A.5	Technische informatie buisstandaard .....	172
A.5.1	C-arm .....	172
A.5.2	Compressie .....	173
A.5.3	Röntgenbuis .....	174
A.5.4	Filtratie en uitgangssignalen röntgenbundel .....	174

A.5.5	Collimatie röntgenbundel.....	176
A.5.6	Indicatie lichtveld .....	176
A.5.7	Röntgengenerator .....	176
A.6	Technische informatie beeldsysteem.....	177
A.6.1	Beeldreceptor.....	177
<b>Bijlage B: Systeem- en waarschuwingsberichten</b> .....		<b>179</b>
B.1	Foutenherstel en probleemoplossing .....	179
B.2	Typen berichten.....	179
B.2.1	Foutniveaus .....	179
B.2.2	Systeemberichten .....	180
B.3	UPS-berichten .....	182
<b>Bijlage C: Gebruik van het mobiele systeem</b> .....		<b>183</b>
C.1	Voorwaarden voor veiligheid en andere voorzorgsmaatregelen.....	183
C.2	Specificaties voor mobiel gebruik.....	184
C.2.1	Schok- en vibratielimieten.....	184
C.2.2	Busomgeving.....	185
C.3	Elektrische ingangssignalen .....	185
C.3.1	Gantry.....	185
C.3.2	Verwervingswerkstation .....	185
C.4	Het systeem voorbereiden voor vervoer .....	186
C.5	Het systeem voorbereiden voor gebruik .....	188
C.6	Het systeem testen na vervoer .....	189
C.6.1	Bedieningselementen mobiele systeem en functionele tests .....	189
C.6.2	Kwaliteitscontrole voor mobiele systemen .....	189
<b>Bijlage D: Dosisinformatie</b> .....		<b>191</b>
D.1	EUREF-dosistabellen .....	191
D.2	EUREF CNR-tabel.....	192
<b>Bijlage E: Lijst met licenties en accessoires</b> .....		<b>193</b>
<b>Verklarende woordenlijst</b> .....		<b>195</b>
<b>Index</b> .....		<b>197</b>

## Lijst van figuren

Figuur 1: 3Dimensions™-systeem.....	19
Figuur 2: Overzicht C-arm.....	20
Figuur 3: Functionaliteit nooduitschakelingsschakelaar.....	26
Figuur 4: Locatie van het systeemblad voor de gantry.....	30
Figuur 5: Locatie van het systeemblad voor de gantry voor het universele verwervingswerkstation.....	30
Figuur 6: Bedieningselementen van de systeemvoeding.....	31
Figuur 7: Bedieningselementen en indicatoren van de buisstandaard.....	32
Figuur 8: Display op buiskop.....	33
Figuur 9: Compressieapparaat.....	33
Figuur 10: Display van compressieapparaat.....	33
Figuur 11: Bedieningspaneel op C-arm.....	34
Figuur 12: Bedieningspaneel op gantry.....	34
Figuur 13: Voetschakelaar met dubbele functie.....	35
Figuur 14: Bedieningselementen en displays van het Universele verwervingswerkstation.....	36
Figuur 15: Draaien om de nooduitschakelingsschakelaars te resetten.....	37
Figuur 16: Aan/uit-knoppen Universeel verwervingswerkstation.....	37
Figuur 17: Scherm Windows 10 Login (Aanmelden bij Windows 10).....	38
Figuur 18: Scherm Startup (Opstarten).....	39
Figuur 19: Aanmeldscherm van systeem.....	40
Figuur 20: Bedieningspaneel op C-arm (afgebeeld is de linker zijde).....	41
Figuur 21: Functionaliteit nooduitschakelingsschakelaar.....	53
Figuur 22: Aan/uit-knoppen Universeel verwervingswerkstation.....	53
Figuur 23: Een voorbeeld van het scherm Uit te voeren functie selecteren.....	55
Figuur 24: Taakbalk.....	56
Figuur 25: Het scherm Patiënt selecteren.....	59
Figuur 26: Het tabblad Onderneming.....	60
Figuur 27: Patiëntscherm toevoegen.....	61
Figuur 28: Het scherm Patiëntendossiers scheiden.....	62
Figuur 29: Selecteer de juiste procedure om patiëntendossiers te scheiden.....	64
Figuur 30: Tabblad Filter in het scherm Patiëntfilter.....	65
Figuur 31: Procedurescherm.....	68
Figuur 32: Knoppen voor paddleverschuiving.....	70
Figuur 33: Dialoogvenster Informatie over procedure.....	70
Figuur 34: Het tabblad Genius AI Detection.....	72
Figuur 35: Dialoogvenster Procedure toevoegen.....	73
Figuur 36: Het scherm Weergave toevoegen.....	75
Figuur 37: Het scherm Edit View (Weergave bewerken).....	76
Figuur 38: Veld Uitvoergroepen.....	79
Figuur 39: Voorbeeld van instellingen voor uitvoerapparaten.....	81
Figuur 40: Voorbeeld van een aangepaste uitvoergroep.....	81
Figuur 41: De beelden voor export selecteren.....	83
Figuur 42: Dialoogvenster Exporteren.....	83

Figuur 43: Afdrukscherm.....	84
Figuur 44: Scherm Beeldweergave (optie SmartSlices weergegeven) .....	87
Figuur 45: Belichting actief .....	89
Figuur 46: Belichting voltooid.....	89
Figuur 47: Gemarkeerde beelden in een procedure .....	90
Figuur 48: Vergelijking van standaard helderheid en verminderde helderheid .....	92
Figuur 49: Vergelijking van standaard helderheid en verminderde helderheid .....	97
Figuur 50: Tabblad Tools (Hulpmiddelen) (weergegeven is de tomosyntheseoptie) .....	99
Figuur 51: Hulpmiddelen voor het beoordelen van beelden.....	100
Figuur 52: Hulpmiddelen op het tabblad Meldingen.....	101
Figuur 53: Blootstellingsindex.....	102
Figuur 54: Weergavemodi .....	102
Figuur 55: Projectie-indicator .....	103
Figuur 56: Plakindicator (optie SmartSlice weergegeven) .....	103
Figuur 57: Scherm van I-View 2D Contrast.....	104
Figuur 58: Scherm van I-View 2D Contrast, wachtperiode .....	105
Figuur 59: Scherm van I-View 2D Contrast, optimale beeldvormingsperiode .....	106
Figuur 60: Instellingen van I-View 2D Contrast.....	109
Figuur 61: Procedurescherm voor specimen.....	110
Figuur 62: Specimenbeeldvormingsscherm .....	111
Figuur 63: Accessoires van de C-arm.....	113
Figuur 64: Het intrekbare gezichtsscherm uitlijnen met de C-arm.....	114
Figuur 65: Installatie van het gezichtsscherm.....	115
Figuur 66: Bediening van het gezichtsscherm .....	115
Figuur 67: Het conventionele gezichtsscherm installeren.....	116
Figuur 68: Een compressiepaddle plaatsen .....	121
Figuur 69: Een compressiepaddle verwijderen .....	121
Figuur 70: Het schuifje van de FAST-compressiemodus .....	123
Figuur 71: Installatie van de vergrotingsstandaard .....	124
Figuur 72: Installatie van het lokalisatieapparaat met dradenkruis .....	125
Figuur 73: Het vergrotingsapparaat met dradenkruis installeren en verwijderen.....	126
Figuur 74: MammoPad aangebracht op het borstplatform.....	128
Figuur 75: MammoPad verwijderen van het borstplatform.....	129
Figuur 76: MammoPad verwijderen van het borstplatform(vervolg).....	129
Figuur 77: Voorbeeld van een screeningprocedurescherm.....	133
Figuur 78: Belichting actief .....	134
Figuur 79: Belichting voltooid.....	135
Figuur 80: Naalddiepte berekenen .....	137
Figuur 81: Scherm Admin (Beheer).....	145
Figuur 82: Tabblad Systeem van het scherm Info (het verwervingswerkstation) .....	148
Figuur 83: Tabblad Toestemming geven van het scherm Info .....	149
Figuur 84: Automatisch hangen en automatisch koppelen inschakelen.....	151
Figuur 85: Tabbladen voor ingrepen met meerdere regels inschakelen .....	152
Figuur 86: De knop Mijn instellingen in het scherm Admin (Beheer).....	152
Figuur 87: Tabblad Console van het scherm Operator bewerken.....	153



Figuur 88: Bedieningspaneel hoogteaanpassing .....	153
Figuur 89: Velden Gewenste consolehoogte en Huidige consolehoogte .....	153
Figuur 90: De knop Voorkeuren in het scherm Admin (Beheer) .....	154
Figuur 91: Tabblad Console van het scherm System Preferences (Systeemvoorkeuren) .....	154
Figuur 92: Bedieningspaneel hoogteaanpassing .....	155
Figuur 93: Velden Desired Console Height (Gewenste consolehoogte) en Current Console Height (Huidige consolehoogte) .....	155
Figuur 94: Automatische ordening beelden instellen.....	156
Figuur 95: Standaardinstellingen van I-View 2D Contrast.....	157
Figuur 96: Automatische selectie voor Genius AI-softwarecasusverwerking .....	158
Figuur 97: Automatische selectie voor Genius AI-softwarecasusverwerking .....	159
Figuur 98: Gebruikersselectie voor Genius AI Detection--softwarecasusverwerking .....	159
Figuur 99: De knop System Tools (Systeemhulpmiddelen).....	160
Figuur 100: Het scherm Systeemhulpmiddelen .....	160
Figuur 101: Het scherm 'Aanmelden bij systeemhulpmiddelen' .....	162
Figuur 102: Het scherm 'Welkom bij systeemhulpmiddelen' .....	162
Figuur 103: Parameters voor het beeldrapport maken.....	163
Figuur 104: Het beeldrapport downloaden.....	163
Figuur 105: Knop Archief .....	164
Figuur 106: Scherm Meerdere patiënten op aanvraag archiveren .....	164
Figuur 107: Exportscherm .....	166
Figuur 108: Afmetingen buisstandaard (gantry met C-arm) .....	167
Figuur 109: Afmetingen universeel verwervingswerkstation .....	168
Figuur 110: Afmetingen mobiel universeel verwervingswerkstation.....	169
Figuur 111: LCD-scherm UPS .....	182
Figuur 112: Vergrendelingsknop toetsenbordlade (rechts of links) .....	186
Figuur 113: Vrijgave van ladevergrendeling van vergrendeld (A) tot ontgrendeld (D) .....	186
Figuur 114: Vergrendelingsknoppen zwenkbare monitor op het mobiele Universele verwervingswerkstation (serie I).....	187
Figuur 115: Vergrendelingsknoppen zwenkbare monitor op het mobiele Universele verwervingswerkstation (serie II).....	187
Figuur 116: Vrijgave van ladevergrendeling van vergrendeld (A) tot ontgrendeld (D) .....	188
Figuur 117: Vergrendelingsknoppen zwenkbare monitor op het mobiele Universele verwervingswerkstation (serie I) .....	188
Figuur 118: Vergrendelingsknoppen zwenkbare monitor op het mobiele Universele verwervingswerkstation (serie II).....	188



## Lijst van tabellen

Tabel 1: Compressietests.....	42
Tabel 2: Beweging omhoog en omlaag van de C-arm .....	43
Tabel 3: Rotatie linksom van C-arm .....	45
Tabel 4: Rotatie rechtsom van C-arm .....	46
Tabel 5: Rotatieschakelaar van C-arm.....	47
Tabel 6: Automatische rotatie linksom van C-arm.....	48
Tabel 7: Automatische rotatie rechtsom van C-arm.....	49
Tabel 8: Automatische MLO-rotatie .....	50
Tabel 9: Collimatie C-arm.....	51
Tabel 10: Paddle verschuiven.....	52
Tabel 11: Taakbalkmenu's.....	56
Tabel 12: Het scherm Patiënt selecteren .....	59
Tabel 13: Opties van het tabblad Filter (Toegangsmachtigingen vereist).....	66
Tabel 14: Het procedurescherm .....	68
Tabel 15: Proceduregroepen.....	74
Tabel 16: Uitvoergroepen voor 3DQuorum-software.....	80
Tabel 17: Instellingen uitvoerapparaten voor 3DQuorum-software .....	80
Tabel 18: Conventionele 2D-beeldvorming.....	95
Tabel 19: Tomosynthesebeeldvorming .....	95
Tabel 20: Beeldvorming met contrastversterking (I-View) .....	95
Tabel 21: Beschikbare accessoires .....	117
Tabel 22: Preventief onderhoud door de gebruiker .....	142
Tabel 23: Preventief onderhoud door de onderhoudstechnicus .....	143
Tabel 24: Functies van het scherm Admin (Beheer).....	146
Tabel 25: Manager van radiologisch technologen—Functies van systeemhulpmiddelen.....	161
Tabel 26: Maximale mA-instelling als functie van kV .....	174
Tabel 27: Systeemberichten .....	180
Tabel 28: 2D Dose (EUREF) .....	191
Tabel 29: BT-dosis (EUREF).....	191
Tabel 30: CEDM-dosis (EUREF) .....	192
Tabel 31: Licenties en accessoires .....	193



## Hoofdstuk 1 Inleiding

Lees deze informatie zorgvuldig door alvorens het systeem te gebruiken. Neem alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding in acht. Houd deze handleiding tijdens procedures bij de hand. Artsen dienen patiënten te informeren over alle potentiële risico's en bijwerkingen die in deze handleiding met betrekking tot het gebruik van het systeem worden beschreven.



---

**Opmerking**

Hologic configureert bepaalde systemen zodanig dat deze aan specifieke vereisten voldoen. Uw systeemconfiguratie beschikt mogelijk niet over alle opties en accessoires die in deze handleiding worden genoemd.

---



---

**Opmerking**

De in deze handleiding vermelde functies zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar. Voor informatie kunt u contact opnemen met uw Hologic-vertegenwoordiger.

---

### 1.1 Beoogd gebruik

Rx Only

Let op: Krachtens de federale wetgeving in de Verenigde Staten mag dit product alleen door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

#### 1.1.1 Beoogd gebruik 3Dimensions-systeem

Het Hologic® 3Dimensions™-systeem genereert digitale mammografiebeelden die kunnen worden gebruikt voor screening op en diagnosticering van borstkanker. Het 3Dimensions (2D of 3D)-systeem is bestemd voor gebruik bij dezelfde klinische toepassingen als een 2D-mammografiesysteem voor screeningsmammogrammen. Het 3Dimensions-systeem kan met name worden gebruikt voor het genereren van digitale 2D-mammogrammen en 3D-mammogrammen. Elk screeningsonderzoek bestaat uit:

- een set 2D FFDM-beelden, of
- een set 2D- en 3D-beelden, waarbij het 2D-beeld ofwel een FFDM-beeld ofwel een uit de set 3D-beelden gegenereerd 2D-beeld kan zijn en de set 3D-beelden kan worden bekeken als 3D-plakken van 1 mm of 3D-SmartSlices van 6 mm.

Het 3Dimensions-systeem kan ook worden gebruikt voor aanvullend diagnostisch onderzoek van de borst.



---

**Opmerking**

In Canada en Singapore is tomosynthese niet goedgekeurd voor screening en moet het systeem worden gebruikt samen met een 2D-beeld (een FFDM-beeld of een 2D-beeld gegenereerd uit de 3D-beeldenset).

---

### Contrastversterkte digitale mammografie

Contrastversterkte digitale mammografie (CEDM) is een uitbreiding van de bestaande indicatie voor diagnostische mammografie met het 3Dimensions-systeem. De CEDM-toepassing maakt contrastversterkte beeldvorming van de borst mogelijk met een techniek die gebruik maakt van twee energieën. Deze beeldvormingstechniek kan als hulpmiddel worden gebruikt na mammografie- en/of echografieonderzoek om een bekende of vermoede laesie te lokaliseren.

### 1.1.2 Beoogd gebruik Genius AI Detection

Genius AI® Detection is een computerondersteund apparaat met detectie- en diagnosesoftware (CADe/CADx) dat bestemd is voor gebruik met compatibele digitale borsttomosynthesesystemen (DBT-systemen) om aandachtsgebieden vast te stellen en te markeren, met inbegrip van de dichtheid van zacht weefsel (massa's, architecturale vervormingen en asymmetrie) en verkalking, tijdens het lezen van DBT-onderzoeken van compatibele DBT-systemen en voor het verstrekken van betrouwbaarheidsscores waarmee de zekerheid van de resultaten kan worden beoordeeld en een case-score. Het apparaat is bedoeld voor ondersteuning bij de interpretatie van digitale borsttomosynthese-onderzoeken, waarbij de arts die de gegevens beoordeelt de resultaten tijdens het aflezen van het onderzoek bevestigt of afwijst.

### 1.1.3 Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

## 1.2 Beschrijvingen van Waarschuwingen, aandachtspunten en opmerkingen

Beschrijvingen van waarschuwingen, aandachtspunten en opmerkingen die in deze handleiding worden gebruikt:



---

#### **WAARSCHUWING!**

**De procedures die u zorgvuldig moet opvolgen om mogelijk gevaarlijk of dodelijk letsel te voorkomen.**

---



---

#### **Waarschuwing:**

**De procedures die u nauwkeurig moet opvolgen om letsel te voorkomen.**

---



---

#### **Aandachtspunt:**

**De procedures die u nauwkeurig moet opvolgen om schade aan apparatuur, gegevensverlies of schade aan bestanden in softwaretoepassingen te voorkomen.**

---



---

#### **Opmerking**

Opmerkingen geven aanvullende informatie weer.

---

### 1.3 Beoogde gebruiker

Gekwalificeerd, technisch opgeleid personeel plaatst de patiënt en bedient het apparaat (zoals een mammografietechnoloog), kalibreert het apparaat (zoals een medisch fysicus) en interpreteert het door het apparaat geproduceerde beeldmateriaal (zoals een radioloog).

### 1.4 Beoogde patiëntengroep

Asymptomatische patiënten met een gemiddeld of bovengemiddeld risico op borstkanker moeten borstkankerscreening ondergaan. Van deze patiënten met symptomen van borstkanker of met abnormale bevindingen tijdens een screeningsonderzoek moet ook radiografisch beeldmateriaal worden gemaakt met behulp van dezelfde of vergelijkbare modaliteiten. Gekwalificeerd, medisch opgeleid personeel beslist op basis van gezamenlijke besluitvorming met de patiënt en, in sommige gevallen, de zorgverlener of een radiografisch onderzoek geïndiceerd is op basis van de leeftijd, gezondheidstoestand en fysieke conditie van de patiënt.

### 1.5 Klinische voordelen

Op populatie gebaseerde mammografiescreening is de beste methode om borstkanker op te sporen voordat de symptomen optreden en het is de enige methode waarvan bewezen is dat deze methode het sterftecijfer verlaagt.

### 1.6 Mogelijke ongewenste gevolgen van mammografiesystemen voor de gezondheid

In onderstaande lijst worden de mogelijke ongewenste gevolgen (zoals complicaties) van het gebruik van dit instrument vermeld (deze risico's zijn vergelijkbaar met die van andere röntgenfilmcassette- of digitale mammografiesystemen):

- Te sterke compressie van de borst
- Overmatige blootstelling aan röntgenstraling
- Elektrische schok
- Infectie
- Huidirritatie, ontvelde plekken of punctiewonden

### 1.7 Mogelijkheden van het systeem

Het systeem biedt de gebruikersinterfaces voor het uitvoeren van screenings- en diagnostische mammogrammen:

- Conventionele mammografie met een digitale beeldreceptor die qua grootte gelijkwaardig is aan grote mammografiefilm.
- Tomosynthesescan met een digitale beeldreceptor die qua grootte gelijkwaardig is aan grote mammografiefilm (tomosyntheseoptie).
- Conventioneel digitaal mammogram en tomosynthesescan tijdens één compressie (tomosyntheseopties).

### 1.8 Info over Genius 3D Mammography-onderzoek

Het Genius<sup>®</sup> 3D Mammography<sup>™</sup>-onderzoek (ook bekend als het Genius<sup>®</sup>-onderzoek) wordt uitgevoerd met een Hologic<sup>®</sup> 3D Mammography<sup>™</sup>-systeem en heeft een 2D- en 3D<sup>™</sup>-beeldset. Het 2D-beeld kan een verworven 2D zijn of een 2D-beeld dat is gegenereerd op basis van de 3D<sup>™</sup>-beeldset. Het Genius<sup>®</sup>-onderzoek is alleen beschikbaar op een Hologic<sup>®</sup> 3D Mammography<sup>™</sup>-systeem.

Genius<sup>®</sup> 3D Mammography<sup>™</sup> is de merknaam van een Hologic<sup>®</sup> 3D Mammography<sup>™</sup>-onderzoek en is mogelijk niet overal verkrijgbaar.

### 1.9 Meer informatie over tomosynthese

Het Hologic Selenia Dimensions-systeem heeft op 11 februari 2011 goedkeuring van de FDA gekregen voor de Hologic-tomosyntheseoptie (PMA-nummer P080003). Deze FDA-goedkeuring betreft screenings- en diagnostische beeldvorming. Meer informatie kunt u vinden op de website van de FDA op

<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003>.

De gegenereerde 2D-optie (C-View) in combinatie met tomosynthese heeft goedkeuring van de FDA gekregen op 16 mei 2013 (PMA-nummer P080003 S001). Meer informatie kunt u vinden op de website van de FDA op

<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003S001>.

Een lijst met wetenschappelijke publicaties over borsttomosynthese is beschikbaar op de website van Hologic. Het grootste deel van de studies werd uitgevoerd met het in de handel gebrachte Selenia Dimensions-tomosynthesesysteem van Hologic. Bekijk de publicatie op <http://www.hologic.com/sites/default/files/Tomo-Bibliography-Rev-13.pdf>.

De website van Hologic bevat een aantal witboeken en samenvattingskaarten over publicaties die betrekking hebben op beeldvorming van de borst. Bekijk de documenten op <http://www.hologic.com/en/learning-center/white-papers/breastimaging/>.

Er zijn onafhankelijke publicaties verschenen waarin het gebruik van Selenia Dimensions-tomosynthesesystemen van Hologic is onderzocht bij screeningsreeksen op bevolkingsniveau in Europa. Resultaten laten consequent een significante toename van het ontdekkingspercentage voor invasieve kanker zien en tegelijkertijd een vermindering van het aantal vals-positieven. De volgende publicaties worden aanbevolen.



**Integration of 3D digital mammography with tomosynthesis for population breast-cancer screening (STORM): a prospective comparison study.**

Ciatto S, Houssami N, Bernardi D, Caumo F, Pellegrini M, Brunelli S, Tuttobene P, Bricolo P, Fantò C, Valentini M, Montemezzi S, Macaskill P.

Lancet Oncol. 2013 Jun;14(7):583-9. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70134-7. Epub 2013 Apr 25.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23623721>

**Prospective trial comparing full-field digital mammography (FFDM) versus combined FFDM and tomosynthesis in a population-based screening programme using independent double reading with arbitration.**

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Hofvind S.

Eur Radiol. 2013 Aug;23(8):2061-71. doi: 10.1007/s00330-013-2820-3. Epub 2013 Apr 4.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553585>

**Comparison of digital mammography alone and digital mammography plus tomosynthesis in a population-based screening program.**

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Niklason LT, Hofvind S, Gur D.

Radiology. 2013 Apr;267(1):47-56. doi: 10.1148/radiol.12121373. Epub 2013 Jan 7.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23297332>

**Two-view digital breast tomosynthesis screening with synthetically reconstructed projection images: comparison with digital breast tomosynthesis with full-field digital mammographic images.**

Skaane P, Bandos AI, Eben EB, Jebsen IN, Krager M, Haakenaasen U, Ekseth U, Izadi M, Hofvind S, Gullien R.

Radiology. 2014 Jun;271(3):655-63. doi: 10.1148/radiol.13131391. Epub 2014 Jan 24

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484063>

**Breast Cancer Screening Using Tomosynthesis in Combination With Digital Mammography**

Sarah M. Friedewald, MD1; Elizabeth A. Rafferty, MD2; Stephen L. Rose, MD3,4; Melissa A. Durand, MD5; Donna M. Plecha, MD6; Julianne S. Greenberg, MD7; Mary K. Hayes, MD8; Debra S. Copit, MD9; Kara L. Carlson, MD10; Thomas M. Cink, MD11; Lora D. Barke, MD12; Linda N. Greer, MD13; Dave P. Miller, MS14; Emily F. Conant, MD15

JAMA. 2014;311(24):2499-2507. doi:10.1001/jama.2014.6095

<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1883018>



**BELANGRIJK:**

Hologic beveelt gebruikers met nadruk aan om zichzelf vertrouwd te maken met plaatselijke of regionale voorschriften. Deze voorschriften kunnen beperkingen opleggen voor verschillende typen klinisch gebruik. Aangezien de voorschriften in de loop van de tijd kunnen veranderen, wordt geadviseerd deze periodiek te bekijken.

---

### 1.10 Info over C-View- en Intelligent 2D-beeldvormingstechnieken

---



#### Opmerking

Intelligent 2D™-beeldvormingstechnologie is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar. Neem voor informatie contact op met uw servicevertegenwoordiger.

---

De C-View™- en Intelligent 2D™-software maakt gebruik van beschikbare beeldgegevens van een borsttomosyntheseverwerving om één digitaal mammogram (2D) per borsttomosyntheseverwerving te genereren. Bij het maken van het gesynthetiseerde 2D-beeld is geen aanvullende blootstelling aan digitale mammografie nodig. Het gesynthetiseerde 2D-beeld is zo vormgegeven dat het er hetzelfde uitziet en hetzelfde doel dient als een digitaal mammogram (2D) wanneer het wordt gebruikt als onderdeel van een screeningsonderzoek waarbij tomosynthese wordt toegepast. Het C-View- of Intelligent 2D-beeld wordt geïnterpreteerd in combinatie met een set borsttomosynthesebeelden en dient zonder de bijbehorende borsttomosynthesebeelden niet te worden gebruikt voor klinische beslissingen of diagnoses.

#### 1.10.1 Waarschuwingen voor C-View- en Intelligent 2D-beeldvormingstechnieken

---



#### Waarschuwing:

**Neem geen klinische beslissing en stel geen diagnose op basis van de C-View- of Intelligent 2D-beelden zonder de bijbehorende tomosynthesebeeldenset te beoordelen.**

---

Als u een screeningsonderzoek uitvoert waarbij van tomosynthese wordt gebruikgemaakt, gebruikt u de met C-View of Intelligent 2D gesynthetiseerde 2D-beelden op dezelfde wijze als bij conventionele digitale mammografie (2D).

- Vergelijk de C-View of Intelligent 2D-beelden tijdens het beoordelen van de te onderzoeken onderdelen of gebieden, met een eerder gemaakt digitaal mammogram (2D), indien aanwezig, en beoordeel vervolgens de bijbehorende tomosynthesebeelden zorgvuldig.
- Onderzoek de gehele tomosynthesebeeldenset voordat u een klinische beslissing neemt.



#### Waarschuwing:

**Een met C-View of Intelligent 2D gesynthetiseerd 2D-beeld kan er anders uitzien dan een conventioneel digitaal (2D) mammografiebeeld, net zoals 2D-films en digitale (2D) mammografiebeelden van verschillende leveranciers ook van elkaar kunnen afwijken.**

---

Gebruikers moeten voldoende zijn getraind en bekend zijn met C-View en Intelligent 2D gesynthetiseerde 2D-beelden en hoe deze eruit zien en worden weergegeven alvorens deze in combinatie met tomosynthesebeeldensets te gebruiken.

### **1.10.2 Werkingsprincipe van C-View- en Intelligent 2D-beeldvormingstechnieken**

#### **Overzicht**

De C-View- en Intelligent 2D-software is een beeldverwerkingstoepassing voor naverwerking van pixelgegevens afkomstig van tomosynthesegegevens, die zijn vastgelegd op een Hologic-tomosynthesebeeldvormingssysteem, tot een digitaal (2D) mammografiebeeld. Het met C-View of Intelligent 2D gesynthetiseerde 2D-beeld kan in plaats van een digitaal mammogram (2D) worden gebruikt als onderdeel van een screeningsonderzoek waarbij van tomosynthese wordt gebruikgemaakt.

De C-View- en Intelligent 2D-software verwerkt tomosynthesegegevens om 2D-beelden te genereren die er hetzelfde uitzien en hetzelfde doel dienen als een digitaal (2D) mammogram wanneer deze worden gebruikt als onderdeel van een screeningsonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van tomosynthese.

#### **Configuratie**

De C-View- en Intelligent 2D-software bevat geen door de gebruiker configureerbare instellingen die van invloed zijn op de weergave van de resulterende gesynthetiseerde 2D-beelden. C-View- en Intelligent 2D-beelden worden in DICOM-indeling voor borsttomosynthesebeelden, als enkele dikke plak, of in DICOM-indeling voor digitale mammografieröntgenbeelden gegenereerd. De PACS-beheerder van de instelling kan in overleg met technici van Hologic die zijn belast met connectiviteit de uitvoerindeling kiezen die het meest geschikt is voor de IT-infrastructuur en de werkstations van de instelling. De DICOM-koptekst van elk C-View- of Intelligent 2D-beeld bevat de benodigde informatie om het te onderscheiden van eventuele begeleidende conventionele 2D-beelden of tomosynthesebeeldensets in dezelfde weergave. Er wordt ook een annotatie ('C-View' of 'Intelligent 2D') op de pixelgegevens van het gesynthetiseerde 2D-beeld gebrand.

#### **Werkstroom**

Zoals bij elk beeldvormingsonderzoek, selecteert de technoloog de patiënt en identificeert hij/zij het type beeldvormingsprocedure dat wordt uitgevoerd. Voor een onderzoek met C-View- of Intelligent 2D-beelden hoeft alleen de beeldvorming van de patiënt te worden uitgevoerd en het onderzoek te worden voltooid. De C-View- en Intelligent 2D-software zelf werkt zonder directe tussenkomst van de mens.

### 1.11 Over 3DQuorum-software



#### Opmerking

3DQuorum®-beeldvormingstechnologie is mogelijk niet in alle regio's leverbaar. Neem voor informatie contact op met uw servicevertegenwoordiger.

---

3DQuorum®-software maakt gebruik van de beeldgegevens die beschikbaar zijn vanuit borsttomosyntheseverwerving met hoge resolutie om SmartSlices te genereren. Dit zijn 'geplette' 3D-beelden. Bij het maken van de SmartSlices is geen aanvullende belichting met digitale tomosynthese nodig. Een SmartSlice kan worden gezien als een "dikke" versie van een tomosyntheseplak en is gelijk aan zes plakken (6 mm) uit de oorspronkelijke tomosynthesereconstructie. Het SmartSlice-volume bestaat uit opeenvolgend gesynthetiseerde plakken. Elke SmartSlice deelt de helft van de inhoud met de SmartSlice ervoor en de andere helft met de SmartSlice erna. Daarom worden de beelden bij het beoordelen van SmartSlices met drie tomosyntheseplakken van 1 mm tegelijk vooruitgeschoven. Het resulterende aantal beelden dat door een radioloog in een studie moet worden beoordeeld, is een derde van het aantal van een set beelden van 1 mm uit de tomosynthesereconstructie.

SmartSlices zijn ontworpen om de totale tijd die nodig is voor de interpretatie van een screeningsonderzoek met tomosynthese te verminderen door het totale aantal beelden te verminderen dat een radioloog moet beoordelen. SmartSlices-beelden zijn niet bedoeld om zonder de gesynthetiseerde 2D-beelden bij de vorming van een klinisch besluit of diagnose te worden gebruikt.

#### 1.11.1 Waarschuwingen voor 3DQuorum-software



#### Waarschuwing:

**Vorm geen klinisch besluit en stel geen diagnose op basis van de SmartSlice-beelden zonder de bijbehorende set met gesynthetiseerde 2D-beelden te beoordelen.**

---



#### Waarschuwing:

**Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van het beeldvormingssysteem voor een volledige lijst met waarschuwingen en aandachtspunten.**

---

Gebruik SmartSlices op dezelfde manier als u de 3D-plakken (of met tomosynthese gereconstrueerde plakken) van 1 mm zou gebruiken bij het beoordeling van een screeningsonderzoek met tomosynthese. Gebruikers moeten voldoende getraind zijn en bekend zijn met het uiterlijk van SmartSlices voordat zij deze in plaats van met tomosynthese gereconstrueerde plakken gebruiken.

### 1.11.2 Werkingsprincipe van de 3DQuorum-software

#### Overzicht

3DQuorum-software is een beeldverwerkingstoepassing voor de nabewerking van een beperkt aantal plakken met tomosynthesegegevens, vastgelegd op een Hologic tomosynthesebeeldvormingssysteem, tot een gecombineerd 3D-beeld. De set met SmartSlices-beelden vermindert het aantal beelden tot een derde van het aantal beelden in vergelijking met een gegevensset van met tomosynthese gereconstrueerde plakken, terwijl de klinische informatie behouden blijft. Hierdoor kunnen de afleestijden voor de radioloog met ongeveer 13% worden teruggebracht. En voor archiverings- en verzendingsdoeleinden kan de bestandsgrootte met meer dan 50% worden teruggebracht. SmartSlices kunnen worden gebruikt in plaats van de met tomosynthese gereconstrueerde plakken bij de beoordeling van een screeningsonderzoek waarbij van tomosynthese gebruik wordt gemaakt. SmartSlices beschikken over dezelfde gevoeligheid als het aflezen van 3D™-plakken van 1 mm.

#### Configuration (Configuratie)

De 3DQuorum-software heeft geen door de gebruiker te configureren instellingen die van invloed op het uiterlijk van de resulterende SmartSlices zijn. SmartSlices worden opgeslagen en verzonden als een serie frames met behulp van de DICOM Breast Tomosynthesis Image-objectindeling. De DICOM-koptekst voor SmartSlices bevat de benodigde informatie om deze in een en dezelfde weergave van eventuele bijbehorende met tomosynthese gereconstrueerde plakken te onderscheiden. Ook wordt een aantekening ("3DQuorum") in de pixelgegevens van de SmartSlices gebrand.

Tijdens de eerste installatie van de 3DQuorum-software wordt het systeem zo geconfigureerd dat het mogelijk is om met tomosynthese gereconstrueerde plakken en SmartSlices naar PACS- en diagnostische werkstations te verzenden. De standaard uitvoergroepen kunnen zo worden geconfigureerd dat alleen SmartSlices, alleen met tomosynthese gereconstrueerde plakken, of beide automatisch naar de gewenste apparaten worden verzonden. De PACS-beheerder van de instelling kan in overleg met technici van Hologic die zijn belast met connectiviteit de uitvoerindelingen kiezen die het meest geschikt zijn voor de IT-infrastructuur en de werkstations van de instelling.

Net als bij de introductie van elke nieuwe beeldvormingstechnologie raadt Hologic u aan SmartSlices met uw PACS, werkstations en andere Imaging Enterprise-apparaten te testen om de compatibiliteit te garanderen.

#### Werkstroom

Zoals bij elk beeldvormingsonderzoek, selecteert de technoloog de patiënt en identificeert hij/zij het type beeldvormingsprocedure dat wordt uitgevoerd. Voor screeningsonderzoeken met tomosynthese met de 3DQuorum-software hoeft alleen de beeldvorming van de patiënt te worden uitgevoerd en het onderzoek te worden voltooid. De 3DQuorum-software zelf werkt zonder directe tussenkomst van de mens.

### 1.12 Over Genius AI Detection-software

Genius AI Detection®-software is een softwaremodule die bestemd is om verdachte borstlaesies te identificeren die in borsttomosynthesebeelden als dichtheid van zacht weefsel (massa's, architecturale vervormingen en asymmetrie) of verkalkingsclusters verschijnen. Genius AI Detection-software analyseert de tomosynthesegegevens voor elke weergave van een Hologic 3D Mammography™-onderzoek om deze laesies vast te stellen aan de hand van deep learning neurale netwerken. Genius AI Detection-software produceert voor elke vastgestelde laesie de volgende CAD-bevindingen:

- Plak die de laesie het best weergeeft.
- Locatie van de laesie.
- Omtrek van de laesie.
- Betrouwbaarheidsscore van de laesie.
- Gecorreleerde resultaten voor de laesie (indien van toepassing).

Daarnaast produceert Genius AI Detection-software een casusscore voor het volledige borsttomosynthese-onderzoek die de betrouwbaarheidsscore van het vinden van een kwaadaardige laesie in het onderzoek aangeeft.

Genius AI Detection-software slaat alle eigenschappen van deze CAD-bevindingen op in een DICOM-mammografie CAD SR-object voor opslag en weergave op beoordelingswerkstations en archiveringssystemen die aan DICOM voldoen. Als de beoordelingswerkstations de DICOM-mammografie CAD SR-objecten niet kunnen interpreteren, is er een optie beschikbaar om een DICOM secundaire beeldopname te maken.

#### **Werkstroom**

Zoals bij elk beeldvormingsonderzoek, selecteert de technoloog de patiënt en identificeert hij/zij het type beeldvormingsprocedure dat wordt uitgevoerd. Voor een Genius 3D™ Mammography-onderzoek hoeft alleen de beeldvorming van de patiënt te worden uitgevoerd en het onderzoek te worden voltooid. De Genius AI Detection-software zelf werkt zonder directe tussenkomst van de mens.

### 1.12.1 Aandachtspunten voor Genius AI Detection-software

**Belangrijk**

De radioloog dient de interpretatie uitsluitend te baseren op beelden van diagnostische kwaliteit en zich niet uitsluitend te laten leiden door markeringen van de Genius AI Detection-software om de klinische dispositie te bepalen.

---

**Belangrijk**

Genius AI Detection-software is een hulpmiddel dat door radiologen wordt gebruikt tijdens de interpretatie van Hologic 3D Mammography™-beeldensets.

---

**Belangrijk**

Genius AI Detection-software versterkt niet wat de gebruiker ziet, maar helpt gebieden op 3D™-mammogrammen te identificeren die moeten worden onderzocht.

---

## 1.13 Gebruikersprofielen

### 1.13.1 Mammografietechnicus

- Voldoet aan alle vereisten die gelden voor de locatie waar de mammografietechnicus werkt.
- Heeft training voltooid op het mammografiesysteem.
- Is getraind op het gebied van mammografieposities.
- Is bekend met de bediening van een computer en de bijbehorende randapparatuur.

### 1.13.2 Radioloog

- Voldoet aan alle vereisten die gelden voor de locatie waar de radioloog werkzaam is.
- Is bekend met de bediening van een computer en de bijbehorende randapparatuur.

### 1.13.3 Medisch fysicus

- Voldoet aan alle vereisten die gelden voor de locatie waar de medisch fysicus werkzaam is.
- Beschikt over kennis op het gebied van mammografie.
- Heeft ervaring met digitale beeldvorming.
- Is bekend met de bediening van een computer en de bijbehorende randapparatuur.

### 1.14 Trainingsvereisten

In de Verenigde Staten moeten gebruikers geregistreerde radiologische technologen zijn die voldoen aan de criteria voor het uitvoeren van mammografie. De gebruikers van mammografie moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde vereisten voor MQSA-personeel volgens de FDA-richtlijnen voor conventionele en digitale mammografie.

De gebruiker heeft onder meer de volgende mogelijkheden voor het volgen van training:

- Training in toepassingen op de werkplek door een Clinical Services Specialist van Hologic
- Training op de werkplek door collega's

Daarnaast staan er in de gebruikershandleiding aanwijzingen voor het gebruik van het systeem.

Alle gebruikers moeten ervoor zorgen dat zij worden getraind in de juiste bediening van het systeem voordat zij dit bij patiënten gebruiken.

Hologic aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor letsel of schade door een verkeerde bediening van het systeem.

### 1.15 Kwaliteitsbewakingsvereisten

Vestigingen in de Verenigde Staten moeten het kwaliteitsbewakingshandboek gebruiken om een kwaliteitswaarborgings- en kwaliteitsbewakingsprogramma op te zetten. De vestiging moet het programma opzetten om te voldoen aan de vereisten van de Mammography Quality Standards Act of om te worden geaccrediteerd door ACR of een andere accreditatie-instantie.

Vestigingen buiten de Verenigde Staten kunnen het kwaliteitsbewakingshandboek gebruiken als leidraad voor het opzetten van een programma waarmee aan de plaatselijke normen en voorschriften wordt voldaan.

### 1.16 Waar u instructies voor installatie kunt vinden

Installatie-instructies vindt u in de *servicehandleiding*.

### 1.17 Waar kunt u technische beschrijvingsinformatie vinden

Technische beschrijvingen vindt u in de *servicehandleiding*.



## 1.18 Garantieverklaring

Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt bepaald, geldt: i) Voor de originele klant dat de door Hologic geproduceerde apparatuur gegarandeerd wezenlijk naar behoren zal werken overeenkomstig de gepubliceerde productspecificaties voor een periode van één (1) jaar vanaf de verzenddatum of, indien installatie vereist is, vanaf de installatiedatum ('Garantieperiode'); ii) röntgenbuizen voor digitale mammografie worden gedekt door een garantie van vierentwintig (24) maanden, tijdens welke periode de röntgenbuizen een volledige garantie hebben voor de eerste twaalf (12) maanden en gedurende maand 13 tot en met 24 een garantie die volgens een rechte lijn afneemt tot nul; iii) vervangingsonderdelen en gereviseerde artikelen worden gedekt door een garantie gedurende de resterende garantieperiode van negentig (90) dagen vanaf verzending, waarbij de langste van de twee geldt; iv) verbruiksartikelen voldoen gegarandeerd aan de gepubliceerde specificaties voor een periode die afloopt op de vervaldatum die staat aangegeven op de respectieve verpakkingen; v) gelicentieerde software werkt gegarandeerd overeenkomstig de gepubliceerde specificaties; vi) de levering van diensten geschiedt gegarandeerd op professionele wijze; vii) de garantie voor apparatuur die niet door Hologic geproduceerd is, wordt geboden door de desbetreffende fabrikant en dergelijke fabrieksgaranties gelden voor klanten van Hologic voor zover toegestaan door de fabrikant van dergelijke niet door Hologic geproduceerde apparatuur. Hologic garandeert niet dat producten zonder onderbreking of fouten zullen werken, of dat producten zullen functioneren met producten van andere fabrikanten die niet door Hologic zijn goedgekeurd. Deze garanties gelden niet voor artikelen die: (a) gerepareerd, verplaatst of gewijzigd zijn door anderen dan door servicepersoneel dat geautoriseerd is door Hologic; (b) onderhevig zijn geweest aan fysiek misbruik (inclusief thermisch of elektrisch), spanning of verkeerd gebruik; (c) opgeslagen, onderhouden of gebruikt zijn op een wijze die onverenigbaar is met de van toepassing zijnde specificaties of instructies van Hologic, waaronder de weigering van de klant om door Hologic aanbevolen software-upgrades toe te staan; of (d) zijn aangemerkt als geleverd onder een garantie die niet door Hologic wordt geboden of op een pre-release- of op 'as-is'-basis.

## 1.19 Technische ondersteuning

Raadpleeg de auteursrechtpagina van deze handleiding voor contactgegevens voor productondersteuning.

## 1.20 Klachten over het product

Rapporteer klachten of problemen met betrekking tot de kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid of prestaties van dit product aan Hologic. Als het apparaat letsel bij de patiënt heeft veroorzaakt of verergert, moet u het incident onmiddellijk aan een geautoriseerde vertegenwoordiger van Hologic en aan de bevoegde autoriteit van de respectievelijke lidstaat of het betreffende land rapporteren. De bevoegde autoriteit voor medische apparaten is meestal het ministerie van Volksgezondheid van de individuele lidstaat of een instantie binnen het ministerie van Volksgezondheid. (Raadpleeg de auteursrechtpagina voor contactgegevens van Hologic.)

### 1.21 Cybersecurity-verklaring van Hologic

Hologic test voortdurend de actuele status van de computer- en netwerkbeveiliging om mogelijke beveiligingsproblemen te onderzoeken. Wanneer nodig levert Hologic de updates voor het product.

Raadpleeg de website van Hologic op [www.hologic.com](http://www.hologic.com) voor documenten over de beste werkwijzen met betrekking tot cybersecurity.



**Waarschuwing:**

**Voor de beveiliging van computers en netwerken moeten alle door Hologic geleverde updates voor cyberbeveiliging worden geïnstalleerd. Er mag uitsluitend goedgekeurde software op het systeem worden geïnstalleerd.**






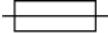








### 1.22 Antivirusinformatie

Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger voor de installatie van antivirussoftware.

### 1.23 Symbolen










In dit gedeelte worden de symbolen op dit systeem beschreven.

















Symbool	Beschrijving	Standaard
	Let op – straling	Hologic
	Niet-ioniserende elektromagnetische straling	IEC 60417, referentie 5140
	Waarschuwing elektriciteit	ISO 7010, referentie W012
	Gevaarlijke spanning	IEC 60417, referentie 5036
	Waarschuwing	ISO 7010, referentie W001
	Let op	ISO 15223-1:2021, referentie 5.4.4

Symbol	Beschrijving	Standaard
	Noodstop	Hologic
	Gooi elektrische en elektronische apparatuur gescheiden weg van gewoon afval. Stuur buiten gebruik gesteld materiaal naar Hologic of neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.	WEEE-richtlijn 2012/19/EU
	Toegepast onderdeel type B	IEC 60417, referentie 5840
	Equipotentialiteit	IEC 60417, referentie 5021
	Beveiligde aarding (geaard)	IEC 60417, referentie 5019
	Zekering	IEC 60417, referentie 5016
	Wisselstroom	IEC 60417, referentie 5032
	'UIT' (voeding)	IEC 60417, referentie 5008
	'AAN' (voeding)	IEC 60417, referentie 5007
	Uitsluitend voorgeschreven gebruik	FDA 21 CFR 801.109
	Bevoegd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap	ISO 15223-1:2021, referentie 5.1.2
	CE-markering met referentienummer van aangemelde instantie	MDR-verordening (EU) 2017/745
	Medisch apparaat	ISO 15223-1:2021, referentie 5.7.7
	Niet-steriel	ISO 15223-1:2021, referentie 5.2.7

# Gebruikershandleiding 3Dimensions-systeem

## Hoofdstuk 1: Inleiding

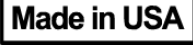Symbol	Beschrijving	Standaard
 <a href="http://www.hologic.com/package-inserts">www.hologic.com/package-inserts</a>	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	ISO 15223-1:2021, referentie 5.4.3
<b>Translations in Box</b>	Vertalingen in verpakking	Hologic
	Recyclingsymbool	Unicode, referentie U+267C
	Toegankelijkheidssymbool	ISO 7000, referentie 0100
	Droog bewaren	ISO 15223-1:2021, referentie 5.3.4
	Breekbaar; voorzichtig hanteren	ISO 15223-1:2021, referentie 5.3.1
	Niet stapelen	ISO 7000:2014, referentie 2402
	Temperatuurlimiet	ISO 15223-1:2021, referentie 5.3.7
<b>Temp Logger Activated</b>	Temperatuurlogger geactiveerd	Hologic
<b>Temp Logger SN</b>	Serienummer temperatuurlogger	Hologic
	Deze zijde boven	ISO 7000:2014, referentie 0623
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	ISO 15223-1:2021, referentie 5.2.8
<b>P/N</b>	Onderdeelnummer	Hologic


Symbol	Beschrijving	Standaard
	Revisie	Hologic
	Modelnummer	Hologic
	Catalogusnummer	ISO 15223-1:2021, referentie 5.1.6
	Batchcode	ISO 15223-1:2021, referentie 5.1.5
	Serienummer	ISO 15223-1:2021, referentie 5.1.7
	Aantal	Hologic
	Verzonden softwareversie	Hologic
	Softwareversie	Hologic
	Omhulsel (doos of verpakking)	Hologic
	Leverancierscode	Hologic
	Fabrikant	ISO 15223-1:2021, referentie 5.1.1
	Fabricagedatum	ISO 15223-1:2021, referentie 5.1.3
	Gemaakt in de Verenigde Staten	Hologic
	Patenten	Hologic
	Vervaldatum	ISO 15223-1:2021, referentie 5.1.4
	Niet hergebruiken	ISO 15223-1:2021, referentie 5.4.2

### 1.24 Conventies voor dit document

Wanneer u wordt gevraagd om tekst toe te voegen, voer de tekst dan precies zoals weergegeven in een monospacief lettertype in.

## Hoofdstuk 2 Algemene informatie

### 2.1 Systeemoverzicht

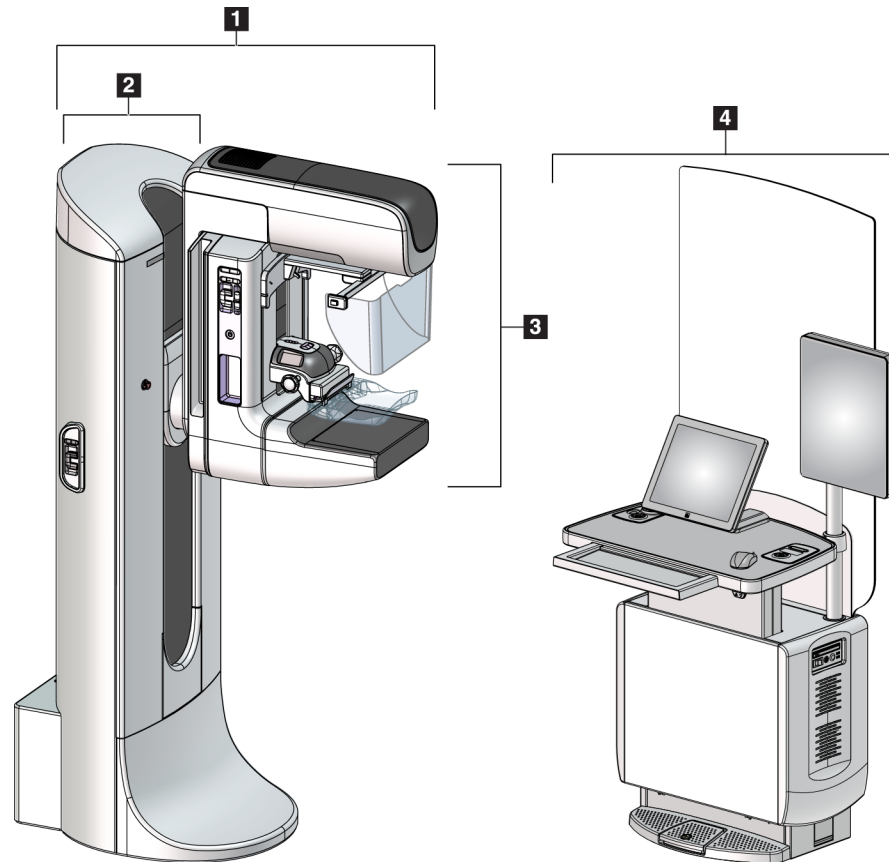


*Figuur 1: 3Dimensions™-systeem*

#### Legenda

1. Buisstandaard (gantry en C-arm)
2. Gantry
3. C-arm (buisarm en compressiearm)
4. Universeel verwervingswerkstation

### 2.1.1 Overzicht C-arm

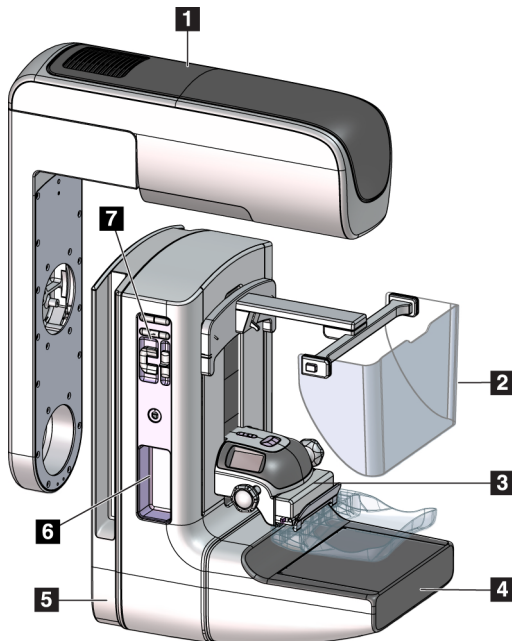

#### Legenda

1. Buisarm
2. Gezichtsscherm voor patiënt
3. Compressieapparaat
4. Beeldreceptor
5. Compressiearm
6. Patiëntgreep
7. Bedieningspaneel op C-arm

*Figuur 2: Overzicht C-arm*

## 2.2 Veiligheidsinformatie

Lees deze handleiding en zorg dat u deze begrijpt voordat u het systeem gebruikt. Houd de handleiding tijdens de bediening van het systeem bij de hand.

Volg altijd alle instructies in deze handleiding. Hologic aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor letsel of schade door een verkeerde bediening van het systeem. Voor trainingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met uw Hologic-vertegenwoordiger.

Het systeem is voorzien van veiligheidsvergrendelingen, maar de gebruiker moet begrijpen hoe het systeem veilig wordt bediend. De gebruiker moet ook de gezondheidsrisico's van röntgenstraling begrijpen.



## 2.3 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen



Dit systeem is geclassificeerd als KLASSE I, TYPE B TOEGEPAST ONDERDEEL, IPX0, permanent aangesloten apparatuur, continubedrijf met kortstondige lading volgens IEC 60601-1. Er zijn geen speciale voorzieningen ter bescherming van het systeem tegen brandbare anesthetica of het binnendringen van vloeistof.



---

### **WAARSCHUWING!**

**Risico van elektrische schok. Sluit deze apparatuur alleen aan op een randaardestopcontact.**

---



---

### **WAARSCHUWING!**

**Elektrische veiligheidseisen in Noord-Amerika schrijven voor dat een stopcontact van ziekenhuiskwaliteit moet worden gebruikt om in een correcte aarding te voorzien.**

---



---

### **WAARSCHUWING!**

**Elektrische apparatuur die in de buurt van brandbare anesthetica wordt gebruikt, kan een explosie veroorzaken.**

**Het systeem is niet ontworpen voor gebruik in een explosieve atmosfeer (bijvoorbeeld in de aanwezigheid van een ontvlambaar anesthetisch mengsel met lucht of zuurstof of lachgas).**

---



---

### **WAARSCHUWING!**

**Raak een systeem dat in brand staat niet aan. Verlaat het gebied. Gebruik alleen brandblussers die zijn goedgekeurd voor elektriciteitsbranden.**

---



---

### **WAARSCHUWING!**

**Sluit voor een correcte isolatie van het systeem alleen goedgekeurde accessoires of opties op het systeem aan. Alleen goedgekeurd personeel kan de aansluitingen wijzigen.**

---



---

**WAARSCHUWING!**

Houd een veilige afstand van 1,5 meter aan tussen de patiënt en apparaten die niet bij de patiënt worden gebruikt. Installeer geen componenten die niet bij de patiënt worden gebruikt (zoals de Workflow Manager, een diagnostisch beoordelingswerkstation of een printer) in de patiëntomgeving.

---



---

**WAARSCHUWING!**

Alleen door Hologic erkende, getrainde onderhoudstechnici kunnen de panelen openen. In dit systeem zijn dodelijke spanningen aanwezig.

---



---

**WAARSCHUWING!**

De gebruiker moet problemen oplossen voordat het systeem wordt gebruikt. Neem contact op met een goedgekeurde servicevertegenwoordiger voor preventief onderhoud.

---



---

**WAARSCHUWING!**

Na een stroomstoring moet de patiënt uit het systeem worden verwijderd voordat de stroomtoevoer wordt hersteld.

---



---

**Waarschuwing:**

Elektrische circuits in het systeem kunnen dodelijk of ernstig letsel veroorzaken. De beschermkappen mogen alleen door geautoriseerd onderhoudspersoneel worden verwijderd. Als de voedingskabel naar de gantry of de AWS is beschadigd, moet het systeem worden uitgeschakeld en gerepareerd voordat het opnieuw wordt gebruikt.

---



---

**Waarschuwing:**

Dit apparaat bevat gevaarlijk materiaal. Stuur buiten gebruik gesteld materiaal naar Hologic of neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.

---



---

**Waarschuwing:**

De C-arm heeft een gemotoriseerde beweging.

---



---

**Waarschuwing:**

U verhoogt de patiëntdosis tot hoge niveaus wanneer u de afstelling van de AEC-belichting verhoogt. U verhoogt de beeldruis of verlaagt de beeldkwaliteit wanneer u de afstelling van de AEC-belichting verlaagt.

---



**Waarschuwing:**

Regel de toegang tot de apparatuur volgens de lokale voorschriften voor stralingsbescherming.

---



**Waarschuwing:**

De schijfstations die in dit systeem zijn geïnstalleerd, zijn een klasse I laserproduct. Voorkomt rechtstreekse blootstelling aan de bundel. Als de behuizing van een schijfstation geopend is, is er verborgen laserstraling aanwezig.

---



**Waarschuwing:**

De streepjescodescanner die in dit systeem is geïnstalleerd, is een klasse I laserproduct. Voorkomt rechtstreekse blootstelling aan de bundel. Als de afdekking geopend is, is er verborgen laserstraling aanwezig.

---



**Waarschuwing:**

Dit systeem produceert ioniserende straling, wat gevaarlijk kan zijn voor patiënten en behandelaars als de veiligheids- en bedieningsinstructies in deze handleiding niet worden gevolgd.

---



**Waarschuwing:**

De elektrische circuits in het systeem kunnen elektromagnetische straling voortbrengen die storing kan veroorzaken in andere apparatuur of geïmplanteerde apparaten.

---



**Waarschuwing:**

Blijf met uw gehele lichaam achter het stralingsscherm tijdens de belichting. Sla niet tegen of oefen geen druk uit op het stralingsscherm om barsten te voorkomen. Een gebarsten stralingsscherm kan scherpe randen hebben.

---



**Waarschuwing:**

Beweeg de C-arm niet terwijl het systeem het beeld ophaalt.

---



**Waarschuwing:**

Wanneer u de paddle bevestigt of verwijdert, moet u uw vingers uit de buurt van de paddleklemopening houden om letsel te voorkomen.

---



**Waarschuwing:**

Als een paddle in aanraking komt met mogelijk infectieuze materialen, moet u contact opnemen met de vertegenwoordiger die belast is met infectiebeheersing om de besmetting van de paddle te verwijderen.

---

## Gebruikershandleiding 3Dimensions-systeem

### Hoofdstuk 2: Algemene informatie

---



**Waarschuwing:**

Laat de patiënt niet zonder toezicht achter tijdens de procedure.

---



**Waarschuwing:**

Houd de handen van de patiënt te allen tijde uit de buurt van alle knoppen en schakelaars.

---



**Waarschuwing:**

Plaats elke voetschakelaar zodanig dat deze tijdens het gebruik binnen het bereik van de nooduitschakelingschakelaars blijft.

---



**Waarschuwing:**

Plaats de voetschakelaars zodanig dat onbedoeld in werking stellen door een patiënt of een rolstoel wordt voorkomen.

---



**Waarschuwing:**

Plaats uitsluitend goedgekeurde materialen in het pad van de röntgenbundel om te voorkomen dat de patiënt aan een hogere stralingsdosis wordt blootgesteld.

---



**Waarschuwing:**

Dit systeem kan gevaarlijk zijn voor de patiënt en de gebruiker. Volg altijd de veiligheidsmaatregelen voor röntgenbelichtingen op.

---



**Waarschuwing:**

Gebruik bij belichtingen altijd het gezichtsschermbeschermer, behalve als het om casestudies gaat waarbij vergrotingen worden gebruikt.

---



**Waarschuwing:**

Het gezichtsschermbeschermer beschermt de patiënt niet tegen straling.

---



**Waarschuwing:**

Risico van vastzitten. Zorg ervoor dat de C-arm 50 cm speling heeft ten opzichte van elk object tijdens de rotatie van de C-arm. Gebruik de automatische rotatie niet wanneer de speling van de C-arm minder dan 50 cm is.

---



**Let op:**

Het systeem is een medisch hulpmiddel en geen normale computer. Voer uitsluitend goedgekeurde wijzigingen uit aan de hardware of software. Installeer dit systeem achter een firewall ter beveiliging van het netwerk. De virusbescherming van de computer of de netwerkbeveiliging voor dit medische hulpmiddel wordt niet meegeleverd (bijv. een computer firewall). De netwerkbeveiliging en anti-virusvoorzieningen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

---



**Let op:**

Schakel de stroomonderbreker van het verwervingswerkstation alleen uit in noodgevallen. De stroomonderbreker kan de ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) uitschakelen waardoor er gegevensverlies kan optreden.

---



**Let op:**

Risico van gegevensverlies. Plaats geen magnetische media bij of op apparatuur die magnetische velden genereert.

---



**Let op:**

Gebruik geen warmtebron (zoals een verwarmingsplaat) op de beeldreceptor.

---



**Let op:**

Ter voorkoming van mogelijke beschadiging van de digitale beeldreceptor door thermische schokken moet de aanbevolen procedure voor het uitschakelen van de apparatuur worden gevolgd.

---



**Let op:**

Het display wordt gekalibreerd zodat het voldoet aan de DICOM-normen. Verander de helderheids- en contrastinstelling van het display niet.

---



**Let op:**

Gebruik de kleinst mogelijke hoeveelheid reinigingsvloeistoffen. De vloeistoffen mogen niet eraf lopen.

---



**Let op:**

Ter voorkoming van beschadiging van de elektronische componenten mag geen desinfectiespray op het systeem worden gespoten.

---




**Opmerking:**

In sommige landen levert Hologic de voedingskabel voor de gantry niet. Als de voedingskabel niet is meegeleverd, moet de geplaatste kabel voldoen aan de volgende vereisten en alle lokale voorschriften die van toepassing zijn: 8 AWG (10 mm<sup>2</sup>) koper met een maximale lengte van 7,62 meter, en 3 conductoren.

---

### 2.4 Nooduitschakelingsschakelaars

Met de nooduitschakelingsschakelaars wordt de voeding van de gantry en het liftmechanisme van het verwervingswerkstation gehaald (alleen op de werkstations met die optie). Schakel het systeem niet routinematig uit met de nooduitschakelingsschakelaars.

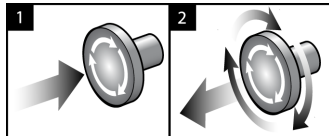

*Figuur 3: Functionaliteit nooduitschakelingsschakelaar*

Er zijn drie nooduitschakelingsschakelaars, één aan elke zijde van de gantry en één op het verwervingswerkstation.

1. Druk op een van de nooduitschakelingsschakelaars om de gantry en het liftmechanisme van het verwervingswerkstation uit te schakelen.
2. De nooduitschakelingsschakelaar wordt gereset door deze een kwartslag rechtsom te draaien tot de schakelaar weer naar buiten schiet.

### 2.5 Vergrendelingen

Het systeem is voorzien van veiligheidsvergrendelingen:

- De verticale beweging en de rotatie van de C-arm worden uitgeschakeld als er compressiekracht wordt uitgeoefend. Een servicetechnicus kan de blokkeerkracht configureren op een waarde van 22 Newton tot 45 Newton.
- Als de röntgenknop en/of -voetschakelaar\* worden losgelaten voordat de belichting is beëindigd, stopt de belichting en wordt er een alarmbericht weergegeven.  
\* (De optionele röntgenvoetschakelaar is alleen beschikbaar op de console van het Universele verwervingswerkstation.)
- In de Tomo-modus is belichting niet mogelijk als het raster zich in het röntgenstralingsveld bevindt (tomosyntheseoptie).
- Markeringen van spiegel- en filterpositie voorkomen tevens dat röntgenstraling wordt geactiveerd wanneer de licht-veldspiegel of de filterconstructie niet correct is gepositioneerd.

## 2.6 Naleving

In dit gedeelte worden de nalevingsvereisten voor het mammografiesysteem en de verantwoordelijkheden van de fabrikant beschreven.

### 2.6.1 Nalevingsvereisten

De fabrikant is verantwoordelijk voor de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van deze apparatuur onder de volgende voorwaarden:

- De elektrische installatie van de kamer voldoet aan alle vereisten.
- De apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de *gebruikershandleiding*.
- De montage, uitbreidingen, afstellingen, wijzigingen en reparaties worden uitsluitend uitgevoerd door erkende personen.
- De netwerk- en communicatieapparatuur wordt geïnstalleerd volgens de IEC-normen. Het gehele systeem (netwerk- en communicatieapparatuur en het mammografiesysteem) moet in overeenstemming zijn met IEC 60601-1.



**Let op:**

Voor medische elektrische apparatuur zijn er speciale voorzorgen ten aanzien van EMC. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd, in gebruik worden gesteld en gebruikt volgens de verstrekte EMC-informatie.

---



**Let op:**

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan medische elektrische apparatuur beïnvloeden.

---



**Let op:**

Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires en kabels kan resulteren in verhoogde emissies of verminderde immuniteit. Voor het behoud van de isolatiekwaliteit van het systeem mogen alleen goedgekeurde accessoires of opties van Hologic op het systeem worden aangesloten.

---



**Let op:**

De medische elektrische apparatuur (ME) of het ME-systeem mag niet worden gebruikt direct naast of boven op andere apparatuur. Als naburig of gestapeld gebruik noodzakelijk is, moet worden gecontroleerd of de ME-apparatuur of het ME-systeem in de gebruikte configuratie naar behoren werkt.

---



Let op:

Dit systeem is uitsluitend bestemd voor gebruik door medisch personeel. Dit systeem kan radiostoring veroorzaken of de werking van apparatuur in de nabijheid storen. In dat geval kunnen corrigerende maatregelen nodig zijn zoals het verdraaien of verplaatsen van de apparatuur of afschermen van de locatie.

---



Let op:

Door wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Hologic kan uw bevoegdheid om de apparatuur te bedienen, komen te vervallen.

---



Let op:

Tests hebben uitgewezen dat deze apparatuur voldoet aan de voor digitale apparaten van klasse A van kracht zijnde bepalingen, conform deel 15 van de richtlijnen van de Federal Communications Commission (FCC Rules; USA). Deze bepalingen zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik van de apparatuur in een commerciële omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitzenden. Als dit apparaat niet is geïnstalleerd of wordt gebruikt volgens de handleiding kan hierdoor schadelijke interferentie met radiocommunicatie ontstaan. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving kan interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruikers, op eigen kosten, maatregelen moeten nemen die nodig zijn om de interferentie te voorkomen.

---



Let op:

Op basis van het testniveau voor BEHUIZINGSPOORTIMMUNITEIT voor DRAADLOZE RF-COMMUNICATIEAPPARATUUR volgens IEC 60601-1-2 ed. 4 vertoont dit apparaat ontvankelijkheid voor de GMRS 460-, FRS 460-zendfrequentie. Hanteer een minimale scheidingsafstand van 30 cm tussen GMRS- en FRS-radio's en het systeem.

---



## 2.6.2 Conformiteitsverklaringen

De fabrikant verklaart dat dit hulpmiddel voldoet aan de volgende vereisten:




Medisch – Toegepaste elektromagnetische stralingsapparatuur met betrekking tot risico's op elektrische schok, brand en mechanische risico's, uitsluitend in overeenstemming met ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + A1: 2012, C1: 2009 / (R)2012, A2: 2010 / (R)2012 en CAN/CSA-C22.2 nr. 60601-1 (2014)


- CAN/CSA - ISO 13485-03 Medische hulpmiddelen – Kwaliteitsbeheersystemen – Vereisten voor regelgevingsdoeleinden (overgenomen uit ISO 13485:2003 tweede editie, 2003-07-15)
- CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1:2014 Medische elektrische apparatuur – Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties
- EN 60601-1: 2006/A1: 2013 Medische elektrische apparatuur. Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties
- ETSI EN 300 330-1: V1.3.1 en ETSI EN 300 330-2: V1.5.1: 2006— Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); kortereafstandsapparatuur (SRD); radioapparatuur, werkend in de 9 kHz tot 25 MHz-frequentieband en ringleidingen in de 9 kHz tot 30 MHz-frequentieband
- ETSI EN 301 489-1: V1.6.1 en ETSI EN 301 489-3: V1.8.1: 2008— Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); elektromagnetische compatibiliteitsnorm (EMC) voor radioapparatuur en radiodiensten
- FCC, 47 CFR Deel 15, Subdeel C, Sectie 15.225: 2009
- FDA, 21 CFR [Deel 900 en 1020]
- IEC 60601-1: 2005/A1: 2012, ed 3.1 Medische elektrische apparatuur – Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties
- IEC 60601-1-2 4e. ed. 2014 Medische elektrische apparatuur – Deel 1-2: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties - Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen en beproevingen
- IEC 60601-1-3 Ed. 2.0: 2008/A1: 2013 Medische elektrische apparatuur – Deel 1-3: Bijzondere eisen voor de veiligheid van röntgenbron- en röntgenbuisaanstellingen voor medische diagnostiek
- IEC 60601-2-28: 2017 Medische elektrische apparatuur – Deel 2-28: Specifieke eisen voor de basisveiligheid en essentiële prestaties van röntgenbuizen voor medische apparatuur
- IEC 60601-2-45: 2011/AMD1: 2015 Medische elektrische apparatuur – Deel 2-45: Specifieke eisen voor de basisveiligheid en essentiële prestaties van röntgenapparatuur voor mammografie en stereotactische apparatuur voor mammografie
- RSS-210: Publicatie 7, 2007 Specificaties inzake radionormen voor vergunningvrije radiocommunicatieapparatuur met een laag vermogen: Apparatuur van categorie I
- ANSI/AAMI ES 60601-1: +A1: 2012, C1: 2009 / (R)2012 en A2: 2010 / (R)2012 Medische elektrische apparatuur, Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties, inclusief wijziging (2010)

## 2.7 Locatie van systeemplakjes

Raadpleeg de volgende afbeeldingen voor de locatie van de systeemplakjes serienummers.

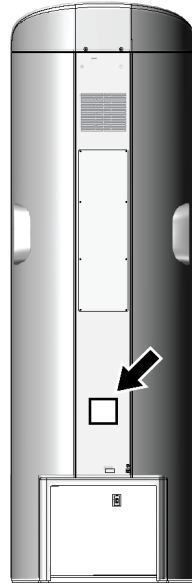


*Figuur 4: Locatie van het systeemplakje voor de gantry*

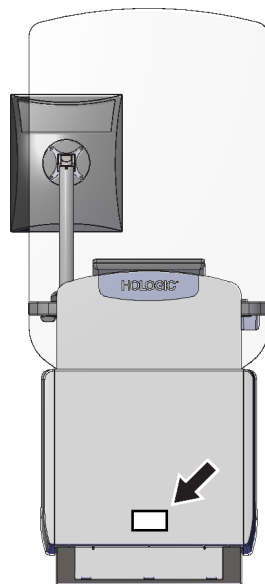

*Figuur 5: Locatie van het systeemplakje voor de gantry voor het universele verwerkingswerkstation*

## Hoofdstuk 3 Bedieningselementen en indicatoren van het systeem

### 3.1 Bedieningselementen van de systeemvoeding

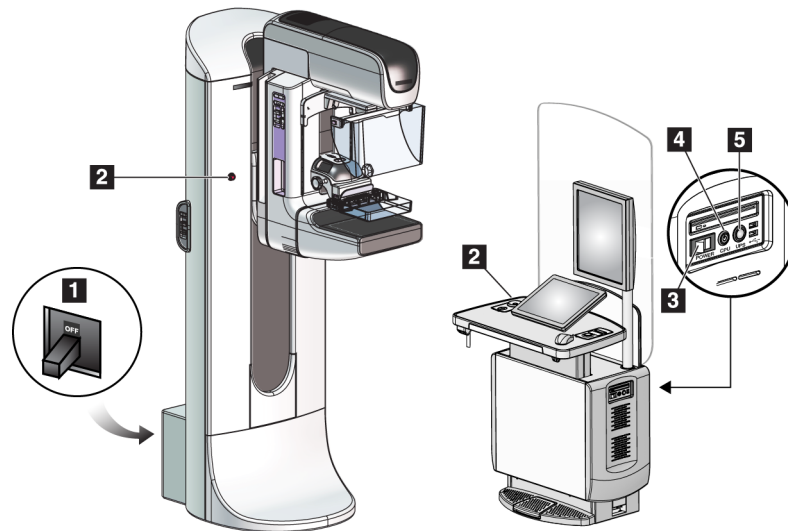


Figuur 6: Bedieningselementen van de systeemvoeding

#### Legenda

1. Stroomonderbreker gantry
2. Nooduitschakelingsschakelaar (twee op de gantry en één op het verwervingswerkstation)
3. Aan/uit-schakelaar verwervingswerkstation
4. Aan/reset-knop computer
5. Aan/uit-knop UPS (ononderbreekbare voedingsbron)

## 3.2 Bedieningselementen en indicatoren van de buisstandaard

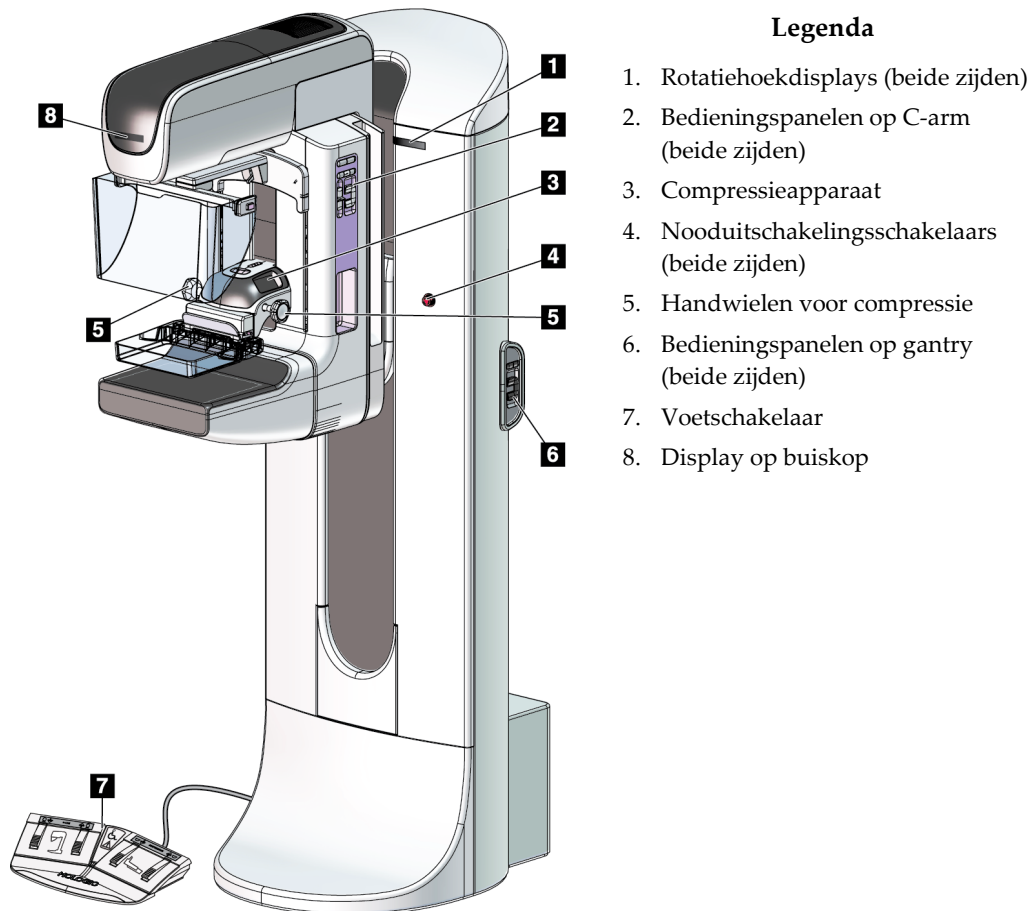


*Figuur 7: Bedieningselementen en indicatoren van de buisstandaard*

### 3.2.1 Display op buiskop

Het display op de buiskop geeft het volgende weer:

- SID
- Filtertype
- Collimatorinstelling
- Paddlepositie

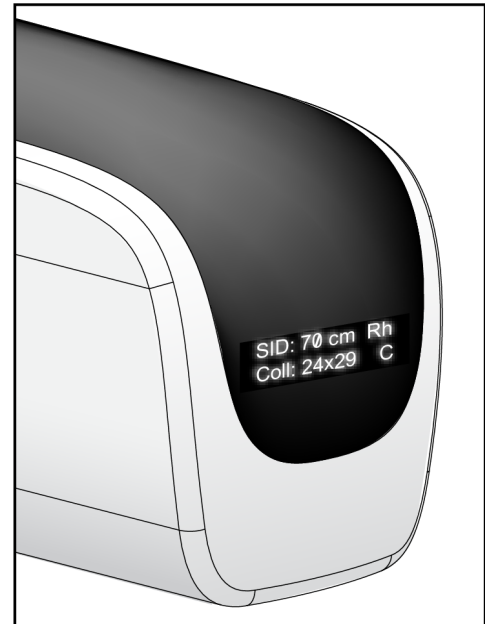


*Figuur 8: Display op buiskop*

### 3.2.2 Bedieningselementen en display van het compressieapparaat

#### Legenda


1. Handwielen voor handmatige compressie
2. Knoppen voor paddleverschuiving
3. AEC-sensorknoppen
4. Display van compressieapparaat
5. Schuifje van de FAST-compressiemodus
6. Paddleklem

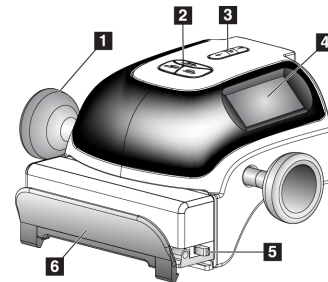

*Figuur 9: Compressieapparaat*

Het display op het compressieapparaat geeft het volgende weer:

- AEC-sensorpositie
- Compressiekracht (geeft 0.0 aan wanneer de kracht minder is dan 18 Newton)
- Compressiedikte
- Hoek van de C-arm na rotatie (gedurende 5 seconden)

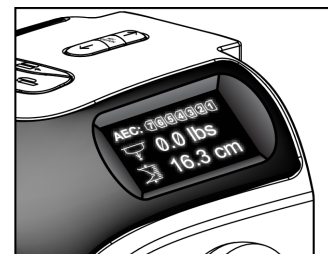

*Figuur 10: Display van compressieapparaat*

### 3.2.3 Bedieningspanelen op C-arm

Er is een bedieningspaneel op de C-arm aan de rechter en de linker zijde van de C-arm. Met deze knoppen worden de functies van de collimator en C-arm bediend.




#### Legenda

1. MLO-rotatie
2. C-arm nul
3. Lichtveldlamp
4. Motor inschakelen
5. Collimatoroverbrugging
6. Rotatie rechtsom van C-arm
7. C-arm omhoog en omlaag
8. Rotatie linksom van C-arm
9. Compressieapparaat omhoog
10. Compressieapparaat omlaag

Figuur 11: Bedieningspaneel op C-arm

### 3.2.4 Bedieningspanelen op gantry

De bedieningspanelen op de gantry vormen een aanvullende toegangsmogelijkheid tot C-armfuncties. Er is een bedieningspaneel op de C-arm aan de rechter en de linker zijde van de gantry.

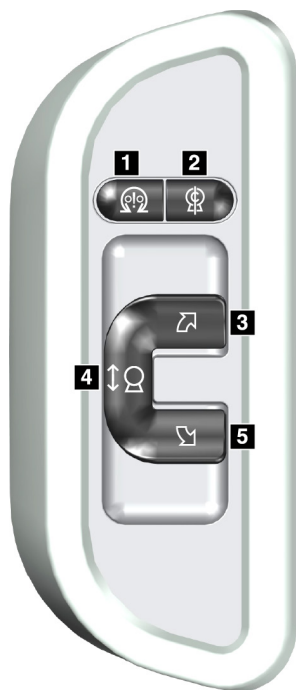

#### Legenda

1. Motor inschakelen
2. C-arm nul
3. Rotatie rechtsom van C-arm
4. C-arm omhoog en omlaag
5. Rotatie linksom van C-arm

Figuur 12: Bedieningspaneel op gantry

### 3.2.5 Voetschakelaar met dubbele functie



**Waarschuwing:**

Plaats elke voetschakelaar zodanig dat deze tijdens het gebruik binnen het bereik van de nooduitschakelingschakelaars blijft.

---



**Waarschuwing:**

Plaats de voetschakelaars zodanig dat onbedoeld in werking stellen door een patiënt of een rolstoel wordt voorkomen.

---



**Waarschuwing:**

Om struikelen of onbedoelde activering te voorkomen moeten patiënten en gebruikers van het systeem weten waar de voetschakelaars en bijbehorende kabels zich bevinden.


---

Gebruik van de voetschakelaar:

- Trap de voetschakelaar in voor activering.
- Laat de voetschakelaar los om de beweging te stoppen.

#### Legenda

1. C-arm omlaag
2. C-arm omhoog
3. Compressieapparaat omlaag
4. Compressieapparaat omhoog

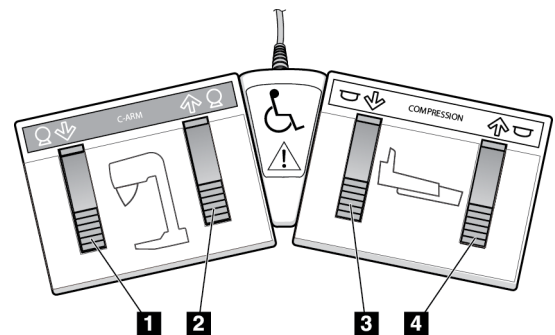

*Figuur 13: Voetschakelaar met dubbele functie*

### 3.3 Bedieningselementen en displays van het Universele verwervingswerkstation




**Opmerking**

Hologic configureert bepaalde systemen zodanig dat deze aan specifieke vereisten voldoen. Uw systeemconfiguratie beschikt mogelijk niet over alle opties en accessoires die in deze handleiding worden genoemd.

---

# Gebruikershandleiding 3Dimensions-systeem

## Hoofdstuk 3: Bedieningselementen en indicatoren van het systeem

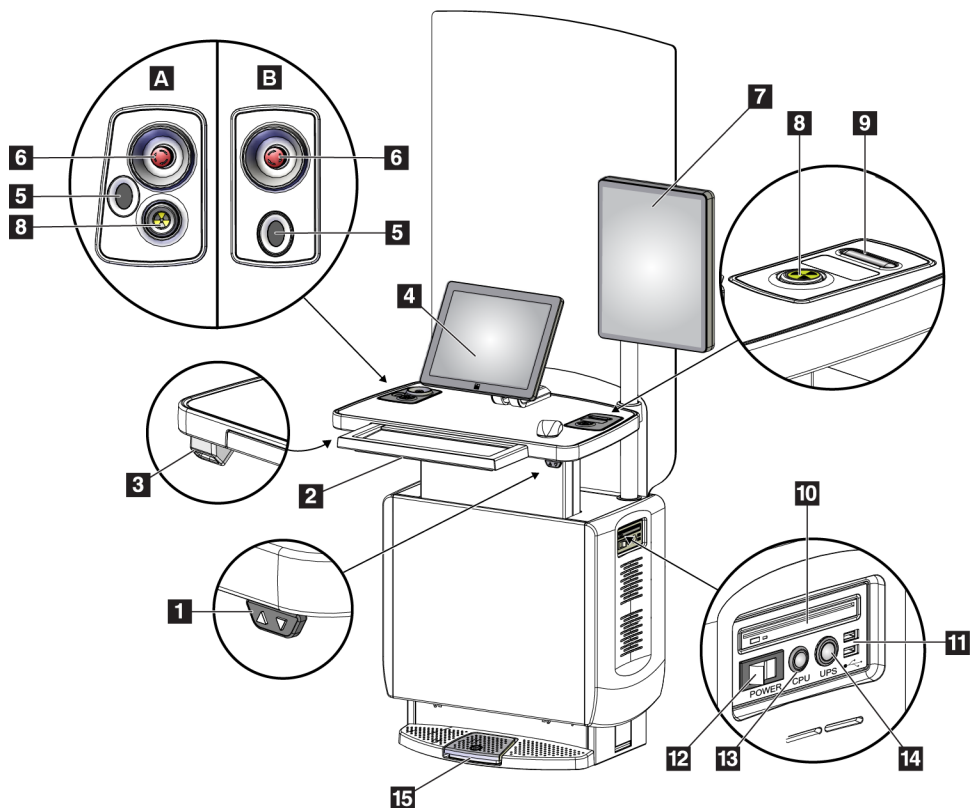

Figuur 14: Bedieningselementen en displays van het Universele verwerkingswerkstation

### Legenda

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Hoogteafstellingsschakelaar      | 10. CD/DVD-station                                     |
| 2. Toetsenbord (in lade)            | 11. USB-poorten  |
| 3. Streepjescodescanner             | 12. Aan/uit-schakelaar<br>verwerkingswerkstation       |
| 4. Bedieningsmonitor                | 13. Aan/reset-knop computer                            |
| 5. Vingerafdrukscanner*             | 14. Aan/uit-knop UPS (ononderbrekbare<br>voedingsbron) |
| 6. Noodstop-schakelaar*             | 15. Voetschakelaar röntgenstraling                     |
| 7. Monitor beelddisplay             |  |
| 8. Activeringsknop röntgenstraling* |  |
| 9. Compressievrijgaveknop           |  |

\*A = lay-out van serie II universeel  
verwerkingswerkstation;

B = lay-out van serie I universeel verwerkingswerkstation



### Opmerking

De bedieningselementen van het Universele verwerkingswerkstation dat in een mobiele omgeving is geïnstalleerd komen overeen met de bedieningselementen van het Universele verwerkingswerkstation.



## Hoofdstuk 4 Opstarten, Functionele tests en Afsluiten


### 4.1 Het systeem opstarten



#### Opmerking


Als het systeem 's nachts ingeschakeld blijft, moet het systeem voor optimaal functioneren dagelijks opnieuw worden gestart.

1. Controleer of er geen obstakels zijn die de beweging van de C-arm en het zicht van de operator belemmeren.
2. Controleer of alle drie nooduitschakelingsschakelaars van het systeem in de resetstand staan (niet ingedrukt).

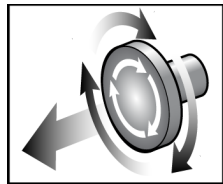

Figuur 15: Draaien om de nooduitschakelingsschakelaars te resetten

3. Controleer of de stroomonderbrekers van de gantry in de stand ON (AAN) staan.
4. Als de UPS op de stand OFF (UIT) werd gezet, drukt u op de aan/uit-knop van de UPS om de UPS in te schakelen (zie volgende figuur).

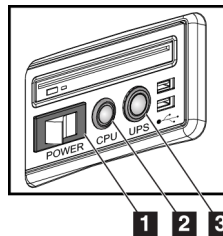


#### Legenda

1. Aan/uit-schakelaar verwervingswerkstation
2. Aan/reset-knop computer
3. Aan/uit-knop UPS

Figuur 16: Aan/uit-knoppen Universeel verwervingswerkstation

5. Zet de aan/uit-knop van het verwervingswerkstation op ON (AAN) (zie vorige figuur).

6. Druk op de aan/uit-knop van de computer (zie vorige figuren). De computer wordt ingeschakeld en het scherm *Windows 10 Login* (Aanmelden bij Windows 10) wordt geopend op de bedieningsmonitor van het verwervingswerkstation.

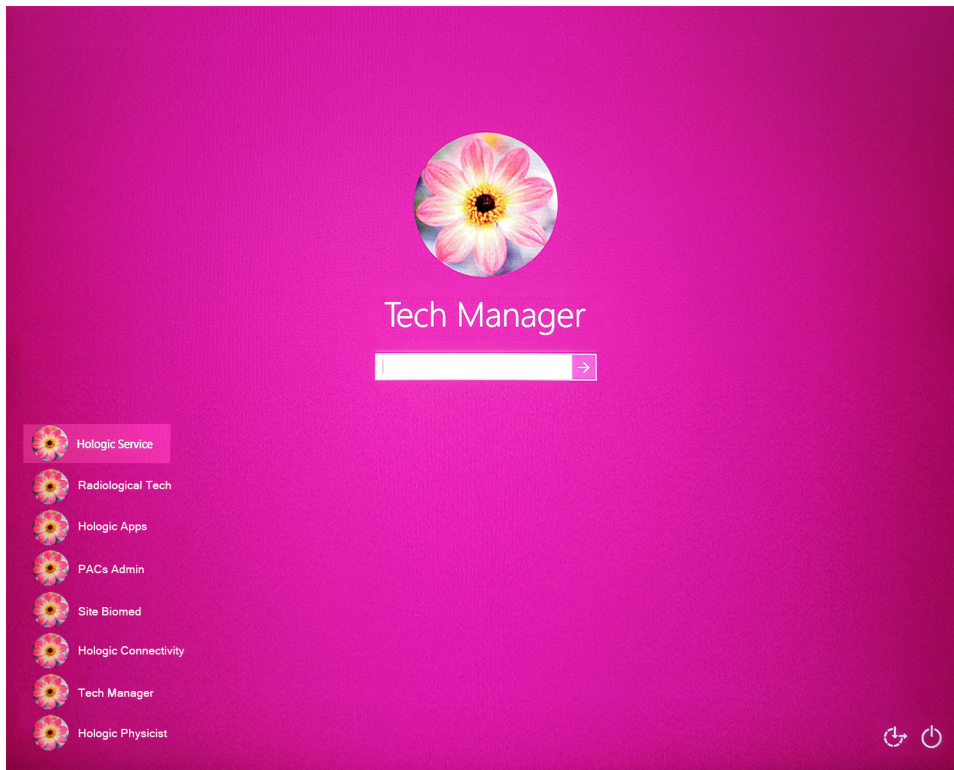


*Figuur 17: Scherm Windows 10 Login (Aanmelden bij Windows 10)*

7. Selecteer uw gebruikersnaam en voer uw wachtwoord in.

- Na enkele ogenblikken wordt het scherm *Startup* (Opstarten) voor het 3Dimensions-systeem op de bedieningsmonitor van het verwervingswerkstation geopend. De gantry wordt vervolgens automatisch ingeschakeld.

## 3Dimensions™

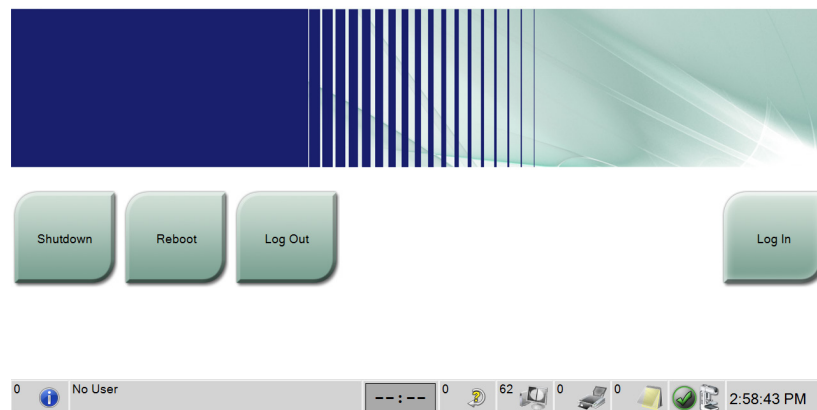

Figuur 18: Scherm *Startup* (Opstarten)



### Opmerking

Selecteer de knop **Log Out** (Uitloggen) om uit te loggen bij het Windows 10-besturingssysteem.



### Opmerking

Het *beginscherm* bevat een knop **Shutdown** (Afsluiten) waarmee het systeem wordt uitgeschakeld, en een knop **Reboot** (Opnieuw opstarten) waarmee het systeem opnieuw wordt opgestart.




### Opmerking

Het kan vijf tot vijftien minuten duren voordat het systeem gereed is voor het verwerven van beelden. De wachttijd is afhankelijk van de voedingsconfiguratie van de detector. Een timer in de taakbalk geeft aan hoelang het duurt voordat het systeem gereed is. Klinische beelden en beelden voor kwaliteitsbewaking mogen pas worden verworven wanneer het pictogram van de systeemstatus aangeeft dat het systeem gereed is.

### 4.2 Log In (Aanmelden)

1. Selecteer de knop **Aanmelden** op het *opstart scherm*.
2. Het scherm *Selecteer een operator* (Aanmelden bij systeem) wordt geopend en bevat een lijst met gebruikersnamen voor Manager en Technicus. Selecteer zo nodig de knop **Alles tonen** om de gebruikersnamen voor Service, Toepassingen en Fysicus te tonen.

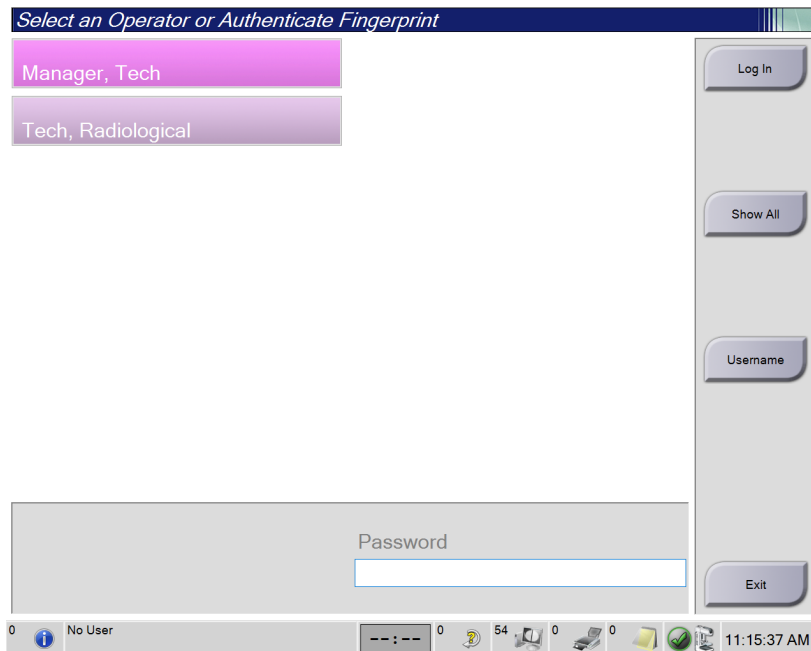

Figuur 19: Aanmeldscherm van systeem


3. Meld u met een van de volgende methoden aan bij het systeem:
  - Selecteer de knop met de juiste gebruikersnaam. Voer uw wachtwoord in en selecteer de knop **Aanmelden**.
  - Selecteer de knop **Gebruikersnaam**. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik vervolgens op de knop **Aanmelden**.
  - Valideer uw vingerafdruk door uw vinger in de vingerafdrukscanner te plaatsen.



#### Opmerking

Het kussentje van de vinger, niet de vingertop, levert het grootste deel van de unieke herhaalbare vingerafdruk-informatie. Een vlakke plaatsing van de vinger, zoals weergegeven in de linker afbeelding, leidt tot een snelle en nauwkeurige identificatie van de vingerafdruk.

---

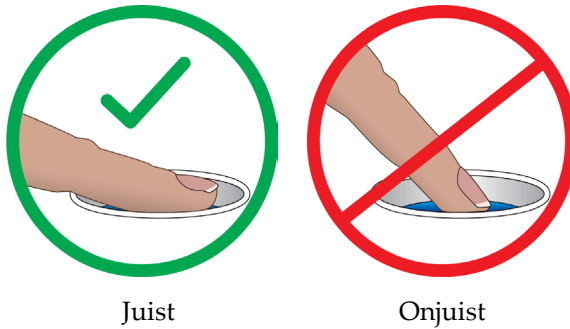


### Opmerking

Als kwaliteitsbewakingstaken moeten worden uitgevoerd, verschijnt het scherm *Uit te voeren functie selecteren*. U kunt kwaliteitsbewakingstaken uitvoeren of **Overslaan** selecteren.

## 4.3 De functionele tests uitvoeren

Om zeker te weten dat de bedieningselementen goed functioneren, moeten de functionele tests worden uitgevoerd als onderdeel van uw maandelijkse visuele checklijst. Controleer of alle knoppen goed functioneren (bedieningspanelen gantry en C-arm, zowel links als rechts).

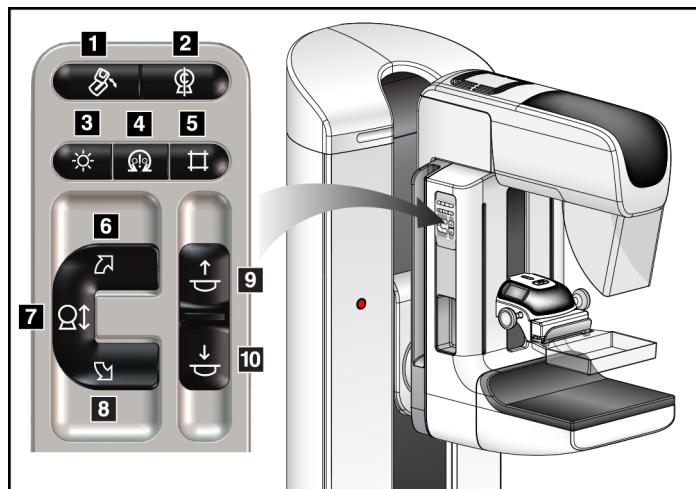

### Legenda

1. MLO-rotatie
2. C-arm nul
3. Lichtveldlamp
4. Motor inschakelen
5. Collimatoroverbrugging
6. Rotatie rechtsom van C-arm
7. C-arm omhoog en omlaag
8. Rotatie linksom van C-arm
9. Compressieapparaat omhoog
10. Compressieapparaat omlaag

Figuur 20: Bedieningspaneel op C-arm (afgebeeld is de linker zijde)





### Opmerking

De verticale beweging en de rotatie van de C-arm worden uitgeschakeld wanneer compressiekracht wordt uitgeoefend. Een servicetechnicus kan de blokkeerkracht configureren op een waarde van 22 Newton tot 45 Newton.

### 4.3.1 Functionele compressietests


Tabel 1: Compressietests

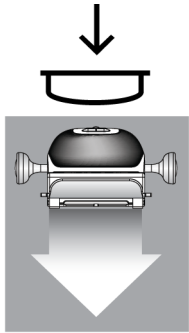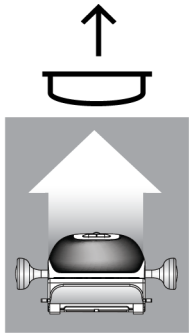Functie	Functionele test
<p data-bbox="378 457 626 527">Compressieapparaat omlaag</p> 	<p data-bbox="724 457 1357 491">Druk op een knop voor <b>Compressieapparaat omlaag</b>:</p> <ul data-bbox="773 501 1263 621" style="list-style-type: none"><li>• De compressierem grijpt aan.</li><li>• De lichtveldlamp gaat branden.</li><li>• Het compressieapparaat gaat omlaag.</li></ul> <p data-bbox="724 632 1357 737"><i>Opmerking... Wanneer u op de knop <b>Compressie omlaag</b> drukt, blijft de compressierem ingeschakeld tot de knop <b>Compressievrijgave</b> wordt ingedrukt.</i></p> <p data-bbox="724 768 1382 802">De beweging omlaag van het compressieapparaat stopt:</p> <ul data-bbox="773 812 1414 963" style="list-style-type: none"><li>• Wanneer u de knop loslaat.</li><li>• Wanneer u de grens van de kracht omlaag bereikt.</li><li>• Wanneer u de ondergrens van het bewegingsbereik bereikt.</li></ul>
<p data-bbox="378 987 626 1056">Compressieapparaat omhoog</p> 	<p data-bbox="724 987 1203 1020">Druk op een knop <b>Compressie omhoog</b>:</p> <ul data-bbox="773 1031 1398 1064" style="list-style-type: none"><li>• Het compressieapparaat gaat naar de bovenzijde.</li></ul> <p data-bbox="724 1075 1357 1144"><i>Opmerking... Met de knop <b>Compressie omhoog</b> wordt de compressierem NIET ontgrendeld.</i></p> <p data-bbox="724 1176 1390 1245">De beweging omhoog van het compressieapparaat stopt automatisch:</p> <ul data-bbox="773 1255 1227 1365" style="list-style-type: none"><li>• Wanneer u de knop loslaat.</li><li>• Wanneer u de bovengrens van het bewegingsbereik bereikt.</li></ul>


### 4.3.2 Functionele tests van de C-armbeweging

#### Beweging omhoog en omlaag van de C-arm

Tabel 2: Beweging omhoog en omlaag van de C-arm

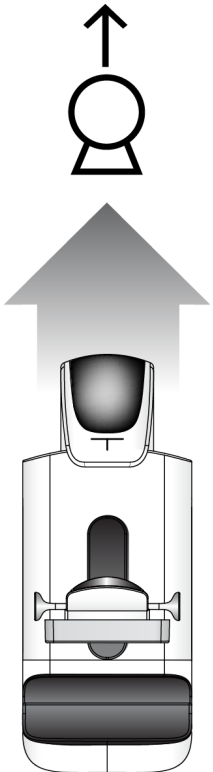Functie	Functionele test
<p>C-arm omhoog</p> 	<p>Druk op de knop voor <b>C-arm omhoog</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De beweging van de C-arm stopt wanneer de knop wordt losgelaten.</li> <li>• De beweging van de C-arm stopt wanneer de C-arm de bovengrens van het bewegingsbereik bereikt.</li> <li>• De verticale beweging en de rotatie van de C-arm worden uitgeschakeld wanneer compressiekracht wordt uitgeoefend. Een servicetechnicus kan de blokkeerkracht configureren op een waarde van 22 Newton tot 45 Newton.</li> </ul>

Tabel 2: Beweging omhoog en omlaag van de C-arm

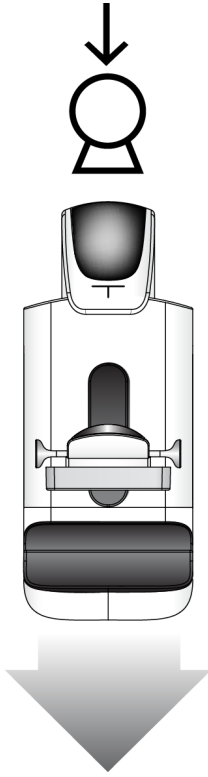
Functie	Functionele test
<p data-bbox="378 363 548 394">C-arm omlaag</p> 	<p data-bbox="724 373 1170 405">Druk op de knop voor <b>C-arm omlaag</b>.</p> <ul data-bbox="773 422 1417 747" style="list-style-type: none"><li>• De beweging van de C-arm stopt wanneer de knop wordt losgelaten.</li><li>• De beweging van de C-arm stopt wanneer de C-arm de ondergrens van het bewegingsbereik bereikt.</li><li>• De verticale beweging en de rotatie van de C-arm worden uitgeschakeld wanneer compressiekracht wordt uitgeoefend. Een servicetechnicus kan de blokkeerkracht configureren op een waarde van 22 Newton tot 45 Newton.</li></ul>



### Rotatie van C-arm

Tabel 3: Rotatie linksom van C-arm

Functie	Functionele test
Rotatie linksom van C-arm	Druk op de knop voor <b>rotatie linksom van de C-arm</b> (onderdeel 1) om de rotatie linksom van de C-arm te starten. De beweging van de C-arm stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten. Om de rotatie van de C-arm fijn af te stellen in segmenten van één graad, houdt u de knop een seconde ingedrukt en laat u deze daarna snel los. Herhaal dit zo nodig.

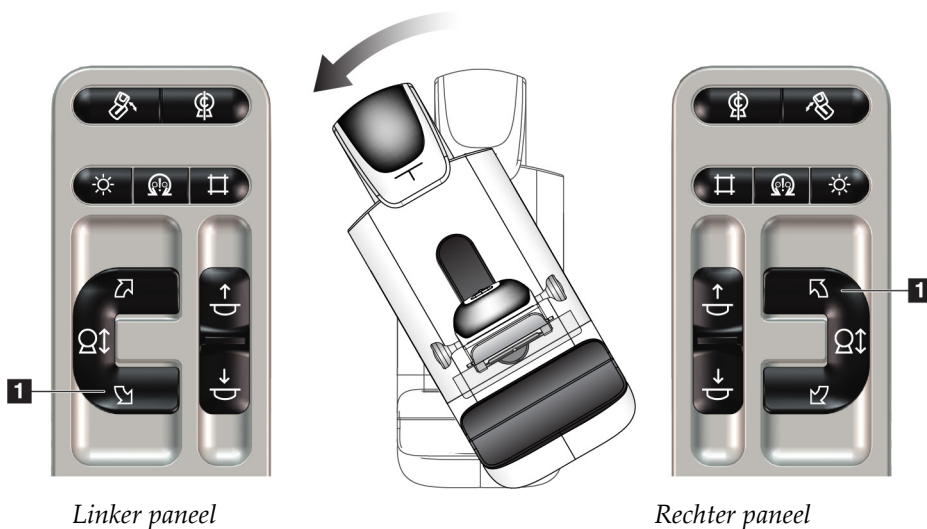


# Gebruikershandleiding 3Dimensions-systeem

## Hoofdstuk 4: Opstarten, Functionele tests en Afsluiten


Tabel 4: Rotatie rechtsom van C-arm

Functie	Functionele test
Rotatie rechtsom van C-arm	Druk op de knop voor <b>rotatie rechtsom van de C-arm</b> (onderdeel 1) om de rotatie rechtsom van de C-arm te starten. De beweging van de C-arm stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten. Om de rotatie van de C-arm fijn af te stellen in segmenten van één graad, houdt u de knop een seconde ingedrukt en laat u deze daarna snel los. Herhaal dit zo nodig.

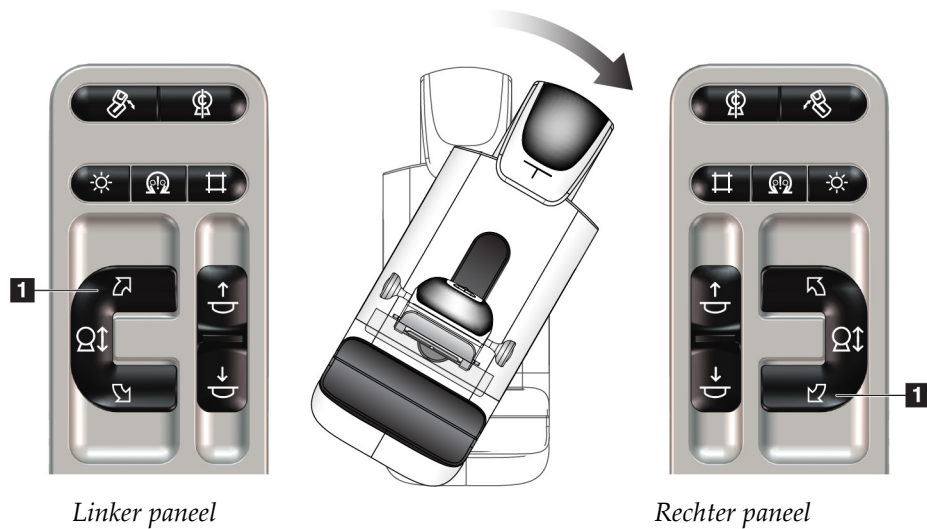

Tabel 5: Rotatieschakelaar van C-arm

Functie	Functionele test
Rotatieschakelaar van C-arm	<p>Duw de rotatieschakelaar op de C-arm van u af om de C-arm naar u toe te bewegen.</p> <p>Trek de rotatieschakelaar op de C-arm naar u toe om de C-arm van u af te bewegen.</p> <p>De beweging van de C-arm stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.</p>

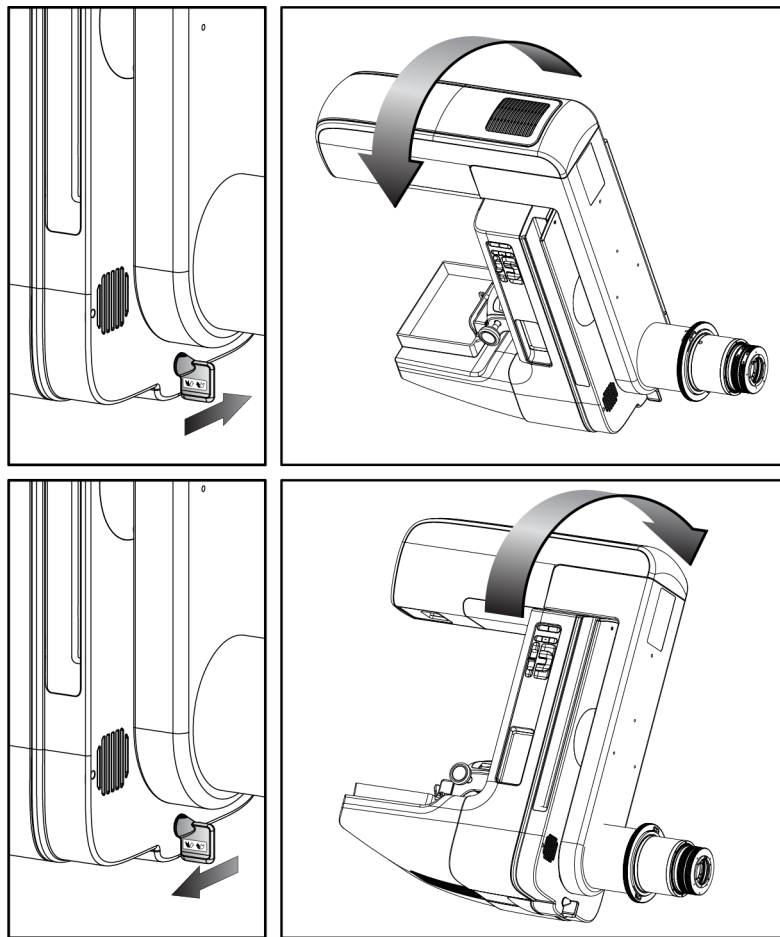

### Automatische rotatie van de C-arm





**Waarschuwing:**

Risico van vastzitten. Zorg ervoor dat de C-arm 50 cm speling heeft ten opzichte van elk object tijdens de rotatie van de C-arm. Gebruik de automatische rotatie niet wanneer de speling van de C-arm minder dan 50 cm is.




**Opmerking**

Om de automatische rotatiebeweging van de C-arm te stoppen, drukt u op een willekeurige knop of de nooduitschakelingsschakelaar.

<p>Motor inschakelen</p> 	<p>Druk gelijktijdig op de knop voor <b>motorinschakeling</b> en de knop voor <b>rotatie</b> om een automatische rotatie naar rechts of naar links in te schakelen.</p>
<p>C-arm nul</p> 	<p>Druk gelijktijdig op de knop voor <b>motorinschakeling</b> en de knop voor <b>nulinstelling van de C-arm</b>. Laat de knoppen los. Het apparaat laat een pieptoon horen waarna de C-arm automatisch naar de nulpositie terugkeert.</p>


Tabel 6: Automatische rotatie linksom van C-arm

Functie	Functionele test
<p>Automatische rotatie linksom van C-arm</p>	<p>Druk gelijktijdig op de knop voor <b>motorinschakeling</b> (onderdeel 1) en de knop voor <b>rotatie linksom van de C-arm</b> (onderdeel 2). Laat de knoppen los. Het apparaat laat een pieptoon horen waarna de C-arm automatisch linksom beweegt.</p>

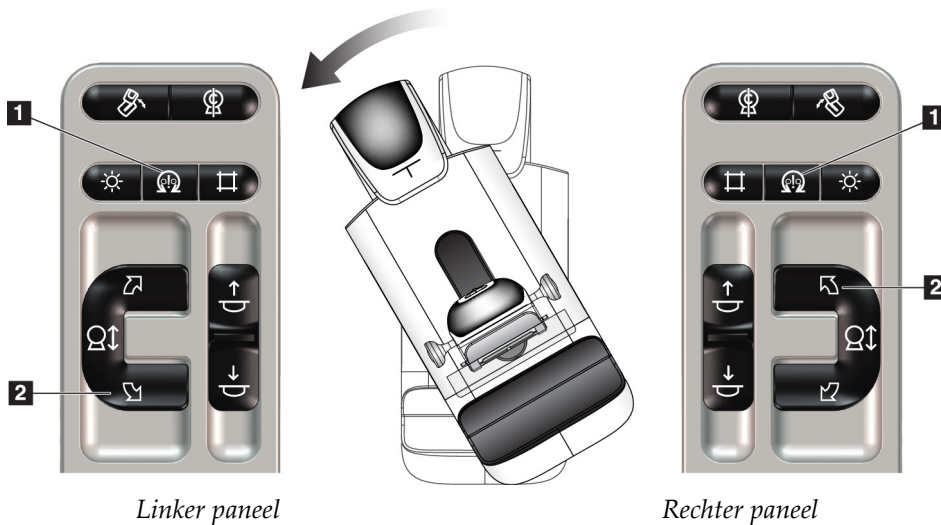

Tabel 7: Automatische rotatie rechtsom van C-arm


Functie	Functionele test
Automatische rotatie rechtsom van C-arm	Druk gelijktijdig op de knop voor <b>motorinschakeling</b> (onderdeel 1) en de knop voor <b>rotatie rechtsom van de C-arm</b> (onderdeel 2). Laat de knoppen los. Het apparaat laat een pieptoon horen waarna de C-arm automatisch rechtsom beweegt.

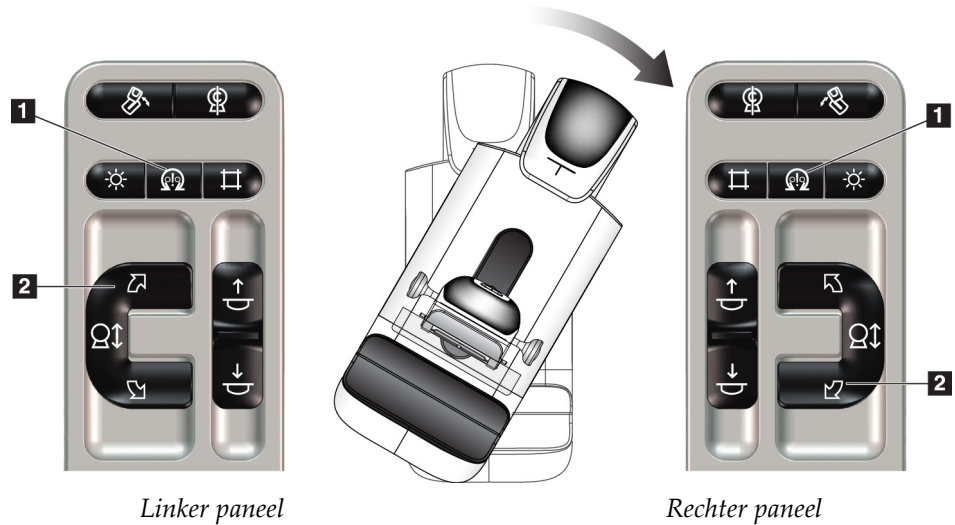

### MLO automatische rotatie

Tabel 8: Automatische MLO-rotatie

Functie	Functionele test
Automatische buiskoprotatie naar nulpositie	Positioneer de C-arm onder een hoek van meer dan 15 graden. Druk op de knop voor <b>MLO-rotatie</b> (onderdeel 1). De buisknop gaat automatisch naar de nulpositie. De compressiearm blijft in de gehoekte positie. Druk nogmaals op de knop <b>MLO-rotatie</b> om de buisknop weer in de oorspronkelijke positie te plaatsen.

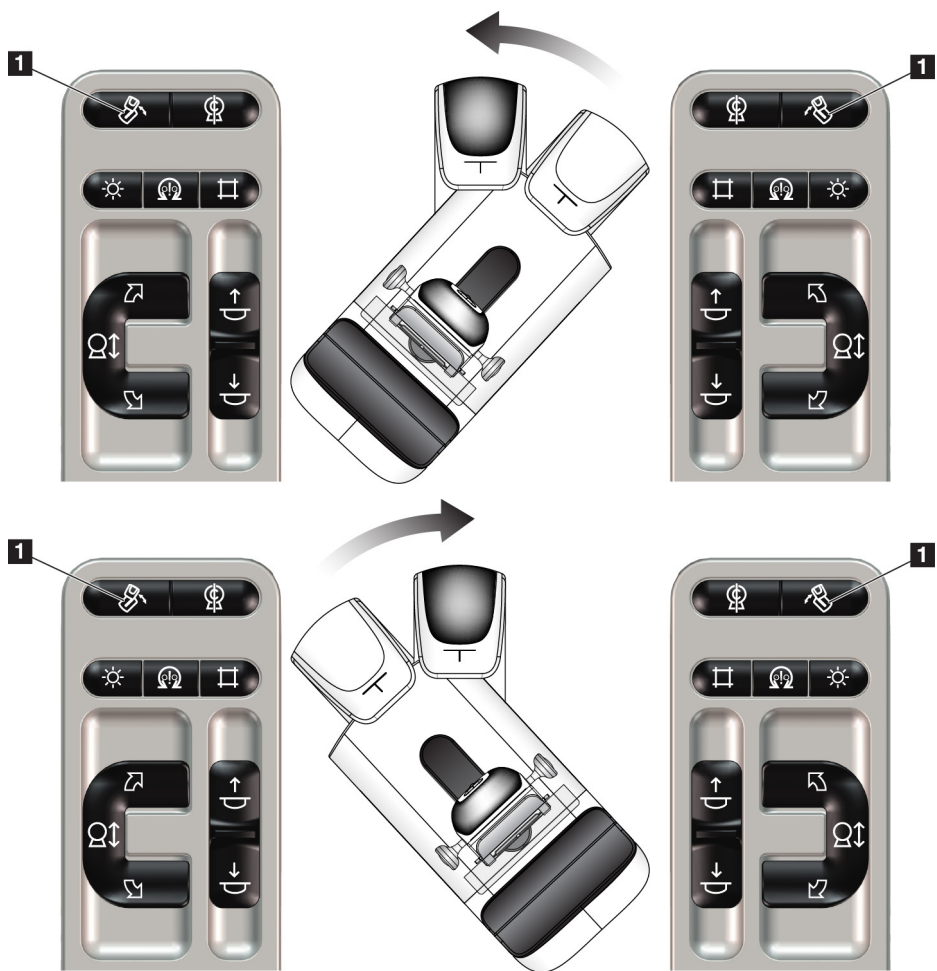



Linker paneel

Rechter paneel

### 4.3.3 Collimatie

Tabel 9: Collimatie C-arm

Functie	Functionele test
Collimatoroverbrugging 	Met de knop voor <b>collimatoroverbrugging</b> verandert de collimatie door de verschillende röntgenvelden. Druk op de knop voor <b>lichtveldlamp</b> om het röntgenveld te tonen en drukt vervolgens op de knop voor <b>collimatoroverbrugging</b> om een röntgenveld te selecteren.
Lichtveldlamp 	Voor compressiepaddles: Druk op de knop voor <b>lichtveldlamp</b> om gedurende twee minuten het röntgenveld te zien. Voor lokalisatiepaddles: Druk op de knop voor <b>lichtveldlamp</b> om gedurende de ingestelde tijd het röntgenveld te zien. De standaardtijd voor biopsie of naaldlokalisatiepaddles is tien minuten. Druk nogmaals op de knop voor <b>lichtveldlamp</b> om de lichtveldlamp uit te schakelen. De lichtveldlamp gaat automatisch branden aan het begin van de beweging omlaag van het compressieapparaat.

### 4.3.4 Paddles verschuiven




#### Opmerking

De meeste paddles kunnen worden gebruikt in combinatie met de paddle verschuiven-functie. De grote frameloze screeningpaddle van 24 x 29 cm, de grote SmartCurve®-systeempaddle van 24 x 29 cm en de vergrotingspaddles zijn niet compatibel met de functie Paddle verschuiven.


Gebruik de 18 x 24 cm frameloze screeningpaddle om de paddle verschuiven-functie te testen.

Tabel 10: Paddle verschuiven

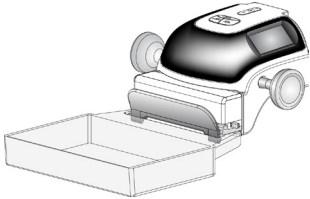Functie	Functionele test
<p>Paddleverschuiving</p> 	<p>De screeningspaddle van 18 x 24 cm beweegt ongeveer 2,5 cm naar de linker, midden- of rechter positie. U kunt de paddle niet verplaatsen wanneer er compressie wordt uitgevoerd. De collimator is geprogrammeerd om de positie van de paddle te volgen.</p> <p>U test deze functie als volgt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Installeer de paddle van 18 x 24 cm in het compressieapparaat.</li><li>2. Selecteer een weergave.</li><li>3. Gebruik de <b>paddleverschuivingsknoppen</b> op het <i>procedurescherm</i> om de positie op te heffen.</li><li>4. Controleer of de paddle automatisch naar de nieuwe positie gaat.</li><li>5. Schakel de lichtveldlamp in.</li><li>6. Verifieer dat de positie van de collimator overeenkomt met die van de paddle.</li><li>7. Herhaal deze procedure voor de andere paddleposities.</li></ol>



## 4.4 Functionaliteit nooduitschakelingsschakelaars

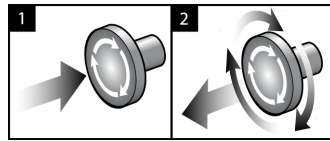

Figuur 21: Functionaliteit nooduitschakelingsschakelaar

Er zijn drie nooduitschakelingsschakelaars, één aan elke zijde van de gantry en één op het verwervingswerkstation.


1. Druk op een van de nooduitschakelingsschakelaars om de gantry en het liftmechanisme van het verwervingswerkstation uit te schakelen.
2. De nooduitschakelingsschakelaar wordt gereset door deze een kwartslag rechtsom te draaien tot de schakelaar weer naar buiten schiet.

## 4.5 Het systeem uitschakelen

1. Sluit eventueel geopende patiëntprocedures. Raadpleeg [Een patiënt sluiten](#) op pagina 77.
2. Selecteer in het scherm *Patiënt selecteren* de knop **Afmelden**.
3. Selecteer in het *opstartscherm* de knop **Shutdown** (Uitschakelen).
4. Selecteer de knop **Ja** in het bevestigingsvenster.

## 4.6 Het systeem spanningsloos maken

Zie de volgende figuur voor illustraties van de knoppen en de schakelaars die in de volgende procedures worden genoemd.

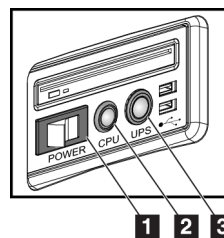

Figuur 22: Aan/uit-knoppen Universeel verwervingswerkstation

### Legenda

1. Aan/uit-schakelaar verwervingswerkstation
2. Aan/reset-knop computer
3. Aan/uit-knop UPS

Om het systeem spanningsloos te maken:

1. Schakel het systeem uit.
2. Als uw systeem is voorzien van de UPS, druk dan de UPS-knop (onderdeel 3) in.
3. Schakel de aan/uit-schakelaar van het verwervingswerkstation (onderdeel 1) UIT.
4. Trek de netstekker van het verwervingswerkstation uit de wandcontactdoos.
5. Schakel de stroomonderbreker van de gantry UIT.
6. Schakel de stroomonderbreker van de hoofdstroomvoorziening van de instelling UIT.



## Hoofdstuk 5 Gebruikersinterface

### 5.1 Scherm Uit te voeren functie selecteren

Nadat u zich hebt aangemeld, verschijnt het scherm *Uit te voeren functie selecteren*. Op dit scherm worden de kwaliteitsbewakingstaken getoond die moeten worden uitgevoerd.



#### Opmerking

Het scherm *Patiënt selecteren* verschijnt wanneer er geen kwaliteitsbewakingstaken gepland staan.

Naam	Laatst uitgevoerd	Einddatum
Kwaliteitscontrole DICOM-printer		23-6-2017
Versterkingskalibratie	22-4-2017	24-4-2017
CEDM Gain Calibration	20-5-2017	22-5-2017
Artefactevaluatie		23-6-2017
Beeldkwaliteit fantoom		23-6-2017
SNR/CNR		23-6-2017
Compressiedikte-indicator		23-6-2017
Diagnostische beoordeling kwaliteitscontrole werkstation		23-6-2017
Viewboxes en weergavecondities		23-6-2017
Visuele checklijst		23-6-2017
Analyse weigeren		23-6-2017
Analyse herhalen		23-6-2017
Compressietest		23-6-2017

Figuur 23: Een voorbeeld van het scherm *Uit te voeren functie selecteren*

#### Een geplande kwaliteitsbewakingstaak uitvoeren:

1. Selecteer een kwaliteitsbewakingstaak uit de lijst.
2. Selecteer de knop **Start**. Volg de berichten om de procedure uit te voeren. (De knop **Start** is niet beschikbaar voor alle typen tests.)  
- OF -  
Selecteer de knop **Markeren als voltooid** om deze procedure als voltooid te markeren. Selecteer **Ja** om de geselecteerde procedure als voltooid te bevestigen.
3. Selecteer **Einde KB**.

**Verdergaan zonder alle geplande kwaliteitsbewakingstaken uit te voeren:**

Als op dit moment niet alle kwaliteitsbewakingstaken zijn voltooid, selecteert u de knop **Overslaan**.



**Opmerking**

Als u de knop **Overslaan** selecteert, verschijnt het scherm *Patiënt selecteren*. Raadpleeg [Het scherm Patiënt selecteren](#) op pagina 59 voor informatie over dit scherm.

Als u de knop **Admin** (Beheer) selecteert, verschijnt het scherm *Admin* (Beheer). Raadpleeg [Scherm Admin \(Beheer\)](#) op pagina 145 voor informatie over dit scherm.




**Opmerking**

Kwaliteitsbewakingstaken kunnen op elk moment worden uitgevoerd. Selecteer eerst de knop **Admin** (Beheer) en vervolgens de knop **Kwaliteitsbewaking** om de lijst met kwaliteitsbewakingstaken weer te geven.

## 5.2 Info over de taakbalk

Op de taakbalk onder aan het scherm worden extra pictogrammen weergegeven. Selecteer het pictogram om toegang te krijgen tot informatie of om systeemtaken uit te voeren.


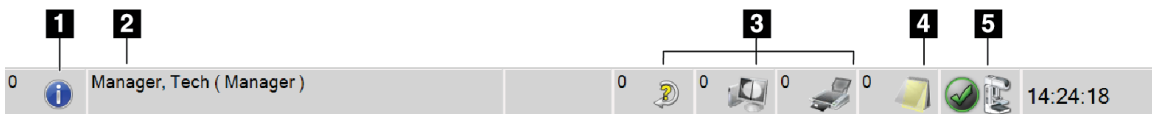










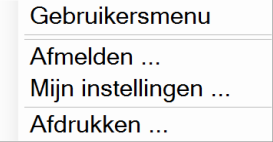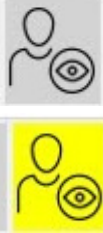

Figuur 24: Taakbalk


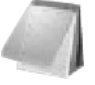



Tabel 11: Taakbalkmenu's

	Beschrijving	Menu
1	<p><b>Informatiepictogram</b></p> <p>Selecteer het pictogram <b>Info</b> om het menu Alarm weer te geven. Dit gedeelte van de taakbalk knippert geel wanneer een alarm is geactiveerd.</p> <p>Selecteer <b>Alles bevestigen</b> om de knipperende indicatie te stoppen.</p> <p>Selecteer <b>Alarmen beheren</b> om eventuele openstaande alarmen weer te geven en te sluiten.</p>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Geen alarmen</p> <hr/> <p>Alles bevestigen</p> <p>Alarmen beheren ...</p> </div>


Tabel 11: Taakbalkmenu's

	Beschrijving	Menu								
2	<p align="center"><b>Gebruikersnaam van huidige gebruiker</b></p> <p>Selecteer het gebruikersnaamgedeelte op de taakbalk om het menu Gebruikers weer te geven.</p> <p>Met <b>Afmelden</b> gaat u terug naar het <i>opstartscherm</i>.</p> <p>Met <b>Mijn instellingen</b> kunt u gebruikersinstellingen en werkstroomvoorkeuren selecteren.</p> <p>Met <b>Afdrukken</b> stuurt u de weergegeven lijst met patiënten naar een aangesloten printer.</p>									
	<p align="center"><b>Leesprioriteitindicator</b></p> <p>Als u Genius AI Detection-software heeft, wordt de indicator voor de leesprioriteit weergegeven. De kleur van het pictogram wordt geel als patiënten volgens de Genius AI-detectieresultaten als hoge leesprioriteit zijn gemarkeerd. Selecteer het pictogram <b>Leesprioriteit</b> om de lijst met patiënten weer te geven die door de Genius AI Detection-software met een hoge leesprioriteit zijn gemarkeerd. Selecteer de knop X om de patiënt uit de lijst met leesprioriteiten te wissen. Raadpleeg <a href="#">Info over Genius AI Detection</a> op pagina 10 voor meer informatie.</p> <div data-bbox="493 1066 971 1304" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center"><b>Leesprioriteit</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Naam patiënt</th> <th>Voltooiingstijd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patient, Test</td> <td>00.02:12 geleden </td> </tr> <tr> <td>Patient, Test 2</td> <td>00.02:02 geleden </td> </tr> <tr> <td>Test, Patient</td> <td>00.01:10 geleden </td> </tr> </tbody> </table> </div>	Naam patiënt	Voltooiingstijd	Patient, Test	00.02:12 geleden 	Patient, Test 2	00.02:02 geleden 	Test, Patient	00.01:10 geleden 	
Naam patiënt	Voltooiingstijd									
Patient, Test	00.02:12 geleden 									
Patient, Test 2	00.02:02 geleden 									
Test, Patient	00.01:10 geleden 									
	<p align="center"><b>Contrastmiddeltimer</b></p> <p>Als u <a href="#">I-View contrastversterkte 2D-beelden</a> op pagina 104 hebt, wordt de contrastmiddeltimer weergegeven. De timer wordt tijdens een 2D-contrastprocedure geactiveerd. De timer geeft de resterende tijd voor elke contrastfase weer. De kleur van de timer geeft de contrastfase aan.</p> <p>(Initiële fase) Geel = wachtperiode; het contrastmiddel heeft zich nog niet volledig verspreid.</p> <p>Groen = Optimale beeldvormingsperiode; het contrastmiddel heeft zich volledig verspreid.</p> <p>(Laatste fase) Geel = Late periode, het contrastmiddel is aan het oplossen.</p>									

Tabel 11: Taakbalkmenu's

	Beschrijving	Menu								
<p>3</p> 	<p align="center"><b>Pictogrammen van het uitvoerapparaat</b></p> <p>Selecteer een pictogram van een uitvoerapparaat om het scherm <i>Wachtrijen beheren</i> weer te geven. Dit scherm geeft de status van taken in de wachtrij weer alsmede taakinformatie voor de geselecteerde uitvoer. In dit scherm kunt u ook de wachtrijweergave filteren. Het getal in het pictogram geeft het aantal taken in de wachtrij weer.</p>									
<p>4</p> 	<p align="center"><b>Meldingepictogram</b></p> <p>Selecteer het pictogram <b>Mededelingen</b> om het scherm <i>Patiënten met niet-bekeken mededelingen</i> weer te geven. Het getal in het pictogram geeft het aantal patiënten met niet-bekeken mededelingen aan.</p>									
<p>5</p>   	<p align="center"><b>Systeemstatuspictogrammen</b></p> <p>Als er naast het pictogram <b>Systeemstatus (buiskop)</b> een groen vinkje staat, is het systeem klaar voor gebruik. Selecteer het pictogram <b>Systeemstatus</b> om het menu Fouten weer te geven.</p> <p>Als het pictogram <b>Systeemstatus</b> rood is en er een getal naast staat, moet het systeem het aangegeven aantal minuten wachten voordat het volgende beeld veilig kan worden opgenomen.</p> <p>Als er naast het pictogram <b>Systeemstatus</b> een geel uitroepteken staat en dit gedeelte van de taakbalk geel knippert, is er een fout opgetreden. Selecteer het pictogram <b>Systeemstatus</b> voor meer informatie over de fout.</p> <p>Bij selectie van <b>Alle fouten wissen</b> worden alle foutmeldingen verwijderd.</p> <p>Bij selectie van <b>Röntgenbuis, 0 graden</b> wordt de rotatie van de buiskop op nul graden gezet voor de volgende belichting.</p> <p>Bij selectie van <b>Röntgenbuis, -15 graden</b> wordt de rotatie van de buiskop op -15 graden gezet voor belichting voor een belichting.</p> <p>Bij selectie van <b>Röntgenbuis, +15 graden</b> wordt de rotatie van de buiskop op +15 graden gezet voor belichting voor een belichting.</p> <p>Bij selectie van <b>Systeemdiagnostiek</b> worden de instellingen van het subsysteem geopend.</p> <p>Bij selectie van <b>Standaardinstellingen systeem</b> wordt het scherm <i>Standaardinstellingen gantry</i> geopend voor het instellen van de standaardwaarden voor de compressie en de generator.</p> <p>Bij selectie van <b>Info</b> wordt informatie weergegeven over het verwervingswerkstation (raadpleeg <a href="#">Scherm Info</a> op pagina 148).</p>	<table border="1"> <tr><td>Geen fouten</td></tr> <tr><td>Alle fouten wissen</td></tr> <tr><td>Röntgenbuis, 0 graden</td></tr> <tr><td>Röntgenbuis, -15 graden</td></tr> <tr><td>Röntgenbuis, +15 graden</td></tr> <tr><td>Systeemdiagnostiek ...</td></tr> <tr><td>Standaardinstellingen systeem ...</td></tr> <tr><td>Info ...</td></tr> </table>	Geen fouten	Alle fouten wissen	Röntgenbuis, 0 graden	Röntgenbuis, -15 graden	Röntgenbuis, +15 graden	Systeemdiagnostiek ...	Standaardinstellingen systeem ...	Info ...
Geen fouten										
Alle fouten wissen										
Röntgenbuis, 0 graden										
Röntgenbuis, -15 graden										
Röntgenbuis, +15 graden										
Systeemdiagnostiek ...										
Standaardinstellingen systeem ...										
Info ...										

### 5.3 Het scherm Patiënt selecteren

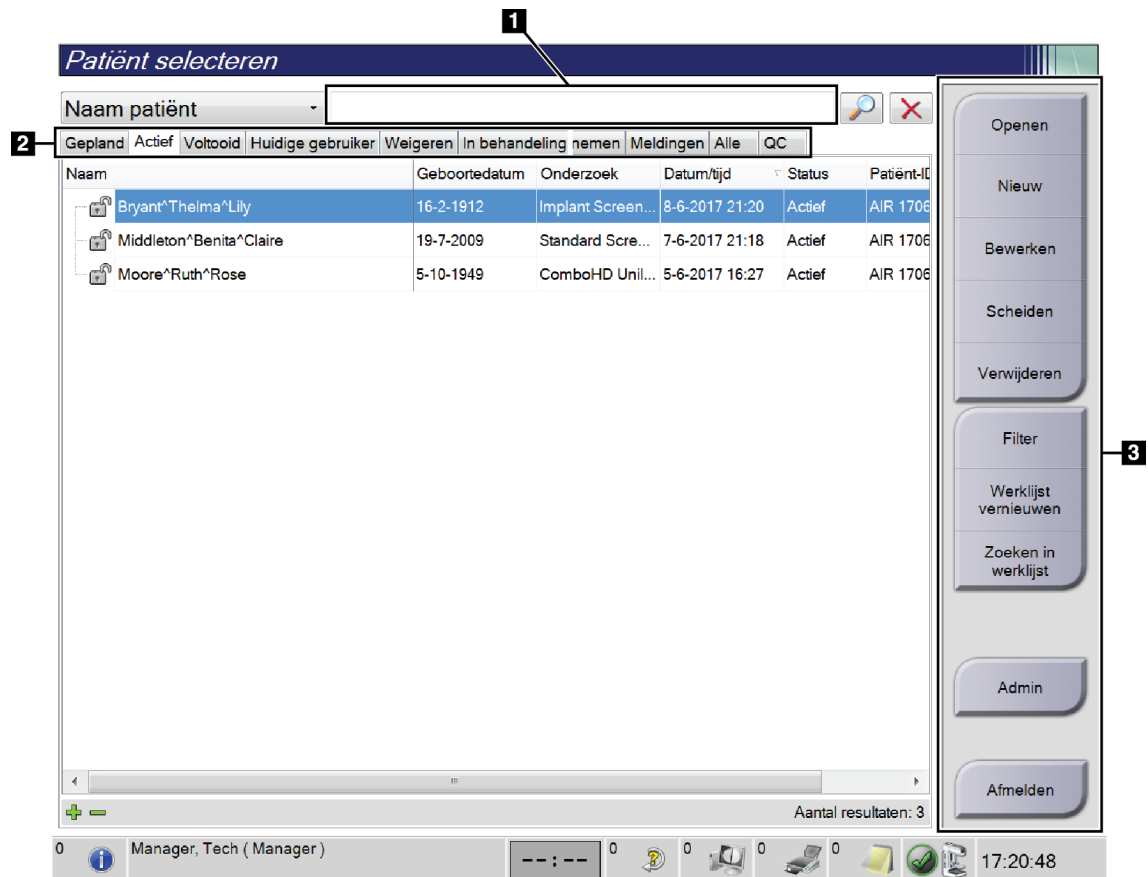


Figuur 25: Het scherm Patiënt selecteren

Tabel 12: Het scherm Patiënt selecteren

Onderdeel	Beschrijving
<b>1. Snelzoeken</b>	Zoek op het geselecteerde tabblad naar de patiëntnaam, de patiënt-ID of het toegangsnummer.
<b>2. Tabbladen</b>	<p>De tabbladen boven aan het scherm zijn configureerbaar. Een gebruiker met de juiste machtigingen kan tabbladen verwijderen en nieuwe tabbladen maken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het tabblad <b>Gepland</b> geeft de geplande procedures weer.</li> <li>• Het tabblad <b>Actief</b> geeft de procedures die nog niet zijn voltooid weer.</li> <li>• Het tabblad <b>Voltooid</b> geeft de voltooide procedures weer.</li> <li>• Het tabblad <b>Huidige gebruiker</b> geeft de procedures voor de huidige operator weer.</li> <li>• Het tabblad <b>Weigeren</b> geeft de procedures met afgewezen weergaven weer.</li> </ul>

Tabel 12: Het scherm Patiënt selecteren

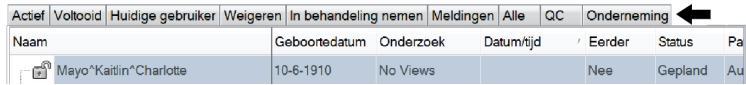Onderdeel	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het tabblad <b>In behandeling</b> geeft de procedures met in behandeling zijnde weergaven weer.</li> <li>Het tabblad <b>Alle</b> geeft alle procedures voor alle gebruikers weer.</li> <li>Het tabblad <b>Meldingen</b> geeft de patiënten met niet-bekeken mededelingen standaard weer. Raadpleeg <a href="#">Info over het tabblad Meldingen</a> op pagina 61 voor volledige informatie.</li> <li>Het tabblad <b>QC</b> geeft de kwaliteitsbewakingsprocedures weer.</li> <li>Het tabblad <b>Onderneming</b> wordt weergegeven als u beschikt over de <a href="#">Advanced Workflow Manager</a> op pagina 67. Op dit tabblad staat een lijst met alle studies die zijn verworven op systemen binnen een Advanced Workflow Manager-cluster. De distributie van de studies wordt op dit tabblad beheerd.</li> </ul>  <p style="text-align: center;">Figuur 26: Het tabblad Onderneming</p>
<b>3. Knoppen</b>	<p>Veel functies kunnen vanuit dit scherm worden geopend door selectie van een bepaalde knop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Openen:</b> Open de geselecteerde patiënt.</li> <li><b>Nieuw:</b> Een nieuwe patiënt toevoegen – raadpleeg <a href="#">Een nieuwe patiënt toevoegen</a> op pagina 61.</li> <li><b>Bewerken:</b> De patiëntinformatie bewerken – raadpleeg <a href="#">De patiëntinformatie bewerken</a> op pagina 62.</li> <li><b>Scheiden:</b> De beelden van een procedure of een patiënt verwijderen en de beelden verplaatsen naar een andere procedure of patiënt – raadpleeg <a href="#">De patiëntendossiers scheiden</a> op pagina 62.</li> <li><b>Verwijderen:</b> De geselecteerde patiënt verwijderen – raadpleeg <a href="#">Een patiënt verwijderen</a> op pagina 64.</li> <li><b>Filter:</b> Een patiëntenfilter gebruiken – raadpleeg <a href="#">Filters voor patiënten</a> op pagina 65.</li> <li><b>Werklijst vernieuwen:</b> De werkljst informatie van de geplande patiënt bijwerken – raadpleeg <a href="#">De werkljst vernieuwen</a> op pagina 66.</li> <li><b>Zoeken in werkljst:</b> Zoeken naar een patiënt in de modaliteitenwerkljst – raadpleeg <a href="#">De werkljst doorzoeken</a> op pagina 67.</li> <li><b>Admin (Beheer):</b> Het scherm <i>Admin (Beheer)</i> openen – raadpleeg <a href="#">Scherm Admin (Beheer)</a> op pagina 145.</li> <li><b>Afmelden:</b> Het systeem afsluiten – zie <a href="#">Afmelden</a> op pagina 67.</li> </ul>



### 5.3.1 Info over het tabblad Meldingen

- Na selectie van het tabblad **Meldingen** in het scherm *Patiënt selecteren* wordt een lijst van de patiënten met mededelingen weergegeven.
- De standaardinstelling voor de lijst is patiënten met bekeken en niet-bekeken mededelingen.
- U kunt de standaardinstelling wijzigen in patiënten met bekeken mededelingen of in patiënten met niet-bekeken mededelingen.
- Selecteer de knop **Openen** om het *procedurescherm* voor de geselecteerde patiënt weer te geven.

### 5.3.2 Een patiënt openen

1. Selecteer een tabblad om de gewenste lijst met patiënten weer te geven.
2. Selecteer een patiënt in de lijst. De knop **Openen** wordt actief.
3. Selecteer **Openen** om het *procedurescherm* voor die patiënt weer te geven.

### 5.3.3 Een nieuwe patiënt toevoegen

1. Selecteer in het scherm *Patiënt selecteren* de knop **Nieuw**. Het scherm *Patiënt toevoegen* wordt geopend.

The screenshot shows the 'Patiënt toevoegen' (Add Patient) form. The form is titled 'Patiënt toevoegen' and contains several input fields and dropdown menus. The fields are: 'Laatst', 'Eerst', 'Midden', 'Patiënt-ID\*', 'Geboortedatum\*', 'Geslacht\*', 'Toegangsnummer', and 'Procedure\*'. The 'Geslacht\*' dropdown is set to 'Vrouwelijk'. The 'Procedure\*' dropdown is set to 'Conventional', and there is a secondary dropdown below it set to 'Standard Screening - Conventional'. On the right side of the form, there are two buttons: 'Openen' (Open) and 'Vorige' (Previous). The Windows taskbar at the bottom shows the user 'Manager, Tech (Manager)', system icons, and the time '11:07:15'.

Figuur 27: Patiëntscherm toevoegen

2. Voer de gegevens van de nieuwe patiënt in en selecteer een procedure.
3. Selecteer de knop **Openen**. Het scherm *Procedure* voor de nieuwe patiënt wordt geopend.

### 5.3.4 De patiëntinformatie bewerken

1. Selecteer in het scherm *Patiënt selecteren* de naam van de patiënt en selecteer vervolgens de knop **Bewerken**.
2. Breng in het scherm *Patiënt bewerken* wijzigingen aan en selecteer vervolgens de knop **Opslaan**.
3. Selecteer **OK** wanneer het bericht *Update geslaagd* wordt weergegeven.

### 5.3.5 De patiëntendossiers scheiden

Met de functie Scheiden kunt u beelden verplaatsen wanneer de beelden zijn verworven in de verkeerde procedure of voor de verkeerde patiënt.




#### Opmerking

U kunt geen beelden scheiden voor beschermde patiënten.



#### Opmerking

Na gebruik van de functie Scheiden moeten gearchiveerde patiëntendossiers nog wel worden gecorrigeerd op PACS of een ander archiefsysteem.

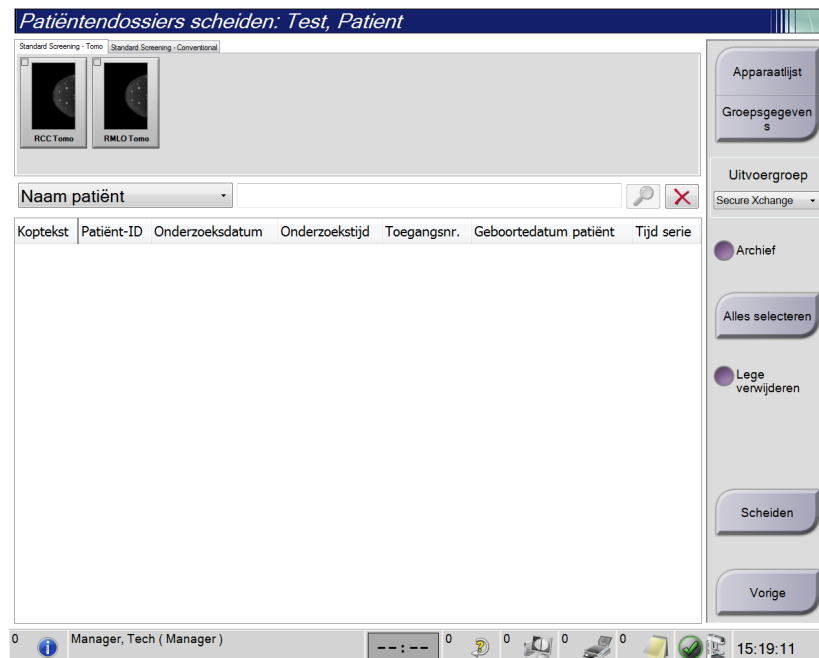


Figuur 28: Het scherm *Patiëntendossiers scheiden*

### Beelden verworven in de verkeerde procedure

1. Selecteer in het scherm *Patiënt selecteren* de patiënt.
2. Selecteer de knop **Scheiden**. Het scherm *Patiëntendossiers scheiden* wordt geopend.
3. Selecteer de te verplaatsen beelden. Als alle beelden moeten worden verplaatst, selecteert u **Alles selecteren**.
4. Selecteer uw zoekcriteria (bijvoorbeeld patiëntnaam of toegangsnummer) met behulp van de vervolgkeuzelijst onder de beelden.
5. Voer de gegevens van dezelfde patiënt in en selecteer de knop **Zoeken** (het vergrootglas).
6. Wanneer de patiëntnaam verschijnt, selecteert u de juiste procedure voor de beelden.
7. Als ALLE beelden moeten worden verplaatst en u de onjuiste procedure wilt verwijderen, selecteert u **Lege verwijderen**.
8. Als u de beelden wilt archiveren of opslaan op een opslagapparaat, selecteert u **Archief**. Controleer of de juiste uitvoer is geselecteerd.
9. Selecteer de knop **Scheiden** en vervolgens **OK** wanneer het bericht *Scheiden geslaagd* wordt weergegeven.

### Beelden verworven in de verkeerde patiënt

1. Selecteer in het scherm *Patiënt selecteren* de patiënt met de beelden die moeten worden verplaatst.
2. Selecteer de knop **Scheiden**. Het scherm *Patiëntendossiers scheiden* wordt geopend.
3. Selecteer de te verplaatsen beelden. Als alle beelden moeten worden verplaatst, selecteert u **Alles selecteren**.
4. Selecteer uw zoekcriteria (bijvoorbeeld patiëntnaam of toegangsnummer) met behulp van de vervolgkeuzelijst onder de beelden.
5. Voer de zoekcriteria in en selecteer de knop **Zoeken** (het vergrootglas).
6. Wanneer de patiëntnaam verschijnt, selecteert u de juiste procedure.

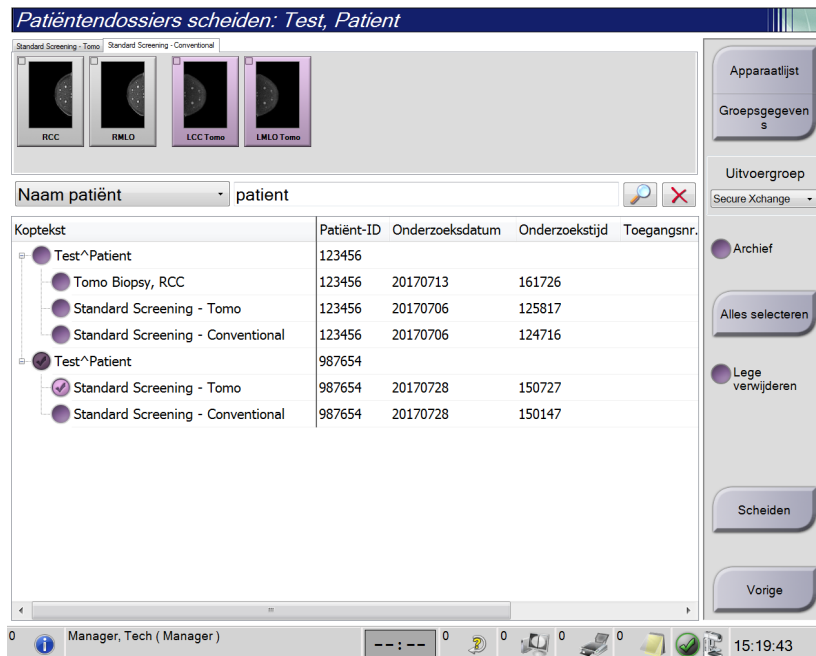

Figuur 29: Selecteer de juiste procedure om patiëntendossiers te scheiden

7. Als ALLE beelden moeten worden verplaatst en u de onjuiste patiënt uit de lijst met patiënten wilt verwijderen, selecteert u **Lege verwijderen**.
8. Als u de beelden wilt archiveren of opslaan op een opslagapparaat, selecteert u **Archief**. Controleer of de juiste uitvoer is geselecteerd.
9. Selecteer de knop **Scheiden** en vervolgens **OK** wanneer het bericht *Scheiden geslaagd* wordt weergegeven.

### 5.3.6 Een patiënt verwijderen



#### Opmerking

Vrijmaken neemt gewoonlijk de vereiste weg om patiënten handmatig te verwijderen. Raadpleeg [Info over vrijmaken](#) op pagina 144.

1. Selecteer in het scherm *Patiënt selecteren* een of meer patiënten.
2. Selecteer de knop **Verwijderen**.
3. Selecteer **Ja** wanneer de bevestigingsprompt verschijnt.




#### Opmerking

De technologen beschikken niet over machtigingen om patiënten te verwijderen.

### 5.3.7 Filters voor patiënten

Na selectie van de knop **Filter** in het scherm *Patiënt selecteren* verschijnt het scherm *Patiëntfilter* voor de geselecteerde lijst met patiënten.

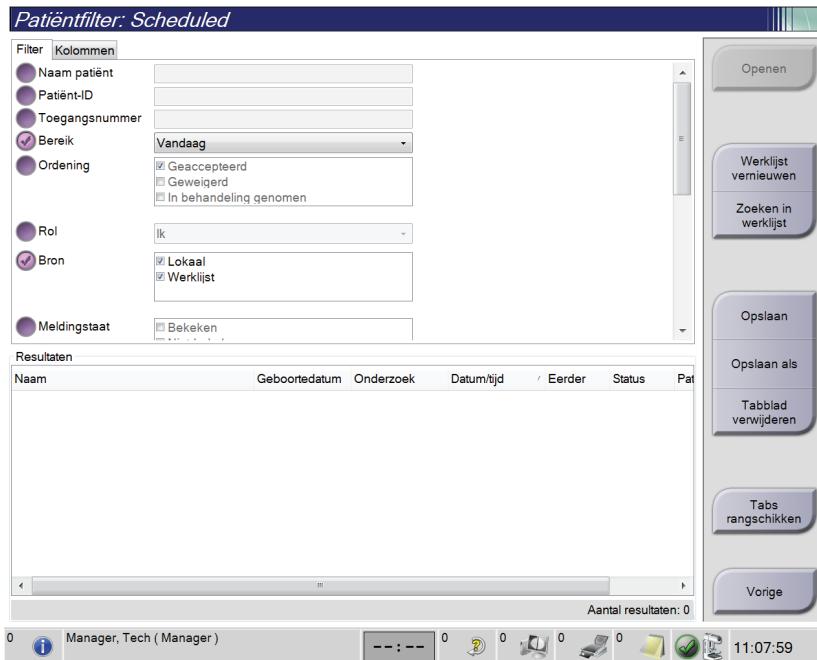

Figuur 30: Tabblad Filter in het scherm *Patiëntfilter*

#### Tabblad Filter

Gebruik het tabblad **Filter** om de filteropties voor de lijst met patiënten te wijzigen. Wanneer u een optie selecteert of annuleert, wordt de verandering weergegeven in het resultaatengebied van het scherm.



#### Opmerking

U moet over toegang op managnersniveau beschikken om deze nieuwe filters op te slaan op het geselecteerde tabblad in het scherm *Patiënt selecteren*. (Raadpleeg [Andere functies van het tabblad Filter](#) op pagina 65.)



#### Opmerking

Wanneer u een regel selecteert in de lijst met resultaten en vervolgens de knop **Openen** selecteert, wordt het *procedurescherm* voor de geselecteerde patiënt geopend.

#### Andere functies van het tabblad Filter

Met het tabblad **Filter** kunnen gebruikers met toegangsmachtigingen tabbladen toevoegen, wijzigen of verwijderen in het scherm *Patiënt selecteren*. Raadpleeg de volgende tabel.

Tabel 13: Opties van het tabblad Filter (Toegangsmachtigingen vereist)

De filterparameters van de huidige patiënt wijzigen.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecteer een tabblad in het scherm <i>Patiënt selecteren</i>.</li><li>2. Selecteer de knop <b>Filter</b>.</li><li>3. Selecteer de filteropties.</li><li>4. Selecteer de knop <b>Opslaan</b>.</li><li>5. Controleer of de naam van het tabblad dat u hebt geselecteerd in het vak Name (Naam) staat.</li><li>6. Selecteer <b>OK</b>.</li></ol>
Een nieuw tabblad maken voor het scherm <i>Patiënt selecteren</i> .	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecteer een tabblad in het scherm <i>Patiënt selecteren</i>.</li><li>2. Selecteer de knop <b>Filter</b>.</li><li>3. Selecteer de filteropties voor het tabblad.</li><li>4. Selecteer de knop <b>Opslaan als</b>.</li><li>5. Voer een nieuwe naam in voor het tabblad.</li><li>6. Selecteer <b>OK</b>.</li></ol>
Een tabblad verwijderen uit het scherm <i>Patiënt selecteren</i> .	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecteer een tabblad in het scherm <i>Patiënt selecteren</i>.</li><li>2. Selecteer de knop <b>Filter</b>.</li><li>3. Selecteer de knop <b>Verwijderen</b>.</li><li>4. Selecteer de knop <b>Ja</b> in het bevestigingsvenster.</li></ol>

### Tabblad Kolommen

Gebruik het tabblad **Kolommen** om meer zoekopties toe te voegen (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, mededelingen) aan de gefilterde lijst. De opties verschijnen als kolommen in het resultaatgebied. Om meer kolommen aan een gefilterde lijst toe te voegen, selecteert u het tabblad **Kolommen** en vervolgens de opties.



#### Opmerking

U moet over toegang op managerniveau beschikken om deze nieuwe kolommen op te slaan op het patiëntfilter.



#### Opmerking

Wanneer u een regel selecteert in de lijst met resultaten en vervolgens de knop **Openen** selecteert, wordt het *procedurescherm* voor de geselecteerde patiënt geopend.

### Knop Tabs rangschikken

Selecteer de knop **Tabs rangschikken** om de volgorde van de tabbladen met de lijsten met patiënten te wijzigen.

### 5.3.8 De werklIJst vernieuwen

Selecteer de knop **WerklIJst vernieuwen** om de lijst met geplande patiënten van de modaliteitenwerklIJstprovider bij te werken.

### 5.3.9 De werklIJst doorzoeken

Selecteer de knop **Zoeken in werklIJst** om in de modaliteitenwerklIJstprovider te zoeken naar een patiënt of een lijst van patiënten.

Er zijn twee methoden om de zoekinformatie in te voeren:

- **Toetsenbord**—Voer de zoekinformatie in een of meer velden in. De geplande procedure wordt weergegeven en de patiënt wordt toegevoegd aan de lokale database. Alle velden voor de zoekopdracht zijn configureerbaar. De standaardvelden zijn Patient name (Patiëntnaam), Patient ID (Patiënt-ID), Accession Number (Toegangsnummer), Requested Procedure ID (ID gevraagde procedure) en Scheduled Procedure Date (Datum geplande procedure).
- **Streepjescodescanner**—Scan de streepjescode voor het geconfigureerde zoekveld. De geplande procedure wordt weergegeven en de patiënt wordt toegevoegd aan de lokale database. Het veld dat door de streepjescodescanner wordt gescand is configureerbaar. Het standaard zoekveld kan zijn patiënt-ID, het toegangsnummer of de gevraagde procedure-ID.

### 5.3.10 Admin (Beheer)

Selecteer de knop **Admin** (Beheer) om het scherm *Admin* (Beheer) en de systeembeheerfuncties te openen. Raadpleeg [Systeembeheerinterface](#) op pagina 145 voor meer informatie.

### 5.3.11 Afmelden


Selecteer de knop **Afmelden** om het systeem af te sluiten en terug te gaan naar het *opstartscherm*.

### 5.3.12 Advanced Workflow Manager

De Advanced Workflow Manager is een werkstroom-engine die communicatie en uitwisseling van beelden tussen compatibele Hologic-systemen onderling mogelijk maakt. De Advanced Workflow Manager houdt alle patiënten, procedures en beelden bij die zijn verworven op systemen binnen een Advanced Workflow Manager-cluster. Daarnaast synchroniseert de Advanced Workflow Manager mededelingen en levert deze beelden aan alle systemen in het cluster.

Systemen met Advanced Workflow Manager geven het tabblad Onderneming weer op het scherm [Het scherm Patiënt selecteren](#) op pagina 59. Op dit tabblad staat een lijst met alle procedures zijn verworven op systemen binnen een Advanced Workflow Manager-cluster.

### 5.4 Procedurescherm

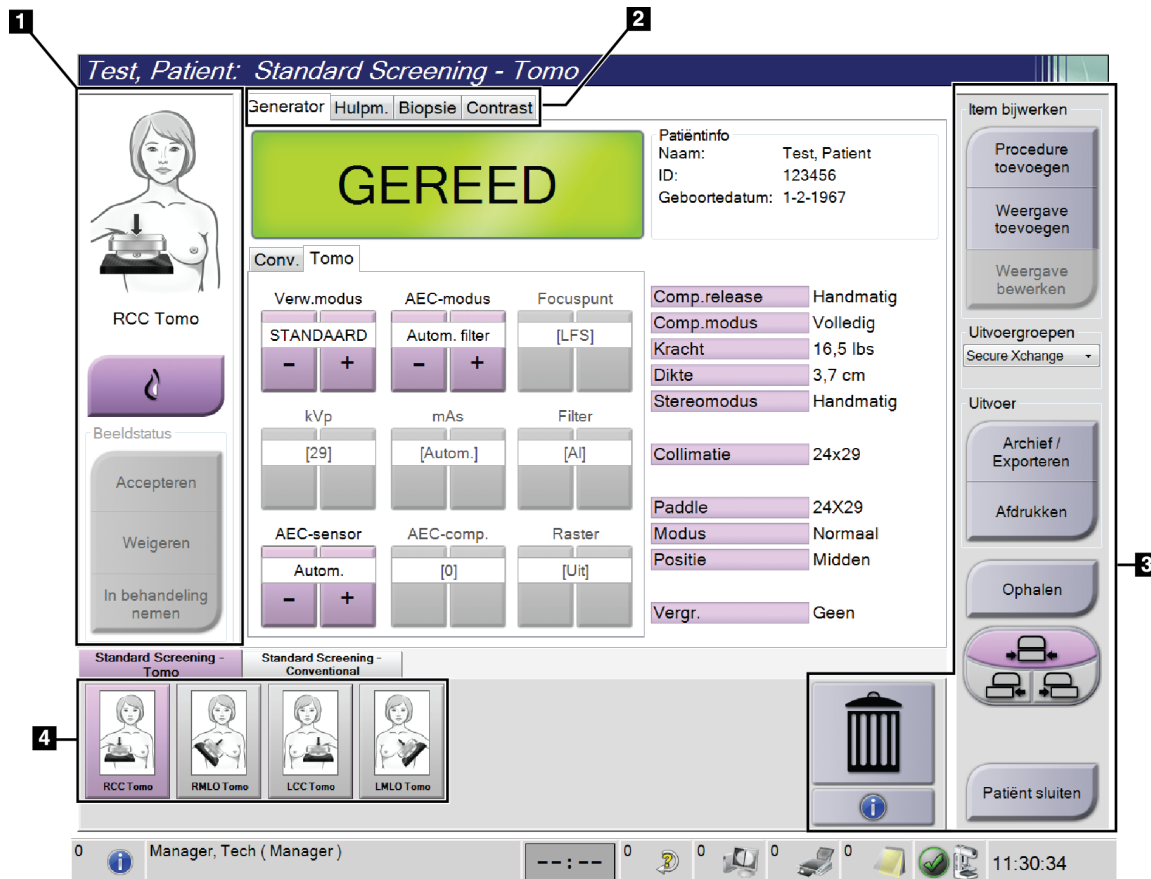

Figuur 31: Procedurescherm

Tabel 14: Het procedurescherm

Onderdeel	Beschrijving
1. Beeldstatus	Het weergavepictogram toont de huidige geselecteerde weergave. De knop <b>Implantaat aanwezig</b> —selecteren wanneer de patiënt een implantaat heeft. De knop <b>Accepteren</b> —selecteren om het beeld te accepteren. De knop <b>Weigeren</b> —selecteren om het beeld af te wijzen. De knop <b>In behandeling</b> —selecteren om het beeld op te slaan voor toekomstige beoordeling.
2. Tabbladen	Selecteer het tabblad <b>Generator</b> om de belichtingstechnieken voor de procedure aan te passen. Selecteer het tabblad <b>Hulpmiddelen</b> om de beelden te beoordelen. Selecteer het tabblad <b>Biopsie</b> om doelen te maken. Selecteer het tabblad <b>Contrast</b> om I-View™ 2D Contrast-procedures uit te voeren.



Tabel 14: Het procedurescherm

Onderdeel	Beschrijving
<b>3. Knoppen</b>	<p>Veel functies kunnen vanuit dit scherm worden geopend door selectie van een bepaalde knop:</p> <p><b>Procedure toevoegen:</b> Voeg een nieuwe patiënt toe.</p> <p><b>Weergave toevoegen:</b> Voeg een nieuwe weergave toe.</p> <p><b>Weergave bewerken:</b> Wijs een andere weergave aan een beeld toe.</p> <p><b>Archief/exporteren:</b> Stuur beelden naar een uitvoer.</p> <p><b>Afdrukken:</b> Druk beelden af.</p> <p><b>Ophalen:</b> Doorzoek de geconfigureerde apparaten met de huidige patiëntinformatie.</p> <p><b>Paddleverschuiving:</b> Omzeil de standaard paddlepositie voor de geselecteerde weergave.</p> <p><b>Patiënt sluiten:</b> Sluit de patiënt en de procedure.</p> <p><b>Prullenbak:</b> Verwijder een weergave.</p>
<b>4. Miniaturen</b>	Selecteer een tabblad om de miniatuurweergaven of de miniatuurbeelden voor die procedure weer te geven.

#### 5.4.1 De knop voor implantaat aanwezig gebruiken

De knop voor **Implantaat aanwezig** bevindt zich boven de knop **Accepteren** in het *procedurescherm*. Met deze knop wordt speciale implantaatverwerking toegepast op de implantaatweergave en de verplaatste weergave van het implantaat, en wordt de DICOM-markering 'Implant Present' (Implantaat aanwezig) in de beeldkopstekst gewijzigd. Wanneer deze knop wordt geselecteerd, verschijnt er een vinkje op de knop.



Selecteer de knop voor **Implantaat aanwezig** voor de implantaatweergave en de verplaatste weergave van het implantaat voordat u het beeld verwerft.



##### Opmerking


De knop voor **Implantaat aanwezig** wordt automatisch geselecteerd als een proceduretabblad een ID-weergave bevat.

#### 5.4.2 De paddleverschuivingsfunctie gebruiken

Raadpleeg [Paddleverschuiving](#) op pagina 122 (Paddleverschuiving) voor informatie over de paddleverschuivingsfunctie.

1. Selecteer in het *procedurescherm* een weergave van een onbelicht miniatuurbeeld. De paddle gaat naar de standaard positie voor die weergave.

2. Selecteer een paddleverschuivingsknop om de standaard paddlepositie voor de geselecteerde weergave te omzeilen. De paddle gaat naar de nieuwe positie.

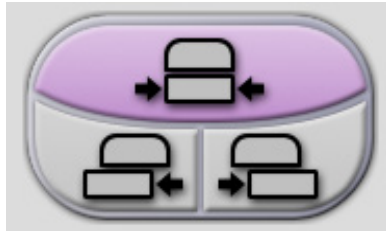


Figuur 32: Knoppen voor paddleverschuiving

### 5.4.3 Dialoogvenster Informatie over procedure

Selecteer de knop **Informatie over procedure** onder de knop **Weergave verwijderen** (prullenbak) om procedure-informatie weer te geven. Het dialoogvenster Informatie over procedure verschijnt met daarin de volgende informatie:

- Procedurenaam
- Toegangsnummer
- Procedurestatus
- Start- en einddatum en start- en eindtijd van de procedure
- Dosisinformatie (elke borst en cumulatief)

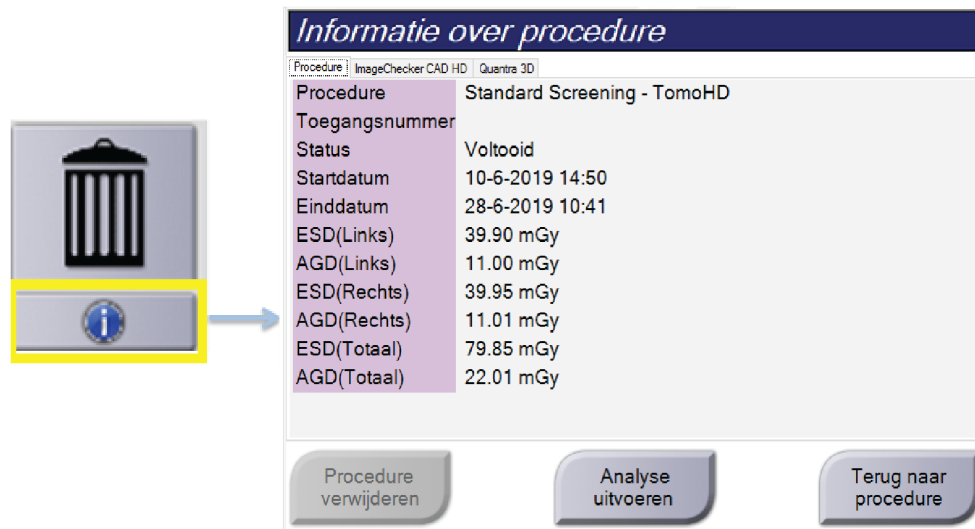

Figuur 33: Dialoogvenster Informatie over procedure

Voor procedures die geen belichte weergaven bevatten, selecteert u de knop **Procedure verwijderen** om de geselecteerde procedure van de patiënt te verwijderen.

Selecteer de knop **Analyse uitvoeren** om de beeldanalyse handmatig uit te voeren.



### Opmerking

De knop **Analyse uitvoeren** wordt alleen weergegeven als u een licentie voor de ImageChecker® CAD-, Quantra™- of Genius AI Detection-software hebt.

---

Selecteer **Terug naar procedure** om het dialoogvenster te sluiten.

### Info over de knop **Analyse uitvoeren**

Op de Selenia Dimensions- en 3Dimensions-systemen is ImageChecker® CAD, Quantra™-beoordelingssoftware voor borstdichtheidsvolume en Genius AI Detection-software beschikbaar.


Als u voor een van deze functies een licentie hebt, zijn de volgende opties beschikbaar:

- Beeldanalyses worden automatisch uitgevoerd als u de knop **Voltooid procedure sluiten** selecteert om een patiënt te sluiten nadat er nieuwe beelden zijn verworven. Beeldanalyse wordt automatisch uitgevoerd na het bewerken van een patiënt of weergave of het toevoegen van een weergave als u de knop **Voltooid procedure sluiten** selecteert om een patiënt te sluiten.
- Beeldanalyses kunnen handmatig worden uitgevoerd door de knop **Analyse uitvoeren** in het dialoogvenster Informatie over procedure te selecteren. Voer beeldanalyses indien nodig handmatig uit op beelden die vanaf een externe bron ontvangen of geïmporteerd zijn.
- Beeldanalyses kunnen alleen op beelden worden uitgevoerd aan de hand van dezelfde softwareversie als het verwervingswerkstation of een softwareversie direct daarvoor.
- Het dialoogvenster Informatie over procedure bevat tabbladen waarop de slagings- of mislukkingstatus van de beeldanalyse wordt weergegeven.
- In het scherm *Procedure* worden miniatuurbeelden voor de resultaten van de beeldanalyse in het gedeelte met miniatuurbeelden weergegeven.

### Info over het tabblad Genius AI Detection

Genius AI Detection-software is een beschikbare functie op de systemen Selenia Dimensions en 3Dimensions. Selecteer de knop **Informatie over procedure** onder de knop **Weergave verwijderen** (prullenbak) om softwareresultaten over de Genius AI Detection-software weer te geven. Het dialoogvenster *Informatie over procedure* wordt geopend. Selecteer het tabblad **Genius AI Detection** om de volgende informatie weer te geven:

- Resultaten
- Leestijdindicator
- Leesprioriteit
- Datum en tijd van de Genius AI Detection-software-analyse
- Gevalscore
- CAD-complexiteit
- Naam en tijd van weergave en of de weergave voor de case-verwerking opgenomen is

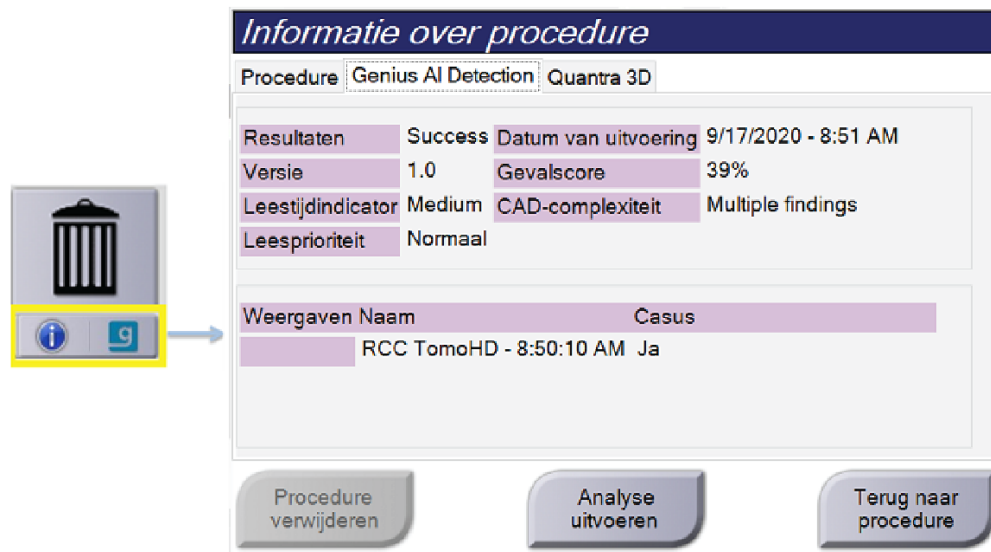


Figuur 34: Het tabblad Genius AI Detection

Selecteer **Terug naar procedure** om het dialoogvenster te sluiten.

### 5.4.4 Een procedure toevoegen

1. Om nog een procedure toe te voegen, selecteert u de knop **Procedure toevoegen** in het *procedurescherm* om het dialoogvenster Procedure toevoegen te openen.

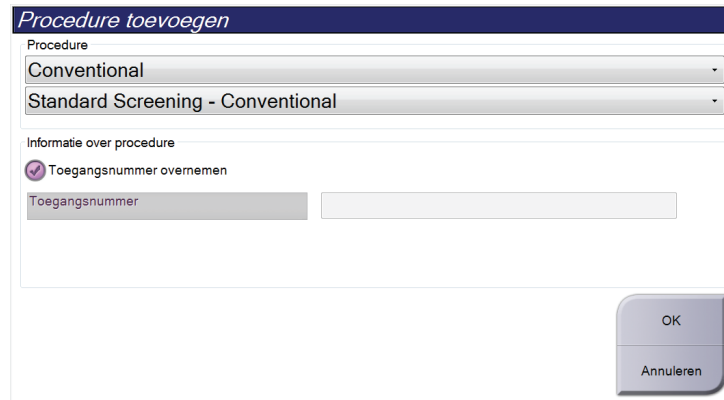

Figuur 35: Dialoogvenster Procedure toevoegen

2. Gebruik de vervolgkeuzemenu's om het type procedure te selecteren dat u wilt toevoegen.
3. Het huidige toegangsnummer wordt automatisch gebruikt. Om een ander toegangsnummer te gebruiken deselecteert u het selectievakje Toegangnummer overnemen en voert u het gewenste nummer in.
4. Selecteer de knop **OK**. Er wordt een nieuw tabblad toegevoegd met de miniatuurbeelden voor de geselecteerde procedure.

### Beschikbare procedures

Onderstaande tabel toont de belangrijkste groepen procedures die op het systeem beschikbaar zijn.



#### Opmerking

Sommige procedures in de lijst worden alleen weergegeven wanneer het systeem een licentie heeft voor die procedure.

Tabel 15: Proceduregroepen

Proceduregroep	Beschrijving
Conventioneel	Beeldvorming uitsluitend door middel van digitale mammografie (2D)
Combo	Beeldvorming door middel van digitale mammografie (2D) en borsttomosynthese
Tomo	Beeldvorming uitsluitend door middel van borsttomosynthese
TomoHD	Beeldvorming door middel van borsttomosynthese en een gegenereerd 2D-weergavebeeld
ComboHD	Beeldvorming door middel van digitale mammografie (2D) en borsttomosynthese en een gegenereerd 2D-weergavebeeld
Stereobiopsie	Biopsie met stereotactische lokalisatie
Tomo-biopsie	Biopsie waarbij gebruik wordt gemaakt van tomosyntheselokalisatie
Specimen	Gespecialiseerde beeldvorming van specimen
2D-contrast	Contrastversterkte digitale beeldvorming
Stereotactische contrastbiopsie	Biopsie met stereotactische contrastlokalisatie

## 5.4.5 Een weergave toevoegen (of verwijderen)


### Een weergave toevoegen

1. Selecteer de knop **Weergave toevoegen** om het scherm *Weergave toevoegen* te openen.



### Opmerking

Afhankelijk van de licentie-instellingen voor uw systeem, worden er andere tabbladen weergegeven.

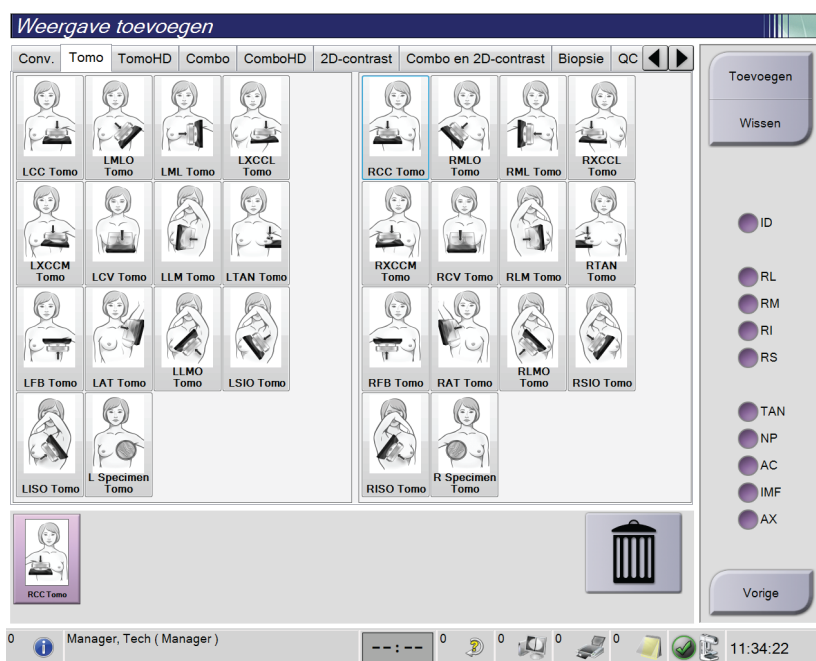

### Wijzigingselementen weergeven

ID = implantaat verplaatst  
 RL = Lateraal gerold  
 RM = Mediaal gerold  
 RM = Inferieur gerold  
 RM = Superieur gerold  
 TAN = Tangentieel  
 NP = Tepel in profiel  
 AC = Anterieure compressie  
 IMF = Vouw onder de borst  
 AX = Okselweefsel

Figuur 36: Het scherm *Weergave toevoegen*


2. Selecteer het tabblad en daarna de weergave. U kunt maximaal drie wijzigingselementen voor weergave selecteren in het rechter paneel van het scherm.
3. Selecteer de knop **Toevoegen**. Een miniaturbeeld van elke geselecteerde weergave wordt toegevoegd aan het onderste paneel van het venster.

### Een weergave verwijderen

- Selecteer de weergave en vervolgens het prullenbakt pictogram om één weergave uit de toegevoegde lijst te verwijderen.
- Om alle weergaven uit de toegevoegde lijst te verwijderen, selecteert u de knop **Wissen**.

### 5.4.6 Een weergave bewerken

Gebruik het scherm *Edit View* (Weergave bewerken) om een andere weergave aan een beeld toe te wijzen.

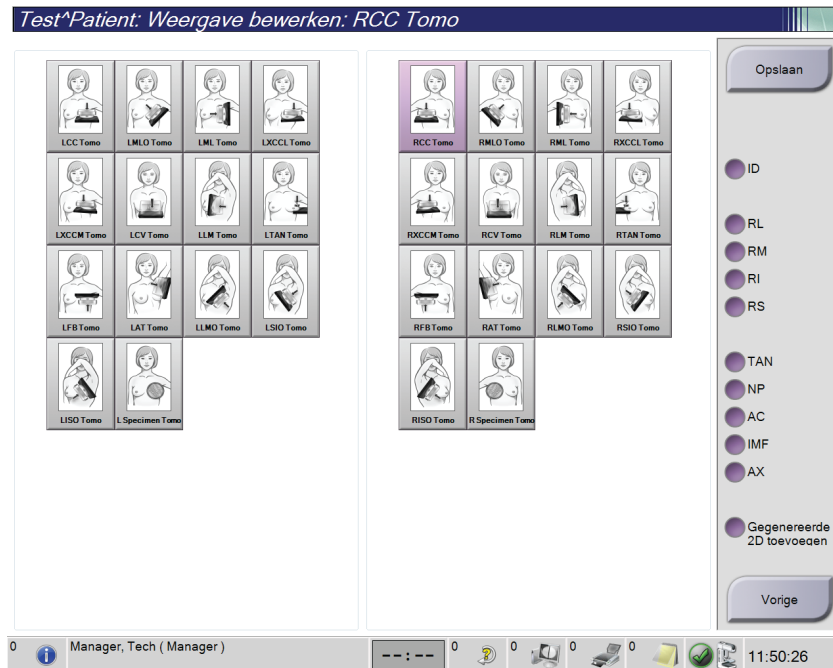

Figuur 37: Het scherm *Edit View* (Weergave bewerken)

1. Selecteer in het scherm *Procedure* een weergave van een belicht miniatuurbeeld.
2. Selecteer de knop **Edit View** (Weergave bewerken).
3. Selecteer de weergave in het scherm. U kunt maximaal drie wijzigingselementen voor weergave selecteren. Raadpleeg [Een weergave toevoegen \(of verwijderen\)](#) op pagina 75 (Een weergave toevoegen of verwijderen) voor een omschrijving van de View Modifiers (Modificatoren voor weergave).
4. Selecteer **Save** (Opslaan) en vervolgens **OK** wanneer het bericht *Update Successful* (Update geslaagd) wordt weergegeven.



#### Opmerking

Het scherm *Edit View* (Weergave bewerken) voor biopsieprocedures geeft verschillende View Modifiers (Modificatoren voor weergave) weer. Raadpleeg de *gebruikershandleiding* van het Affirm®-borstbiopsiesysteem.


### 5.4.7 Ophalen

Selecteer de knop **Ophalen** om de geconfigureerde apparaten met de huidige patiëntinformatie te doorzoeken. De knop **Ophalen** voert dezelfde functie uit als de knop **Zoekopdracht ophalen** in het scherm *Admin* (Beheer).



### 5.4.8 Een patiënt sluiten

Selecteer de knop **Close Patient** (Patiënt sluiten). Als er beelden zijn verworven, wordt het dialoogvenster Procedure sluiten geopend. Selecteer een van de volgende opties:

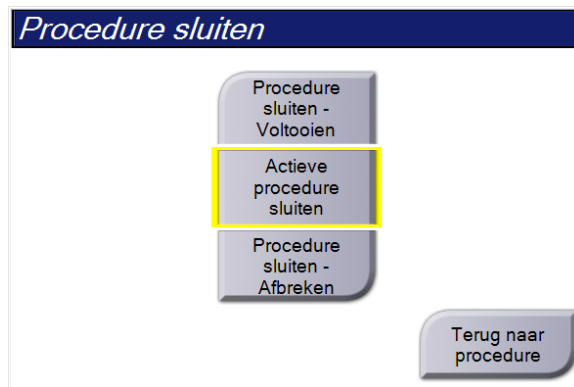

**Close Procedure Complete (Voltooid procedure sluiten):** Sluit de procedure en zet de procedure op het tabblad **Voltooid**.

**Actieve procedure sluiten:** Sluit de procedure en zet de procedure op het tabblad **Actief**.

**Procedure sluiten - Afbreken:** Sluit de procedure en zet de procedure op het tabblad **Alle**. Er wordt een dialoogvenster geopend en u moet in een lijst de reden selecteren waarom de procedure werd beëindigd of een nieuwe reden toevoegen.

**Terug naar procedure:** Hiermee gaat u terug naar de procedure.

Als er beelden zijn gemarkeerd als In behandeling, opent er een dialoogvenster met de volgende opties:

- Alles accepteren en afsluiten als voltooid
- Actieve procedure sluiten
- Terug naar procedure

Als MPPS wordt geactiveerd, wordt informatie over de status van de procedure naar de uitvoerapparaten gezonden wanneer u **Voltooien** of **Beëindigen** selecteert. U kunt ook het tabblad boven de miniatuurbeelden ingedrukt houden om een bericht over de procedurestatus opnieuw te verzenden tijdens de procedure. Er wordt een dialoogvenster voor *procedurehandelingen* geopend met daarin knoppen om een status opnieuw te verzenden of om terug te keren naar de procedure.



### Belangrijk

Als u een licentie hebt voor 3DQuorum-software, volgt u de standaardprocedure om een patiënt te sluiten. Als er SmartSlices zijn waarvoor de verwerking nog niet is voltooid, wordt een dialoogvenster met het volgende bericht geopend:



Wacht tot de verwerking voltooid is voordat u de volgende patiënt opent.

---



### Opmerking

Als u een licentie voor Genius AI Detection-, ImageChecker-, CAD- of Quantra-software hebt, worden beeldanalyses automatisch uitgevoerd als u de knop **Close Procedure Complete** (Voltooid procedure sluiten) selecteert na het verwerven van nieuwe beelden. De resultaten worden automatisch naar de uitvoerapparaten verzonden. Als u de patiënt opnieuw opent, worden de miniatuurbeelden voor de resultaten in het scherm *Procedure* weergegeven en zijn er statustabbladen beschikbaar in het dialoogvenster Informatie over procedure.

---

## 5.5 De beeldbeoordelingsfuncties openen

Selecteer het tabblad **Hulpmiddelen** in het *procedurescherm* om de beeldbeoordelingsfuncties te openen. Raadpleeg [Tabblad Hulpmiddelen beeldbeoordeling](#) op pagina 100 voor informatie.

## 5.6 Uitvoergroepen

De geaccepteerde beelden worden automatisch naar de uitvoerapparaten in de geselecteerde uitvoergroep gezonden. De systeemconfiguratie bepaalt of de beelden worden verzonden nadat een patiënt is gesloten of nadat het beeld is geaccepteerd.

---




### Opmerking

Tomosynthesebeelden worden niet naar een afdrukapparaat in de geselecteerde uitvoergroep gezonden. U kunt geselecteerde tomosynthesebeelden afdrukken vanuit het scherm *Afdrukken*.

---

### 5.6.1 Selecteer een uitvoergroep

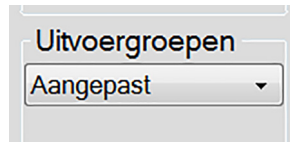

Figuur 38: Veld Uitvoergroepen

Selecteer een uitvoerapparaatgroep, zoals PACS, diagnostische werkstations of CAD-apparaten en -printers, in de vervolgkeuzelijst Uitvoergroepen in het *procedurescherm*.



#### Opmerking

Selecteer een uitvoerapparaatgroep zoals PACS, diagnostische werkstations of CAD-apparaten en -printers, in de vervolgkeuzelijst Uitvoergroepen in het *Procedurescherm*.

---

### 5.6.2 Een uitvoergroep toevoegen of bewerken



#### Opmerking

De configuratie van uitvoergroepen wordt tijdens de installatie uitgevoerd, maar u kunt nog steeds bestaande groepen bewerken of nieuwe groepen toevoegen.

---

#### Nieuwe uitvoergroep toevoegen:

1. Open het scherm *Admin* (Beheer).
2. Selecteer de knop voor **Uitvoergroepen beheren**.
3. Selecteer de knop **Nieuw**, voer de informatie in en selecteer het uitvoerapparaat/de uitvoerapparaten.
4. Selecteer **Toevoegen** en vervolgens **OK** wanneer het bericht *Update geslaagd* wordt weergegeven.
5. U kunt elke groep selecteren om als standaard in te stellen.

#### Uitvoergroep bewerken:

1. Open het scherm *Admin* (Beheer).
2. Selecteer de knop voor **Uitvoergroepen beheren**.
3. Selecteer de knop **Bewerken** en voer de wijzigingen uit.
4. Selecteer de knop **Opslaan** en vervolgens **OK** wanneer het bericht *Update geslaagd* wordt weergegeven.

### 5.6.3 SmartSlices-uitvoergroepen



#### Opmerking

De configuratie van uitvoergroepen wordt uitgevoerd tijdens installatie, maar u kunt bestaande groepen bewerken of nieuwe groepen toevoegen.

Tijdens de installatie van 3DQuorum-software worden nieuwe standaarduitvoergroepen in het systeem aangemaakt om ruimte aan uitvoeropties voor SmartSlice-beelden te bieden. Met de nieuwe uitvoergroepen kunt u controleren of SmartSlices, met tomosynthese gereconstrueerde plakken of beide automatisch naar de gewenste apparaten worden verzonden. Zie de volgende tabel voor een beschrijving van de uitvoergroepen.


Tabel 16: Uitvoergroepen voor 3DQuorum-software

Naam uitvoergroep	Toelichting op de configuratie
SmrtSlces,DBT,2D	Verzendt alle geconfigureerde gegevenstypen.
SmartSlices,2D	Verzendt SmartSlices en 2D-gegevenstypen (gesynthetiseerde 2D of FFDM). Er worden geen gereconstrueerde plakken van 1 mm verzonden.
DBT,2D	Verzendt gereconstrueerde plakken van 1 mm en 2D-gegevenstypen (gesynthetiseerde 2D of FFDM). Er worden geen SmartSlices verzonden.
Aangepast	Biedt selectie op verzoek van uitvoermogelijkheden en gegevenstypen.

Als u de drie nieuwe uitvoergroepentypen wilt maken, wordt elk ImageStorage-uitvoerapparaat geconfigureerd met drie items voor geïnstalleerde apparaten. Dit biedt maximale flexibiliteit om te experimenteren met de vraag of SmartSlices altijd worden gebruikt voor diagnostische aflezing, altijd worden gearchiveerd of alleen op verzoek worden verzonden. Zie de volgende tabel voor een beschrijving van de instellingen van de geïnstalleerde uitvoerapparaten.

Tabel 17: Instellingen uitvoerapparaten voor 3DQuorum-software

Uitvoernaam	Toelichting op de configuratie
Apparaatnaam	Verzendt alle gewenste gegevenstypen behalve SmartSlices en gereconstrueerde plakken van 1 mm.
Apparaatnaam – 3D-plakken van 1 mm	Verzendt uitsluitend gereconstrueerde plakken van 1 mm.
Apparaatnaam – SmartSlices	Verzendt uitsluitend SmartSlices.

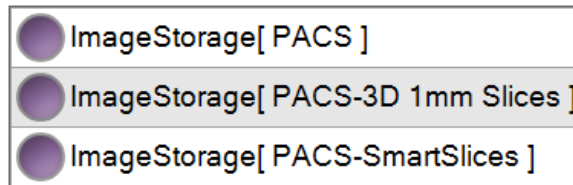

Figuur 39: Voorbeeld van instellingen voor uitvoerapparaten


In samenhang met de besluitvorming aangaande welke gegevens ter diagnose naar werkstations moeten worden verzonden, welke gegevens moeten worden gearchiveerd en welke gegevens alleen op verzoek moeten worden verzonden, kunnen de standaardconfiguraties verder worden aangepast. Wijzigingen kunnen worden aangebracht tijdens de training voor klinische toepassingen of door contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hologic.

#### 5.6.4 Aangepaste uitvoer

Met de optie voor een aangepaste uitvoergroep kunt u een uitvoergroep maken in het *procedurescherm*. De door u gemaakte aangepaste uitvoergroep blijft de aangepaste optie tot er een andere aangepaste uitvoergroep wordt gemaakt.

**Een aangepaste uitvoergroep maken in het *procedurescherm*:**

1. Selecteer in het *procedurescherm* de optie **Aangepast** in de vervolgkeuzelijst van de uitvoergroepen.
2. Maak in het dialoogvenster *Uitvoergroep* een selectie uit de lijst van beschikbare apparaten en selecteer **OK**.

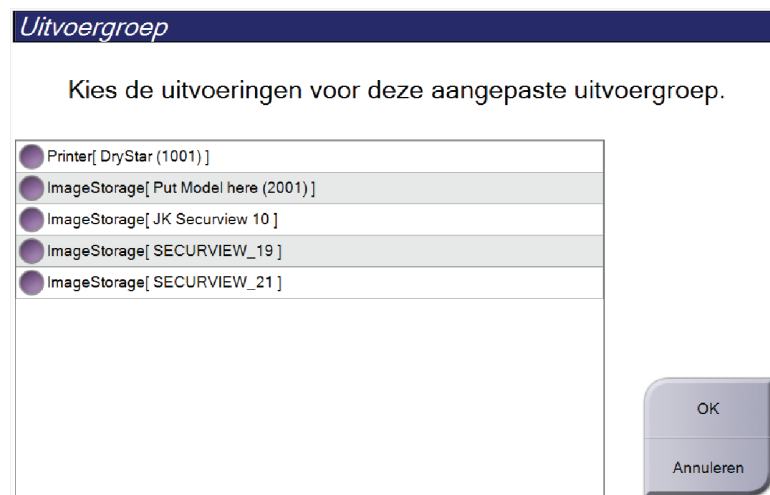

Figuur 40: Voorbeeld van een aangepaste uitvoergroep

### 5.7 Uitvoeren op verzoek

De uitvoeren op verzoek zijn **Archief/Exporteren** en **Afdrukken**. U kunt de geopende patiënt handmatig archiveren, exporteren of afdrukken tot de procedure wordt gesloten.

Wanneer u een knop voor **Uitvoer op verzoek** selecteert, kunt u beelden van de geopende patiënt naar elk van de geconfigureerde uitvoerapparaten verzenden.

#### 5.7.1 Archief

1. Selecteer de knop **Archief/Exporteren**.
2. Selecteer de procedure of weergaven in het scherm *Archiveren op verzoek*:
  - Met de knop **Alles selecteren** selecteert u alle onderdelen die in dit scherm verschijnen.
  - Met de knop **Wissen** maakt u de selectie ongedaan van onderdelen die in dit scherm zijn geselecteerd.
  - Met de knop **Eerdere** geeft u eerdere procedures en weergaven van deze patiënt weer.
  - Met de knop **Geweigerd** geeft u afgewezen weergaven van deze patiënt weer.
3. Selecteer een bestemmingsapparaat:
  - Selecteer de knop **Apparaatlijst** en maak een keuze uit de opties in het vervolgkeuzemenu *Opslagapparaat*.

-OF-

  - Selecteer een uitvoergroep in de vervolgkeuzelijst *Uitvoergroep*.
4. Selecteer de knop **Archief** om de geselecteerde beelden naar het geselecteerde archief te verzenden.




#### Opmerking

Gebruik het hulpprogramma Manage Queue in de taakbalk om de achiveringsstatus te bekijken.

---


## 5.7.2 Exporteren

1. Selecteer de knop **Archief/Exporteren** (rechts op het *procedurescherm*).
2. Selecteer de beelden die u wilt exporteren en selecteer daarna de knop **Exporteren**.

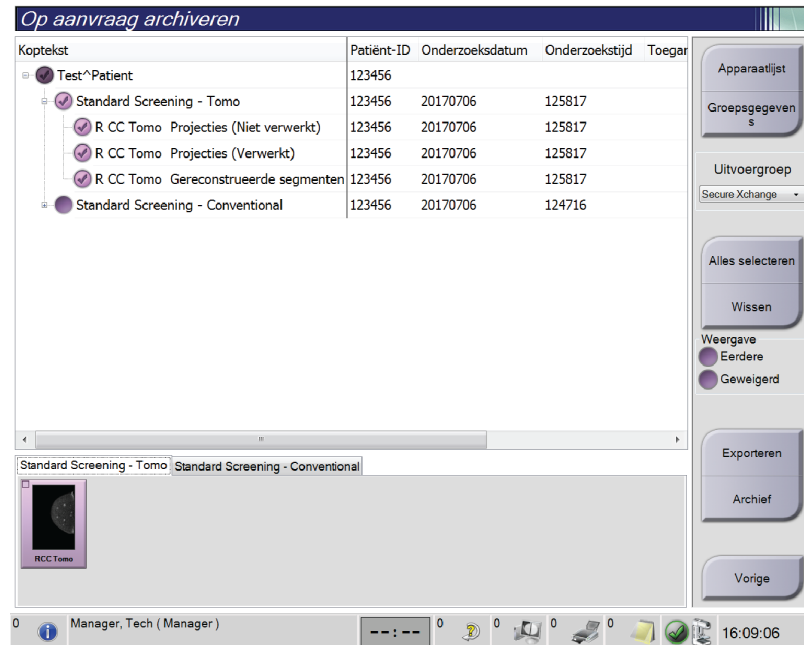

Figuur 41: De beelden voor export selecteren


3. Selecteer in het dialoogvenster Exporteren het doel in de vervolgkeuzelijst met media-apparaten.

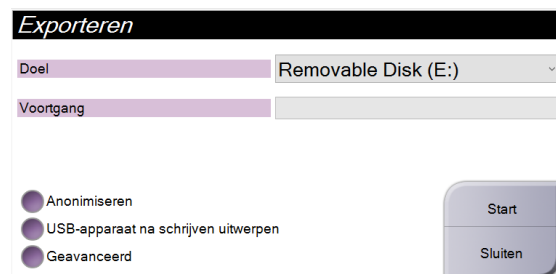

Figuur 42: Dialoogvenster Exporteren

- Als u patiëntinformatie wilt anonimiseren, selecteert u **Anonimiseren**.
  - Als u het verwisselbare media-opslagapparaat automatisch wilt uitwerpen wanneer het exporteren is voltooid, selecteert u **USB-apparaat na schrijven uitwerpen**.
  - Als u voor het opslaan van uw selecties een map in uw lokale systemen wilt selecteren of als u de exporttypen wilt selecteren voor het beeld, selecteert u **Geavanceerd**.
4. Selecteer de knop **Start** om de geselecteerde beelden naar het geselecteerde apparaat te verzenden.

### 5.7.3 Afdrukken

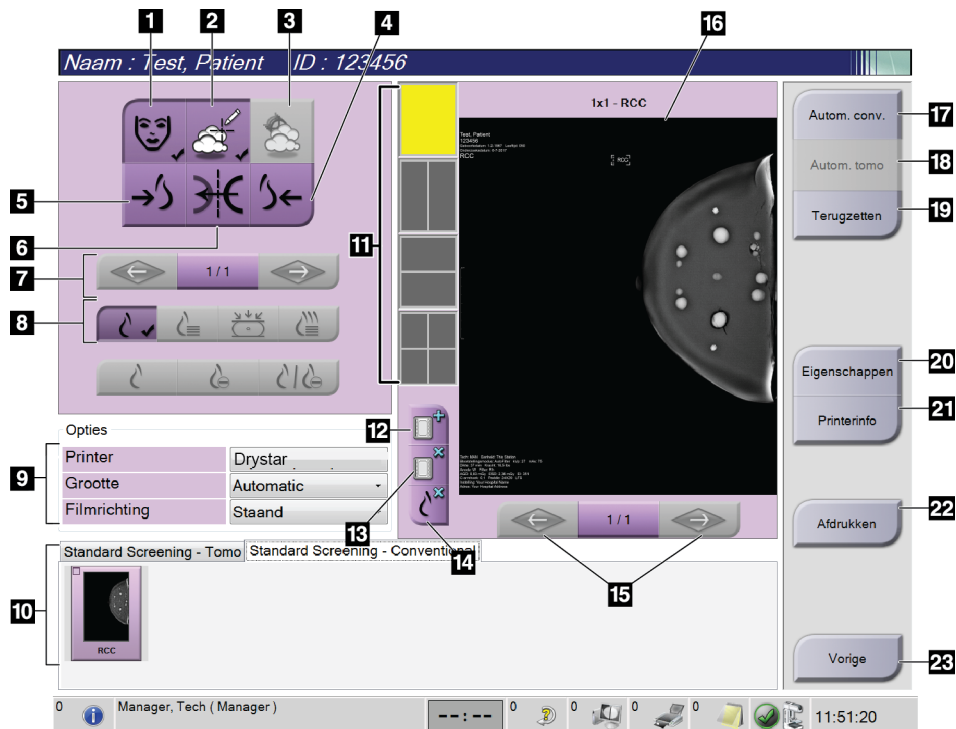

Figuur 43: Afdrukscherm

#### Legenda

1. Patiëntinformatie tonen of verbergen.
2. Markeringen en aantekeningen tonen of verbergen.
3. Doelgebieden in beelden van een biopsie tonen of verbergen.
4. Het beeld afdrukken vanuit een dorsaal perspectief.
5. Het beeld afdrukken vanuit een ventraal perspectief.
6. Het beeld omkeren (spiegelen).
7. Naar de vorige of volgende tomosyntheseplak of -projectie gaan (tomosyntheseoptie).
8. Projectie-, reconstructie- of conventionele weergaven selecteren (tomosyntheseoptie). De C-View-knop wordt weergegeven als het systeem een licentie heeft voor C-View-beeldvorming.
9. De printeropties selecteren.
10. Miniaturbeelden bekijken.
11. De filmindeling (aantal tegels) selecteren.
12. Een nieuwe film maken.
13. Een film verwijderen.
14. Een beeld uit een film verwijderen.
15. Door de filmpagina's bladeren.
16. Gebied van het afdrukvoorbeeld.
17. Conventioneel afdrukken (en C-View-beelden, als het systeem over een licentie hiervoor beschikt) met de standaard setup.
18. Tomosynthesebeelden afdrukken (plakken of projecties) gelabeld voor afdrukken (tomosyntheseoptie).
19. Het scherm *Print* (Afdrukken) terugzetten op de standaardinstellingen.
20. Het scherm *Properties* (Eigenschappen) openen.
21. Het IP-adres van de printer, de AE-titel, de poort en de mogelijkheid voor afdrukken op ware grootte weergeven.
22. Het afdrukproces starten.
23. Terugkeren naar het scherm *Procedure*.




1. Selecteer in het scherm *Procedure* de knop **Print** (Afdrukken) om het scherm *Print* (Afdrukken) weer te geven.
2. Selecteer de filmindeling in het gebied met filmindelingen van het scherm.
3. Selecteer een miniatuurbeeld.
4. Selecteer de beeldmodus (Conventioneel, Projectie of Reconstructie). De C-View-knop wordt weergegeven als het systeem een licentie heeft voor C-View-beeldvorming.
5. Selecteer het beeldweergavegebied (onderdeel 16) in het scherm *Print* (Afdrukken). Het beeld dat in dit gebied wordt weergegeven, is het beeld dat op de film wordt afgedrukt.
6. Herhaal stap 3 t/m 5 om andere beelden op dezelfde multiformat-film te plaatsen.
7. Om dezelfde beelden in een andere filmindeling af te drukken, selecteert u de knop **New Film** (Nieuwe film) (onderdeel 12) en voert u stap 2 t/m 6 uit.
8. Gebruik de knoppen linksboven in het scherm *Afdrukken* (onderdeel 1 t/m onderdeel 6) om patiëntinformatie, markeringen en aantekeningen te verbergen of weer te geven, en om de richting van het beeld te wijzigen.
9. Selecteer de knop **Print** (Afdrukken) om uw films af te drukken.



## Hoofdstuk 6 Beeldvorming

### 6.1 Scherm Beeldweergave

Nadat u een belichting hebt uitgevoerd, wordt het verworven beeld op de beeldweergavemonitor weergegeven. Op het scherm kan zowel patiënt- als procedure-informatie worden weergegeven. Ga naar het tabblad **Hulpmiddelen** in het *procedurescherm* en selecteer de knop **Patiëntinformatie** om de informatie aan of uit te zetten.

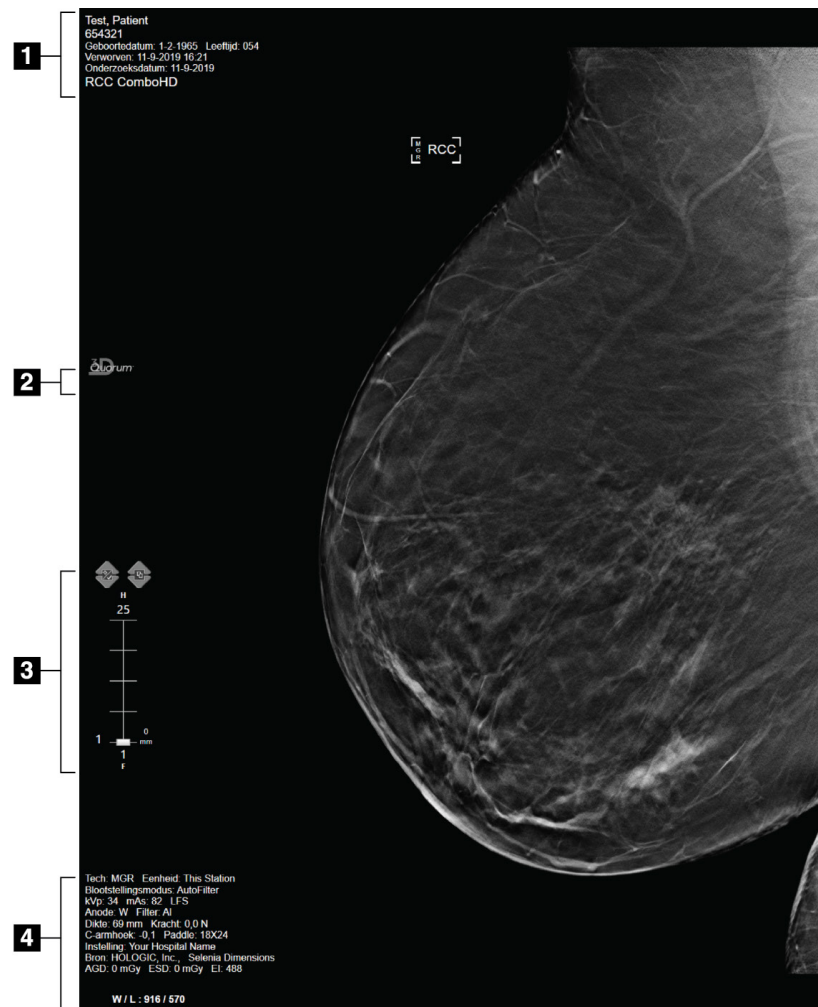

Figuur 44: Scherm Beeldweergave (optie SmartSlices weergegeven)

#### Legenda

1. Patiëntinformatie en onderzoeksdatum
2. Logo 3DQuorum-software
3. Plakindicator
4. Belichtingsinformatie

## 6.2 De belichtingsparameters instellen

### 6.2.1 De beeldverwerkingsmodus (tomosyntheseoptie) selecteren

- Standaard Voor routinematige screeningsprocedures met tomosynthese
- Versterkt Voor diagnostische tomosyntheseweergaven



#### Waarschuwing:

**De versterkte verwerkingsmodus met combo-modus-beeldvorming (DM + BT) kan een stralingsdosis produceren die hoger is dan de grens voor MQSA-screening van 3,0 mGy en mag daarom uitsluitend worden gebruikt bij diagnostische evaluatie.**

---

### 6.2.2 De belichtingsmodus selecteren

Gebruik de modi van de autom. belichtingsregelaar (Automatic Exposure Control, AEC) om het systeem de belichtingstechnieken te laten regelen. AEC-modi zijn beschikbaar van 20-49 kV.

- Manual (Handmatig) De gebruiker selecteert de kV, mAs, het focuspunt en het filter.
- AEC: Auto-Time (Autom. tijd) De gebruiker selecteert de kV, het focuspunt en het filter. Het systeem selecteert de mAs.
- AEC: Auto-kV (Autom. kV) De gebruiker selecteert het focuspunt. Het systeem selecteert de kV, mAs en het filter (rhodium).
- AEC: Auto-Filter (Autom. filter) De gebruiker selecteert het focuspunt. Het systeem selecteert de kV, mAs en het filter.

### 6.2.3 De AEC-sensor gebruiken

De AEC-sensor heeft zeven handmatige posities en een automatische positie. De handmatige posities beginnen bij de rand van de borstwand (stand 1) en eindigen bij de rand van de tepel (stand 7). Bij de automatische positie worden twee regio's geselecteerd binnen een gebied dat zich uitstrekt van de borstwand tot de tepel.

Gebruik de plus- (+) en min- (-) toetsen op het compressieapparaat of in het AEC-sensorgebied van het scherm om de positie van de sensor te wijzigen. U kunt Auto AEC (Autom. AEC) selecteren om het systeem de beste belichting voor de borst te laten berekenen.


### 6.3 Een beeld verwerven

Raadpleeg [Klinische procedures](#) op pagina 131 voor informatie over klinische procedures.

1. Selecteer een weergave in de miniatuurbeelden onder aan het *procedurescherm*.
2. Houd de **röntgenstralingsknop** en/of de **röntgenvoetschakelaar** ingedrukt voor de volledige belichting.


Tijdens de belichting:

- De systeemstatusbalk toont het stralingssymbool en een gele achtergrond (zie de volgende figuur).

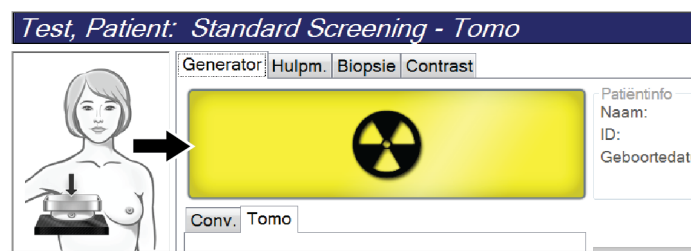

Figuur 45: Belichting actief

- Tijdens de belichting klinkt er voortdurend een geluidssignaal. Het geluidssignaal is een continue opeenvolging van tonen. Het geluidssignaal klinkt tijdens de volledige combo-verwerving, vanaf de start van de belichting tot het einde van de conventionele weergave. Het geluidssignaal wordt niet onderbroken tussen tomosynthese van de borst en conventionele digitale mammografische belichtingen. Laat de belichtingsschakelaar niet los terwijl het geluidssignaal klinkt.
3. Wanneer het geluidssignaal stopt en de systeemstatusbalk toont **Stand-by** (zie de volgende figuur), kunt u de **röntgenstralingsknop** en/of de **röntgenvoetschakelaar** loslaten.

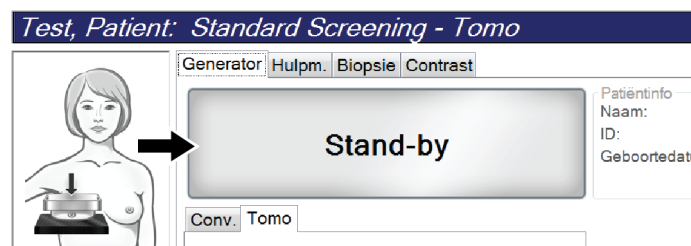


Figuur 46: Belichting voltooid

4. Wanneer de röntgenstraling voltooid is, wordt het beeld op de beeldweergavemonitor weergegeven. Het *procedurescherm* verandert automatisch in het tabblad **Hulpmiddelen**.

Selecteer een van de volgende opties om de verwerving te voltooien:

- **Accepteren** van het beeld. Het beeld wordt met alle kenmerken naar uitvoerapparaten gezonden.
- **Weigeren** van het beeld. Selecteer de reden waarom het beeld wordt afgewezen in het dialoogvenster dat wordt geopend. Het *beeldweergavescherm* wordt gesloten. U kunt de afgewezen weergave herhalen of een andere weergave selecteren. Als u **Weigeren** selecteert, verschijnt een X op het miniatuurbeeld.
- Markeer het beeld als **In behandeling**. Het beeld wordt opgeslagen voor toekomstige beoordeling. Als u **In behandeling** selecteert, verschijnt een vraagteken ? op het miniatuurbeeld.

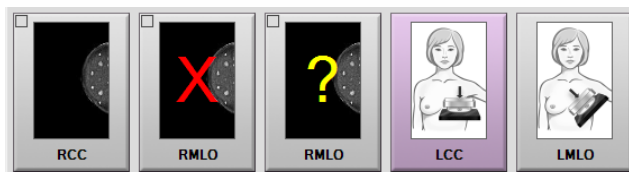

Figuur 47: Gemarkeerde beelden in een procedure

5. Herhaal stap 1 t/m 4 voor elke weergave.



### Opmerking

Een manager-gebruiker kan het systeem configureren om nieuwe beelden automatisch te accepteren (Auto-Accept) of automatisch als In behandeling (Auto-Pend) te markeren.

---

### 6.3.1 Volgorde van gebeurtenissen bij conventionele beeldvorming

1. Beoordeel het beeld na de belichting en voeg indien nodig een opmerking toe.
2. **Accepteer** het beeld (Accepteren), **wijs het af** (Weigeren) of markeer het als **In behandeling**. Een miniatuurbeeld vervangt de miniatuurweergave in het Case Study-gebied van het scherm.



### Opmerking

Een manager-gebruiker kan het systeem configureren om nieuwe beelden automatisch te accepteren (Auto-Accept) of automatisch als In behandeling (Auto-Pend) te markeren.

---

### 6.3.2 Volgorde van gebeurtenissen bij tomosynthesebeeldvorming

1. Wacht tot de beeldreconstructie voltooid is.
2. Beoordeel de projectiebeelden op beweging.
3. **Accepteer** de beelden (Accepteren), **weiger ze** (Weigeren) of markeer ze als **In behandeling**. Een miniatuurbeeld vervangt de miniatuurweergave in het Case Study-gebied van het scherm.



#### Opmerking

Een manager-gebruiker kan het systeem configureren om nieuwe beelden automatisch te accepteren (Auto-Accept) of automatisch als In behandeling (Auto-Pend) te markeren.

---

### 6.3.3 Een afgewezen beeld accepteren

Als een afgewezen beeld beter is dan het nieuwe beeld, kunt u het oude beeld ophalen en gebruiken. Selecteer het miniatuurbeeld in het *procedurescherm* om opnieuw een voorbeeld weer te geven van het beeld en **accepteer** vervolgens het beeld.

### 6.3.4 Een beeld in behandeling accepteren of afwijzen

Selecteer het miniatuurbeeld van het beeld in behandeling en vervolgens de knop **Accepteren** of de knop **Weigeren** om een beeld in behandeling te accepteren of af te wijzen.




#### Opmerking

Een manager-gebruiker kan het systeem configureren om nieuwe beelden automatisch te accepteren (Auto-Accept) of automatisch als In behandeling (Auto-Pend) te markeren.

---

#### 6.3.5 Helderheid huidlijn

Er is voor 2D-beeldvorming een optionele instelling voor beeldvormingsverwerking beschikbaar om de helderheid van en een teveel aan schaduw op de huid op screeningsweergaven te verminderen. Neem contact op met uw Hologic-vertegenwoordiger om deze optie in te schakelen.

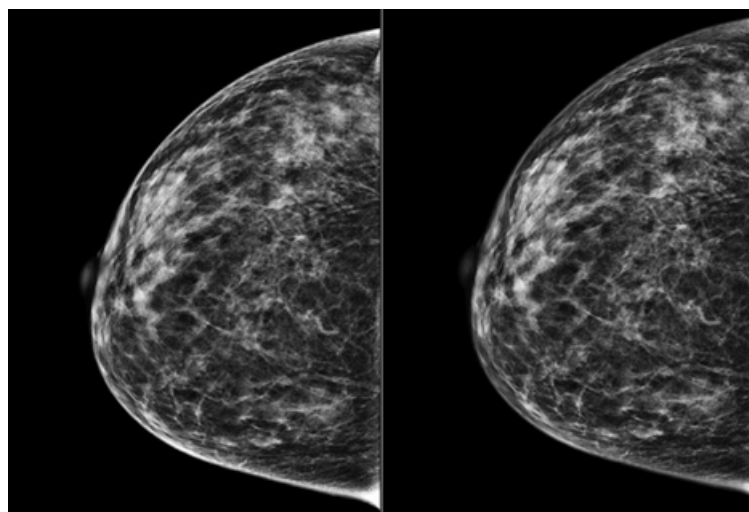

Standaard

Verminderde helderheid

*Figuur 48: Vergelijking van standaard helderheid en verminderde helderheid*

#### 6.4 Een beeld met een implantaat verwerven



##### Opmerking


Selecteer **ALTIJD** de knop **Implantaat aanwezig** voor alle weergaven van implantaten. Door deze knop te selecteren, worden de implantaatbeelden op de juiste wijze verwerkt.

---



### 6.4.1 implantaat dat zich niet bij de tepel bevindt

1. Selecteer een weergave in de miniatuurbeelden onder aan het *procedurescherm*.
2. Selecteer **Automatisch filter** voor de AEC-modus.
3. Verplaats de AEC-sensor aan de hand van de knoppen + en – naar het weefsel achter de tepel.

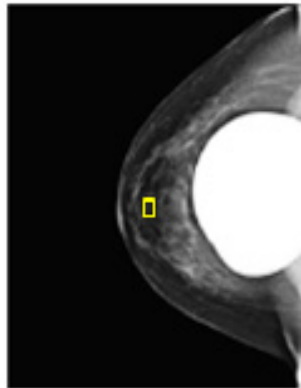

4. Verwerf de belichting.
5. **Accepteer** de beelden (Accepteren), **weiger ze** (Weigeren) of markeer ze als **In behandeling**.



#### Opmerking

Een manager-gebruiker kan het systeem configureren om nieuwe beelden automatisch te accepteren (Auto-Accept) of automatisch als In behandeling (Auto-Pend) te markeren.

---

6. Herhaal stap 1 t/m 5 voor elke weergave.

### 6.4.2 Implantaat dat zich bij de tepel bevindt

1. Selecteer een weergave in de miniatuurbeelden onderaan het scherm *Procedure*.
2. Selecteer **Manual** (Handmatig) voor de AEC-modus.
3. Selecteer de kVp- en mAs-waarden aan de hand van de knoppen + en -. Raadpleeg de tabellen in [Waardetabellen voor implantaten die zich bij de tepel bevinden](#) op pagina 95 (Waardetabellen voor implantaat dat zich bij de tepel bevindt) voor de aanbevolen waarden op basis van het weergavetype en de compressiedikte.



#### Opmerking

De CEDM-weergave bestaat uit twee afzonderlijke belichtingstoepassingen. Alleen de technieken voor eerste belichting met lage energie kunnen handmatig worden ingesteld. Het systeem stelt automatisch de technieken voor de tweede belichting in op basis van de technieken van de eerste belichting.

---



#### Opmerking

Selecteer voor gecombineerde contrastweergaven de waarden voor de tomosynthesebelichtingen uit tabel 17 en de waarden voor de contrastversterkte belichting (CEDM) uit tabel 18.

---

Raadpleeg [I-View contrastversterkte 2D-beelden](#) op pagina 104 (I-View contrastversterkte 2D-beelden) voor meer informatie over het verwerven van contrastversterkte beelden.

4. Verwerf de belichting.
  5. Klik voor de beelden op **Accept** (Accepteren), **Reject** (Weigeren) of markeer ze als **Pend** (In behandeling).
- 



#### Opmerking

Een manager-gebruiker kan het systeem configureren om nieuwe beelden automatisch te accepteren (Auto-Accept) of automatisch als In behandeling (Auto-Pend) te markeren.

---

6. Herhaal stap 1 t/m 5 voor elke weergave.

**Waardetabellen voor implantaten die zich bij de tepel bevinden**

*Tabel 18: Conventionele 2D-beeldvorming*

<b>Compressiedikte</b>	<b>kV</b>	<b>mAs</b>	<b>Filter</b>
<4 cm	28	100	Rh
4 - <6 cm	28	120	Rh
6 - <8 cm	28	140	Rh
8 - 10 cm	28	160	Rh
>10 cm	28	180	Rh

*Tabel 19: Tomosynthesebeeldvorming*


<b>Compressiedikte</b>	<b>kV</b>	<b>mAs</b>	<b>Filter</b>
<4 cm	29	60	Al
4 - <6 cm	31	70	Al
6 - <8 cm	33	90	Al
8 - 10 cm	35	100	Al
>10 cm	38	100	Al

*Tabel 20: Beeldvorming met contrastversterking (I-View)*

<b>Compressiedikte</b>	<b>kV</b>	<b>mAs</b>	<b>Filter</b>
< 3,5 cm	26	30	Rh
3,5 - <4 cm	27	40	Rh
4 - <5 cm	28	40	Rh
5 cm - <5,5 cm	29	60	Ag
5,5 cm - <6 cm	30	60	Ag
6 - <7,5 cm	31	80	Ag
7,5 - <8,5 cm	32	120	Ag
8,5 - 12 cm	33	120	Ag
>12 cm	33	160	Ag

### 6.4.3 Weergaven van verplaatst implantaat

1. Selecteer een weergave in de miniatuurbeelden onder aan het *procedurescherm*.
2. Selecteer **Automatisch filter** voor de AEC-modus.
3. Verplaats de AEC-sensor aan de hand van de knoppen + en – naar het weefsel achter de tepel.

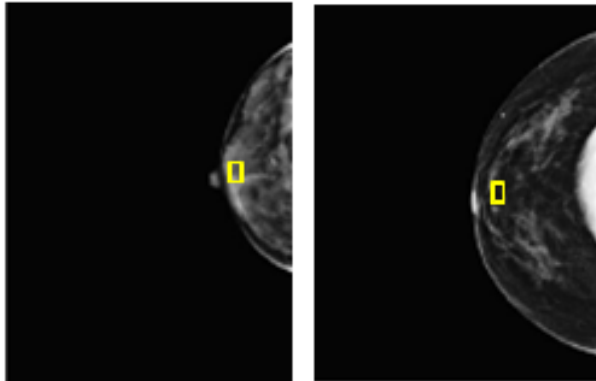

4. Verwerf de belichting.
5. **Accepteer** de beelden (Accepteren), **weiger ze** (Weigeren) of markeer ze als **In behandeling**.



#### Opmerking


Een manager-gebruiker kan het systeem configureren om nieuwe beelden automatisch te accepteren (Auto-Accept) of automatisch als In behandeling (Auto-Pend) te markeren.

---

6. Herhaal stap 1 t/m 5 voor elke weergave.

#### 6.4.4 Helderheid implantaat

Voor zowel 2D- als 3D-beeldvorming bij implantaten is een optionele instelling voor beeldverwerking beschikbaar. De helderheid van het implantaat kan worden verminderd om de zichtbaarheid van het grensgebied van het implantaat en de borst te verbeteren. Neem contact op met uw Hologic-vertegenwoordiger om deze optie in te schakelen.

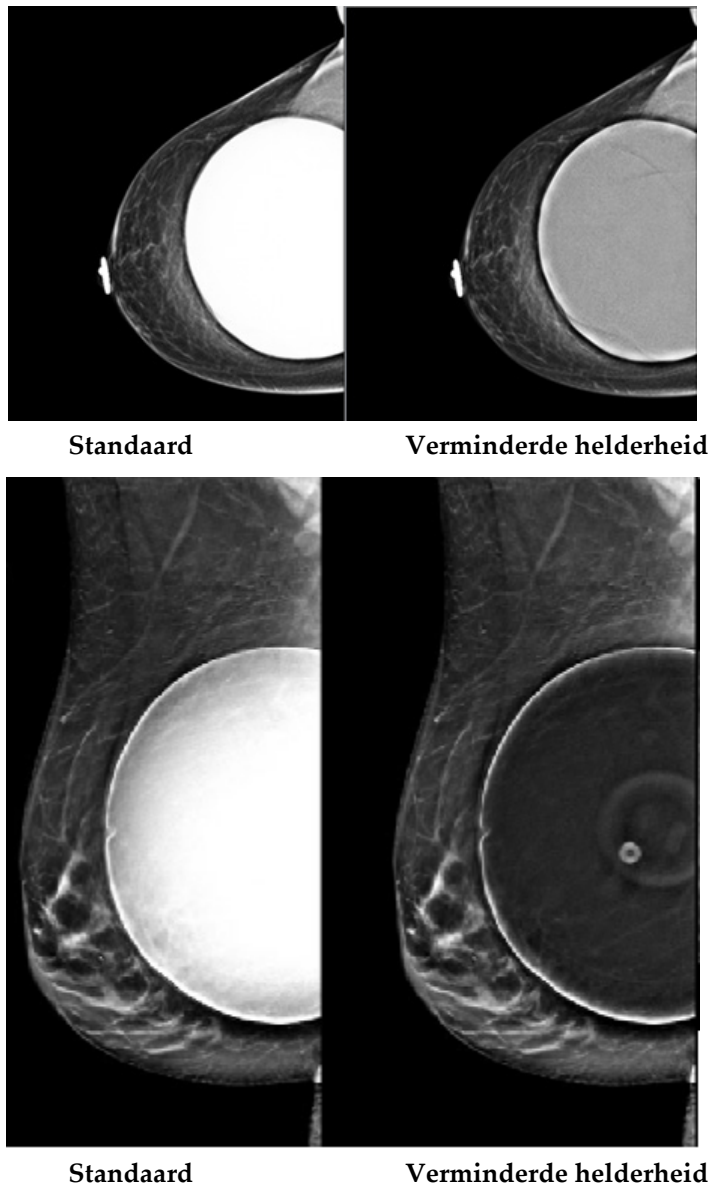

Figuur 49: Vergelijking van standaard helderheid en verminderde helderheid

## 6.5 Beelden met implantaten corrigeren en opnieuw verwerken

U moet het beeld corrigeren als u een implantaatweergave of een verplaatste weergave van het implantaat verwerft zonder dat de knop voor **Implantaat aanwezig** is geactiveerd.

### 6.5.1 Als het beeld niet wordt geaccepteerd

Selecteer de knop voor **Implantaat aanwezig** in het *procedurescherm* om aan te geven dat een implantaat aanwezig is. Op de knop verschijnt een vinkje en het beeld wordt opnieuw verwerkt.



### 6.5.2 Als het beeld wordt geaccepteerd

1. Selecteer het beeld.
2. Selecteer de knop voor **Implantaat aanwezig** in het *procedurescherm* om het beeld te corrigeren. Op de knop verschijnt een vinkje en het beeld wordt opnieuw verwerkt.
3. Selecteer de knop **Accepteren** om de wijzigingen te accepteren.




#### Opmerking

Het gecorrigeerde beeld wordt automatisch naar de geselecteerde uitvoerapparaten verzonden als het systeem is ingesteld om beelden te verzenden wanneer de knop **Accepteren** wordt geselecteerd.

---

## 6.6 De beelden beoordelen

Voor de beoordeling van beelden worden de miniatuurbeelden, beeldbeoordelingshulpmiddelen en weergavemodi gebruikt.

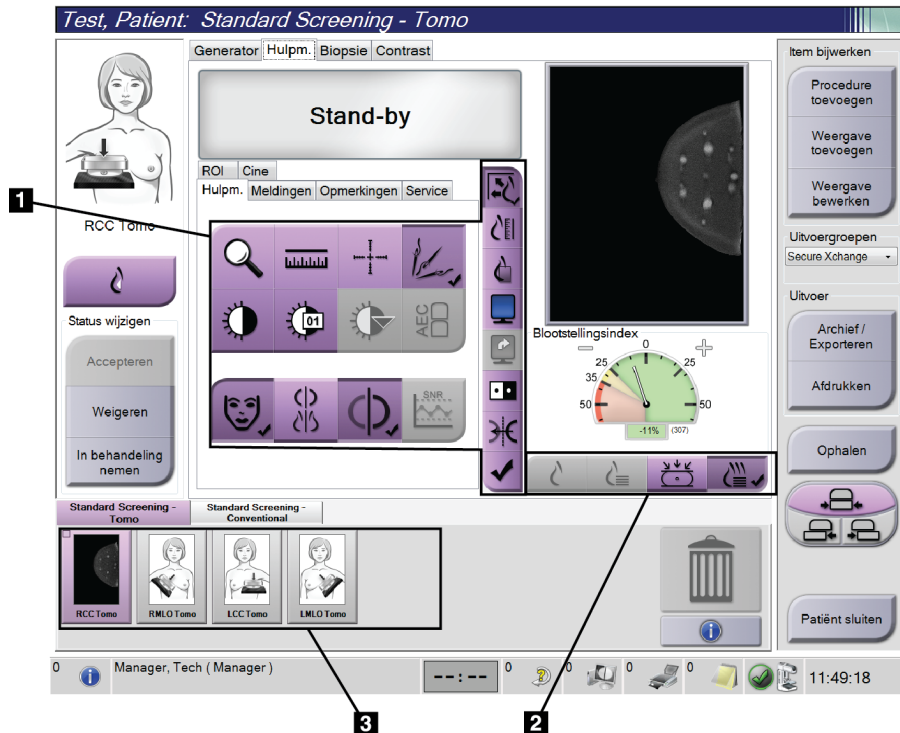


Figuur 50: Tabblad Tools (Hulpmiddelen) (weergegeven is de tomosyntheseoptie)

### Legenda

1. Beeldbeoordelingshulpmiddelen - raadpleeg [Tabblad Hulpmiddelen beeldbeoordeling](#) op pagina 100.
2. Beeldweergavemodi - raadpleeg [Weergavemodi](#) op pagina 102.
3. Miniatuurweergaven en miniatuurbeelden. Selecteer een miniatuurbeeld voor weergave op de beeldweergavemonitor.

### 6.6.1 Tabblad Hulpmiddelen beeldbeoordeling

Het tabblad **Hulpmiddelen** op het *procedurescherm* biedt de hulpmiddelen voor het beoordelen van beelden. Op het actieve hulpmiddel verschijnt een vinkje.

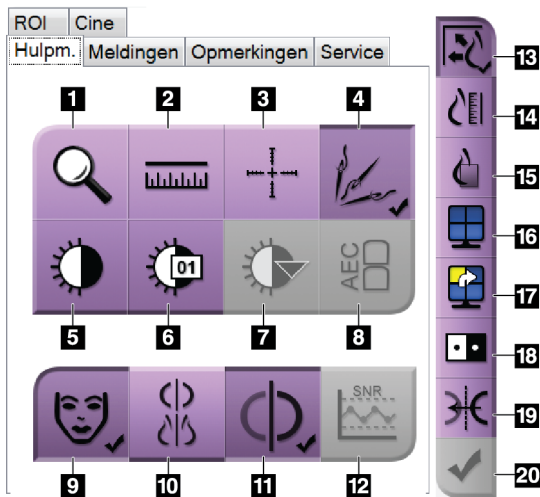

Figuur 51: Hulpmiddelen voor het beoordelen van beelden


#### Legenda

1. Met het **zoom**-hulpmiddel wordt een gedeelte van het beeld vergroot.
2. Met de **liniaal** wordt de afstand tussen twee punten gemeten.
3. Met het **dradenkruis** wordt een dradenkruis op het *beeldweergavescherm* weergegeven.
4. Met de **demetalizer** worden tomosynthesebeelden verwerkt die metalen objecten bevatten.
5. Met het **venster/niveau**-hulpmiddel worden helderheid en contrast gewijzigd.
6. Met het hulpmiddel voor **fijnafstelling venster/niveau** kunnen specifieke venster- en niveauwaarden worden ingevoerd.
7. Met het hulpmiddel voor **LUT-selectie** wordt door beschikbare venster/niveau-instellingen gebladerd om een weergegeven beeld met eraan bevestigde LUT's te lokaliseren.
8. Met de **AEC**-knop worden de AEC-sensorgebieden weergegeven die worden gebruikt voor de belichtingsberekening. De sensorgebieden worden op het *beeldweergavescherm* weergegeven.
9. Met de knop voor **patiëntinformatie** wordt het scherm met patiëntinformatie geactiveerd.
10. Met de knop voor **Autom. hangen** wordt de geselecteerde studie in een 4-up-configuratie geplaatst.
11. Met de knop voor **Auto-Pairing** (Automatische koppeling) wordt automatische koppeling voor het huidige geselecteerde beeld in een multi-up-configuratie uitgeschakeld.
12. Met de **SNR/CNR**-knop worden de signaal-ruis verhouding en de contrast-ruisverhouding op het ACR-fantom berekend.
13. Met de knop voor **Aanpassen aan weergavekader** wordt het beeld in de beeldtegel geplaatst.
14. Met de knop voor **Werkelijke grootte** wordt het beeld op ware grootte van de borst weergegeven.
15. Met de knop voor **Werkelijke pixels weergeven** wordt het beeld in de volledige resolutie weergegeven.
16. Met de knop voor **Multi-up-weergave** wordt het aantal weer te geven tegels geselecteerd.
17. Met de knop voor **Beeldtegel naar voren brengen** wordt de actieve multi-up-tegel ingesteld.
18. Met het hulpmiddel voor **Beeld inverteren** verandert zwart in wit en andersom.
19. Met de **spiegel**-knop wordt het beeld omgekeerd (gespiegeld).
20. Met de knop voor **Markeren voor afdrukken** worden de projectie- of reconstructiebeelden van een tomosynthesebeeld gemarkeerd voor afdrukken op een later tijdstip.



### 6.6.2 Tabblad Meldingen

Met de hulpmiddelen op het tabblad **Meldingen** kunt u beelden markeren en van aantekeningen voorzien en mededelingen over het weergegeven beeld of de procedure verzenden. Met het vervolkeuzemenu Melding uitvoergroepen onder aan het tabblad kunt u de bestemming voor de meldingen selecteren.

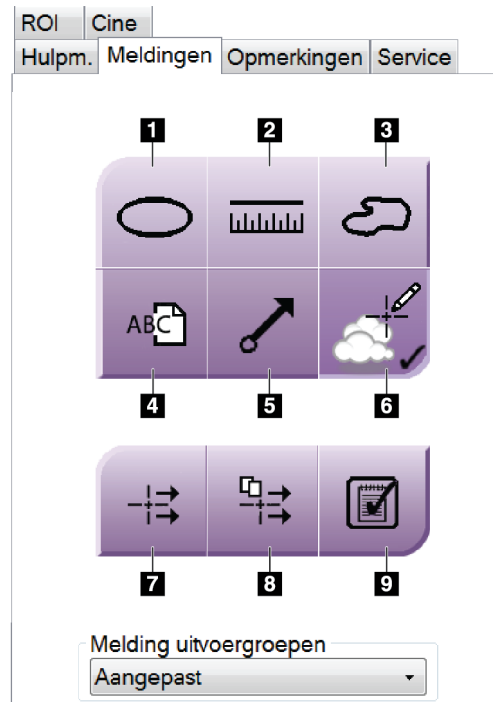

Figuur 52: Hulpmiddelen op het tabblad Meldingen

#### Legenda

1. Met het hulpmiddel **Ovaal** wordt een ovale markering op het beeld getekend.
2. Met de **liniaal** wordt de afstand tussen twee punten gemeten.
3. Met het hulpmiddel **Vrije hand** wordt een vrije hand-markering op het beeld getekend.
4. Met het hulpmiddel **Tekst** wordt een tekstnotitie zonder markering aan het beeld toegevoegd.
5. Met het hulpmiddel **Pijl** wordt een pijl op het beeld getekend.
6. Met het hulpmiddel **Markeringen** worden markeringen en aantekeningen op een beeld weergegeven of verborgen.
7. Met het hulpmiddel **Verzend melding** wordt een mededeling over het huidige beeld naar de geselecteerde bestemming gezonden.
8. Met het hulpmiddel **Verzend alle meldingen** worden alle mededelingen over alle beelden in de geopende procedure naar de geselecteerde bestemming verzonden.
9. Met het hulpmiddel **Bekeken** wordt de mededelingenstatus van de patiënt gewijzigd in "bekeken".


### 6.6.3 Andere hulpmiddelen voor beeldbeoordeling

#### Overige tabbladen

- **Opmerkingen:** Opmerkingen toevoegen aan een beeld.
- **Service:** Een beeld markeren voor gebruik voor service.
- **ROI:** Een te onderzoeken locatie op de beeldweergavemonitor tekenen.
- **Cine:** Een reeks beelden weergeven als film (tomosyntheseoptie).

#### Blootstellingsindex


De blootstellingsindex is een richtsnoer voor beeldkwaliteit. Wanneer in de belichtingsindex het rode of gele gebied wordt aangegeven, moet het geselecteerde beeld opnieuw worden beoordeeld op ruis en moet er een besluit worden genomen over het opnieuw verwerven van het beeld.

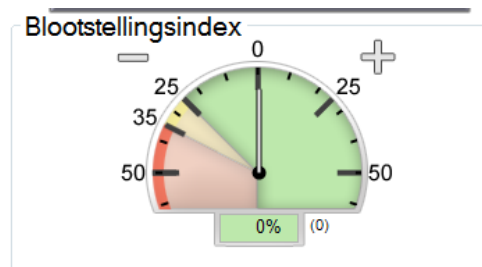

Figuur 53: Blootstellingsindex

#### Weergavemodi

Selecteer met de knoppen in het weergavemodigebied van het scherm het type weergave dat op de beeldweergavemonitor moet worden weergegeven. U kunt wisselen tussen conventionele, gegenereerd 2D, projecties, reconstructies en SmartSlices voor het weergeven van de combinatiebeelden.

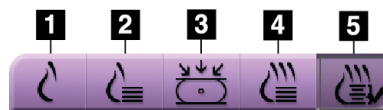


Figuur 54: Weergavemodi

#### Legenda

1. Met de knop **Conventioneel** worden conventionele 2D-beelden weergegeven.
2. Met de knop **Gegeneerd 2D** wordt een 2D-beeld weergegeven dat uit het verworven tomografische beeld is gegenereerd.
3. Met de knop **Projecties** worden de projectiebeelden uit de sweep van 15° weergegeven.
4. Met de knop **Reconstructies** worden gereconstrueerde plakken van 1 mm weergegeven.
5. Met de knop **SmartSlices** worden plakken van 6 mm uit de 3DQuorum-software weergegeven.

### 6.6.4 Projectie-indicator

De projectie-indicator op de beeldweergavemonitor wordt alleen voor tomosyntheseprocedures weergegeven. Selecteer de modus voor projectieweergave om de indicator weer te geven.

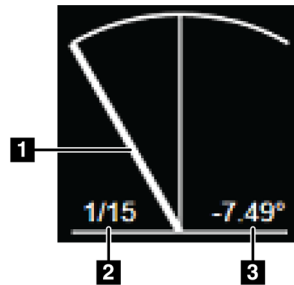


Figuur 55: Projectie-indicator

#### Legenda

1. Gebruik het bladerwiel van de muis om door de projecties te navigeren.
2. Projectienummer van het beeld
3. Hoek van de buis voor de projectie

### 6.6.5 Plakindicator

De plakindicator op de beeldweergavemonitor wordt alleen op tomografische reconstructies, met inbegrip van SmartSlices, weergegeven.

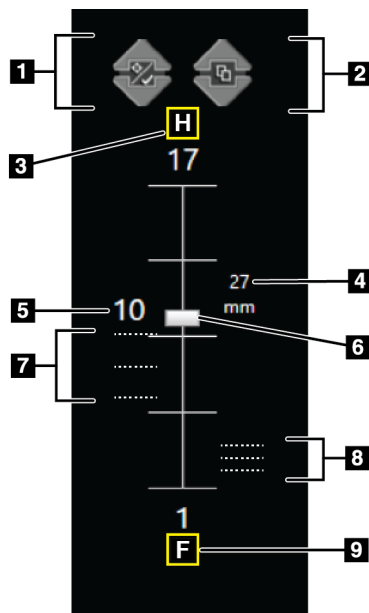

Figuur 56: Plakindicator (optie SmartSlice weergegeven)

#### Legenda

1. Met de pijlen **omhoog** en **omlaag** kunt u van plakken met een te onderzoeken laesie naar plakken die zijn gemarkeerd om te worden afgedrukt gaan en omgekeerd.
2. Met de pijlen **omhoog** en **omlaag** kunt u door plakken met mededelingen bladeren.
3. H (anatomische verwijzing naar de richting van het hoofd)
4. Hoogte binnen het borstvolume (voor SmartSlices)
5. Nummer van het met tomosynthese gereconstrueerde plak- of SmartSlice-beeld
6. Met de schuifbalk kunt u door de plakken van de reconstructies schuiven.
7. Plakken die te onderzoeken gebieden bevatten of zijn gemarkeerd om te worden afgedrukt.
8. Plakken die mededelingen bevatten.
9. F (anatomische verwijzing naar de richting van de voeten)

## 6.7 De beelden naar de uitvoerapparaten verzenden

U kunt de beelden naar uitvoerapparaten verzenden of de functie Archief/Exporteren gebruiken om beelden naar tijdelijke opslagmedia te kopiëren. Raadpleeg [Uitvoergroepen](#) op pagina 78 en [Uitvoeren op verzoek](#) op pagina 82 voor instructies.

### 6.8 I-View contrastversterkte 2D-beelden



**Waarschuwing:**

Contrastmiddelen kunnen bijwerkingen bij patiënten veroorzaken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het contrastmiddel voor alle informatie.



**Waarschuwing:**

Mammografie met contrastversterking maakt gebruik van contrastmiddelen die intraveneus worden toegediend. Er kunnen allergische reacties optreden.



**Opmerking**


Hologic configureert bepaalde systemen zodanig dat deze aan specifieke vereisten voldoen. Uw systeemconfiguratie beschikt mogelijk niet over alle opties en accessoires die in deze handleiding worden genoemd.



**Opmerking**

Gebruik geen SmartCurve-systeempaddles voor I-View-procedures.

1. Selecteer het tabblad **Contrast** om de functie I-View® 2D-contrast (CEDM) te openen.

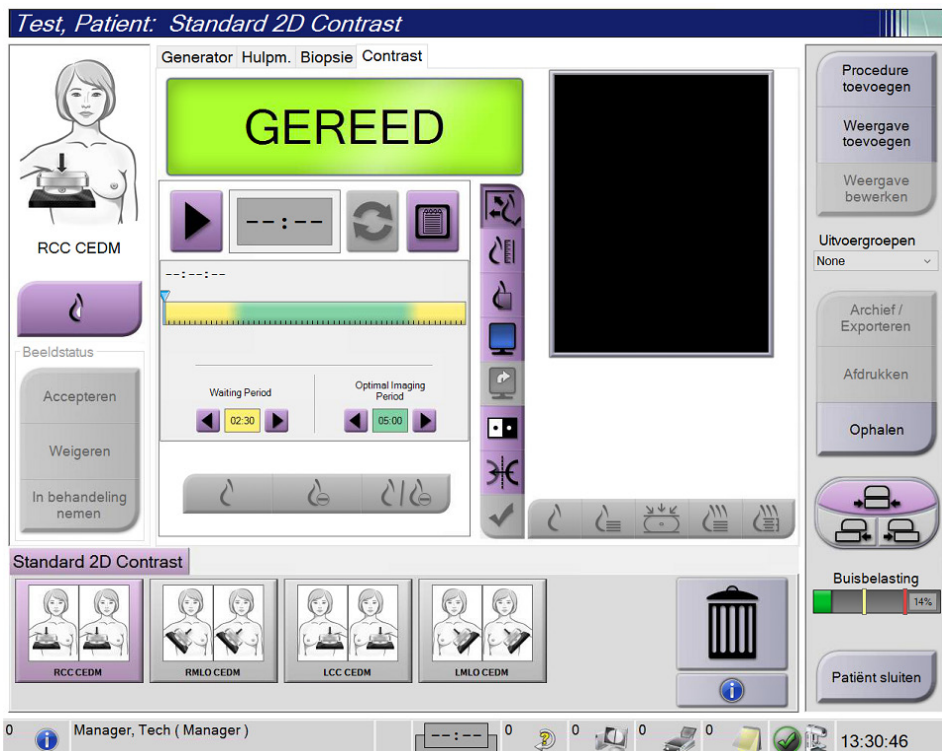

Figuur 57: Scherm van I-View 2D Contrast

2. Stel de contrastinstellingen in. Raadpleeg voor meer informatie [De contrastinstellingen configureren](#) op pagina 109.



**Opmerking**

Contrastinformatie wordt opgenomen in de DICOM-header van I-View-beelden.

- Klik op de (pijl)knop **Start** om te beginnen met de contrastdosis en de timer te starten.  
De timer begint in de **wachtperiode**, die verschijnt met een gele achtergrond.




**Opmerking**

U kunt de timer voor de duur van fasen van de **wachtperiode** en de **optimale beeldvormingsperiode** voor elke procedure aanpassen. Doe dit aan de hand van de pijlen naar links en naar rechts.



**Opmerking**

U kunt de standaardduur van de **wachtperiode** en de fasen van de **optimale beeldvormingsperiode** van de timer aanpassen. Raadpleeg [De standaard contrastinstellingen instellen](#) op pagina 157.

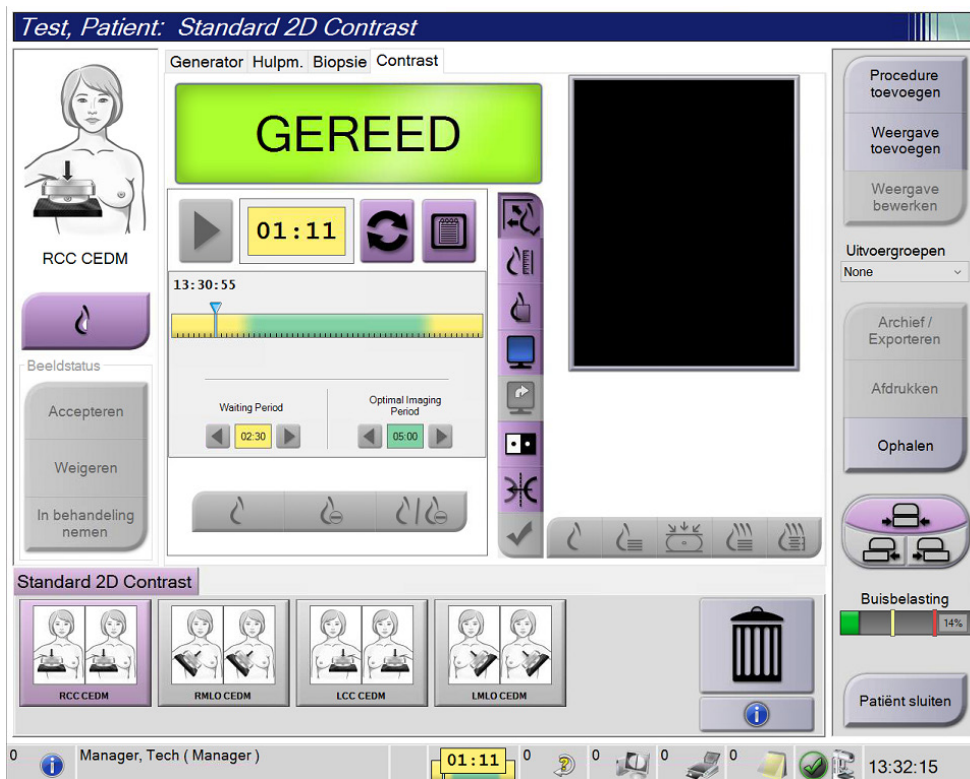

Figuur 58: Scherm van I-View 2D Contrast, wachtperiode




**Opmerking**

De timerfunctie biedt geen mogelijkheid tot stoppen van de timer. U kunt deze alleen starten en opnieuw instellen. De timer stopt alleen wanneer u de patiëntprocedure afsluit.

Na de **wachtperiode** begint de timer met aftellen van de **optimale beeldvormingsperiode**, die verschijnt met een groene achtergrond.

4. Verwerf de beelden tijdens de **optimale beeldvormingsperiode**.

Nadat u een beeld hebt verworven, verschijnt een marker onder de timer.

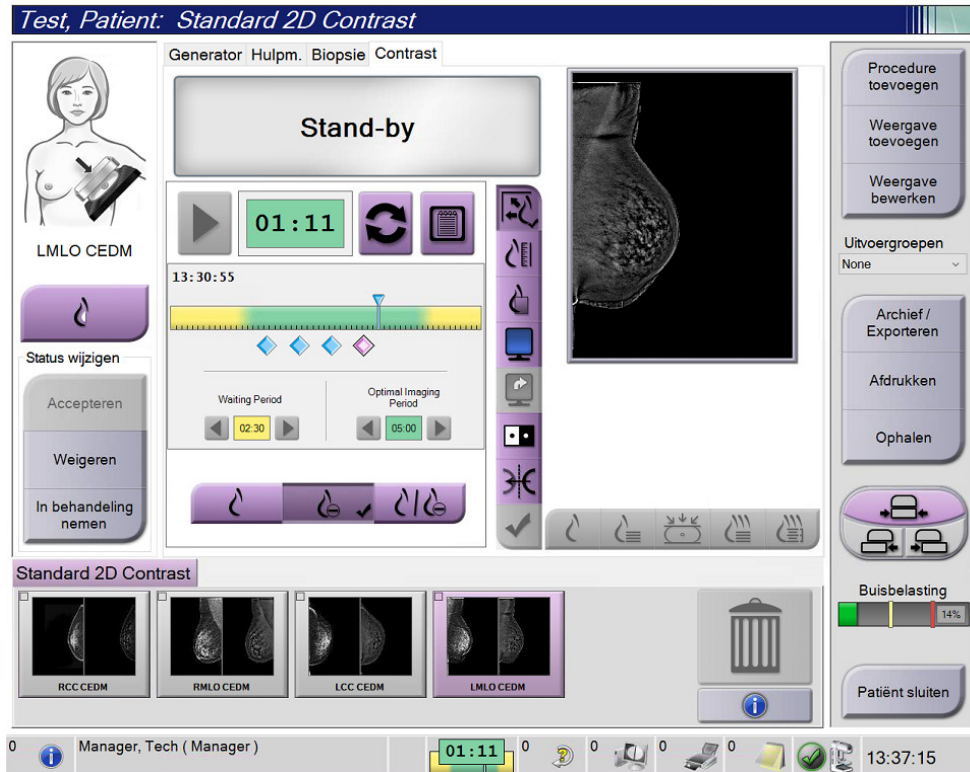

Figuur 59: Scherm van I-View 2D Contrast, optimale beeldvormingsperiode

5. Selecteer de knoppen voor lage energie en subtractie om de gesubtraheerde beelden met lage energie en dubbele energie weer te geven.
  - **Lage energie:** Conventioneel laag energetisch beeld
  - **Subtractie:** Gesubtraheerd beeld met contrast
  - **Beelden met lage energie en van subtractie naast elkaar tonen:** Toont de laag energetische en gesubtraheerde schermbeelden naast elkaar in een gedeeld scherm.



### Let op:

Als u een I-View 2D Contrast-procedure uitvoert, neemt de hersteltijd die machine nodig heeft om meer beelden te verwerven toe. Als het pictogram **Systeemstatus** rood



is ( ), wordt een aanbevolen wachttijd weergegeven. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de temperatuur van de röntgenbuis afneemt om schade te voorkomen die de garantie op de röntgenbuis teniet kan doen. Als het pictogram **Systeemstatus** tijdens een procedure rood wordt, volgt u de richtlijnen in het gedeelte [Indicator voor buisbelasting](#) op pagina 107.


De warmtebelasting van de röntgenbuis wordt door de buisbelastingsindicator bijgehouden. Zorg dat u de buisbelastingsstatus in de gaten houdt als u beelden met contrastversterking verwerft. Raadpleeg [Indicator voor buisbelasting](#) op pagina 107 voor meer informatie.

### 6.8.1 Indicator voor buisbelasting

Het tabblad **Generator** van het scherm *Procedure* bevat een indicator voor de buisbelasting. Deze indicator geeft de huidige warmtebelasting van de röntgenbuis aan.

De indicator voor buisbelasting geeft een van de volgende drie statussen weer:


- Een groene status betekent dat de warmtelading van de röntgenbuis lager is dan wat wordt beschouwd als stabiele warmtelading. Tijdens de groene status kan het systeem 4 patiënten per uur volgens I-View-procedures met verbeterd contrast verwerken.

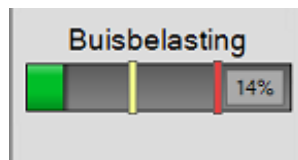

#### Opmerking

Stabiele warmtelading van de Dimensions-röntgenbuis is gedefinieerd als continue werking op 55% van de warmtecapaciteit van de röntgenbuis. Stabieleit betekent continue Combo-beeldvorming met 8 patiënten per uur.

- De gele status betekent dat de warmtelading van de röntgenbuis hoger is dan wat wordt beschouwd als stabiele werking (zie opmerking hierboven). Bij een gele status heeft het systeem nog steeds volop warmtecapaciteit voor een volledige I-View-procedure met verbeterd contrast en zijn beeldopnamen voor maximaal 4 patiënten per uur mogelijk.

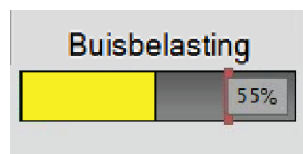

#### Opmerking

Het getal dat wordt weergegeven in de hoek van de indicator Buis laden toont de geschatte warmtelading van de buis, waarbij 55% de stabiele waarde is. Er wordt verwacht dat de indicator Buis laden geel wordt tijdens een I-View-procedure met verbeterd contrast en dat tijdens de rest van de procedure blijft. Het is ook mogelijk, maar zeldzaam, dat de indicator Buis laden geel is wanneer een patiënt wordt geopend om een I-View-procedure met verbeterd contrast te starten. In beide gevallen kan de I-View-procedure ononderbroken doorgaan. Zolang de indicator Buis laden geel is, is de warmtelading van de buis veilig.






### Opmerking

Wanneer de status van Buis laden geel is, kan het pictogram Systeemstatus rood knipperen en een getal bevatten dat aangeeft hoeveel minuten het gaat duren voordat het niveau onder de stabiele warmtelading komt. Wanneer de indicator Buis laden geel is, hoeft u ondanks het knipperende pictogram Systeemstatus niet te wachten om beeldopnamen te maken. Het pictogram Systeemstatus is er alleen ter informatie en vereist geen actie wanneer de indicator Buis laden geel is.

---

- De rode status betekent dat de warmtelading van de röntgenbuis zojuist een drempelwaarde heeft overschreden. Dit kan risico's opleveren wanneer u probeert extra beeldopnamen te maken. Bij een rode status resteert er nog enige warmtecapaciteit in het systeem (de drempelwaarde is ingesteld op 75% van de capaciteit voor warmtelading van de buis). We raden echter aan te wachten met de verwerving van extra beelden totdat het aanbevolen aantal minuten in de indicator Buis laden is verstreken. De wachttijd is meestal erg kort (ongeveer één minuut). Zodra de status van de indicator Buis laden weer geel is, kunnen extra beeldopnamen gemaakt worden.

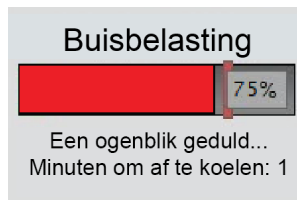

### Opmerking

Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bij een sterk gecompriëerde borstdikte of meer dan vier contrastweergaven) is het normaal dat de indicator Buis laden rood wordt na de laatste opname voor een I-View-procedure met verbeterd contrast. Het systeem komt snel weer in evenwicht en de status verandert binnen een paar minuten weer in geel of zelfs groen. Zelfs als de indicator Buis laden soms rood wordt, kan het systeem nog steeds 4 patiënten per uur verwerken voor I-View-onderzoeken met verbeterd contrast. Er is nog steeds ruimte voor extra warmtelading naar de röntgenbuis.

---



### Let op

**Overmatige warmteontwikkeling kan de röntgenbuis beschadigen.**

---



## 6.8.2 De contrastinstellingen configureren

1. Selecteer in het tabblad **Contrast** de knop **Contrast configureren** om de contrastinstellingen te bewerken. Het dialoogvenster met contrastinformatie wordt geopend.

Informatie over contrastmiddel	
Toedieningsroute van contrastmiddel	Intra-arterial route
Contrastmiddel	Diatrizoate
Contrastmiddelconcentratie	240 mg/ml
Totaal bolusvolume	0.0 ml
Gewicht patiënt	0.0 lb = 0.0 kg
Concentratie van contrastmiddel op basis van lichaamsgewicht	0.0 ml/kg
Hoeveelheid contrastmiddel	0.0 ml

Opslaan en sluiten      Annuleren

Figuur 60: Instellingen van I-View 2D Contrast


2. Gebruik de vervolgkeuzelijsten om de juiste instellingen te selecteren.
3. Voer gegevens voor het veld '**Concentratie van contrastmiddel op basis van lichaamsgewicht**' of het veld '**Hoeveelheid contrastmiddel**' in. In het andere veld wordt automatisch de juiste informatie ingevuld.
4. Selecteer **Opslaan en sluiten**.

### 6.9 Specimenbeelden

Het systeem kan worden gebruikt voor de beeldvorming van biopsiespecimen.

Op de volgende wijze verwerft u specimenbeelden:


1. Selecteer een patiënt in de werklIJst of voeg handmatig een nieuwe patiënt toe.
2. Selecteer de vereiste beeldvormingsprocedure voor specimen of voeg deze toe.

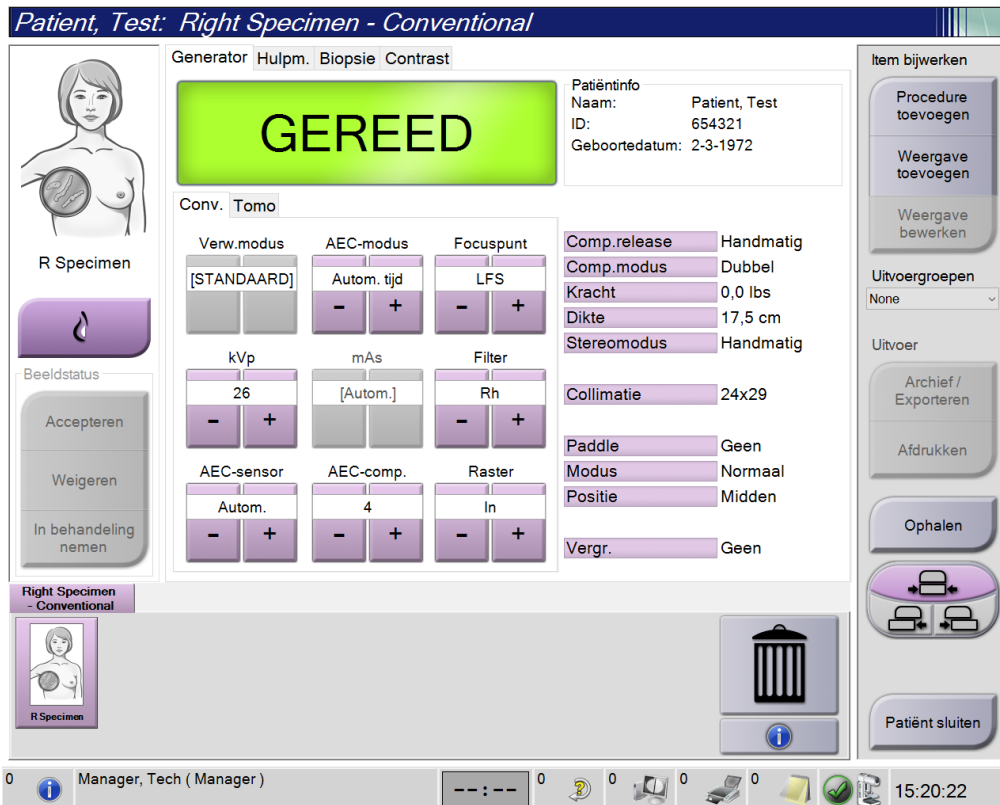

Figuur 61: Procedurescherm voor specimen

3. Zorg dat de C-arm is gepositioneerd op 0 graden.
4. Bereid het specimen voor en plaats het op de beelddetector.

5. Verwerf de beelden. Raadpleeg [Een beeld verwerven](#) op pagina 89 voor meer informatie over het verwerven van beelden.

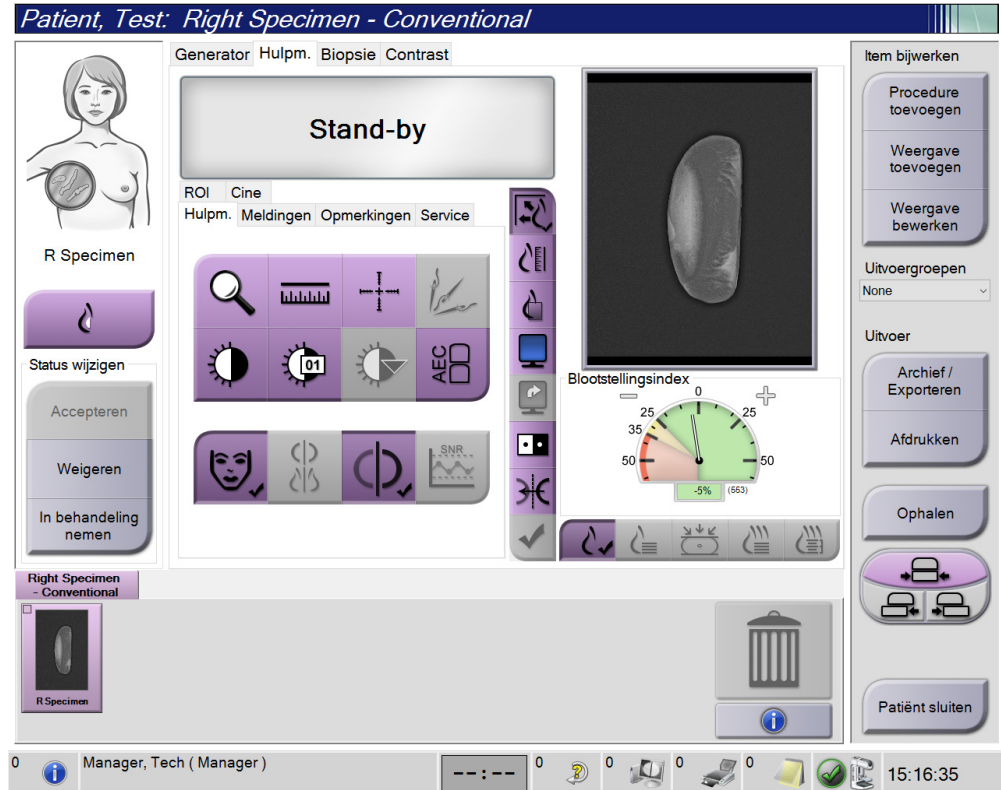

Figuur 62: Specimenbeeldvormingsscherm

6. Bekijk indien nodig de beelden.



## Hoofdstuk 7 Accessoires

Met het systeem kunnen met behulp van gespecificeerde accessoires screenings- of diagnostische toepassingen worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt het gebruik van alle mogelijke systeemaccessoires beschreven.




### Opmerking

Hologic configureert bepaalde systemen zodanig dat deze aan specifieke vereisten voldoen. Uw systeemconfiguratie beschikt mogelijk niet over alle opties en accessoires die in deze handleiding worden genoemd.

### 7.1 Accessoires installeren op de C-arm

Het intrekbare gezichtsscherm, de vergrotingsstandaard en het dradenkruis voor lokalisatie worden in gleuven op de C-arm geïnstalleerd. De gleuven zijn voorzien van labels met pictogrammen die het accessoire aangeven waarvoor de gleuf bestemd is. Elk accessoire heeft twee lijnen. Lijn het accessoire uit met de bijbehorende lijn op de C-arm. Wanneer de haak op het accessoire zich op de juiste diepte bevindt, sluit de tweede, dunnere lijn aan bij de lijn op de C-arm. In het volgende gedeelte vindt u installatie-instructies voor elk accessoire.

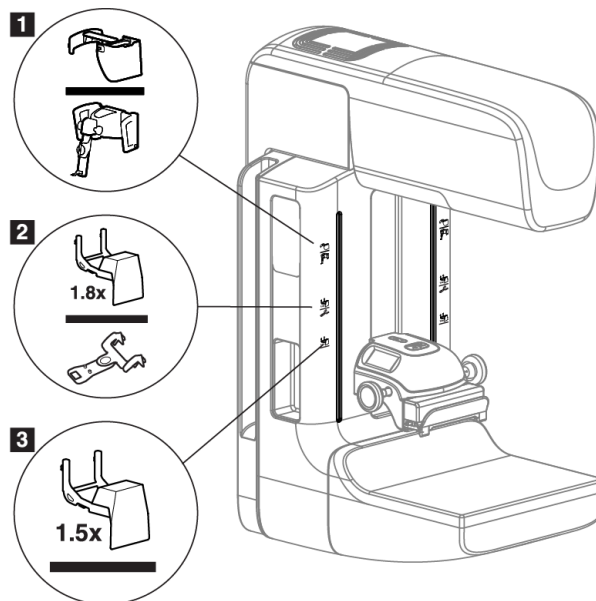

Figuur 63: Accessoires van de C-arm

#### Legenda

1. Gleuf voor intrekbaar gezichtsscherm (tomosyntheseoptie) of het Affirm®-geleidesysteem voor borstbiopsie (biopsieoptie)
2. Gleuf voor 1,8 x vergrotingsstandaard en dradenkruis voor lokalisatie
3. Gleuf voor 1,5 x vergrotingsstandaard

### 7.2 Gezichtsschermen voor de patiënt

Het gezichtsschermbouwtijdens het onderzoek het hoofd en gezicht van de patiënt uit de buurt van het röntgenveld. Inspecteer het gezichtsschermdagelijks voordat u het gebruikt.



**Waarschuwing:**

Het gezichtsschermmoet worden aangebracht voor alle belichtingen behalve als het om casestudies gaat waarbij vergrotingen worden gebruikt.



**Waarschuwing:**

Zorg dat het gezichtsschermvolledig aangebracht is op de C-arm. Onjuiste installatie van het gezichtsschermkandepatiënt en de gebruiker verwonden.




**Waarschuwing:**

Het gezichtsschermbeschermt de patiënt niet tegen straling.

#### 7.2.1 Het intrekbare gezichtsscherminstalleren en verwijderen

Het intrekbare gezichtsschermbwordt als volgt geïnstalleerd:

1. Schuif het gezichtsschermitot in de buitenste stand.
2. Breng de haken van het gezichtsschermap één lijn met de bevestigingsgleuven op de C-arm, die worden aangegeven met een pictogram van het gezichtsschermb.
3. Plaats de haken aan beide zijden van het gezichtsschermin de bevestigingsgleuven op de C-arm. De ontgrendelhendel (zie onderdeel 1 in de volgende figuur) staat omhoog.
4. Duw het gezichtsschermin de omlaag-stand. Dit is tevens de vergrendelde positie. De ontgrendelhendel staat in de omlaag-stand wanneer het gezichtsscherbzich vergrendelt.

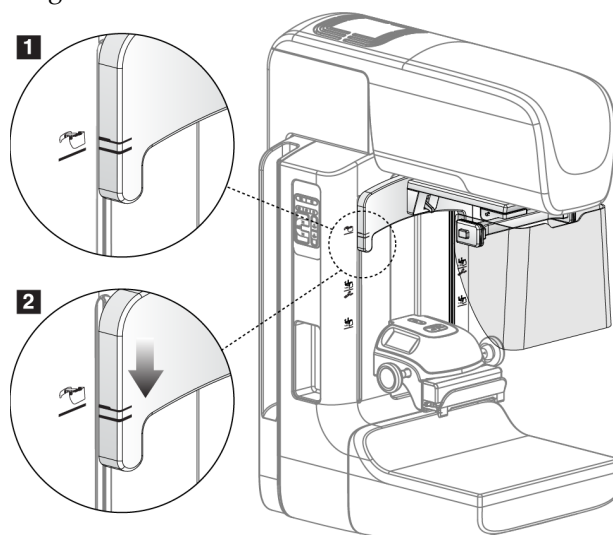

Figuur 64: Het intrekbare gezichtsschermitlijnen met de C-arm

Het intrekbare gezichtsscherf verwijderen:

1. Druk de ontgrendelhendel (zie onderdeel 1 in de vorige figuur) in de omhoog-stand en houd deze ingedrukt in deze positie.
2. Til het gezichtsscherf uit de gleuven en verwijder het van de C-arm.

### 7.2.2 Het intrekbare gezichtsscherf gebruiken




#### Opmerking

Voordat u een belichting uitvoert, moet u controleren of het gezichtsscherf volledig is uitgeschoven of volledig is ingetrokken.


U schuift het gezichtsscherf uit door dit van de C-arm vandaan te trekken tot het zich vergrendelt in de buitenste stand.

Het gezichtsscherf intrekken:

1. Druk op een ontgrendeling (zie onderdeel 2 in de volgende figuur – één aan elke zijde).
2. Duw het gezichtsscherf naar de C-arm toe tot het niet verder gaat.

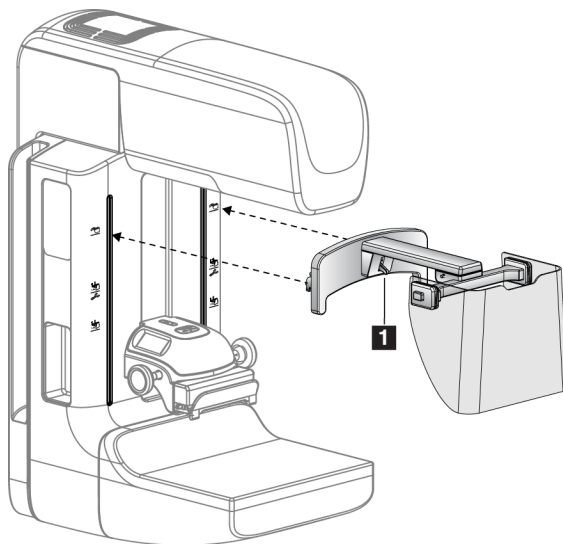


Figuur 65: Installatie van het gezichtsscherf

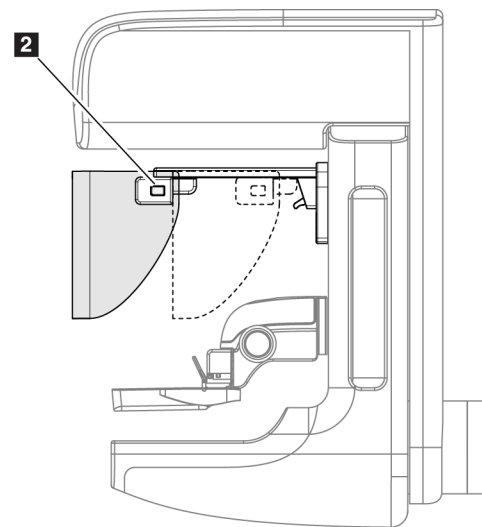

Figuur 66: Bediening van het gezichtsscherf

#### 7.2.3 Het conventionele gezichtsscherf installeren en verwijderen

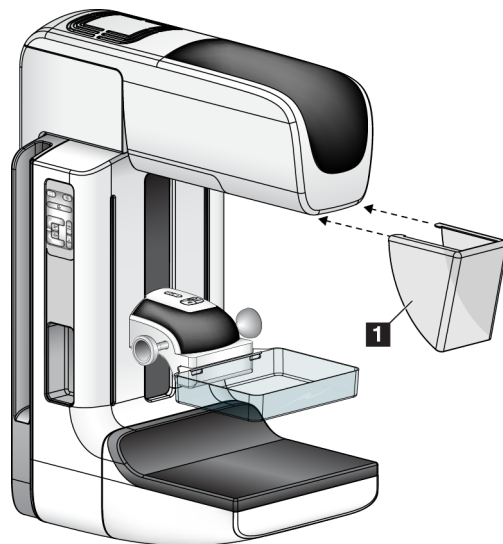

*Figuur 67: Het conventionele gezichtsscherf installeren*

Het conventionele gezichtsscherf wordt als volgt geïnstalleerd:

1. Plaats de nokjes van het gezichtsscherf (onderdeel 1 in de vorige figuur) voorzichtig in de gleuven aan de voorzijde van de buiskopbevestiging.
2. Schuif het gezichtsscherf op de buiskopbevestiging tot het zich vergrendelt.

Het conventionele gezichtsscherf verwijderen:

1. Trek de zijkanten van het gezichtsscherf in horizontale richting (van de buiskop vandaan).
2. Verwijder het gezichtsscherf.



## 7.3 Compressiepaddles



### Opmerking

Sommige paddles zijn optioneel en worden niet meegeleverd met uw systeem.

Het systeem herkent elke paddle en past automatisch de collimator aan.

Welke accessoires beschikbaar zijn is afhankelijk van de configuratie van uw systeem.

Tabel 21: Beschikbare accessoires

Accessoire		2D/BT	2D-screening
Paddles voor routinescreening	18 x 24 cm	*	*
	24 x 29 cm	*	*
	Kleine borst	*	*
	18 x 24 cm SmartCurve®	*	*
	24 x 29 cm SmartCurve	*	*
	SmartCurve mini	*	*
Contactpaddle en spot-compressiepaddle	10 cm, contact	*	
	15 cm, contact	*	
	7,5 cm, contact	*	Zie opmerking
	Frameloos spot-contact	*	
Vergrotingspaddles	7,5 cm, spot-vergroting	*	
	10 cm, vergr.	*	
	15 cm, vergr.	*	
Lokalisatiepaddles	10 cm, rechthoekig open	*	
	15 cm, rechthoekig open	*	
	10 cm, geperforeerd	*	
	15 cm, geperforeerd	*	
	10 cm, vergr., geperforeerd, lok.	*	
	10 cm, vergr., lokalisatie	*	
Echografiepaddle	15 cm, groot, echografie	*	
Gezichtsscherm voor patiënt		*	*
Vergrotingsstandaard		*	
Lokalisatieapparaat met dradenkruis		*	
Vergrotingsapparaat met dradenkruis		*	



### Opmerking

Gebruik op het 2D-screeningssysteem alleen de spot-contactpaddle van 7,5 cm voor kalibratie van de compressiedikte.

---




### Opmerking


De paddle verschuiven-functie is NIET beschikbaar voor de 24 x 29 cm frameeloze screeningpaddle, de grote 24 x 29 cm paddle van het SmartCurve-systeem, de vergrotingspaddles en de lokalisatiepaddles.

---


### 7.3.1 Paddles voor routinescreening

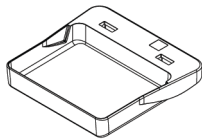

18 x 24 cm frameeloze screeningpaddle

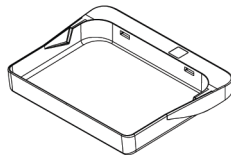


24 x 29 cm frameeloze screeningpaddle

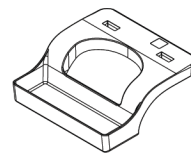


Frameeloze paddle voor kleine borsten


### Paddles van het Smartcurve-systeem

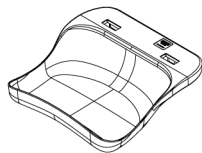

18 x 24 cm frameeloze screeningpaddle van het SmartCurve-systeem

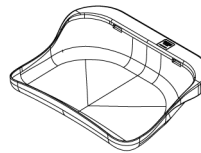

24 x 29 cm frameeloze screeningpaddle van het SmartCurve-systeem

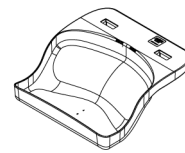

SmartCurve-systeem mini screeningpaddle



### Opmerking

De paddles van het SmartCurve-systeem zijn mogelijk niet geschikt voor alle patiënten. Als de borst door de vorm van de paddles niet op de juiste manier kan worden geïmmobiliseerd of samengedrukt, gebruikt u de standaard platte screeningpaddles.

---



### Opmerking

De paddles van het Smartcurve-systeem worden niet aanbevolen voor zgn. cleavageweergaven, rolled weergaven of mozaïekweergaven van zeer grote borsten. Gebruik voor deze weergaven standaard platte screeningpaddles.

---



### Opmerking

De paddles van het SmartCurve-systeem zijn geschikt voor vrijwel alle borstgroottes. Voor sommige patiënten waarvoor normaal de kleinere standaard platte paddles zouden worden gebruikt, is het mogelijk makkelijker om de borsten te positioneren met SmartCurve-paddles vanwege de vorm van deze paddles.



### Opmerking


De paddles van het SmartCurve-systeem zijn niet compatibel met de FAST-compressiemodus.




### Opmerking

Gebruik geen SmartCurve-systeempaddles voor I-View-procedures.


## 7.3.2 Contactpaddle en spot-compressiepaddle

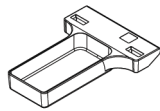


10 cm frameeloze contactpaddle

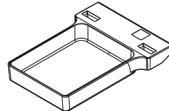

15 cm frameeloze contactpaddle

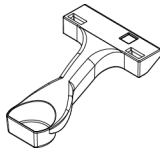


7,5 cm frameeloze spot-contactpaddle

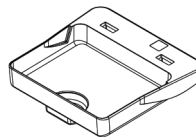


Frameeloze spot-contactpaddle


## 7.3.3 Vergrotingspaddles

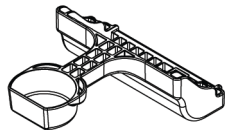

7,5 cm spot-vergrotingspaddle

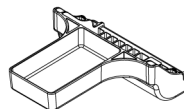

10 cm vergrotingspaddle

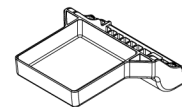


15 cm vergrotingspaddle




### Opmerking

U kunt geen tomosynthesebeelden verwerven met de vergrotingspaddles.


### 7.3.4 Lokalisatiepaddles

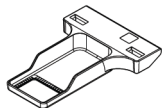


10 cm, lokalisatiepaddle met rechthoekige opening

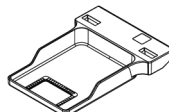


15 cm, lokalisatiepaddle met rechthoekige opening

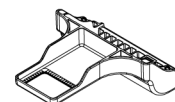

10 cm lokalisatiepaddle met vergroting

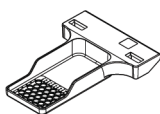

10 cm geperforeerde lokalisatiepaddle

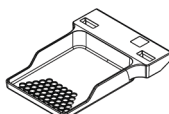


15 cm geperforeerde lokalisatiepaddle



10 cm geperforeerde lokalisatiepaddle met vergroting

### 7.3.5 Grote echografiepaddle

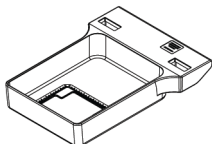


15 cm, grote echografiepaddle

### 7.3.6 Een compressiepaddle plaatsen en verwijderen

#### Een compressiepaddle plaatsen:


1. Houd de voorzijde van de paddle met één hand voor het compressieapparaat.
2. Kantel de paddle (tussen 30 en 45 graden) en plaats de achterzijde van de paddel in de groef aan de achterzijde van het compressieapparaat (onderdeel 1 in de volgende figuur).
3. Schuif de paddle over de groef tot de gleuven aan de bovenzijde van de paddle zich onder de vergrendelingen op de paddleklem bevinden (onderdeel 2 in de volgende figuur).
4. Druk de paddleklem (onderdeel 3 in de volgende figuur) samen met uw vrije hand.
5. Draai de paddle omhoog (onderdeel 4 in de volgende figuur).
6. Laat de paddleklem los om de paddle te vergrendelen.

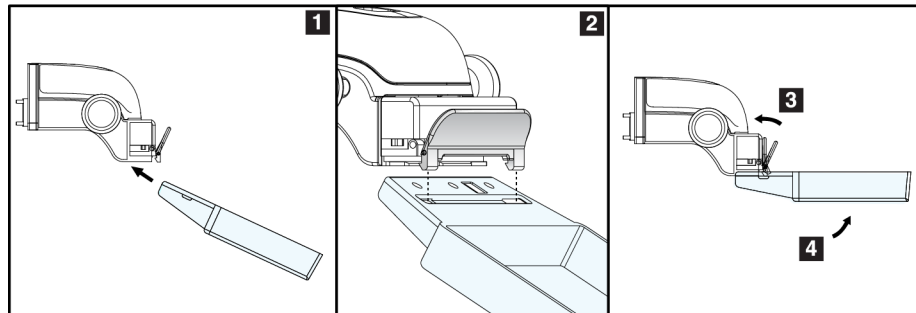

Figuur 68: Een compressiepaddle plaatsen

#### Een compressiepaddle verwijderen:

1. Houd de paddle met één hand vast en gebruik uw vrije hand om de paddleklem samen te drukken om de vergrendeling vrij te geven (onderdeel 1 in de volgende figuur).
2. Breng de paddle (onderdeel 2 in de volgende figuur) omlaag en verwijder de paddle uit het compressieapparaat (onderdeel 3 in de volgende figuur).
3. Laat de paddleklem los.

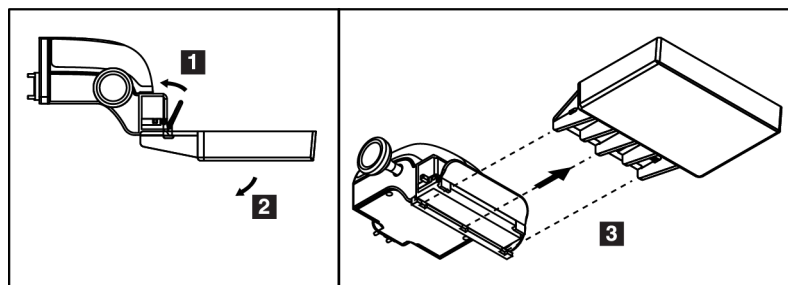

Figuur 69: Een compressiepaddle verwijderen

#### 7.3.7 Onderhoud en reiniging paddles

Reinig de paddles na elk gebruik. Raadpleeg [Onderhoud en reiniging](#) op pagina 139 voor reinigingsinstructies.

#### 7.3.8 Paddleverschuiving

Op het systeem kunnen de meeste paddles naar links of rechts van de middenpositie worden geschoven. Deze functie is nuttig bij onderzoeken van kleine borsten met laterale weergaven. Wanneer een laterale weergave wordt geselecteerd, beweegt het systeem de collimator automatisch aan de hand van de geselecteerde paddlepositie.



##### Opmerking

De paddle verschuiven-functie is niet beschikbaar voor de 24 x 29 cm frame-loze screeningpaddle, de 24 x 29 cm paddle van het SmartCurve-systeem en de vergrotingspaddles.

---

#### 7.3.9 FAST-compressiemodus

##### FAST-compressiemodus

De compressiemodus met volledig geautomatiseerde zelfstellende kanteling (Fully Automatic Self-adjusting Tilt, FAST) is bedoeld voor gebruik in gevallen waarin de samenstelling van het borstweefsel een gelijkmatige compressie van de volledige borst met een vlakke compressiepaddle verhindert. Bij deze patiënten kan onvoldoende compressie ertoe leiden dat het voorste gedeelte van het beeld onscherp lijkt door onvrijwillige beweging en onvoldoende compressie.

De bij dit type borst gebruikte FAST-compressiemodus biedt de volgende kenmerken:

- Verminderde bewegingsartefacten omdat de compressie effectiever is
- Meer gelijkmatige compressie vanaf de borstwand tot aan de tepel
- Maximaal comfort voor de patiënt, omdat overcompressie bij de borstwand wordt voorkomen

Wanneer de FAST-compressiemodus wordt geselecteerd, kantelt de paddle automatisch wanneer compressie wordt toegepast. De paddle begint in de vlakke positie tot enige compressiekracht wordt uitgeoefend. De paddle kantelt vervolgens tot de maximale hoek is bereikt.

De FAST-compressiemodus vereist geen overmatige compressie, maar u moet voldoende compressie toepassen om beweging van de borst te voorkomen. U dient een consistente mate van compressie te gebruiken, met name voor bij elkaar horende linker en rechter weergaven.

De FAST-compressiemodus is mogelijk niet de beste keuze voor borsten die gelijk of symmetrisch zijn wat betreft dikte vanaf de borstwand tot het voorste gedeelte van de borst.



### Opmerking

Alleen de 18 x 24 cm frameeloze screeningspaddle en de 24 x 29 cm SmartCurve-paddle zijn compatibel met de FAST-compressiemodus.




### Opmerking

Het systeem laat een pieptoon horen wanneer de FAST-compressiemodus is ingeschakeld, maar dit niet compatibel is met de huidige paddle.

## Het schuifje van de FAST-compressiemodus gebruiken

Om de FAST-compressiemodus in te schakelen, duwt u tegen het schuifje (aan een van beide zijden) tot de F zichtbaar is en het schuifje op de plaats vastklikt.

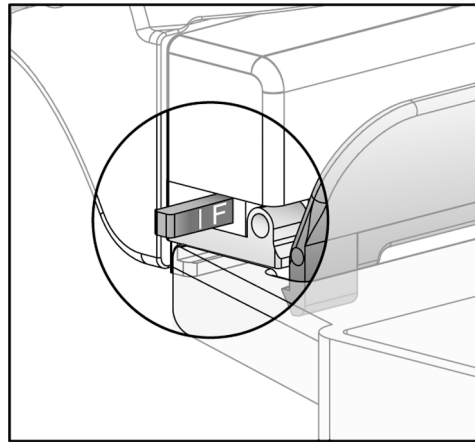


Figuur 70: Het schuifje van de FAST-compressiemodus

## 7.4 Vergrotingsstandaard

De vergrotingsstandaard is voorzien van een borstplatform en een buikscherm. Wanneer de vergrotingsstandaard wordt geïnstalleerd, wordt het raster automatisch teruggetrokken en worden de röntgenbelichtingstechnieken ingesteld op de standaard vergrotingswaarden. Gebruik de vergrotingspaddles alleen wanneer de vergrotingsstandaard is geïnstalleerd (raadpleeg [Vergrotingspaddles](#) op pagina 119).

### 7.4.1 De vergrotingsstandaard installeren en verwijderen

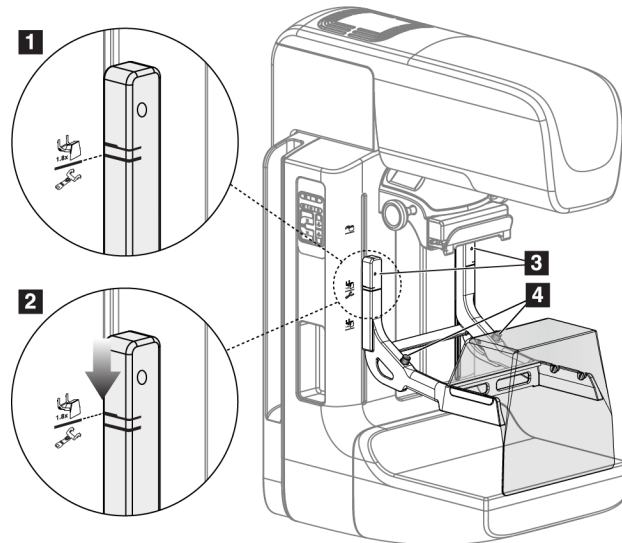

Figuur 71: Installatie van de vergrotingsstandaard

#### De vergrotingsstandaard installeren:

1. Verwijder het gezichtsscherm (raadpleeg [Gezichtsschermen voor de patiënt](#) op pagina 114 [Gezichtsschermen voor de patiënt]).
2. Verwijder de compressiepadde (raadpleeg [Een compressiepadde plaatsen en verwijderen](#) op pagina 121 [De compressiepadde verwijderen]).
3. Verplaats het compressieapparaat geheel naar de bovenzijde.
4. Houd de standaard aan elke zijde, net onder de zwarte knoppen, vast (zie onderdeel 4 in de vorige figuur). Druk niet op de zwarte knoppen.



#### Opmerking

De zwarte knoppen worden alleen gebruikt bij het verwijderen van de vergrotingsstandaard.



#### Opmerking

Er zijn twee sets bevestigingsopeningen voor de vergrotingsstandaard—een set is voor 1,8 x en de andere set is voor 1,5 x. Raadpleeg [Accessoires installeren op de C-arm](#) op pagina 113 (Accessoires van de C-arm) voor meer informatie.

5. Lijn de dikke zwarte lijnen op de vergrotingsstandaard uit met de dikke zwarte lijnen op de C-arm. Wanneer deze lijnen bij elkaar komen, liggen de haken van de vergrotingsstandaard op één lijn met de bevestigingsgleuven op de C-arm. Zie onderdeel 1 in de vorige figuur.
6. Plaats de haken van de vergrotingsstandaard in de gleuven op de C-arm. Schuif de vergrotingsstandaard omlaag tot de dunne zwarte lijnen op de vergrotingsstandaard en de zwarte lijn van de C-arm bij elkaar komen. Zie onderdeel 2 in de vorige figuur.



7. De vergrendelpennen schuiven in de openingen en zetten het apparaat vast. U hoort dan een klik.



### Opmerking


Als de vergrotingsstandaard niet correct is geïnstalleerd, is er een indicator aanwezig met een rode schacht die uitsteekt (zie onderdeel 3 in de vorige figuur). Wanneer de standaard correct is geïnstalleerd, wordt de indicator teruggetrokken.

### De vergrotingsstandaard verwijderen:

1. De vergrotingsstandaard verwijderen.
2. Houd de handgrepen van de vergrotingsstandaard vast en druk op de zwarte knoppen.
3. Til het apparaat van de C-arm af.

## 7.5 Apparaten met dradenkruis

### 7.5.1 Het lokalisatieapparaat met dradenkruis installeren en verwijderen

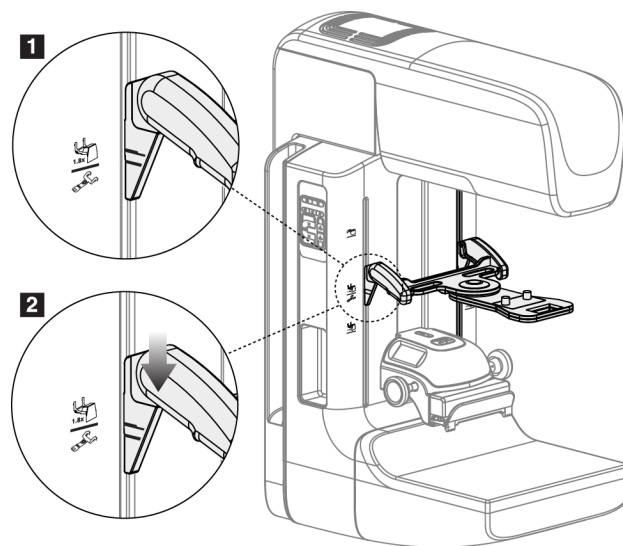

Figuur 72: Installatie van het lokalisatieapparaat met dradenkruis

### Het lokalisatieapparaat met dradenkruis installeren:

1. Verwijder het gezichtsscherm (raadpleeg [Gezichtsschermen voor de patiënt](#) op pagina 114 [Gezichtsschermen voor de patiënt]).
2. Verplaats het compressieapparaat naar de positie onder de bevestigingsgleuven, aangegeven door een dradenkruispictogram. Raadpleeg [Accessoires installeren op de C-arm](#) op pagina 113 (Accessoires van de C-arm) voor meer informatie.
3. Houd het apparaat met dradenkruis bij de grepen vast en lijn de dikke lijnen op het apparaat uit met de lijn op de C-arm. Druk de ontgrendelhendels samen.

4. Plaats de haken in de gleuven op de C-arm.
5. Schuif de haken naar de onderzijde tot de dunne zwarte lijnen op het dradenkruis en de zwarte lijn op de C-arm bij elkaar komen.
6. Laat de ontgrendelhendels los. De vergrendelpennen schuiven in de openingen en zetten het apparaat op de plaats vast.


#### Het lokalisatieapparaat met dradenkruis verwijderen:

1. Druk de ontgrendelhendels samen.
2. Til het frame op en verwijder de haken uit de gleuven op de C-arm.

### 7.5.2 Het lokalisatieapparaat met dradenkruis gebruiken

1. Het apparaat met het dradenkruis kan naar links of rechts van de buiskop worden gedraaid. Draai het apparaat van de röntgenbundel vandaan tijdens de belichting die wordt verworven met de lokalisatiepaddle.
2. Wanneer u het apparaat naar de voorzijde terugdraait voor gebruik, verzeker u er dan van dat u het apparaat zo ver door draait tot het op de plaats vastklikt.
3. Schakel de lichtveldlamp in.
4. Draai de twee dradenkruisknoppen tot de schaduw op de borst overeenkomt met het dradenkruis op het beeld dat de vermoede laesie aangeeft.

### 7.5.3 Het vergrotingsapparaat met dradenkruis installeren en verwijderen

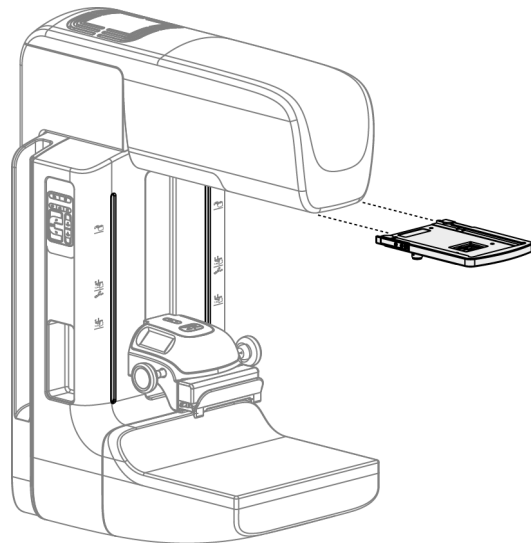

*Figuur 73: Het vergrotingsapparaat met dradenkruis installeren en verwijderen*

### Het vergrotingsapparaat met dradenkruis installeren:

1. Verwijder het gezichtsscherf (raadpleeg [Het conventionele gezichtsscherf installeren en verwijderen](#) op pagina 116).
2. Lijn het vergrotingsapparaat met dradenkruis uit met de buiskop.
3. Schuif het apparaat met dradenkruis op de rails aan weerszijden van de buiskop die worden gebruikt door het conventionele gezichtsscherf. Zorg ervoor dat het apparaat op de plaats vastklikt.
4. Installeer de resterende vergrotingsapparaten.

### Het vergrotingsapparaat met dradenkruis verwijderen:

1. Houd het apparaat bij de zijkanten vast.
2. Trek het apparaat naar u toe en verwijder het van de buiskop.

## 7.5.4 Het apparaat met dradenkruis uitlijnen



### Opmerking

Als de lichtrechthoek van het apparaat met dradenkruis scheef lijkt te staan ten opzichte van de opening in de paddle, voer dan deze uitlijningsprocedure uit.

---

1. Installeer de rechthoekige lokalisatiepaddle.
2. Draai de vergrendelingschroef voor afstelling onder aan het apparaat met dradenkruis los.
3. Plaats een stuk wit papier op de beeldreceptor om de schaduwen van het dradenkruis beter zichtbaar te maken.
4. Verschuif de lokalisatiepaddle naar een positie ongeveer 6 cm boven de beeldreceptor.
5. Schakel het lichtveld in.
6. Draai het apparaat met dradenkruis tot de rechthoek van licht op één lijn ligt met de opening in de lokalisatiepaddle.
7. Draai de afstelschroef vast.

### 7.6 Instructies om het MammoPad-borstkussen aan te brengen

MammoPad®-borstkussens zijn wegwerpbaar medische producten voor eenmalig gebruik. Ze zijn radiolucent en bevatten geen latex. Gebruik voor elke patiënt een nieuw kussen. Volg de onderstaande procedure om de pad goed aan te brengen.

1. Open de zak met de MammoPad-borstkussens, neem er één kussen uit en sluit de zak weer.



#### Opmerking

Kussens moeten worden bewaard in een afgedichte plastic zak om verontreiniging en daardoor aantasting van de beeldkwaliteit te voorkomen. Buiten bereik van direct zonlicht bewaren. Zak afsluiten wanneer niet in gebruik.

---

2. Verwijder de papieren onderlaag van het kussen en gooi deze weg.
3. Breng de klevende zijde aan op het borstplatform conform de instructies in de volgende opmerking voor uw type systeem. Plaats het kussen niet op geleverde stickers.




#### Opmerking

Selenia® en de meeste andere FFDM-systemen: richt de ronde hoek op de linkeronderzijde van de detector. Strijk het kussen glad met een beweging van de achterkant naar de voorkant van het borstplatform.

Dimensions® en GE-systemen: richt de ronde hoek op de rechteronderzijde van de detector. Strijk het kussen glad met een beweging van de voorkant naar de achterkant van het borstplatform.

---

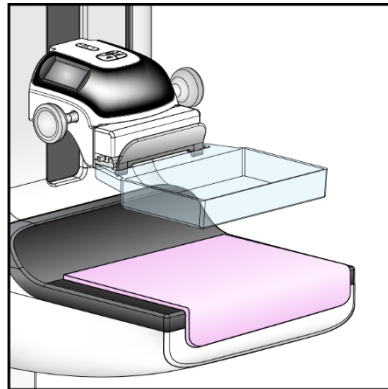

Figuur 74: MammoPad aangebracht op het borstplatform

4. Volg uw gebruikelijke positioneringsroutine voor alle screeningweergaven.
5. Na afloop van het onderzoek verwijdert u het kussen van het beeldplatform en gooit u het kussen weg.
  - a. Pak de MammoPad bij één hoek vast en trek deze voorzichtig omhoog en schuin naar de achterkant van het borstplatform.



*Figuur 75: MammoPad verwijderen van het borstplatform*

- b. Zodra de MammoPad los is van de bovenkant van het borstplatform, verwijdert u het kussen door deze schuin vanaf de voorkant van het borstplatform weg te trekken. Blijf trekken totdat de MammoPad volledig is verwijderd.



*Figuur 76: MammoPad verwijderen van het borstplatform(vervolg)*



**Opmerking**

Als het kussen pad in aanraking is gekomen met bloed of lichaamsvloeistoffen, volgt u de procedure voor het wegwerpen van biologisch gevaarlijke materialen van uw faciliteit.

---



## Hoofdstuk 8 Klinische procedures



**Waarschuwing:**

Dit apparaat is bedoeld om op de vloer te worden bevestigd. Als het systeem wordt gebruikt zonder juiste bevestiging op de vloer, kan het uit balans raken en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

---



**Waarschuwing:**

De C-arm heeft een gemotoriseerde beweging.

---



**Waarschuwing:**

Houd de handen van de patiënt te allen tijde uit de buurt van alle knoppen en schakelaars.

---



**Waarschuwing:**

Plaats elke voetschakelaar zodanig dat deze tijdens het gebruik binnen het bereik van de nooduitschakelingschakelaars blijft.

In geval van een noodsituatie, kan elk van de noodstopknoppen worden gebruikt om de stroom onmiddellijk uit te schakelen en de apparatuur stil te zetten.

---



**Waarschuwing:**

Voordat u de compressiearm of buisarm in beweging zet, moet u controleren of het bewegingstraject vrij is van personen en obstructies.

---



**Waarschuwing:**

Plaats de voetschakelaars zodanig dat onbedoeld in werking stellen door een patiënt of een rolstoel wordt voorkomen.

---

### 8.1 Standaard werkstroom

#### 8.1.1 Voorbereiding

1. Selecteer een patiënt in de werklijst of voeg handmatig een nieuwe patiënt toe.
2. Stel vast welke de vereiste procedures zijn.
3. Selecteer de uitvoerapparaten set als een ander of extra apparaat nodig is.
4. Installeer de paddle.
5. Selecteer de eerste weergave.

#### 8.1.2 Op de gantry


1. Stel de hoogte en rotatiehoek van de C-arm in.
2. Zorg ervoor dat het lichte veld het juiste gebied verlicht.
3. Positioneer de patiënt en voer compressie van de borst uit.

#### 8.1.3 Op het verwervingswerkstation

1. Stel de belichtingstechniek in.
2. Verwerf het beeld.
3. Maak de patiënt vrij.
4. Bekijk het beeldvoorbeeld. Bekijk de belichtingsindex om zeker te zijn dat de belichting binnen het aanvaardbare bereik valt.
5. U kunt het venster/niveau-hulpmiddel of andere beeldweergaveopties gebruiken tijdens de voorbeeldweergave van het beeld.
6. Accepteer het beeld (Accepteren), wijs het af (Weigeren) of markeer het als In behandeling.
7. Voer de acquisitiecycle uit zoals vereist voor de gevraagde procedures.
8. Voeg, indien nodig, een extra weergave of procedure toe.
9. Zorg ervoor dat de patiënt zich altijd veilig uit de buurt van het systeem bevindt nadat u het onderzoek hebt voltooid.
10. Sluit de procedure.



## 8.2 Voorbeeld van een screeningsprocedure

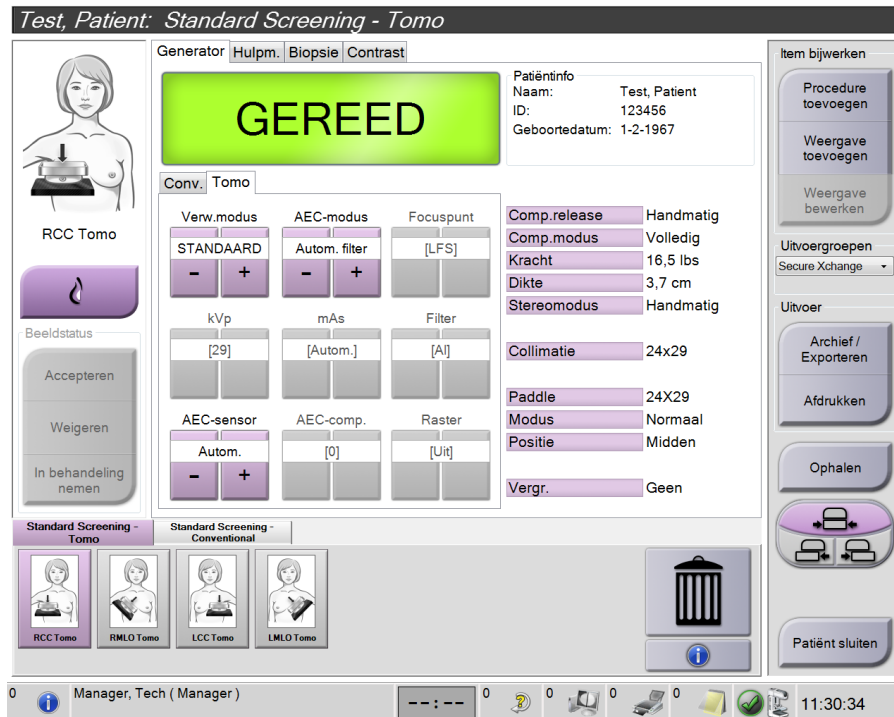

Figuur 77: Voorbeeld van een screeningsprocedurescherm

### 8.2.1 Positionering van de patiënt

1. Breng het borstplatform omhoog of omlaag voor de patiënt.
2. Zet de buiskop in de projectiehoek.
3. Beweeg de patiënt naar de C-arm.
4. Positioneer de patiënt zoals vereist.
5. Plaats de arm of hand van de patiënt op de handgreep voor de patiënt of tegen de zijkant van het lichaam.
6. Instrueer de patiënt om uit de buurt te blijven van de bedieningselementen van het systeem.
7. Voer de compressie van de borst uit.
  - Gebruik, wanneer mogelijk, de bedieningselementen van de voetschakelaar om in een hands-free compressieregeling en hoogteafstelling van de C-arm te voorzien.
  - Gebruik zo nodig de lichtveldlamp om het röntgenveld zichtbaar te maken.
  - Voer de compressie langzaam uit. Stop zo nodig om wijzigingen aan te brengen in de positie van de patiënt.
  - Gebruik de handwielen voor de uiteindelijke compressie.

### 8.2.2 De belichtingstechnieken instellen

Selecteer de belichtingstechnieken voor de procedure. Raadpleeg [De belichtingsparameters instellen](#) op pagina 88 voor informatie.

### 8.2.3 De belichting verwerven

1. Controleer of alle belichtingsfactoren correct zijn ingesteld.
2. Als op het systeem niet binnen 30 seconden Gereed wordt weergegeven, controleer dan of de accessoires correct zijn geïnstalleerd en of de paddle op de plaats is vergrendeld. Wanneer als generatorstatus **Gereed** wordt aangegeven, is het systeem gereed voor belichting.



#### Waarschuwing:


**Dit systeem kan gevaarlijk zijn voor de patiënt en de gebruiker. Volg altijd de veiligheidsmaatregelen voor röntgenbelichtingen op.**

3. Houd de **röntgenstralingsknop** en/of de **röntgenvoetschakelaar** ingedrukt voor de volledige belichting.

Tijdens de belichting:


- Er verschijnt een systeembericht met het stralingssymbool en een gele achtergrond (zie de volgende figuur)
- Tijdens de belichting klinkt er voortdurend een geluidssignaal

Het gedrag van het geluidssignaal tijdens een combo-blootstelling is gewijzigd om te voorkomen dat gebruikers de röntgenstralingsknop en/of de röntgenvoetschakelaar te vroeg loslaten. Het geluidssignaal is nu een continue opeenvolging van tonen. Het geluidssignaal klinkt tijdens de volledige combo-verwerving, vanaf de start van de belichting tot het einde van de conventionele weergave. Het geluidssignaal wordt niet onderbroken tussen tomosynthese van de borst en conventionele digitale mammografische belichtingen. Laat de belichtingsschakelaar niet los terwijl het geluidssignaal klinkt.

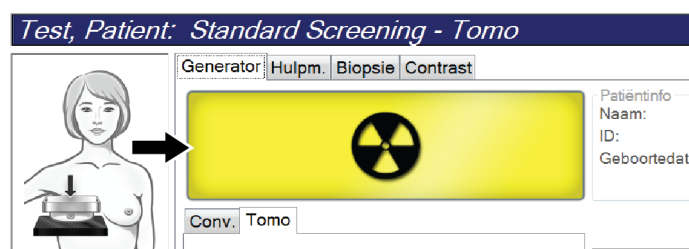

Figuur 78: Belichting actief

4. Wanneer het geluidssignaal stopt en het systeembericht **Stand-by** wordt weergegeven (zie de volgende figuur), kunt u de **röntgenstralingsknop** en/of de **röntgenvoetschakelaar** loslaten.

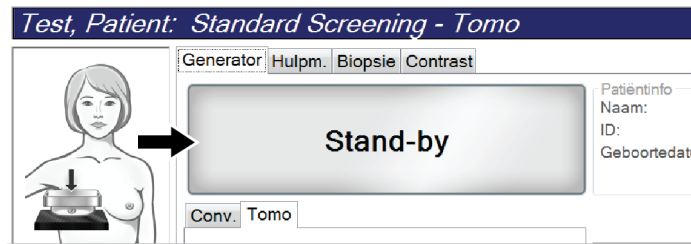

Figuur 79: Belichting voltooid

5. Geef het compressieapparaat langzaam vrij. Als de functie voor automatische vrijgave is ingesteld, wordt het compressieapparaat automatisch omhoog gebracht na de belichting.

### 8.3 Procedure voor naaldlokalisatie met tomosynthese

1. Installeer een lokalisatiepaddle en installeer het apparaat met dradenkruis op de buiskop. Let erop dat de geleiders van het apparaat met dradenkruis zich buiten het röntgenveld bevinden.
2. Open een nieuwe procedure met een Tomo- of TomoHD-weergave voor uw benadering.
3. Positioneer de patiënt en voer compressie uit.
4. Verwerf een Tomo Scout. Controleer of het ROI zichtbaar is in de opening van de lokalisatiepaddle. Zo niet, herpositioneer de patiënt dan en herhaal de procedure.
5. Noteer de compressiedikte en de dikte van het overtollige weefsel dat door de opening van de lokalisatiepaddle komt.
6. Schuif door de reconstructieplakken om vast te stellen waar de laesie het beste te zien is. Noteer het plaknummer (elke plak is 1 mm dik).
7. Plaats het dradenkruis van het verwervingswerkstation op de laesie.
8. Om de coördinaten van het apparaat met dradenkruis van de gantry te vinden, bladert u door de reconstructies tot u de alfanumerieke coördinaten kunt bepalen.
9. Bereken de naalddiepte:

Waarde	Voorbeeld
Borstcompressiedikte	50 mm
(+) Dikte van het weefsel dat door de opening van de paddle komt	+ 7 mm
(-) Nummer van de plak waarop de laesie is aangetroffen	- 30 mm
(+) Optionele afstand voorbij het ROI voor de draad	+ 5-15 mm
(=) Naalddiepte van de lokalisatiedraad	32- 42 mm


10. Schakel het collimatorlampje in en lijn het apparaat met dradenkruis op de buiskop uit met het dradenkruis van het verwervingswerkstation.
11. Positioneer de naald en breng deze in.

12. Schuif de geleiders van het apparaat met dradenkruis uit het röntgenveld.
13. Verwerf nog een Tomo-beeld om zeker te zijn dat de naald zich in de juiste locatie bevindt. Om te berekenen of een correctie nodig is, vergelijkt u het plaknummer van de punt van de naald en het plaknummer van de laesie.
14. Breng de voerdraad in door de naald. Daarna kunt u desgewenst de naald verwijderen, maar laat de draad op zijn plaats zitten.
15. Volg desgewenst de volgende stappen:
  - c. Verwerf een conventionele of Tomo-weergave om zeker te zijn van de juiste plaatsing van de draad.
  - d. Gebruik de orthogonale weergave om de plaatsing van de draad of naald te documenteren (in Tomo of conventioneel).
16. Voeg slechts één weergavepictogram per keer toe voor orthogonale weergaven om de mogelijkheid weg te nemen dat de paddle verschuift door mogelijke minimale compressie.

### Voorbeeld: Naalddiepte berekenen bij tomosynthese

Gebruik in dit voorbeeld de waarden uit de tabel op de vorige pagina en bekijk de volgende afbeelding.

Bereken de naalddiepte aan de hand van de huidlijn van het weefsel (onderdeel 1) en niet aan de hand van de lokalisatiepaddle (onderdeel 9). Breng de naald minimaal 27 mm in (borstcompressie plus opbollend weefsel).

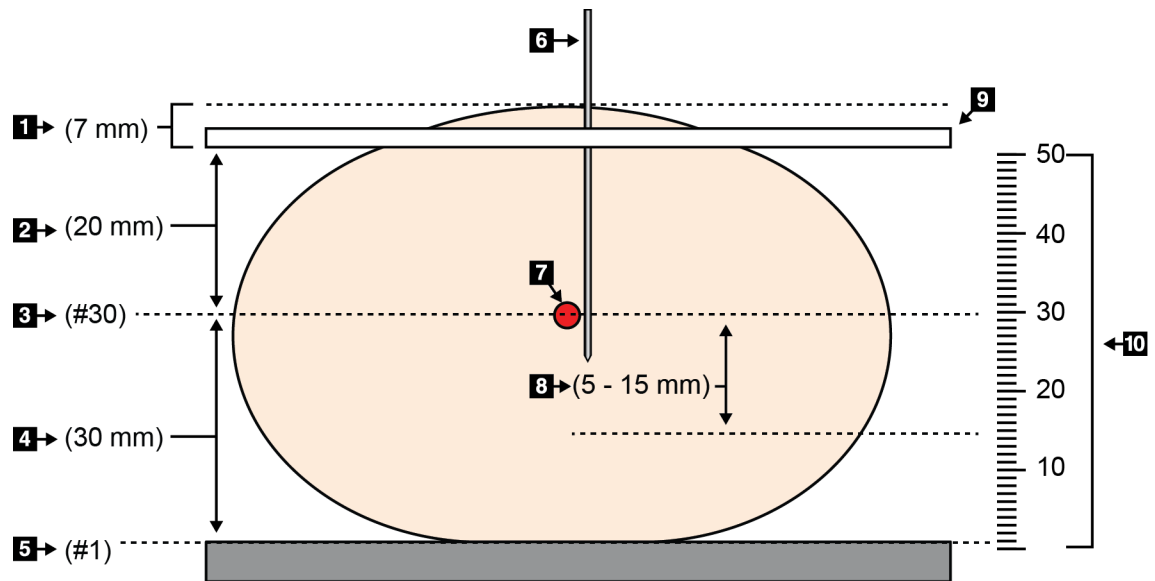

Figuur 80: Naalddiepte berekenen

Onderdeel	Beschrijving	Voorbeeld
1	Dikte van het weefsel dat door de opening van de lokalisatiepaddle komt	7 mm
2	Dikte gemeten vanaf de lokalisatiepaddle tot de laesie	
3	Nummer van plak met laesie (het nummer van de plak waarop de laesie het duidelijkst te zien is)	30 mm
4	Dikte gemeten vanaf de detector tot de laesie	
5	Plaknummer (1)	
6	Naald	
7	Laesie	
8	De naald 5-15 mm verder schuiven dan de laesie (optioneel)	5-15 mm
9	Lokalisatiepaddle	
10	Dikte van de borstcompressie vanaf de detector (0 mm) tot de lokalisatiepaddle (50 mm in dit voorbeeld)	50 mm



## Hoofdstuk 9 Onderhoud en reiniging

### 9.1 Reiniging

#### 9.1.1 Algemene informatie over reiniging

Vóór elk onderzoek moet elk onderdeel van het systeem dat in aanraking komt met een patiënt worden gereinigd en met een desinfectiemiddel worden behandeld. Besteed daarbij met name aandacht aan de paddles en de beeldreceptor.



---

**Let op:**

**Gebruik geen warmtebron (zoals een verwarmingsplaat) op de beeldreceptor.**

---

Wees voorzichtig met de compressiepaddles. Inspecteer de paddles. Vervang de paddles als ze beschadigingen vertonen.

#### 9.1.2 Voor algemene reiniging

Gebruik een pluisvrije doek of een spons en breng hiermee verdund afwasmiddel aan.



---

**Let op:**

**Gebruik de kleinst mogelijke hoeveelheid reinigingsvloeistoffen. De vloeistoffen mogen niet eraf lopen.**

---

Als reiniging met afwasmiddel niet toereikend is, beveelt Hologic het gebruik van een van de volgende oplossingen aan:

- 10% bleekmiddeloplossing en water met één deel in de handel verkrijgbare bleekmiddeloplossing (gewoonlijk 5,25% chloor en 94,75% water) en negen delen water. Meng deze oplossing dagelijks voor het beste resultaat.
- In de handel verkrijgbare isopropylalcoholoplossing (70% isopropylalcohol volgens volume, niet verdund)
- Waterstofperoxideoplossing met een maximale concentratie van 3%

Gebruik nadat u een van de hierboven genoemde oplossingen hebt aangebracht een spons met verdund afwasmiddel om de onderdelen die in aanraking komen met de patiënt te reinigen.



---

**Waarschuwing:**

**Als een paddle in aanraking komt met mogelijk infectieuze materialen, moet u contact opnemen met de vertegenwoordiger die belast is met infectiebeheersing om de besmetting van de paddle te verwijderen.**

---



---

**Let op:**

**Ter voorkoming van beschadiging van de elektronische componenten mag geen desinfectiespray op het systeem worden gespoten.**

---

#### 9.1.3 Ter voorkoming van mogelijk letsel of beschadiging van apparatuur

Gebruik geen bijtende oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of polijstmiddelen. Kies een reinigings-/desinfectiemiddel dat de kunststof, aluminium of koolstofvezel niet beschadigt.

Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, alcohol in een hoge concentratie of methanol in welke concentratie dan ook.

Stel de apparatuuronderdelen niet bloot aan sterilisatie met stoom of hoge temperaturen.

Laat geen vloeistoffen in de interne onderdelen van de apparatuur binnendringen. Breng geen reinigungs-sprays of -vloeistoffen aan op de apparatuur. Gebruik altijd een schone doek en breng de spray of vloeistof op de doek aan. Als vloeistof het systeem binnendringt, koppel dan de elektrische voeding los en onderzoek het systeem voordat het weer in gebruik wordt genomen.



**Let op:**

**Verkeerde reinigingsmethoden kunnen leiden tot beschadiging van de apparatuur, verminderde beeldvormingsprestaties of een verhoogd risico op elektrische schokken.**

**Als vloeistof op het systeem wordt gemorst, schakel het systeem dan onmiddellijk uit. Schakel het systeem pas in als de vloeistof volledig is opgedroogd. Spat of spuit geen reinigingsmiddel op het systeem.**

---

Volg altijd de instructies van de fabrikant van het product dat u gebruikt voor het reinigen. De instructies omvatten de aanwijzingen en voorzorgsmaatregelen voor het aanbrengen en de inwerktijd, opslag, wasvereisten, beschermende kleding, houdbaarheid en afvalverwijdering. Volg de instructies en gebruik het product op de veiligste en effectiefste wijze.

#### 9.1.4 Verwervingswerkstation

**Het beeldweergavescherm reinigen:**

Raak het weergavescherm van de beeldweergavemonitor niet aan.

Wees voorzichtig bij het reinigen van het buitenoppervlak van het LCD-scherm. Gebruik altijd een schone, zachte, pluisvrije doek voor het reinigen van het weergavegebied. Het gebruik van microvezeldoeken wordt aanbevolen.

- Breng nooit een spray of een scheutje vloeistof op het display aan.
- Oefen nooit druk uit op het displaygebied.
- Gebruik nooit een reinigingsmiddel met fluoriden, ammoniak, alcohol of schurende bestanddelen.
- Gebruik nooit bleekmiddel.
- Gebruik nooit staalwol.
- Gebruik nooit een spons met schurende middelen.



Er zijn veel producten voor het reinigen van lcd-displays in de handel verkrijgbaar. Elk product dat geen van de vermelde bestanddelen bevat en dat toegepast wordt volgens de aanwijzingen van de fabrikant kan worden gebruikt.

### **Het aanraakscherm reinigen:**

Gebruik een reinigingsproduct voor ramen of glas om het display van het aanraakscherm te reinigen. Breng het reinigingsproduct op een doek aan en reinig daarmee het display van het aanraakscherm. Breng het reinigingsproduct niet rechtstreeks op het display aan.

### **Het toetsenbord reinigen:**

Neem de oppervlakken af met een CRT-doekje. Reinig het toetsenbord door middel van een vacuüm, indien nodig. Als er vloeistof in het toetsenbord binnendringt, moet u contact opnemen met de technische ondersteuning voor een vervangend toetsenbord.

### **De vingerafdrukscanner reinigen:**



#### **Let op:**

#### **Ter bescherming van de vingerafdrukscanner:**

- Breng geen vloeibaar product rechtstreeks op het venster van de vingerafdrukscanner aan.
  - Gebruik geen producten die alcohol bevatten.
  - Dompel de vingerafdrukscanner nooit in vloeistof onder.
  - Oefen nooit druk uit op het venster van de vingerafdrukscanner met schurend materiaal.
  - Duw niet tegen het venster van de vingerafdrukscanner.
- 

Ga als volgt te werk om de vingerafdrukscanner te reinigen:

- Breng de klevende zijde van plakband aan en verwijder daarna het plakband.
- Breng een product op ammoniakbasis aan op een doek en reinig het venster van de vingerafdrukscanner.

### 9.2 Onderhoud

#### 9.2.1 Schema's voor preventief onderhoud

Tabel 22: Preventief onderhoud door de gebruiker

Beschrijving van onderhoudstaak	Aanbevolen frequentie					
	Elk gebruik	Wekelijks	Twee-wekelijks	Maandelijks	Twee-maandelijks	Halfjaarlijks
Paddle reinigen en desinfecteren	✓					
Borstplatform reinigen en desinfecteren	✓					
Alle paddles visueel op beschadiging controleren	✓					
Kalibratie vlak veld detector *		✓				
Artefactevaluatie *		✓				
Fantoombeeld *		✓				
Signaal-ruis-/contrast-ruis-metingen *		✓				
Geometriekalibratie (tomosyntheseoptie) *						✓
Compressiedikte-indicator *			✓			
Visuele checklijst *				✓		
Compressie *						✓

\* Raadpleeg het kwaliteitsbewakingshandboek

Tabel 23: Preventief onderhoud door de onderhoudstechnicus

Beschrijving van onderhoudstaak	Aanbevolen frequentie	
	Halfjaarlijks	Jaarlijks
Reinig en inspecteer de gantry en het verwervingswerkstation	✓	
Inspecteer het stralingsscherm op schilfers, scheuren, breuken en op te strakke verbindingen.	✓	
Controleer alle primaire stroomaansluitingen	✓	
Controleer vergrendelingen, veiligheids- en limietschakelaars	✓	
Inspecteer/smeer de C-arm	✓	
C-arm / Controleer alle knoppen op de C-arm	✓	
Verifieer de kalibratie van de C-arm en de rotatie	✓	
Vervang het borstplatformfilter	✓	
Verifieer de compressiekrachtkalibratie	✓	
Verifieer de compressiediktekalibratie	✓	
Inspecteer het collimatorlampje op stof en vuil	✓	
Reinig en smeer de collimator en de wormschroeven	✓	
Voer een rotatieremverificatie uit	✓	
Verifieer het röntgenveld/de lichtveldkalibratie	✓	
Verifieer de kV-kalibratie en buisstroomkalibratie	✓	
Controleer de HVL-evaluatie	✓	
Controleer de doeldosisverificatie	✓	
Verifieer de AEC Exposure Compensation 2D	✓	
Voer een systeemresolutietest* uit	✓	
Voor een evaluatie uit van de fantoombeeldkwaliteit*	✓	
Voer een beeldartefactevaluatie uit*	✓	
Maak een back-up van de verwervingswerkstationbestanden	✓	
Evalueer de USP-prestatiestatus/accustatus	✓	
Maak een back-up van alle kalibratiegegevens	✓	
* Raadpleeg het kwaliteitsbewakingshandboek		

#### 9.2.2 Info over vrijmaken

Vrijmaken is een automatische functie waarmee schijfruimte vrij wordt gemaakt, zodat er nieuwe beelden kunnen worden opgeslagen. Nadat het ingestelde aantal beelden is verzameld, wordt het vrijmaken gestart en worden oudere beelden van het systeem verwijderd.

## Hoofdstuk 10 Systeembeheerinterface

### 10.1 Scherm Admin (Beheer)


In dit gedeelte worden de functies beschreven die beschikbaar zijn in het scherm *Admin* (Beheer). Om toegang te krijgen tot alle functies op dit scherm, meldt u zich aan als gebruiker met beheerders-, managers- of servicerechten.

Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor beschrijvingen van de functies van het scherm *Admin* (Beheer).



#### Opmerking

Afhankelijk van de licentie-instellingen voor uw systeem, worden er andere knoppen weergegeven.

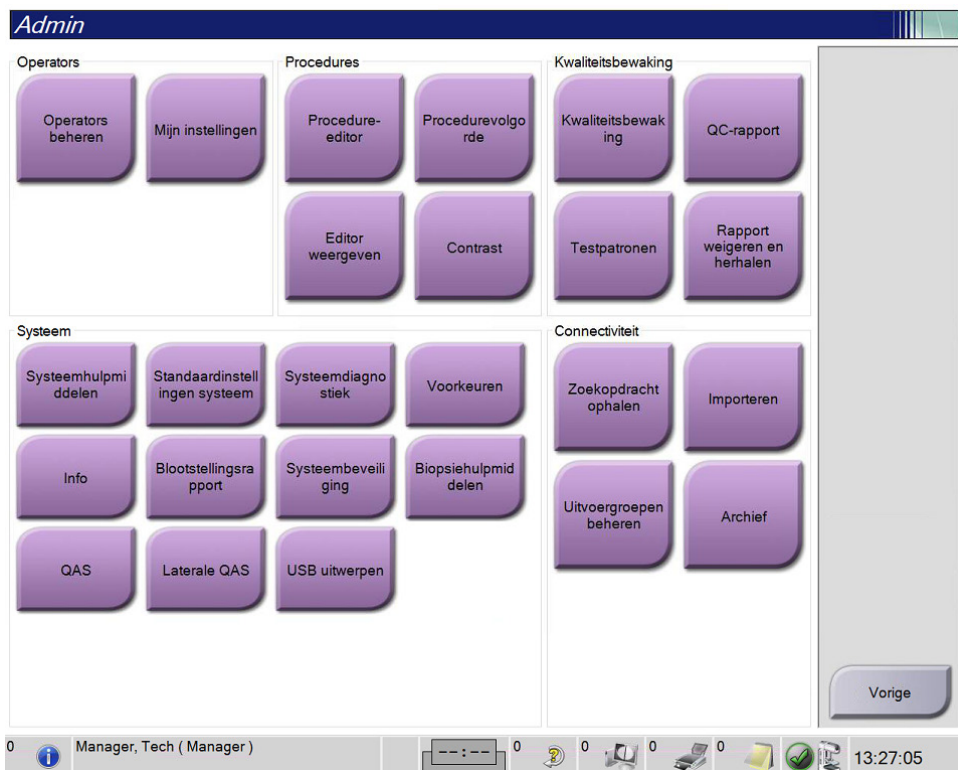

Figuur 81: Scherm Admin (Beheer)

Tabel 24: Functies van het scherm Admin (Beheer)

Groep	Knop	Functie
Operators	<b>Operators beheren</b>	Toevoegen, verwijderen of wijzigen van operatorgegevens.
	<b>Mijn instellingen</b>	De informatie van de huidige operator wijzigen.
Procedures	<b>Procedure-editor</b>	Toevoegen of bewerken van de procedures, of de weergavevolgorde wijzigen voor elke gebruiker.
	<b>Procedurevolgorde</b>	De volgorde van de procedures binnen een proceduregroep bekijken of wijzigen.
	<b>Editor weergeven</b>	De standaard weergavevolgorde voor een procedure instellen en individuele weergaven bewerken.
	<b>Contrast</b>	Hier vindt u de functies voor contrastversterkte digitale mammografie en kunt u de standaardinstellingen configureren.
Kwaliteitsbeheersing	<b>Kwaliteitsbeheersing</b>	Een kwaliteitsbewakingstaak selecteren om uit te voeren of te markeren als voltooid.
	<b>QC-rapport</b>	Een QC-rapport maken.
	<b>Testpatronen</b>	De testpatronen selecteren en naar uitvoerapparaten verzenden.
	<b>Rapport weigeren en herhalen</b>	Een afwijzings- en herhalingsrapport maken.

Tabel 24: Functies van het scherm Admin (Beheer)

Groep	Knop	Functie
Systeem	<b>Systeemhulpmiddelen</b>	De interface voor service voor de configuratie of het vaststellen van problemen in het verwervingswerkstation.
	<b>Standaardinstellingen systeem</b>	De standaard waarden voor de gantry instellen.
	<b>Systeemdiagnostiek</b>	De status van alle subsystemen tonen.
	<b>“Preferences” (Voorkeuren)</b>	De systeemvoorkeuren instellen.
	<b>Info</b>	Beschrijft het systeem. Raadpleeg <a href="#">Scherm Info</a> op pagina 148.
	<b>Blootstellingsrapport</b>	Een stralingsblootstellingsrapport maken.
	<b>Systeembeveiliging</b>	Toegang tot beveiligingsinstellingen van het account, computerbeheer, lokaal beveiligingsbeleid, lokale gebruikers en groepen, en lokaal groepsbeleid in het Windows-besturingssysteem
	<b>Biopsieapparaten</b>	Beschikbare biopsiehulpmiddelen bekijken en configureren.
	<b>QAS</b>	Het scherm <i>QAS-naaldtest</i> openen.
	<b>Laterale QAS</b>	Het scherm <i>Laterale QAS-naaldtest</i> openen.
	<b>USB uitwerpen</b>	Een in de USB-poort geplaatst mediaopslagapparaat uitwerpen.
Connectiviteit	<b>Zoekopdracht ophalen</b>	Patiëntinformatie zoeken en openen vanaf de geconfigureerde apparaten.
	<b>Importeren</b>	De gegevens uit een DICOM-bron importeren.
	<b>Uitvoergroepen beheren</b>	Toevoegen, verwijderen of bewerken van uitvoergroepen.
	<b>Archief</b>	Lokale studies naar netwerkopslagapparaten verzenden of naar verwijderbare media-apparaten exporteren.
U moet toestemming hebben om alle functies te openen. Het toestemmingsniveau bepaalt welke functies u kunt openen en wijzigen.		


### 10.2 Scherm Info

Het scherm *Info* geeft informatie over de machine, zoals systeemniveau, IP-adres en serienummer van de gantry. Dit type gegevens kan nuttig zijn wanneer u samen met Hologic een probleem in het systeem probeert op te lossen of het systeem configureert. Selecteer **Info** in de groep *Systeem* op het scherm *Beheerder* om het scherm *Info* te openen.



#### Opmerking

U kunt het scherm *Info* ook openen via de taakbalk. Selecteer het pictogram **Systeemstatus (buiskop)** en selecteer vervolgens **Info...**

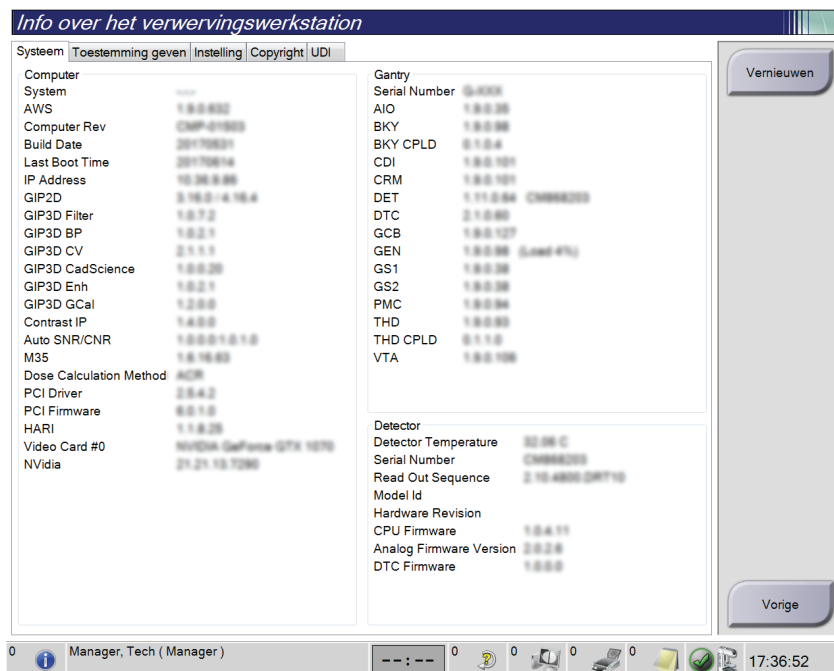

Figuur 82: Tabblad *Systeem* van het scherm *Info* (het verwerkingswerkstation)

Het scherm *Info* heeft vijf tabbladen:

- Het tabblad **Systeem** (standaard) - vermeldt informatie over de systeemconfiguratie
- Het tabblad **Toestemming geven** - vermeldt de door Hologic gelicentieerde opties die op deze machine zijn geïnstalleerd
- Het tabblad **Instelling** - vermeldt de naam en het adres van de organisatie en de stationsnaam die aan deze machine zijn toegewezen
- Het tabblad **Copyright** - vermeldt de auteursrechten van Hologic en de externe software die op deze machine is geïnstalleerd
- Het tabblad **UDI** - vermeldt de unieke identificatiecode(s) van deze machine



### 10.2.1 Tabblad Toestemming geven

Het tabblad **Toestemming geven** van het scherm *Info* toont alle licenties die op uw systeem zijn geïnstalleerd.




#### Opmerking

Hologic configureert bepaalde systemen zodanig dat deze aan specifieke vereisten voldoen. Uw systeemconfiguratie beschikt mogelijk niet over alle opties en accessoires die in deze handleiding worden genoemd.



#### Opmerking

De in deze handleiding vermelde functies zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar. Voor informatie kunt u contact opnemen met uw Hologic-vertegenwoordiger.

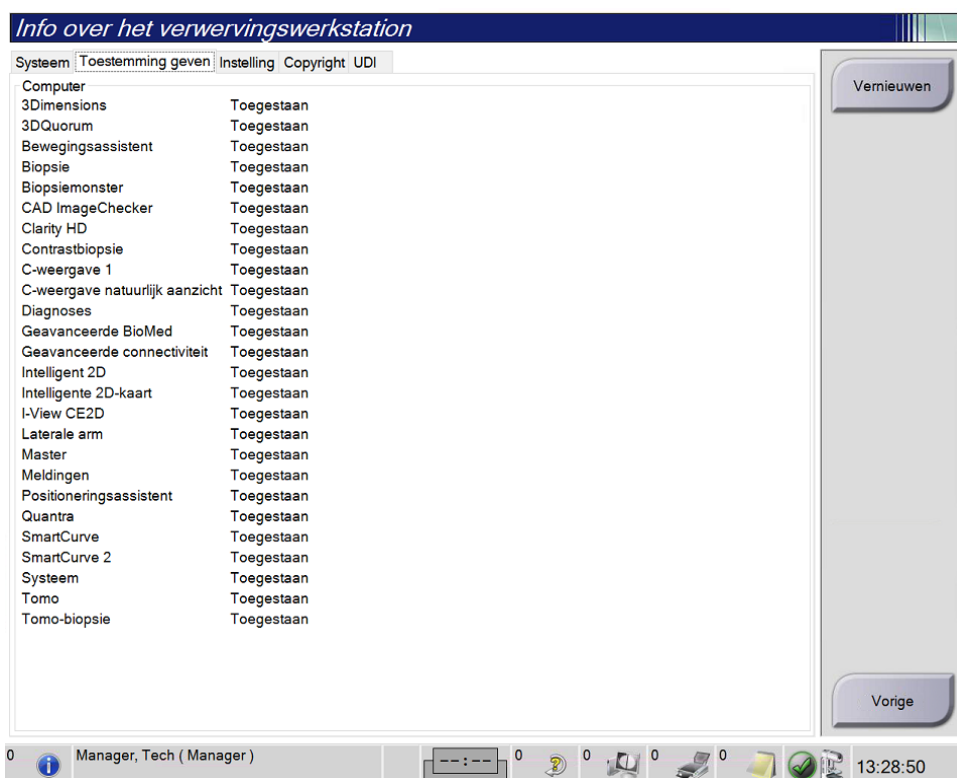

Figuur 83: Tabblad Toestemming geven van het scherm *Info*

### 10.3 De taalvoorkeur van de gebruiker wijzigen

Gebruikers kunnen de taal voor de gebruikersinterface zodanig instellen dat deze na het aanmelden automatisch wijzigt in hun persoonlijke voorkeur.

1. Selecteer in de Operators-groep van het scherm *Admin* (Beheer) de optie **Mijn instellingen**.



---

#### Opmerking

U kunt **Mijn instellingen** ook openen via de taakbalk. Selecteer het gebruikersnaamgedeelte en selecteer **Mijn instellingen** in het pop-upmenu.

---

2. Het tabblad **Gebruikers** van het scherm *Operator bewerken* wordt geopend. Selecteer in het veld Landinstelling een taal in de vervolgkeuzelijst.
3. Selecteer **Opslaan** en vervolgens **OK** wanneer het bericht *Update geslaagd* wordt weergegeven. De gebruikersinterface verandert naar de geselecteerde taal.

### 10.4 Automatisch hangen en automatisch koppelen instellen

Het systeem instellen voor het automatisch hangen en automatisch koppelen van beelden:

1. Selecteer in de Operators-groep van het scherm *Admin* (Beheer) de optie **Mijn instellingen**.



---

#### Opmerking

U kunt **Mijn instellingen** ook openen via de taakbalk. Selecteer het gebruikersnaamgedeelte en selecteer **Mijn instellingen** in het pop-upmenu.

---

2. Het scherm *Operator bewerken* wordt geopend. Selecteer het tabblad **Werkstroom**.
  - Selecteer het selectievakje Autom. hangen om automatisch een eerder onderzoek in de 4-up-modus weer te geven.
  - Selecteer het selectievakje Autom. koppelen om een eerdere weergave in de multi-upmodus weer te geven naast een nieuw vastgelegd beeld.



Figuur 84: Automatisch hangen en automatisch koppelen inschakelen

3. Selecteer de knop **Opslaan** en vervolgens **OK** wanneer het bericht *Update geslaagd* wordt weergegeven.

## 10.5 Tabbladen voor ingrepen met meerdere regels instellen

U kunt bij de voorkeuren voor operators instellen dat bovenaan de tabbladen voor ingrepen een groter deel van de procedurenaam wordt getoond. U kunt als volgt instellen dat de tabbladen voor ingrepen meerdere regels tekst bevatten in plaats van één regel:

1. Selecteer in de Operators-groep van het scherm *Admin* (Beheer) de optie **Mijn instellingen**.



### Opmerking

U kunt **Mijn instellingen** ook openen via de taakbalk. Selecteer het gebruikersnaamgedeelte en selecteer **Mijn instellingen** in het pop-upmenu.

2. Het scherm *Operator bewerken* wordt geopend. Selecteer het tabblad **Werkstroom**.
3. Schakel het selectievakje **Tabbladen voor ingrepen met meerdere regels gebruiken** in.




Figuur 85: Tabbladen voor ingrepen met meerdere regels inschakelen

4. Selecteer de knop **Opslaan** en vervolgens **OK** wanneer het bericht *Update geslaagd* wordt weergegeven.

## 10.6 Het hoogtegeheugen inschakelen en instellen

Gebruikers kunnen de hoogte van het verwervingswerkstation inschakelen en zodanig instellen dat deze na het aanmelden automatisch wijzigt in hun persoonlijke voorkeur. Het hoogteaangepassingsgeheugen inschakelen en instellen:

1. Selecteer in de Operators-groep van het scherm *Admin* (Beheer) de optie **Mijn instellingen**.

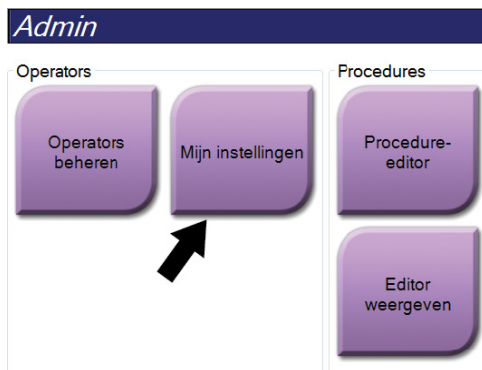

Figuur 86: De knop *Mijn instellingen* in het scherm *Admin* (Beheer)




### Opmerking

U kunt **Mijn instellingen** ook openen via de taakbalk. Selecteer het gebruikersnaamgedeelte en selecteer **Mijn instellingen** in het pop-upmenu.


2. Selecteer in het scherm *Operator bewerken* het tabblad **Console**.

- Om het geheugen voor hoogte-aanpassing in te schakelen, selecteert u het keuzerondje rechts naast het veld 'Automatische hoogteaanpassing bij aanmelden'. Er verschijnt een vinkje. (Deselecteer het keuzerondje om het geheugen van de hoogte-aanpassing uit te schakelen.)

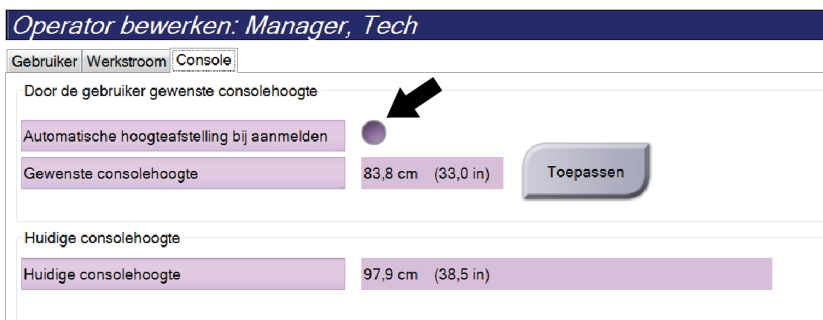


Figuur 87: Tabblad Console van het scherm Operator bewerken

- Gebruik de knoppen ▲ OMHOOG en ▼ OMLAAG op het bedieningspaneel voor hoogteaanpassing om de gewenste hoogte in te stellen (zie volgende figuur).

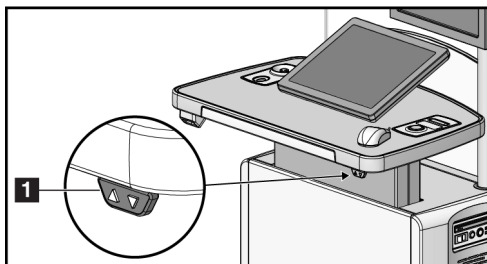

Figuur 88: Bedieningspaneel hoogteaanpassing

- Het veld 'Gewenste consolehoogte' toont de hoogte waarop de console op dat moment staat. Het veld 'Huidige consolehoogte' toont de laatst opgeslagen hoogte. (Zie de volgende afbeelding.) Selecteer **Toepassen** om de gewenste hoogte-instelling op te slaan.

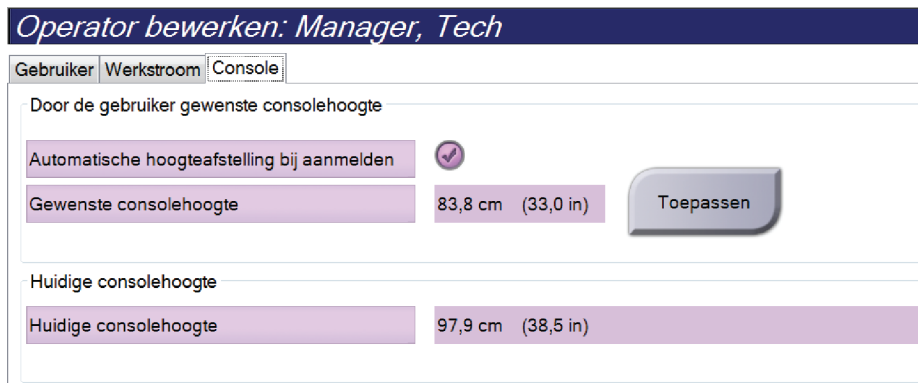

Figuur 89: Velden Gewenste consolehoogte en Huidige consolehoogte

- Selecteer de knop **Opslaan** en vervolgens **OK** wanneer het bericht *Update geslaagd* wordt weergegeven.

### 10.7 De standaardhoogte inschakelen en instellen


Een managergebruiker kan het verwervingswerkstation zodanig instellen dat dit automatisch terugkeert naar een standaardhoogte zodra een gebruiker zich afmeldt. De standaardhoogte inschakelen en instellen:

1. Selecteer in de groep System (Systeem) van het scherm *Admin* (Beheer) de optie **Preferences** (Voorkeuren).




Figuur 90: De knop Voorkeuren in het scherm Admin (Beheer)

2. Selecteer in het scherm *System Preferences* (Systeemvoorkeuren) het tabblad **Console**.
3. Om de standaardhoogte in te schakelen, selecteert u het keuzerondje rechts naast het veld 'Automatische hoogteaanpassing bij afmelden'. Er verschijnt een vinkje. (Deselecteer het keuzerondje om de standaardhoogte-optie uit te schakelen.)

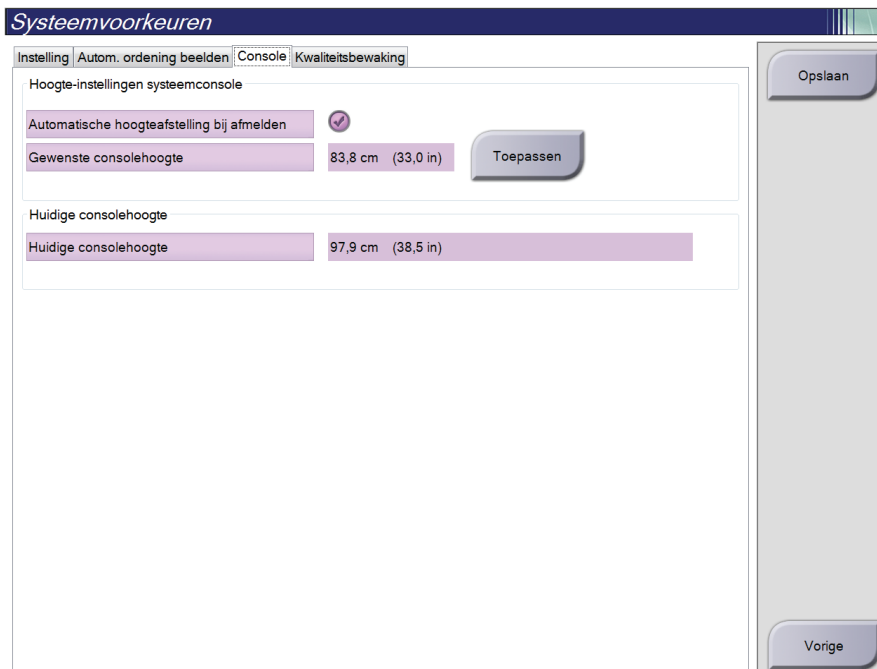


Figuur 91: Tabblad Console van het scherm System Preferences (Systeemvoorkeuren)

4. Gebruik de knoppen ▲ UP (OMHOOG) en ▼ DOWN (OMLAAG) op het bedieningspaneel voor hoogteaanpassing om de gewenste hoogte in te stellen (zie volgende figuur).

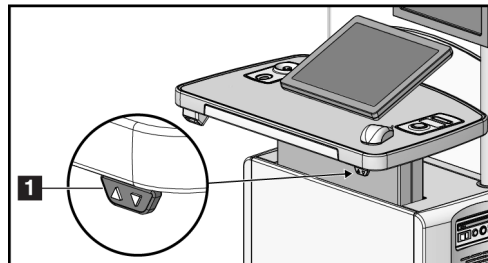

Figuur 92: Bedieningspaneel hoogteaanpassing

5. Het veld 'Gewenste consolehoogte' toont de hoogte waarop de console op dat moment staat. Het veld 'Huidige consolehoogte' toont de laatst opgeslagen hoogte. (Zie de volgende afbeelding.) Selecteer **Toepassen** om de gewenste hoogte-instelling op te slaan.

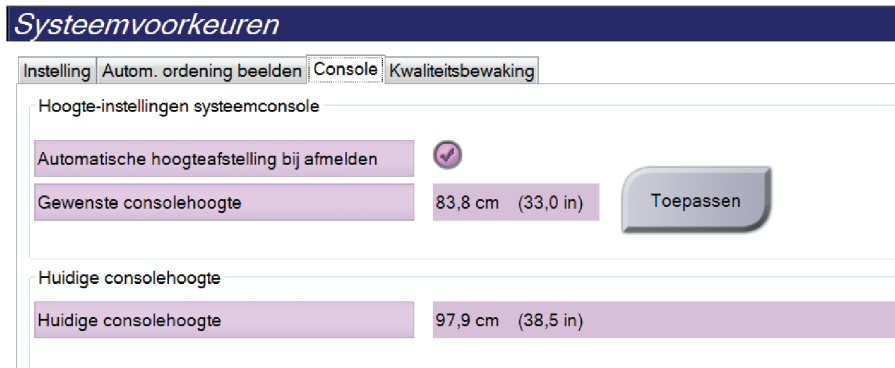


Figuur 93: Velden *Desired Console Height* (Gewenste consolehoogte) en *Current Console Height* (Huidige consolehoogte)

6. Selecteer **Save** (Opslaan) en vervolgens **OK** wanneer het bericht *Update Successful* (Update geslaagd) wordt weergegeven.

### 10.8 Automatisch accepteren en Automatisch markeren als in behandeling van beelden instellen

Een manager-gebruiker kan het systeem configureren om nieuwe beelden automatisch te accepteren of automatisch als In behandeling te markeren.

1. Selecteer in de systeemgroep van het scherm *Admin* (Beheer) de optie **Voorkeuren**. Het scherm *Systeemvoorkeuren* wordt geopend.
2. Selecteer het tabblad **Autom. ordening beelden**.
3. Gebruik de vervolgkeuzemenu's om de automatische ordening van elk type beeld te selecteren.
  - Selecteer **Handmatig** om elk nieuw verworven beeld handmatig te accepteren, af te wijzen of te markeren als in behandeling.
  - Selecteer **Accepteren** om nieuw verworven beelden automatisch te accepteren.
  - Selecteer **In behandeling nemen** om nieuw verworven beelden automatisch te markeren als in behandeling.

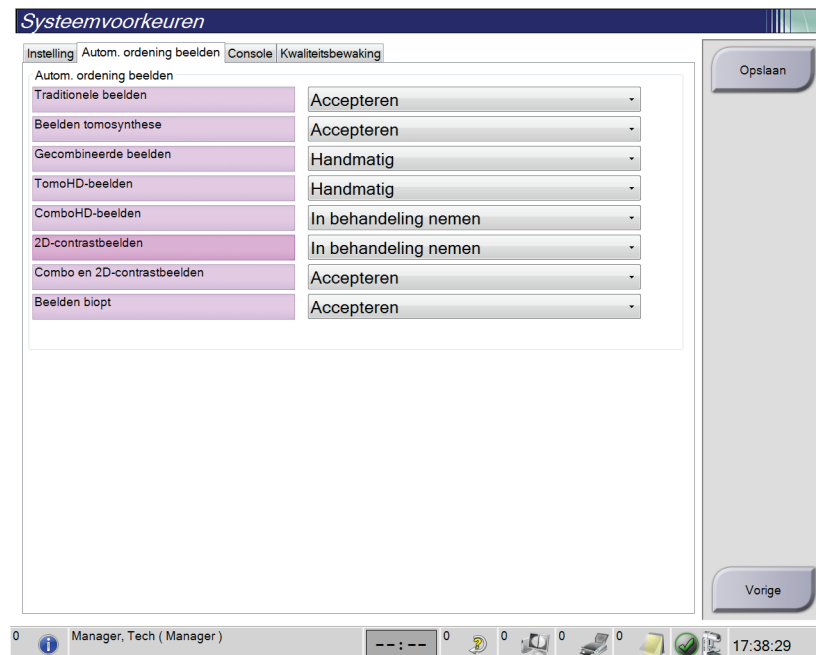

Figuur 94: Automatische ordening beelden instellen

4. Selecteer de knop **Opslaan** en vervolgens **OK** wanneer het bericht *Update geslaagd* wordt weergegeven.




## 10.9 De standaard contrastinstellingen instellen

Een manager-gebruiker kan de standaard timerperioden en de standaard contrastinformatie configureren.

### De standaard timerperioden instellen

1. Selecteer in de Procedures-groep in het scherm *Admin* (Beheer) de knop **Contrast**.

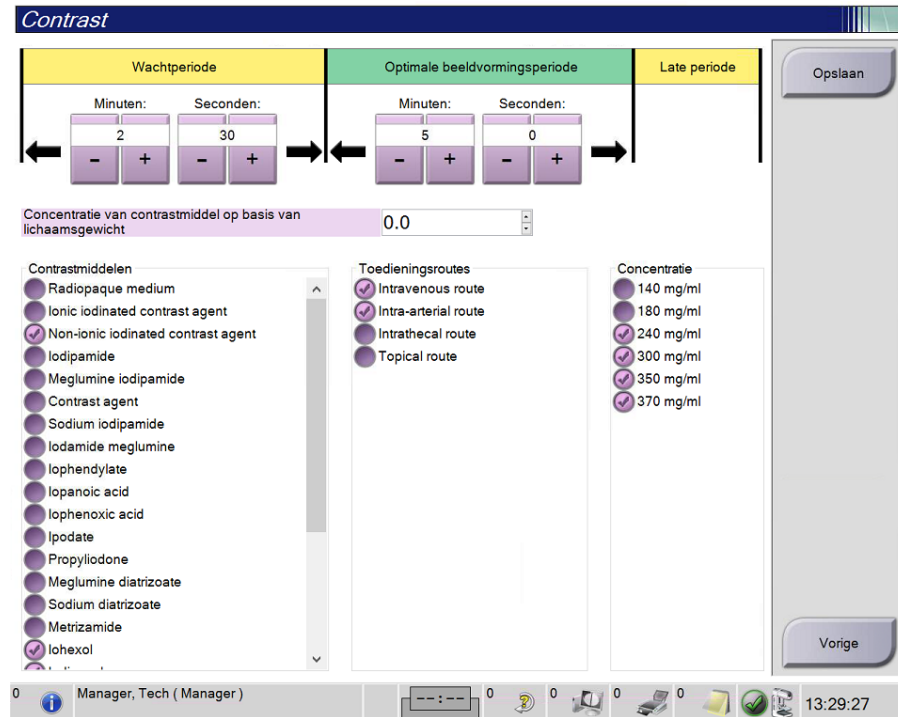

Figuur 95: Standaardinstellingen van I-View 2D Contrast

2. Kies de plus- (+) of min- (-) knoppen om de minuten en seconden te wijzigen voor de **wachperiode** en **optimale beeldvormingsperiode**.
3. Selecteer **Opslaan**.

Uw selecties verschijnen als de standaard timerinstellingen op het tabblad **Contrast**.

### De standaard contrastinformatie instellen

1. Selecteer in de Procedures-groep in het scherm *Admin* (Beheer) de knop **Contrast**.
2. Selecteer een of meer **contrastmiddelen**, **toegangsroutes** en de **concentratie**. Zie de vorige figuur.
3. Selecteer **Opslaan**.


Uw selecties verschijnen als standaardopties in het dialoogvenster met contrastinformatie.

### 10.10 Voorkeursinstellingen voor Genius AI Detection-software instellen

Voor een procedure zijn soms herhaalde weergaven vereist. Een beheerder kan voorkeuren instellen voor de afbeelding die moet worden gebruikt voor de verwerking van Genius AI Detection-software wanneer er dubbele weergaven zijn.

#### De standaardstelsysteemselectie instellen bij dubbele weergaven:

1. Selecteer in de groep System (Systeem) van het scherm *Admin* (Beheer) de knop **Preferences** (Voorkeuren). Het scherm *System Preferences* (Systeemvoorkeuren) wordt geopend.
2. Selecteer het tabblad **Genius AI Detection**.
3. Selecteer in het veld Genius AI Case Processing Automatic Duplicate View Selection (Automatische dubbele weergave Genius AI-casusverwerking) **Newest** (Nieuwste) of **Oldest** (Oudste).
  - Met **Newest** (Nieuwste) selecteert het systeem automatisch de nieuwste dubbele weergave voor casusverwerking.
  - Met **Oldest** (Oudste) selecteert het systeem automatisch de oudste dubbele weergave voor casusverwerking.

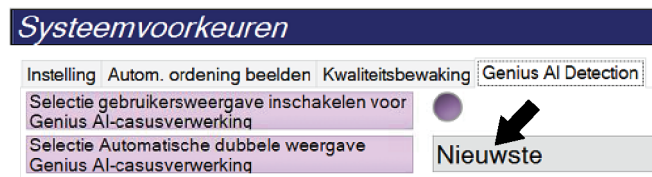

Figuur 96: Automatische selectie voor Genius AI-softwarecasusverwerking

4. Selecteer **Save** (Opslaan) en vervolgens **OK** wanneer het bericht *Update Successful* (Update geslaagd) wordt weergegeven.

#### De gebruikersselectie inschakelen voor dubbele weergaven:


1. Selecteer in de groep System (Systeem) van het scherm *Admin* (Beheer) de knop **Preferences** (Voorkeuren). Het scherm *System Preferences* (Systeemvoorkeuren) wordt geopend.
2. Selecteer het tabblad **Genius AI Detection**.
3. Selecteer om de gebruikersselectie in te schakelen het keuzerondje Enable User View Selection for Genius AI Case Processing (Selectie gebruikersweergave inschakelen voor Genius AI-casusverwerking). Er verschijnt een vinkje. (Deselecteer het keuzerondje om de gebruikersselectie uit te schakelen.)



Figuur 97: Automatische selectie voor Genius AI-softwarecasusverwerking

4. Selecteer **Save** (Opslaan) en vervolgens **OK** wanneer het bericht *Update Successful* (Update geslaagd) wordt weergegeven.

Wanneer een dubbele weergave is verworven en geaccepteerd, laat het systeem het beeld zien dat de gebruiker heeft geselecteerd voor Genius AI Detection-softwarecasusverwerking. Het tabblad **Tools (Hulpmiddelen)** op het procedurescherm geeft een groot vinkje weer. De miniatuur van het beeld dat is geselecteerd voor casusverwerking is gemarkeerd met een klein vinkje. (Zie de volgende figuur.)

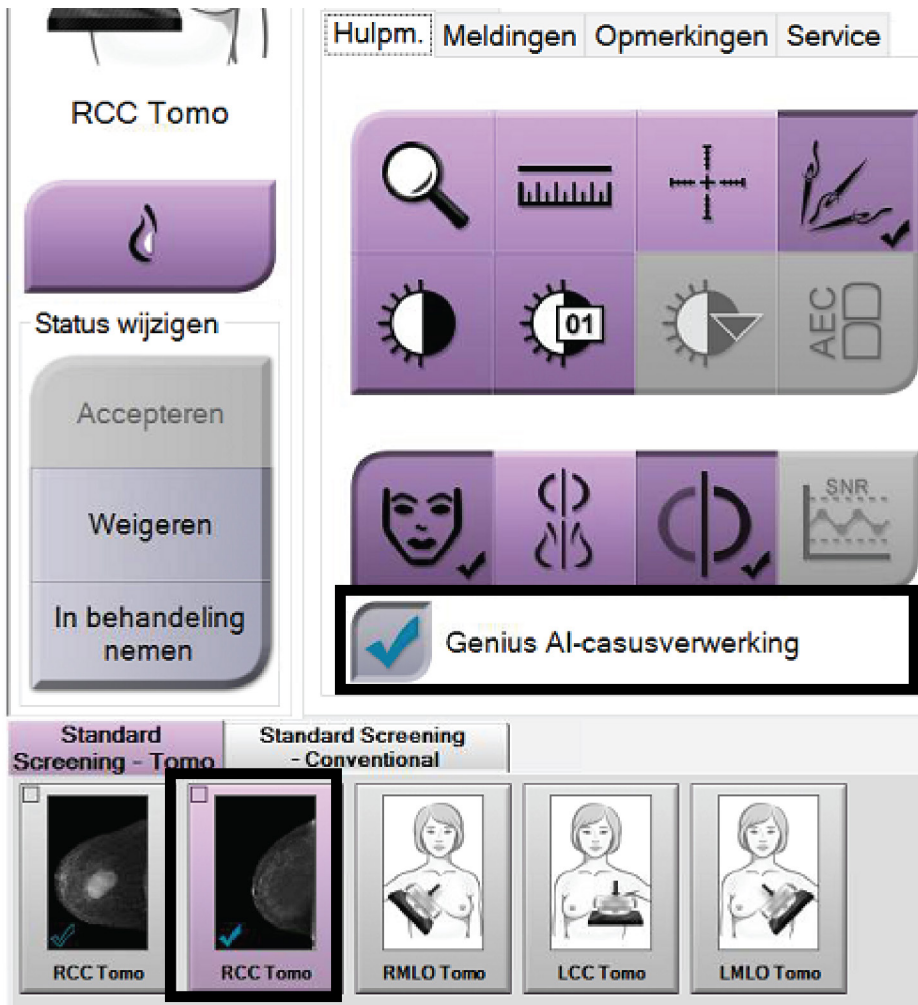

Figuur 98: Gebruikersselectie voor Genius AI Detection--softwarecasusverwerking


### 10.11 Systeemhulpmiddelen

Zowel managers van radiologen als gebruikers met servicemachtigingen hebben toegang tot de systeemhulpmiddelen. De systeemhulpmiddelen bevatten informatie over de configuratie van het systeem. Om deze te openen, selecteert u **System Tools** (Systeemhulpmiddelen) in de groep System (Systeem) op het scherm *Admin* (Beheer).



Figuur 99: De knop System Tools (Systeemhulpmiddelen)

#### 10.11.1 Systeemhulpmiddelen voor de manager van radiologisch technologen

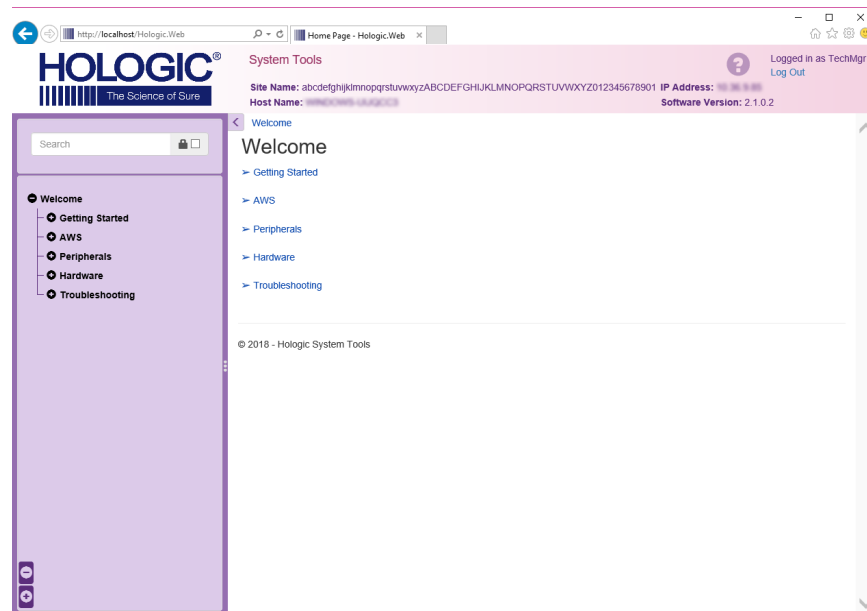

Figuur 100: Het scherm Systeemhulpmiddelen

Tabel 25: Manager van radiologisch technologen—Functies van systeemhulpmiddelen


Gedeelte	Schermfuncties
Aan de slag	<p><b>Info over:</b> De inleiding op het servicehulpmiddel.</p> <p><b>FAQ:</b> Lijst van veelgestelde vragen.</p> <p><b>Woordenlijst:</b> Lijst van termen en beschrijvingen.</p> <p><b>Platform:</b> Lijst van directory's, softwareversie nummers en statistieken van systeemsoftware.</p> <p><b>Snelkoppelingen:</b> Lijst van Windows-snelkoppelingen.</p>
AWS	<p><b>Connectiviteit:</b> Lijst van geïnstalleerde apparaten.</p> <p><b>Film- en beeldinformatie:</b> Een beeldrapport maken*. Een QC-rapport maken. (*U kunt dit rapport ook vanaf een externe computer openen. Raadpleeg <a href="#">Externe toegang tot beeldrapporten</a> op pagina 161.)</p> <p><b>Licentiëring:</b> Lijst van geïnstalleerde licenties.</p> <p><b>Gebruikersinterface:</b> De opties in de softwaretoepassing wijzigen.</p> <p><b>Internationalisatie:</b> De plaatselijke taal en cultuur selecteren.</p>
Problemen oplossen	<p><b>AWS:</b> Maakt downloaden van beelden mogelijk.</p> <p><b>Computer:</b> Systemmanagement en netwerkinformatie.</p> <p><b>Logbestand:</b> De opties van gebeurtenisrecords wijzigen.</p> <p><b>Back-ups:</b> De back-ups voor het systeem regelen.</p>

### 10.11.2 Externe toegang tot beeldrapporten

Toegang tot beeldrapporten via een externe computer die via een netwerk met het systeem is verbonden. Deze functie kan nuttig zijn voor locaties waar het niet is toegestaan om rapporten rechtstreeks vanaf het systeem op USB-sticks te downloaden.


Volg deze stappen om beeldrapporten te openen vanaf een externe computer. Voor deze procedure moet u zich bij de systeemhulpmiddelen aanmelden als gebruiker op managerniveau.

1. Zorg dat u het IP-adres krijgt van het systeem waartoe u toegang wilt verkrijgen. U kunt het IP-adres krijgen bij uw IT-beheerder of via het systeem. Ga naar het scherm *Info* en selecteer het tabblad **Systeem**. Schrijf het IP-adres op.
2. Navigeer met een internetbrowser op uw externe computer naar `http:// [IP-adres]/Hologic.web/MainPage.aspx`. Gebruik het IP-adres van stap 1.
3. Het scherm *Aanmelden bij systeemconfiguratie* wordt geopend. Typ een gebruikersnaam en wachtwoord van managerniveau en klik vervolgens op de knop **Aanmelden**.

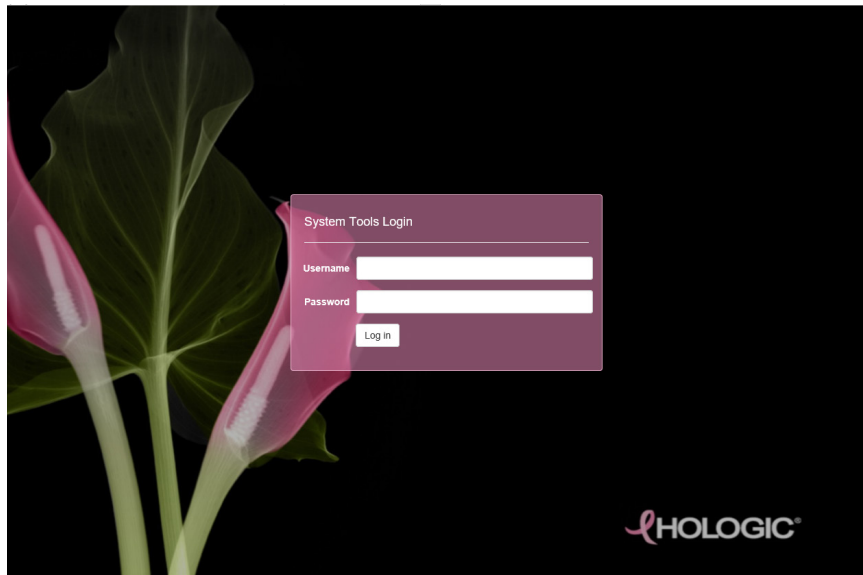


Figuur 101: Het scherm 'Aanmelden bij systeemhulpmiddelen'

4. Het scherm *Welkom bij systeemhulpmiddelen* wordt geopend. Ga naar **AWS > Film & Image Information (Film- en beeldinformatie) > Create Image Report (Beeldrapport maken)**.

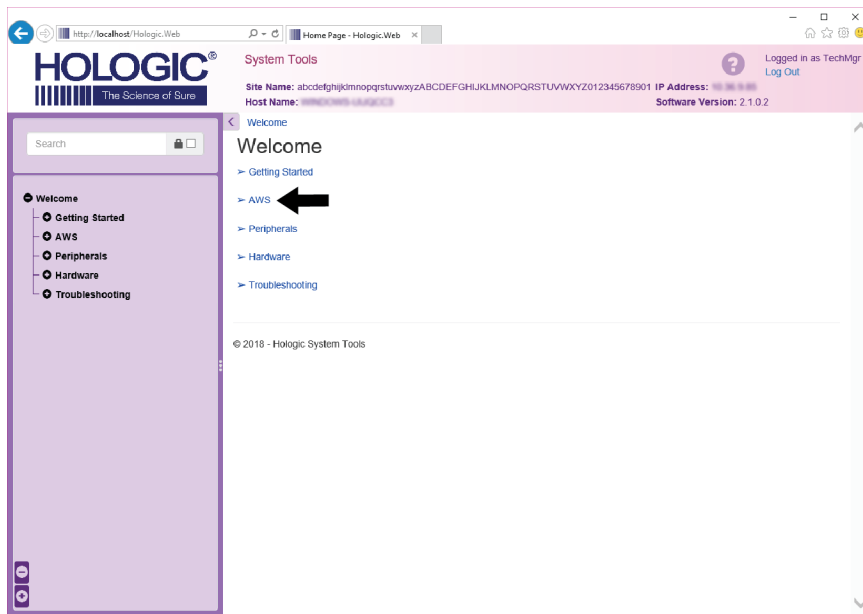


Figuur 102: Het scherm 'Welkom bij systeemhulpmiddelen'

5. Selecteer de parameters voor het rapport en selecteer **Genereren**.

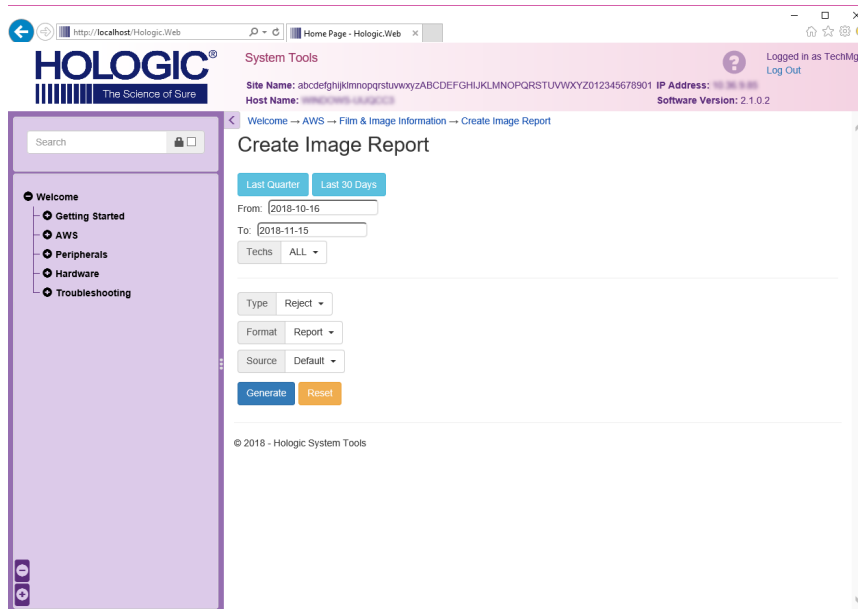

Figuur 103: Parameters voor het beeldrapport maken

- Het rapport wordt op het scherm weergegeven. Schuif naar de onderzijde van het rapport en selecteer **Downloaden naar (html)** of **Downloaden naar (csv)** voor het downloadtype van het bestand. Selecteer **Opslaan** wanneer het systeem dit aangeeft.

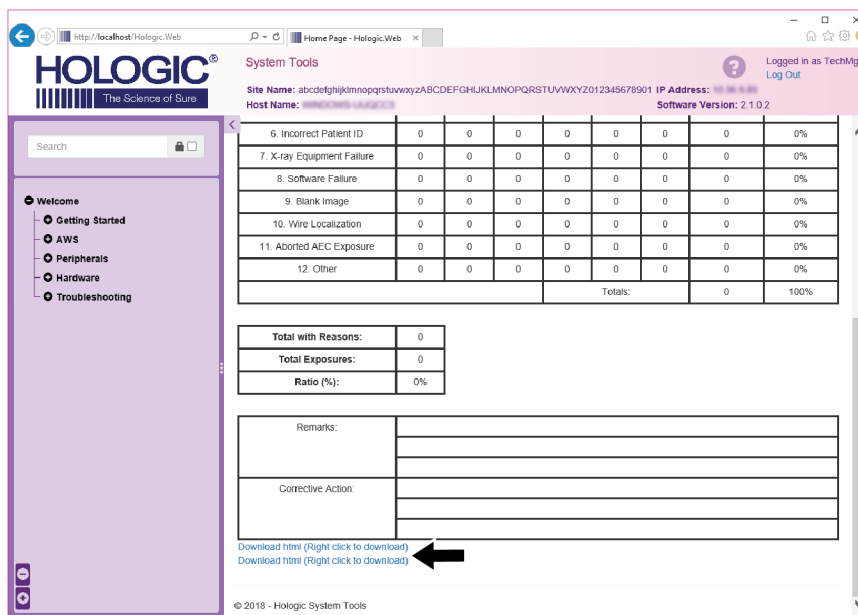


Figuur 104: Het beeldrapport downloaden

- Selecteer een map op de computer en klik vervolgens op **Opslaan**.
- Als u klaar bent, moet u zich **Afmelden** bij de systeemhulpmiddelen.

### 10.12 Archiveringshulpmiddel

Met de archiveringsfunctie in het scherm *Admin* (Beheer) kunt u:


- Lokale studies naar een archief verzenden.
- Studies naar verwijderbare media exporteren.

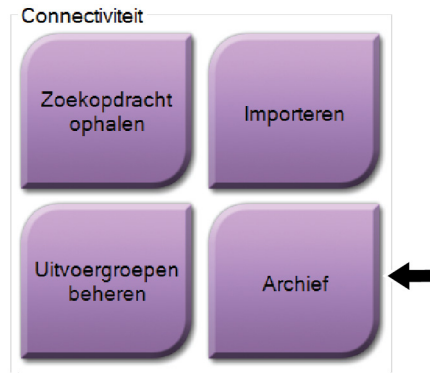

Figuur 105: Knop Archief

1. Selecteer in de groep *Connectiviteit* in het scherm *Admin* (Beheer) de knop **Archief**. Het scherm *Meerdere patiënten op aanvraag archiveren* wordt geopend.
2. Om naar een patiënt te zoeken, moet u minimaal twee tekens invoeren in het gebied voor zoekparameters en het vergrootglas selecteren.

Er wordt dan een lijst van patiënten die voldoen aan de zoekcriteria weergegeven.

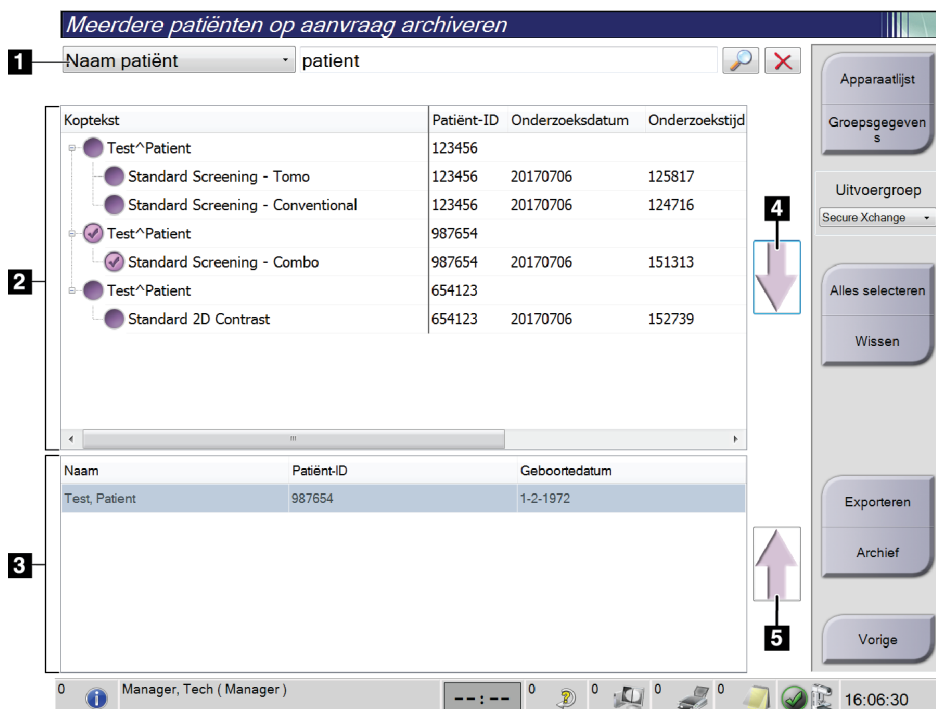

Figuur 106: Scherm *Meerdere patiënten op aanvraag archiveren*

#### Legenda

1. Zoekparameters
2. Gebied met lijst van patiënten
3. Gebied voor te archiveren of exporteren patiënten
4. Selectie in het gebied met de lijst van patiënten toevoegen aan het gebied voor te archiveren of exporteren patiënten
5. De selectie verwijderen uit het gebied voor te archiveren of exporteren patiënten



### Archiveren:

1. Selecteer de patiënten en procedures die moeten worden gearhiveerd.
  - Selecteer patiënten uit de lijst van patiënten, of voer een zoekopdracht uit met de zoekparameters (onderdeel 1) en selecteer patiënten uit de zoekresultaten.



#### Opmerking

Met de knop **Alles selecteren** aan de rechterzijde van het scherm worden alle patiënten in het gebied met de lijst van patiënten geselecteerd. Met de knop **Wissen** aan de rechterzijde van het scherm worden de selecties gewist.

---

- Selecteer de procedures voor elke patiënt.
  - Selecteer de **pijl omlaag** (onderdeel 4) op het scherm om de geselecteerde patiënten naar het gebied voor te archiveren patiënten te verplaatsen (onderdeel 3).
  - Selecteer de **pijl omhoog** (onderdeel 5) op het scherm om de geselecteerde patiënten uit het gebied voor te archiveren patiënten te verwijderen (onderdeel 3).
2. Selecteer een opslagapparaat.
    - Selecteer een optie in het vervolgkeuzemenu Apparaat opslaan.
  - OF-
  - Selecteer de knop **Lijst groeperen** en selecteer daarna een optie.
  3. Selecteer de knop **Archief**. De lijst in het gebied voor te archiveren patiënten wordt naar de geselecteerde archiveringsapparaten gekopieerd.



#### Opmerking

Gebruik het hulpprogramma Manage Queue in de taakbalk om de achiveringsstatus te bekijken.

---

### Exporteren:

1. Selecteer de patiënten en procedures die moeten worden geëxporteerd.
  - Selecteer patiënten uit de lijst van patiënten, of voer een zoekopdracht uit met een van de zoekparameters (onderdeel 1) en selecteer patiënten uit de zoekresultaten.



#### Opmerking

Met de knop **Alles selecteren** aan de rechterzijde van het scherm worden alle patiënten in het gebied met de lijst van patiënten geselecteerd. Met de knop **Wissen** aan de rechterzijde van het scherm worden de selecties gewist.

---

- Selecteer de procedures voor elke patiënt.
- Selecteer de **pijl omlaag** (onderdeel 4) op het scherm om de geselecteerde patiënten naar het gebied voor te archiveren patiënten te verplaatsen (onderdeel 3).
- Selecteer de **pijl omhoog** (onderdeel 5) op het scherm om de geselecteerde patiënten uit het gebied voor te archiveren patiënten te verwijderen (onderdeel 3).

2. Selecteer de knop **Exporteren**.
3. Selecteer in het dialoogvenster *Exporteren* het doel in de vervolgkeuzelijst met media-apparaten.




*Figuur 107: Exportscherm*

4. Selecteer zo nodig andere opties:
  - **Anonimiseren:** voor het anonimiseren van patiëntinformatie.
  - **USB-apparaat na het schrijven uitwerpen:** voor het automatisch uitwerpen van het verwijderbare mediaopslagapparaat nadat het exporteren is voltooid.
  - **Geavanceerd:** voor het selecteren van een map op uw lokale systeem waarin uw selecties worden opgeslagen of voor het selecteren van de exporttypen voor de beelden.
5. Selecteer de knop **Start** om de geselecteerde beelden naar het geselecteerde apparaat te verzenden.

## Bijlage A Specificaties

### A.1 Meetwaarden product

#### A.1.1 Buisstandaard (gantry met C-arm)

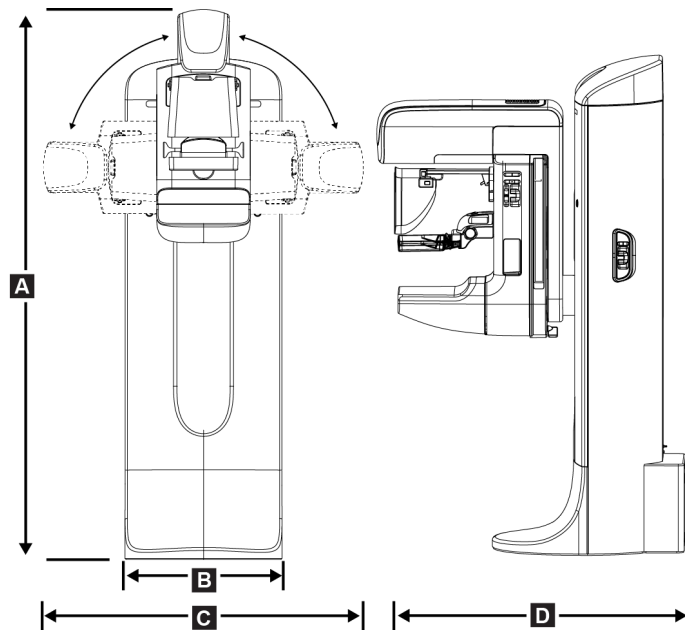


Figuur 108: Afmetingen buisstandaard (gantry met C-arm)

A. Hoogte	223 cm (87.8 inch)
B. Breedte	66 cm (26 inch)
C. Breedte	173 cm (68 inch)
D. Diepte	138 cm (54,3 inch)
Gewicht	Maximaal 400 kg

### A.1.2 Verwerfingswerkstations


#### Universeel verwerfingswerkstation

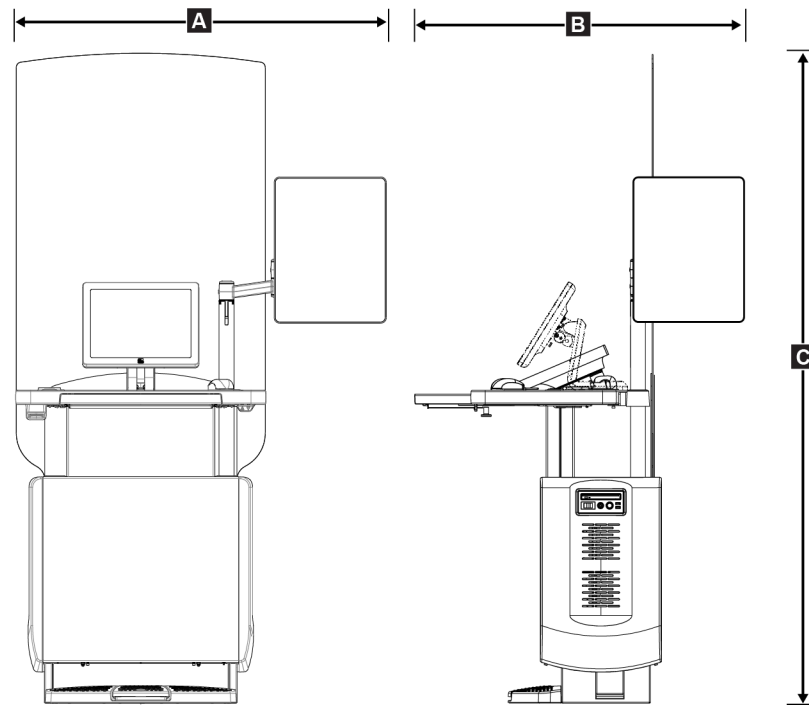

Figuur 109: Afmetingen universeel verwerfingswerkstation

A. Breedte (maximum) met optionele displayarm gekoppeld en uitgeschoven	136 cm - serie I UAWS 128 cm - serie II UAWS
Breedte (maximum) met standaard displayarm	94,0 cm - serie I UAWS 107 cm - serie II UAWS
B. Diepte (maximum) met toetsenbordlade uitgeschoven en optionele monitorarm gekoppeld	122 cm - serie I UAWS, naar opzij gedraaid 115 cm - serie II UAWS, naar opzij gedraaid
Diepte (maximum) met toetsenbordlade uitgeschoven en standaard monitorarm	83,6 cm - serie I en II UAWS
C. Hoogte (nominaal)	219 cm na augustus 2017 204 cm vóór september 2017
Gewicht (maximum)	209 kg

Verwerfingswerkstation voor mobiel gebruik

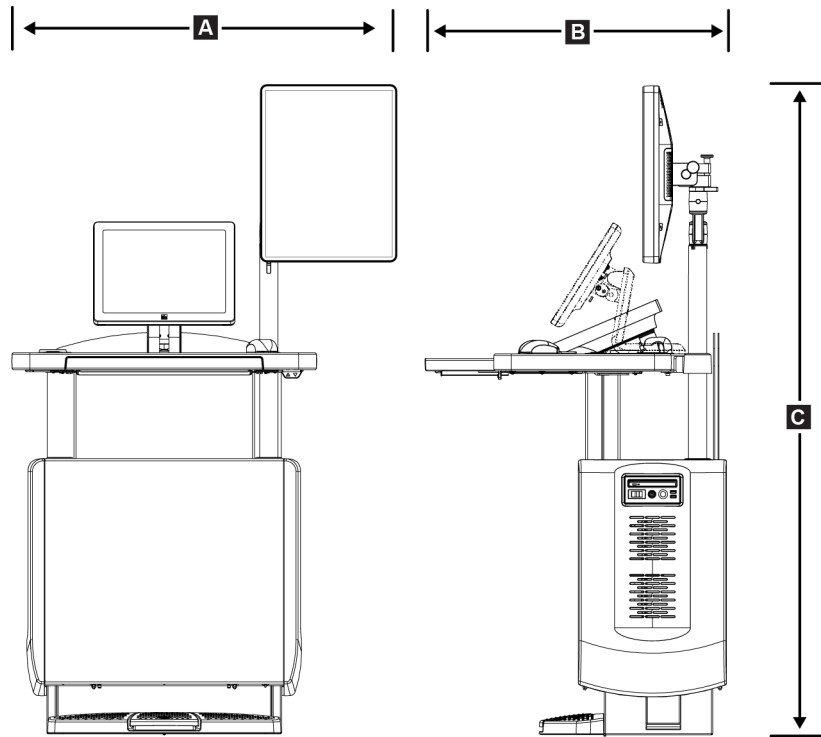

Figuur 110: Afmetingen mobiel universeel verwerfingswerkstation

A. Breedte (maximum) met mobiele displayarm	100 cm - serie I UAWS 107 cm - serie II UAWS
B. Diepte (maximum) met toetsenbordlade uitgeschoven	85 cm
C. Hoogte (maximum)	180 cm
Gewicht (maximum)	179 kg

## A.2 Bedrijfs- en opslagomgeving

### A.2.1 Algemene bedrijfsvoorwaarden

<i>Temperatuurbereik</i>	<i>20 °C tot 30 °C</i>
<i>Relatieve vochtigheid</i>	<i>20% tot 80% zonder condensatievocht</i>

### A.2.2 Opslagomgeving

#### **Gantry**

<i>Temperatuurbereik</i>	<i>-10 °C tot 40 °C</i>
<i>Relatieve vochtigheid</i>	<i>10% tot 90% zonder condensatievocht</i>

*(In een verpakking opbergen voor opslag in een gebouw.)*

#### **Röntgendetector**

<i>Temperatuurbereik</i>	<i>10 °C tot 30 °C, onbepaald</i>
	<i>10 °C tot 35 °C, voor max. 12 uur</i>
<i>Maximale snelheid van temperatuurverandering</i>	<i>Minder dan 10 °C per uur</i>
<i>Relatieve vochtigheid</i>	<i>10% tot 80% zonder condensatievocht</i>

*(In een verpakking opbergen voor opslag in een gebouw.)*

#### **Verwervingswerkstation**

<i>Temperatuurbereik</i>	<i>-10 °C tot 40 °C</i>
<i>Relatieve vochtigheid</i>	<i>10% tot 90% zonder condensatievocht</i>

*(In een verpakking opbergen voor opslag in een gebouw.)*

### A.3 Stralingsscherm

*Lood (Pb) equivalent stralingsscherm*      0,5 mm lood voor röntgenenergie tot 35 kV

### A.4 Elektrische ingangssignalen

#### A.4.1 Buisstandaard

<i>Netspanning</i>	200/208/220/230/240 VAC $\pm 10\%$
<i>Netimpedantie</i>	Maximale lijnimpedantie moet gelijk of lager zijn dan 0,20 ohm voor 208/220/230/240 VAC, 0,16 ohm voor 200 VAC
<i>Netfrequentie</i>	50/60 Hz $\pm 5\%$
<i>Gemiddelde stroom over 24 uur</i>	< 5 A
<i>Piekstroom lijn</i>	4 A (maximaal 65 A gedurende $\leq 5$ sec.)

#### A.4.2 Verwervingswerkstation

<i>Netspanning</i>	100/120/200/208/220/230/240 VAC $\pm 10\%$
<i>Netfrequentie</i>	50/60 Hz $\pm 5\%$
<i>Opgenomen vermogen</i>	< 1000 watt
<i>Inschakelduur (standaard verwervingswerkstation)</i>	10% ~ 6 min. per uur of 2 min. aan, 18 min. uit
<i>Overstroombeveiliging</i>	8A

### A.5 Technische informatie buisstandaard

#### A.5.1 C-arm

<i>Rotatiebereik</i>	<i>Conventionele mammografie:</i> $+195^{\circ} +3^{\circ}/-0,5^{\circ}$ tot $0^{\circ} \pm 0,5^{\circ}$ tot $-155^{\circ} +0,5^{\circ}/-3^{\circ}$  <i>Tomosyntheseoptie:</i> $+180^{\circ} \pm 0,5^{\circ}$ tot $0^{\circ} \pm 0,5^{\circ}$ tot $-140^{\circ} \pm 0,5^{\circ}$
<i>Absolute hoekstand</i>	<i>nauwkeurig tot op <math>\pm 0,5^{\circ}</math></i>
<i>Rotatieversnelling</i>	$18^{\circ}/s^2 +18/-9\%$
<i>Rotatievertraging</i>	$18^{\circ}/s^2 +18/-9\%$
<i>Rotatiehoeknelheid positionering</i>	$18^{\circ}/s \pm 25\%$



#### **Opmerking**

De hoeknelheid is het gemiddelde van de snelheid van de buisarm die rechtsonder tusschen  $0^{\circ}$  en  $90^{\circ}$  of linksom tusschen  $90^{\circ}$  en  $0^{\circ}$  draait. De hoeknelheid omvat niet de tijdsduur die nodig is om vanuit nul te versnellen en om tot nul te vertragen.

---

<i>Afstand bron-tot-beeld (SID)</i>	$70,0 \text{ cm} \pm 1,0 \text{ cm}$  <i>(Afwijking brandpuntpositie is <math>\pm 5 \text{ mm}</math>)</i>
<i>Patiëntondersteuning (niet-vergroot)</i>	
<i>Ondergrens verticale positie</i>	$70,5 \text{ cm} +5,1/-0 \text{ cm}$
<i>Bovengrens verticale positie</i>	$141 \text{ cm} +0/-17,8 \text{ cm}$



## A.5.2 Compressie

<i>Handmatige compressiekracht</i>	<i>Maximaal 300 N</i>
<i>Gemotoriseerde compressie</i>	<i>Functioneert in drie bedrijfsmodi: voorcompressie, volledig bereik, dubbele compressie. Door gebruiker te selecteren via software.</i>
<i>Voorcompressiekracht</i>	<i>67 tot 134 N, gemotoriseerd</i>
<i>Compressiekracht bij volledig bereik</i>	<i>89 tot 178 N, gemotoriseerd</i>
<i>Dubbele compressie</i>	<i>Levert voorcompressiekracht bij eerste activering van de compressieschakelaar; vervolgens, als schakelaar binnen 2 seconden wordt geactiveerd, neemt de kracht stapsgewijs toe voor elke extra activering van de schakelaar tot de gebruiker de volledige compressiekracht heeft geselecteerd.</i>
<i>Compressieregelaars</i>	<i>Regelaars voor omhoog/omlaag aan beide zijden van de C-arm en op de voetschakelaar met 2 standen (gemotoriseerd). Handwiel aan beide zijden van het compressieapparaat (handbediend).</i>
<i>Compressievrijgave</i>	<i>Handmatig gemotoriseerde vrijgavemodus bediend door drukknoppen aan beide zijden van de C-arm.</i>
<i>Automatische compressievrijgave</i>	<i>Door gebruiker te selecteren automatische vrijgavemodus brengt compressieapparaat omhoog na beëindiging van belichting.</i>
<i>Variabele snelheid neergaande beweging</i>	<i>4,2 cm/s <math>\pm</math>15%</i>
<i>Weergave compressiekracht</i>	<i>Twee LCD's op het compressieapparaat tonen de compressiekracht in het bereik van 18 N tot 300 N in stappen van 1 N.</i>
<i>Weergavenauwkeurigheid compressiekracht</i>	<i><math>\pm</math>20 N</i>
<i>Weergave compressiedikte</i>	<i>Twee LCD's op het compressieapparaat meten de compressiedikte in stappen van 0,1 cm. Het display is zichtbaar vanaf beide zijden van de patiënt.</i>
<i>Weergavenauwkeurigheid compressiedikte</i>	<i><math>\pm</math>0,5 cm voor dikten tussen 0,5 cm en 15 cm</i>
<i>Borstcompressiedikte tomosynthese</i>	<i>Tomosynthese met standaard resolutie Maximum: 24 cm (beperkt door geometrie compressieapparaat)  Tomosynthese met hoge resolutie Maximum: 15 cm (beperkt door DICOM-limieten)</i>
<i>Compressiepaddles</i>	<i>Compressiepaddles zijn doorzichtig. De paddles bestaan uit polycarbonaathars of een soortgelijk materiaal. Bij uitgeoefende compressie moet de doorbuiging van de paddles vanuit een vlak evenwijdig aan het ondersteuningsvlak van de patiënt minder dan of gelijk zijn aan 1,0 cm.</i>

### A.5.3 Röntgenbuis

<i>Focuspunt</i>	<i>Groot (0,3 mm), nominaal</i> <i>Klein (0,1 mm), nominaal</i>
<i>Buisspanning</i>	<i>20 kV tot 49 kV</i>
<i>Anodemateriaal</i>	<i>Tungsten</i>
<i>Röntgenvenster</i>	<i>Beryllium 0,63 mm</i>
<i>Testvoorwaarden lekkage röntgenbuis</i>	<i>49 kVp, 2,0 mA</i>

### A.5.4 Filtratie en uitgangssignalen röntgenbundel

<i>Filtratie</i>	<i>Filterwiel met 5 standen:</i> <i>Stand 1: Rhodium, 0,050 mm ±10%</i> <i>Stand 2: Aluminium, 0,70 mm (nominaal) (tomosyntheseoptie)</i> <i>Stand 3: Zilver, 0,050 mm ±10%</i> <i>Stand 4: Koper, 0,3 mm</i> <i>Stand 5: Lood (voorzien voor onderhoud)</i>
------------------	---

### Bereik van kV/mA

*Tabel 26: Maximale mA-instelling als functie van kV*

<b>kV</b>	<b>LFS mA</b>	<b>SFS mA</b>
20	100	30
21	110	30
22	110	30
23	120	30
24	130	30
25	130	40
26	140	40
27	150	40
28	160	40
29	160	40
30	170	50
31	180	50
32	190	50

Tabel 26: Maximale mA-instelling als functie van kV

kV	LFS mA	SFS mA
33	200	50
34	200	50
35	200	50
36	190	50
37	180	50
38	180	50
39	180	50
40	170	
41	170	
42	160	
43	160	
44	150	
45	150	
46	150	
47	140	
48	140	
49	140	

Stappen mAs (tabel 1, standaardwaarden) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 32,5, 35, 37,5, 40, 42,5, 45, 47,5, 50, 52,5, 55, 57,5, 60, 62,5, 65, 67,5, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500

### Verzwakking van koolstofvezel

Beeldreceptor < 0,3 mm Al

Vergrotingsplatform < 0,3 mm Al

### A.5.5 Collimatie röntgenbundel

<i>Collimatievelden</i>	<i>7,0 cm x 8,5 cm</i>
	<i>10 cm x 10 cm</i>
	<i>15 cm x 15 cm</i>
	<i>18 cm x 24 cm</i>
	<i>18 cm x 29 cm (tomosyntheseoptie)</i>
	<i>24 cm x 29 cm</i>

### A.5.6 Indicatie lichtveld

<i>Congruentie lichtveld ten opzichte van röntgenbundel</i>	<i>Binnen 2% van SID</i>
---	--------------------------

### A.5.7 Röntgengenerator

<i>Type</i>	<i>Hoogfrequentomzetter van constante potentiaal</i>
<i>Kwalificatie</i>	<i>7,0 kW, maximaal (isowatt), 200 mA bij 35 kV</i>
<i>Elektrische vermogen</i>	<i>maximaal 9,0 kW</i>
<i>Bereik van kV</i>	<i>20 kV tot 49 kV in stappen van 1 kV</i>
<i>Nauwkeurigheid van kV</i>	<i>±2%, binnen een bereik van 20-49 kVp</i>
<i>Bereik van mAs</i>	<i>3,0 mAs tot 500 mAs in handmatige mAs-modus (minimaal 8 mAs in AEC-modus)</i>
<i>Nauwkeurigheid van mAs</i>	<i>±(10% + 0,2 mAs)</i>
<i>Bereik van mA</i>	<i>10 mA tot 200 mA, groot focuspunt</i>
	<i>10 mA tot 50 mA, klein focuspunt</i>

## A.6 Technische informatie beeldsysteem

### A.6.1 Beeldreceptor

<i>Binnendringen van vloeistoffen</i>	<i>Er mag geen per ongeluk gemorste vloeistof de beeldontvanger binnendringen.</i>
<i>Doorbuiging</i>	<i>Deze mag bij maximale compressie niet groter zijn dan 1,0 mm.</i>
<i>Actief beeldvormingsgebied</i>	<i>Niet kleiner dan 23,3 cm bij 28,5 cm</i>
<i>Conventionele DQE-mammografie</i>	<i>Niet kleiner dan 50% bij 0,2 lp/mm</i> <i>Niet kleiner dan 15% bij de Nyquist-limiet</i>
<i>DQE (tomosyntheseoptie)</i>	<i>Niet kleiner dan 30% bij 0,2 lp/mm</i> <i>Niet kleiner dan 15% bij de Nyquist-limiet</i>
<i>Dynamisch bereik en lineariteit</i>	<i>De reactie van het detectorsubstelsysteem is lineair met een lineariteit van 0,999 binnen een dynamisch bereik van 400:1 bij blootstelling aan röntgenstraling.</i>
<i>Uniformiteit</i>	<i>Het detectorsubstelsysteem kan versterkingsafwijkingen van pixel tot pixel corrigeren.</i> <i>Bij conventionele mammografieprocedures mag de uniformiteit van de reactie van een vlak veldbeeld van de detector niet groter zijn dan 2% nadat versterkingskalibratie is toegepast over een belichtingsbereik van 0,5 mR tot 200 mR.</i>



## Bijlage B Systeem- en waarschuwingsberichten

### B.1 Foutenherstel en probleemoplossing

De meeste fouten en waarschuwingsberichten worden gewist zonder gevolgen voor uw werkstroom. Volg de schermwijzingen of los het probleem op en wis vervolgens de status van de taakbalk. Sommige problemen vereisen het opnieuw opstarten van het systeem of geven aan dat er meer moet worden ondernomen (bijvoorbeeld, contact opnemen met de technische ondersteuning van Hologic). In deze bijlage worden de berichtcategorieën beschreven en uw handelingen om het systeem weer normaal te laten werken. Mochten fouten zich blijven herhalen, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Hologic.

### B.2 Typen berichten

#### B.2.1 Foutniveaus

Elk bericht heeft een bepaalde set met de volgende kenmerken:

- Er wordt een actieve belichting afgebroken (ja/nee)
- Een belichting wil niet beginnen (ja/nee)
- Er verschijnt een bericht voor de gebruiker op het verwervingswerkstation (ja/nee)
- Kan door de gebruiker worden gereset (ja/nee)
- Kan automatisch door het systeem worden gereset (ja/nee)

#### Weergegeven berichten

Alle weergegeven berichten worden in de door de gebruiker geselecteerde taal weergegeven.

In een bericht waardoor een blootstelling wordt afgebroken of wordt voorkomen dat een belichting wordt gestart, is altijd een bericht opgenomen dat aangeeft welke handelingen de gebruiker moet verrichten om door te gaan.

#### Aanvullende informatie over berichten








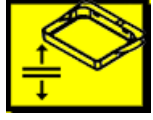

Technische informatie over het bericht is beschikbaar in het logbestand.

Sommige berichten worden altijd weergegeven als een kritieke fout (herstarten van het systeem is noodzakelijk). Deze berichten zijn het gevolg van een situatie die een belichting voorkomt en die niet door de gebruiker of het systeem kunnen worden gereset.

### B.2.2 Systeemberichten

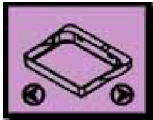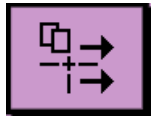









Wanneer de volgende systeemberichten verschijnen, voer dan de stap uit die wordt weergegeven in de kolom Actie om het bericht te verwijderen en de volgende belichting mogelijk te maken.

Tabel 27: Systeemberichten

Pictogram	Bericht	Actie
	Paddle wordt verplaatst	Geen actie nodig.
	Melding wordt verzonden	Geen actie nodig.
	Ongeldig gebruik van vergrotingsstandaard	U hebt een tomografische weergave geselecteerd terwijl de vergrotingsstandaard is geïnstalleerd. Selecteer een niet-tomografische weergave. (Tomosyntheseoptie)
	Gezichtsscherm zit niet vast	Schuif het gezichtsscherm volledig uit of trek het volledig in. (Tomosyntheseoptie)
	Ongeldig gebruik van compressiepaddle	Verwijder de vergrotingsstandaard of installeer de vergrotingspaddle.
	Paddlepositie komt niet overeen met geselecteerde weergave	Verschuif de paddle naar de juiste locatie voor de geselecteerde weergave.
	Compressie minder dan 4,5 cm tijdens kalibratie	Plaats de compressiepaddle hoger dan 4,5 cm om de kalibratieprocedure te voltooien.
	FAST-compressie is actief	Schakel FAST-compressie uit en installeer een voor deze modus bestemde paddle.
	Licentie ontbreekt	Een licentie is noodzakelijk voor het gebruik van deze voorziening of functie. (Dit bericht is alleen bedoeld ter informatie. Er zijn geen acties die de gebruiker moet uitvoeren.)



Tabel 27: Systeemberichten

Pictogram	Bericht	Actie
	Ongeldige detectorkalibratie	Installeer de vergrotingsstandaard voor kalibratie met een klein focuspunt. Verwijder de vergrotingsstandaard voor kalibratie met een groot focuspunt.
	Ongeldige geometrische kalibratie	Herhaal de geometrische kalibratie voordat u een belichting uitvoert. (Tomosyntheseoptie)
	Configuratiebestand ontbreekt	Van toepassing voor servicepersoneel.
	Wachten op detector	Geen actie nodig.
	Systeem in testmodus	Van toepassing voor servicepersoneel.
	Buis moet handmatig worden geplaatst (naar 0 graden worden gezet)	Draai de C-arm naar 0 graden.
	Buis moet handmatig worden geplaatst (naar -15 graden worden gezet)	Draai de C-arm naar -15 graden.
	Buis moet handmatig worden geplaatst (naar 15 graden worden gezet)	Draai de C-arm naar +15 graden.
	De nooduitschakelingsschakelaar is ingeschakeld.	Draai de nooduitschakelingsschakelaar een kwartslag om de schakelaar opnieuw in te stellen.
	Onvoldoende compressie voor tomo-reconstructies.	Plaats de compressiepaddle hoger dan 0,5 cm om tomografiebelichtingen uit te voeren.


### B.3 UPS-berichten



#### Opmerking

De gebruikershandleiding voor de UPS wordt met het systeem meegeleverd. Raadpleeg de *gebruikershandleiding* van de UPS voor volledige instructies.

Het LCD-scherm in de UPS geeft de vermogensstatus aan.

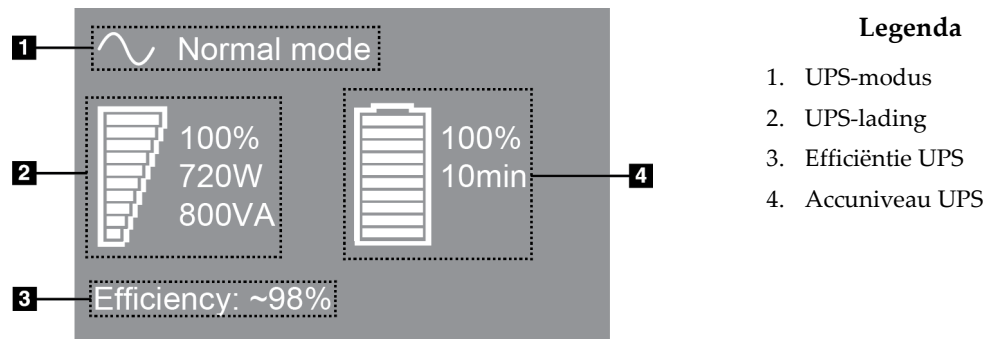

*Figuur 111: LCD-scherm UPS*

Als de UPS-accu de vervaldatum bereikt, verandert het moduspictogram zoals weergegeven. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger om de accu te vervangen.



## Bijlage C Gebruik van het mobiele systeem

In deze bijlage wordt het systeem beschreven dat in een mobiele omgeving is geïnstalleerd.

### C.1 Voorwaarden voor veiligheid en andere voorzorgsmaatregelen

Een aanvaardbare, stabiele, schone VAC-voedingsbron is vereist om ervoor te zorgen dat het systeem aan alle prestatiespecificaties voldoet. Waar beschikbaar biedt een externe stroomvoorziening die op correcte wijze stroom levert aan het systeem de beste prestaties. Als een mobiele voedingsgenerator wordt gebruikt, moet u de specificaties voor het ingangsvermogen aanhouden tijdens alle soorten belasting.



#### Waarschuwing:

Het stralingsscherm is niet goedgekeurd voor mobiel gebruik en wordt niet meegeleverd. De fabrikant van de bus moet voor voldoende afscherming zorgen.

---



#### Let op:

Wanneer een externe stroomvoorziening niet beschikbaar is, kunnen mobiele voedingsbronnen die gelijkwaardige prestaties leveren worden gebruikt. (Raadpleeg [Specificaties voor mobiel gebruik](#) op pagina 184.) De juiste werking en prestaties van het systeem kunnen alleen worden gegarandeerd als een zuiver sinusoïdaal VAC-continuvermogen wordt geleverd volgens de specificaties voor ingangsvermogen van het systeem en de belastingeigenschappen. De voedingsbron moet intermitterend gedurende minimaal 5 seconden 65 A bij 208 VAC leveren en in andere gevallen 4 A maximaal continu. Deze lading moet eenmaal per 30 seconden worden ondersteund. Mocht er sprake zijn van onderbreking van de externe of mobiele stroomvoorziening, dan moet de UPS gedurende minimaal 4 minuten de hierboven beschreven operationele voeding kunnen leveren. De voeding van het verwervingswerkstation en de voeding van de gantry moeten zich in afzonderlijke, speciaal hiervoor bestemde circuits bevinden. Het gebruik van een ononderbreekbare stroomvoorziening met een actieve lijnconditioner wordt aanbevolen op elk voedingscircuit. Dienovereenkomstig moet alle bijkomstige voeding van de mobiele bus worden gedistribueerd door andere circuits. Na initiële installatie en na elke verplaatsing van de mobiele bus moet worden geverifieerd dat de elektrische installatie voldoet aan de specificaties voor ingangsvermogen van systemen en aan de veiligheidsvereisten van IEC 60601-1.

---



Let op:

De temperatuur en vochtigheid in het voertuig moeten te allen tijde worden gehandhaafd. Zorg ervoor dat de omgevingsomstandigheden de aangegeven specificaties niet overschrijden wanneer het systeem niet wordt gebruikt.

---



Let op:

Spanningen mogen niet met meer dan  $\pm 10\%$  veranderen wanneer de röntgeneenheid of andere apparatuur (bijvoorbeeld, verwarming of airconditioning) wordt gebruikt.

---



Let op

Neem het volgende in acht om beeldartefacten te voorkomen:

- Let er goed op dat de mobiele bus niet in de buurt van krachtige stroombronnen wordt geplaatst (zoals hoogspanningskabels en transformatorhuisjes).
  - Zorg ervoor dat mobiele stroomgeneratoren, ononderbreekbare voedingsbronnen (UPS) en spanningsstabilisatoren zich op ten minste 3 meter afstand bevinden van het dichtstbijzijnde punt van het pad dat de beelddetector aflegt.
  - Beschadiging van het borstplatform of de paddles kan artefacten in het beeld veroorzaken.
- 

## C.2 Specificaties voor mobiel gebruik

De volgende systeemspecificaties gelden alleen voor mobiel gebruik. Raadpleeg [Specificaties](#) op pagina 167 voor alle andere specificaties.

### C.2.1 Schok- en vibratielimieten

*Vibratielimiet*

*Maximaal 0,30 G (2 Hz tot 200 Hz), gemeten op het punt waar het systeem aan de bus is gemonteerd.*

*Schoklimiet*

*Maximaal 1,0 G (1/2 sinuspuls), gemeten op het punt waar het systeem aan de bus is gemonteerd. Er wordt voor de bussen luchtvering aanbevolen.*

## C.2.2 Busomgeving

### Bedrijfsomgeving

<i>Temperatuurbereik</i>	20 °C tot 30 °C
<i>Relatieve vochtigheid</i>	20% tot 80% zonder condensatievocht

### Niet-operationele (vervoers)omgeving

<i>Temperatuurbereik</i>	10 °C tot 35 °C, voor max. 12 uur
	10 °C tot 30 °C, onbepaald
<i>Maximale snelheid van temperatuurverandering</i>	<10 °C/u.
<i>Relatieve vochtigheid</i>	10% tot 80% zonder condensatievocht

## C.3 Elektrische ingangssignalen

### C.3.1 Gantry

<i>Netspanning</i>	200/209/220/230/240 VAC ±10%
<i>Netimpedantie</i>	Maximale, niet te overschrijden lijnimpedantie
	0,20 Ohm voor 208/220/230/240 VAC,
	0,16 Ohm voor 200 VAC
<i>Netfrequentie</i>	50/60 Hz ±5%
<i>Gemiddelde stroom over 24 uur</i>	< 5 A
<i>Piekstroom lijn</i>	4 A (maximaal 65 A gedurende 3 seconden)


### C.3.2 Verwervingswerkstation

<i>Netspanning</i>	100/120/200/ 208/220/230/ 240 VAC ±10%
<i>Netfrequentie</i>	50/60 Hz ±5%
<i>Opgenomen vermogen</i>	< 1000 watt

### C.4 Het systeem voorbereiden voor vervoer


Voer de volgende stappen uit vóór het vervoer:

1. Draai de C-arm naar 0 graden (CC-positie).
2. Breng de C-arm omlaag naar de laagste positie.
3. Schakel het systeem uit via de gebruikersinterface.
4. Plaats de muis in de toetsenbordlade.
5. Vergrendel de toetsenbordlade (zie de volgende figuren):
  - a. Sluit de lade.
  - b. Zoek de vergrendelingsknop op onder de lade.

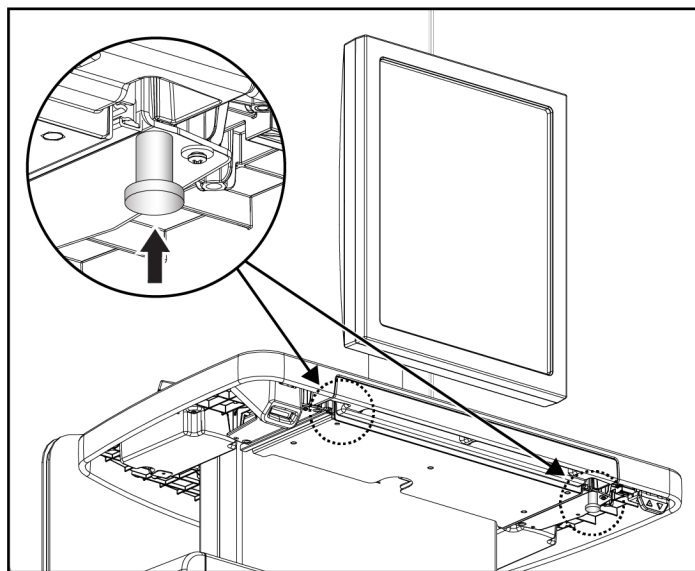


Figuur 112: Vergrendelingsknop toetsenbordlade (rechts of links)

- c. Draai de vergrendelingsknop 90° tot deze in het vergrendelingsmechanisme past. Positie A in de volgende figuur geeft de vergrendelde positie weer.

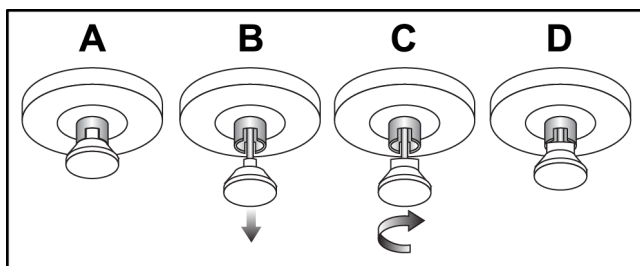


Figuur 113: Vrijgave van ladevergrendeling van vergrendeld (A) tot ontgrendeld (D)

6. Vergrendel de zwenkbare monitor met de hiervoor bestemde knoppen (zie de volgende figuren).

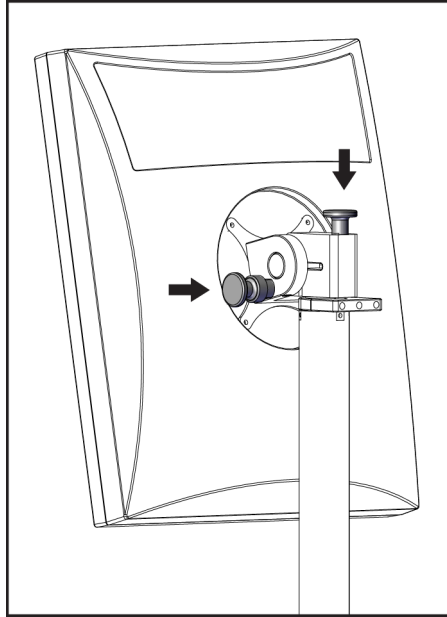

*Figuur 114: Vergrendelingsknoppen zwenkbare monitor op het mobiele Universele verwerkingswerkstation (serie I)*

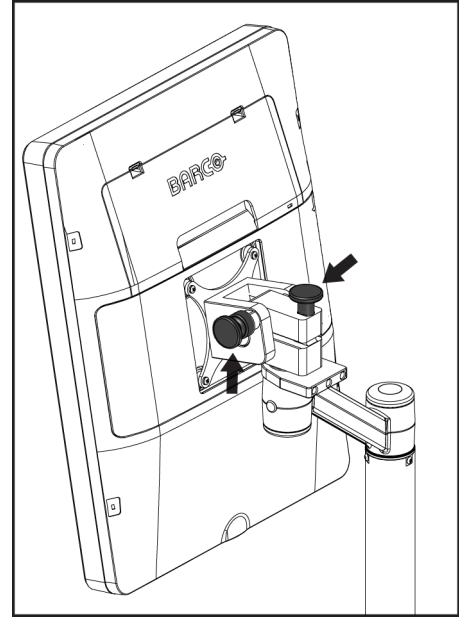


*Figuur 115: Vergrendelingsknoppen zwenkbare monitor op het mobiele Universele verwerkingswerkstation (serie II)*

7. Breng het werkoppervlak omlaag naar de laagste positie.
8. Verwijder alle systeemaccessoires.
9. Plaats alle accessoires op een veilige opslagplaats.


### C.5 Het systeem voorbereiden voor gebruik

1. Ontgrendel de toetsenbordlade:
  - a. Zoek de vergrendelingsknop op onder de lade.
  - b. Trek de knop omlaag.
  - c. Draai de knop 90°. In deze positie blijft de vergrendeling geopend. Positie D (in de volgende figuur) geeft de ontgrendelde positie weer.

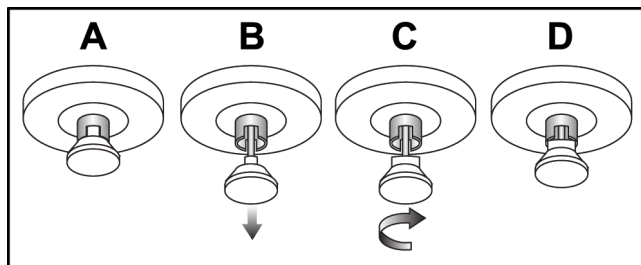


Figuur 116: Vrijgave van ladevergrendeling van vergrendeld (A) tot ontgrendeld (D)

2. Trek zo nodig de lade uit.
3. Bij gebruik van het mobiele Universele verwervingswerkstation moet de zwenkbare monitor worden ontgrendeld (zie de volgende figuren).

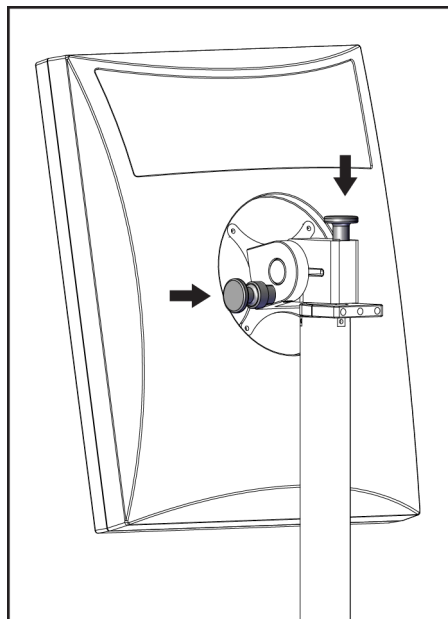

Figuur 117: Vergrendelingsknoppen zwenkbare monitor op het mobiele Universele verwervingswerkstation (serie I)

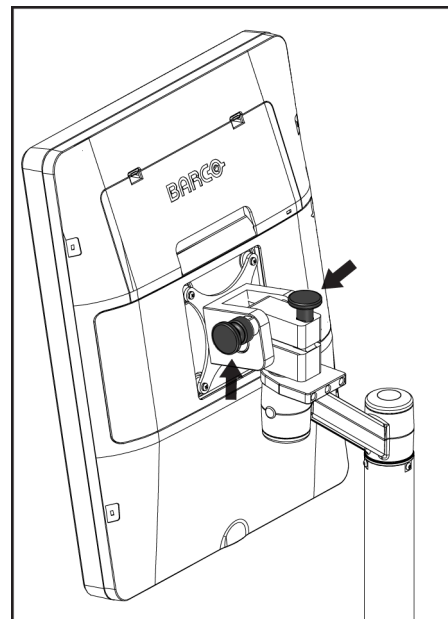

Figuur 118: Vergrendelingsknoppen zwenkbare monitor op het mobiele Universele verwervingswerkstation (serie II)



## C.6 Het systeem testen na vervoer

### C.6.1 Bedieningselementen mobiele systeem en functionele tests

Voer de controles en de functionele tests uit om de mechanische integriteit van een mobiel systeem te testen. Raadpleeg [De functionele tests uitvoeren](#) op pagina 41.

- Compressieapparaat omhoog/omlaag
- Compressievrijgave
- Rotatie van C-arm
- C-arm omhoog/omlaag
- Collimatoroverbrugging
- Lichtveldlamp
- Paddlesysteem verschuiven
- Nooduitschakelingsschakelaars

Als het mobiele systeem is verplaatst, moeten de controles en functionele tests altijd worden uitgevoerd.

### C.6.2 Kwaliteitscontrole voor mobiele systemen

Voer de volgende kwaliteitscontroletests uit om de werkingsintegriteit van een mobiel systeem te controleren:

- Artefactevaluatie
- SNR/CNR-meting
- Beoordeling fantoombeeld
- Compressiedikte

Voer de kwaliteitscontroletests altijd uit nadat het mobiele systeem is verplaatst.



## Bijlage D Dosisinformatie

### D.1 EUREF-dosistabellen



#### Opmerkingen

Deze informatie is alleen van toepassing voor de Europese Unie.

De volgende waarden zijn de waarden voor de standaard dosistabellen.

In de volgende tabellen staan de gangbare dosiswaarden bij gebruik van het systeem in 2D- en BT-beeldvormingsmodi. Alle dosiswaarden hebben een tolerantie van  $\pm 30\%$ . De tabellen volgen de procedures die worden beschreven in de *European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, Fourth edition: section 2a.2.5.1 Dosimetry, and Appendix 5: Procedure for determination of average glandular dose*.

Tabel 28: 2D Dose (EUREF)

Fantoom	cm	kV	Anode	Filter	EUREF-dosis (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	25	W	0,05 mm Rh	0,55
3,0 cm PMMA	3,2	26	W	0,05 mm Rh	0,75
4,0 cm PMMA	4,5	28	W	0,05 mm Rh	1,05
4,5 cm PMMA	5,3	29	W	0,05 mm Rh	1,42
5,0 cm PMMA	6	31	W	0,05 mm Rh	2
6,0 cm PMMA	7,5	31	W	0,05 mm Ag	2,7
7,0 cm PMMA	9	34	W	0,05 mm Ag	3,1

Tabel 29: BT-dosis (EUREF)

Fantoom	cm	kV	Anode	Filter	EUREF-dosis (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26	W	0,7 mm Al	1
3,0 cm PMMA	3,2	28	W	0,7 mm Al	1,15
4,0 cm PMMA	4,5	30	W	0,7 mm Al	1,5
4,5 cm PMMA	5,3	31	W	0,7 mm Al	2,00
5,0 cm PMMA	6	33	W	0,7 mm Al	2,5
6,0 cm PMMA	7,5	36	W	0,7 mm Al	3,9
7,0 cm PMMA	9	42	W	0,7 mm Al	5,15

Tabel 30: CEDM-dosis (EUREF)

Fantoom	cm	kV	Anode	Filter	EUREF-dosis (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	0,83
3,0 cm PMMA	3,2	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,1
4,0 cm PMMA	4,5	28/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,6
4,5 cm PMMA	5,3	29/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	2,1
5,0 cm PMMA	6	31/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	3,0
6,0 cm PMMA	7,5	32/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,1
7,0 cm PMMA	9	33/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,7

## D.2 EUREF CNR-tabel



### Opmerkingen

Deze informatie is alleen van toepassing voor de Europese Unie.

De volgende waarden zijn de waarden voor de standaard dosistabellen.

De volgende tabel toont de gangbare CNR-waarden wanneer het systeem met de Hologic Clarity HD® of 15-projectie BT-beeldvormingsmodus op de standaardresolutie wordt uitgevoerd. Alle CNR-waarden hebben een tolerantie van  $\pm 25\%$ . De gegevens in de tabel zijn verkregen door de in het *European Protocol for the Quality Control of the Physical and Technical Aspects of Digital Breast Tomosynthesis Systems*: paragraaf **2.4 AEC Performance** vermelde procedure te volgen.

Fantoom	Hologic Clarity HD	Standaardresolutie
2,0 cm PMMA	3,2	6,0
3,0 cm PMMA	2,5	4,7
4,0 cm PMMA	2,1	4,0
4,5 cm PMMA	2,1	4,0
5,0 cm PMMA	2,0	3,7
6,0 cm PMMA	1,9	3,5
7,0 cm PMMA	1,6	2,9

## Bijlage E Lijst met licenties en accessoires

Het-systeem is compatibel met de volgende licenties en accessoires:

*Tabel 31: Licenties en accessoires*

	<b>Beschrijving</b>
1	C-View-software
2	Genius AI Detection-software
3	Hologic Clarity HD-beeldtechnologie
4	Intelligente 2D-beeldtechnologie
5	3DQuorum-beeldtechnologie
6	I-View-software
7	Smartcurve-borststabilisatiesysteem
8	Advanced Workflow Manager
9	Affirm®-borstbiopsie-geleidesysteem
10	Paddles voor routinescreening
11	Contact- en spot-compressiepaddles
12	Vergrotingspaddles
13	Lokalisatiepaddles
14	Echografiepaddle
15	Gezichtsscherm voor patiënt
16	Vergrotingsstandaard
17	Lokalisatieapparaat met dradenkruis
18	Vergrotingsapparaat met dradenkruis
19	Verwervingswerkstations
20	MammoPad-borstkussen



## Verklarende woordenlijst

### **Aantekeningen**

Grafische afbeeldingen of tekstmarkeringen op een beeld om een te onderzoeken locatie te tonen

### **ACR**

American College of Radiology

### **AEC**

Autom. belichtingsregelaar (Automatic Exposure Control)

### **Beeldreceptor**

Combinatie van de röntgendetector, raster ter vermindering van röntgenstroostraling en afdekking van koolstofvezel

### **BT**

Borsttomosynthese. Een beeldvormingsprocedure die informatie over de borst biedt in drie dimensies

### **CEDM**

Contrastversterkte digitale mammografie

### **Collimator**

Een hulpmiddel op de röntgenbuis waarmee de het belichtingsgebied van de röntgenbundel wordt geregeld

### **Conventionele mammografie**

Röntgenopnamen op basis van één projectie van weergaven voor screenings- en diagnostische doeleinden

### **C-weergave**

Een gelicentieerde Hologic-functie waarmee een digitaal mammografiebeeld (DM) wordt gegenereerd op basis van gegevens die tijdens een borsttomosynthesescan (BT) zijn verworven

### **DBT**

Digitale borsttomosynthese

### **DICOM**

Digitale beeldvorming en communicatie op medisch gebied (Digital Imaging and Communications in Medicine)

### **DM**

Digitale mammografie (2D)

### **EMC**

Elektromagnetische compatibiliteit

### **FAST-paddle**

Paddle met volledig automatische zelfregelende kanteling (Fully Automatic Self-Adjusting Tilt Paddle)

### **FDA**

Food and Drug Administration (in de Verenigde Staten)

### **In behandeling**

De handeling die is uitgevoerd op het beeld om het beeld te markeren als de technoloog de beeldkwaliteit niet positief beoordeelt (beelden in behandeling moeten worden geaccepteerd of geweigerd voordat de procedure wordt gesloten)

### **Intelligent 2D**

Een gelicentieerde Hologic-functie waarmee een digitaal mammografiebeeld (DM) met hoge resolutie wordt gegenereerd op basis van gegevens die tijdens een borsttomosynthesescan (BT) met hoge resolutie zijn verworven

### **I-View**

Een gelicentieerde functie voor 2D contrastversterkte digitale mammografie

### **Melding**

Annotaties en opmerkingen per beeld die worden gecommuniceerd tussen werkstations voor diagnostische beoordeling, werkstations voor technologen en verwervingswerkstations

### **MPPS**

Door modaliteit uitgevoerde procedurestap (Modality Performed Procedure Step)

### **MQSA**

Mammography Quality Standards Act

### **PACS**

Beeldarchiverings- en communicatiesysteem (Picture Archiving and Communications System). Een computer- en netwerksysteem dat digitale medische beelden overdraagt en archiveert

### **Projectiebeeld**

Eén van een groep borsttomosynthesebeelden die onder verschillende projectiehoeken zijn gemaakt en dat wordt gebruikt om het definitieve gereconstrueerde beeld te produceren

### **Raster**

Een element in de digitale beeldreceptor dat strooistraling vermindert tijdens de belichting

### **RF**

Radiofrequentie

### **ROI**

Te onderzoeken locatie (Region of Interest)

### **SID**

Afstand van bron tot beeld (Source to Image Distance)

### **Tomosynthese**

Een beeldvormingsprocedure die een aantal beelden van de borst combineert die onder verschillende hoeken zijn gemaakt. De tomosynthesebeelden kunnen worden gereconstrueerd om focale vlakken (plakken) in de borst te tonen.

### **UDI**

Een programma van de Amerikaanse Food and Drug Administration voor unieke apparaatidentificatie (Unique Device Identification (UDI)). Ga voor meer informatie over UDI naar

<http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/UniqueDeviceIdentification/UDIBasics/default.htm>.

### **UPS**

Ononderbreekbare stroomvoorziening (Uninterruptible Power Supply)

### **USB**

Universele seriële bus

### **Vrijmaken**

Automatische verwijdering van patiëntbeelden en bijbehorende informatie om de opslag van nieuwe patiëntbeelden mogelijk te maken



# Index

## A

- aan/uit-knop • 31
- aan/uit-knop computer • 31
- accessoires
  - apparaten met dradenkruis • 125
  - gezichtsschermen • 114
  - installeren op C-arm • 113
  - vergrotingsstandaard • 123
- scherm Admin (Beheer)
  - knop Admin (Beheer) • 67
- afgewezen beelden accepteren • 91
- afmelden • 67
- archiveren • 82
- automatisch hangen, automatisch koppelen • 150
- Automatische belichtingsregelaar
  - knoppen • 33
  - sensorpositie • 33

## B

- bedieningselementen
  - C-arm • 35
  - compressie • 35
  - handwielen • 33
  - indicatoren • 31
  - systeem • 31
  - voetschakelaars, AWS • 35
- beeld in behandeling, accepteren of afwijzen • 91
- beelden
  - beoordelingshulpmiddelen • 78
  - uitvoeropties • 103
  - verwervingsmodus • 88
- beelden naar uitvoer sturen • 103
- beheren
  - uitvoergroepen • 79
- beoordeling
  - afgewezen beeld • 91
- berichten en waarschuwingen • 179
- bewerken
  - patiëntinformatie • 62
- Bijlage E Accessoires • 193
- blootstelling
  - parameters • 88

- technieken, set • 88
- buiskop, display • 33

## C

- C-arm
  - gleuven voor accessoires • 113
- compressie
  - bedieningselementen en -displays • 33
  - FAST-compressiemodus • 122
  - specificaties • 173
- compressiekracht, bereik • 33
- contactpaddles • 119
- contrastinstellingen • 109
- conventioneel gezichtsscherm, installeren • 116
- cybersecurity-verklaring • 14

## D

- display
  - compressiekracht • 33
  - dikte • 33
  - schoon • 140
- dosisinformatie • 191
  - EUREF-dosistabellen • 191

## F

- FAST-compressiemodus • 122
- filter, informatie-opties • 65
- filtertabblad • 65
  - andere functies • 65
- fouten • 179
- functionele tests • 41
  - nooduitschakelingsschakelaar • 53

## G

- gebruikersinterface • 55
- gebruikersprofielen • 11
- gegevensverlies • 21
- generatortabblad, set technieken • 88
- gezichtsscherm • 114

## I

- indicatoren • 31
- installeren
  - compressiepaddles • 121

- conventioneel gezichtsscherm • 116
- intrekbaar gezichtsscherm • 114
- lokalisatieapparaat met dradenkruis • 125
- vergrotingsapparaat met dradenkruis • 126
- vergrotingsstandaard • 124

Intelligent 2D • 6

intrekbaar gezichtsscherm

- gebruik • 115
- installeren • 114

I-View

- Instellingen I-View • 109

## K

- klinische procedures • 131
- knop voor Implantaat aanwezig • 69
- kwaliteitsbewakingsvereisten • 12

## L

- laserfilmprinter, isolatievereisten • 21
- lichtveldlamp
  - gebruik • 133
- lokalisatie van naald • 135
- lokalisatieapparaat met dradenkruis
  - gebruik • 126
  - installeren en verwijderen • 125
  - uitlijnen • 127
- lokalisatiepaddles • 120

## M

- MammoPad • 128
- MLO-rotatie • 50
- mobiel systeem
  - specificaties • 184
  - testen na vervoer • 189
  - veiligheid • 183

## N

- noodzakelijke voorwaarden voor gebruik van systeem • 11

## O

- onderhoud
  - algemeen • 139

- ononderbreekbare stroomvoorziening (Uninterruptible Power Supply) • 182
- op verzoek, uitvoer • 82

## P

paddles

- compressie • 119
- installeren • 121
- naar nieuwe positie verschuiven • 69
- verwijderen • 121

paddleverschuiving • 69

paddleverschuiving, knoppen • 33

patiënt

- filter • 65
- gezichtsscherm • 114
- informatie bewerken • 62
- openen • 61
- positie • 133
- toevoegen • 61
- verwijderen • 64

patiënt verwijderen • 64

patiëntprocedure openen • 61

## S

schermen

- filter patiëntinformatie • 65
- nieuwe patiënt toevoegen • 61
- uit te voeren functie selecteren • 55
- zoeken • 67

selecteren

- belichtingsparameters • 88
- uitvoergroepen • 79

specificaties • 167

- elektrisch • 171

spot-compressiepaddles • 119

stralingsveiligheid • 21

stroomonderbreker

- Gantry • 31

systeem

- bedieningselementen voor voeding • 31
- beheer • 145
- berichten • 180
- mogelijkheden • 4

systeem uitschakelen • 53

**T**

- tabblad Cine • 102
- tabblad met opmerkingen • 102
- tabblad Notices (Meldingen) • 102
- Tabblad ROI • 102
- tabbladen
  - filter, kolom • 65
- Technische ondersteuning van Hologic • 139
- toevoegen
  - nieuwe patiënt • 61
- trainingsvereisten • 12

**U**

- uitvoer, op verzoek • 82
- uitvoerapparaten
  - uitvoergroepen • 103
- uitvoergroepen, beheren • 103
- uitvoergroepen, selecteren • 79

**V**

- veiligheid
  - algemene informatie • 20, 21
  - apparaatbeschadiging • 21
  - gegevensverlies • 21
  - straling • 21
- vereisten
  - benodigde vaardigheden • 11
  - kwaliteitsbewaking • 12
  - opleiding • 12
- vergrotingsapparaat met dradenkruis, installeren
  - en verwijderen • 126
- vergrotingspaddles • 119
- Vergrotingsstandaard • 123
  - installeren en verwijderen • 124
- verklaring, cybersecurity • 14
- verwervingsmodi • 88
- Verwervingswerkstation
  - onderhoud • 140
- verwijderen
  - compressiepaddles • 121
  - conventioneel gezichtsscherm • 116
  - intrekbaar gezichtsscherm • 114
  - lokalisatieapparaat met dradenkruis • 125
  - vergrotingsapparaat met dradenkruis • 126

- vergrotingsstandaard • 124

- voetschakelaars, AWS • 35

**W**

- waarschuwingen • 179
- waarschuwingen, aandachtspunten en opmerkingen
  - gedefinieerd • 2
- waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en aantekeningen • 21
- werklijst, zoeken • 67
- werkstroom, standaard • 131

**Z**

- zoeken in werkljst • 67

# HOLOGIC®



**Hologic, Inc.**  
600 Technology Drive  
Newark, DE 19702 USA  
1.800.447.1856

**Australia**

**Hologic (Australia & New Zealand) Pty Ltd**  
Level 3, Suite 302  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park, NSW 2113  
Australia  
1.800.264.073

**EC REP**

**Hologic BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32.2.711.46.80  
Fax: +32.2.725.20.87

**CE**  
**2797**