

# Faxitron® Path+

Sistema de radiografia de espécimes



## GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

### 1. ATIVAÇÃO

- Certifique-se de que o interruptor de energia na parte posterior do gabinete do Faxitron Path+ esteja na posição **ON** (ligado)
- Gire a **chave** na frente do gabinete do Faxitron Path+ para **on** (ligado)
- Gire o monitor para **on** (ligado) *(se necessário)*

### 2. INICIAR SOFTWARE

- Verifique se não há nada na câmara de raios X do Faxitron Path+
- Clique duas vezes no ícone do **Vision** no centro da área de trabalho e digite a senha

### 3. CALIBRAR

- Você será solicitado a calibrar depois de fazer o login. Pressione o botão **"Calibrate"** (Calibrar) para prosseguir

### 4. DADOS DO PACIENTE

- Inicie o procedimento
- Selecione a partir da lista de trabalho
- Localize o nome do paciente e clique duas vezes nele
- Preencha os campos obrigatórios em falta, tais como Laterality (Lateralidade)
- **"Accept"** (Aceitar)

### 5. GERAÇÃO DE IMAGENS EM RAIOS X

- Coloque o(s) espécime(s) na câmara de raios X do Faxitron Path+; use a bandeja de ampliação, se desejar
- Pressione o botão verde **"X-ray"** (Raios X) para ativar os raios X; a imagem aparecerá após alguns segundos

### 6. MANIPULAÇÃO DE IMAGENS

- Segure o **botão esquerdo do mouse** e arraste o mouse para mudar o brilho e o contraste para a função de janela/nível
- **Ajuste o zoom** para ampliar a imagem para visualização

### 7. ARMAZENAMENTO EM PACS

- Escolha o botão **"PACS Store"** (Armazenamento em PACS) no lado esquerdo da tela

### 8. IMPRESSÃO

- Escolha o botão **"PACS Print"** (Impressão em PACS) no lado esquerdo da tela

### 9. DESLIGAMENTO

- Selecione o botão **"System Shutdown"** (Desligamento do sistema) no lado esquerdo e depois clique em **"OK"**
- Gire a **chave** no gabinete do Faxitron Path+ para **off** (desligado)

 [www.hologic.com/package-inserts](http://www.hologic.com/package-inserts)



**Hologic, Inc.**  
600 Technology Drive  
Newark, DE 19702 EUA  
1.800.447.1856  
[www.hologic.com](http://www.hologic.com)



**Hologic, BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Bélgica  
Tel.: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87

#### PATROCINADOR NA AU

**Hologic Pty Ltd**  
Suite 302, Level 3  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113  
Tel.: 02 9888 8000



Sistema Faxitron Path+, conhecido também como Sistema PathVisionXL.

MAN-10247-2300 Rev. 001 (7/23) Hologic Inc. ©2023 Todos os direitos reservados. Hologic, Path+, PathVisionXL, Faxitron e The Science of Sure são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Hologic, Inc. e/ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. Estas informações são destinadas a profissionais médicos nos EUA e outros mercados e não se destinam a solicitação ou promoção de produtos onde tais atividades são proibidas. Como os materiais da Hologic são distribuídos através de sites, eBroadcasts e feiras, nem sempre é possível controlar onde esses materiais aparecem. Para obter informações específicas sobre os produtos disponíveis para venda em um determinado país, entre em contato com o representante local da Hologic ou escreva para [womenshealth@hologic.com](mailto:womenshealth@hologic.com).