

Horizon®



Horizon® Knochendensitometrie-System Benutzerhandbuch

MAN-04871-802 Revision 013

HOLOGIC®

Horizon[®]

Knochendensitometrie-System

Benutzerhandbuch

Teilenummer: MAN-04871-802
Revision 013

August 2020

Achtung: Gemäß US-Gesetzgebung darf dieses Gerät nur durch einen Arzt oder auf dessen Anweisung vertrieben werden.

Kundendienst

Gebührenfrei in den USA: +1.800.321.4659

E-Mail: SkeletalHealth.Support@hologic.com

In Europa, Südamerika oder Asien wenden Sie sich an Ihren Händler oder das Vertriebsunternehmen vor Ort.

© 2016 - 2020 Hologic, Inc. Gedruckt in den USA. Die Originalsprache dieses Handbuchs ist Englisch.

Hologic, Advanced Body Composition, APEX, Horizon, QDR und die entsprechenden Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt ist u. U. durch eines oder mehrere US-amerikanische oder ausländische Patente geschützt. Angaben hierzu finden Sie unter www.Hologic.com/patent-information.

Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht.....	1
1.1 Gebrauchshinweise	1
1.1.1 APEX-Indikationen.....	1
1.1.2 IVA-Indikationen	1
1.1.3 Indikationen zur Körperzusammensetzung.....	1
1.1.4 Viszeralfett-Software	2
1.1.5 10-Jahres-Frakturrisiko.....	3
1.1.6 Indikationen zur Hüften-Strukturanalyse.....	3
1.1.7 Indikationen für die SE (Single Energy)-Oberschenkeluntersuchung.....	3
1.2 Kontraindikationen	3
1.3 IEC-Vorschriften.....	3
1.4 Warn- und Sicherheitshinweise	4
1.4.1 EMI.....	4
1.4.2 Zubehör	4
1.4.3 Achtung.....	4
1.5 Etiketten	5
1.6 Symbole	8
1.7 Supportunterlagen	8
1.7.1 QDR-Referenzhandbuch.....	8
1.7.2 Onlinehilfe.....	9
1.7.3 Handbuch – Technische Daten der QDR-Serie	9
1.7.4 QDR Internet-Sicherheitsinformationen.....	9
1.8 Hauptfenster	9
1.8.1 Funktionen im Hauptfenster.....	9
2 Starten und Herunterfahren des Systems	10
2.1 Hochfahren des Systems	10
2.2 Herunterfahren des Systems.....	10
3 Verfahren zur Qualitätskontrolle	11
3.1 Systemtest.....	11
3.2 Automatische QK	11
3.3 Automatische Kalibrierung der Option „Körperzusammensetzung“	12
4 Patientendatensätze.....	12
4.1 Abrufen eines Patientendatensatzes.....	12
4.2 Anlegen eines Patientendatensatzes.....	12
4.3 Bearbeiten eines Patientendatensatzes.....	13
4.4 Verwenden der Worklist zum Laden eines Patientendatensatzes.....	13

4.5 Bestätigung der Patienteninformationen	13
4.5.1 Biografische Angaben.....	14
4.5.2 Untersuchungsinformationen	14
5 Durchführen einer Untersuchung	14
5.1 Patientenbefragung	14
5.2 Patientenvorbereitung	15
5.3 Patientenauswahl	15
5.4 Auswählen des Messungstyps	16
5.5 Durchführung einer Messung	16
6 Manuelle Messungsanalyse.....	16
6.1 Schaltflächen für Analyseschritte.....	16
6.2 Toolboxen	18
6.2.1 Toolbox „Knochenmarkierung“	19
6.2.2 Toolbox „Linien“ (Wirbelsäule).....	19
6.2.3 Toolbox „Neck“ (Hüfte).....	19
6.2.4 Toolbox „Ergebnisse“ (Ganzkörper).....	20
6.2.5 Toolbox „Unterbereich“	20
6.2.6 Toolbox-Steuerelemente	21
6.3 Steuerelement Helligkeit/Kontrast.....	22
7 AP-Untersuchung der Lendenwirbelsäule	22
7.1 Positionieren des Patienten.....	22
7.2 Positionieren des C-Bogens.....	23
7.3 Starten der AP-Lendenwirbelsäulenmessung.....	24
7.3.1 Neupositionieren der Messung (falls erforderlich)	24
7.4 Analysieren der Messung.....	25
7.4.1 Automatische One-Time [™] -Analyse	26
7.5 Beenden der Analyse	26
7.6 Erstellen und Drucken von Berichten	26
8 Hüftuntersuchung	27
8.1 Positionieren des Patienten für Hüftuntersuchungen links, rechts und Dual-Hip	27
8.2 Positionieren des C-Bogens.....	29
8.2.1 Tipps zur Bestimmung des Trochanter major	29
8.2.2 Linke oder rechte Hüfte ohne Autopositionierung für Hüftmessungen.....	29
8.2.3 Linke oder rechte Hüfte mit Autopositionierung für Hüftmessungen	29
8.2.4 Dual-Hüfte	30
8.3 Starten der Hüftmessung	31
8.3.1 Neupositionieren der Messung	31
8.3.2 Neupositionieren des Patienten.....	32
8.3.3 Weitere Schritte einer Dual-Hip-Messung.....	32

8.4 Analysieren der Messung.....	33
8.4.1 Automatische One-Time-Analyse	33
8.5 SE (Single Energy) Oberschenkeluntersuchung	34
8.5.1 Positionierung für die SE-Oberschenkelmessung.....	34
8.5.2 Positionierung für die SE-Oberschenkelmessung nach einer Hüftmessung	35
8.5.3 Starten der SE-Oberschenkelmessung	36
8.5.4 Analyse der SE-Oberschenkelmessung	36
8.5.5 Visuelle Bewertung.....	36
8.5.6 Toolbox „Bild“	37
8.5.7 Registerkarte „Analysis Tools (Analyse-Tools)“	37
8.5.8 Bewertung.....	38
8.6 Referenzen	41
8.6.1 Dual-Hip-Messungen.....	41
8.7 Erstellen und Drucken von Berichten	41
9 Unterarmuntersuchung.....	42
9.1 Messen des Unterarms des Patienten.....	42
9.2 Positionieren des Patienten.....	42
9.2.1 Positionieren des Patienten für die Unterarmuntersuchung in Rückenlage	44
9.3 Positionieren des C-Bogens.....	46
9.4 Starten der Unterarmmessung	46
9.4.1 Neupositionieren der Messung (falls erforderlich)	47
9.4.2 Neupositionierung des Patienten (falls erforderlich).....	48
9.5 Analysieren der Messung.....	48
9.5.1 Eingeben der Länge des Unterarms	48
9.5.2 Definieren der globalen ROI	48
9.5.3 Anzeigen der Knochenmarkierung.....	49
9.5.4 Überprüfen des Mittellinien-/UD-Bereichs	50
9.6 Anzeigen der Ergebnisse.....	51
9.7 Beenden der Analyse	51
9.8 Erstellen und Drucken von Berichten	51
10 Ganzkörperuntersuchung	52
10.1 Körperzusammensetzungsanalyse	52
10.2 Positionieren des Patienten	53
10.3 Starten der Ganzkörpermessung	53
10.4 Fächerstrahlanalyse – Ganzkörper.....	54
10.5 Analysieren der Messung.....	54

10.5.1 Körperzusammensetzungsanalyse.....	55
10.5.2 Standardplatzierung von Ganzkörperbereichen.....	55
10.5.3 Anpassung der A/G-Bereiche (falls erforderlich).....	58
10.5.4 Viszerales Körperfettgewebe	59
10.5.5 Anpassung der VAT-Bereiche (falls erforderlich).....	60
10.5.6 VAT-Referenzen.....	62
10.6 Anzeigen der Ergebnisse.....	63
10.6.1 Lineale.....	63
10.7 Beenden der Analyse	64
10.8 Benutzerdefinierte Unterbereiche	65
10.9 Beheben asymmetrischer Ergebnisse durch Reflexion	65
10.10 NHANES BCA aktivieren	66
10.11 Erstellen und Drucken von Berichten	66
11 AP/Laterale Wirbelsäulen-BMD-Untersuchung in Rückenlage (Horizon A).....	67
11.1 Sicherheitsfunktion des Tisches	67
11.2 Positionierung für die AP/Lateralmessung	67
11.3 Starten der AP-Messung.....	68
11.4 Analysieren der AP-Messung.....	68
11.5 Starten der lateralen Messung	69
11.6 Analysieren der lateralen Messung	69
11.6.1 Definieren der globalen ROI	70
11.6.2 Anpassen der Vertebral-Grenzen	70
11.6.3 Anpassen der Wirbelkörper	71
11.6.4 Anzeigen der Knochenmarkierung.....	72
11.6.5 Anpassen der Mittelbereiche.....	72
11.7 Anzeigen der Ergebnisse.....	72
11.8 Beenden der Analyse	73
11.9 Erstellen und Drucken von Berichten	73
12 Dekubitus-Lateral-Wirbelsäulen-BMD-Untersuchung	73
12.1 Durchführen und Analysieren der AP-Messung	73
12.2 Positionieren des Patienten für die laterale Dekubitus-Messung	73
12.3 Positionieren des C-Bogens für die laterale Dekubitus-Messung.....	74
12.4 Starten der lateralen Dekubitus-Messung	75
12.4.1 Neupositionieren der Messung (falls erforderlich)	75
12.5 Analysieren der Messung.....	76
12.5.1 Definieren der globalen ROI	76
12.5.2 Anpassen der Vertebral-Grenzen	77

12.5.3 Anpassen der Wirbelkörper	78
12.5.4 Anzeigen der Knochenmarkierung	78
12.6 Anzeigen der Ergebnisse	79
12.7 Beenden der Analyse	79
12.8 Erstellen und Drucken von Berichten	79
13 IVA-, IVA HD-Bildaufnahmen auf einem Horizon-System C oder W; IVA-Bildaufnahme auf dem Horizon-System Ci oder Wi.....	80
13.1 Auswählen des Messungstyps	80
13.2 Positionieren des Patienten für die AP-IVA-Aufnahme.....	80
13.3 Starten der AP-IVA-Aufnahme	81
13.4 Positionieren des Patienten und des C-Bogens für die laterale IVA-Aufnahme	81
13.5 Starten der lateralen IVA-Aufnahme.....	82
13.6 IVA-Analyse einer lateralen IVA-Aufnahme	83
14 IVA- und IVA HD-Bildaufnahmen auf einem Horizon-System A	83
14.1 Positionieren des Patienten	83
14.2 Auswählen des Messungstyps	84
14.3 Starten der AP-IVA-Aufnahme	84
14.4 Starten der lateralen IVA-Aufnahme.....	85
14.5 IVA-Analyse einer lateralen IVA-Aufnahme	86
15 IVA mit BMD-Untersuchung	86
15.1 Positionieren des Patienten	86
15.2 Auswählen des Messungstyps	86
15.3 Durchführen der AP-IVA-Aufnahme	87
15.4 Durchführen und Analysieren der AP-BMD-Aufnahme	87
15.5 Durchführen der lateralen BMD-Aufnahme	87
15.6 Durchführen der lateralen IVA-Aufnahme	87
15.7 IVA-Analyse	87
16 IVA-Analyse	88
16.1 Viewer-Fenster, linkes Teilfenster.....	88
16.2 Viewer-Fenster, mittleres Teilfenster.....	89
16.3 Viewer-Fenster, rechtes Teilfenster.....	89
16.4 Viewer-Fenster, linkes Teilfenster, Registerkarte „Grafik-Tools“	90
16.5 Viewer-Fenster, linkes Teilfenster, Registerkarte Analysis Tools (Analyse-Tools).....	90
16.6 Bildsteuerelemente	93
16.7 DE-Messung	93
17 Auswerten des IVA-Bildes.....	94

18 Marker	97
18.1 Verwenden von Markern	98
18.1.1 Spiegeln des Bildes	98
18.1.2 Hinzufügen von Markern.....	98
18.1.3 Auswählen von Markern.....	99
18.2 Ergebnisblock.....	100
18.2.1 Ergebnisblock für laterale IVA-Aufnahmen.....	100
18.2.2 Ergebnisblock für AP-IVA-Aufnahmen	101
18.3 Drucken.....	102
18.3.1 Bericht drucken	102
18.3.2 Bild drucken.....	102
19 Vergleichs- und Folgemessungen.....	103
19.1 Wiederherstellen einer Basis- oder vorherigen Messung.....	103
19.2 Auswerten der Basis- oder vorherigen Messung	103
19.3 Ausführen der Folgemessung	103
19.4 Analysieren der Folgemessung mithilfe der Vergleichsanalyse	103
19.5 Erstellen des Änderungsratenberichts	104
20 Berichte	104
20.1 Berichtinformationsblöcke	105
20.2 Bearbeiten von Kommentaren.....	105
20.3 Änderungsratenbericht.....	106
20.3.1 Entfernen von Sternchen (*) und Rautenzeichen (#) aus Berichten.....	106
20.3.2 Erstellen von Hüftpaaren für Dual-Hip-Änderungsratenberichte.....	106
20.4 Körperzusammensetzungsberichte	107
20.4.1 BCA-Ergebnisse.....	107
20.4.2 BCA-Änderungsratenberichtsergebnisse.....	109
20.4.3 Körperzusammensetzungsberichte und Referenzdatenbankvergleiche.....	110
20.5 Pädiatrieberichte.....	112
20.6 DICOM-Bericht.....	113
20.6.1 Eingeben von Zugangsnummern und benutzerdefinierten Einträgen	114
20.6.2 Anzeigen der Vorschau eines DICOM-Berichts.....	114
20.6.3 Drucken eines DICOM-Berichts	114
20.6.4 Speichern eines DICOM-Berichts	114
20.6.5 Senden eines DICOM-Berichts.....	115
20.6.6 Sortieren der Messungsliste	115
20.6.7 Anzeigen der Warteschlange	115
20.6.8 Schließen eines DICOM-Berichts.....	115
20.7 DxReport.....	115
20.7.1 Erstellen eines DxReports.....	115

21 Auswerten der Ergebnisse.....	116
21.0.1 Über FRAX.....	117
21.0.2 FRAX-Einschränkungskriterien.....	118
21.0.3 Informationen zum 10-Jahres-Frakturrisiko – Alle Länder	119
21.0.4 FRAX-Risikofaktoren	120
21.0.5 Referenzen.....	121
22 Archivieren von Messungen.....	121
23 Suchen von Messungen	121
24 Wiederherstellen von Messungen	122
25 Kopieren von Messungen	122
26 Abfragen/Laden von Messungen.....	122
27 Durchführen der Systemsicherung	123
28 Reinigen des Systems.....	123
28.1 Reinigen der QDR- und Computerkomponenten	123
28.2 Reinigen der Tischoberfläche.....	123
28.3 Desinfizieren der Tischoberfläche.....	124
28.4 Entfernen von verschütteten Flüssigkeiten	125
29 Notfallmaßnahmen	125
29.1 Stromausfall.....	125
29.1.1 Beenden der Arbeit.....	125
29.2 Ausfall während des Betriebs	126
29.3 Stromausfall.....	127
30 Flächendosisprodukt-Messgerät.....	127
30.1 Ein- und Ausschalten des DAP-Messgeräts	127
31 Dienstprogramme	127
31.1 Systemkonfiguration.....	128
31.2 Verwendung.....	128
31.3 Datenbank-Tools.....	128
31.3.1 Patientenverwaltung	128
31.3.2 Export	128
31.3.3 Von Medium importieren.....	128
31.3.4 Abstimmen.....	128
31.3.5 Patientenrückruf	128
31.3.6 Dienstprogramm für die automatische Basismessung.....	128
31.4 Messdateiansicht	129
31.5 Diagramm der Messdatei	129
31.6 Notsteuerung	129

31.7 AP-Neupositionierung	129
31.8 Interne Dienstprogramme.....	129
31.9 Service-Dienstprogramme.....	129
31.10 Referenzkurve	129
31.10.1 Editor	129
31.10.2 Ethnische Gruppe hinzufügen.....	129
31.10.3 Wiederherstellen	129
31.11 Archivindex neu erstellen	130
31.12 Optionen installieren.....	130
32 Referenzkurve	131
32.1 Starten des Referenzkurveneditors.....	131
32.2 Anzeigen der Referenzkurvendaten.....	132
32.3 Erstellen neuer Referenzkurvendatensätze	132
32.4 Kopieren eines Referenzkurvendatensatzes.....	135
32.5 Bearbeiten von Referenzkurvendatensätzen.....	136
32.6 Löschen von Referenzkurvendatensätzen.....	137
32.7 Hinzufügen neuer ethnischer Gruppen.....	137
32.8 Wiederherstellen einer Referenzkurvendatenbank.....	138
33 DICOM-Option	139
34 Konfigurieren der DICOM-Option.....	139
34.1 Registerkarten zur DICOM-Konfiguration.....	139
34.2 Modalitäten-Worklist.....	140
34.2.1 Konfigurieren der Modalitäten-Worklist	140
34.3 Abfrageparameter	141
34.4 Intervall für automatische Abfrage.....	142
34.5 Wiederholungsparameter für Abfrage.....	142
34.6 Löschintervall.....	143
34.7 Eingabe aus Datei	144
34.8 Worklist-Anbieter.....	145
34.8.1 Worklist-Anbieter-Schnittstelle	145
34.8.2 Worklist-Anbieter-Steuerelemente.....	145
34.9 Worklist-Felder abgleichen	147
34.10 DICOM Send-Ziele.....	148
34.10.1 Dialog „Add / Edit DICOM Send Destination Dialog (DICOM Send-Ziel hinzufügen/ bearbeiten)“	151
34.10.2 DICOM Send konfigurieren	154

34.11 DICOM Storage Commitment-Ziele.....	155
34.11.1 DICOM Send-Ziele konfigurieren.....	155
34.11.2 Dialog „Add / Edit Storage Commitment Destination (Storage Commitment-Ziel hinzufügen/bearbeiten)“	157
34.11.3 Storage Commitment konfigurieren	158
34.12 DICOM Abfrage-/Ladeziele.....	159
34.12.1 Der Dialog „DICOM-Abfrage-/Ladeziel hinzufügen/bearbeiten“	161
34.12.2 Abfragen/Laden konfigurieren.....	161
34.13 Host	162
35 Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu FRAX	164

Liste der Abbildungen

Abbildung 1: Horizon-Hauptfenster.....	9
Abbildung 2: Position des Wirbelsäulen-Phantoms	11
Abbildung 3: AP Lendenwirbelsäule – Positionierung	23
Abbildung 4: Beinposition	23
Abbildung 5: AP Lendenwirbelsäule.....	24
Abbildung 6: Neupositionierung der Wirbelsäule	25
Abbildung 7: AP Lendenwirbelsäulenanalyse	26
Abbildung 8: Positionierung der linken Hüfte ohne Hüft-Autopositionierung	27
Abbildung 9: Positionierung der rechten Hüfte ohne Hüft-Autopositionierung	28
Abbildung 10: Fußpositionierung (Dual Hip-Messung).....	28
Abbildung 11: Positionierung der linken Hüfte mit Hüft-Autopositionierung.....	30
Abbildung 12: Neupositionierung der Hüfte	32
Abbildung 13: Ordnungsgemäß durchgeführte Hüftmessung	33
Abbildung 14: Positionierung für linke SE-Oberschenkelmessung	34
Abbildung 15: Messen des linken Unterarms.....	42
Abbildung 16: Positionierung des linken Unterarms	43
Abbildung 17: Laserposition auf linkem Arm	43
Abbildung 18: Positionierung des rechten Unterarms.....	44
Abbildung 19: Laserposition auf rechtem Arm.....	44
Abbildung 20: Patient Ein/Aus-Position für linken Unterarm in Rückenlage.....	45
Abbildung 21: Patientenposition für linken Unterarm in Rückenlage	45
Abbildung 22: Patientenposition für rechten Unterarm in Rückenlage	46
Abbildung 23: Neupositionierung des Unterarms	47
Abbildung 24: Unterarm-ROI	49
Abbildung 25: Unterarm-Knochenmarkierung.....	50
Abbildung 26: Unterarm-Mittellinie/UD	51
Abbildung 27: Ganzkörperpositionierung.....	53
Abbildung 28: Ganzkörperanalyse (Horizontale Linien und Linien des unteren Beckens)	56
Abbildung 29: Ganzkörperanalyse (Vertikale Linien)	57

Abbildung 30: A/G-Bereiche	59
Abbildung 31: VAT-Bereiche als CT-Schicht dargestellt	60
Abbildung 32: Abdominalgewebe-Details	61
Abbildung 33: VAT-Bereiche	62
Abbildung 34: Warnmeldung zu asymmetrischen Ergebnissen	65
Abbildung 35: AP/Laterale Wirbelsäulenpositionierung	68
Abbildung 36: Wirbelsäule (lateral)	69
Abbildung 37: Laterale ROI.....	70
Abbildung 38: Vertebral-Grenzen	71
Abbildung 39: Wirbelkörper	71
Abbildung 40: Knochenmarkierung (lateral).....	72
Abbildung 41: Positionieren bei lateraler Dekubitus-Messung	74
Abbildung 42: Wirbelsäulenposition	74
Abbildung 43: Dekubitusmessung der Wirbelsäule.....	75
Abbildung 44: Neupositionierung im Dekubitus	76
Abbildung 45: Laterale ROI.....	77
Abbildung 46: Vertebral-Grenzen	77
Abbildung 47: Wirbelkörper	78
Abbildung 48: Knochenmarkierung (lateral).....	79
Abbildung 49: AP-IVA-Positionierung.....	81
Abbildung 50: Laterale IVA-Positionierung	82
Abbildung 51: Wirbelsäulenposition	82
Abbildung 52: AP-IVA-Positionierung.....	83
Abbildung 53: Laterale IVA-Positionierung	85
Abbildung 54: IVA-Viewer-Fenster	88
Abbildung 55: Die menschliche Wirbelsäule.....	96
Abbildung 56: Wirbelkörperverformungen.....	97
Abbildung 57: Markerplatzierung.....	98
Abbildung 58: Einen Marker hinzufügen.....	99
Abbildung 59: Selecting a Marker (Einen Marker auswählen)	99
Abbildung 60: Markerdaten im Ergebnisblock	100
Abbildung 61: Ergebnisblock	101

Horizon Bone Densitometry System User Guide

Liste der Abbildungen

Abbildung 62: Berichtsblöcke.....	105
Abbildung 63: Erweiterter Bericht zur Körperzusammensetzung.....	108
Abbildung 64: Advanced Body Composition-Änderungsratenbericht.....	109
Abbildung 65: Pädiatrischer Wirbelsäulenbericht.....	113
Abbildung 66: Erstellen und Senden eines DICOM-Berichts.....	113
Abbildung 67: Netztrennschalter und Anzeige.....	126

Liste der Tabellen

Tabelle 1: Symbole	8
Tabelle 2: Schaltflächen für Analyseschritte	16
Tabelle 3: Toolbox „Globale ROI“	18
Tabelle 4: Toolbox „Knochenmarkierung“	19
Tabelle 5: Toolbox „Neck“ (Hüfte)	19
Tabelle 6: Toolbox „Neck“ (Hüfte)	20
Tabelle 7: Toolbox „Unterbereich“	20
Tabelle 8: Toolbox-Steuerelemente	21
Tabelle 9: Toolbox „Bild“	37
Tabelle 10: Bewertung	38
Tabelle 11: Erstellen und Ändern von Linealen	38
Tabelle 12: Anzeigoptionen	39
Tabelle 13: Anmerkungen ändern	40
Tabelle 14: Bewertung atypischer Oberschenkelbrüche	40
Tabelle 15: Processus Styloideus Ulnae	49
Tabelle 16: Viewer-Fenster, linkes Teilfenster	88
Tabelle 17: Viewer-Fenster, mittleres Teilfenster	89
Tabelle 18: Viewer-Fenster, rechtes Teilfenster	89
Tabelle 19: Viewer-Fenster, linkes Teilfenster, Registerkarte „Grafik-Tools“	90
Tabelle 20: Bewertungsbereich	90
Tabelle 21: Der Bereich Display Options (Anzeigoptionen)	92
Tabelle 22: Der Bereich Change Annotations (Anmerkungen ändern)	92
Tabelle 23: Bildsteuerelemente	93
Tabelle 24: Ergebnisblock-Kennzeichnungen	101
Tabelle 25: Ergebnisblock für die AP-IVA-Aufnahme	102
Tabelle 26: Verfahren zur Folgemessung	103
Tabelle 27: Felder des erweiterten Berichts zur Körperzusammensetzung	108
Tabelle 28: Felder des erweiterten Diagramms zur Körperzusammensetzung	108
Tabelle 29: Felder des Advanced Body Composition-Änderungsratenberichts	109
Tabelle 30: Felder des Advanced Body Composition-Änderungsratendiagramms	110

Horizon Bone Densitometry System User Guide

Liste der Tabellen

Tabelle 31: FRAX-Risikofaktoren	120
Tabelle 32: Referenzkurvenbeschreibungsfelder	134
Tabelle 33: Abfrageparameter	141
Tabelle 34: Intervall für automatische Abfrage	142
Tabelle 35: Wiederholungsparameter für Abfrage	143
Tabelle 36: Löschintervall	144
Tabelle 37: Eingabe aus Datei	144
Tabelle 38: Worklist-Anbieter-Funktionen	145
Tabelle 39: Worklist-Anbieter	146
Tabelle 40: Durchgeführter Verfahrensschritt	146
Tabelle 41: Anbieter	146
Tabelle 42: DICOM Send-Ziele	148
Tabelle 43: DICOM Send-Ziele	151
Tabelle 44: DICOM-Sendekonfiguration	154
Tabelle 45: DICOM Storage Commitment-Ziele	155
Tabelle 46: Storage Commitment-Ziel bearbeiten	157
Tabelle 47: Storage Commitment konfigurieren	158
Tabelle 48: DICOM Abfrage-/Ladeziele	159
Tabelle 49: DICOM-Abfrage-/Ladeziel hinzufügen/bearbeiten	161
Tabelle 50: Abfragen/Laden konfigurieren	161
Tabelle 51: Hostkonfiguration	162

1 Übersicht

1.1 Gebrauchshinweise

1.1.1 APEX-Indikationen

Die APEX™-Funktion für QDR™-Röntgenknochendensitometer ist für die Bewertung der Knochenmineraldichte (BMD), den Vergleich der erhaltenen Messvariablen einer vorhandenen QDR-Messung mit Referenzwerten in einer Datenbank, zur Bestimmung des Frakturrisikos, zur Bewertung der Wirbelkörperverformung, zur Körperzusammensetzungsanalyse und zur Knochenunterscheidung in der Prothetik mit Hologic® QDR-Röntgenknochendensitometer

1.1.2 IVA-Indikationen

IVA-Messungen dienen der Visualisierung oder quantitativen Bewertung von Wirbelkörperverformungen. Mit IVA ist außerdem eine Visualisierung der Kalzifikation der Bauchaorta möglich und, sofern vorhanden, kann eine klinische Korrelation angezeigt sein, da eine Kalzifikation der Bauchaorta mit einer Herzgefäßerkrankung verbunden sein kann.

1.1.3 Indikationen zur Körperzusammensetzung

Die Referenzdatenbank-Software für Ganzkörper-DXA von Hologic, die auf QDR-Knochendensitometern von Hologic verwendet werden, misst die:

- regionale und Ganzkörper-Knochenmineraldichte,
- Mager- und Fettgewebemasse und
- berechnet Derivatивwerte von:
 - Knochenmineralgehalt
 - Bereich
 - Weichgewebemasse
 - regionale Weichgewebemasse
 - Weichgewebemasse, Ganzkörper
 - Fettfreie Masse
 - Verhältnis regionaler zu Ganzkörper-Weichgewebemasse
 - % Körperfett, regional
 - % Körperfett, Ganzkörper
 - % Körperfett, android
 - % Körperfett, gynoid
 - % Körperfett, Verhältnis android/gynoid
 - Body-Mass-Index

Die Werte können in benutzerdefinierten Statistikformaten und -verläufen mit Farbuordnungen dargestellt und nach alleinigem Ermessen des Arztes mit Referenzpopulationen verglichen werden.

Diese Werte zur Körperzusammensetzung sind für medizinisches Personal bei der Behandlung von Erkrankungen und Störungen hilfreich, bei denen die Erkrankung oder Störung selbst oder die entsprechende Behandlung Auswirkungen auf den relativen Anteil an Fett- und Magergewebe hat. Mit der Referenzdatenbank-Software für Ganzkörper-DXA von Hologic können weder Erkrankungen diagnostiziert werden, noch gibt sie Empfehlungen zu Behandlungen ab oder misst deren Wirksamkeit. Nur das medizinische Personal kann diese Faktoren beurteilen. Zu den Erkrankungen (und Störungen), für die die Werte der Körperzusammensetzung hilfreich sind, gehören chronisches Nierenversagen, Magersucht, Fettleibigkeit, AIDS/HIV und Mukoviszidose. Die Messung der Körperzusammensetzung mit DXA ist eine gute Alternative zum hydrostatischen Wiegen und zur Hautfaltenmessung.

1.1.4 Viszeralfett-Software

Die Viszeralfett-Software von Hologic, die bei der Knochendensitometrie-Ganzkörpermessung mit Hologic Horizon[®] zum Einsatz kommt, schätzt den Anteil von viszeralem Körperfettgewebe (Viszeralfett) innerhalb des Android-Bereiches bei erwachsenen Männern und Frauen (Schwangere ausgeschlossen). Geschätzte Anteile sind der Viszeralfettbereich, die Viszeralfettmasse und das Viszeralfettvolumen. Diese Werte können in benutzerdefinierten Statistikformaten und -verläufen dargestellt werden. Der Schätzwert für den Viszeralfettanteil ist für medizinisches Personal bei der Behandlung von Erkrankungen und Störungen hilfreich, bei denen die Erkrankung oder die Störung selbst oder die entsprechende Behandlung Auswirkungen auf den relativen Viszeralfettanteil im Android-Bereich hat.



Hinweis *Die Viszeralfett-Software von Hologic kann weder Erkrankungen diagnostizieren, noch gibt sie Empfehlungen zu Behandlungen ab oder misst deren Wirksamkeit. Nur das medizinische Personal kann diese Faktoren beurteilen.*

Zu den Erkrankungen/Störungen, in deren Rahmen die Viszeralfettschätzung hilfreich ist, zählen Hypertonie, eine abnorme Nüchtern glukose, gestörte Glukosetoleranz, Diabetes mellitus, Dyslipidämie sowie das metabolische Syndrom.

1.1.5 10-Jahres-Frakturrisiko

Das 10-Jahres-Risiko einer Hüftfraktur sowie das 10-Jahres-Risiko einer größeren Osteoporosefraktur wird anhand des Algorithmus (FRAX[®]) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Erwachsene unter Berücksichtigung der Knochenmineraldichte des Oberschenkelhalses und der klinischen Risikofaktoren berechnet. Der Arzt kann mit dem 10-Jahres-Frakturrisiko, dem Wissen über die Krankengeschichte des Patienten sowie der medizinischen Erfahrung und der klinischen Beurteilung bestimmen, ob ein therapeutischer Eingriff angezeigt ist.

1.1.6 Indikationen zur Hüften-Strukturanalyse

Die Hip Structure Analysis (HSA[®]) für die QDR-Röntgenknochendensitometer verwendet Daten der herkömmlichen Dual Energie-Röntgen-Absorptiometrie (DXA), um die Verteilung der Knochenmineralmasse an bestimmten Querschnitten der Hüfte zu messen, und der Arzt kann die strukturellen Eigenschaften der Hüfte wie CSA, CSMI, Z und BR abschätzen.

1.1.7 Indikationen für die SE (Single Energy)-Oberschenkeluntersuchung

SE (Single Energy)-Oberschenkeluntersuchungen werden verwendet, um Fokusreaktionen oder Verdickungen entlang des lateralen Kortex, die von einer quer verlaufenden strahlendurchlässigen Linie begleitet sein können, zu visualisieren. Da diese Merkmale mit atypischen Femurfrakturen übereinstimmen können, einer mit der Langzeitanwendung einer resorptionshemmenden Therapie assoziierten Komplikation, ist die klinische Korrelation ratsam.

1.2 Kontraindikationen

Schwangerschaft und die Anwendung von Kontrastmitteln innerhalb der vergangenen 7 Tage sind kontraindiziert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Abschnitt 5.1 Patientenbefragung](#) auf Seite 14.

1.3 IEC-Vorschriften

Die Röntgenknochendensitometer der QDR-Serie erfüllen die Forderungen nach IEC 60601-1. Die Röntgenknochendensitometer der QDR-Serie sind nach dieser Spezifikation als Geräte der Klasse 1, Typ B eingestuft.

Die Serie QDR erfüllt die Forderungen nach IEC 60601-1-3 mit Ausnahme des Punkts 29.205.2, in dem „... ein Abstand zwischen Brennpunkt und Haut (FSSD) von mindestens 45 cm bei normaler Verwendung“ gefordert wird. Der Abstand bei der QDR-Serie beträgt 42,5 cm und wurde gewählt, um eine optimale räumliche Auflösung und Präzision bei minimaler Patientenbestrahlung zu erreichen.

Die QDR-Serie erfüllt die folgenden IEC-Normen:

IEC 60601-1	2014	IEC 60601-2-28	2010
IEC 60601-1-2	2014	IEC 60825-1	2014
IEC 60601-1-3	2013	IEC 60601-1-6	2013

Bei der Entwicklung der Software für die QDR-Serie wurde IEC 62304 als Richtlinie verwendet.

1.4 Warn- und Sicherheitshinweise



Warnung: *Zur Vermeidung eines Stromschlagrisikos darf dieses Gerät nur an eine Netzversorgung mit Schutzerdung angeschlossen werden. Es ist nicht gestattet, dieses Gerät zu verändern.*

1.4.1 EMI

Das Gerät ist für elektromagnetische Umgebungen entsprechend IEC 60601-1-2 ausgelegt und kann problemlos in einer Umgebung mit anderen Geräten betrieben werden, die dieser Norm entsprechen.

1.4.2 Zubehör


Verwenden Sie mit diesem Gerät kein Zubehör, das nicht von Hologic für die Verwendung mit dem Gerät geliefert wurde.

1.4.3 Achtung



Achtung *Um die Integrität des Systems und die Sicherheit für Patient und Bediener zu gewährleisten, versorgen Sie den Computer und die Zubehörteile, die an der Steckdosenleiste an der Rückseite der Konsole angeschlossen sind, nicht über eine andere Netzquelle. Betreiben Sie auch keine Zubehörteile oder Geräte, die nicht mit dem System geliefert wurden, über die Steckdosenleiste an der Rückseite der Konsole.*


1.5 Etiketten

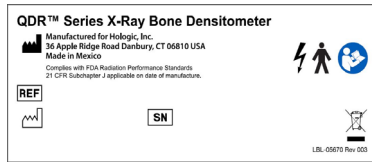

Typenschild des Horizon-Systems

Das **Typenschild** enthält folgende Angaben:

- QDR-Röntgenknochendensitometer
- Horizon-Modell
- Herstellername und Adresse
- Entspricht den am Tag der Herstellung gültigen FDA-Standards zur Durchführung von Bestrahlungen 21 CFR, Unterkapitel J.
- Herstellungsdatum
- Seriennummer
- IEC-Normen

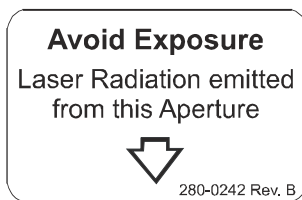

Laser Austrittsöffnung

Das Laser Austrittsöffnung enthält folgende Angaben:

- Bestrahlung vermeiden
- Laserstrahlung erfolgt über diese Austrittsöffnung



INMETRO und ULBR Produktkennzeichnung

Auf der Rückseite, INMETRO und ULBR Produktkennzeichnung

- enthält die INMETRO und ULBR Symbole
- Segurança

AC POWER

Line Voltage (V)	100	120	230
Frequency (Hz)	50/60	50/60	50/60
Maximum Current (A)	16	14	8
Maximum Apparent Resistance (ohm)	0.32	0.32	1.28

280-0379 Rev 004


Wechselstromkennzeichnung

Die **Wechselstromkennzeichnung** führt die elektrischen Spezifikationen des Systems auf, einschließlich:

- Versorgungsspannung (V)
- Frequenz (Hz)
- Maximale Stromstärke (A)
- Maximaler Scheinwiderstand (Ohm)

Horizon Bone Densitometry System User Guide


1. Übersicht

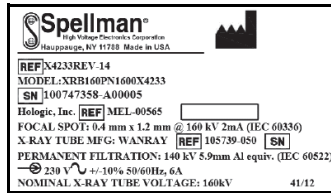

Tanketikett

Das Tanketikett enthält folgende Angaben:


- Herstellername und Adresse
- Modellnummern
- Seriennummern
- Nennleistung der Röhre
- Brennfleck
- Aluminiumfilteräquivalenz

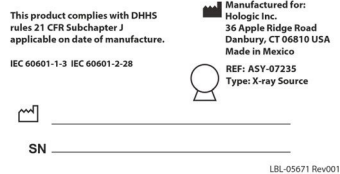

HF-Röntgenquellenkennzeichnung

Die HF-Röntgenquellenkennzeichnung beinhaltet:


- 21 CFR Konformitätserklärung
- Herstellungsdatum
- Modell-Nr. der Strahlungsquelle
- Typ: Strahlungsquelle
- Serien-Nr. der Strahlungsquelle
- IEC-Normen

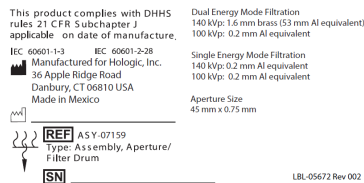

Trommelfiltrationsetikett

Das Trommelfiltrationsetikett enthält folgende Angaben:


- Herstellername und Adresse
- Nummer der Modelleinheit
- Seriennummer
- 21 CFR Konformitätserklärung
- EC- und IEC-Nummern

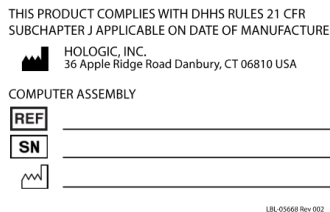

Computer-Zertifizierungskennzeichnung

Die Computer-Zertifizierungskennzeichnung beinhaltet:

- 21 CFR Konformitätserklärung
- Herstellername und Adresse
- Nummer der Computereinheit
- Seriennummer der Computereinheit
- Herstellungsdatum

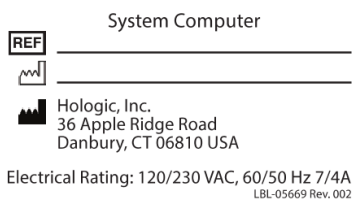

Systemcomputer-Kennzeichnung

Die **Systemcomputer-Kennzeichnung** beinhaltet:

- Nummer der Systemcomputereinheit
- Herstellungsdatum
- Herstellername und Adresse
- Elektrische Nennleistung



WARNING: This x-ray unit may be dangerous to patient and operator unless safe exposure factors, operating instructions and maintenance schedules are observed.
280-0200 Rev 002

Röntgen-Warnzeichen

- **Warnung:** Dieses Röntgengerät kann eine Gefahr für Patienten und Bediener darstellen, wenn die Sicherheitshinweise zu Strahlungsfaktoren, die Bedienungsanweisungen und die Wartungspläne nicht eingehalten werden.

1.6 Symbole

Tabelle 1 Symbole

	Gerät mit CSA-Zulassung		CE-Kennzeichnung
	Gefährliche Spannung		Achtung
	Röntgenstrahlung		Röntgenquelleneinheit
	Warnung: Strom		Wechselstrom
	Anwendungsteil vom Typ B		Schutzerdung
	Herstellungsdatum		Hersteller
	Die Ausrüstung muss unter Beachtung der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden.		Autorisierte Vertretungen in der Europäischen Gemeinschaft
	Bestellnummer		Seriennummer
	Strahlenfilter		Gefahr: Quetschpunkt
	Anweisungen in der Bedienungsanleitung befolgen		INMETRO und ULBR
	Temperaturgrenze		Feuchtigkeitsgrenze

1.7 Supportunterlagen

1.7.1 QDR-Referenzhandbuch

Referenz für Informationen zur Technologie des Systems.

1.7.2 Onlinehilfe

Klicken Sie im Hauptfenster oder in den meisten Dialogfeldern auf die Schaltfläche „Help“ (Hilfe) oder drücken Sie die Taste F1.

1.7.3 Handbuch – Technische Daten der QDR-Serie

Referenz für technische Daten.

1.7.4 QDR Internet-Sicherheitsinformationen

Melden Sie sich an, um Supportinformationen zu erhalten. Zugang zu QDR Internet-Sicherheitsinformationen: <https://www.hologic.com/package-inserts/breast-skeletal-health-products/horizon-dxa-system-package-insertsifus>

1.8 Hauptfenster

Abbildung 1 Horizon-Hauptfenster



1.8.1 Funktionen im Hauptfenster

1-Menüleiste

2-Hauptarbeitsbereich

3-Patienten- und Messdatensätze

4-Systemfunktionen

5-Systemmeldungen

6-Täglich auszuführende Funktionen

7-Hilfe

2 Starten und Herunterfahren des Systems

2.1 Hochfahren des Systems

1. Überprüfen Sie, ob sich das Bedienfeld in hochgeklappter und verriegelter Position befindet (nur beim Modell Horizon A).



Hinweis *Beim Modell Horizon A kann das Bedienfeld vertikal heruntergeklappt werden, wenn sich der Tisch in der Patient Ein/Aus-Position befindet, um die Umlagerung des Patienten von einer Trage auf den Horizon-Tisch zu erleichtern.*

Sobald sich das Bedienfeld in vertikaler, heruntergeklappter Position befindet, unterbricht das System als normale Sicherheitsmaßnahme automatisch die Kommunikation zwischen dem Tisch und der Anwendung. Wird das Bedienfeld wieder in die horizontale Position gebracht, wird die Kommunikation mit dem Tisch mit einer Verzögerung von drei Sekunden wiederhergestellt und der normale Betrieb erneut aufgenommen.

2. Überprüfen Sie auf dem **Bedienfeld**, ob der **Nothaltschalter** eingeschaltet ist.
3. Schalten Sie den Computer ein.
Der Monitor und der Drucker sollten bei einem normalen Einschaltvorgang bereits eingeschaltet sein.
4. Melden Sie sich bei **QDR** an.

2.2 Herunterfahren des Systems

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Exit** (Beenden).
2. Klicken Sie auf **Exit QDR with shutdown?** (QDR beenden und herunterfahren?).
3. Klicken Sie auf **OK**.




Achtung *Schalten Sie nicht den Netztrennschalter aus.
Schalten Sie den Monitor oder den Drucker nicht aus.*

3 Verfahren zur Qualitätskontrolle

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Daily QC (Tägliche QK)**.
2. Platzieren Sie das Wirbelsäulen-Phantom auf dem Tisch. Dabei muss die Registrierungsmarkierung (**Abbildung 2A**) nach links in Richtung Fußende zeigen.
3. Positionieren Sie das Phantom parallel zur Rückseite des Untersuchungstisches.
4. Richten Sie das Laser-Fadenkreuz (**Abbildung 2B**) auf die Registrierungsmarkierung aus.
5. Klicken Sie auf **Continue** (Weiter).

Abbildung 2 Position des Wirbelsäulen-Phantoms

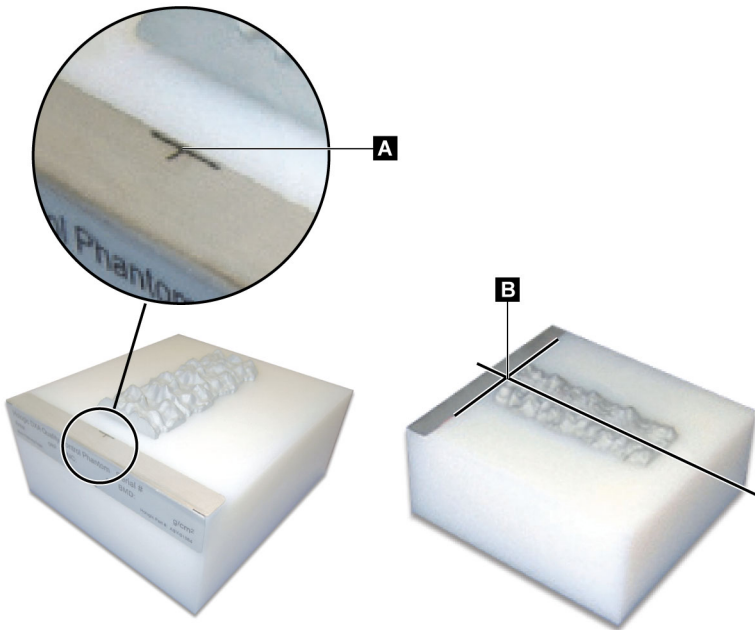

3.1 Systemtest

Wenn der Systemtest fehlschlägt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Problembeseitigung und wiederholen Sie die QK.

3.2 Automatische QK

Wenn die automatische Qualitätskontrolle erfolgreich ist, klicken Sie auf **OK**, um mit den Messungen für die Patienten zu beginnen.

Wenn die automatische Qualitätskontrolle fehlschlägt, folgen Sie den Anweisungen zur Problembeseitigung.

3.3 Automatische Kalibrierung der Option „Körperzusammensetzung“

QDR-Systeme mit **APEX oder QDR für Windows XP Version 12.4.2 und höher** (außer aktualisierte Systeme) enthalten eine automatische Kalibrierung der Option „Körperzusammensetzung“. Das System kontrolliert, wann die letzte Kalibrierung durchgeführt wurde, und führt nach Ablauf einer Woche während einer QK automatisch eine Kalibrierung durch. Durch diesen Prozess wird das QK-Verfahren nur um wenige Sekunden verlängert.

Nach Abschluss der Kalibrierung werden Sie vom System aufgefordert, das QK-Phantom zu entfernen.

1. Klicken Sie auf **OK**, um den Test der radiographischen Gleichmäßigkeit für „Adult WB (Erwachsene WB)“ durchzuführen. Wenn „Infant WB (Kind WB)“ installiert ist, wird der Test unmittelbar nach dem Test für „Adult WB (Erwachsene WB)“ durchgeführt.
2. Klicken Sie nach dem Ende dieses Tests auf **OK**, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

4 Patientendatensätze

Handelt es sich bei der Patientin um eine Frau mit einem Alter, in dem der T-Score gemeldet werden muss, und ist sie postmenopausal, muss das Menopausenalter in der Biografie eingegeben werden. Andernfalls wird kein T-Score erzeugt.



Hinweis *Das Berichtsalter für den T-Score kann konfiguriert werden (die Standardvorgabe ist 50 Jahre).*

4.1 Abrufen eines Patientendatensatzes

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Patients** (Patienten).
2. Klicken Sie zum Auswählen auf den **Namen des Patienten**.



Hinweis *Klicken Sie zur Verwendung von Suchkriterien auf die Überschrift und die Art des Suchkriteriums im Text.*

4.2 Anlegen eines Patientendatensatzes

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Patients** (Patienten).
2. Klicken Sie auf **New Patient** (Neuer Patient).

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Biography** (Biografie).
 - a. Geben Sie die Patientendaten ein.
 - b. Klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Insurance** (Versicherung).
 - a. Geben Sie die Patientendaten ein.
 - b. Klicken Sie auf **OK**.

4.3 Bearbeiten eines Patientendatensatzes

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Patients** (Patienten).
2. Klicken Sie auf **Edit Patient** (Patient bearbeiten).
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Biography** (Biografie) und ändern Sie die Angaben nach Bedarf.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Insurance** (Versicherung) und ändern Sie die Angaben nach Bedarf.
5. Klicken Sie auf **OK**.

4.4 Verwenden der Worklist zum Laden eines Patientendatensatzes



Hinweis *Die Worklist ist eine Option der QDR-Systeme.*

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Perform Exam** (Untersuchung durchführen).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Worklist**.
3. Klicken Sie auf **Query** (Abfrage).
4. Markieren Sie den Namen des gewünschten Patienten.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Überprüfen Sie die Patientendaten.
 - a. Klicken Sie auf **OK** oder
 - b. klicken Sie auf **Edit patient** (Patienten bearbeiten), um den Patientendatensatz wie oben beschrieben zu bearbeiten.

4.5 Bestätigung der Patienteninformationen

Mit dem Fenster „Patientenbestätigung“ bestätigen Sie untersuchungsspezifische Informationen, FRAX[®]-Einschränkungskriterien und FRAX-Risikofaktoren bzw. geben diese ein.

4.5.1 Biografische Angaben

Kontrollieren Sie die Richtigkeit der Eingaben für Patientennamen, ID, Geburtsdatum, aktuelles Gewicht und aktuelle Größe auf Richtigkeit.

4.5.2 Untersuchungsinformationen

Bestätigen bzw. bearbeiten Sie die Untersuchungsinformationen gegebenenfalls.

1. Geben Sie die Patientendaten ein oder ändern Sie diese.
2. Füllen Sie den Fragebogen aus.
3. Tragen Sie alle Bewertungsdaten ein.

Die Untersuchungsinformationen enthalten folgende Daten:

- Bediener
- **Zugangsnummer**, die einen Patientenbesuch eindeutig kennzeichnet
- überweisender Arzt
- benutzerdefinierte Felder.

5 Durchführen einer Untersuchung

5.1 Patientenbefragung

Im Folgenden finden Sie eine Liste von Fragen, die Sie dem Patienten stellen sollten (einige treffen möglicherweise nicht zu).

Besteht die Möglichkeit einer Schwangerschaft?

Wenn die Patientin schwanger ist (oder die Möglichkeit einer Schwangerschaft besteht), muss die Messung verschoben werden, bis eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden kann.

Wurde beim Patienten innerhalb der letzten 7 Tage eine Behandlung durchgeführt, bei der eine der folgenden Substanzen verwendet wurde:

- Jod
- Barium

Die Röntgenkontrastmittel für CT- und Röntgenaufnahmen können DXA-Messungen stören. Insbesondere können oral verabreichte Kontrastmittel mehrere Tage im Verdauungstrakt bleiben und die DXA-Ergebnisse beeinträchtigen. Intravenös gegebenes Jod wird bei Patienten mit normaler Nierenfunktion in der Regel innerhalb von 72 Stunden ausgeschieden.

Bei mehreren Studien hat sich erwiesen, dass die DXA-Messungen von Hologic durch Untersuchungen mit radioaktiven Isotopen nicht beeinträchtigt werden, das heißt, DXA-Messungen können sofort nach Untersuchungen mit radioaktiven Isotopen durchgeführt werden,

sofern die Untersuchungen nicht ebenfalls Röntgenkontrastmittel erfordern (beispielsweise Jod und Barium).

Hat der Patient einen künstlichen Darmausgang oder trägt der Patient Metallknöpfe, Verschlüsse oder Schmuckgegenstände im Messungsbereich?

Dies kann die Messungen des Patienten beeinträchtigen.

Wurde beim Patienten im Messungsbereich zu irgendeinem Zeitpunkt ein chirurgischer Eingriff durchgeführt?

Überlegen Sie in solchen Fällen, ob die Untersuchung durchgeführt werden soll. Die Messung kann beispielsweise durch folgende interne Objekte gestört werden:

- Herzschrittmacher
- radioaktive Seeds
- Metallimplantate
- chirurgische Klammern
- Fremdkörper, z. B. durch Schussverletzungen
- röntgenstrahlenundurchlässige Katheter oder Schläuche.

Wenn an dem Patienten bereits ein chirurgischer Eingriff an einer Hüftseite oder einem Unterarm durchgeführt wurde, sollte die unversehrte Hüftseite oder der unversehrte Unterarm gemessen werden.

5.2 Patientenvorbereitung

Den Patienten auf die Untersuchung vorbereiten:

- Achten Sie darauf, dass sich keine Metallgegenstände (beispielsweise Reißverschluss, Schnalle, Gürtel usw.) im Messungsfeld befinden. Lassen Sie den Patienten gegebenenfalls für die Untersuchung einen Kittel anlegen.
- Weisen Sie den Patienten bei Untersuchungen der AP-Lendenwirbelsäule oder Hüfte bzw. bei Ganzkörperuntersuchungen an, die Schuhe auszuziehen.
- Das Gewicht des Patienten darf maximal 227 kg (500 lbs) betragen. Bei Patienten, die schwerer sind, messen Sie den Unterarm.

5.3 Patientenauswahl

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Perform Exam** (Untersuchung durchführen).
2. Erstellen oder laden Sie einen Patientendatensatz.
3. Klicken Sie auf **OK**.
4. Überprüfen Sie die Patientendaten.

5. Klicken Sie auf **OK**.

5.4 Auswählen des Messungstyps

1. Wählen Sie im Fenster **Select Scan Type** (Messungstyp auswählen) den gewünschten Untersuchungstyp aus.
2. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>.

5.5 Durchführung einer Messung

Weitere Informationen zum Durchführen bestimmter Messungstypen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten dieses Handbuchs.

6 Manuelle Messungsanalyse

Verwenden Sie für die Analyse einer Messung die Schaltflächen für die Analyseschritte, die Toolbox und das Steuerelement für Helligkeit/Kontrast auf der rechten Seite des Analysefensters.


6.1 Schaltflächen für Analyseschritte

Jede der Schaltflächen für Analyseschritte wird zum Durchführen eines Analyseschrittes verwendet. Klicken Sie bei der Analyse einer Messung von oben nach unten auf die einzelnen Schaltflächen und führen Sie die erforderlichen Vorgänge durch, bis alle Schritte abgeschlossen sind.

Tabelle 2 Schaltflächen für Analyseschritte

Schaltfläche	Funktion
Globale ROI (Region of Interest)	Die festgelegten Grenzen des zu analysierenden Bildes. Die ROI wird im Bild als Rechteck angezeigt.
Knochenmarkierung	Eine vom System erstellte Illustration für den durch die ROI definierten Knochenbereich. Die Markierung überlagert das Bild in Gelb.
Wirbellinien (Wirbelsäule)	Werden zur Markierung der intervertebralen Zwischenräume innerhalb der ROI für die Wirbelsäule verwendet.
Schenkelhals (Hüfte)	Ermöglicht das Positionieren der Neck-Box für den Schenkelhals. Die Neck-Box sollte das Ischium nicht einschließen.
Mittellinie/UD (Unterarm)	Ermöglicht die Positionierung der mittleren (Mittellinie) und ultradistalen (UD) Bereiche des Unterarms.
Bereiche (Ganzkörper)	Wird zur Definition der ROI bei einer Ganzkörpermessung verwendet.

Tabelle 2 Schaltflächen für Analyseschritte (Continued)

Schaltfläche	Funktion
A/G-Bereiche (Ganzkörper)	Zur Abgrenzung der Android- und Gynoid-Bereiche im Ganzkörperbild. Für die Ergebnisse über die Körperzusammensetzung werden die A/G-Bereiche zur Berechnung des Fettgehalts, des Magergehalts (einschließlich BMC) und des prozentualen Fettanteils der Android- und Gynoid-Bereiche des Körpers verwendet.
VAT-Bereiche	Bei APEX-Systemen 4.0 und höher zeigt die Analyseschrittschaltfläche für A/G-Bereiche auch die VAT-Bereiche an. Mithilfe der VAT-Bereiche werden im Ganzkörperbild die Bereiche des viszeralen Körperfettgewebes (Visceral Adipose Tissue, VAT) abgegrenzt. Die VAT-Bereiche umfassen die Haut am Rand des Abdominalbereiches sowie die Viszeralhöhle.
Unterbereiche (Ganzkörper)	Zur Abgrenzung eines oder mehrerer Bereiche in der Ganzkörpermessung. Es sind bis zu sieben Unterbereiche möglich, die ungleichmäßige Formen und Überlappungen aufweisen können. Für die Ergebnisse über die Körperzusammensetzung werden der Fettgehalt, der Magergehalt (einschließlich BMC) und der prozentuale Fettanteil jedes Unterbereichs sowie der Nettodurchschnitt (NETAVE) für alle Unterbereiche berechnet.
 Hinweis	<i>Wenn sich Unterbereiche überschneiden, ergibt sich der Nettodurchschnitt aus der mathematischen Vereinigung der einzelnen Bereiche.</i>
Unterbereichsergebnisse (Ganzkörper)	Zeigt die Analyseergebnisse des Unterbereichs im Analysefenster an. Klicken Sie zum Abrufen der Ergebnisse über die Körperzusammensetzung auf „BCA“.
Vertebral-Grenzen (Lateral-Wirbelsäule BMD)	Wird zur Identifizierung der Anterior-Grenze der Wirbelkörper verwendet und in der Abbildung der lateralen Wirbelsäule als gelb gestrichelte Linie angezeigt.
Wirbelkörper (Lateral-Wirbelsäule BMD)	Werden zur Identifizierung der Grenzen der Wirbelkörper verwendet und in der Abbildung der lateralen Wirbelsäule als Rechtecke angezeigt.
Mittelbereiche (Lateral-Wirbelsäule BMD)	Werden zum Anpassen der Bereiche in der Mitte der Wirbelkörper in der Abbildung der lateralen Wirbelsäule verwendet (nur selten erforderlich).
Ergebnisse	Zeigt die Analyseergebnisse im Analysefenster an.

6.2 Toolboxen


Die Toolboxen enthalten die für die einzelnen Analyseschritte erforderlichen Tools. Welche Tools verfügbar sind, hängt vom zu analysierenden Messungstyp und von der aktiven Schrittschaltfläche ab.

Tabelle 3 Toolbox „Globale ROI“

Werkzeug	Funktion
Gesamtmodus	Ermöglicht das Verschieben des gesamten ROI-Rechtecks über das Bild. Das Rechteck wird mit gelb gestrichelten Linien dargestellt.
Linienmodus	Ermöglicht das Verschieben einer einzelnen Linie des ROI-Rechtecks. Klicken Sie auf eine beliebige Linie, um diese auszuwählen. Die jeweils aktive Linie wird gelb gestrichelt angezeigt.
Punktmodus	Ermöglicht das Verschieben eines einzelnen Punktes des ROI-Rechtecks. Die Punkte werden im Rechteck als Pluszeichen dargestellt. Der jeweils aktive Punkt ist gelb.
1/3 Distal (nur Unterarm)	Wird verwendet, um die Größe des 1/3 distalen Bereichs des Unterarms anzupassen (nur selten erforderlich).

6.2.1 Toolbox „Knochenmarkierung“

Tabelle 4 Toolbox „Knochenmarkierung“

Werkzeug	Funktion
Knochen hinzufügen	Wird verwendet, um die außenliegenden Kanten einer unvollständigen Knochenmarkierung zu verbinden und den fehlenden Bereich aufzufüllen (nur selten erforderlich).
Knochen löschen	Wird verwendet, um einen Bereich der Knochenmarkierung zu löschen (nur selten erforderlich).
Rückgängig	Hebt den zuletzt durchgeführten Vorgang auf.
 Hinweis	Die Funktion Undo (Rückgängig) ermöglicht es dem Bediener, die unverarbeitete Knochenmarkierung anzuzeigen. Das Anzeigen der Knochenmarkierung, bevor der Analysealgorithmus Knocheninseln versenkt und Löcher im Knochen auffüllt, kann aufzeigen, wie gut der automatische Algorithmus zur Knochenfindung funktioniert hat, und kann bei problematischen Messungen verwendet werden. Die Funktion Undo (Rückgängig) ist in der Phase Bone Map (Knochenmarkierung) bei allen Messungstypen aktiv und verfügbar, die nicht den Ganzkörper betreffen.

6.2.2 Toolbox „Linien“ (Wirbelsäule)

Werden zur Markierung der intervertebralen Zwischenräume innerhalb der ROI für die Wirbelsäule verwendet.

6.2.3 Toolbox „Neck“ (Hüfte)

Tabelle 5 Toolbox „Neck“ (Hüfte)

Werkzeug	Funktion
Neck-Box	Ermöglicht das Verschieben sowie das Ändern der Größe der Neck-Box (nur selten erforderlich). Das Rechteck wird mit gelb gestrichelten Linien dargestellt.
Andere Bereiche	Erweitert die Toolbox Neck, so dass sie die Tools Mittellinie, Wardsches Dreieck und Trochanter umfasst.
Mittellinie	Ermöglicht das Verschieben und Kippen der Mittellinie (nur selten erforderlich).
Wardsches Dreieck	Ermöglicht das Anpassen des Wardschen Dreiecks (nur selten erforderlich).

Tabelle 5 Toolbox „Neck“ (Hüfte)

Werkzeug	Funktion
Trochanter	Ermöglicht das Anpassen des Trochanterbereichs (nur selten erforderlich).
Automatische Positionierung	Ermöglicht die automatische Einstellung eines Bereichs.

6.2.4 Toolbox „Ergebnisse“ (Ganzkörper)

Tabelle 6 Toolbox „Neck“ (Hüfte)

Werkzeug	Funktion
BMD	BMD-Ergebnis im Analysefenster anzeigen.
BCA	BCA-Ergebnis im Analysefenster anzeigen.
Lineale	Für Messungen der Patientenanatomie durch Anlegen von Linealen am Messungsbild. Die Lineale werden im Analysefenster unter dem Bild angezeigt, wenn Sie die Option „Display (Anzeige)“ aktivieren.

6.2.5 Toolbox „Unterbereich“

Tabelle 7 Toolbox „Unterbereich“


Werkzeug	Funktion
Ein Bereich	Unterbereiche individuell bearbeiten.
Alle Bereiche	Alle Unterbereiche als Einheit bearbeiten.
Rückgängig	Den letzten durchgeführten Vorgang aufheben.

6.2.6 Toolbox-Steuererelemente


Tabelle 8 Toolbox-Steuererelemente

Bedienelement	Funktion
	Cursor zum Verschieben von Unterbereichen.
	Cursor zum Drehen von Unterbereichen. Die Hand wird bis zum Beginn der Drehung als geöffnet und während der Drehung mit zusammengedrücktem Daumen und Zeigefinger dargestellt.
	Im Rahmen der Lendenwirbelsäulen-Analyse zur Auswahl der Linie über der aktuell ausgewählten Linie.
	Im Rahmen der Lendenwirbelsäulen-Analyse zur Auswahl der Linie unter der aktuell ausgewählten Linie.
	Vergrößert den Cursor zum Hinzufügen oder Löschen von Knochen aus einer Knochenmarkierung.
	Verkleinert den Cursor zum Hinzufügen oder Löschen von Knochen aus einer Knochenmarkierung.
	Zum Erstellen eines Unterbereichs.
	Zum Löschen eines Unterbereichs.
	Zum Auswählen des nächsten Unterbereichs in einer Folge von zwei oder mehr Unterbereichen.
	Zum Auswählen des vorherigen Unterbereichs in einer Folge.
	Zum vertikalen Spiegeln von Unterbereichen.
	Zum horizontalen Spiegeln von Unterbereichen.
	Zum Verschieben gegen den Uhrzeigersinn, um die nächste Linie oder den nächsten Punkt in einem Unterbereich auszuwählen.

Tabelle 8 Toolbox-Steuerelemente (Continued)

Bedienelement	Funktion
	Zum Verschieben im Uhrzeigersinn, um die nächste Linie oder den nächsten Punkt in einem Unterbereich auszuwählen.

6.3 Steuerelement Helligkeit/Kontrast

	Wird zum Einstellen von Helligkeit und Kontrast des Bildes verwendet, um die bestmögliche Anzeigegenauigkeit der anatomischen Details zu erhalten. Dies hat keinen Einfluss auf die Berechnungen.
---	---


7 AP-Untersuchung der Lendenwirbelsäule

Beginnen Sie mit der Untersuchung entsprechend [Abschnitt 4.4 Verwenden der Worklist zum Laden eines Patientendatensatzes](#) auf Seite 13. Wählen Sie im Fenster **Select Scan Type (Messungstyp auswählen)** die Option **AP Lumbar Spine (AP Lendenwirbelsäule)** aus.

7.1 Positionieren des Patienten

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld auf **Patient On/Off** (Patient ein/aus).
2. Legen Sie den Patienten auf den Rücken mit dem Kopf am rechten Ende des Tisches.
3. Drücken Sie am Bedienfeld auf die Taste **Center** (Mitte).
4. Positionieren Sie den Patienten wie abgebildet ([Abbildung 3](#) und [Abbildung 4](#)).


Abbildung 3 AP Lendenwirbelsäule – Positionierung

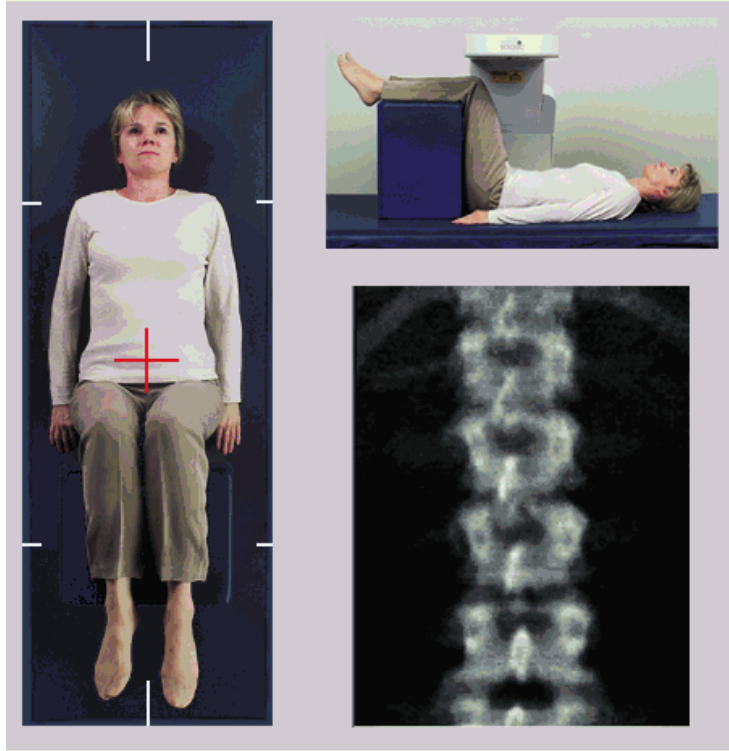

7.2 Positionieren des C-Bogens

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld auf **Laser**.
2. Platzieren Sie das Laser-Fadenkreuz mit den Tasten **Arm** und **Tisch** 4 cm (1.6 in) unterhalb der Crista iliaca und mittig an der Mittellinie des Patienten.
3. Weisen Sie den Patienten an, sich möglichst nicht zu bewegen und normal zu atmen.

Abbildung 4 Beinposition

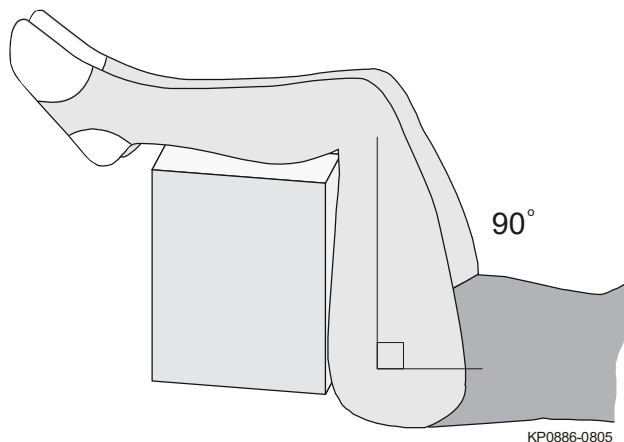


7.3 Starten der AP-Lendenwirbelsäulenmessung



Warnung: *Wenn die Röntgen-Kontrolllampe am Bedienfeld nicht 10 Sekunden nach Abschluss der Messung erlischt, drücken Sie sofort die rote **Nothalt**-Taste. Wenden Sie sich an den Hologic-Kundendienst, bevor Sie weitere Vorgänge ausführen.*

1. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten). Die Anzeige *Röntgenquelle Ein* blinkt, bis die Messung abgeschlossen ist.
2. Überprüfen Sie das Bild während des Messvorgangs.
 - Wurde die Wirbelsäule korrekt positioniert, klicken Sie auf **Stop Scan** (Messung anhalten), wenn Sie auf dem Bild ([Abbildung 5](#)) erkennen können, dass die Rippen mit T12 verbunden sind.
 - Wenn die Wirbelsäule nicht korrekt positioniert ist, klicken Sie auf **Reposition Scan** (Messung neu positionieren), um die Messung für die Neupositionierung zu stoppen.


Abbildung 5 AP Lendenwirbelsäule

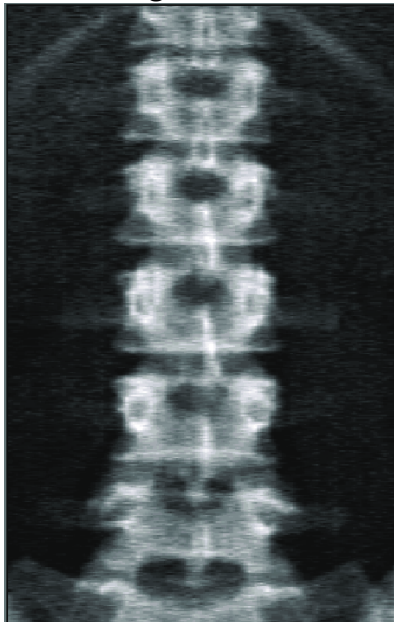

7.3.1 Neupositionieren der Messung (falls erforderlich)

1. Klicken Sie vor Abschluss der Messung auf **Reposition Scan** (Messung neu positionieren).
2. Positionieren Sie den Cursor über der Wirbelsäulenabbildung ([Abbildung 6](#)).

Abbildung 6 Neupositionierung der Wirbelsäule

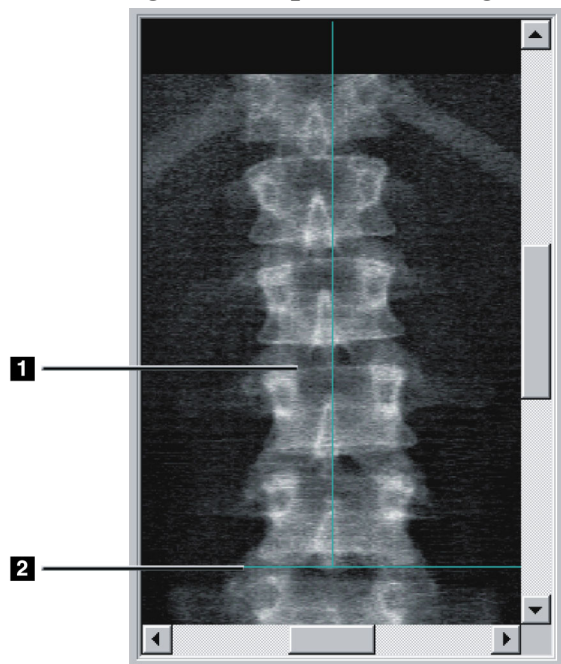

3. Klicken Sie auf das Bild und ziehen Sie es zur Neupositionierung der Wirbelsäule so, dass folgende Bedingungen zutreffen:
 - Die Mitte der Lendenwirbelsäule ist an der blauen vertikalen Positionierungslinie [1] ausgerichtet.
 - Die Crista iliaca befindet sich an oder unterhalb der blauen horizontalen Positionierungslinie [2].



Hinweis Sie können das Bild auch mit den Bildlaufleisten neu positionieren.

4. Wenn die Wirbelsäule richtig positioniert wurde, klicken Sie auf **Restart Scan** (Messung neu starten).
5. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten).
6. Wenn Sie auf dem Bild erkennen können, dass die Rippen mit T12 verbunden sind, klicken Sie auf **Stop Scan** (Messung anhalten).

7.4 Analysieren der Messung

1. Klicken Sie auf **Analyze Scan** (Messung analysieren).
2. Wenn eine vorherige Messung vorhanden ist, klicken Sie auf **Results** (Ergebnisse).

Ist keine vorherige Messung vorhanden, klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>. Bei allen Analyseschritten erscheint rechts vom Bild in einem Fenster ein Histogramm. Es ist als Hilfsmittel zur Platzierung der intervertebralen Linien vorgesehen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche >> oben rechts, um das Fenster zu vergrößern, und auf <<, um es zu verkleinern.

Sie können das Histogramm vom DXA_{pro}-Konfigurationsbildschirm aus konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im *MAN-03648 Horizon Referenzhandbuch*.


7.4.1 Automatische One-Time™-Analyse

Sobald die automatische Analyse abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse angezeigt.



Hinweis Wenn die automatische Analyse unzureichend ist, führen Sie eine manuelle Analyse durch ([Abbildung 7](#)), um eine korrekte Analyse zu erhalten.

Abbildung 7 AP Lendenwirbelsäulenanalyse

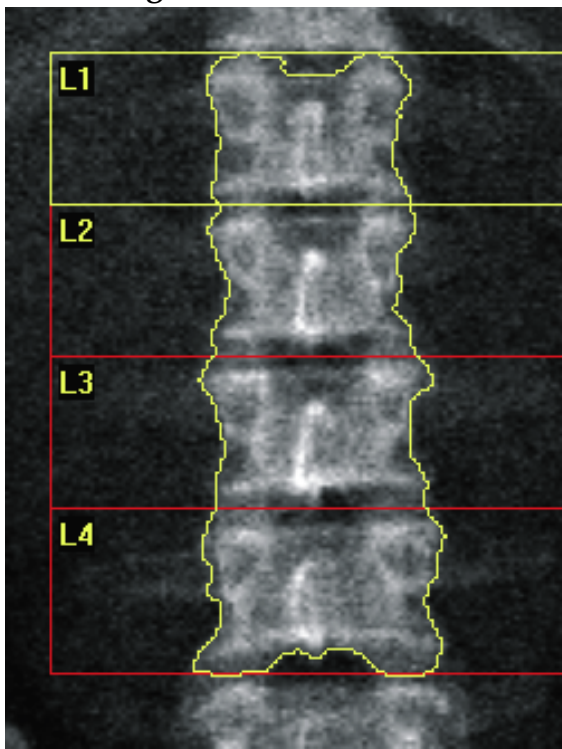

7.5 Beenden der Analyse

1. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).
2. Klicken Sie auf **Report** (Bericht).

7.6 Erstellen und Drucken von Berichten

Siehe [Abschnitt 20 Berichte](#) auf Seite 104.

8 Hüftuntersuchung


1. Beginnen Sie mit der Untersuchung entsprechend [Abschnitt 4.4 Verwenden der Worklist zum Laden eines Patientendatensatzes](#) auf Seite 13.
2. Wählen Sie im Fenster **Select Scan Type** (Messungstyp auswählen) **Left Hip** (Linke Hüfte), **Right Hip** (Rechte Hüfte) oder **Dual-Hip** aus.

8.1 Positionieren des Patienten für Hüftuntersuchungen links, rechts und Dual-Hip

1. Positionieren Sie den Patienten wie abgebildet ([Abbildung 8](#) und [Abbildung 9](#)).

Halten Sie den Oberschenkelknochen mit der Hüftpositionierhilfe von Hologic in der richtigen Position.

Abbildung 8 Positionierung der linken Hüfte ohne Hüft-Autopositionierung

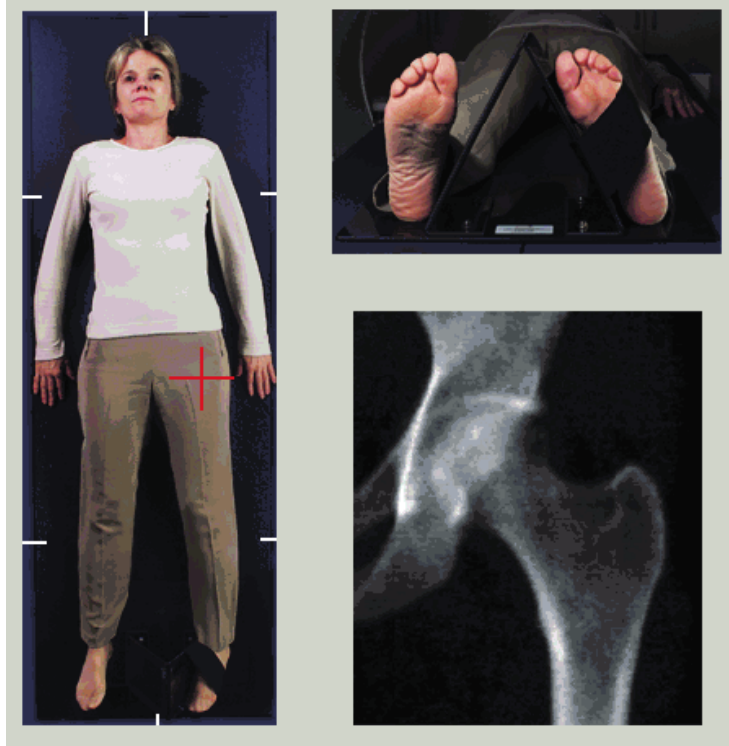

2. Drücken Sie am Bedienfeld auf die Taste **Center** (Mitte).
3. Legen Sie die Fuß-Positionierungshilfe unter die Beine des Patienten.
4. Richten Sie die Mitte der Positionierungshilfe an der Mittellinie des Patienten aus.
5. Drehen Sie (auf der zu messenden Seite) das gesamte Bein um 25° nach innen.

6. Platzieren Sie die Innenkante des Fußes an der Positionierungshilfe. Der Fuß sollte zur Decke gebogen sein ([Abbildung 8](#) und [Abbildung 9](#)).

7. Fixieren Sie den Fuß mit dem Klettverschluss in der gewünschten Position.

Drehen Sie bei dualen Hüftmessungen beide Beine um 25° nach innen und passen Sie beide Riemen so an, dass die Füße in korrekter Position gehalten werden ([Abbildung 10](#)).

Abbildung 9 Positionierung der rechten Hüfte ohne Hüft-Autopositionierung


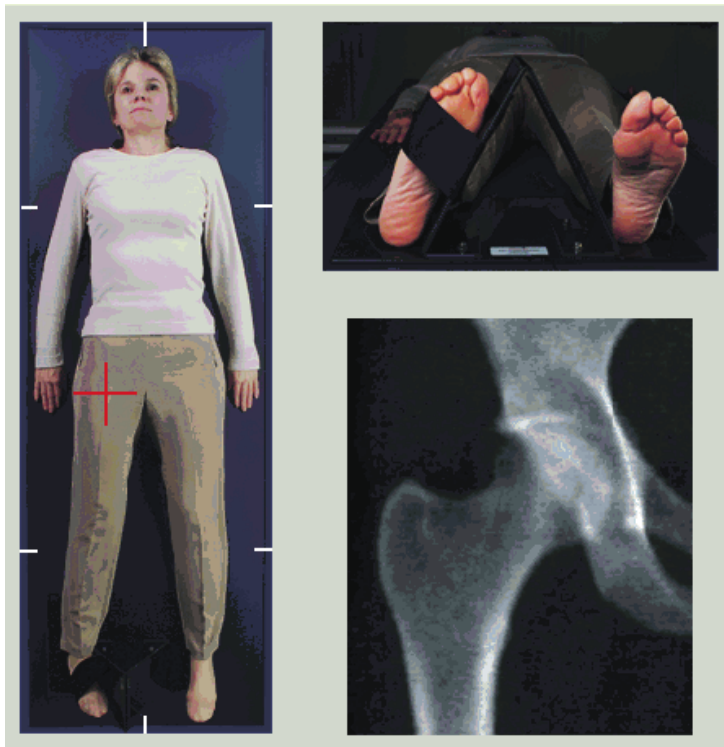


Abbildung 10 Fußpositionierung (Dual Hip-Messung)



8.2 Positionieren des C-Bogens

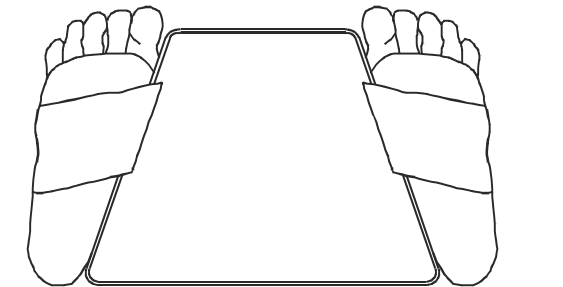

Hinweis Bei Hüftmessungen bei übergewichtigen oder adipösen Patienten: Abdominalfett, das über der Hüftregion liegt, sollte zurückgehalten bzw. aus dem Röntgen-Sichtfeld gezogen werden, da überlappendes Fett (Panniculus) die BMD-Ergebnisse der Hüfte beeinträchtigen kann.

8.2.1 Tipps zur Bestimmung des Trochanter major

1. Platzieren Sie Ihren Daumen auf der *Crista iliaca*.
2. Spreizen Sie Ihre Finger.
3. Richten Sie Ihren kleinen Finger auf das Knie.

Der Trochanter major befindet sich unter Ihrem kleinen Finger.

Wenn Sie den Trochanter nicht fühlen können:

1. Bitten Sie den Patienten, das Bein am Knie zu beugen und anzuheben.
2. Suchen Sie die Rille, die sich oben am Bein bildet.

Nutzen Sie diese Stelle als ungefähre Position des Trochanter major.

8.2.2 Linke oder rechte Hüfte ohne Autopositionierung für Hüftmessungen

1. Drücken Sie auf dem **Bedienfeld** auf **Laser**.
2. Verwenden Sie die Steuerelemente **Arm** und **Tisch** auf dem Bedienfeld, um das Fadenkreuz des Lasers zu platzieren:
 - 7,6 cm unter dem Trochanter major
 - 2,5 cm medial zum Oberschenkelschaft.

Beachten Sie

[Abbildung 8](#) zur linken Hüfte bzw. [Abbildung 9](#) zur rechten Hüfte.

[Abschnitt 8.2.1 Tipps zur Bestimmung des Trochanter major](#) auf Seite 29.


3. Weisen Sie den Patienten an, sich möglichst nicht zu bewegen und normal zu atmen.

8.2.3 Linke oder rechte Hüfte mit Autopositionierung für Hüftmessungen

1. Aktivieren Sie die **Autopositionierung** für Hüftmessungen.
2. Wählen Sie im **AEX Main Menu** (APEX-Hauptmenü) Folgendes aus:
 - Dienstprogramme
 - Systemkonfiguration
 - Markieren Sie die Autopositionierung für Hüftmessungen.
3. Drücken Sie auf dem **Bedienfeld** auf **Laser**.

4. Verwenden Sie die Steuerelemente **Arm** und **Table** (Tisch) auf dem **Bedienfeld**, um das Fadenkreuz des Lasers über der Außenkante des Trochanter major zu platzieren ([Abbildung 11](#) zur linken Hüfte).
Siehe [Abschnitt 8.2.1 Tipps zur Bestimmung des Trochanter major](#) auf Seite 29.
5. Weisen Sie den Patienten an, sich möglichst nicht zu bewegen und normal zu atmen.

Abbildung 11 Positionierung der linken Hüfte mit Hüft-Autopositionierung

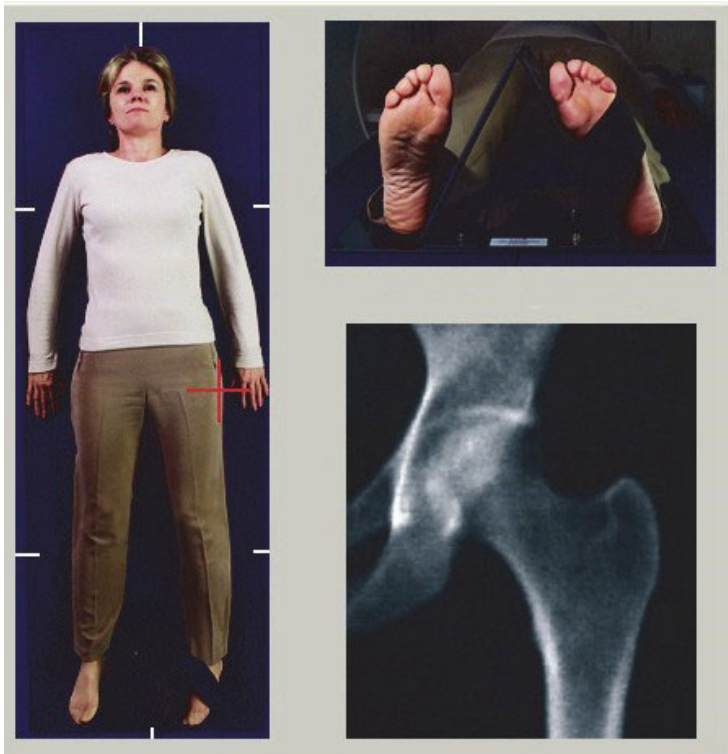

8.2.4 Dual-Hüfte

1. Schalten Sie den Laser ein und positionieren Sie den C-Bogen über der Mittellinie des Patienten.
2. Klicken Sie auf **Continue** (Weiter).
3. Palpieren Sie das linke Bein des Patienten, um den Trochanter major zu bestimmen.

Siehe [Abschnitt 8.2.1 Tipps zur Bestimmung des Trochanter major](#) auf Seite 29.



Hinweis Bei der Dual-Hip-Methode wird stets die linke Hüfte zuerst aufgenommen.

4. Platzieren Sie das Laser-Fadenkreuz mit den Tasten **Arm** und **Tisch** am Bedienfeld 7,6 cm unterhalb des Trochanter major und 2,5 cm mittig zum Oberschenkelschaft ausgerichtet.



Hinweis *Bei der Verwendung der Autopositionierung platzieren Sie das Fadenkreuz des Lasers über der Außenkante des Trochanter major.*

5. Klicken Sie auf **Continue** (Weiter).
6. Weisen Sie den Patienten an, sich möglichst nicht zu bewegen und normal zu atmen.

8.3 Starten der Hüftmessung



Warnung: *Wenn die Röntgen-Kontrolllampe am Bedienfeld nicht 10 Sekunden nach Abschluss der Messung erlischt, drücken Sie sofort die rote Nothalt-Taste. Wenden Sie sich an den Hologic-Kundendienst, bevor Sie weitere Vorgänge ausführen.*

1. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten). Die Anzeige „Röntgenquelle Ein“ blinkt, bis die Messung abgeschlossen ist.
 - a. Überprüfen Sie während der Bilderstellung, ob die Hüftmessung korrekt erfolgt.
 - b. Wenn die Hüfte nicht korrekt positioniert ist, klicken Sie auf **Reposition Scan** (Messung neu positionieren), um die Messung für die Neupositionierung zu stoppen.

Hinweise zur Neupositionierung des Bildes zur Einbeziehung des gesamten Oberschenkelkopfes finden Sie unter [Abschnitt 8.3.1 Neupositionieren der Messung](#) auf Seite 31. Liegt der Schaft nicht parallel, siehe [Abschnitt 8.3.2 Neupositionieren des Patienten](#) auf Seite 32.


8.3.1 Neupositionieren der Messung

1. Klicken Sie vor Abschluss der Messung auf **Reposition Scan** (Messung neu positionieren).
2. Positionieren Sie den Cursor über dem Hüftbild.



Hinweis *Sie können das Bild auch mit den Bildlaufleisten neu positionieren.*

Abbildung 12 Neupositionierung der Hüfte

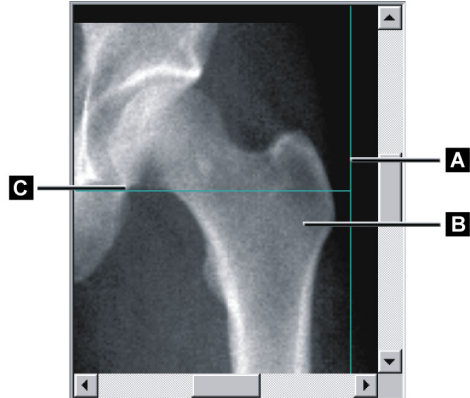

3. Klicken Sie auf das Bild und ziehen Sie es auf den Schnittpunkt der beiden blauen Positionierungslinien, sodass folgende Bedingungen zutreffen:
 - Die vertikale Positionierungslinie [A] berührt die Außenkante des Trochanter major [B].
 - Die horizontale Positionierungslinie [C] ist mittig am Trochanter major [B] ausgerichtet.
4. Klicken Sie auf **Restart Scan** (Messung neu starten).
5. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten).

8.3.2 Neupositionieren des Patienten

1. Klicken Sie vor Abschluss der Messung auf **Reposition Scan** (Messung neu positionieren).
2. Klicken Sie auf **Restart Scan** (Messung neu starten).
3. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten).
4. Werten Sie das Bild aus, sobald es angezeigt wird. Wenn das Bild zufriedenstellend ist, warten Sie den Abschluss des Messvorgangs ab.

8.3.3 Weitere Schritte einer Dual-Hip-Messung

Bei einer Dual-Hip-Messung wird der Scanner nach Abschluss der Messung der linken Hüfte zur rechten Hüfte bewegt. Wenn **SE Femur** (SE-Oberschenkel) aktiviert ist, werden Sie vom System aufgefordert, eine SE-Oberschenkelmessung des linken Oberschenkelknochens durchzuführen, bevor Sie zur rechten Hüfte wechseln. Sie werden außerdem aufgefordert, eine SE-Oberschenkelmessung des rechten Oberschenkelknochens durchzuführen, nachdem die Messung der rechten Hüfte beendet ist. Siehe [Abschnitt 8.5.2 Positionierung für die SE-Oberschenkelmessung nach einer Hüftmessung](#) auf Seite 35 und [Abschnitt 8.5.3 Starten der SE-Oberschenkelmessung](#) auf Seite 36.

1. Schalten Sie den Laser ein.
2. Stellen Sie sicher, dass der Laser ordnungsgemäß über der rechten Hüfte des Patienten positioniert ist.

3. Klicken Sie auf **Continue** (Weiter).
4. Überprüfen Sie, ob die Messung der rechten Hüfte zufriedenstellend ausfällt.
5. Ist dies nicht der Fall, positionieren Sie das Bild oder den Patienten neu und führen Sie erneut eine Messung durch.

8.4 Analysieren der Messung

1. Klicken Sie auf **Analyze Scan** (Messung analysieren).
2. Wenn eine vorherige Messung vorhanden ist, klicken Sie auf **Results** (Ergebnisse).

Ist keine vorherige Messung vorhanden, klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>.


8.4.1 Automatische One-Time-Analyse

Sobald die automatische Analyse abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse angezeigt.



Hinweis Wenn die automatische Analyse unzureichend ist, führen Sie eine manuelle Analyse durch. Ein Beispiel für eine korrekte Analyse sehen Sie in [Abbildung 13](#).


Abbildung 13 Ordnungsgemäß durchgeführte Hüftmessung

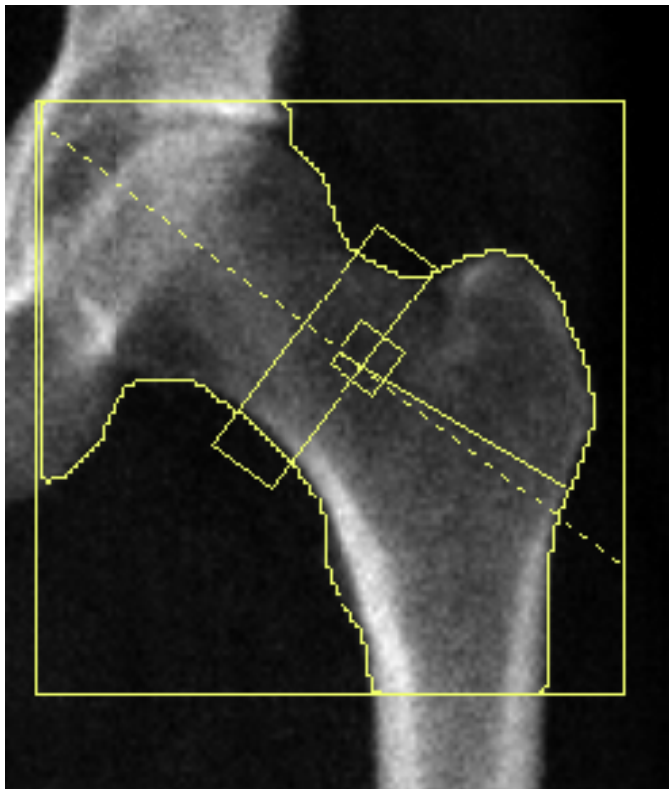

8.5 SE (Single Energy) Oberschenkeluntersuchung

Beginnen Sie mit der Untersuchung entsprechend [Abschnitt 4.4 Verwenden der Worklist zum Laden eines Patientendatensatzes](#) auf Seite 13. SE-Oberschenkelmessungen können direkt aus dem Fenster **Select scan type** (Messungstyp auswählen) oder am Ende einer BMD-Hüftmessung ausgewählt werden. Das Auswählen einer SE-Oberschenkelmessung am Ende einer Hüftmessung ist nur möglich, wenn im Fenster **Systemkonfiguration** SE-Oberschenkelmessungen über ein Kontrollkästchen konfiguriert wurden.

Abbildung 14 Positionierung für linke SE-Oberschenkelmessung

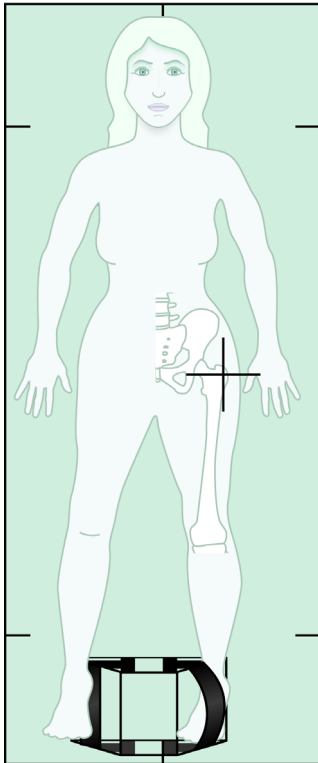

8.5.1 Positionierung für die SE-Oberschenkelmessung

1. Positionieren Sie den Patienten wie in [Abbildung 14](#) dargestellt. Halten Sie den Oberschenkelknochen mit der Hüftpositionierhilfe von Hologic in der richtigen Position.
2. Drücken Sie am **Bedienfeld** auf die Taste **Center** (Mitte).
3. Legen Sie die Fuß-Positionierungshilfe unter die Beine des Patienten und
4. richten Sie die Mitte der Positionierungshilfe an der Mittellinie des Patienten aus.

5. Drehen Sie (auf der zu messenden Seite) das gesamte Bein um 25° nach innen und positionieren Sie die Innenkante des Fußes an der Positionierungshilfe.

Der Fuß sollte zur Decke hin gebeugt sein.

6. Fixieren Sie den Fuß mit dem Klettverschluss in der gewünschten Position.
7. Wählen Sie im Fenster **Select scan type** (Messungstyp auswählen) die Option „SE-Femur (SE-Oberschenkel)“ aus.
8. Palpieren Sie das Bein des Patienten, um den Trochanter major zu bestimmen. Siehe [Abschnitt 8.2.1 Tipps zur Bestimmung des Trochanter major](#) auf Seite 29.
9. Drücken Sie auf dem Bedienfeld auf „Laser“.
10. Verwenden Sie die Steuerelemente „Arm“ und „Tisch“ auf dem Bedienfeld, um das Fadenkreuz des Lasers zu platzieren:
 - Ebene des Trochanter major
 - Die Mitte des Oberschenkelschafts ist leicht nach außen zum Außenrand des Oberschenkels hin versetzt, um die gesamte Länge des Oberschenkelknochens zu berücksichtigen.
11. Weisen Sie den Patienten an, sich möglichst nicht zu bewegen und normal zu atmen.

8.5.2 Positionierung für die SE-Oberschenkelmessung nach einer Hüftmessung

1. Nach der Durchführung einer einzelnen Hüftmessung können Sie auf Wunsch eine SE-Oberschenkelmessung durchführen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **SE Femur Scan** (SE-Oberschenkelmessung).

Das Fenster **Positioning Femur Scan** (Positionierung für die Oberschenkelmessung) wird angezeigt. Dort können Sie sehen, wo die automatische Positionierung des C-Bogens durch das System erfolgen wird. Auf diese Weise kann der Bediener das Messungsbild vor der Oberschenkelmessung noch neu positionieren.

3. Stellen Sie sicher, dass das Bild in der Ebene des Trochanter major beginnt und dass die Mitte des Oberschenkelschafts leicht zum Innenrand des Oberschenkels hin versetzt ist, um die gesamte Länge des Oberschenkelknochens zu berücksichtigen.
4. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

8.5.3 Starten der SE-Oberschenkelmessung



Warnung: *Wenn die Röntgen-Kontrolllampe am Bedienfeld nicht 10 Sekunden nach Abschluss der Messung erlischt, drücken Sie sofort die rote Nothalt-Taste. Wenden Sie sich an den Hologic-Kundendienst, bevor Sie weitere Vorgänge ausführen.*

1. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten). Die Anzeige „Röntgenquelle Ein“ blinkt, bis die Messung abgeschlossen ist.
2. Überprüfen Sie während der Bilderstellung, ob die Oberschenkelmessung korrekt erfolgt.

Wenn das Bild zufriedenstellend ist, warten Sie den Abschluss des Messvorgangs ab.

3. Wenn die SE-Oberschenkelmessung nicht korrekt positioniert ist, klicken Sie auf **Reposition Scan** (Messung neu positionieren), um die Messung für die Neupositionierung zu stoppen.

8.5.4 Analyse der SE-Oberschenkelmessung

Das Bild wird im Viewer-Fenster angezeigt.

Der Bediener kann mit dem Viewer das SE-Oberschenkelbild anzeigen.

Die Steuerelemente am Viewer bieten dem Bediener folgende Optionen:

- den View-Modus ändern
- zoomen
- Helligkeit und Kontrast des Bildes anpassen
- Anmerkungen hinzufügen
- Kommentare hinzufügen
- Lineale platzieren.

8.5.5 Visuelle Bewertung

1. Überprüfen Sie das Bild visuell im Hinblick auf Deformität^{1 2 3}, insbesondere entlang des seitlichen Kortex vom Trochanter minor bis an die suprakondyläre Femurerweiterung.
2. Suchen Sie nach Fokusreaktionen oder Verdickungen entlang des lateralen Kortex, die von einer quer verlaufenden strahlendurchlässigen Linie begleitet sein können.
3. Erhöhen Sie mithilfe der Viewer-Steuerelemente die Vergrößerung und stellen Sie den Kontrast ein.

Die Veränderungen im lateralen Kortex können subtil sein.



Hinweis *Die Bilder sollten von einem qualifizierten Mediziner angesehen werden.*

8.5.6 Toolbox „Bild“

Tabelle 9 Toolbox „Bild“

Werkzeug	Funktion
Multi View	Wenn diese Schaltfläche ausgewählt wird, wechselt der Viewer in den Multi View-Modus, bei dem im rechten Bildbereich ein zweites Bild angezeigt wird.
Mit den Grafik-Tools und Analyse-Tools können beide Bilder unabhängig voneinander bearbeitet werden. Wenn die beiden Bilder identisch sind, werden die für das Bild im Mittelbereich durchgeführten Analysen auch im rechten Bildbereich angezeigt.	
W-L-Steuerung	Kontrast und Helligkeit des Bildes werden eingestellt, indem Sie in der Mitte des Dreiecks auf die <i>Kugel</i> klicken und sie ziehen. Feineinstellung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild. 2. Klicken Sie auf Adjust WL (W-L anpassen). 3. Klicken Sie in das Bild und ziehen Sie den Cursor.
Invert (Invertieren)	Der Graustufenwert der einzelnen Pixel wird invertiert, so dass ein Negativ des Bildes entsteht.
Zoom	Dient zum Verkleinern und Vergrößern des Messungsbildes.

8.5.7 Registerkarte „Analysis Tools (Analyse-Tools)“

Mit den Analyse-Tools können im Bild festgestellte Deformitäten bewertet werden. Mit den Tools in diesem Bereich stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Steuerung der Methode des Hinzufügens von Anmerkungen und/oder Linealen
- Steuerung der Anzeige von Anmerkungen und Linealen auf dem Bild
- Anmerkungen ändern

8.5.8 Bewertung

Zwei Optionsfelder, die festlegen, welches Tool verwendet wird, wenn der Benutzer auf das Bild klickt.

Tabelle 10 Bewertung

Werkzeug	Funktion
Annotations (Anmerkungen)	Wenn diese Option ausgewählt ist und Sie mit der linken Maustaste auf ein Bild klicken, erscheint ein Fenster, in dem Text eingegeben und gespeichert werden kann. Es können bis zu zwei Anmerkungen erstellt werden.
Lineale	Wenn diese Option ausgewählt ist und Sie mit der linken Maustaste auf ein Bild klicken und es ziehen, wird ein Lineal erstellt. Mit den Linealen kann der Bediener die kortikale Dicke und/oder andere Details messen. Dazu werden die Lineale auf dem Messungsbild platziert. Es können bis zu sechs Lineale hinzugefügt werden.

Tabelle 11 Erstellen und Ändern von Linealen

Werkzeug	Funktion
Lineal hinzufügen	Der Cursor ändert sich in ein Fadenkreuz, wenn er über dem Messungsbild platziert ist. <ol style="list-style-type: none"> 1. Platzieren Sie das Fadenkreuz dort auf dem Bild, wo das Lineal beginnen soll. 2. Ziehen Sie eine Linie, um das Lineal anzulegen. Unter der Schaltfläche „Lineale“ wird die Länge des neuen Lineals (in Zentimetern) angegeben. 3. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Lineale hinzuzufügen.
Lineal auswählen	Der Cursor ändert sich in eine Hand, wenn er direkt auf einem Lineal platziert wird. Bei Anzeige des Handcursors klicken Sie, um ein Lineal auszuwählen.
Lineal verschieben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie das Lineal aus. 2. Klicken Sie bei angezeigtem Handcursor und ziehen Sie das Lineal in die gewünschte Position, oder 3. verschieben Sie das Lineal mit den Pfeiltasten auf der Tastatur nach oben, unten, links oder rechts.

Tabelle 11 Erstellen und Ändern von Linealen

Werkzeug	Funktion
Endpunkt des Lineals auswählen	Der Cursor ändert sich in einen Pfeil, wenn Sie den Endpunkt des Lineals erreicht haben. Klicken Sie bei Anzeige des Pfeilcursors, um den Endpunkt festzulegen.
Größe des Lineals ändern	Bei angezeigtem Pfeilcursor <ol style="list-style-type: none"> 1. klicken und ziehen Sie den Endpunkt bis zur gewünschten Länge und Position oder 2. verschieben Sie den Endpunkt mit den Pfeiltasten auf der Tastatur nach oben, unten, links oder rechts.
Ein Lineal löschen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie das Lineal aus und drücken Sie die Löschtaste auf der Tastatur, oder 2. klicken Sie bei angezeigtem Handcursor mit der rechten Maustaste und wählen Sie Delete (Löschen) aus.

Anzeigeoptionen

Zwei Kontrollkästchen, mit denen festgelegt wird, welche Bewertungen im Bild angezeigt werden.

Tabelle 12 Anzeigeoptionen

Werkzeug	Funktion
Annotations (Anmerkungen)	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Positionen aller im Bild erstellten Anmerkungen angezeigt. Sie werden als 1 und 2 bezeichnet.
Lineale	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden alle im Bild erstellten Lineale angezeigt.

Anmerkungen ändern

Drei Schaltflächen, die es dem Benutzer ermöglichen, Anmerkungen hinzuzufügen oder zu ändern. Diese Schaltflächen sind aktiviert, wenn ein Fenster für Anmerkungen auf dem Bild erscheint.

Tabelle 13 Anmerkungen ändern

Werkzeug	Funktion
Fokale Verdichtung	Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster zur Bearbeitung von Anmerkungen angezeigt und im Bearbeitungsfeld erscheint der folgende Text: „Focal reaction or thickening along the lateral cortex of the femoral shaft is present. (Entlang des lateralen Kortex des femoralen Schafts liegt eine fokale Reaktion oder Verdichtung vor.)“
Strahlendurchlässige Linie	Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster zur Bearbeitung von Anmerkungen angezeigt und im Bearbeitungsfeld erscheint der folgende Text: „A transverse radiolucent line is present. (Es liegt eine transversale strahlendurchlässige Linie vor.)“
Freitext	Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster zur Bearbeitung von Anmerkungen angezeigt, in das ein Freitext eingegeben werden kann.

Bewertung atypischer Oberschenkelfrakturen

Der Text aller Anmerkungen und die Längen sämtlicher Lineale, die im Bild platziert wurden, werden in diesem Abschnitt angezeigt. Außerdem gibt es einen Abschnitt für Kommentare, in den ein Freitext eingegeben werden kann, und zwei Schaltflächen mit vordefinierten Kommentaren, die bei Klicken in das Kommentarfeld übernommen werden.

Tabelle 14 Bewertung atypischer Oberschenkelfrakturen

Werkzeug	Funktion
Korrelation ratsam	Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird folgender Text in den Kommentarabschnitt eingefügt: „Clinical correlation is advised as these features may be consistent with an incomplete atypical femur fracture. (Da diese Merkmale einer unvollständigen, atypischen Oberschenkelfraktur entsprechen könnten, ist die klinische Korrelation ratsam.)“
Komplikation durch Arzneimittel	Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird folgender Text in den Kommentarabschnitt eingefügt: „Atypical femur fractures are a complication associated with long term use of antiresorptive therapy. (Atypische Oberschenkelfrakturen sind eine mit der Langzeitanwendung einer resorptionshemmenden Therapie assoziierte Komplikation.)“

8.6 Referenzen

Die folgenden Referenzen enthalten weitere Informationen zu atypischen Frakturen des Oberschenkelknochens und den damit verbundenen radiographischen Erscheinungsbildern und Risikofaktoren:

1. Elizabeth Shane, David Burr, Peter R Ebeling, Bo Abrahamsen, Robert A Adler, et al. „Atypical Subtrochanteric and Diaphyseal Femoral Fractures: Report of a Task Force of the American Society for Bone and Mineral Research.“ Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 25, No. 11, November 2010
2. Elizabeth Shane (Co-Chair)*, David Burr, Bo Abrahamsen, Robert A. Adler, Thomas D. Brown, Angela M. Cheung, Felicia Cosman, Jeffrey R. Curtis, Richard Dell, David W. Dempster, Peter R. Ebeling, Thomas A. Einhorn, Harry K. Genant, Piet Geusens, Klaus Klaushofer, Joseph M. Lane, Fergus McKiernan, Ross McKinney, Alvin Ng, Jeri Nieves, Regis O'Keefe, Socrates Papapoulos, Tet Sen Howe, Marjolein C.H. van der Meulen, Robert S. Weinstein, Michael P. Whyte. Atypical subtrochanteric and diaphyseal femoral fractures: Second report of a task force of the American society for bone and mineral research, J Bone Miner Res. DOI: 10.1002/jbmr.1998
3. Zehava Sadka Rosenberg, Renata La Rocca Vieira, Sarah S. Chan, James Babb, Yakup Akyol, et al. „Bisphosphonate-Related Complete Atypical Subtrochanteric Femoral Fractures: Diagnostic Utility of Radiography.“ AJR:197, Oktober 2011
4. Mitteilung der FDA bezüglich Arzneimittelsicherheit: Safety update for osteoporosis drugs, bisphosphonates, and atypical fractures; <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm229009.htm>

8.6.1 Dual-Hip-Messungen

1. Klicken Sie nach der Analyse der rechten Hüfte auf **Close** (Schließen).
2. Um die linke Hüfte zu analysieren, klicken Sie auf **Analyze Another Scan** (Weitere Messung analysieren).

8.7 Erstellen und Drucken von Berichten

Siehe [Abschnitt 20 Berichte](#) auf Seite 104.


9 Unterarmuntersuchung

1. Beginnen Sie mit der Untersuchung entsprechend [Abschnitt 4.4 Verwenden der Worklist zum Laden eines Patientendatensatzes](#) auf Seite 13.
2. Wählen Sie im Fenster **Select Scan Type** (Messungstyp) auswählen die Option **Left Forearm** (Linker Unterarm) oder **Right Forearm** (Rechter Unterarm) aus.

9.1 Messen des Unterarms des Patienten

1. Messen Sie den Unterarm bis zum ulnaren Styloid [1] in Zentimetern. ([Abbildung 15](#)).
2. Notieren Sie den Messwert.

Abbildung 15 Messen des linken Unterarms

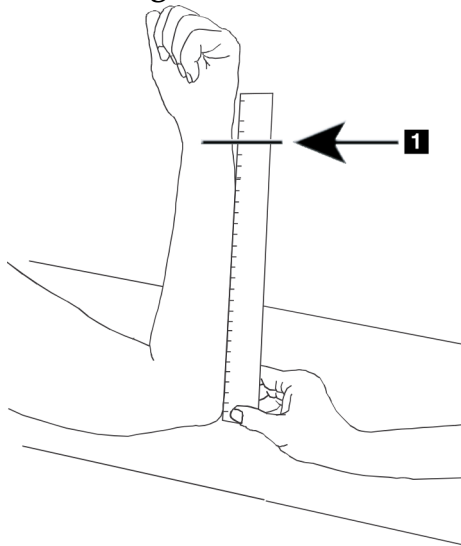

9.2 Positionieren des Patienten

1. Drücken Sie am Bedienfeld auf die Taste **Center (Mitte)**.
2. Positionieren Sie den Patienten wie dargestellt in:
 - [Abbildung 16](#) für den linken Unterarm
 - [Abbildung 18](#) für den rechten Unterarm
 - [Abbildung 20](#) und [Abbildung 21](#) für den linken Unterarm in Rückenlage
 - [Abbildung 22](#) für den rechten Unterarm in Rückenlage.

Abbildung 16 Positionierung des linken Unterarms



Abbildung 17 Laserposition auf linkem Arm


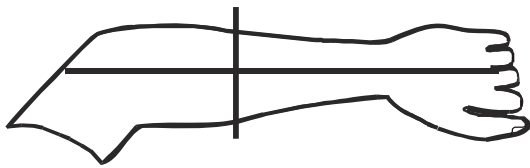


Abbildung 18 Positionierung des rechten Unterarms



Abbildung 19 Laserposition auf rechtem Arm

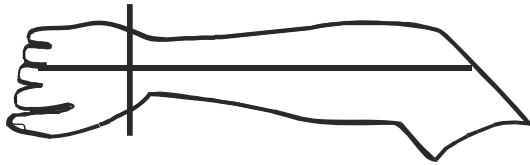

9.2.1 Positionieren des Patienten für die Unterarmuntersuchung in Rückenlage

1. Positionieren Sie die Hüfte des Patienten an der äußeren Tischkante.
2. Platzieren Sie für den rechten Arm den linken Arm des Patienten über dem Brustkorb. Platzieren Sie für den linken Arm den rechten Arm des Patienten über dem Brustkorb.
3. Beugen Sie den Ellbogen so, dass der Unterarm parallel zur Längsachse des Tisches liegt.
4. Richten Sie die langen Knochen des Unterarms mit der langen Achse des Lasers aus.
5. Stellen Sie sicher, dass im Umkreis von 1 cm von Radius- und Ulnarseite des Unterarms ein Freiraum besteht.

Abbildung 20 Patient Ein/Aus-Position für linken Unterarm in Rückenlage
C-Bogen ganz nach rechts bewegen

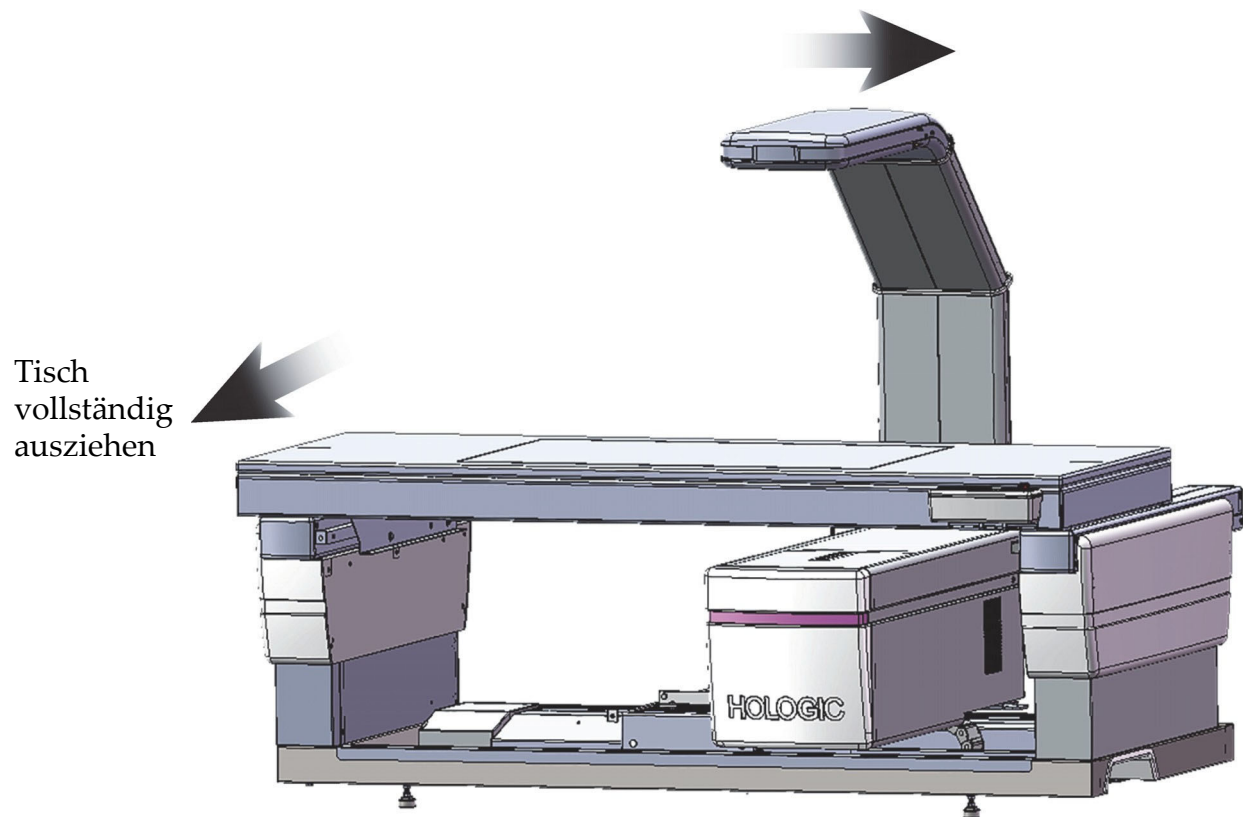


Abbildung 21 Patientenposition für linken Unterarm in Rückenlage
Lassen Sie 1 cm Freiraum auf jeder Seite des Arms.


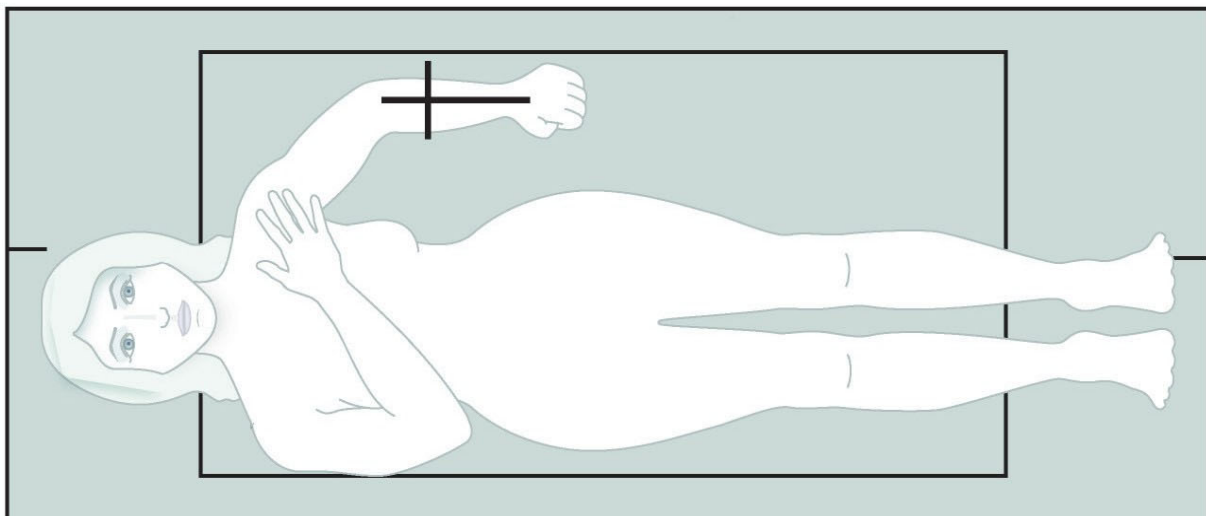


Abbildung 22 Patientenposition für rechten Unterarm in Rückenlage

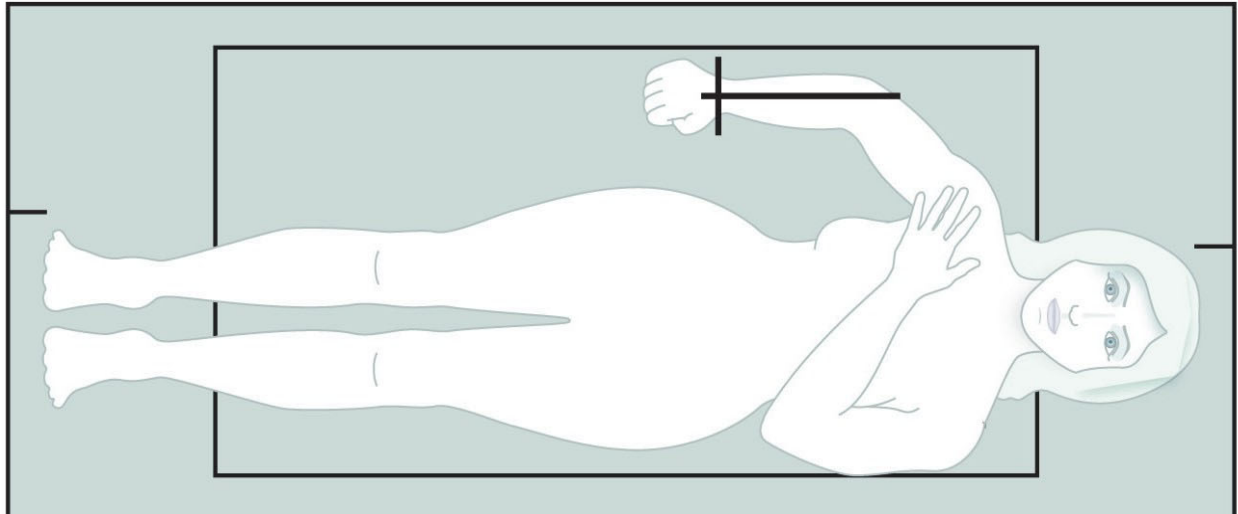

9.3 Positionieren des C-Bogens

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld auf **Laser**.
2. Verwenden Sie am Bedienfeld die **Tasten Arm**, um den Anfangspunkt auf dem Unterarm genau zu positionieren.
 - **Messung des linken Unterarms:** Die Messung beginnt am mittleren Unterarm. Überprüfen Sie, ob sich die erste Reihe der Karpalknochen innerhalb von 15 cm vom Startpunkt befindet ([Abbildung 17](#)).
 - **Messung des rechten Unterarms:** Die Messung beginnt an der ersten Reihe der Karpalknochen ([Abbildung 19](#)).
3. Weisen Sie den Patienten an, sich möglichst nicht zu bewegen und normal zu atmen.

9.4 Starten der Unterarmmessung



Warnung: *Wenn die Röntgen-Kontrolllampe am Bedienfeld nicht 10 Sekunden nach Abschluss der Messung erlischt, drücken Sie sofort die rote Nothalt-Taste. Wenden Sie sich an den Hologic-Kundendienst, bevor Sie weitere Vorgänge ausführen.*

1. Klicken Sie auf **Start Scan (Messung starten)**. Die Anzeige *Röntgenquelle Ein* blinkt, bis die Messung abgeschlossen ist.
2. Überprüfen Sie das Bild.
 - Radius und Ulna müssen gerade und zentriert angezeigt werden.

- Im Bild wird mindestens die erste Reihe der Karpalknochen angezeigt (bei einer Messung des rechten Unterarms im unteren Bereich oder bei einer Messung des linken Unterarms im oberen Bereich).
 - Auf der Ulna-Seite ist mindestens ebenso viel Luft vorhanden, wie der Ulna-Schaft breit ist.
3. Wenn das Bild zufriedenstellend ist, klicken Sie auf **Reposition Scan** (Messung neu positionieren).
 4. Wenn das Bild zufriedenstellend ist, warten Sie den Abschluss des Messvorgangs ab.

9.4.1 Neupositionieren der Messung (falls erforderlich)

1. Klicken Sie vor Abschluss der Messung auf **Reposition Scan** (Messung neu positionieren).
2. Positionieren Sie den Cursor über der Unterarmabbildung.



Hinweis Sie können das Bild mit den Bildlaufleisten neu positionieren.

Abbildung 23 Neupositionierung des Unterarms



3. So positionieren Sie den Unterarm:
 - Bewegen Sie die erste Reihe der Karpalknochen innerhalb der blauen horizontalen Positionierungslinie und der äußeren Begrenzung des Messungsfelds.
 - Radius und Ulna müssen parallel zwischen den beiden blauen vertikalen Positionierungslinien verlaufen.

4. Wenn der Unterarm richtig positioniert wurde, klicken Sie auf **Restart Scan** (Messung neu starten).
5. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten).

9.4.2 Neupositionierung des Patienten (falls erforderlich)

1. Positionieren Sie den Unterarm so, dass dieser gerade ist.



Hinweis *Der Unterarm des Patienten kann bewegt werden, um weitere Karpalknochen ein- oder auszuschließen.*

2. Klicken Sie auf **Restart Scan** (Messung neu starten).
3. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten).
4. Werten Sie das Bild aus, sobald es angezeigt wird. Wenn das Bild zufriedenstellend ist, warten Sie den Abschluss des Messvorgangs ab.

9.5 Analysieren der Messung

1. Klicken Sie auf **Analyze Scan** (Messung analysieren).



Hinweis *Beschreibungen der Schaltflächen für die Analyseschritte und Toolboxes finden Sie unter [Abschnitt 6.1 Schaltflächen für Analyseschritte](#) auf Seite 16.*

2. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>.

9.5.1 Eingeben der Länge des Unterarms

1. Klicken Sie auf **Length** (Länge). Die Länge des Unterarms muss zwischen 4,0 und 42,0 Zentimeter betragen.
2. Geben Sie die Länge in Zentimetern ein.

9.5.2 Definieren der globalen ROI

1. Klicken Sie auf **Globale ROI**.
2. Verwenden Sie die Tools **Whole Mode** (Gesamtmodus) und **Line Mode** (Linienmodus), um die ROI so anzupassen, wie es in der [Abbildung 24](#) dargestellt ist.

Abbildung 24 Unterarm-ROI

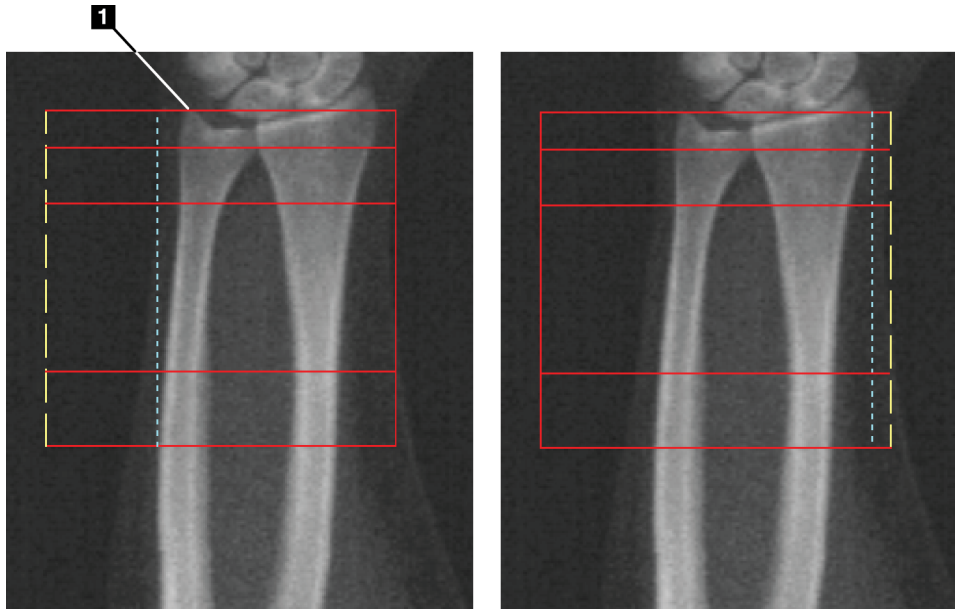


Tabelle 15 Processus Styloideus Ulnae

Teil	Beschreibung
1	Processus Styloideus Ulnae



Hinweis Bei Verwendung des Gesamtmodus sollte die obere Linie des Kastens der globalen ROI an der Spitze des Styloideus Ulnae platziert werden.

Bei Verwendung des Linienmodus verschieben Sie die ROI-Linie auf der Radius-Seite nach innen, bis die blaue gestrichelte Linie den lateralen Rand des Radius berührt.


Wiederholen Sie dieses Verfahren auf der Ulna-Seite und stellen Sie dabei sicher, dass etwa 1–2 cm Luft in die globale ROI auf der Ulna-Seite einbezogen werden.

Bei Patienten mit langen Unterarmen muss die gestrichelte blaue Linie möglicherweise vom lateralen Rand der Ulna nach außen verschoben werden, um die erforderlichen 1–2 cm Luft-Hintergrundpunkte einzubeziehen.

9.5.3 Anzeigen der Knochenmarkierung

1. Klicken Sie auf **Bone Map** (Knochenmarkierung).
2. In den meisten Fällen ist es nicht erforderlich, die Knochenmarkierung zu bearbeiten. Wenn dennoch eine Bearbeitung erforderlich ist, verwenden Sie die Tools der Toolbox, wie in [Abbildung 25](#) gezeigt.

Abbildung 25 Unterarm-Knochenmarkierung

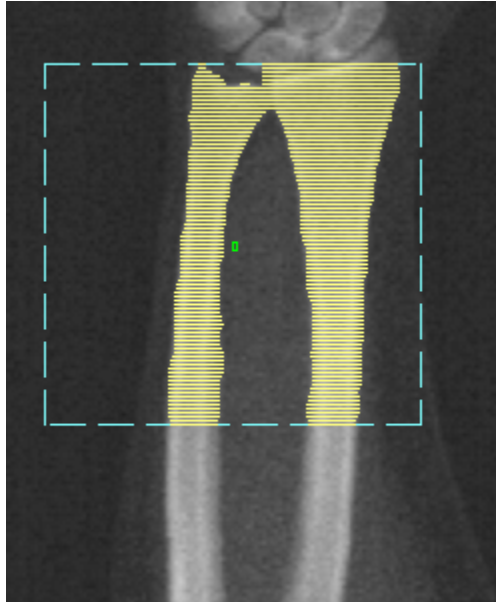

Hinweis Die globale ROI muss geeignete Luftpunkte enthalten, um angemessene Knochenmarkierung und Analyseergebnisse sicherzustellen. Bei manchen Patienten muss die blaue gestrichelte Linie auf der Ulna-Seite möglicherweise nach außen verschoben werden, um angemessene Luftpunkte einzuschließen


9.5.4 Überprüfen des Mittellinien-/UD-Bereichs

1. Klicken Sie auf **MID/UD** (Mittellinie/UD).

In den meisten Fällen ist ein Anpassen des Mittellinien-/UD-Bereiches oder ein Neupositionieren der Ulna/Radius-Trennung nicht erforderlich.

2. Wenn dennoch ein Anpassen erforderlich ist, verwenden Sie die Tools der Toolbox, wie in [Abbildung 26](#) gezeigt.

Abbildung 26 Unterarm-Mittellinie/UD

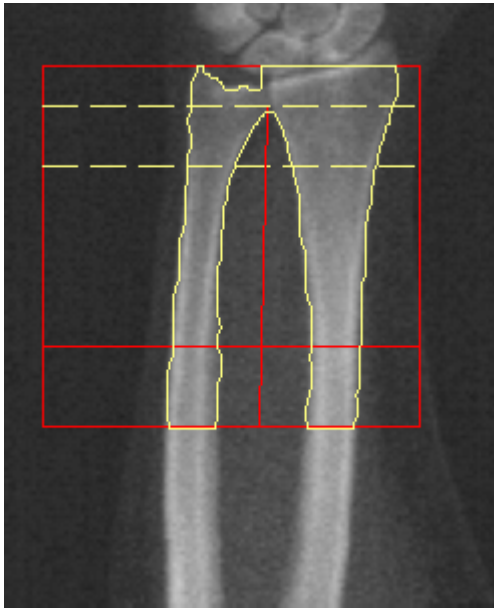

9.6 Anzeigen der Ergebnisse

Klicken Sie auf **Results** (Ergebnisse).

9.7 Beenden der Analyse

1. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).
2. Klicken Sie auf **Report** (Bericht).

9.8 Erstellen und Drucken von Berichten

Siehe [Abschnitt 20 Berichte](#) auf Seite 104.

10 Ganzkörperuntersuchung

Beginnen Sie mit der Untersuchung entsprechend [Abschnitt 4.4 Verwenden der Worklist zum Laden eines Patientendatensatzes](#) auf Seite 13. Wählen Sie im Fenster Select **Scan Type** (Messungstyp auswählen) die Option **Whole Body** (Ganzkörper) aus.

10.1 Körperzusammensetzungsanalyse

Die Körperzusammensetzungsanalyse von Hologic ermöglicht die Analyse der Zusammensetzung des Weichgewebes des gesamten Körpers und die Nachverfolgung von Änderungen in der Zusammensetzung des Weichgewebes, die im Laufe der Zeit aus [Interventionen](#) wie einer Diät und körperlichen Übungen resultieren. Die Analyse der Fettmasse, der Magermasse und des prozentualen Anteils der Fettmasse kann für den gesamten Körper sowie für Kopf, Arme, Rumpf, Becken und Beine erfolgen.

QDR-Ganzkörpersysteme liefern Ergebnisse über die Körperzusammensetzung:

- Fett
- Magermasse in Kombination mit dem Knochenmineralgehalt (BMC)
- Magermasse (ohne Knochenmineralgehalt)
- % Fett. „% Fett“ ergibt sich aus der Fettmasse dividiert durch die Gesamtfettmasse zuzüglich der Magermasse und des BMC.

Die Viszeralfett-Software von Hologic schätzt den Anteil des viszeralen Körperfettgewebes (Viszeralfett) bei erwachsenen Männern und nicht-schwangeren Frauen. Die Ergebnisse werden ausgegeben als:

- Viszeralfettbereich
- Viszeralfettmasse
- Viszeralfettvolumen.

Aufgrund der Empfindlichkeit der Weichgewebeanalyse *sollten Patienten während der Messung nur ein Krankenhausbettenlaken oder einen Papierumhang tragen*. Sämtliche Kleidung sollte so weit wie möglich unter den Patienten gelegt werden. Wenn zum Bedecken des Patienten ein Laken verwendet wird, muss der Patient vollständig vom Kinn abwärts (einschließlich aller Extremitäten) zugedeckt sein. Kissen dürfen sich nicht im Messungsbereich befinden, da das Material die Weichgewebemessung beeinträchtigt.

10.2 Positionieren des Patienten

1. Positionieren Sie den Patienten wie dargestellt ([Abbildung 27](#)).




Hinweis Weisen Sie große Patienten dazu an, ihre Hände seitlich vertikal zu platzieren, so dass der kleine Finger auf der Tischoberfläche aufliegt. Die Hände sollten sich neben den Oberschenkeln befinden, damit sich Hände und Arme innerhalb der Tischgrenzen befinden.



Warnung: Während der Ganzkörperuntersuchung müssen alle Körperteile des Patienten auf oder über der Fläche des Untersuchungstisches liegen, um Quetschpunkte zu vermeiden.

2. Weisen Sie den Patienten an, sich möglichst nicht zu bewegen und normal zu atmen.

Abbildung 27 Ganzkörperpositionierung

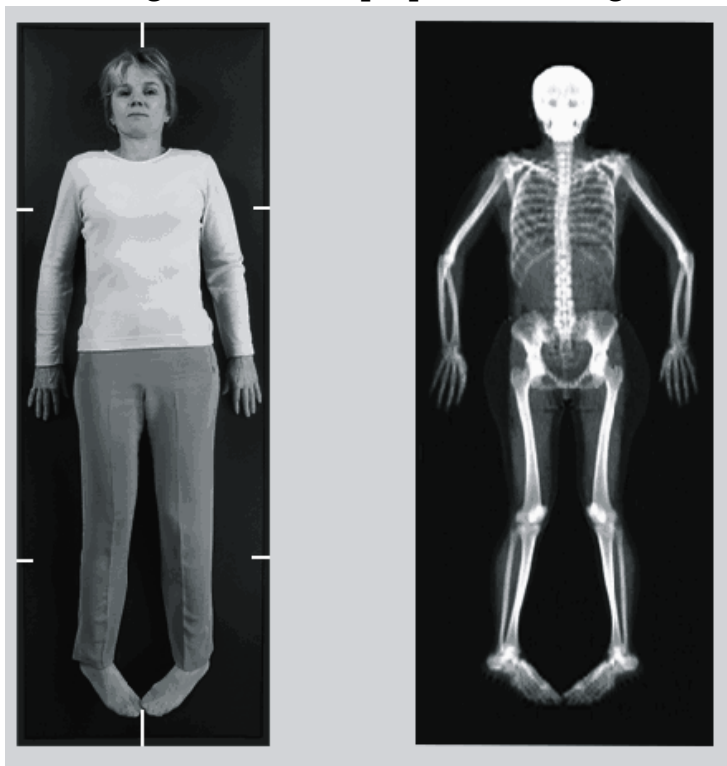

10.3 Starten der Ganzkörpermessung



Warnung: Wenn die Röntgen-Kontrolllampe am Bedienfeld nicht 10 Sekunden nach Abschluss der Messung erlischt, drücken Sie sofort die rote Nothalt-Taste. Wenden Sie sich an den Hologic-Kundendienst, bevor Sie weitere Vorgänge ausführen.

1. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten). Die Anzeige **Röntgenquelle Ein** blinkt, bis die Messung abgeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass sich die Arme des Patienten beim ersten und beim letzten Durchgang des C-Bogens innerhalb des Messungsbereiches befinden. Der Patient sollte sich nicht bewegen, bis der Messvorgang abgeschlossen ist.

10.4 Fächerstrahlanalyse – Ganzkörper

Bei der standardmäßigen Methode „Ganzkörper-Fächerstrahl“ des QDR-Systems wird die Funktion „Ganzkörper automatisch“ verwendet, mit der die Analyse für Patienten mit einem Gewicht von 8 kg (17,6 lbs) bis 40 kg (88 lbs) automatisch angepasst wird. Bei einem Gewicht von über 40 kg (88 lbs) liefert die Analyse „Ganzkörper automatisch“ Ergebnisse, die denen früherer Versionen der Ganzkörperanalyse entsprechen. Die Software wurde nicht für Patienten mit einem Gewicht von unter 8 kg (17,6 lbs) bewertet und eine Verwendung für Patienten unterhalb dieses Gewichtsbereiches wird nicht empfohlen.

Da die Funktion „Ganzkörper automatisch“ automatisch eine optimierte Analyse für Patienten mit weniger als 40 kg (88 lbs) Körpergewicht liefert, wird die Analysemethode „Legacy PWB“ beim Menschen nicht mehr empfohlen. Für Patienten, die zuvor mithilfe der Funktion „Legacy PWB“ analysiert wurden, sollte mit der Funktion „Ganzkörper automatisch“ eine neue Analyse erstellt werden, da die Referenzdatenbankvergleiche und Z-Scores ungültig sind.



Hinweis *Bei Ganzkörperuntersuchungen von Patienten unter 40 kg, z. B. Kindern, muss unbedingt sichergestellt werden, dass die Funktion „Auto Whole Body (Ganzkörper automatisch)“ in den Systemkonfigurationen für die Analyse nicht deaktiviert ist. Es sollte die Standardeinstellung verwendet werden, d. h. „Ganzkörper automatisch“ sollte aktiviert sein.*

10.5 Analysieren der Messung



Hinweis *Die Körperzusammensetzungsanalyse wird gleichzeitig mit der Ganzkörperanalyse durchgeführt. Das Analysefenster wird anfangs mit aktivierten Bereichen und aktiviertem Linienmodus angezeigt.*

1. Klicken Sie auf **Analyze Scan** (Messung analysieren).



Hinweis *Beschreibungen der Schaltflächen für die Analyseschritte und Toolboxes finden Sie unter [Abschnitt 6.1 Schaltflächen für Analyseschritte](#) auf Seite 16.*

2. Klicken Sie auf **Results** (Ergebnisse).

10.5.1 Körperzusammensetzungsanalyse

Für die Berechnung von Weichgewebe- und Knochenmineralwerten werden dieselben [anatomischen Regionen](#) verwendet. Um die Weichgewebewerte korrekt zu ermitteln, [müssen Sie die anatomischen Schnittlinien so anpassen, dass sie das dem Bereich entsprechende Weichgewebe umfassen](#). Passen Sie beispielsweise die Beinbereiche so an, dass sich das Oberschenkelgewebe im entsprechenden Beinbereich und nicht in den Armbereichen befindet.

10.5.2 Standardplatzierung von Ganzkörperbereichen


Nach Abschließen der Standardplatzierung sollte die Genauigkeit der Bereichslinien überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Weitere Informationen zur korrekten Analyse finden Sie unter [Abbildung 28](#) und [Abbildung 29](#).

Überprüfen der horizontalen Linien und der Trennlinien des unteren Beckens ([Abbildung 28](#)).

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Halslinie direkt unter dem Kiefer des Patienten befindet.
2. Stellen Sie sicher, dass die T12–L1-Linie in der Wirbelsäule ungefähr auf Ebene T12–L1 liegt.
3. Stellen Sie sicher, dass die obere Beckenlinie direkt über der Crista iliaca liegt.
4. Stellen Sie sicher, dass die Trennlinien des unteren Beckens Beine und Rumpf trennen.

Ist eine Anpassung erforderlich, verwenden Sie die Tools in der Toolbox „Bereiche“ und ziehen Sie die Linien in die korrekte Position.

Abbildung 28 Ganzkörperanalyse (Horizontale Linien und Linien des unteren Beckens)

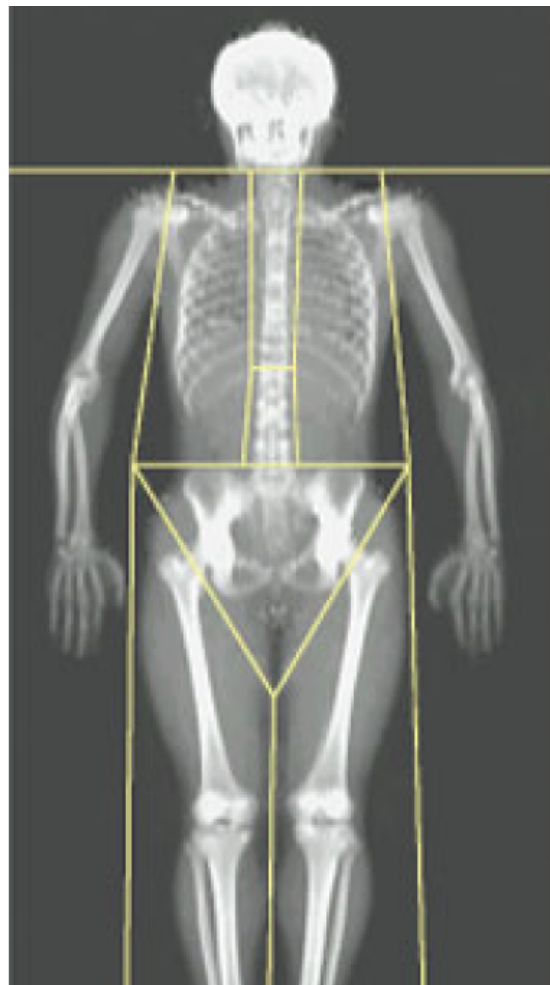


1. Halslinie
2. T12-L1-Linie
3. Obere Beckenlinie
4. Trennlinien des unteren Beckens

Überprüfen der vertikalen Linien ([Abbildung 29](#))

1. Stellen Sie sicher, dass die Brustlinien nahe am Brustkorb liegen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Wirbelsäulenlinien dicht an der Wirbelsäule liegen.
3. Stellen Sie sicher, dass sich die Beinlinien nahe am Bein befinden.
4. Stellen Sie sicher, dass die Beintrennlinie Beine und Füße gleichmäßig trennt.

Ist eine Anpassung erforderlich, verwenden Sie die Tools in der Toolbox „Bereiche“ und ziehen Sie die Linien in die korrekte Position.

Abbildung 29 Ganzkörperanalyse (Vertikale Linien)

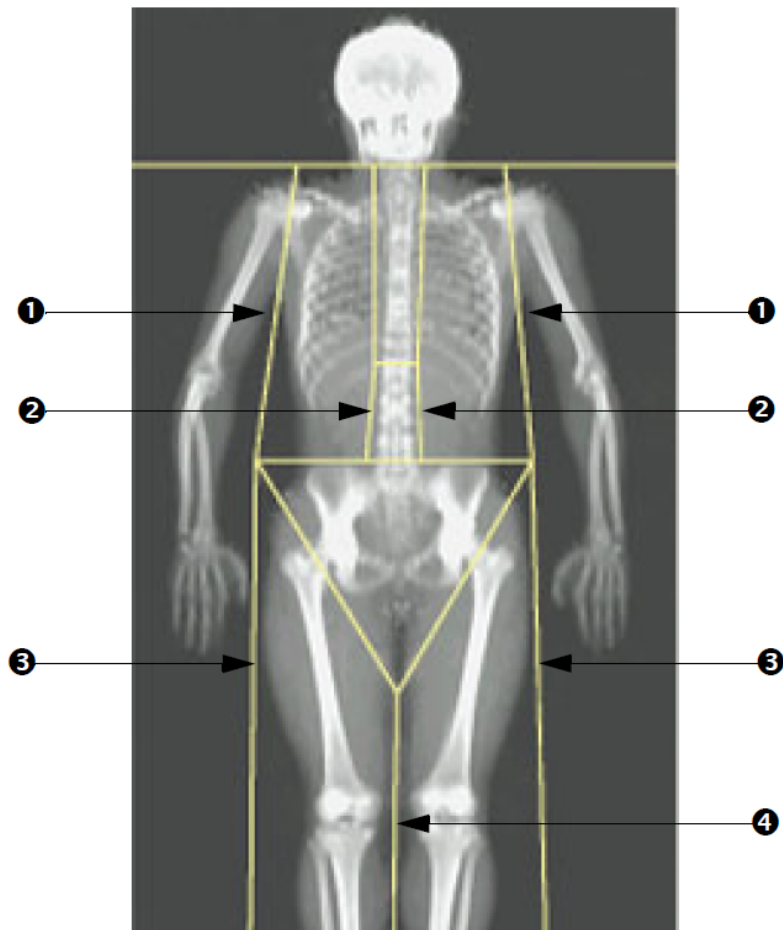

1. Brustlinien
2. Wirbelsäulenlinien
3. Beinlinien
4. Beintrennlinie

So nehmen Sie bei Bedarf Feineinstellungen der vertikalen Linien vor:
Falls erforderlich, verwenden Sie die Punktmodus-Steuererelemente in der Toolbox „Bereiche“, um die vertikalen Linien wie folgt (fein) einzustellen:

1. Ziehen Sie den Punkt auf der linken Schulter so, dass er zwischen dem Caput humeri und der Skapula an der Fossa glenoidalis liegt. Wiederholen Sie diesen Schritt für die rechte Schulter.
2. Ziehen Sie die drei Punkte auf der linken Seite der Wirbelsäule in die Nähe der Wirbelsäule, sodass diese die Kurvenform möglichst gut abbilden. Wiederholen Sie diesen Schritt für die drei Punkte auf der rechten Seite der Wirbelsäule.
3. Ziehen Sie bei Bedarf den linken Punkt über der Crista iliaca an den Seiten heraus, um Weichgewebe des Brustkorbs und der Oberschenkel einzuschließen. Wiederholen Sie diesen Schritt für den rechten Punkt über der Crista iliaca.
4. Ziehen Sie die untere Spitze des Dreiecks unterhalb des Beckens so, dass beide Schenkelhälfte halbiert werden.

5. Bewegen Sie das Bild mit der Bildlaufleiste ans Ende der Messung. Ziehen Sie den linken und rechten Punkt in der Nähe der Füße so, dass möglichst viel Weichgewebe der Oberschenkel eingeschlossen wird, jedoch nicht die Hände und Finger des Patienten.

10.5.3 Anpassung der A/G-Bereiche (falls erforderlich)

Klicken Sie auf „A/G Regions (A/G-Bereiche)“.



Hinweis *Eine Anpassung der A/G-Bereiche ist in der Regel nicht erforderlich. Passen Sie die A/G-Bereiche nur an, falls dies notwendig ist.*

Überprüfen Sie mithilfe von Abbildung 30 Android- und Gynoid-Bereiche wie folgt:

Android-ROI


1. Die Höhe des Android-Bereiches sollte 20 % des Abstands zwischen horizontaler Beckenlinie und Halslinie entsprechen.
2. Die untere Grenze des Android-Bereiches muss mit der horizontalen Beckenlinie übereinstimmen.
3. Stellen Sie sicher, dass die seitlichen Grenzen des Android-Bereiches mit den Armlinien übereinstimmen.

Gynoid-ROI

1. Die Höhe des Gynoid-Bereiches sollte der doppelten Höhe des Android-Bereiches entsprechen.
2. Stellen Sie sicher, dass die obere Grenze des Gynoid-Bereiches unter der horizontalen Beckenlinie liegt, wobei der Abstand das 1,5-Fache der Höhe des Android-Bereiches beträgt.
3. Stellen Sie sicher, dass die seitlichen Grenzen des Gynoid-Bereiches mit den Armlinien übereinstimmen.

Ist eine Anpassung erforderlich, verwenden Sie die Tools in der Toolbox „Android/Gynoid SubRegion (Unterbereich android/gynoid“ und ziehen Sie die Linien in die korrekte Position.

Abbildung 30 A/G-Bereiche

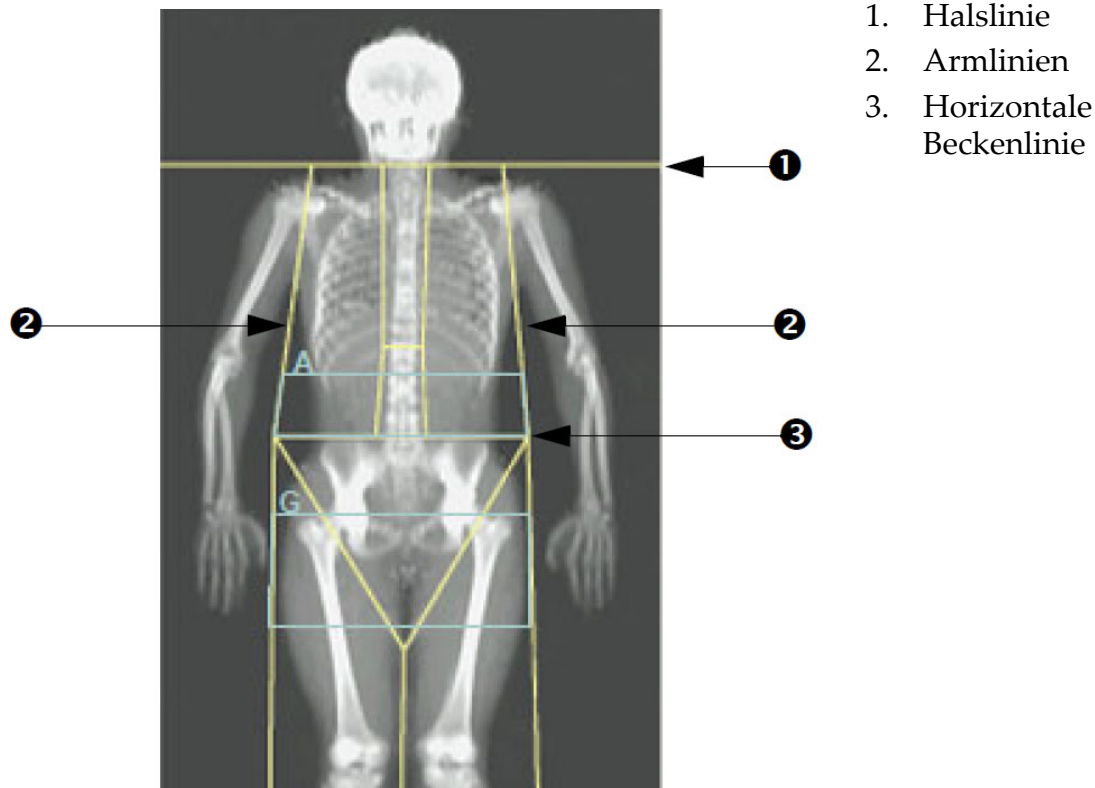

10.5.4 Viszerales Körperfettgewebe

Viszerales Körperfettgewebe (Visceral Adipose Tissue, VAT) bezeichnet das Fettgewebe innerhalb der Abdominalhöhle, **d. h. unterhalb der inneren Bauchmuskelschicht**. Horizon-Ergebnisse für den VAT-Bereich sind entsprechend kalibriert und korrelieren in hohem Maße mit Ergebnissen für VAT-Bereiche einer CT-Schichtaufnahme auf Ebene L4–L5 ([Abbildung 31](#))

Die VAT-Bereiche besetzen einen Streifen, der die Abdominalhöhle des Patienten zwischen Becken und Brustkorb kreuzt. Ein Bereich bedeckt die gesamte Breite dieses Streifens, von einer Körperseite bis zu anderen. Der andere Bereich beinhaltet nur das Innere der Abdominalhöhle, vom Innenrand der Bauchmuskelschicht auf einer Körperseite bis zum Innenrand der Bauchmuskelschicht auf der anderen Seite ([Abbildung 32](#)).

VAT-Bereiche stehen nur auf Horizon A-, W- und Wi-Systemen mit APEX 4.0 und neuer zur Verfügung.

Abbildung 31 VAT-Bereiche als CT-Schicht dargestellt



1. Subkutanes Fett
2. Bauchorgane
3. Bauchmuskelschicht
4. VAT


10.5.5 Anpassung der VAT-Bereiche (falls erforderlich)



Hinweis *Eine manuelle Anpassung ist in der Regel nicht erforderlich. Verzichten Sie auf geringfügige Anpassungen.*

1. Klicken Sie auf „A/G Regions (A/G-Bereiche)“.
2. Beachten Sie [Abbildung 32](#) und stellen Sie Kontrast und Helligkeit des Bildes ein, um Folgendes zu erkennen:
 - Bauchmuskeln beidseitig der Viszeralhöhle
 - dunkles subkutanes Fett am Außenrand des Abdomens.


Abbildung 32 Abdominalgewebe-Details

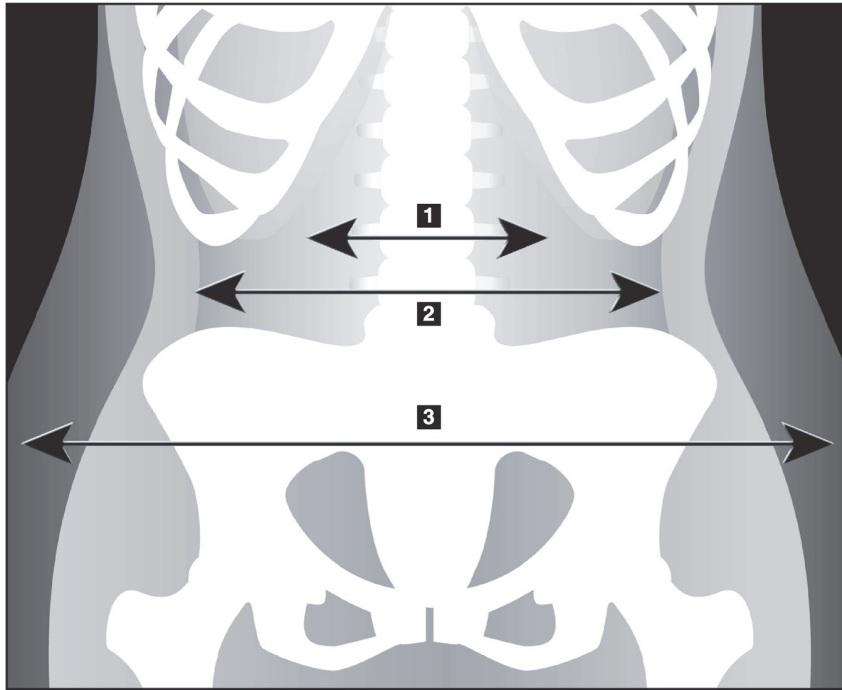

1. Viszeralhöhle
2. Innere Bauchmuskelschicht
3. Subkutanes Fett

4. Stellen Sie sicher, dass Sie den Beckenknochen aus den VAT-Bereichen ausschließen. Die Beckenschnittlinie legt die vertikale Positionierung der VAT-Bereiche fest. Ziehen Sie die Beckenschnittlinie so, dass sie gerade oberhalb der Crista iliaca liegt.
5. Stellen Sie sicher, dass sich der Abdominalbereich von der äußeren Hautlinie einer Körperseite bis zur äußeren Hautlinie der anderen Seite erstreckt. Das größere Rechteck legt den Abdominalbereich fest ([Abbildung 33](#)).
6. Stellen Sie sicher, dass die nächste Gruppe lateraler Linien der Abdominalregion am Rand der seitlich sichtbaren subkutanen Fettschicht direkt außerhalb der Bauchmuskelschicht positioniert wird. ([Abbildung 33](#)).
7. Stellen Sie sicher, dass die lateralen Linien, die die Viszeralhöhle festlegen, am inneren Rand der Bauchmuskelschicht platziert sind. ([Abbildung 33](#)).

Abbildung 33 VAT-Bereiche

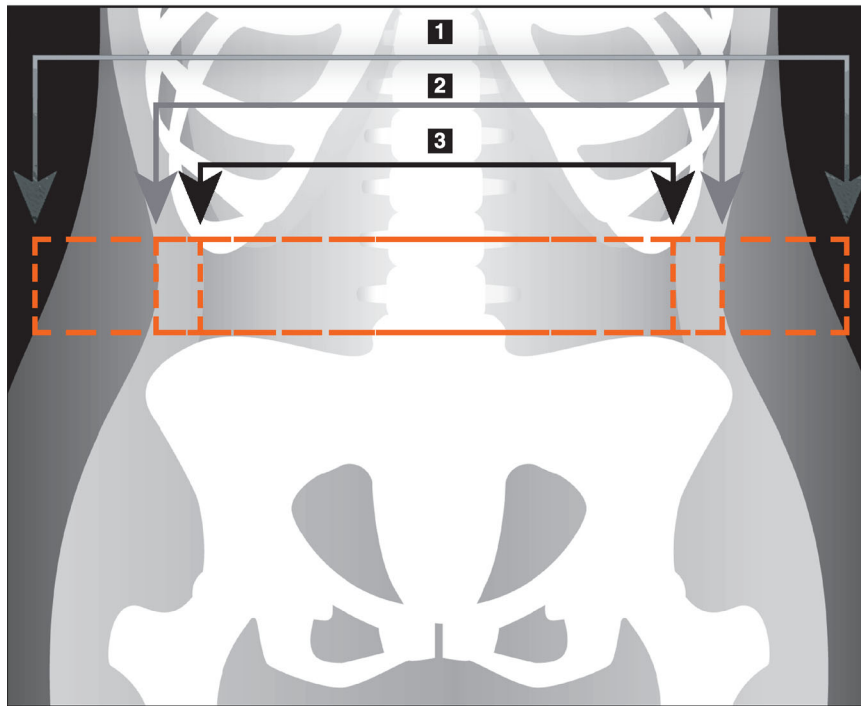

1. Abdominalbereich
2. Rand der subkutanen Fettschicht
3. Viszeralhöhle

Sie können die vertikalen VAT-Linien auswählen und verschieben. Für die VAT-Option stehen Gesamt- und Linienmodi zur Verfügung. Der Punktmodus ist für diese Option nicht verfügbar.

10.5.6 VAT-Referenzen

Auswahl von Literaturhinweisen für klinische Einsatzmöglichkeiten der Schätzung von Viszeralfett:

- Sam, S., Haffner, S., Davidson, M. H., D'Agostino Sr., R. B., Feinstein, S., Kondos et al. „Relationship of Abdominal Visceral and Subcutaneous Adipose Tissue With Lipoprotein Particle Number and Size in Type 2 Diabetes.“ *Diabetes*, Vol. 57, August 2008
- Pascot A, Lemieux I, Prud'homme D, Tremblay A, Nadeau A, Couillard C, et al. „Reduced HDL particle size as an additional feature of the atherogenic dyslipidemia of abdominal obesity.“ *Journal of Lipid Research*, Volume 42, 2001
- Fox C, Massaro JM, Hoffmann U, Pou KM, Maurovich-Horvat P, Liu C, et al. „Abdominal Visceral and Subcutaneous Adipose Tissue Compartments: Association With Metabolic Risk Factors in the Framingham Heart Study“ *Circulation* 2007, 116:39-48
- Preis S, Massaro JM, Robins SJ, Hoffmann U, Vasani RS, Irlbeck T. „Abdominal Subcutaneous and Visceral Adipose Tissue and Insulin Resistance in the Framingham Heart Study.“ *Obesity* (Silver Spring). 2010 November; 18(11): 2191–2198. doi:10.1038/oby.2010.59

- Nieves DJ, Cnop M, Retzlaff B, Walden CE, Brunzell JD, Knopp RH, Kahn SE. „The Atherogenic Lipoprotein Profile Associated With Obesity and Insulin Resistance Is Largely Attributable to Intra-Abdominal Fat.“ *Diabetes*, VOL. 52, January 2003
- Goodpaster BH, Krishnaswami S, Harris TB, Katsiaras A, Kritchevsky SB, Simonsick EM, et al. “Obesity, Regional Body Fat Distribution, and the Metabolic Syndrome in Older Men and Women.” *ARCH INTERN MED*, Vol 165, Apr 11, 2005.
WWW.ARCHINTERNMED.COM.

10.6 Anzeigen der Ergebnisse

Klicken Sie auf **Results (Ergebnisse)** und auf „BMD“, um die Ergebnisse für die Knochenmineraldichte abzurufen.

Klicken Sie auf „BCA“, um die Ergebnisse über die Körperzusammensetzung abzurufen, die die Bereiche und darüber hinaus die Android- und Gynoid-Unterbereiche umfassen.

10.6.1 Lineale

Bei der Ganzkörpermessung werden Lineale auf dem Bild platziert, um die Patientenanatomie zu vermessen. Es können bis zu sechs Lineale hinzugefügt werden.



Hinweis *Lineale erfordern ein spezielles Messungsbild, das in früheren APEX-Versionen nicht enthalten war. Für diese Messungen sind keine Lineale verfügbar.*

So fügen Sie ein Lineal hinzu:

1. Achten Sie darauf, dass in der Toolbox „Ergebnis“ BMD ausgewählt ist und klicken Sie auf **Rulers (Lineale)**. *Der Cursor ändert sich in ein Fadenkreuz, wenn er über dem Messungsbild platziert ist.*
2. Platzieren Sie das Fadenkreuz auf dem Bild, wo das Lineal beginnen soll, und ziehen Sie eine Linie, um das Lineal anzulegen.

So wählen Sie ein Lineal aus:

Der Cursor ändert sich in eine Hand, wenn er direkt auf einem Lineal platziert wird. Bei Anzeige des Handcursors klicken Sie, um ein Lineal auszuwählen.

So verschieben Sie ein Lineal:

Wählen Sie das Lineal aus. Klicken Sie bei angezeigtem Handcursor und ziehen Sie das Lineal in die gewünschte Position oder verschieben Sie das Lineal mit den Pfeiltasten auf der Tastatur nach oben, unten, links oder rechts.

So wählen Sie den Endpunkt für ein Lineal aus:

Der Cursor ändert sich in einen Pfeil, wenn Sie den Endpunkt des Lineals erreicht haben. Klicken Sie bei Anzeige des Pfeilcursors, um den Endpunkt festzulegen.

So ändern Sie die Größe eines Lineals:

Klicken Sie bei angezeigtem Pfeilcursor und ziehen Sie den Endpunkt bis zur gewünschten Länge und Position oder verschieben Sie den Endpunkt mit den Pfeiltasten auf der Tastatur nach oben, unten, links oder rechts.

So löschen Sie ein Lineal:

Wählen Sie das Lineal aus und drücken Sie die Löschtaste auf der Tastatur oder – bei angezeigtem Handcursor – klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann „Löschen“ aus.

So ändern Sie die Größe des Bildes:

Wählen Sie „Lineale“ aus, klicken Sie dann auf das Symbol für **Sonne/Mond** und wählen Sie den gewünschten Zoomfaktor mit der Zoomsteuerung aus. Das Bild kann mit 100 %, 144 %, 200 %, 288 % oder 400 % angezeigt werden. Klicken Sie erneut auf das Symbol für **Sonne/Mond**, um wieder zur Platzierung des Lineals zurückzukehren.

Anzeigekontrollkästchen

Wenn „Lineale“ ausgewählt sind, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig aktiviert. Ist „Lineale“ nicht ausgewählt, markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Lineale auf dem Bild anzuzeigen. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden keine Lineale im Bild angezeigt (die Lineale sind zwar nicht gelöscht, werden aber nicht angezeigt).

10.7 Beenden der Analyse

Wenn die Analyse abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Close** (Schließen), um einen Bericht zu drucken oder eine weitere Messung zu analysieren. Um benutzerdefinierte Unterbereiche zu erstellen, klicken Sie auf **Sub Regions** (Unterbereiche) und fahren Sie mit [Abschnitt 10.8 Benutzerdefinierte Unterbereiche](#) auf Seite 65 fort.

10.8 Benutzerdefinierte Unterbereiche

Die Unterbereichsanalyse wurde für wissenschaftliche Analysen entwickelt, damit das untersuchende Personal verschiedene benutzerdefinierte Bereiche der Knochen und des Weichgewebes messen kann. Dabei kann jeder beliebige Bereich einer Ganzkörpermessung analysiert werden. Es sind bis zu sieben Unterbereiche möglich, die auch Überschneidungen und ungleichmäßige Formen aufweisen können. Wenn sich Bereiche überschneiden, ergibt sich der Nettodurchschnitt aus der mathematischen Vereinigung der einzelnen Bereiche.




Hinweis *Beschreibungen der Schaltflächen für die Analyseschritte und Toolboxes finden Sie unter [Abschnitt 6.1 Schaltflächen für Analyseschritte](#) auf Seite 16.*

10.9 Beheben asymmetrischer Ergebnisse durch Reflexion

Die Warnmeldung zu asymmetrischen Ergebnissen wird angezeigt, wenn ein erheblicher Unterschied in der Masse zwischen dem rechten und linken Arm (25 %) oder dem rechten und dem linken Bein (15 %) erkannt wird.

Abbildung 34 Warnmeldung zu asymmetrischen Ergebnissen

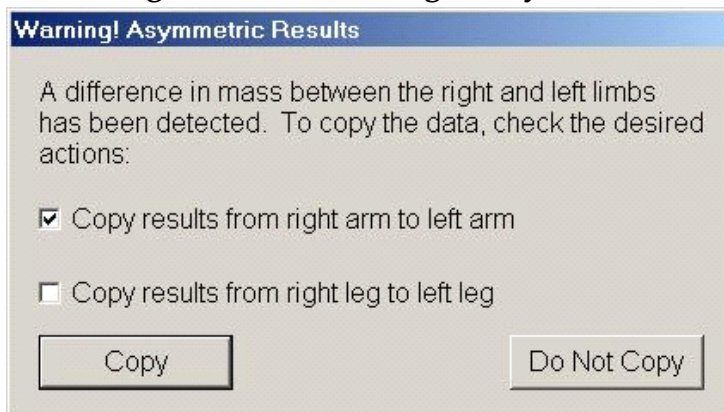

Mögliche Gründe dafür sowie Lösungsmöglichkeiten sind u. a.:

- Die Linien für die Gesamtkörperanalyse, die Arme und Beine trennen, wurden asymmetrisch platziert. Überprüfen Sie die in der Analyse verwendeten Linien und klicken Sie auf „Regions (Bereiche)“, um die Arm- und Beinlinien so anzupassen, dass sie symmetrisch sind.
- Ein Teil eines Arms oder Beins (in der Regel an der Hüfte) befand sich außerhalb des Messbereichs. Im Warnmeldungs-Dialogfeld können Sie auswählen, ob Sie die Ergebnisse für den vollständig gemessenen Arm oder das vollständig gemessene Bein auf den Arm oder das Bein mit den fehlenden Informationen kopieren möchten.

- Der Körper des Patienten ist asymmetrisch (z. B. aufgrund von Amputation, Polio usw.). Wenn ein Patient einen erheblich asymmetrischen Körper aufweist, fragen Sie den Arzt, wie die Ergebnisse im Bericht dargestellt werden sollen. Wenn Sie die Ergebnisse für die fehlenden Informationen nicht kopieren, erhalten Sie die genaueste Messung für den Patienten. Durch Kopieren der Ergebnisse könnte jedoch ein exakterer Vergleich mit Referenzdaten für Gesamtkörpermessungen möglich werden.

Das System bestimmt automatisch, welche der Gliedmaßen kleiner ist. Im Warnmeldungs-Dialogfeld können Sie durch Aktivieren eines oder beider Kontrollkästchen wählen, ob die Ergebnisse für die größere Gliedmaße auf die kleinere Gliedmaße kopiert werden sollen.

Im Warnmeldungs-Dialogfeld des Beispiels ist die Masse des rechten Arms erheblich größer als die Masse des linken Arms, der Unterschied in der Masse zwischen dem rechten und dem linken Bein war jedoch nicht so groß, dass das System hier das Kopieren empfiehlt. Wenn das System die Ergebnisse für das Bein trotzdem kopieren soll, kann dieses Kontrollkästchen jedoch aktiviert werden.

Klicken Sie auf „Copy (Kopieren)“, um die von den Kontrollkästchen beschriebene Aktion durchzuführen. Klicken Sie auf „Do Not Copy (Nicht kopieren)“, wenn Sie das Dialogfeld ohne Änderung der Ergebnisse schließen möchten. Ergebnisse, die von einem auf den anderen Arm oder von einem auf das andere Bein kopiert wurden, werden im Bericht markiert. Genauigkeit und Präzision könnten durch das Kopieren von einer Seite auf die andere beeinträchtigt werden. Je nach körperlichem Habitus des Patienten können durch das Kopieren jedoch die genauesten Ergebnisse erzielt werden.

10.10 NHANES BCA aktivieren

Gehen Sie zur Aktivierung von NHANES BCA zum APEX-Hauptmenü, wählen Sie „Utilities (Dienstprogramme)“, „System Configuration (Systemkonfiguration)“, Registerkarte „Analyze (Analysieren)“ und markieren Sie das Kontrollkästchen „Enable NHANES BCA (NHANES BCA aktivieren)“. Wählen Sie diese Option, um die von Schoeller *et al.* empfohlene Kalibrierung durchzuführen.¹ Ist diese Option aktiviert, wird NHANES BCA in dem BCA-Ergebnisabschnitt notiert.

10.11 Erstellen und Drucken von Berichten

Siehe [Abschnitt 20 Berichte](#) auf Seite 104.

1. Schoeller DA, Tylavsky FA, Baer DJ, Chumlea WC, Earthman CP, Fuerst T, Harris TB, Heymsfield SB, Horlick M, Lohman TG, Lukaski HC, Shepherd J, Siervogel RM, Borrud LG „QDR 4500A dual-energy X-ray absorptiometer underestimates fat mass in comparison with criterion methods in adults.“ Am J Clin Nutr. 2005;81(5):1018-25.

11 AP/Laterale Wirbelsäulen-BMD-Untersuchung in Rückenlage (Horizon A)

11.1 Sicherheitsfunktion des Tisches

Die Bewegung des C-Bogens stoppt, wenn Sie oder der Patient einen der Sicherheitsstreifen an den Kanten des Tisches berühren. Drücken Sie in diesem Fall auf die Taste für die Option **Enable Lateral** (Lateral aktivieren), um die Drehung des C-Bogens abzuschließen.

11.2 Positionierung für die AP/Lateralmessung

Beginnen Sie mit der Untersuchung entsprechend [Abschnitt 4.4 Verwenden der Worklist zum Laden eines Patientendatensatzes](#) auf Seite 13. Wählen Sie im Fenster **Select Scan Type** (Messungstyp auswählen) die Option **AP/Lateral** aus.

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld auf **Patient On/Off** (Patient ein/aus).
2. Legen Sie den Patienten auf den Rücken mit dem Kopf am rechten Ende des Tisches.
3. Drücken Sie am Bedienfeld auf die Taste **Center** (Mitte).
4. Positionieren Sie den Patienten wie dargestellt ([Abbildung 35](#)).



Hinweis *Der Patient darf sich zwischen der AP- und der Lateralmessung nicht bewegen.*

Abbildung 35 AP/Laterale Wirbelsäulenpositionierung



11.3 Starten der AP-Messung

1. Drücken Sie am Bedienfeld auf die Taste für die **Option Enable Lateral** (Lateral aktivieren).
2. Klicken Sie auf **Continue** (Weiter).
3. Verfahren Sie wie in [Abschnitt 7.3 Starten der AP-Lendenwirbelsäulenmessung](#) auf Seite 24 und schließen Sie die Messung ab.

11.4 Analysieren der AP-Messung

1. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>.
2. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).
3. Halten Sie die Taste für die Option **Enable Lateral** (Lateral aktivieren) am Bedienfeld gedrückt, bis der C-Bogen sich vollständig in die Position für eine Lateralmessung gedreht hat.

11.5 Starten der lateralen Messung



Warnung: *Wenn die Röntgen-Kontrolllampe am Bedienfeld nicht 10 Sekunden nach Abschluss der Messung erlischt, drücken Sie sofort die rote Nothalt-Taste. Wenden Sie sich an den Hologic-Kundendienst, bevor Sie weitere Vorgänge ausführen.*

1. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten). Die Anzeige *Röntgenquelle Ein* blinkt, bis die Messung abgeschlossen ist.
2. Wenn L2 bis L4 vollständig angezeigt werden ([Abbildung 36](#)), klicken Sie auf **Stop Scan** (Messung anhalten).

Abbildung 36 Wirbelsäule (lateral)



3. Halten Sie die Taste für die Option **Enable Lateral** (Lateral aktivieren) am Bedienfeld gedrückt, bis sich der C-Bogen in seiner ursprünglichen Position befindet.

11.6 Analysieren der lateralen Messung

1. Klicken Sie auf **Analyze Scan** (Messung analysieren).
2. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>.




Hinweis *Beschreibungen der Schaltflächen für die Analyseschritte und Toolboxes finden Sie unter [Abschnitt 6.1](#) Schaltflächen für Analyseschritte auf Seite 16.*

11.6.1 Definieren der globalen ROI

1. Klicken Sie auf **Globale ROI**.
2. Verwenden Sie die Tools **Whole Mode** (Gesamtmodus) und **Line Mode** (Linienmodus), um die ROI so anzupassen, wie es in [Abbildung 37](#) dargestellt ist.


Abbildung 37 Laterale ROI

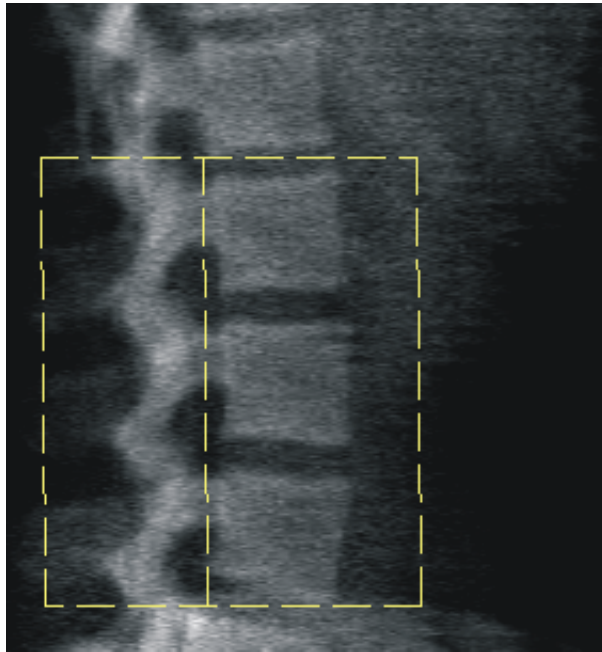

11.6.2 Anpassen der Vertebral-Grenzen

1. Klicken Sie auf **Vertebral Boundaries and Ant. Boundary** (Vertebral-Grenze und Ant. Grenze).
2. Verwenden Sie die Tools **Line Mode** (Linienmodus) und **Point Mode** (Punktmodus), um die Vertebral-Grenzen wie in [Abbildung 38](#) gezeigt anzupassen.


Abbildung 38 Vertebral-Grenzen

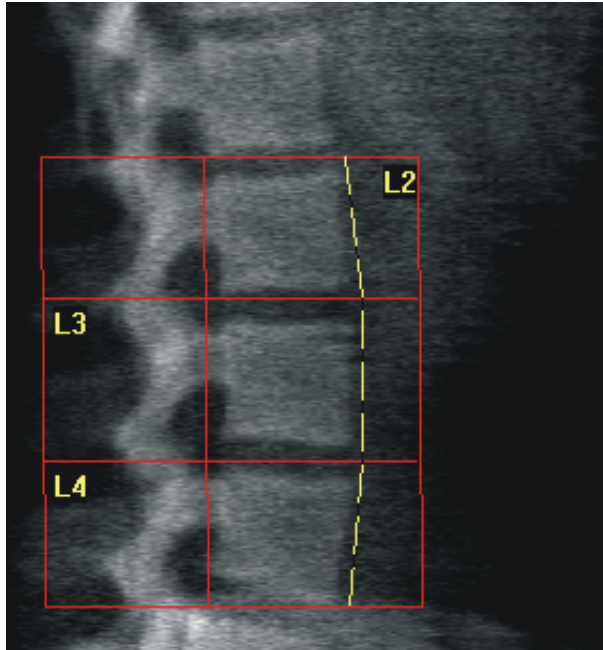

11.6.3 Anpassen der Wirbelkörper

1. Klicken Sie auf **Vertebral Bodies** (Wirbelkörper).
2. Verwenden Sie die Tools **Line Mode** (Linienmodus) und **Mode** (Punktmodus), um die Wirbelkörper wie in [Abbildung 39](#) gezeigt anzupassen.


Abbildung 39 Wirbelkörper

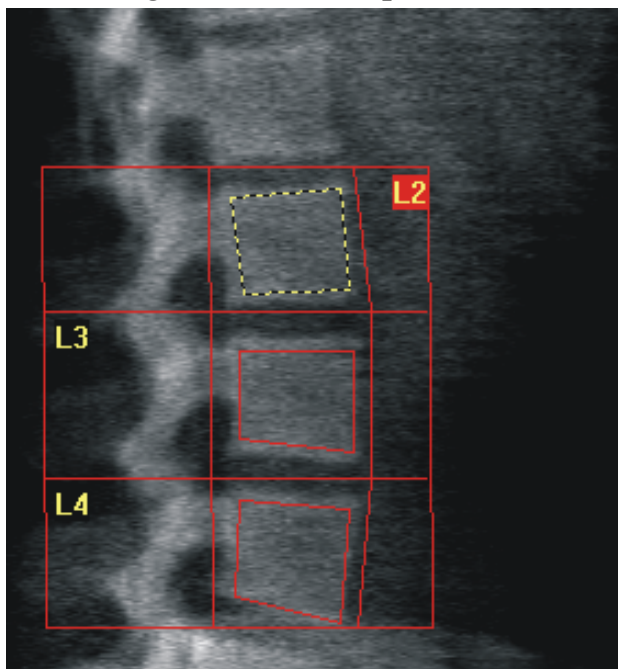

11.6.4 Anzeigen der Knochenmarkierung

1. Klicken Sie auf **Bone Map** (Knochenmarkierung).
2. Wenn die Knochenmarkierung für die Wirbelkörper unvollständig ist, passen Sie die Felder wie in [Abbildung 39](#) an. In den meisten Fällen ist es nicht erforderlich, die Knochenmarkierung zu bearbeiten.

Abbildung 40 Knochenmarkierung (lateral)

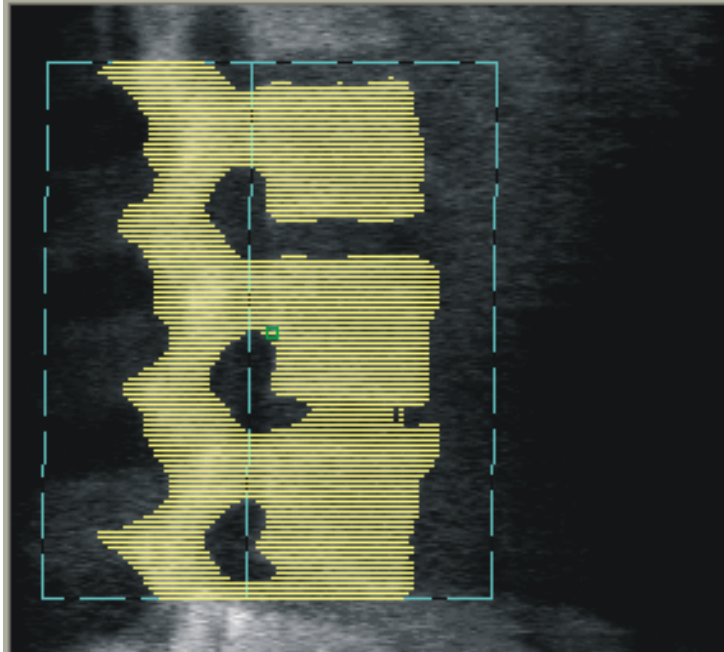

11.6.5 Anpassen der Mittelbereiche

Wenn die Mittelbereiche aktiviert sind, verwenden Sie die Schaltfläche **Mid Regions** (Mittelbereiche) und die Tools **Whole Mode** (Gesamtmodus), **Line Mode** (Linienmodus) sowie **Point Mode** (Punktmodus), um die Bereiche anzupassen, in denen die Knochendichte in der Mitte der Wirbelkörper ermittelt wird ([Abbildung 39](#)).



Hinweis Mittelbereiche können im Menü *Utilities (Dienstprogramme)* unter *System Configuration (Systemkonfiguration)* auf der Registerkarte *Analyse (Analysieren)* aktiviert werden.

11.7 Anzeigen der Ergebnisse

1. Klicken Sie auf **Results** (Ergebnisse).
2. Klicken Sie auf **BMD**, um die BMD-Ergebnisse anzuzeigen, oder klicken Sie auf **WA-BMD**, um die BMD-Ergebnisse mit einer Anpassung der Breite anzuzeigen.

11.8 Beenden der Analyse

1. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).
2. Klicken Sie auf **Report** (Bericht).

11.9 Erstellen und Drucken von Berichten

Siehe [Abschnitt 20 Berichte](#) auf Seite 104.

12 Dekubitus-Lateral-Wirbelsäulen-BMD-Untersuchung

Beginnen Sie mit der Untersuchung entsprechend [Abschnitt 4.4 Verwenden der Worklist zum Laden eines Patientendatensatzes](#) auf Seite 13. Wählen Sie im Fenster **Select Scan Type** (Messungstyp auswählen) die Option **AP/Dekubitus** aus.

12.1 Durchführen und Analysieren der AP-Messung

Der AP-Teil der AP/Dekubitus-Lateral-Wirbelsäulenmessung wird auf die gleiche Weise wie eine AP-Lendenwirbelsäulenmessung durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [Abschnitt 7 AP-Untersuchung der Lendenwirbelsäule](#) auf Seite 22. Folgen Sie diesen Anweisungen, bis die AP-Analyse abgeschlossen ist.

12.2 Positionieren des Patienten für die laterale Dekubitus-Messung

1. Positionieren Sie den Patienten wie abgebildet ([Abbildung 41](#) und [Abbildung 42](#)).
2. Legen Sie ihm ein Kissen unter den Kopf, um die Schultern auszugleichen und um die Wirbelsäule parallel zum Tisch zu positionieren.
3. Winkeln Sie die Knie des Patienten um etwa 90 Grad an.
4. Breiten Sie die Oberarme des Patienten 90 Grad von der Mitte der koronaren Ebene aus.
5. Bringen Sie den Körper in eine exakt laterale Position.

Abbildung 41 Positionieren bei lateraler Dekubitus-Messung


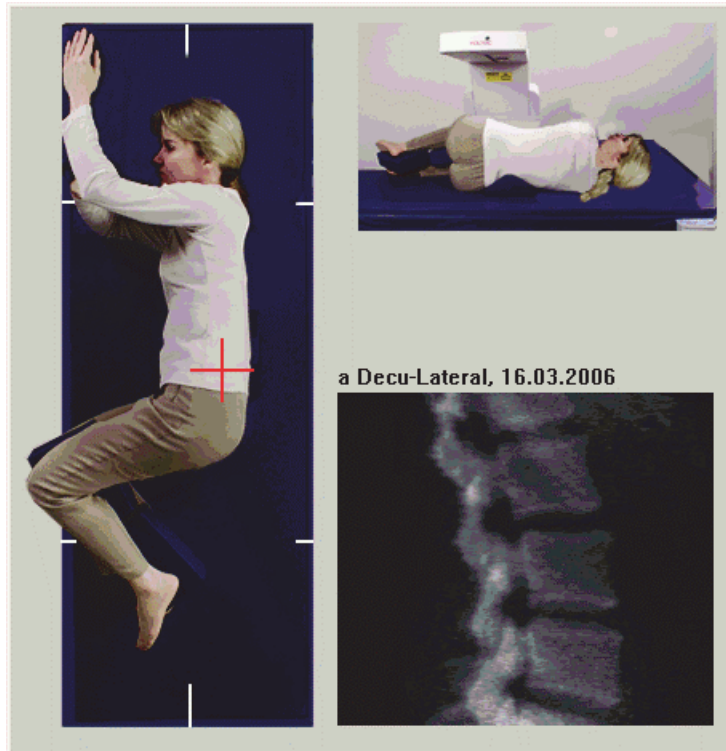


Abbildung 42 Wirbelsäulenposition

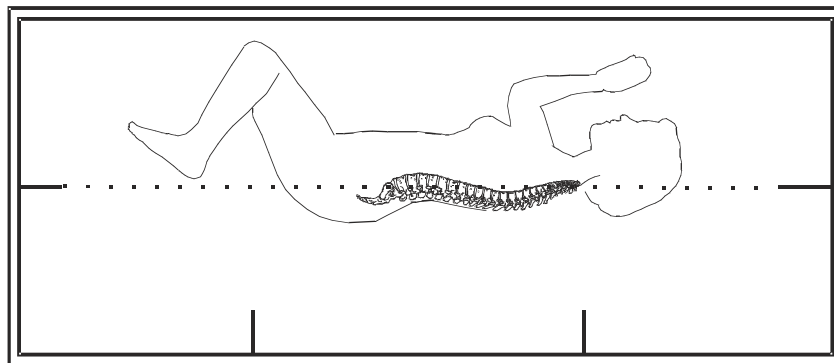

12.3 Positionieren des C-Bogens für die laterale Dekubitus-Messung

1. Positionieren Sie den C-Bogen wie dargestellt ([Abbildung 41](#)).
2. Schalten Sie den Laser ein.
3. Positionieren Sie das Fadenkreuz des Lasers 5 cm unter der Crista iliaca und mittig über der Wirbelsäule.
4. Bewegen Sie das Laserfadenkreuz 2,5 cm zum Rücken des Patienten hin.
5. Klicken Sie auf **Continue** (Weiter).


12.4 Starten der lateralen Dekubitus-Messung



Warnung: *Wenn die Röntgen-Kontrolllampe am Bedienfeld nicht 10 Sekunden nach Abschluss der Messung erlischt, drücken Sie sofort die rote Nothalt-Taste. Wenden Sie sich an den Hologic-Kundendienst, bevor Sie weitere Vorgänge ausführen.*

1. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten). Die Anzeige **Röntgenquelle Ein** blinkt, bis die Messung abgeschlossen ist.
2. Überprüfen Sie das Bild während des Messvorgangs. Wenn L2 bis L4 vollständig angezeigt werden, klicken Sie auf **Stop Scan** (Messung anhalten).
3. Helfen Sie dem Patienten nach Beendigung einer zufriedenstellenden Lateralaufnahme ([Abbildung 43](#)) vom Untersuchungstisch.


Abbildung 43 Dekubitusmessung der Wirbelsäule

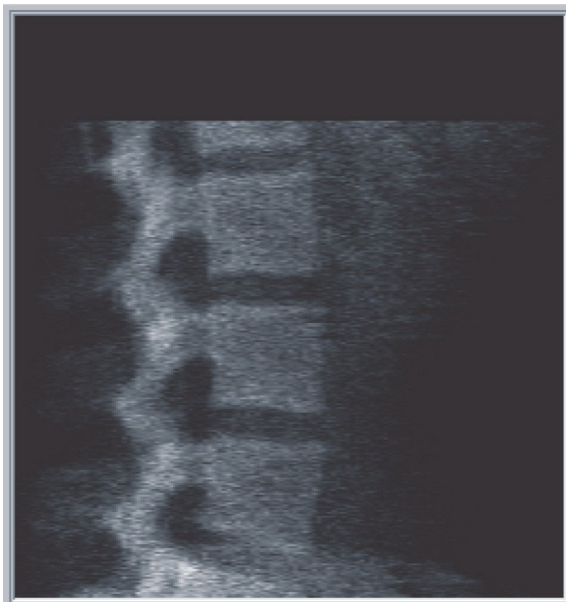

12.4.1 Neupositionieren der Messung (falls erforderlich)

1. Klicken Sie auf **Reposition Scan** (Messung neu positionieren).
2. Positionieren Sie den Cursor über der Wirbelsäulenabbildung ([Abbildung 44](#)).

Abbildung 44 Neupositionierung im Dekubitus

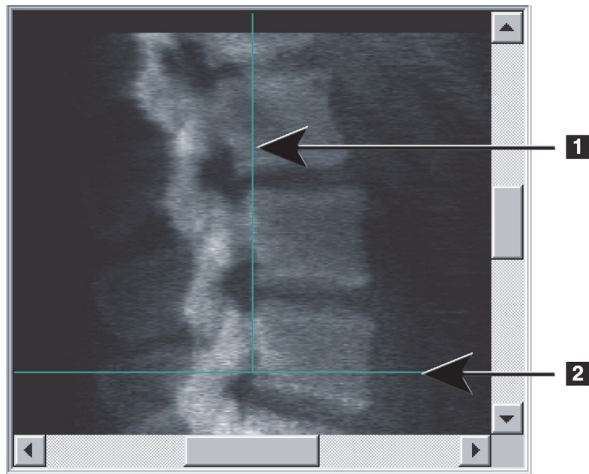

3. Klicken Sie auf das Bild und ziehen Sie es zur Neupositionierung so, dass folgende Bedingungen zutreffen:
 - Die Crista iliaca befindet sich an oder unterhalb der blauen horizontalen Positionierungslinie [1] und im unteren Teil des Messungsfeldes.
 - Die Mitte der Wirbelsäule ist mit der blauen vertikalen Positionierungslinie [2] ausgerichtet.
4. Wenn die Wirbelsäule richtig positioniert wurde, klicken Sie auf **Restart Scan** (Messung neu starten) und wiederholen Sie die Messung.

12.5 Analysieren der Messung

1. Klicken Sie auf **Analyze Scan** (Messung analysieren).
2. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>.




Hinweis Beschreibungen der Schaltflächen für die Analyseschritte und Toolboxes finden Sie unter [Abschnitt 6.1](#) Schaltflächen für Analyseschritte auf Seite 16.

12.5.1 Definieren der globalen ROI

1. Klicken Sie auf **Globale ROI**.
2. Verwenden Sie die Tools **Whole Mode** (Gesamtmodus), **Line Mode** (Linienmodus) und **Point Mode** (Punktmodus), um die ROI anzupassen ([Abbildung 45](#)).


Abbildung 45 Laterale ROI

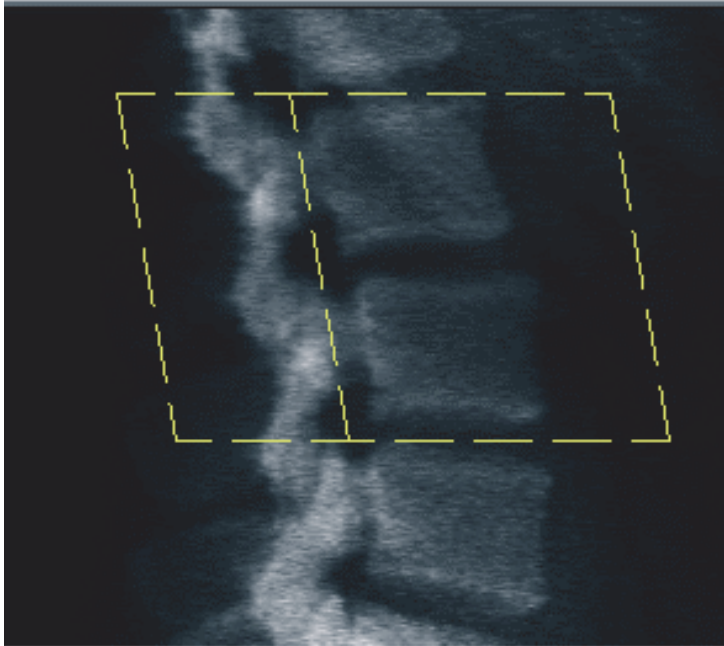

12.5.2 Anpassen der Vertebral-Grenzen

1. Klicken Sie auf **Vertebral Boundaries** (Vertebral-Grenze) und **Ant. Boundary** (Ant. Grenze).
2. Verwenden Sie die Tools **Line Mode** (Linienmodus) und **Point Mode** (Punktmodus), um die **Vertebral-Grenzen** wie in [Abbildung 46](#) gezeigt anzupassen.


Abbildung 46 Vertebral-Grenzen

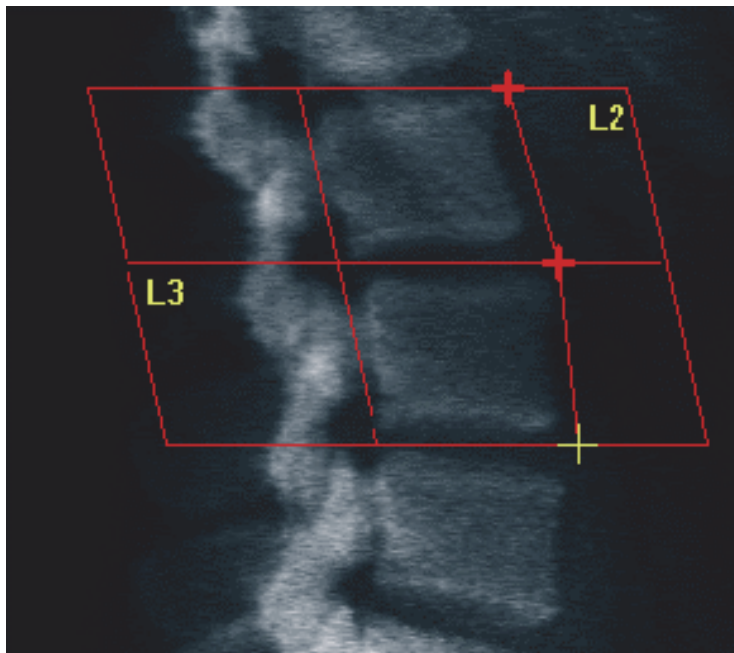

12.5.3 Anpassen der Wirbelkörper

1. Klicken Sie auf **Vertebral Bodies** (Wirbelkörper).
2. Verwenden Sie die Tools **Whole Mode** (Gesamtmodus), **Line Mode** (Linienmodus) und **Point Mode** (Punktmodus), um die Wirbelkörper anzupassen ([Abbildung 47](#)).


Abbildung 47 Wirbelkörper

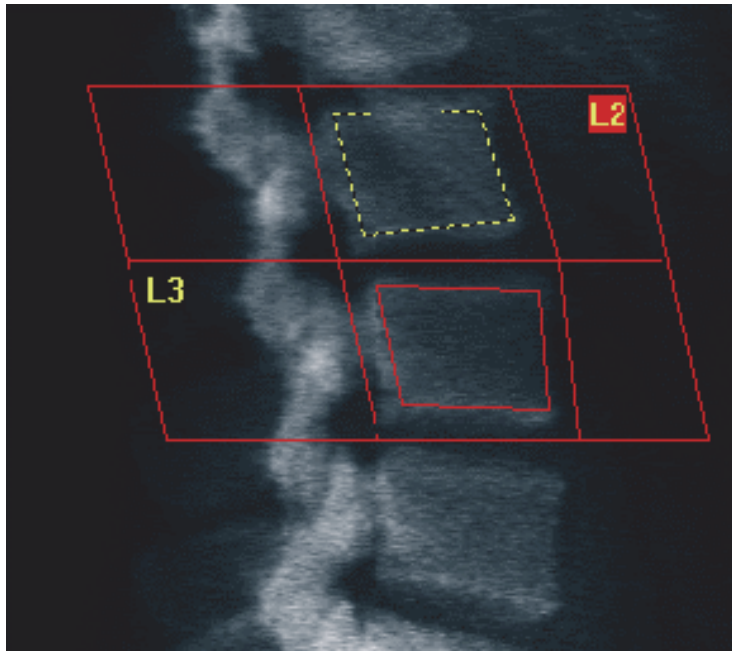

12.5.4 Anzeigen der Knochenmarkierung

1. Klicken Sie auf **Bone Map** (Knochenmarkierung).
2. In den meisten Fällen ist es nicht erforderlich, die Knochenmarkierung zu bearbeiten.
Falls eine Bearbeitung notwendig ist, klicken Sie auf **Vertebral Bodies** (Wirbelkörper) und passen Sie **L2** bzw. **L3** erneut an, so dass sie sich gerade innerhalb der Knochenkonturen befinden.

Abbildung 48 Knochenmarkierung (lateral)

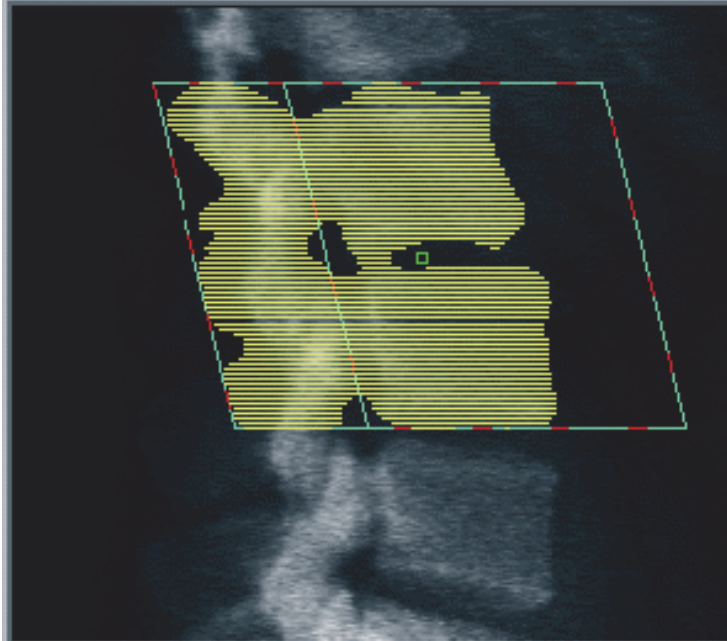

12.6 Anzeigen der Ergebnisse

Klicken Sie auf **Results** (Ergebnisse).

12.7 Beenden der Analyse

1. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).
2. Klicken Sie auf **Report** (Bericht).

12.8 Erstellen und Drucken von Berichten

Siehe [Abschnitt 20 Berichte](#) auf Seite 104.

13 IVA-, IVA HD-Bildaufnahmen auf einem Horizon-System C oder W; IVA-Bildaufnahme auf dem Horizon-System Ci oder Wi

Beginnen Sie mit der Untersuchung entsprechend [Abschnitt 4.4 Verwenden der Worklist zum Laden eines Patientendatensatzes](#) auf Seite 13. Wählen Sie im Fenster **Messungstyp auswählen** die Option **IVA-Bildaufnahme** aus.


13.1 Auswählen des Messungstyps

1. Deaktivieren Sie im Fenster **Select Scan Type** (Messungstyp auswählen) das Kontrollkästchen **Use Default Scan Mode** (Standard-Scanmodus verwenden).
2. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>.
3. Klicken Sie im Fenster **Include SE AP Spine Scan in IVA Exam?** (SE-AP-Wirbelsäulenmessung bei IVA-Untersuchung einschließen?) auf **SE AP Image** (SE-AP-Bild).
4. Klicken Sie auf **Next (Weiter)** >>.
5. Klicken Sie im Fenster **Include SE Lateral Spine Scan in IVA Exam?** (SE-Lateral-Wirbelsäulenmessung bei IVA-Untersuchung einschließen?) auf **SE Lateral Image** (SE-Lateral-Bild).
6. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>. Das Fenster **Scan Parameters** (Messungsparameter) für die AP-IVA-Aufnahme wird angezeigt.

13.2 Positionieren des Patienten für die AP-IVA-Aufnahme

Positionieren Sie den Patienten und den C-Bogen wie in [Abschnitt 7.3 Starten der AP-Lendenwirbelsäulenmessung](#) auf Seite 24 beschrieben. *Es gilt jedoch folgende Ausnahme:* Die Schultern des Patienten sollten sich unterhalb der oberen Messungsbegrenzungslinie befinden ([Abbildung 49](#)).

Abbildung 49 AP-IVA-Positionierung

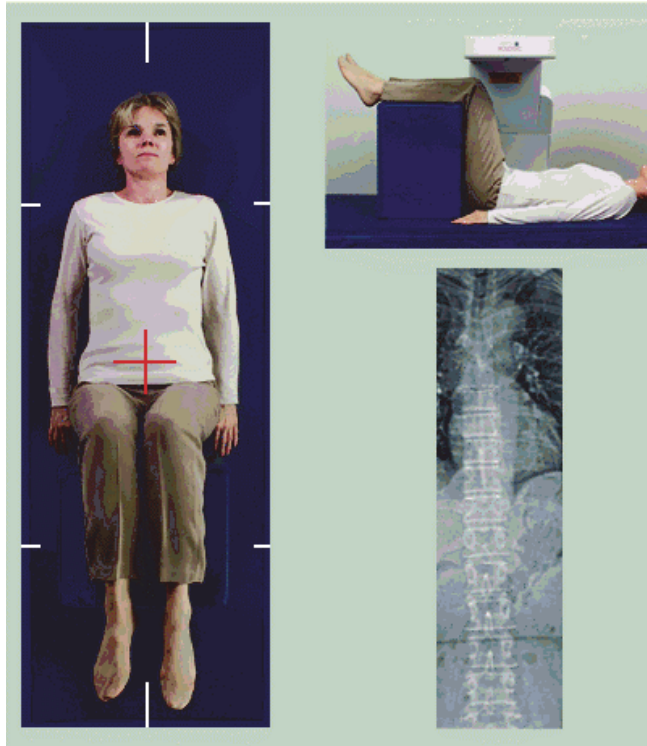

13.3 Starten der AP-IVA-Aufnahme



Warnung: *Wenn die Röntgen-Kontrolllampe am Bedienfeld nicht 10 Sekunden nach Abschluss der Messung erlischt, drücken Sie sofort die rote Nothalt-Taste. Wenden Sie sich an den Hologic-Kundendienst, bevor Sie weitere Vorgänge ausführen.*

1. Bitten Sie den Patienten, während der Aufnahme nicht zu atmen.
2. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten). Die Anzeige *Röntgenquelle Ein* blinkt, bis die Messung abgeschlossen ist.
3. Überprüfen Sie das Bild.
4. Wenn auf dem Bild L4 bis T4 zu sehen sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Stop Scan** (Messung anhalten) und bitten Sie den Patienten, wieder normal zu atmen.
5. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).

13.4 Positionieren des Patienten und des C-Bogens für die laterale IVA-Aufnahme

1. Positionieren Sie den Patienten wie in [Abbildung 50](#) und [Abbildung 51](#) gezeigt.
2. Winkeln Sie die Knie des Patienten um etwa 90 Grad an.

Horizon Bone Densitometry System User Guide

13. IVA-, IVA HD-Bildaufnahmen auf einem Horizon-System C oder W; IVA-Bildaufnahme auf dem Horizon-System Ci oder Wi

3. Breiten Sie die Oberarme des Patienten 90 Grad von der Mitte der koronaren Ebene aus.
4. Bringen Sie den Körper in eine exakt laterale Position.

Abbildung 50 Laterale IVA-Positionierung


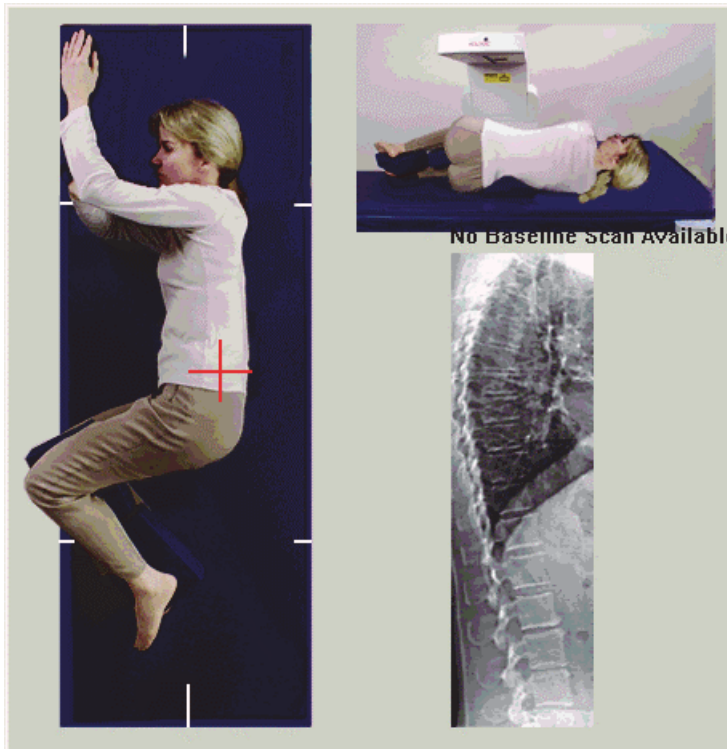


Abbildung 51 Wirbelsäulenposition



13.5 Starten der lateralen IVA-Aufnahme

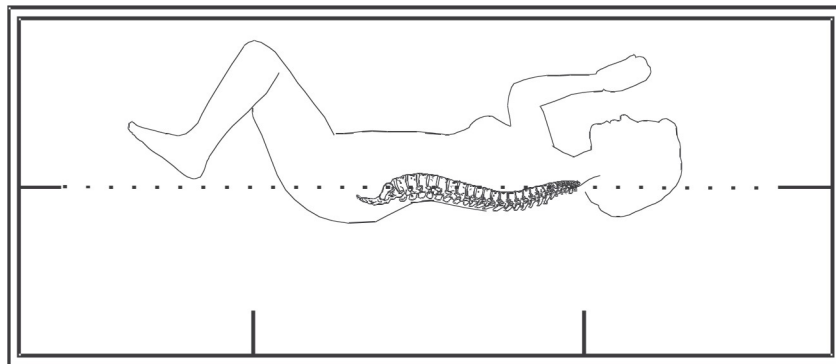

Warnung: *Wenn die Röntgen-Kontrolllampe am Bedienfeld nicht 10 Sekunden nach Abschluss der Messung erlischt, drücken Sie sofort die rote Nothalt-Taste. Wenden Sie sich an den Hologic-Kundendienst, bevor Sie weitere Vorgänge ausführen.*

1. Bitten Sie den Patienten, während der Aufnahme (10 Sekunden) nicht zu atmen.
2. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten). Die Anzeige *Röntgenquelle Ein* blinkt, bis die Messung abgeschlossen ist.

13.6 IVA-Analyse einer lateralen IVA-Aufnahme

Siehe [Abschnitt 16 IVA-Analyse](#) auf Seite 88.


14 IVA- und IVA HD-Bildaufnahmen auf einem Horizon-System A

Beginnen Sie mit der Untersuchung entsprechend [Abschnitt 4.4 Verwenden der Worklist zum Laden eines Patientendatensatzes](#) auf Seite 13. Wählen Sie im Fenster **Select Scan Type (Messungstyp auswählen)** die Option **IVA Imaging (IVA-Bildaufnahme)** aus.

14.1 Positionieren des Patienten

Positionieren Sie den Patienten wie in [Abschnitt 11.2 Positionierung für die AP/Lateralmessung](#) auf Seite 67 beschrieben. *Es gilt jedoch folgende Ausnahme:* Die Schultern des Patienten sollten sich unterhalb der oberen Messungsbegrenzungslinie befinden.

Abbildung 52 AP-IVA-Positionierung

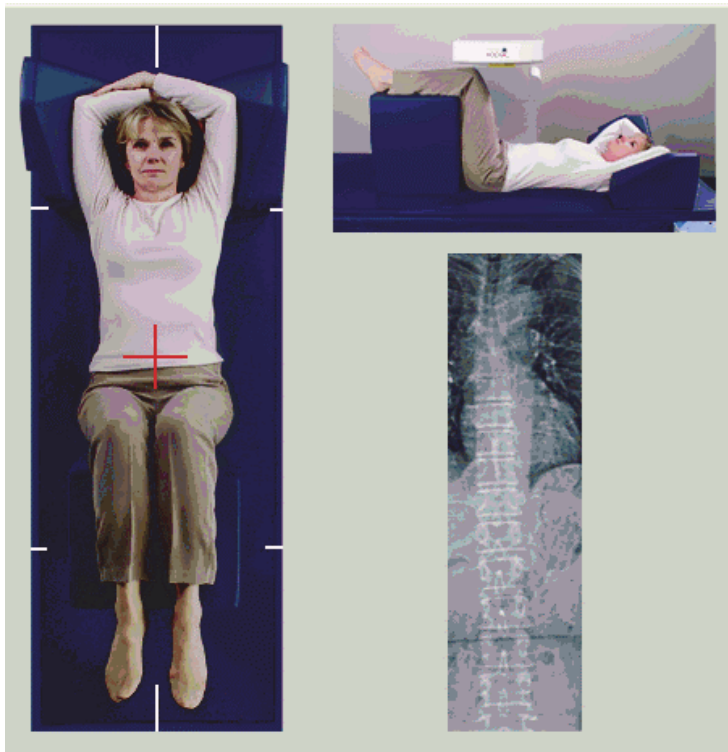

14.2 Auswählen des Messungstyps

1. Deaktivieren Sie im Fenster **Select Scan Type** (Messungstyp auswählen) das Kontrollkästchen **Use Default Scan Mode** (Standard-Scanmodus verwenden).
2. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>.
3. Klicken Sie im Fenster **Include SE AP Spine Scan in IVA Exam?** (SE-AP-Wirbelsäulenmessung bei IVA-Untersuchung einschließen?) auf **SE AP Image** (SE-AP-Bild).
4. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>.
5. Klicken Sie im Fenster **Include SE Lateral Spine Scan in IVA Exam?** (SE-Lateral-Wirbelsäulenmessung bei IVA-Untersuchung einschließen?) auf **SE Lateral Image** (SE-Lateral-Bild).
6. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>. Die Meldung *Continuously Press ENABLE...* zum Halten der AKTIVIEREN-Taste wird angezeigt.

Durch Auswählen der Option **Enable Lateral** (Lateral aktivieren) am Bedienfeld wird der Tisch gesperrt. Es kann lediglich der C-Bogen bewegt werden. Bewegen Sie den Patienten gegebenenfalls zur Längsachse des Laser-Fadenkreuzes.


14.3 Starten der AP-IVA-Aufnahme



Warnung: *Wenn die Röntgen-Kontrolllampe am Bedienfeld nicht 10 Sekunden nach Abschluss der Messung erlischt, drücken Sie sofort die rote Nothalt-Taste. Wenden Sie sich an den Hologic-Kundendienst, bevor Sie weitere Vorgänge ausführen.*

1. Bitten Sie den Patienten, während der Aufnahme nicht zu atmen.
2. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten). Die Anzeige **Röntgenquelle Ein** blinkt, bis die Messung abgeschlossen ist.
3. Überprüfen Sie das Bild.
4. Wenn auf dem Bild L4 bis T4 zu sehen sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Stop Scan** (Messung anhalten) und gestatten Sie anschließend dem Patienten, wieder normal zu atmen.
5. Klicken Sie auf **Close** (Schließen). Die Meldung *Continuously Press ENABLE...* zum Halten der AKTIVIEREN-Taste wird angezeigt.
6. Halten Sie die Taste für die Option **Enable Lateral** (Lateral aktivieren) am Bedienfeld gedrückt, bis der C-Bogen sich vollständig in die Position für eine Lateralmessung gedreht hat.

Abbildung 53 Laterale IVA-Positionierung

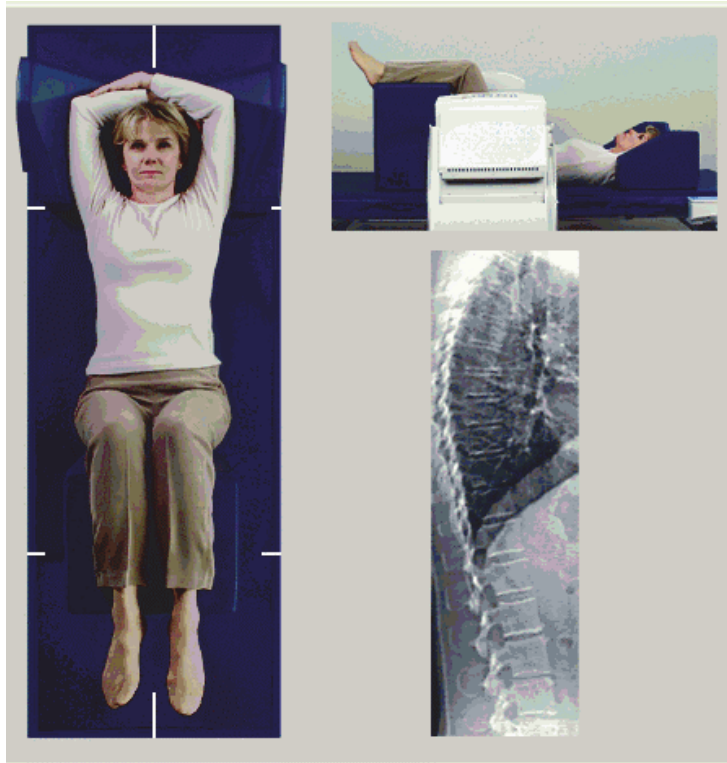

14.4 Starten der lateralen IVA-Aufnahme



Warnung: *Wenn die Röntgen-Kontrolllampe am Bedienfeld nicht 10 Sekunden nach Abschluss der Messung erlischt, drücken Sie sofort die rote Nothalt-Taste. Wenden Sie sich an den Hologic-Kundendienst, bevor Sie weitere Vorgänge ausführen.*

1. Bitten Sie den Patienten, während der Aufnahme (10 Sekunden) nicht zu atmen.
2. Klicken Sie auf **Start Scan** (Messung starten). Die Anzeige **Röntgenquelle Ein** blinkt, bis die Messung abgeschlossen ist.
3. Überprüfen Sie das Bild.
4. Wenn auf dem Bild **L4** bis **T4** zu sehen sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Stop Scan** (Messung anhalten) und gestatten Sie anschließend dem Patienten, wieder normal zu atmen.
5. Halten Sie die Taste für die Option **Enable Lateral** (Lateral aktivieren) am Bedienfeld gedrückt, bis sich der C-Bogen in seiner ursprünglichen Position befindet.
6. Klicken Sie auf **Exit** (Beenden).
7. Drücken Sie am Bedienfeld auf **Patient On/Off** (Patient Ein/Aus) und helfen Sie dem Patienten vom Tisch, sobald die Bewegung beendet ist.

14.5 IVA-Analyse einer lateralen IVA-Aufnahme

Siehe [Abschnitt 16 IVA-Analyse](#) auf Seite 88.

15 IVA mit BMD-Untersuchung

Beginnen Sie mit der Untersuchung entsprechend [Abschnitt 4.4 Verwenden der Worklist zum Laden eines Patientendatensatzes](#) auf Seite 13. Wählen Sie im Fenster **Select Scan Type** (Messungstyp auswählen) die Option **IVA with BMD** (IVA mit BMD) aus.

Hologic empfiehlt es, die Aufnahmen in folgender Reihenfolge durchzuführen:

1. AP-IVA-Aufnahme
2. AP-BMD-Aufnahme
3. Laterale BMD-Aufnahme
4. Laterale IVA-Aufnahme.

15.1 Positionieren des Patienten

Positionieren Sie den Patienten wie in [Abschnitt 11.2 Positionierung für die AP/Lateralmessung](#) auf Seite 67 beschrieben. *Es gilt jedoch folgende Ausnahme:* Die Schultern des Patienten sollten sich unterhalb der oberen Messungsbegrenzungslinie befinden.

15.2 Auswählen des Messungstyps

1. Deaktivieren Sie im Fenster **Select Scan Type** (Messungstyp auswählen) das Kontrollkästchen **Use Default Scan Mode** (Standard-Scanmodus verwenden).
2. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>.
3. Klicken Sie im Fenster **Include SE AP Spine Scan in IVA Exam?** (SE-AP-Wirbelsäulenmessung bei IVA-Untersuchung einschließen?) auf **SEAP Image** (SE-AP-Bild).
4. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>.
5. Klicken Sie im Fenster **Select AP Lumbar Spine Scan Mode** (Scanmodus für AP Lendenwirbelsäule auswählen) auf **Express (x)**.
6. Klicken Sie auf **Next (Weiter)** >>.
7. Klicken Sie im Fenster **Select Lateral Scan Mode for AP/Lateral Exam** (Scanmodus 'Lateral' für AP/Lateral-Untersuchung auswählen) auf **Fast Array (f)** (Schnell-Array (f)).
8. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>.

9. Klicken Sie im Fenster **Include SE Lateral Spine Scan in IVA Exam?** (SE-Lateral-Wirbelsäulenmessung bei IVA-Untersuchung einschließen?) auf **SE Lateral Image** (SE-Lateral-Bild).
10. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) >>. Die Meldung *Continuously Press ENABLE...* zum Halten der AKTIVIEREN-Taste wird angezeigt.

15.3 Durchführen der AP-IVA-Aufnahme

Führen Sie die AP-IVA-Aufnahme durch wie in [Abschnitt 14 IVA- und IVA HD-Bildaufnahmen auf einem Horizon-System A](#) auf Seite 83 beschrieben und beginnen Sie dabei mit [Abschnitt 14.1 Positionieren des Patienten](#) auf Seite 83.

Durch Auswählen der Option **Enable Lateral** (Lateral aktivieren) am Bedienfeld wird der Tisch gesperrt. Es kann lediglich der C-Bogen bewegt werden. Bewegen Sie den Patienten gegebenenfalls zur Längsachse des Laser-Fadenkreuzes.

15.4 Durchführen und Analysieren der AP-BMD-Aufnahme

Führen Sie die AP BMD-Aufnahme und deren Analyse wie in [Abschnitt 7.3 Starten der AP-Lendenwirbelsäulenmessung](#) auf Seite 24 und [Abschnitt 7.4 Analysieren der Messung](#) auf Seite 25 beschrieben durch.

15.5 Durchführen der lateralen BMD-Aufnahme

Führen Sie die laterale BMD-Aufnahme wie in [Abschnitt 11.5 Starten der lateralen Messung](#) auf Seite 69 beschrieben durch.

15.6 Durchführen der lateralen IVA-Aufnahme

Führen Sie die laterale IVA-Aufnahme wie in [Abschnitt 14.4 Starten der lateralen IVA-Aufnahme](#) auf Seite 85 beschrieben durch.


15.7 IVA-Analyse

Siehe [Abschnitt 16 IVA-Analyse](#) auf Seite 88.

16 IVA-Analyse

Das Viewer-Fenster ([Abbildung 54](#)) wird in [Tabelle 16](#) beschrieben.

Abbildung 54 IVA-Viewer-Fenster

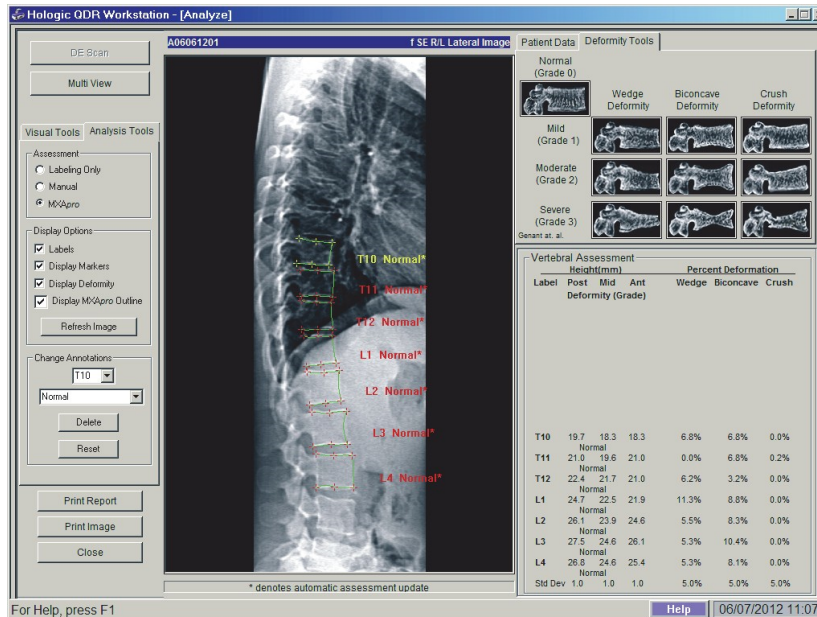

16.1 Viewer-Fenster, linkes Teilfenster

Tabelle 16 Viewer-Fenster, linkes Teilfenster

Bedienelement	Beschreibung
DE-Messung	Wird nur für die laterale-IVA-Aufnahme verwendet (Abschnitt 16.7 DE-Messung auf Seite 93).
Schaltfläche „Multi View“	Hiermit können Sie zwischen Multi View und Single View umschalten.
Registerkarte „Grafik-Tools“	Klicken Sie hier, um die Grafik-Tools anzuzeigen (Abschnitt 16.4 Viewer-Fenster, linkes Teilfenster, Registerkarte „Grafik-Tools“ auf Seite 90).
Registerkarte „Analyse-Tools“	Hiermit werden die Analyse-Tools angezeigt (siehe Abschnitt 16.5 Viewer-Fenster, linkes Teilfenster, Registerkarte Analysis Tools (Analyse-Tools) auf Seite 90).
Bericht drucken	Der Bericht wird auf dem gewählten Drucker gedruckt.
Bild drucken	Das Bild wird auf dem gewählten Drucker gedruckt.

Tabelle 16 Viewer-Fenster, linkes Teilfenster

Bedienelement	Beschreibung
Schließen	Das Analysefenster wird geschlossen und das Hauptfenster wird wieder angezeigt, wobei sämtliche an der Messung vorgenommenen Änderungen gespeichert werden.

16.2 Viewer-Fenster, mittleres Teilfenster

Tabelle 17 Viewer-Fenster, mittleres Teilfenster

Bedienelement	Beschreibung
Bildanzeigebereich	<i>In diesem Bereich wird das Bild der gewählten Messung angezeigt. Um die Bildsteuerungsmenüs anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild (Abschnitt 16.6 Bildsteuerelemente auf Seite 93).</i>
Scan-ID	Wird links über dem Bild angezeigt.
Messungstyp	Wird rechts über dem Bild angezeigt.




16.3 Viewer-Fenster, rechtes Teilfenster

Tabelle 18 Viewer-Fenster, rechtes Teilfenster

Bedienelement	Beschreibung
Registerkarte „Patientendaten“	Mit dieser Option werden die Patientendaten aufgerufen.
Registerkarte „Deformitäts-Tools“	Mit dieser Option können Sie die Referenzbilder zur Erkennung von Deformitäten und die Ergebnisse zu jedem im Bild analysierten Wirbelkörper anzeigen.
Multi View aktiviert	Im Viewer wird ein Bild sowohl im mittleren als auch im rechten Teilfenster angezeigt.

16.4 Viewer-Fenster, linkes Teilfenster, Registerkarte „Grafik-Tools“

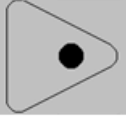Tabelle 19 Viewer-Fenster, linkes Teilfenster, Registerkarte „Grafik-Tools“

Bedienelement	Beschreibung
<p>W-L</p> 	<p><i>Kontrast und Helligkeit des Bildes werden eingestellt, indem Sie in der Mitte des Dreiecks auf die „Kugel“ klicken und sie ziehen. Feineinstellung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild.</i> 2. <i>Klicken Sie auf „W-L anpassen“.</i> 3. <i>Klicken Sie auf das Bild und bewegen Sie den Cursor.</i>
Zurücksetzen	Stellt alle ursprünglichen Werte für die Anzeigeparameter wieder her.
Invert (Invertieren)	Der Graustufenwert der einzelnen Pixel wird invertiert, so dass ein Negativ des Bildes entsteht.
Spiegeln	Das Bild wird an der senkrechten Mittelachse gespiegelt.
	Klicken, um die Vergrößerung des Bildes zu erhöhen.
	Klicken, um die Vergrößerung des Bildes zu verringern.

16.5 Viewer-Fenster, linkes Teilfenster, Registerkarte Analysis Tools (Analyse-Tools)

Tabelle 20 Bewertungsbereich

Bedienelement	Beschreibung
Optionsfelder zur Festlegung der Platzierung der Wirbelanmerkungen im Bild. Beachten Sie die folgenden Beschreibungen:	
Nur Bezeichnung	Zum Platzieren einer Wirbelbezeichnung positionieren Sie den Cursor und klicken Sie mit der Maus. Um die Bezeichnung zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle. Per Rechtsklick können Sie die Bezeichnung ändern oder eine Bewertung hinzufügen.

Tabelle 20 Bewertungsbereich

Bedienelement	Beschreibung
Manual	Um eine Wirbelbezeichnung samt Marker zu platzieren, setzen Sie den Cursor in die Mitte eines Wirbelkörpers und klicken Sie mit der Maus. Sollen Bezeichnung und Marker gleichzeitig verschoben werden, klicken Sie zwischen die Marker und ziehen Sie beides mit der Maus an die gewünschte Stelle. Um nur einen Marker zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen Sie ihn an die jeweilige Position. Per Rechtsklick können Sie die Bezeichnung ändern oder eine Bewertung hinzufügen.
MXApro	Zum Platzieren von Wirbelbezeichnung, Markern, Wirbelumriss (grün) und Deformitätsbewertungen auf Grundlage des berechneten Verhältnisses setzen Sie den Cursor in die Mitte eines Wirbelkörpers und klicken Sie mit der Maus. Um alles gemeinsam zu verschieben, klicken Sie zwischen die Marker. Soll nur ein Marker verschoben werden, klicken Sie darauf und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position (Abschnitt 18 Marker auf Seite 97). Per Rechtsklick kann die Bezeichnung oder Bewertung geändert werden. Das Sternchen gibt an, dass die Bewertung auf den Verhältnissen basiert, die aus den Wirbelkörperhöhen berechnet wurden. Die Wirbeldeformitätsbewertung unterliegt der alleinigen Entscheidung des Arztes oder der geschulten medizinischen Fachkraft. Vor dem Drucken oder der Berichterstellung müssen die Bewertungen von einem Arzt geändert oder genehmigt werden. Richtlinien zur Bewertung finden Sie unter Abschnitt 17 Auswerten des IVA-Bildes auf Seite 94.

Tabelle 21 Der Bereich Display Options (Anzeigeoptionen)

Bedienelement	Beschreibung
	Steuerelemente zur Festlegung, welche Wirbelanmerkungen auf den Bildern angezeigt werden (siehe die folgenden Beschreibungen).
Bezeichnungen	Mit dieser Option können Sie alle Bezeichnungen auf dem Bild anzeigen.
Marker anzeigen	Mit dieser Option können Sie alle Marker auf dem Bild anzeigen.
Deformität anzeigen	Hiermit können Sie alle Deformitätsbewertungen auf dem Bild anzeigen.
MXA_{pro}-Umriss anzeigen	Diese Option dient zum Anzeigen der MXA _{pro} -Umrisse auf dem Bild. Der Umriss ist die softwareseitige Bewertung der Wirbelkanten, die die Software zum Platzieren der Marker verwendete.
Schaltfläche „Bild aktualisieren“	Mit dieser Option werden die ausgewählten Anzeigeoptionen auf die zuletzt analysierten Wirbelkörper übertragen (zeigt die Darstellung des Bildes bei Anzeige oder Ausdruck).




Tabelle 22 Der Bereich Change Annotations (Anmerkungen ändern)

Bedienelement	Beschreibung
	Steuerelemente zur Änderung der Wirbelbezeichnungen und Bewertungen ausgewählter Wirbelanmerkungen (siehe die folgenden Beschreibungen).
Dropdown-Liste für Bezeichnungsauswahl	Mit dem Pfeil nach unten kann die Bezeichnung der ausgewählten Wirbelanalyse geändert werden.
Dropdown-Liste für Bewertungsauswahl	Mit dem Pfeil nach unten kann die Deformitätsbewertung der ausgewählten Wirbelanalyse geändert werden.
Schaltfläche „Löschen“	Diese Option dient zum Löschen einer oder mehrerer ausgewählter Wirbelanalysen.
Reset-Taste (Rücksetzen)	Hiermit werden alle neuen Wirbelanalysen entfernt und die ursprünglichen Analysen (falls vorhanden) aus der DICOM-Datei angezeigt.

16.6 Bildsteuerelemente

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Bildbereich.

Tabelle 23 Bildsteuerelemente

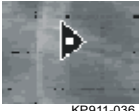Bedienelement	Beschreibung
Zoom und W-L Auswahlmenü (oberer Bereich)	Klicken Sie auf eine der Auswahlmöglichkeiten zum Aktivieren der folgenden Optionen: Vergrößerung ziehen Ausschnitt ziehen WL anpassen
Vergrößerung ziehen	Ziehen Sie die Lupe auf den Bereich des Bildes, den Sie vergrößern möchten, und lassen Sie die Taste los.  KP911-034
Ausschnitt ziehen	Klicken Sie auf das Bild und ziehen Sie es an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.  KP911-035
W-L-Anpassung	Ermöglicht W-L-Feineinstellungen. Bewegen Sie den Mauszeiger, um die Werte für F und L zu ändern.  KP911-036
Zoomsteuerung (unterer Bereich)	Wählen Sie eine der folgenden Zoomeinstellungen zum Vergrößern oder Verkleinern der Bildgröße aus: An Fenster anpassen 25 % 50 % 100 % 200 % 400 %


16.7 DE-Messung

Wenn eine Dual Energy-Messung von einem oder zwei Wirbeln der IVA-Aufnahme erforderlich ist, verwenden Sie DE-Messung.


Der Patient muss auf dem Tisch bleiben und dieselbe Position einnehmen wie während der lateralen IVA-Aufnahme. Wenn sich der Patient bewegt hat, muss eine weitere laterale IVA-Aufnahme und direkt im Anschluss eine DE-Messung durchgeführt werden, bei der sich der Patient in derselben Position befindet.

1. Klicken Sie auf **DE Scan** (DE-Messung).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Analysis Tools** (Analyse-Tools).
3. Platzieren Sie den Mauszeiger auf die obere grüne Linie (am oberen Bildrand) und ziehen Sie diese an den oberen Rand des gewünschten Bereiches.

*Hinweis: Wenn das Bild vergrößert wurde, befinden sich die grünen Linien möglicherweise außerhalb des angezeigten Bereiches. Wählen Sie zum Anzeigen der Linien die Option **Fit to Window** (An Fenster anpassen).*

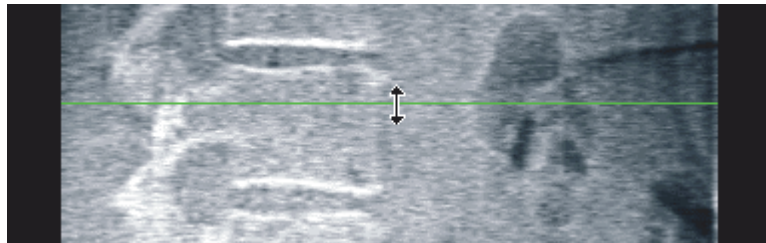

4. Platzieren Sie den Mauszeiger auf die untere grüne Linie (am unteren Bildrand) und ziehen Sie diese an den unteren Rand des gewünschten Bereiches.

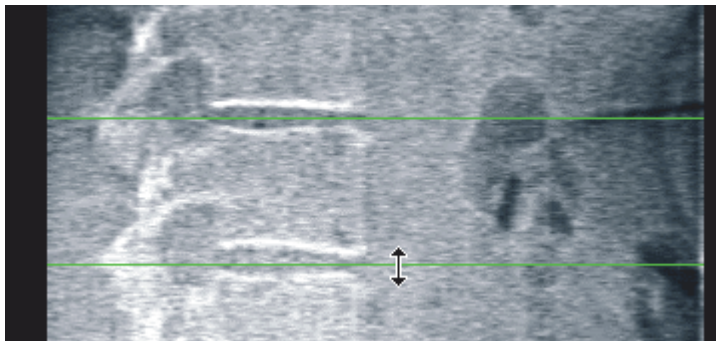

5. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).
6. Starten Sie die neue Messung. Während der Dual Energy-Aufnahme kann der Patient normal atmen.

17 Auswerten des IVA-Bildes

IVA-Bilder müssen von einem Arzt ausgewertet werden. IVA Bilder sind nicht für die allgemein-radiologische Diagnose gedacht, sondern für die Bewertung von Wirbelkörperverformungen.

Die Anatomie der Wirbelsäule ist in [Abbildung 55](#) zusammen mit den Bezeichnungen der Wirbelkörperebenen dargestellt. IVA-Bilder enthalten in der Regel die Ebenen **T4** bis **L4**. Entsprechend dem Klassifizierungsschema nach Genant (siehe folgende Referenz) zeigt [Abbildung 56](#) Beispiele einer typischen Wirbelkörperform und Beispiele für deformierte Wirbelkörper.

Abbildung 55 Die menschliche Wirbelsäule

Die menschliche Wirbelsäule besteht aus:

1. 7 Halswirbeln
2. 12 Brustwirbeln
3. 5 Lendenwirbeln
4. Kreuzbein.


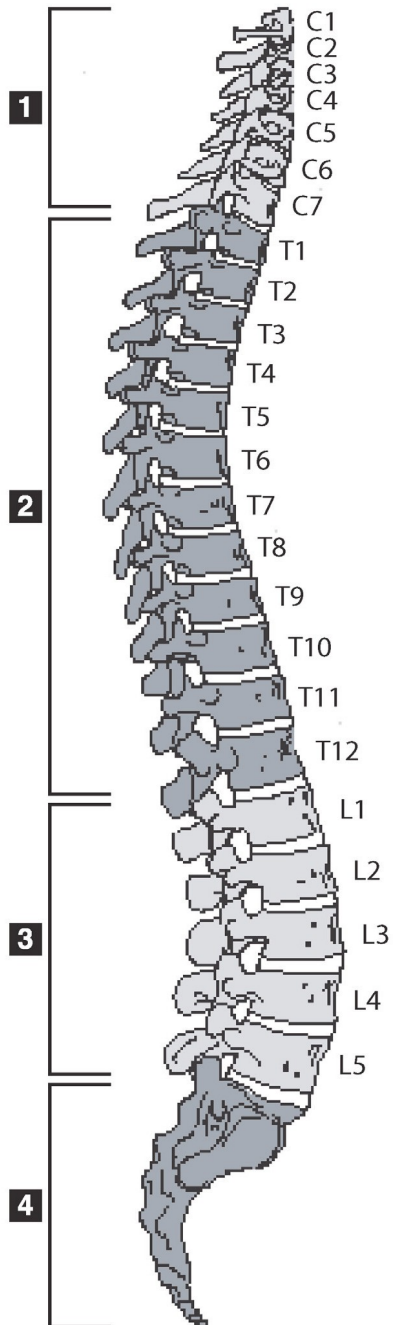


Abbildung 56 Wirbelkörperverformungen

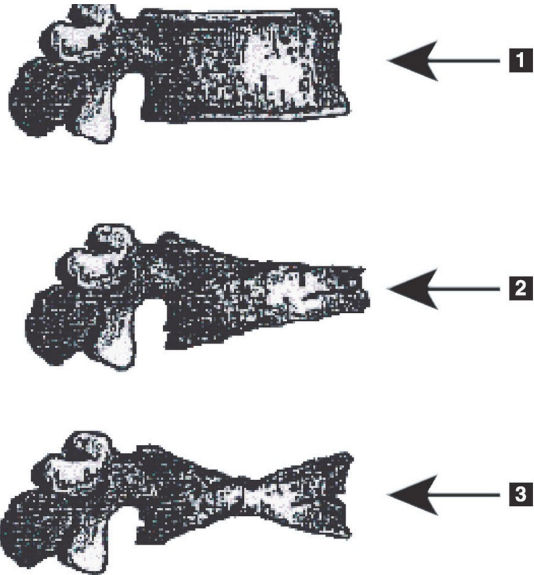

1. Typischer Wirbelkörper
2. Starke keilförmige Verformung
3. Starke bikonkave Verformung

Typische Wirbelkörper im Vergleich zu stark deformierten Wirbelkörpern.


Nach Genant, H. K., C. Y. Wu et al. (1993).
 „Vertebral fracture assessment using a semiquantitative technique.“ J. Bone Miner Res 8(9): 1137-48.

Weitere Informationen zur Bewertung von Wirbelkörperverformungen und zur Nützlichkeit der Feststellung von Wirbelkörperverformungen bei der klinischen Osteoporosebewertung finden Sie in den Werken und Referenzen unter [Abschnitt 21 Auswerten der Ergebnisse](#) auf Seite 116.

18 Marker

Um die Form eines oder mehrerer Wirbel zu definieren, ordnen Sie den hinteren, vorderen und mittleren Wirbelpunkten Marker zu ([Abbildung 57](#)).

Abbildung 57 Markerplatzierung

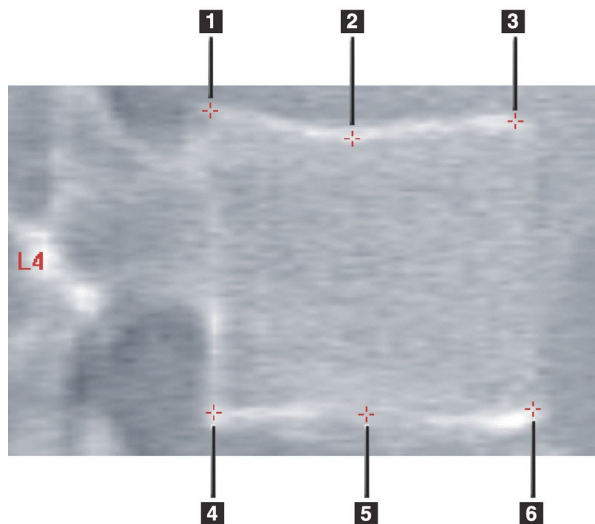

1. Superior Posterior
2. Superior Mitte
3. Superior Anterior
4. Inferior Posterior
5. Inferior Mitte
6. Inferior Anterior

Weitere Informationen zur richtigen Platzierung dieser sechs Marker finden Sie im Anhang zu Kapitel 20 von „Point Placement in Vertebral Morphometric X-ray Absorptiometry“ von Jacqueline A. Rea in „The Evaluation of Osteoporosis: Dual Energy Absorptiometry and Ultrasound in Clinical Practice, Second Edition“, S. 456-457.

18.1 Verwenden von Markern

18.1.1 Spiegeln des Bildes

Im Bild der IVA-Aufnahme werden die Wirbel zuerst auf der linken Seite angezeigt. Achten Sie vor dem Hinzufügen von Markern darauf, dass sich die Wirbelsäule auf der linken Seite befindet. Klicken Sie gegebenenfalls auf **Flip** (Spiegeln).




Hinweis Das Bild kann gespiegelt werden, nachdem Marker hinzugefügt wurden.

18.1.2 Hinzufügen von Markern

1. Klicken Sie auf **Markers**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und klicken Sie dann auf **Add Marker** (Marker hinzufügen).

Abbildung 58 Einen Marker hinzufügen

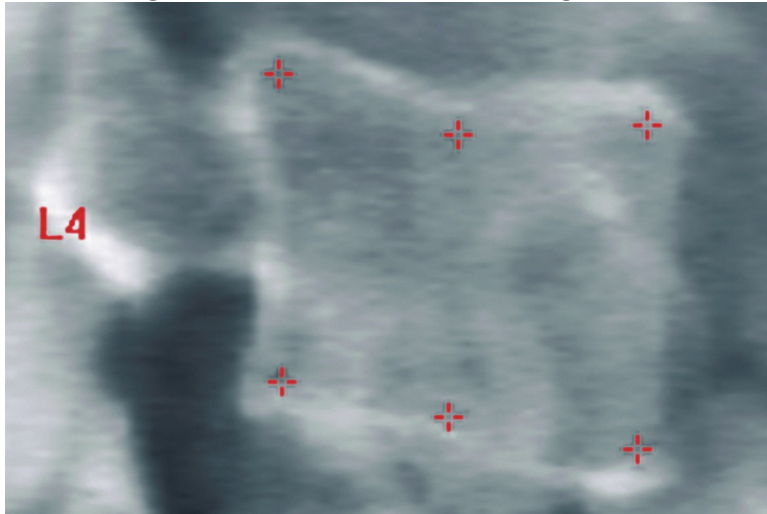**Hinweis**

Die Software versucht, die Wirbelbezeichnung basierend auf der Position des Cursors beim Klicken des Benutzers zu ermitteln. Wenn die von der Software ermittelte Bezeichnung falsch ist, ändern Sie die Bezeichnung nach dem Hinzufügen der ersten Bezeichnung zum Bild, bevor Sie eine weitere hinzufügen. Wenn weitere Bezeichnungen hinzugefügt werden und eine oder mehrere falsch sind, ändern Sie die entsprechende Bezeichnung, bevor Sie eine weitere Bezeichnung hinzufügen.

18.1.3 Auswählen von Markern

1. Klicken Sie in die Mitte der sechs Marker und klicken Sie dann auf oder wählen Sie die Markerdaten im Ergebnisblock aus.

Abbildung 59 Selecting a Marker (Einen Marker auswählen)

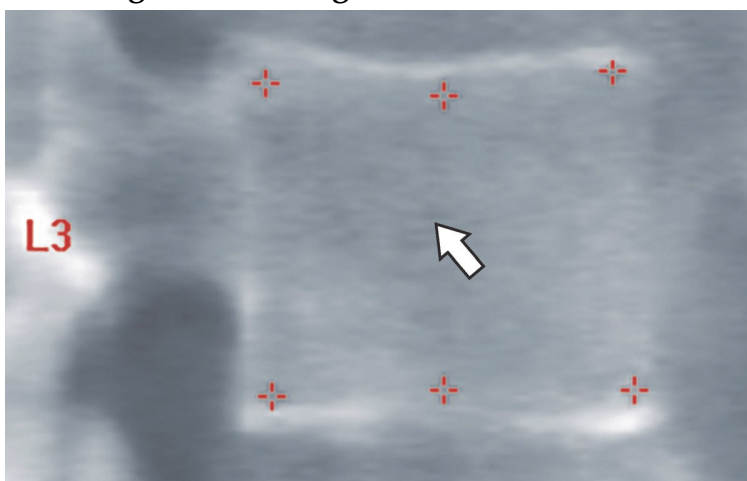


Abbildung 60 Markerdaten im Ergebnisblock

L3	22.6	21.1	22.9	1.01	0.93
L4	21.3	19.3	22.4	1.05	0.91

Die ausgewählten Marker werden gelb dargestellt (bzw. rot, wenn das Bild invertiert ist). Nicht ausgewählte Marker werden rot dargestellt (bzw. zyan, wenn das Bild invertiert ist).

18.2 Ergebnisblock

Das Ergebnisfeld für laterale und für AP-IVA-Aufnahmen muss unterschiedlich interpretiert werden, da die Wirbelsäule bei der jeweiligen Messung eine andere Position einnimmt.

18.2.1 Ergebnisblock für laterale IVA-Aufnahmen

Der Wirbelbeurteilungsbereich wird unten rechts im Fenster angezeigt, wenn der Viewer sich im Modus Single View (Einzel-Ansicht) befindet. In diesem Bereich werden für alle analysierten Wirbel des im Bildbereich angezeigten Bildes die Ergebnisse tabellarisch angezeigt.

Für jede mögliche Wirbelanalyse stehen zwei Zeilen zur Verfügung.

- Die erste Zeile enthält die Wirbelbezeichnung, die hintere, mittlere und vordere Wirbelhöhe in mm und die prozentuale Deformität für Keilwirbel, Bikonkav und Kompression.
- Die zweite Zeile enthält den Deformitätstyp sowie den jeweiligen Schweregrad. Je nachdem, welches Verfahren zur Wirbelanalyse angewendet wurde, sind einige dieser Daten möglicherweise nicht vorhanden. Bei nicht analysierten Wirbeln werden zwei leere Zeilen angezeigt.
- In der letzten Datenzeile der Tabelle werden für jeden der angezeigten Datentypen die jeweiligen Standardabweichungswerte angezeigt. Beispielsweise beträgt die Standardabweichung für Post Höhe (mm) ± 1 mm und für Keilwirbel ± 5 %.

Abbildung 61 Ergebnisblock

Vertebral Assessment						
Label	Height(mm)			Percent Deformation		
	Post Deformity (Grade)	Mid	Ant	Wedge	Biconcave	Crush
T7	18.0	16.0	18.0	0.0%	11.1%	0.0%
T8	18.0	16.0	18.0	0.0%	11.1%	0.0%
T9	18.0	16.0	18.0	0.0%	11.1%	0.0%
T10	18.0	16.0	18.0	0.0%	11.1%	0.0%
T11	18.0	16.0	18.0	0.0%	11.1%	0.0%
T12	18.0	16.0	18.0	0.0%	11.1%	0.0%
L1	18.0	16.0	18.0	0.0%	11.1%	0.0%
L2	18.0	16.0	18.0	0.0%	11.1%	0.0%
L3	18.0	16.0	18.0	0.0%	11.1%	0.0%
L4	18.0	16.0	18.0	0.0%	11.1%	0.0%
Std Dev	1.0	1.0	1.0	5.0%	5.0%	5.0%

Tabelle 24 Ergebnisblock-Kennzeichnungen

Kennzeichnung	Beschreibung
Post Höhe (mm)	Höhe des Wirbels zwischen dem oberen und unteren Posterior-Marker in mm
Mittlere Höhe (mm)	Höhe des Wirbels zwischen dem oberen und unteren Mittellinien-Marker in mm
Ant Höhe (mm)	Höhe des Wirbels zwischen dem oberen und unteren Anterior-Marker in mm
Keilwirbel	Abstand in mm, der aus Ant Höhe geteilt durch Post Höhe berechnet wird.
Mittlerer Keilwirbel	Abstand in mm, der aus Mittlere Höhe geteilt durch Post Höhe berechnet wird.

18.2.2 Ergebnisblock für AP-IVA-Aufnahmen



Hinweis Die Verwendung von Markern für AP-IVA-Aufnahmen wird von Hologic nicht empfohlen.

Der Ergebnisblock für die AP-IVA-Aufnahme wird wie bei der lateralen IVA-Aufnahme dargestellt. Aufgrund der Position der Wirbelsäule werden jedoch andere Bezeichnungen verwendet. Die **Mittlere Höhe**, der **Keilwirbel** und der **Mittlere Keilwirbel** sind identisch. **Post Höhe** muss jedoch als **Rechte Seite** und **Ant Höhe** als **Linke Seite** des Wirbels interpretiert werden. Es gilt also:

Tabelle 25 Ergebnisblock für die AP-IVA-Aufnahme

Laterale IVA-Aufnahme	AP-IVA-Aufnahme
Post Höhe (mm)	Rechte Seite (mm)
Ant Höhe (mm)	Linke Seite (mm)

Die Bezeichnungen **Linke Seite** und **Rechte Seite** werden nicht im Ergebnisblockbericht der AP-IVA-Aufnahme angezeigt und nicht in Berichten gedruckt.

18.3 Drucken

Im Viewer stehen zwei Möglichkeiten zum Drucken des Bildschirminhalts zur Verfügung: Bericht drucken und Bild drucken.

Die Druckfunktion ist in die normale Windows-Architektur integriert. Sie können daher das Ausgabegerät, die Anzahl der Exemplare, verschiedene Eigenschaften usw. auswählen. Sie können sich auch in der Druckvorschau auf dem Bildschirm anzeigen lassen, wie der Ausdruck aussieht.



Hinweis *Wenn dem Bild neue CADfx-Analysen hinzugefügt wurden, müssen Sie diese Analysen bestätigen, bevor die Ergebnisse gedruckt oder auf dem Bildschirm angezeigt werden können.*

18.3.1 Bericht drucken

Bericht drucken kann nur im Modus Single View verwendet werden.

18.3.2 Bild drucken

Bild drucken kann sowohl im Modus Single View als auch Multi View verwendet werden.

Weitere Bericht-Typen werden unter [Abschnitt 20 Berichte](#) auf Seite 104 beschrieben.

19 Vergleichs- und Folgemessungen

19.1 Wiederherstellen einer Basis- oder vorherigen Messung

Wenn sich die Basis- oder vorherige Messung des Patienten zurzeit nicht im System befindet, suchen Sie diese und stellen Sie sie wieder her ([Abschnitt 23 Suchen von Messungen](#) auf Seite 121 und [Abschnitt 24 Wiederherstellen von Messungen](#) auf Seite 122).

19.2 Auswerten der Basis- oder vorherigen Messung

Vergewissern Sie sich, dass die Basis- oder vorherige Messung ordnungsgemäß analysiert wurde. Ist dies nicht der Fall, führen Sie die Analyse erneut durch und archivieren Sie die Messung sowie alle Folgemessungen.

19.3 Ausführen der Folgemessung

Informationen zu den Verfahrensweisen bei Folgemessungen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

Tabelle 26 Verfahren zur Folgemessung

Scannen	Abschnitt
AP Lenden	<i>AP-Untersuchung der Lendenwirbelsäule auf Seite 22</i>
Hüfte	<i>Hüftuntersuchung auf Seite 27</i>
Unterarm	<i>Unterarmuntersuchung auf Seite 42</i>
Ganzkörper	<i>Ganzkörperuntersuchung auf Seite 52</i>
AP/Lateral	<i>AP/Laterale Wirbelsäulen-BMD-Untersuchung in Rückenlage (Horizon A) auf Seite 67</i>
Dekubitus lateral	<i>Dekubitus-Lateral-Wirbelsäulen-BMD-Untersuchung auf Seite 73</i>

Klicken Sie anschließend im Bildschirm „Exit Exam (Untersuchung beenden)“ auf **Analyze Scan** (Messung analysieren).

19.4 Analysieren der Folgemessung mithilfe der Vergleichsanalyse

1. Führen Sie einen automatischen Vergleich mit der Basis- oder vorherigen Messung durch, je nach Analysekonfiguration.
2. Klicken Sie auf **Results** (Ergebnisse).
3. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).

4. Verwenden Sie, falls erforderlich, die Schaltflächen der Analyseschritte und die Toolbox-Tools, um die Folgemessung zu vergleichen. Passen Sie die Analyse der Folgemessung an die Analyse der Basis- oder vorherigen Messung an.



Hinweis *Wenden Sie die **Compare Analysis** (Vergleichsanalyse) an, um die besten Ergebnisse für die Änderungsrate zu erhalten.*

19.5 Erstellen des Änderungsratenberichts

1. Klicken Sie im Fenster **Exit Analysis** (Analyse beenden) auf **Report** (Bericht).



Hinweis *Wenn die Bereiche der vorherigen Messungen nicht exakt, sondern nur teilweise mit der aktuellen Messung übereinstimmen, wird nur für die Bereiche ein Bericht erstellt, in denen Übereinstimmungen vorhanden sind.*

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Änderungsrate**.
3. Klicken Sie auf **Print** (Drucken).

20 Berichte

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Report** (Bericht).
2. Klicken Sie auf den Namen des Patienten und anschließend auf **Next** (Weiter) >>.
3. Klicken Sie auf die gewünschten Messungen und anschließend auf **Next** (Weiter) >>. Hinweise zum Erstellen von Dual-Hip-Messungspaaren finden Sie unter [Abschnitt 20.3.2 Erstellen von Hüftpaaren für Dual-Hip-Änderungsratenberichte](#) auf Seite 106.
4. Um die Kommentare des Berichts ebenfalls zu drucken, klicken Sie auf **Edit comment...** (Kommentar bearbeiten...) ([Abbildung 62](#)).
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Wählen Sie den Berichtstyp. Klicken Sie dazu in das entsprechende Kästchen. ([Abschnitt 66 Erstellen und Senden eines DICOM-Berichts](#) auf Seite 113).
 - Klicken Sie auf **DICOM/IVA-Bericht**. ([Abschnitt 66 Erstellen und Senden eines DICOM-Berichts](#) auf Seite 113).
 - Klicken Sie auf **Generate DxReport** (DxReport erstellen). Siehe *Benutzerhandbuch zu DxReport* (MAN-02331). Sie können den DxReport auf der Registerkarte „Report (Bericht)“ des Fensters „System Configuration (Systemkonfiguration)“ konfigurieren.

6. Klicken Sie auf **Print** (Drucken).

20.1 Berichtsinformationsblöcke

Die Berichte enthalten *Informationsblöcke*, die sich je nach Art des ausgewählten Berichts leicht voneinander unterscheiden. Siehe [Abbildung 62](#) und die folgende Beschreibung zu den Berichtsblöcken.

Abbildung 62 Berichtsblöcke

Hologic, Inc.
35 Crosby Drive
Bedford, MA 01730

Source: Adina, Ada Sex: Female Height: 67.0 in
Patient ID: Ethnicity: White Weight: 110.0 lb
DOB: 11/01/1950 Menstruation Age: 54 Age: 59

Referent Physician:

Scan Information:
Scan Date: December 04, 2009 ID: A12040909
Scan Type: Lumbor Spine
Analysis: December 04, 2009 13:32 Version 13.1.3
Spine
Operator: QDR Workstation (S/N 1234)
Model: Comment:

DXA Results Summary:

Region	Area (cm ²)	BMC (g/cm ²)	BMD (g/cm ³)	T - score	Z - score
L1	174.5	15.69	1.016	-0.2	1.4
L2	162.5	17.51	1.066	0.5	1.7
L3	172.1	18.99	1.104	0.2	1.6
L4	182.0	18.91	1.039	-0.2	1.5
Total	679.8	70.91	1.057	-0.1	1.5

WHO Classification: Normal
Treatable Risk: Not Increased

Comment:

HOLOGIC

20.2 Bearbeiten von Kommentaren

1. Klicken Sie im Fenster **Print** (Drucken) auf **Edit comment...** (Kommentar bearbeiten...)
 - Um eine Option aus der Liste der vordefinierten Kommentare auszuwählen, klicken Sie auf den Abwärtspfeil.
 - Klicken Sie in das Textfeld **Comment** (Kommentar), um einen neuen Kommentar einzugeben.



Hinweis *Neue Kommentare werden nicht zur Liste der vordefinierten Kommentare hinzugefügt.*

2. Klicken Sie auf **Update** (Aktualisieren).

20.3 Änderungsratenbericht

Der Änderungsratenbericht dient zur Nachverfolgung von Veränderungen in den Ergebnissen im Laufe der Zeit und enthält:

- Detaillierte Patienten- und Messungsinformationen
- Besuchsdatum, Alter des Patienten, BMD und T-Score Ergebnisse für jeden Besuch
- Änderungen in den Ergebnissen in Prozent (%) und/oder als absoluter Differenzbetrag (gm/cm^2) im Vergleich zur Basismessung und vorherigen Messungen
- Messungsbild mit ROI und Knochenmarkierung der aktuellen Messung
- Referenzkurvendiagramm der BMD im Vgl. zum Alter für jede Basismessung und alle Folgemessungen
- 10-Jahres-Frakturrisiko (nur bei Hüftmessungen)
- Körperzusammensetzung, Änderungsrate (nur Ganzkörpermessungen)

Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 21 Auswerten der Ergebnisse](#) auf Seite 116.

20.3.1 Entfernen von Sternchen (*) und Rautenzeichen (#) aus Berichten

Berichte können Sternchen (*) und Rautenzeichen (#) enthalten, mit denen angezeigt wird, dass Messungstypen und Analysemethoden nicht übereinstimmen. So verhindern Sie, dass Sternchen (*) und Rautenzeichen (#) in Berichten vorkommen:

1. Klicken Sie auf **System Configuration** (Systemkonfiguration) > **Registerkarte „Report** (Bericht)“. Die Registerkarte „General (Allgemein)“ wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Rate of Change** (Änderungsrate).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Configure** (Konfigurieren). Das Dialogfeld „Configure Rate of Change (Änderungsrate konfigurieren)“ wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Results Block** (Ergebnisblock).
5. Deaktivieren Sie das Kästchen **Indicate Different Scan Types or Analysis Methods** (Unterschiedliche Messungstypen oder Analysemethoden anzeigen).
6. Klicken Sie auf **OK** und dann erneut auf **OK**.

20.3.2 Erstellen von Hüftpaaren für Dual-Hip-Änderungsratenberichte

Der Dual-Hip-Änderungsratenbericht liefert Informationen zu Veränderungen in den Ergebnissen von Hüftpaaren. Ein *Hüftpaar* umfasst eine Messung der rechten Hüfte und eine Messung der linken Hüfte, zwischen denen maximal 14 Tage liegen dürfen.

1. Greifen Sie auf die Liste der Patientenmessungen zu, wie Sie es bei jedem Bericht tun würden ([Abschnitt 20 Berichte](#) auf Seite 104).
2. Wählen Sie eine linke und eine rechte Messung – eine Messung ist die zuletzt durchgeführte Messung. Das Dialogfeld „Match Pairs of Scans (Messungspaare abgleichen)“ wird angezeigt.
3. Wählen Sie eine Messung der rechten Hüfte aus dem linken Listenfeld aus.
4. Wählen Sie eine Messung der linken Hüfte aus dem rechten Listenfeld aus. Der nach unten zeigende Pfeil wird aktiviert.
5. Wählen Sie das Hüftpaar aus der Liste „Dual Hip Pairs (Dual-Hip-Paare)“ aus.
6. Klicken Sie auf OK.

20.4 Körperzusammensetzungsberichte

Mit der APEX-Software können die DXA-Messungen mit einer repräsentativen Farbzuordnung für „fettes“ und „mageres“ Gewebe dargestellt werden ([Abbildung 63](#)).

Darüber hinaus kann ein Änderungsratenbericht (Rate-of-Change, ROC) generiert werden, um die Tendenz der fortlaufenden DXA-Körperzusammensetzungsmessungen über einen Zeitraum hinweg anzuzeigen ([Abbildung 64](#)).



Hinweis *Die Bilder in diesen Berichten eignen sich nicht zur Diagnosstellung.*

20.4.1 BCA-Ergebnisse

Die Berichtsblöcke und Diagramme für BCA-Ergebnisse ([Abbildung 63](#)) sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Eine Beschreibung der Bilder finden Sie unter [Abschnitt 20.6 DICOM-Bericht](#) auf Seite 113.

Abbildung 63 Erweiterter Bericht zur Körperzusammensetzung

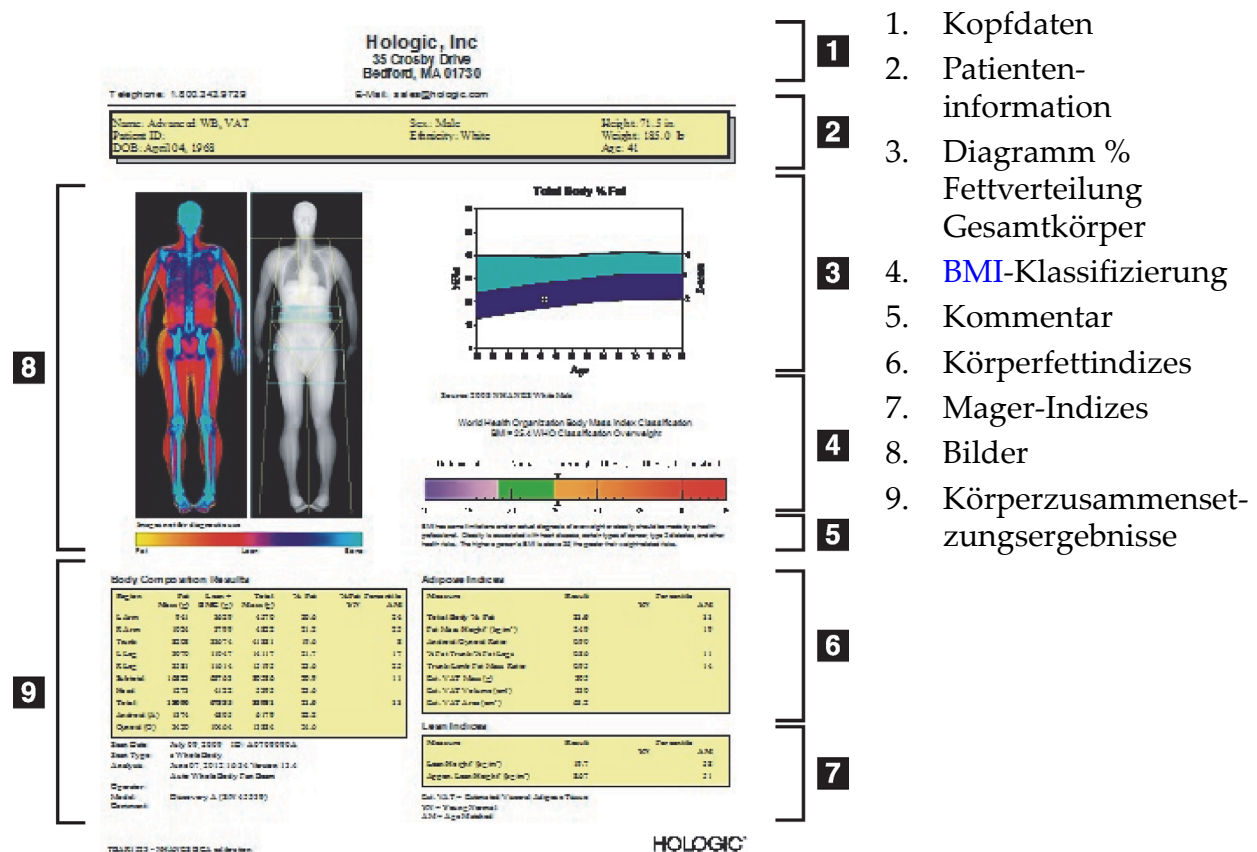


Tabelle 27 Felder des erweiterten Berichts zur Körperzusammensetzung

Berichtsbereich	Beschreibung
Körperzusammensetzungsergebnisse	Ergebnisse für die Standard-Unterbereiche (Arme, Rumpf, Beine und Kopf), Subtotal (ohne Kopf), Gesamt (mit Kopf) sowie Android- und Gynoid-Bereiche.
Körperfettindizes	Ergebnisse und Indizes für Körperfettgewebe des Patienten.
Mager-Indizes	Ergebnisse und Indizes für Magermassengewebe des Patienten.

Tabelle 28 Felder des erweiterten Diagramms zur Körperzusammensetzung

Diagramm	Beschreibung
Diagramm „Alter gegenüber % Fettverteilung Gesamtkörper“ ¹	Diagramm, in dem das Alter des Patienten im Vergleich zu seinem prozentualen Gesamtkörperfettanteil dargestellt wird.
BMI-Klassifizierung der WHO	Skalare Darstellung des Body-Mass-Index des Patienten nach WHO-Klassifizierung.

¹ Vom Nutzer konfigurierbar.

20.4.2 BCA-Änderungsratenberichtsergebnisse

Die Advanced Body Composition™-Berichtsblöcke und -Diagramme für BCA-Änderungsratenberichtsergebnisse ([Abbildung 64](#)) sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.

Abbildung 64 Advanced Body Composition-Änderungsratenbericht

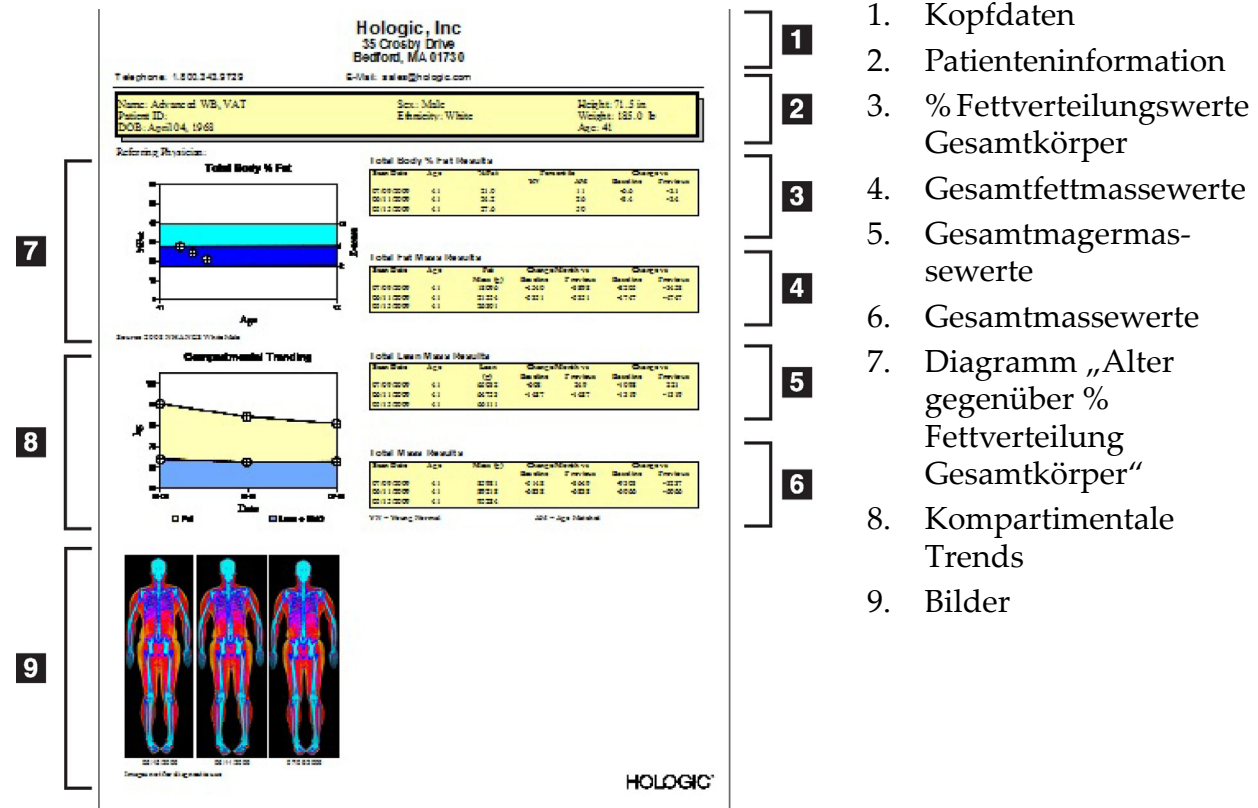


Tabelle 29 Felder des Advanced Body Composition-Änderungsratenberichts

Berichtsblock	Beschreibung
% Fettverteilungswerte Gesamtkörper ¹	Ergebnisse, Indizes und Vergleichsdaten für den prozentualen Fettanteil des Patienten.
Gesamtfettmassewerte*	Ergebnisse, Indizes und Vergleichsdaten für den Gesamtfettanteil des Patienten.
Gesamtmagermassewerte*	Ergebnisse, Indizes und Vergleichsdaten für die Magermasse plus BMC-Masse des Patienten.
Gesamtmassewerte*	Ergebnisse, Indizes und Vergleichsdaten für die Gesamtmasse des Patienten.

1 Vom Nutzer konfigurierbar

Tabelle 30 Felder des Advanced Body Composition-Änderungsratendiagramms

Diagramm	Beschreibung
Diagramm „Alter gegenüber % Fettverteilung Gesamtkörper“ ¹	Diagramm, in dem das Alter des Patienten im Vergleich zu seinem prozentualen Gesamtkörperfettanteil dargestellt wird.
Kompartimentale Trends*	Diagramm, in dem die Änderungen in Gesamtkörperfettmasse und Gesamtkörpermagermasse dargestellt werden

1 Vom Nutzer konfigurierbar

20.4.3 Körperzusammensetzungsberichte und Referenzdatenbankvergleiche

Im Jahr 2008 veröffentlichte NHANES einen populationsbasierten DXA-Ganzkörperdatensatz, der auf Hologic-Scannern gewonnen wurde. Ausgewählte DXA-Messungen können mit Referenzdatenbanken zu Geschlecht, ethnischer Gruppe und Alter verglichen werden, die aus dem 2008 vom NHANES veröffentlichten Ganzkörperdatensatz entwickelt wurden.²

Mit der Software können darüber hinaus die DXA-Messungen mit einer repräsentativen Farbzuordnung für „fettes“ und „mageres“ Gewebe dargestellt werden ([Abbildung 63](#)). Auf dem Farbbild wird der relative Anteil von Fett- und Magergewebe im DXA-Bild angezeigt, wobei gelbe Bereiche einen höheren prozentualen Fettanteil und orangefarbene und rote Bereiche einen stufenweise niedrigeren prozentualen Fettanteil aufweisen. Bereiche mit Knochen werden blau abgebildet. Neben dem Farbbild wird ein Bild angezeigt, das in Bereichen mit höherer Gewebedicke heller und in Bereichen mit dünnerer Gewebedicke dunkler dargestellt wird. Mit diesem Bild werden die vom Anwender während der Analyse platzierten ROI-Linien angezeigt. Mit der Textzeile „Image not for diagnostic use (Bild nicht zur diagnostischen Verwendung)“ unter den Bildern werden die Benutzer informiert, dass das Bild nicht zur Diagnose verwendet werden darf. Das Farbbild zeigt die relative Verteilung von Fett- und Magergewebe in der Aufnahme an und enthält keine diagnostischen oder quantitativen Informationen.

2. T.L. Kelly, K.E. Wilson and S.B. Heymsfield, „Dual energy X-ray absorptiometry body composition reference values from NHANES,“ PLoS One, 4 (2009), e7038.

Es wird eine Referenzkurve für „% Fettverteilung Gesamtkörper gegenüber Alter“ generiert, die mit dem Geschlecht und der ethnischen Zugehörigkeit des Patienten abgeglichen wird. Das Diagramm liefert eine grafische Darstellung der Messwerte des Patienten relativ zu altersgleichen Patienten. Die Mittellinie des Diagramms stellt den mittleren Referenzwert dar, und die oberen und unteren schattierten Bereiche definieren das Konfidenzintervall von 95 Prozent des Diagramms. Beachten Sie, dass die oberen und unteren schattierten Bereiche der Referenzkurve möglicherweise nicht genau dieselbe Größe aufweisen, was darauf hindeutet, dass die zugrunde liegenden Referenzdaten nicht normal verteilt sind. Es wurde ein Algorithmus implementiert, der die Verschiebung der zugrunde liegenden Daten ausgleicht, um genaue T-Scores, Z-Scores und Perzentile zu liefern.

Eine BMI-Skala (Body Mass Index) auf dem Bericht zeigt den berechneten BMI des Patienten auf Grundlage der vom Bediener eingegebenen Werte für Größe und Gewicht des Patienten an. Vor einer Interpretation der Ergebnisse in der BMI-Skala sollte immer die Richtigkeit von Größe und Gewicht überprüft werden. Oberhalb der Skala wird die BMI-Klassifizierung der WHO sowie eine Erläuterung der mit einem hohen BMI verbundenen Gesundheitsrisiken angezeigt. Unter dem Diagramm werden in einem Absatz die vom Surgeon General, dem US-amerikanischen Gesundheitsbeauftragten, veröffentlichten gesundheitlichen Konsequenzen von Übergewicht und Fettleibigkeit zusammengefasst

(http://www.surgeongeneral.gov/topics/obesity/calltoaction/fact_advice.htm). Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.surgeongeneral.gov/topics/obesity/calltoaction/CalltoAction.pdf>.

Die Patientenergebnisse können sowohl grafisch als auch quantitativ mit Werten in der Referenzdatenbank für Ganzkörper-DXA von Hologic verglichen werden ([Abbildung 63](#)). Das Diagramm zeigt die Referenzwerte sowie den gemessenen DXA-Wert des Patienten an. Bei Erwachsenen liefert der quantitative Vergleich einen Z-Score oder einen AÜ-Perzentilwert (Altersübereinstimmung) und einen T-Score oder einen JN-Perzentilwert (Jung, normal entwickelt). Bei Patienten unter 20 Jahren wird nur ein Z-Score oder ein AÜ-Perzentilwert bereitgestellt. Mithilfe einer einfachen mathematischen Umwandlung werden Z-Scores und T-Scores in AÜ- bzw. JN-Perzentilwerte konvertiert, je nachdem, ob der Benutzer die Software für die Anzeige von Z- und T-Scores (Standardabweichungs-Scores) oder Perzentilen konfiguriert.

Darüber hinaus kann ein Änderungsratenbericht (Rate-of-Change, ROC) generiert werden, um die Tendenz der fortlaufenden DXA-Körperzusammensetzungsmessungen über einen Zeitraum hinweg anzuzeigen ([Abbildung 64](#)). Die Kurve „% Fettverteilung Gesamtkörper“ oben links im Bericht zeigt die Tendenz der Ergebnisse von „% Fettverteilung Gesamtkörper“ im Laufe der Zeit an. Diese Messwerte werden auf einer an Alter, Geschlecht und die ethnische Gruppe angepassten Referenzkurve der Referenzdatenbank für Ganzkörper-DXA von Hologic angezeigt.

Direkt unter der Kurve „% Fettverteilung Gesamtkörper“ ist ein weiteres Diagramm mit der Bezeichnung „Kompartimentale Trends“ abgebildet. Dieses Diagramm gewährt eine grafische Übersicht über die Änderungen in Gesamtkörperfettmasse (gelb schattierter Bereich) und Gesamtkörpermagermasse (blau schattierter Bereich). Die Gesamtmasse, d. h. die Summe aus gelbem Fettmassebereich und blauem Magermassebereich, wird durch die oberste Linie des Diagramms angegeben.

20.5 Pädiatrieberichte

[Pediatric Reports \(Pädiatrieberichte\)](#) zeigt ein Diagramm an, in dem die Messwerte des Patienten auf einer Referenzkurve, die nach Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit angepasst ist, dargestellt werden. Unter der Grafik erscheinen die zugehörigen Ergebnisse auf Grundlage der verfügbaren Messungen, die in der Systemkonfiguration für diesen Bericht ausgewählt wurden. Jede DXA-Messung wird auf einer Perzentil-Skala dargestellt und Z-Score und Perzentil der Messwerte des Patienten werden relativ zu Patienten des gleichen Geschlechts und der gleichen ethnischen Zugehörigkeit ganz rechts in der Skala dargestellt. Für Z-Scores und Perzentilwerte werden Referenzdaten von Hologic, der Studie zur Knochenmineraldichte in der Kindheit und NHANES zugrunde gelegt.

Abbildung 65 Pädiatrischer Wirbelsäulenbericht

Hologic, Inc.
35 Crosby Drive
Bedford, MA 01730

Name: SPINE White Male AGE 8
Patient ID:
DOB: June 12, 1992

Sex: Male
Ethnicity: White
Height: 49.4 in
Weight: 57.5 lb
Age: 8

Referring Physician:

5 [Image of spine scan]

3 [Graph of BMD vs Age]

4 [DXA Results Summary Table]

7 [Technical details]

1 1. Kopfdaten
2 2. Patienteninformation
3 3. Diagramm mit BMD im Vergleich zum Alter
4 4. Untersuchungsergebnisse
5 5. Bild
6 6. DXA-Ergebniszusammenfassung
7 7. Messungsinformationen

Region	Area	BMD	BMDAD	BMDD	Z	LSI
L1	1.81	1.35	0.05	0.15	1.55	0.00
L2	1.78	1.36	0.05	0.15	1.55	0.00
L3	1.64	1.36	0.05	0.15	1.55	0.00
L4	1.62	1.35	0.05	0.15	1.55	0.00
L1-L4	16.96	1.35	0.05	0.15	-0.4	36

20.6 DICOM-Bericht

Abbildung 66 Erstellen und Senden eines DICOM-Berichts

Auswählen eines DICOM-BMD-Berichtstyps

1. Wählen Sie die gewünschten Messungen aus.
2. Wählen Sie den **DICOM BMD**-Berichtstyp.

Anzeigen von Messungsinformationen und Ausfüllen der Felder zur Patientenbiografie

1. Wählen Sie die Messung im Fenster **DICOM Report** (DICOM-Bericht).
2. Klicken Sie auf **Scan Details** (Messungsinformationen).
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Details** (Informationen).
4. Die folgenden Felder können bearbeitet werden:
 - Zugangsnummer – bis zu 16 Zeichen
 - Untersuchungsinstanz UID – maximal 28 Zeichen
 - HL7-Feld 1 – bis zu 64 Zeichen
 - HL7-Feld 2 – bis zu 64 Zeichen
 - HL7-Feld 3 – bis zu 64 Zeichen



Hinweis Die HL7-Felder sind benutzerdefinierbar und enthalten zusätzliche Informationen.

- Bediener – bis zu 5 Zeichen
 - Größe – bis zu 5 Zeichen
 - Gewicht – bis zu 5 Zeichen
 - Messungskommentar – bis zu 100 Zeichen
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Identification** (Identifizierung), um die Messungsinformationen anzuzeigen.
 6. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern; klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen), um das Fenster ohne Speichern zu schließen.

20.6.1 Eingeben von Zugangsnummern und benutzerdefinierten Einträgen

1. Wählen Sie im Fenster *DICOM Report (DICOM-Bericht)* eine Messung aus.
2. Klicken Sie auf **Save As** (Speichern unter) oder auf **Send** (Senden).
3. Wenn die ausgewählte Messung keine Zugangsnummer hat, geben Sie eine ein und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen), falls die Zugangsnummer unbekannt ist oder zu einem späteren Zeitpunkt eingegeben wird.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, weitere Informationen hinzuzufügen, geben Sie diese ein und klicken in den angezeigten Dialogfeldern jeweils auf **OK**.

20.6.2 Anzeigen der Vorschau eines DICOM-Berichts

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Preview** (Vorschau), um den *DICOM*-Bericht vor dem Speichern oder Senden anzuzeigen.

20.6.3 Drucken eines DICOM-Berichts

Im Fenster *DICOM Preview* (Vorschau DICOM-Bericht) können Sie über die Schaltfläche **Print** (Drucken) den *DICOM*-Bericht auf Ihrem lokalen Standarddrucker drucken.

20.6.4 Speichern eines DICOM-Berichts

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Save As** (Speichern unter), um einen *DICOM*-Bericht als Datei an einem beliebigen Speicherort zu speichern.

20.6.5 Senden eines DICOM-Berichts

1. Wählen Sie die Messungen im Fenster *DICOM Report* (DICOM-Bericht).

Allen Messungen, die diesem Patientenbesuch zugeordnet sind, muss dieselbe Zugangsnummer zugewiesen werden.

2. Klicken Sie auf **Send** (Senden).

Für jede der ausgewählten Messungen wird ein *DICOM*-Bericht erstellt. Die Berichte werden in die Warteschlange gestellt und in der Reihenfolge gesendet, in sie eingestellt wurden.

Zum Anzeigen des Sendestatus siehe [Abschnitt 20.6.7 Anzeigen der Warteschlange](#) auf Seite 115.

20.6.6 Sortieren der Messungsliste

Klicken Sie auf eine beliebige Überschrift, um die Messungsliste danach zu sortieren (in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge).

20.6.7 Anzeigen der Warteschlange

Klicken Sie auf die Schaltfläche **View Queue** (Warteschlange anzeigen), um die zu sendenden Messungen in der Warteschlange anzuzeigen.

Anzeigen des Verlaufs der gesendeten Berichte

Klicken Sie auf die Schaltfläche **View Log** (Protokoll anzeigen) im Dialogfeld *View Queue* (Warteschlange anzeigen).

Aktualisieren des Status von DICOM-Berichten in der Warteschlange

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Refresh** (Aktualisieren) im Dialogfeld *View Queue* (Warteschlange anzeigen) anzeigen.

Löschen eines DICOM-Berichts aus der Warteschlange

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Delete** (Löschen) im Dialogfeld *View Queue* (Warteschlange anzeigen).

20.6.8 Schließen eines DICOM-Berichts

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Cancel** (Abbrechen) oder **<<Back** (Zurück) im Fenster *DICOM Report* (DICOM-Bericht).

20.7 DxReport

20.7.1 Erstellen eines DxReports

1. Wählen Sie den für den Befund zuständigen Arzt aus.
2. Markieren Sie die Option „Include rate of Change (Änderungsrate einbeziehen)“ oder heben Sie die Markierung wieder auf.
3. Klicken Sie auf „Generate DxReport (DxReport erstellen)“.

Ein Word-Bericht wird entsprechend den Konfigurationseinstellungen erstellt, siehe *Benutzerhandbuch* zu *DxReport* MAN-02331.



Achtung *In DxReports erstellte Patientenberichte müssen vor ihrer Freigabe von einem qualifizierten Arzt überprüft werden.*

21 Auswerten der Ergebnisse

Websites:

- www.iscd.org – insbesondere „ISCD Official Positions“
- www.nof.org – insbesondere „NOF Physician's Guide“
- www.iofbonehealth.org – insbesondere „Health Professionals“ einschließlich „Educational Tools“ und „Slide Kits“.
- <http://www.aace.com> - American Association of Clinical Endocrinologists

Publikationen:

- U.S. Department of Health and Human Services. Bone Health and Osteoporosis: A Report of the Surgeon General. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Office of the Surgeon General, 2004.
- Kanis, JA on behalf of the World Health Organization Scientific Group (2007), Assessment of osteoporosis at the primary health-care level. Technical Report. World Health Organization Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, UK. 2007: Gedruckt von der University of Sheffield.
- The Evaluation of Osteoporosis: Dual Energy Absorptiometry and Ultrasound in Clinical Practice, Zweite Auflage; Blake, G. M., Walgner, H. W., Fogelman, I., © Martin Duritz Ltd 1999
- Merrill's Atlas of Radiographic Positions and Radiologic Procedures; P. W. Ballinger und Ed Frank (Hg.), (Mosby, New York) 1999
- Genant, H. K., Jergas, M., van Kuijk, C. (Hg.): Vertebral Fracture in Osteoporosis. San Francisco, CA, University of California Osteoporosis Research Group, 1995
- Genant, H. K., C. Y. Wu et al. (1993). „Vertebral fracture assessment using a semiquantitative technique.“ *J Bone Miner Res* 8(9): 1137-48.
- Levitzky YS, Cupples LA, Murabito JM, Kannel WB, Kiel DP, Wilson PW, Wolf PA, O'Donnell CJ 2008 Prediction of intermittent claudication, ischemic stroke, and other cardiovascular disease by detection of abdominal aortic calcific deposits by plain lumbar radiographs. *Am J Cardiol* 101(3):326-31.

- Oei HH, Vliegenthart R, Hak AE, Iglesias del Sol A, Hofman A, Oudkerk M, Witteman JC 2002 The association between coronary calcification assessed by electron beam computed tomography and measures of extracoronary atherosclerosis: the Rotterdam Coronary Calcification Study. J Am Coll Cardiol 39(11):1745-51.
- Schousboe JT, Taylor BC, Kiel DP, Ensrud KE, Wilson KE, McCloskey EV 2008 Abdominal aortic calcification detected on lateral spine images from a bone densitometer predicts incident myocardial infarction or stroke in older women. J Bone Miner Res 23(3):409-16.
- Schousboe JT, Vokes T, Broy SB, Ferrar L, McKiernan F, Roux C, Binkley N 2008 Vertebral Fracture Assessment: The 2007 ISCD Official Positions. J Clin Densitom 11(1):92-108.
- Schousboe JT, Wilson KE, Kiel DP 2006 Detection of abdominal aortic calcification with lateral spine imaging using DXA. J Clin Densitom 9(3):302-8.

21.0.1 Über FRAX

Für die Frakturrisikobewertung nach der Berechnung mit FRAX gelten bestimmte Alters-, Gewichts- und Größeneinschränkungen. Der Altersbereich liegt zwischen 40 und 90 Jahren. Wenn Sie ein Alter zwischen 20 und 40 Jahren eingeben, berechnet FRAX die Frakturwahrscheinlichkeit für das Alter von 40 Jahren. Wenn Sie ein Alter von über 90 Jahren eingeben, berechnet FRAX die Frakturwahrscheinlichkeit für ein Alter von 90 Jahren. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 25 kg (55 lbs) und 125 kg (276 lbs); die Größe liegt zwischen 100 cm (39 in) und 220 cm (86 in). Wenn Sie ein Gewicht oder eine Größe außerhalb dieser Bereiche eingeben, berechnet FRAX die Frakturwahrscheinlichkeit für die jeweiligen Grenzwerte.

Den BMI berechnet die Software mithilfe der Angaben zur Größe und zum Gewicht des Patienten.

Den BMD-Wert des Oberschenkelhalses erhalten Sie aus der letzten Hüftmessungsanalyse des Patienten.



Hinweis *Die FRAX-Bewertung gibt keine Auskunft darüber, wer behandelt werden soll; dies kann nur der behandelnde Arzt entscheiden. In vielen Ländern stehen Richtlinien zur Verfügung, die sich auf Expertenmeinungen und/oder gesundheitsökonomische Begründungen stützen.*

21.0.2 FRAX-Einschränkungskriterien

NOF/ISCD empfiehlt die Verwendung der FRAX-Einschränkungskriterien für US-Konfigurationen. Sie können FRAX aber auch so konfigurieren, dass die Einschränkungskriterien entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren von FRAX](#) auf Seite 118.

Wählen Sie für die folgenden FRAX-Einschränkungskriterien **Yes** (Ja) oder **No** (Nein).

Previous hip or vertebral fracture (Frühere Hüft- oder Wirbelfraktur)

Klicken Sie auf „Ja“, wenn der Patient eine frühere Hüft- oder Wirbelfraktur (klinisch oder morphometrisch) hatte. Falls Sie auf „Ja“ klicken, werden keine FRAX-Werte berechnet.

Treatment for osteoporosis (Behandlung wegen Osteoporose)

Klicken Sie auf „Ja“, wenn der Patient zurzeit wegen Osteoporose behandelt wird. Falls Sie auf „Ja“ klicken, werden keine FRAX-Werte berechnet.

Beispiele für „unbehandelte“ Patienten:

- kein ET/HT oder SERM im vergangenen Jahr
- kein Calcitonin im vergangenen Jahr
- kein PTH im vergangenen Jahr
- kein Denosumab im vergangenen Jahr
- kein Bisphosphonat in den vergangenen beiden Jahren (außer oralen Gaben für maximal 2 Monate).



Hinweis *Kalzium und Vitamin D gelten in diesem Kontext NICHT als „Behandlung“.*

Premenopausal woman (Prämenopausale Frau)

Klicken Sie auf **Yes** (Ja), wenn die Patientin im vergangenen Jahr Monatsblutungen hatte oder stillt. Falls Sie auf „Ja“ klicken, werden keine FRAX-Werte berechnet.

Konfigurieren von FRAX

Entfernen der FRAX-Einschränkungskriterien:

1. Wählen Sie im Menü **Utilities** (Dienstprogramme) **System Configuration** (Systemkonfiguration) > **Registerkarte Report** (Bericht).

2. Es muss die Registerkarte **General** (Allgemein) ausgewählt sein. Klicken Sie dann im Abschnitt **Ten Year Fracture Risk** (10-Jahres-Frakturrisiko) auf **Configure** (Konfigurieren).
3. Wählen Sie im Abschnitt **Display Settings** (Anzeigeeinstellungen) die Option **Use IOF configurations** (IOF-Konfigurationen verwenden).
4. Klicken Sie auf **OK**.

21.0.3 Informationen zum 10-Jahres-Frakturrisiko – Alle Länder

Die folgenden Informationen stammen vom WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, Großbritannien, mit Stand vom Januar 2008. Der Abdruck erfolgt mit Genehmigung.

Das FRAX-Tool wurde von der WHO entwickelt, um das Frakturrisiko von Patienten zu bewerten. Es basiert auf individuellen Patientenmodellen, die die Risiken im Zusammenhang mit klinischen Risikofaktoren und der Knochenmineraldichte (BMD) des Oberschenkelhalses berücksichtigen.

Die FRAX-Modelle wurden durch Untersuchung populationsbasierter Kohorten aus Europa, Nordamerika, Asien und Australien entwickelt.

Die FRAX-Algorithmen bestimmen das 10-Jahres-Frakturrisiko. Das Ergebnis ist die Wahrscheinlichkeit einer Hüftfraktur und einer größeren Osteoporosefraktur (klinische Wirbelsäulen-, Unterarm-, Hüft- oder Schulterfraktur) in den nächsten 10 Jahren.

Antworten auf häufig gestellte Fragen über FRAX finden Sie unter [Abschnitt 35 Häufig gestellte Fragen \(FAQs\) zu FRAX](#) auf Seite 164.

21.0.4 FRAX-Risikofaktoren

In [Tabelle 31](#) finden Sie Hinweise, wie Sie die FRAX-Risikofaktoren bewerten sollten.

Tabelle 31 FRAX-Risikofaktoren

Risikofaktor	Antwort
Ländercode	<i>Wählen Sie das gewünschte Land (Herkunft), indem Sie auf den Abwärtspfeil klicken und das Land aus der Liste auswählen.</i>
Frühere Fraktur	Klicken Sie auf Yes (Ja), wenn der Patient an einem Knochenbruch im Alter ab 40 Jahre litt (außer Frakturen von Schädel, Hand und Fuß). Unter einer früheren Fraktur ist genauer eine frühere Fraktur im Erwachsenenalter zu verstehen, die spontan oder infolge eines Traumas auftrat, das bei einer gesunden Person nicht zu einer Fraktur geführt hätte. <i>Hinweis: Eine nur im Röntgenbild erkannte Fraktur, beispielsweise mit IVA, zählt als frühere Fraktur.</i>
Hüftfraktur in der Familie	Klicken Sie auf Yes (Ja), wenn Vater oder Mutter des Patienten eine Hüftfraktur hatten.
Aktuelles Rauchverhalten	Klicken Sie auf Yes (Ja), wenn der Patient zurzeit raucht.
Glucocorticoide	Klicken Sie auf Yes (Ja), wenn der Patient orale Glucocorticoide nimmt oder länger als drei Monate orale Glucocorticoide mit einer Dosis von mindestens 5 mg Prednisolon pro Tag (bzw. äquivalente Dosen anderer Glucocorticoide) erhielt.
Rheumatische Arthritis (RA)	Klicken Sie auf Yes (Ja), wenn für den Patienten eine von einem Arzt bestätigte Diagnose für rheumatische Arthritis vorliegt (d. h. keine Selbstdiagnose einer rheumatischen Arthritis).
Sekundäre Osteoporose	Klicken Sie auf Yes (Ja), wenn der Patient Beschwerden hat, die allgemein mit Osteoporose in Zusammenhang gebracht werden. Dazu gehören Diabetes Typ I (Insulinabhängigkeit), Osteogenesis imperfecta bei Erwachsenen, nicht behandelter langwieriger Hyperthyreoidismus, Hypogonadismus oder vorzeitige Menopause (<45 Jahre), chronische Unterernährung oder schlechte Aufnahme von Nahrungsmitteln und chronische Lebererkrankung.

Tabelle 31 FRAX-Risikofaktoren

Risikofaktor	Antwort
Alkoholkonsum von mindestens 3 Einheiten pro Tag	Klicken Sie auf Yes (Ja), wenn der Patient mehr als drei Einheiten Alkohol pro Tag trinkt. Unabhängig vom Land ist unter einer Alkoholeinheit eine Menge von 8 bis 10 g Alkohol zu verstehen. Dies entspricht einem normalen Glas Bier (285 ml), einem einfachen Schnaps (30 ml), einem mittelgroßen Glas Wein (120 ml) oder einem Glas Aperitif (60 ml).

Wenn bei einem Patienten die Antwort unklar ist, klicken Sie auf **No** (Nein).

21.0.5 Referenzen

Die Entwicklung der Modelle zur Frakturrisikobewertung basieren auf einem Arbeitsprogramm beim WHO-Zentrum der Sheffield-Universität. Weitere Details finden Sie im QDR-Referenzhandbuch. Dazu gehören Artikel zum Modellierungsansatz, zu Metaanalysen und zur Auswertung der Knochenmineraldichte und anderer Risikofaktoren sowie aktuelle wissenschaftliche Abhandlungen.

22 Archivieren von Messungen

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Archive Scans** (Messungen archivieren).
2. Wählen Sie die Messungen zum Archivieren aus.
3. Klicken Sie auf **Archive Scans** (Messungen archivieren). Das Fenster **Transfer Results** (Ergebnisse übertragen) wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Hologic empfiehlt, die Messungen sofort auch auf einem weiteren Datenträger zu archivieren. Diese zweite Archivierung schützt vor Datenverlust, falls das erste Speichermedium beschädigt wird oder verloren geht.

23 Suchen von Messungen

Suchen Sie mit der Funktion „Query/Retrieve Scans (Messungen abfragen/laden)“ Messungen, die auf einem PACS-Server archiviert wurden.

Siehe [Abschnitt 26 Abfragen/Laden von Messungen](#) auf Seite 122.

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Locate Scans** (Messungen suchen).
2. Klicken Sie auf den Namen des Patienten und anschließend auf **Locate Scans** (Messungen suchen).

3. Wählen Sie Messungen aus der Registerkarte „Primary Archive (Primäres Archiv)“.



Hinweis Wenn Messungen nicht über den Bildschirm „Primary Archive (Primäres Archiv)“ wiederhergestellt werden können, wenden Sie sich vor der Verwendung des sekundären Archivs an den Hologic-Kundendienst.

4. Suchen Sie den Datenträger mit der korrekten Bezeichnung und legen Sie ihn in das Laufwerk ein.
5. Klicken Sie auf **Restore Scans** (Messungen wiederherstellen).
6. Klicken Sie auf **OK**.

24 Wiederherstellen von Messungen

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Archive** (Archiv) im Hauptfenster und wählen Sie dann **Restore Scans** (Messungen wiederherstellen).
2. Wählen Sie die wiederherzustellenden Messungen aus und klicken Sie auf **Restore Scans** (Messungen wiederherstellen).
3. Klicken Sie auf **OK**.

25 Kopieren von Messungen

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Archive** (Archiv) im Hauptfenster und wählen Sie dann **Copy Scans** (Messungen kopieren).
2. Messungen zum Kopieren an den angegebenen Speicherort auswählen:
3. Klicken Sie auf **Copy Scans** (Messungen kopieren).
4. Klicken Sie auf **OK**.

26 Abfragen/Laden von Messungen

Suchen Sie mit „Query/Retrieve (Abfragen/Laden)“ Messungen und laden Sie diese von einem konfigurierten PACS-Server in das QDR-System.

1. Wählen Sie **Query/Retrieve** (Abfragen/Laden) aus dem Dropdown-Menü **Archive** (Archiv) im Hauptfenster.
2. Geben Sie die gewünschten **Abfrageparameter** ein.
3. Klicken Sie auf **Optional Filters** (Optionale Filter), um Untersuchungsfilter für die Abfrage hinzuzufügen, oder gehen Sie zu Schritt 5.

4. Füllen Sie die **Study level filters** (Untersuchungsebenenfilter) entsprechend aus.
5. Wenn mehr als ein aktives Verzeichnis konfiguriert ist, wählen Sie das Archivverzeichnis (**Destination** (Ziel)) aus.
6. Klicken Sie auf **Query** (Abfrage).
7. Wählen Sie im Abschnitt **Retrieve** (Laden) die Untersuchungen, die Sie laden möchten.
8. Klicken Sie auf **Retrieve** (Laden).

27 Durchführen der Systemsicherung

Führen Sie eine Systemsicherung durch, bei der eine Kopie der Systemdatenbank auf Wechselmedien oder in ein Verzeichnis eines Computernetzwerks übertragen wird.

1. Klicken Sie im Hauptfenster auf **System Backup** (Systemsicherung).
2. Geben Sie das Verzeichnis der Datensicherung an (oder übernehmen Sie das Standardverzeichnis).
3. Übernehmen Sie den standardmäßigen Dateinamen für die Sicherung oder geben Sie einen anderen Dateinamen ein (nicht empfehlenswert).



Achtung *Wenn Sie den Dateinamen für die Sicherung ändern, wird die Wiederherstellung der richtigen Datei erschwert.*

4. Klicken Sie auf **OK**.

28 Reinigen des Systems

28.1 Reinigen der QDR- und Computerkomponenten

1. Schalten Sie die Netzversorgung am Hauptschalter aus.
2. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
3. Schalten Sie die Netzversorgung am Hauptschalter ein.

28.2 Reinigen der Tischoberfläche

Verwenden Sie eine einfache Lösung aus Neutralseife und lauwarmem Wasser. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie Messungen durchführen.



Hinweis *Entfernen Sie zur Reinigung oder Desinfektion niemals den Bezug des Tisches.*

Wenn die Reinigung nicht zu befriedigenden Ergebnissen führt, wenden Sie sich an den Hologic-Kundendienst, um eine neue Tischoberfläche anzufordern.

28.3 Desinfizieren der Tischoberfläche

1. Verwenden Sie ein phenolisches oder quarternäres Desinfektionsmittel in der vom Hersteller empfohlenen Konzentration.



Hinweis *Desinfektionsmittel, die unverdünnt oder nur geringfügig verdünnt am Gerät verwendet werden, können den Bezug beschädigen.*

Idophore, d. h. jodhaltige Desinfektionsmittel, können zu Fleckenbildung führen, wenn sie nicht innerhalb von 20 Minuten nach dem Auftragen mit einer verdünnten (10:1) Bleichmittellösung behandelt werden.

2. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie Messungen durchführen.

28.4 Entfernen von verschütteten Flüssigkeiten

Halten Sie Flüssigkeiten vom Horizon-System fern.

1. Entfernen Sie die Flüssigkeit sofort mit einem leicht angefeuchteten Schwamm. Wenn die Flüssigkeit in das Innere des Systems einzudringen droht, schalten Sie unverzüglich den Hauptschalter aus.



Hinweis *Unterstützung erhalten Sie bei Bedarf beim Hologic-Kundendienst.*

2. Trocknen Sie die Tischoberfläche gründlich ab, bevor Sie eine Messung durchführen.



Hinweis *Feuchtigkeit auf der Tischoberfläche kann die Röntgenübertragung verzerren und zu fehlerhaften Analyseergebnissen führen.*

3. Schalten Sie die Netzversorgung erst wieder ein, wenn das Gerät völlig trocken ist.

29 Notfallmaßnahmen


29.1 Stromausfall

Schalten Sie alle Geräte aus. Wenn wieder Netzspannung verfügbar wird, ist diese möglicherweise anfangs instabil. Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Geräte wieder einschalten.

29.1.1 Beenden der Arbeit

1. Wenn das Horizon-Gerät zum Zeitpunkt des Stromausfalls in Betrieb war, helfen Sie dem Patienten vom Untersuchungstisch.
2. Schalten Sie den Computer aus.
3. Schalten Sie den Netztrennschalter aus ([Abbildung 67](#)).

Abbildung 67 Netztrennschalter und Anzeige

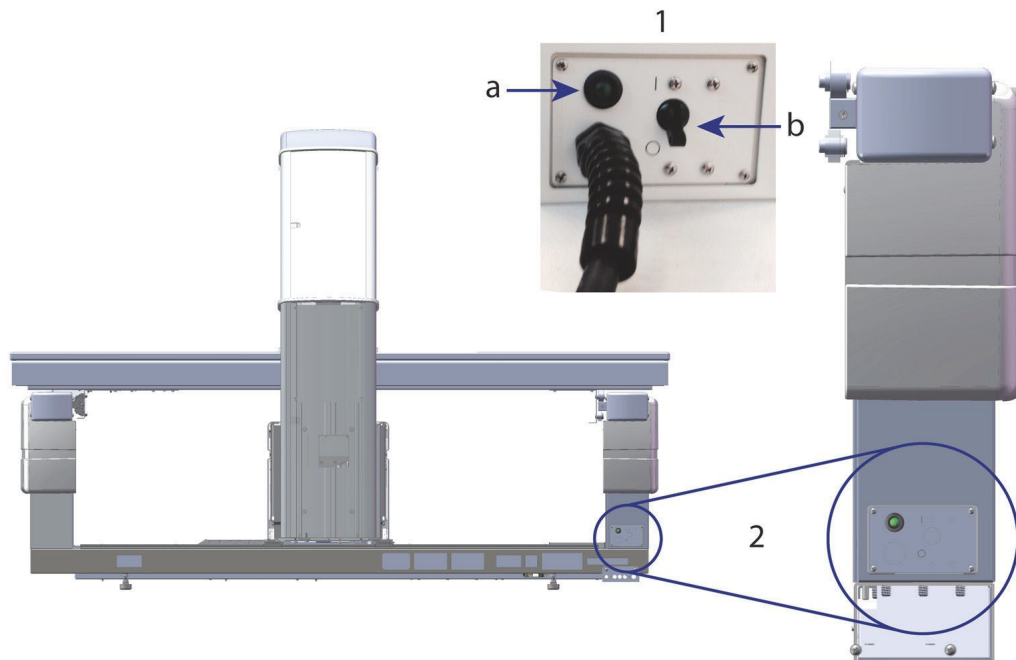

Rückansicht Horizon W

1. Netztrennschalter
 - a. Anzeige
 - b. Schalter
2. Position des Netztrennschalters

Nach Wiederherstellung der Netzspannung

1. **Warten Sie einige Minuten, bis sich die Spannung stabilisiert hat, und schalten Sie dann den Netztrennschalter wieder ein.** Die grüne Anzeige leuchtet auf.
2. Starten Sie das System und fahren Sie es wieder herunter (*Hochfahren des Systems* auf Seite 10 und *Herunterfahren des Systems* auf Seite 10).

29.2 Ausfall während des Betriebs

1. Drücken Sie am Bedienfeld die rote Nothalt-Taste. Der Untersuchungstisch und der C-Bogen werden sofort angehalten und die Röntgenstrahlen sowie der Laser werden abgeschaltet.
2. Helfen Sie dem Patienten vom Untersuchungstisch.
3. Schalten Sie den Netztrennschalter aus ([Abbildung 67](#)).
4. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose (wenn möglich).
5. Wenden Sie sich an den Kundendienst von Hologic.

29.3 Stromausfall

Wenn der Netztrennschalter ([Abbildung 67](#)) (nicht durch einen Geräteausfall) ausgeschaltet oder der Stecker aus der Wandsteckdose gezogen wurde, schalten Sie das Gerät folgendermaßen wieder ein:

1. Stecken Sie ggf. den Netzstecker in die Steckdose.
2. Schalten Sie den Netztrennschalter ein. Die grüne Anzeige leuchtet auf.
3. Starten Sie das System ([Abschnitt 2.1 Hochfahren des Systems](#) auf Seite 10).
4. Wenn das System nicht eingeschaltet werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst von Hologic.

30 Flächendosisprodukt-Messgerät

Das Flächendosisprodukt (DAP; Dose Area Product)-Messgerät misst die Strahlung, der ein Patient während einer Untersuchung ausgesetzt ist. Die Ergebnisse dieser Messung werden beim Beenden einer Untersuchung angezeigt.

30.1 Ein- und Ausschalten des DAP-Messgeräts

1. Klicken Sie auf der Menüleiste im Hauptfenster auf **Utilities** (Dienstprogramme).
2. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf **System Configuration** (Systemkonfiguration).
3. Wählen Sie die Registerkarte „System“ aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Report Dose Area Product** (Flächendosisprodukt-Bericht).
4. Klicken Sie auf **OK**.

31 Dienstprogramme

Dienstprogramme werden zum Suchen, Verschieben, Speichern und Bearbeiten von Patientenbiografien, Patientenmessungen und -daten sowie von Systeminformationen verwendet. Klicken Sie auf der Menüleiste im Hauptfenster auf **Utilities** (Dienstprogramme), um auf die Dienstprogramme zuzugreifen. Um detaillierte Informationen zu einem bestimmten Dienstprogramm zu erhalten, klicken Sie innerhalb dieses Programmes auf „Hilfe“.

31.1 Systemkonfiguration

Hier können Sie die Einstellungen der Systemfunktionen ändern. Klicken Sie für die gewünschte Funktion auf die entsprechende Registerkarte.

31.2 Verwendung

Hier können Sie bei geleasteten Systemen Abrechnungsinformationen anzeigen und ausdrucken. Klicken Sie auf **Usage** (Verwendung).

31.3 Datenbank-Tools

Mit den Datenbank-Tools können Sie Patienten-, Referenz- und QK-Daten aus anderen Datenbanken abrufen und in diese verschieben.

31.3.1 Patientenverwaltung

Hier können Sie Patienten- und Messdaten löschen. Alle für einen Patienten aufgelisteten Messungen müssen gelöscht werden, bevor sich die Daten des Patienten löschen lassen. Nutzen Sie auch die Patientenverwaltung, um eine neue Basismessung auszuwählen.

31.3.2 Export

Verschieben Sie mit dieser Option Daten in neue oder bereits vorhandene Datenbanken eines anderen Systems. Klicken Sie auf **Export** (Exportieren).

31.3.3 Von Medium importieren

Mit dieser Funktion können Sie Daten eines anderen Systems in das Horizon-System importieren. Klicken Sie auf **Import** (Importieren).

31.3.4 Abstimmen

Bei dieser Funktion wird die Systemdatenbank mit den Messdateien im Systemverzeichnis verglichen und Unstimmigkeiten werden automatisch korrigiert.

31.3.5 Patientenrückruf

In dieser Liste sind Patienten basierend auf dem ausgewählten Datum der letzten Untersuchung und den T-Score-Werten aufgeführt. Klicken Sie auf **Callback List** (Rückrufliste).

31.3.6 Dienstprogramm für die automatische Basismessung

Setzt die Basismessung aller wiederhergestellten Messungen (Patienten und Messungstypen) auf die älteste Messung.

31.4 Messdateiansicht

Hierbei werden Datensätze in den Messdateien aufgelistet. Klicken Sie auf **Scan File Look** (Messdateiansicht).

31.5 Diagramm der Messdatei

Zeigt ein Diagramm von Datensätzen in den Messdateien an. Klicken Sie auf **Scan File Plot** (Diagramm der Messdatei).

31.6 Notsteuerung

Diese Option sollte nur nach Anweisung eines autorisierten Hologic-Mitarbeiters verwendet werden.

31.7 AP-Neupositionierung

Diese Option sollte nur nach Anweisung eines autorisierten Hologic-Mitarbeiters verwendet werden.

31.8 Interne Dienstprogramme

Diese Programme werden nur von Hologic verwendet.

31.9 Service-Dienstprogramme

Diese Programme werden nur von einem autorisierten Hologic-Mitarbeiter verwendet.

31.10 Referenzkurve

Hier lassen sich benutzerdefinierte Referenzkurven einrichten und verwalten.

31.10.1 Editor

Der Editor enthält u. a. die folgenden Funktionen: **New, Edit, Copy, View, Delete** (Neu, Bearbeiten, Kopieren, Anzeigen, Löschen). Klicken Sie auf die gewünschte Funktion.

31.10.2 Ethnische Gruppe hinzufügen

Mit dieser Option können Sie der Liste „Ethnische Gruppe“ einen neuen Namen für eine ethnische Gruppe hinzufügen, der in Referenzkurvenbeschreibungen verwendet werden kann.

31.10.3 Wiederherstellen

Mit dieser Option stellen Sie den ursprünglichen Zustand der Referenzkurvendatenbank wieder her.

31.11 Archivindex neu erstellen

Durch diese Option wird die Indexdatei der archivierten Messungen neu erstellt. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Messungen auf einem Archivmedium nicht angezeigt werden, auf dem sich Messungen befinden. Klicken Sie auf **Rebuild Archive Index** (Archivindex neu erstellen).

31.12 Optionen installieren

So führen Sie die Funktion „Install Options (Optionen installieren)“ durch:

1. Erwerben Sie bei Hologic einen Lizenzschlüssel für die Option, die Sie installieren möchten.
2. Wählen Sie **Utilities** (Dienstprogramme) > **Install Options** (Optionen installieren) aus der **Menüleiste** im Hauptfenster aus.
3. Geben Sie den Lizenzschlüssel von Hologic im Feld „License Key (Lizenzschlüssel)“ ein.
4. Klicken Sie auf **Install Option** (Option installieren).
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
6. Wählen Sie eine weitere zu installierende Option oder klicken Sie auf **Close** (Schließen).

32 Referenzkurve

Standardreferenzkurven werden von Hologic auf der Basis von Untersuchungen bereitgestellt, die auf QDR-Knochendensitometern von Hologic durchgeführt wurden. Referenzkurven sind Datenpunktsätze für ein bestimmtes Geschlecht, eine bestimmte ethnische Gruppe und einen bestimmten Messungstyp/-bereich und geben die Standardabweichung und den Skew-Wert für den Punkt an.

Mit der Option Reference Curve (Referenzkurven) kann der Benutzer benutzerdefinierte Referenzkurvendaten einrichten und ändern.

Mithilfe der Option „Referenzkurven“ können Sie:

- Referenzkurvendatensätze anzeigen
- neue Referenzkurvendatensätze erstellen
- Referenzkurvendatensätze ändern (die von Hologic bereitgestellten Referenzkurvendatensätze können nicht geändert werden)
- Referenzkurvendatensätze löschen (die von Hologic bereitgestellten Referenzkurvendatensätze können nicht gelöscht werden)
- neue ethnische Gruppen erstellen
- Datenbank auf die von Hologic bereitgestellten Referenzkurven zurücksetzen.

Die von Hologic bereitgestellten Referenzkurven können nicht geändert oder gelöscht werden. Die von Hologic bereitgestellten Kurven können jedoch als aktuell oder nicht aktuell markiert sowie kopiert und bearbeitet werden, um eine neue Referenzkurve zu erstellen.

32.1 Starten des Referenzkurveneditors

1. Wählen Sie **Utilities (Dienstprogramme) > Reference Curve (Referenzkurve) > Editor** aus der Menüleiste im Hauptfenster.



Hinweis *Durch Änderungen an der von Hologic zur Verfügung gestellten Referenzkurvendatenbank werden möglicherweise auch die Ergebnisse der T-Scores, der Z-Scores, der Spitzenwertreferenz und der Altersübereinstimmungsreferenz geändert.*

2. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld „Reference Curve Editor (Referenzkurveneditor)“ anzuzeigen.



Hinweis *Ein **H** im Hologic-Feld kennzeichnet einen von Hologic bereitgestellten Referenzkurvendatensatz, der weder geändert noch gelöscht werden kann.*

32.2 Anzeigen der Referenzkurvendaten

1. Starten Sie den Reference Curve Editor (Referenzkurveneditor) ([Abschnitt 32.1 Starten des Referenzkurveneditors](#) auf Seite 131).
2. Suchen Sie den Referenzkurvendatensatz, den Sie anzeigen möchten, und klicken Sie darauf.
3. Klicken Sie auf **View** (Ansicht).

Der obere Abschnitt des Dialogfeldes „View Reference Curve (Referenzkurve anzeigen)“ enthält die Referenzkurvenbeschreibung. Die Referenzkurvenpunktdaten sind im unteren Bereich aufgelistet. In diesem Dialogfeld können keine Änderungen durchgeführt werden.



Hinweis *Beschreibungen zu den Feldern auf diesem Bildschirm finden Sie unter [Tabelle 32](#).*

4. Klicken Sie auf **Close** (Schließen), um zum Dialogfeld **Reference Curve Editor** (Referenzkurveneditor) zurückzukehren.
5. Klicken Sie auf **Close** (Schließen), um zum Hauptfenster zurückzukehren.

32.3 Erstellen neuer Referenzkurvendatensätze



Hinweis *Neue Referenzkurvendatensätze können schnell durch das Kopieren eines vorhandenen Referenzkurvendatensatzes erstellt werden, wenn die meisten Daten mit dem vorhandenen Datensatz übereinstimmen. Siehe [Abschnitt 32.4 Kopieren eines Referenzkurvendatensatzes](#) auf Seite 135.*

1. Starten Sie den Referenzkurveneditor.
2. Klicken Sie auf **New** (Neu). Eine Kurve wird zur Datenbank hinzugefügt.
3. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld *New Reference Curve (Neue Referenzkurve)* anzuzeigen.

Der obere Abschnitt des Dialogfeldes „Neue Referenzkurve“ enthält die Referenzkurvenbeschreibung. Der untere Abschnitt listet die Referenzkurvenpunktdaten auf, die hinzugefügt werden.



Hinweis *Beschreibungen zu den Feldern auf diesem Bildschirm finden Sie unter [Tabelle 32](#).*

4. Geben Sie die Referenzkurvenbeschreibung im oberen Abschnitt ein. Verwenden Sie dazu ggf. die Dropdown-Listen. Mit der Tab-Taste können Sie zwischen den Feldern wechseln.
5. Klicken Sie auf „Select X, Y Labels (x-, y-Bezeichnungen auswählen)“.

6. Erweitern Sie den Auswahlbaum nach Bedarf.
7. Klicken Sie sowohl im Abschnitt **X** Label (x-Bezeichnung) als auch im Abschnitt **Y** Label (y-Bezeichnung) auf eine Bezeichnung.
8. Klicken Sie auf **OK**.
9. Klicken Sie auf „Input (Eingeben)“, um einen neuen Datenpunktsatz zur Referenzkurve hinzuzufügen.
10. Füllen Sie im Dialog **Input Data** (Daten eingeben) die Informationsfelder **S.D.** (standard deviation (Standard-Abweichung)) und **L** (skew value for the point (Skew-Wert für den Punkt)) aus und klicken Sie dann auf **OK**.
Der Punktsatz wird im unteren Abschnitt nach der x-Achsenauswahl sortiert angezeigt.
11. Wiederholen Sie ggf. Schritt 10, um weitere Punktsätze hinzuzufügen. Oder klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen), um das Dialogfeld „Input Record (Datensatz eingeben)“ zu schließen und fortzufahren.
12. Bearbeiten Sie ggf. einen Punktsatz, indem Sie auf den gewünschten Punktsatz und anschließend auf die Schaltfläche „Edit (Bearbeiten)“ klicken, um das Dialogfeld **Edit Data** (Daten bearbeiten) anzuzeigen.
13. Ändern Sie die Informationsfelder nach Bedarf und klicken Sie auf **OK**.
Der Punktsatz wird im unteren Abschnitt nach der x-Achsenauswahl sortiert angezeigt.
14. Löschen Sie bei Bedarf einen Punktsatz, indem Sie auf den gewünschten Punktsatz und anschließend auf die Schaltfläche „Delete (Löschen)“ klicken.



Hinweis *You are about to delete the selected record! (Sie sind im Begriff, den ausgewählten Datensatz zu löschen!) Are you sure you want to continue? (Möchten Sie wirklich fortfahren?)*

15. Klicken Sie zum Fortfahren auf **Yes** (Ja).
Der Punktsatz wird aus dem unteren Abschnitt entfernt.
16. Wiederholen Sie ggf. die Schritte 14 und 15, um weitere Punktsätze zu löschen.
17. Nachdem Sie die Referenzkurve hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Close (Schließen)“, um die Kurvendaten zu speichern. Klicken Sie auf **OK**, um zum Dialog **Reference Curve Editor** (Referenzkurveneditor) zurückzukehren.
18. Klicken Sie auf **Close** (Schließen), um zum Hauptfenster zurückzukehren.

Tabelle 32 Referenzkurvenbeschreibungsfelder

Feld	Beschreibung
Geschlecht	Auswahl aus der Dropdown-Liste.
Ethnische Gruppe	Auswahl aus der Dropdown-Liste.
Datum	Wird vom System festgelegt, wenn eine Kurve erstellt oder geändert wird. Kann nicht bearbeitet werden.
Autor	Kennung der Person, die die Kurve erstellt oder ändert. Geben Sie bis zu fünf Zeichen ein.
Quelle	Kennung für den Lieferanten der Referenzkurvendaten. Geben Sie bis zu 61 Zeichen ein.
Kommentar	Kommentare zur Referenzkurve.
x-, y-Bezeichnungen auswählen	Diese Schaltfläche öffnet das Fenster „x-, y-Bezeichnungen auswählen“.
x-Achse Kennzeichnung Anzeige von – bis	<p>x-Achsenbezeichnung, die auf den Berichten angezeigt wird.</p> <p>Bereich der x-Achsendaten, der auf den Berichten angezeigt wird und für den die Referenzkurve gültig ist. Dies stimmt nicht unbedingt mit dem oberen und unteren Punkt überein, die die Kurve definieren.</p>
y-Achse Kennzeichnung Anzeige von – bis	<p>y-Achsenbezeichnung, die auf den Berichten angezeigt wird.</p> <p>Bereich, der für die y-Achse in der Grafikanzeige verwendet wird. Beeinflusst nicht die Funktion der Normkurven.</p>
Ist diese Kurve aktuell?	Lässt mehr als eine Referenzkurve (für das gleiche Geschlecht, die gleiche ethnische Gruppe, den gleichen Messungstyp und die gleiche Knochenregion) gleichzeitig auf dem System zu. Nur eine der Kurven kann als aktuell gekennzeichnet werden. Nur aktuelle Kurven werden von Normalkurven verwendet.

Tabelle 32 Referenzkurvenbeschreibungsfelder

Feld	Beschreibung
Methode	Analysenmethode für die Kurve. Auswahl aus der Dropdown-Liste.
Messungstyp	Wird vom System in Abhängigkeit von der Auswahl der x-, y-Bezeichnung bei Erstellung oder Änderung einer Kurve festgelegt. Kann nicht bearbeitet werden.
Altersspitzenwert BMD	Alter der maximalen Knochendichte, die zur Berechnung des T-Score verwendet werden kann. Wird angezeigt, wenn als x-Achsenbezeichnung „Age (Alter)“ und als y-Achsenbezeichnung „BMD“ ausgewählt ist.

32.4 Kopieren eines Referenzkurvendatensatzes

Durch das Kopieren eines vorhandenen Referenzkurvendatensatzes können Sie leicht einen neuen Kurvendatensatz erstellen, wenn die meisten Daten mit dem vorhandenen Datensatz übereinstimmen.

1. Starten Sie den **Referenzkurveditor**.
2. Suchen Sie den Referenzkurvendatensatz, den Sie kopieren möchten, und klicken Sie darauf.
3. Klicken Sie auf **Copy** (Kopieren). Eine Kurve wird zur Datenbank hinzugefügt.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Der obere Abschnitt des Dialogfeldes *Copy Reference Curve* (Referenzkurve kopieren) enthält Felder zur Eingabe oder Änderung der Referenzkurvenbeschreibung. Die aktuellen Referenzkurvenpunktdaten sind im unteren Abschnitt aufgelistet.

5. Ändern Sie bei Bedarf die Referenzkurvenbeschreibung im oberen Abschnitt. Verwenden Sie dazu ggf. die Dropdown-Listen. Mit der Tab-Taste können Sie zwischen den Feldern wechseln.
6. Weitere Informationen zur Auswahl von x-, y-Bezeichnungen finden Sie unter [Abschnitt 32.3 Erstellen neuer Referenzkurvendatensätze](#) auf Seite 132 – Schritte 5 bis 8.
7. **Weitere Informationen zum Hinzufügen, Bearbeiten und/oder Löschen von Referenzkurvenpunktdaten finden Sie unter [Abschnitt 32.3 Erstellen neuer Referenzkurvendatensätze](#) auf Seite 132 – Schritte 9 bis 16.** Fahren Sie anschließend mit den folgenden Schritten fort.
8. Nachdem Sie die kopierte Referenzkurve abschließend geändert haben, klicken Sie auf **Close** (Schließen), um die Kurvendaten zu speichern.

Klicken Sie auf **OK**, um zum Dialog *Reference Curve Editor* (Reference Curve Editor) zurückzukehren.

9. Klicken Sie auf **Close** (Schließen), um zum Hauptfenster zurückzukehren.

32.5 Bearbeiten von Referenzkurvendatensätzen



Hinweis Bei Referenzkurvendatensätzen von Hologic kann nur das Feld **Is the curve current?** (Ist diese Kurve aktuell?) im Bereich der Referenzkurvenbeschreibung bearbeitet werden.

1. Starten Sie den Referenzkurveneditor.
2. Suchen Sie den Referenzkurvendatensatz, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie darauf. Die Zeile wird hervorgehoben.
3. Klicken Sie auf **Edit** (Bearbeiten).

Der obere Abschnitt des Dialogfeldes *Edit Reference Curve* (Referenzkurve bearbeiten) enthält Felder zur Eingabe oder Änderung der Referenzkurvenbeschreibung. Die aktuellen Referenzkurvenpunktdaten sind im unteren Abschnitt aufgelistet.



Hinweis Beschreibungen zu den Feldern auf diesem Bildschirm finden Sie unter [Tabelle 32](#).

4. Geben Sie die Referenzkurvenbeschreibung im oberen Abschnitt ein oder ändern Sie diese. Verwenden Sie dazu ggf. die Dropdown-Listen. Mit der Tab-Taste können Sie zwischen den Feldern wechseln.
5. Weitere Informationen zur Auswahl von x-, y-Bezeichnungen finden Sie unter [Abschnitt 32.3 Erstellen neuer Referenzkurvendatensätze](#) auf Seite 132, Schritte 5 bis 8.
6. Weitere Informationen zum Hinzufügen, Bearbeiten und/oder Löschen von Referenzkurvenpunktdaten finden Sie unter [Abschnitt 32.3 Erstellen neuer Referenzkurvendatensätze](#) auf Seite 132, Schritte 9 bis 16. Fahren Sie anschließend mit den folgenden Schritten fort.
7. Nachdem Sie die kopierte Referenzkurve abschließend geändert haben, klicken Sie auf **Close** (Schließen), um die Kurvendaten zu speichern.
Klicken Sie auf **OK**, um zum Dialog *Reference Curve Editor* (Reference Curve Editor) zurückzukehren.
8. Klicken Sie auf **Close** (Schließen), um zum Hauptfenster zurückzukehren.

32.6 Löschen von Referenzkurvendatensätzen



Hinweis *Die von Hologic bereitgestellten Referenzkurvendatensätze können nicht gelöscht werden.*

1. Starten Sie den Referenzkurveneditor.
2. Suchen Sie den Referenzkurvendatensatz, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie darauf.
3. Klicken Sie auf **Delete** (Löschen).



Hinweis *You are about to delete the selected record! (Sie sind im Begriff, den ausgewählten Datensatz zu löschen!) This data and all results will be permanently **LOST!** (Diese Daten und alle Ergebnisse gehen für immer **VERLOREN!**) Are you sure you want to continue? (Möchten Sie wirklich fortfahren?)*

4. Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um den ausgewählten Datensatz zu löschen und zum Dialogfeld *Reference Curve Editor* (Referenzkurveneditor) zurückzukehren.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Datensätze zu löschen, oder klicken Sie auf **Close** (Schließen), um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

32.7 Hinzufügen neuer ethnischer Gruppen

1. Wählen Sie **Utilities** (Dienstprogramme) > **Reference Curve** (Referenzkurve) > **Add Ethnicity** (Ethnische Gruppe hinzufügen) aus der Menüleiste im Hauptfenster.



Hinweis *Wenn Sie einen Austausch von Messdaten mit anderen Benutzern durchführen möchten, darf der neue Code für die ethnische Gruppe NICHT mit dem Code eines anderen Benutzers übereinstimmen, es sei denn, Sie verwenden dieselben Referenzkurven für diese ethnische Gruppe.*

2. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld *Add New Ethnicity* (Neue ethnische Gruppe hinzufügen) anzuzeigen.
3. Geben Sie den Namen und den Code (zwei alphanumerische Zeichen) für die neue ethnische Gruppe in den entsprechenden Feldern ein und klicken Sie auf **OK**, um die Gruppe hinzuzufügen und zum **Hauptfenster** zurückzukehren.

32.8 Wiederherstellen einer Referenzkurvendatenbank



Hinweis *Diese Option stellt den ursprünglichen Zustand der von Hologic bereitgestellten Referenzkurvendatenbank wieder her. Vorgenommene Änderungen gehen verloren.*

1. Wählen Sie **Utilities** (Dienstprogramme) > **Reference Curve** (Referenzkurve) > **Restore** (Wiederherstellen) aus der Menüleiste im Hauptfenster.



Hinweis *This action will restore the reference curve database to the original state as supplied by Hologic, Inc. Any changes that may have been made will be lost. (Durch diesen Vorgang wird der ursprüngliche Auslieferungszustand der durch Hologic Inc. bereitgestellten Referenzkurvendatenbank wiederhergestellt. Vorgenommene Änderungen gehen verloren.) Proceed with Restore? (Soll mit dem Wiederherstellungsvorgang fortgefahren werden?)*

2. Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um die Datenbank wiederherzustellen. Oder klicken Sie auf **No** (Nein), wenn Sie die Datenbank nicht wiederherstellen möchten. Das System kehrt zum **Hauptfenster** zurück.

33 DICOM-Option

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) ist ein leistungsstarkes Tool, das Folgendes bietet:

- Für den Befund zuständige Ärzte können die elektronische QDR-Knochendichtemessung und Analyseergebnisse auf einem PACS-Viewer (Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem) anzeigen. Mit der DICOM-Option können Ergebnisse automatisch über das Netzwerk der Einrichtung direkt auf eine DICOM-Anzeigestation des Arztes zur Auswertung und Berichterstellung übertragen werden. Die Ergebnisse können auch auf dem PACS archiviert werden, sodass sie für die Zukunft zur Verfügung stehen und an andere Benutzer im PACS-Netzwerk weitergeleitet werden können.
- Das QDR-System kann den Zeitplan und die demografischen Informationen des Patienten laden, wenn die Option „Modalitäten-Worklist“ auf dem System installiert ist.
- Messungen, die bereits auf einem Remote-Speichersystem (PACS) archiviert sind, können gesucht und geladen werden, wenn die Option „Abfragen/Laden“ auf dem System installiert ist.

34 Konfigurieren der DICOM-Option

34.1 Registerkarten zur DICOM-Konfiguration

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Konfiguration der Modalitäten-Worklist; das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von entfernten DICOM Send-Zielen für Berichte; das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von entfernten DICOM Storage Commitment-Zielen für Berichte; das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von entfernten Abfrage-/Ladezielen sowie das Konfigurieren des Host-Computers (lokales System).

Die Einstellungen für die DICOM-Funktionen werden auf der Registerkarte **System Configuration – DICOM (Systemkonfiguration – DICOM)** im Pulldown-Menü **Utilities (Dienstprogramme)** im Hauptfenster vorgenommen.

Die Registerkarte „DICOM“ enthält fünf Registerkarten für die Konfiguration:

- Option „Modality Worklist (Modalitäten-Worklist)“ (falls installiert)
- DICOM report send destinations (DICOM Send-Ziele für Berichte) (falls installiert)

- DICOM report storage commitment destinations (DICOM Storage Commitment-Ziele für Berichte) (falls installiert)
- Option „Query/Retrieve (Abfragen/Laden)“ (falls installiert)
- Host machine (Host-Computer).

34.2 Modalitäten-Worklist

Die Option „Modality Worklist (Modalitäten-Worklist)“ fügt zwei Registerkarten zur APEX-Software hinzu:

- Eine Registerkarte „Worklist“ wird im Fenster „System Configuration – DICOM (Systemkonfiguration – DICOM)“ zur Konfiguration der Modalitäten-Worklist hinzugefügt.
- Eine Registerkarte „Worklist“ wird im Fenster „Select Patient for Exam (Patienten für die Untersuchung auswählen)“ hinzugefügt, damit der Bediener Zeitpläne aus dem KIS/RIS laden kann, um die Aufgaben auf dem QDR-System durchzuführen.

34.2.1 Konfigurieren der Modalitäten-Worklist



Achtung *Beim Ändern von Informationen, die die Modalitäten-Worklist konfigurieren, können schwerwiegende Kommunikationsstörungen mit dem KIS/RIS auftreten. Nur berechnigte Personen sollten Einstellungen ändern.*

Die Modalitäten-Worklist wird durch Auswahl der Registerkarte **System Configuration – DICOM** (Systemkonfiguration – DICOM) und der Registerkarte **Worklist** im Pulldown-Menü **Utilities (Dienstprogramme)** im Hauptfenster konfiguriert.

Die Registerkarte „Worklist“ ist in sieben Bereiche zur Steuerung der Kommunikation mit dem KIS/RIS unterteilt, und ein Bereich enthält eine Option zum Laden der Worklist-Daten aus einer Eingabedatei statt von einem entfernten Worklist-Anbieter.

- Query Parameters (Abfrageparameter)
- Auto Query Interval (Intervall für automatische Abfrage)
- Query Retry Parameters (Wiederholungsparameter für Abfrage)
- Purge Interval (Löschintervall)
- Input from File (Eingabe aus Datei)
- Configure Worklist Provider (Worklist-Anbieter konfigurieren)
- Map Worklist Fields (Worklist-Felder abgleichen)
- Local Ping (confirm network and PACS connection) (Lokaler Ping (Netzwerk- und PACS-Verbindung bestätigen))

Die einzelnen Bereiche werden im Folgenden erläutert:

34.3 Abfrageparameter

Verwenden Sie die Steuerelemente in diesem Bereich, um Folgendes durchzuführen:

- Filtern der Abfrage nach Modalität und AE-Titel
- Bestimmen einer Grenze für die Einträge in die Worklist-Datenbank für einen bestimmten Zeitraum
- Festlegen, ob die Schaltfläche **Detailed Query** (Detaillierte Abfrage) und **Extended Details** (Erweiterte Details) im Dialog *Select a Patient for this Exam – Worklist* (Einen Patienten für diese Untersuchung auswählen – Worklist) angezeigt wird.

Tabelle 33 Abfrageparameter

Parameter	Funktion
Tage zurück/vorwärts	Dies gibt den gültigen Zeitraum für die Abfrage an. Es gibt zwei Dropdown-Menüs mit der Bezeichnung Back (Zurück) bzw. Forward (Vorwärts). Wenn beide auf 0 gesetzt sind, bezieht sich der gültige Bereich nur auf das aktuelle Datum. Wenn das Dropdown-Menü Back (Zurück) auf 7 und das Dropdown-Menü Forward (Vorwärts) auf 0 gesetzt ist, bezieht sich der gültige Zeitraum für die Abfrage auf eine Woche, die mit dem aktuellen Datum beginnt und 7 Tage zurückreicht. Der Bereich für das Dropdown-Menü Back (Zurück) ist 0 bis 9 und der Bereich für das Dropdown-Menü Forward (Vorwärts) ist 0 bis 8. Beide Dropdown-Menüs Back und Forward können manuell auf 0 bis 99 eingestellt werden.
Modalität	Modalität ist die Art des Systems, das von KIS/RIS erkannt wird. Die Standardmodalität für das QDR-System ist „OT“.
AE-Titel	AE steht für Anwendungseinheit. Dies ist ein Texteingabefeld mit einem eindeutigen Namen für das QDR-System. Jedes QDR-System besitzt einen AE-Namen (oder sollte einen besitzen), der das spezifische System eindeutig kennzeichnet.
Maximale Anzahl an Treffern pro Abfrage	Dies ist ein Eingabefeld, das nur einen Zahlenwert akzeptiert. Die Zahl ist die maximale Anzahl der an das QDR-System übertragenen Treffer bei den Abfragen, die in den Dropdown-Menüs Days Back (Tage zurück) und Forward (Vorwärts) angegeben sind. Wenn die Trefferquote die maximale Anzahl übersteigt, wird nur die in diesem Feld angegebene Anzahl an das QDR-System weitergeleitet.

Tabelle 33 Abfrageparameter

Parameter	Funktion
Detaillierte Abfrage aktivieren	Ein Kontrollkästchen, das festlegt, ob die Schaltflächen Detailed Query (Detaillierte Abfrage) und Extended Details (Erweiterte Details) im Dialog <i>Select a Patient for this Exam - Worklist</i> (Einen Patienten für diese Untersuchung auswählen – Worklist) erscheinen, wenn eine Untersuchung durchgeführt wird. Ist dieses Kontrollkästchen markiert, werden beide Schaltflächen angezeigt.

34.4 Intervall für automatische Abfrage

Die Steuerelemente in diesem Bereich werden verwendet, um ein spezielles Zeitintervall für die Abfrage des Anbieters durch das QDR-System zur Aktualisierung der Worklist festzulegen.

Der Bereich **Auto Query Interval** (Intervall für automatische Abfrage) enthält drei Optionsfelder, von denen nur eine Option ausgewählt werden kann.



Hinweis *Diese Steuerelemente bleiben aktiv, wenn die Option „Input From file (Eingabe aus Datei)“ aktiviert ist.*

Tabelle 34 Intervall für automatische Abfrage

Parameter	Funktion
Täglich um	Mit dieser Eingabe kann der Benutzer für jeden Tag eine bestimmte Zeit definieren, zu der das QDR-System den Anbieter abfragt, um die Worklist zu aktualisieren.
Alle	Dieser Eintrag enthält zwei Dropdown-Menüs mit der Bezeichnung HR und Min , mit denen Sie eine Abfrage in den definierten Zeitabständen festlegen (alle <i>n</i> Stunden und <i>n</i> Minuten).
Nie	Wenn Never (Nie) ausgewählt ist, fragt das QDR-System den Anbieter nicht automatisch ab, um die Worklist zu aktualisieren. Bei Auswahl dieser Option müssen die Abfragen manuell vom Bediener durchgeführt werden.

34.5 Wiederholungsparameter für Abfrage

Wenn der Anbieter auf eine Abfrage zur Aktualisierung der Worklist aus irgendeinem Grund nicht reagiert (z. B. besetzt, offline), legen die Steuerelemente in diesem Bereich fest, wie lange das QDR-System auf eine Reaktion wartet, bevor die Abfrage erneut versucht wird.

Dieser Eintrag enthält ein Kontrollkästchen und drei Dropdown-Menüs, die festlegen, wie lange das QDR-System die Antwort des Anbieters auf eine Abfrage abwartet.



Hinweis Diese Steuerelemente bleiben aktiv, wenn die Option „Input from file (Eingabe aus Datei)“ aktiviert ist.

Tabelle 35 Wiederholungsparameter für Abfrage

Parameter	Funktion
Kontrollkästchen „Abfrage wiederholen“	Damit das QDR-System eine Wiederholung nach einer Zeitüberschreitung durchführt, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wartet das QDR-System so lange, bis der Anbieter auf die Abfrage zur Aktualisierung der Worklist reagiert. Um das Kontrollkästchen zu markieren, klicken Sie in das Kästchen.
Zeitlimit für Abfrage	Dies ist ein Dropdown-Menü mit der Bezeichnung Min . Der Wert in diesem Dropdown-Menü legt fest, wie lange das QDR-System warten kann, bevor die Abfrage erneut versucht wird. Min hat einen Bereich von 0 bis 60 Min. in 5-Minuten-Intervallen. Der Bediener kann manuell eine Zahl von 0 bis 99 eingeben.
Anzahl der Wiederholungen	Dies ist ein Dropdown-Menü mit der Bezeichnung Times (Anzahl) , das festlegt, wie oft das QDR-System eine Anfrage wiederholen kann. In diesem Dropdown-Menü kann als Anzahl der Wiederholungen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 ausgewählt werden. Der Bediener kann manuell eine Zahl von 0 bis 99 eingeben.
Wiederholungsintervall	Dies ist ein Dropdown-Menü mit der Bezeichnung Min , das festlegt, wie lange das QDR-System zwischen den Wiederholungen warten muss. Dieses Dropdown-Menü besitzt einen Bereich von 10 bis 90 Min. in 10-Minuten-Intervallen. Der Bediener kann manuell eine Zahl von 0 bis 99 eingeben.

34.6 Löschintervall

Jedes Mal, wenn der Anbieter auf eine Abfrage aus dem QDR-System reagiert, werden die Worklist-Einträge in einer Datenbank auf dem QDR-System gespeichert. Verwenden Sie die Steuerelemente in diesem Bereich, um die Datenbank automatisch zu einer bestimmten Zeit zu bereinigen (Daten werden entfernt).

Diese Steuerelemente bleiben aktiv, wenn die Option „Input From file (Eingabe aus Datei)“ aktiviert ist.


Tabelle 36 Löschintervall

Parameter	Funktion
Verwendete Einträge	Dies ist ein Dropdown-Menü mit der Bezeichnung Days (Tage). Der Wert in diesem Dropdown-Menü legt eine Grenze für die Speicherung der Untersuchungen fest, die bereits durchgeführt wurden. Diese Untersuchungen werden nach einer festgelegten Anzahl von Tagen bereinigt (gelöscht). Der Bereich für das Dropdown-Menü Used Entries (Verwendete Einträge) liegt zwischen 0 und 9 Tagen. Das Dropdown-Menü Used Entries (Verwendete Einträge) kann auch manuell auf eine Zahl von 0 bis 999 eingestellt werden.
Nicht verwendete Einträge	Dies ist ein Dropdown-Menü mit der Bezeichnung Days (Tage). Der Wert in diesem Dropdown-Menü liefert einen Grenzwert für die Speicherung der Untersuchungen, die noch nicht durchgeführt wurden. Diese werden nach einer festgelegten Anzahl von Tagen bereinigt (gelöscht). Der Bereich für das Dropdown-Menü Unused Entries (Nicht verwendete Einträge) liegt zwischen 0 und 9 Tagen. Das Dropdown-Menü Unused Entries (Nicht verwendete Einträge) kann auch manuell auf eine Zahl von 0 bis 999 gesetzt werden.

34.7 Eingabe aus Datei

Dies ist eine Option zum Erhalt von Worklist-Daten aus einer Eingabedatei, die von einem elektronischen medizinischen Berichtssystem erzeugt wird statt von einem entfernten Worklist-Anbieter.

Tabelle 37 Eingabe aus Datei

Parameter	Funktion
Aktivieren	Ein Kontrollkästchen, das festlegt, ob die Funktion „Input from File (Eingabe aus Datei)“ aktiviert ist. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Worklist-Daten aus einer Eingabedatei abgerufen.  <i>Alle Steuerelemente auf der Registerkarte „Worklist“, die nicht für die Funktion „Input from File (Eingabe aus Datei)“ verwendet werden, sind deaktiviert, wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist.</i>
Eingabedateiname	Zeigt einen vollständigen Pfad der aktuellen Worklist-Datei an. Dieses Feld wird ausgefüllt oder geändert, wenn ein Dateipfad mit Browse (Durchsuchen) ausgewählt wird.
... (Durchsuchen)	Zeigt das Dialogfenster „File open (Datei öffnen)“ an, in dem der Benutzer eine Worklist-Eingabedatei auf dem lokalen System oder Netzwerk finden kann.

34.8 Worklist-Anbieter

34.8.1 Worklist-Anbieter-Schnittstelle

Die Schnittstelle Worklist-Anbieter liefert Worklist-Einträge für das QDR-System.

Nähere Informationen erhalten Sie unter [Abschnitt 34.8.2 Worklist-Anbieter-Steuerelemente](#) auf Seite 145.

Tabelle 38 Worklist-Anbieter-Funktionen

Parameter	Funktion
Worklist-Felder abgleichen	<p>Verschiedene Krankenhäuser und Kliniken können die gleichen DICOM-Attribute auf verschiedene Weise verwenden, um die Patienten zu identifizieren. „Map Worklist Fields (Worklist-Felder abgleichen)“ wird verwendet, um sicherzustellen, dass sich die Daten im QDR-System und im KIS/RIS auf den gleichen Patienten beziehen.</p> <p>Klicken Sie auf Map Worklist Fields (Worklist-Felder abgleichen) auf der Registerkarte Worklist, um das Fenster „Map Worklist Keys (Schlüssel für den Abgleich der Worklist)“ anzuzeigen, in dem Sie Felder für die Patientenüberprüfung durch das QDR-System und die KIS/RIS-Datenbank auswählen können. Nach Eingabe dieser Daten werden sie bei jeder Untersuchung überprüft, um sicherzustellen, dass sich das QDR-System und das KIS/RIS auf den gleichen Patienten beziehen.</p> <p>Nähere Informationen erhalten Sie unter Abschnitt 34.9 Worklist-Felder abgleichen auf Seite 147.</p>
Lokaler Ping	Überprüft, ob das lokale System mit einem Netzwerk verbunden ist.

34.8.2 Worklist-Anbieter-Steuerelemente

Wenn Sie auf **Configure Worklist Provider** (Worklist-Anbieter konfigurieren) klicken, wird ein Fenster zur Definition des Worklist-Anbieters angezeigt.

Der Worklist-Anbieter liefert Worklist-Einträge für das QDR-System.

Worklist-Anbieter

Verwenden Sie die Steuerelemente in diesem Bereich, um den Worklist-Anbieter zu definieren.

Tabelle 39 Worklist-Anbieter

Parameter	Funktion
AE-Titel	Dies ist der Titel der Anwendungseinheit des Worklist-Anbieters.
Remote Host	Dies ist der Hostname oder die IP-Adresse des Worklist-Anbieters. Der Hostname oder die IP-Adresse müssen sich in dem gleichen Netzwerk befinden wie die QDR-Arbeitsstation. Akzeptiert bis zu 120 alphanumerische Zeichen.
Nummer des Remote-Ports	Dies ist die Portnummer des Worklist-Anbieters.

Durchgeführter Verfahrensschritt

In diesem Bereich können Sie automatisch auf einen Anbieter eines durchgeführten Verfahrens reagieren, sobald eine spezielle Aufgabe in der Worklist durchgeführt wurde.

Tabelle 40 Durchgeführter Verfahrensschritt

Bedienelement	Funktion
Durchgeführten Verfahrensschritt verwenden	Ist diese Option markiert, wird nach jedem Abschluss einer Untersuchung eine Antwort an den Anbieter mit dem Hinweis gesendet, dass die Aufgabe abgeschlossen ist. Um das Kontrollkästchen zu markieren, klicken Sie in das Kästchen.

Anbieter

Verwenden Sie die Steuerelemente in diesem Bereich, um den Anbieter des durchgeführten Verfahrensschritts zu definieren. Der Anbieter des durchgeführten Verfahrens kann derselbe wie der Worklist-Anbieter oder ein anderer Anbieter sein.

Tabelle 41 Anbieter

Bedienelement	Funktion
Daten des Worklist-Anbieters verwenden	Ist diese Option markiert, ist der Anbieter des durchgeführten Verfahrensschritts gleichzeitig der Worklist-Anbieter.
AE-Titel	Dies ist der Titel der Anwendungseinheit des durchgeführten Verfahrensschrittes, wenn die Option <i>Use Worklist Provider Data</i> (Daten des Worklist-Anbieters verwenden) nicht markiert ist.

Tabelle 41 Anbieter (Continued)

Bedienelement	Funktion
Remote Host	Dies ist der Hostname oder die IP-Adresse des Anbieters des durchgeführten Verfahrensschritts, wenn die Option <i>Use Worklist Provider Data</i> (Daten des Worklist-Anbieters verwenden) nicht markiert ist. Der Hostname oder die IP-Adresse müssen sich in dem gleichen Netzwerk befinden wie die QDR-Arbeitsstation. Akzeptiert bis zu 120 alphanumerische Zeichen.
Nummer des Remote-Ports	Dies ist die Portnummer des Anbieters des durchgeführten Verfahrensschritts, wenn die Option <i>Use Worklist Provider Data</i> (Daten des Worklist-Anbieters verwenden) nicht markiert ist.
Remoter Ping	Überprüft, ob der konfigurierte Worklist-Anbieter oder der Anbieter des durchgeführten Verfahrensschritts mit dem gleichen Netzwerk wie das lokale System verbunden sind.
C-ECHO	Überprüft, ob das konfigurierte System für den Worklist-Anbieter oder den Anbieter des durchgeführten Verfahrensschritts ein Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem (PACS) ist.

34.9 Worklist-Felder abgleichen

Wenn Sie auf die Option **Map Worklist Fields** (Worklist-Felder abgleichen) klicken, wird das Dialogfeld *Map Worklist Keys* (Schlüssel für den Abgleich der Worklist) angezeigt.



Achtung *Ändern Sie die Einstellungen in den Worklist-Feldern nicht ohne spezielle Anweisungen von Ihrer KIS/RIS-Abteilung.*

Das Dialogfeld besteht aus 15 verschiedenen Dropdown-Menüs mit spezifischen Bezeichnungen auf der linken Seite. Die Bezeichnungen geben Daten an, die in der Patientenbiographie der QDR-Systeme enthalten sind (einige Informationen wie die HL7-Felder gelten nicht für jedes QDR-System). Die Informationen in den Dropdown-Menüs sind Informationen, die in der KIS/RIS-Datenbank für den Patienten angezeigt werden. Damit sollen Informationen in der Patientenbiographie gefunden werden, die mit den Informationen in der KIS/RIS-Datenbank übereinstimmen, die als Schlüssel dienen, um sicherzugehen, dass der Patient in der Patientenbiographie derselbe Patient ist wie in der KIS/RIS-Datenbank.

Der Vergleich dieser Informationen muss von einer Person durchgeführt werden, die sowohl das QDR-System als auch die Funktionsweise des KIS/RIS-Systems kennt.

Es gibt zwei verschiedene Dropdown-Menüs:

- **Patient Matching Keys** (Schlüssel für den Patientenabgleich) – sechs Dropdown-Menüs für den Patientenabgleich
- **Other Keys** (Andere Schlüssel) – neun Dropdown-Menüs für die Schlüsselzuordnung

Mit den Dropdown-Menüs **Patient Matching** (Patientenabgleich) können spezifische Daten in der Patientenbiographie des QDR-Systems Daten in der KIS/RIS-Datenbank zugeordnet werden. Diese Dropdown-Menüs enthalten links neben der Bezeichnung Kontrollkästchen. Ein markiertes Kontrollkästchen bedeutet, dass die Informationen in der Patientenbiographie mit den Informationen in der KIS/RIS-Datenbank übereinstimmen müssen, um denselben Patienten zu identifizieren.

Die Dropdown-Menüs für **Key Mapping** (Schlüsselzuordnung) liefern Daten aus der KIS/RIS-Datenbank, die speziellen Informationen in der Patientenbiographie zugeordnet werden können.

Die Angabe *Not Mapped* (Nicht zugeordnet) in einem Dropdown-Menü gibt an, dass das Feld in der Patientenbiographie keinem Feld in der KIS/RIS-Datenbank zugeordnet wird.

34.10 DICOM Send-Ziele

Send-Ziele definieren Ziele, auf die die DICOM-Berichte übertragen werden, wenn die Funktion **Send** verwendet wird.

Dieser Abschnitt beschreibt die Konfiguration, das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von entfernten Knoten eines Ziels sowie die Konfiguration aller Send-Ziele.

Send-Ziele werden konfiguriert, indem Sie System Configuration (Systemkonfiguration) – Registerkarte DICOM – Registerkarte Send (Senden) im Pulldown-Menü Utilities (Dienstprogramme) im Hauptfenster auswählen.

Tabelle 42 DICOM Send-Ziele

Parameter	Funktion
DICOM Send-Ziele konfigurieren	Auswahlliste vorhandener DICOM Send-Ziele, die auf dem lokalen System konfiguriert sind.
Ziel hinzufügen	Zeigt einen Dialog, mit dem Sie ein neues Send-Ziel konfigurieren können.
Ziel bearbeiten	<i>Ist aktiviert, wenn ein Ziel ausgewählt ist.</i> Zeigt einen Dialog an, mit dem Sie die Konfiguration des ausgewählten Send-Zieles ändern können.

Tabelle 42 DICOM Send-Ziele

Parameter	Funktion
Ziel löschen	<i>Ist aktiviert, wenn mindestens ein Ziel ausgewählt ist.</i> Löscht die ausgewählten Send-Ziele.
Lokaler Ping	Überprüft, ob das lokale System mit einem Netzwerk verbunden ist.
Remoter Ping	<i>Ist aktiviert, wenn ein Ziel ausgewählt ist.</i> Überprüft, ob das System des konfigurierten Send-Zieles mit dem gleichen Netzwerk wie das lokale System verbunden ist.
C-ECHO	<i>Ist aktiviert, wenn ein Ziel ausgewählt ist.</i> Überprüft, ob das System des konfigurierten Send-Zieles ein Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem (PACS) ist.
Parameter konfigurieren	Klicken Sie auf Configure Parameters (Parameter konfigurieren), um die Parameter für automatische Wiederholung des Send-Zieles sowie den Zeitpunkt zum Reinigen der Protokolleinträge zu definieren. Nähere Informationen erhalten Sie unter Abschnitt 34.10.2 DICOM Send konfigurieren auf Seite 154.

1. So fügen Sie ein neues Ziel **hinzu**:
 - a. Klicken Sie auf **Add Destination** (Ziel hinzufügen).
 - b. Füllen Sie die Dialogfelder *Add / Edit DICOM Send Destination* (DICOM Send-Ziel hinzufügen/bearbeiten) aus (Einzelheiten siehe [Abschnitt 34.10.1 Dialog „Add / Edit DICOM Send Destination Dialog \(DICOM Send-Ziel hinzufügen/bearbeiten\)“](#) auf Seite 151).
 - c. Klicken Sie auf **OK**.
2. So konfigurieren Sie ein bestehendes Ziel **neu**:
 - a. Wählen Sie das Ziel in der Auswahlliste aus.
 - b. Klicken Sie auf **Edit Destination** (Ziel bearbeiten).
 - c. Bearbeiten Sie ggf. das Dialogfeld *Add / Edit DICOM Send Destination* (DICOM Send-Ziel hinzufügen/bearbeiten) (Einzelheiten siehe [Abschnitt 34.10.1 Dialog „Add / Edit DICOM Send Destination Dialog \(DICOM Send-Ziel hinzufügen/bearbeiten\)“](#) auf Seite 151).
 - d. Klicken Sie auf **OK**.
3. So **aktivieren/deaktivieren** Sie ein Ziel:
 - a. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen in der Spalte „Active (Aktiv)“ der Auswahlliste, um das Ziel zu markieren bzw. die Auswahl aufzuheben (markiert heißt aktiviert).

4. So **prüfen Sie, ob das lokale System mit einem lokalen Netzwerk verbunden ist**:
 - a. Klicken Sie auf **Local Ping** (Lokaler Ping).
 - b. Klicken Sie auf **OK**, um die angezeigte Meldung zu schließen.
5. So **prüfen Sie, ob das Ziel mit dem gleichen Netzwerk wie das lokale System verbunden ist**:
 - a. Wählen Sie das Ziel in der Auswahlliste aus.
 - b. Klicken Sie auf „Remote Ping“. Klicken Sie auf **OK**, um die angezeigte Meldung zu schließen.
6. So **überprüfen Sie, ob das Ziel ein PACS ist**:
 - a. Wählen Sie das Ziel in der Auswahlliste aus.
 - b. Klicken Sie auf **C-ECHO**.
 - c. Klicken Sie auf **OK**, um die angezeigte Meldung zu schließen.
7. So **löschen Sie ein Ziel**:
 - a. Wählen Sie das Ziel in der Auswahlliste aus.
 - b. Klicken Sie auf **Delete Destination** (Ziel löschen).
8. So **definieren Sie die automatischen Abfrageparameter für alle konfigurierten Send-Ziele**:
 - a. Klicken Sie auf **Configure Parameter** (Parameter konfigurieren).
 - b. Bearbeiten Sie ggf. das Dialogfeld **Configure DICOM Send (DICOM Send konfigurieren)** (Einzelheiten sind unter [Abschnitt 34.10.2 DICOM Send konfigurieren](#) auf Seite 154 zu finden).
 - c. Klicken Sie auf **OK**.
9. Klicken Sie auf **OK**, um zum **Hauptfenster** zurückzukehren.

34.10.1 Dialog „Add / Edit DICOM Send Destination Dialog (DICOM Send-Ziel hinzufügen/bearbeiten)“

Tabelle 43 DICOM Send-Ziele

Parameter	Funktion
AE-Titel	<i>Anwendungseinheit.</i> Gibt einen eindeutigen Namen für das Zielsystem an. Akzeptiert bis zu 16 alphanumerische Zeichen. Hinweis: Um die QDR-Arbeitsstation als Zielknoten hinzuzufügen, geben Sie „local“ im Feld AE-Titel ein.
Hostname oder IP-Adresse	Name oder IP-Adresse des Ziels. Der Hostname oder die IP-Adresse müssen sich in dem gleichen Netzwerk befinden wie die QDR-Arbeitsstation. Akzeptiert bis zu 120 alphanumerische Zeichen. Hinweis: Um die QDR-Arbeitsstation als Zielknoten hinzuzufügen, geben Sie „localhost“ im Feld Host Name or IP Address (Hostname oder IP-Adresse) ein.
SCP-Port	Portnummer des Ziels. Der Standardwert für die Portnummer des Dienstklassenanbieters ist 104. Akzeptiert bis zu 5 numerische Zeichen im Bereich von 1 bis 65535.
Name des Ziels	Aliasname für die Auswahl eines Ziels. Akzeptiert bis zu 120 alphanumerische Zeichen.
Für den Befund zuständiger Arzt	Ein optionaler Eintrag, der den Namen des Arztes angibt, der die Messung auswertet. Akzeptiert bis zu 120 Zeichen.
Nur Graustufe	Ist diese Option markiert, werden DICOM-Berichte beim Senden an das ausgewählte Ziel in Graustufen umgewandelt. Ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert, werden Bilder für alle Berichtarten mit Graphen in Farbe erstellt. Bilder für alle anderen Berichtarten (IVA, Fragebogen usw.) werden in Graustufen erstellt.
Präsentationsdatei	Bei Markierung dieses Kontrollkästchens wird eine DICOM-GSPS-Datei gemeinsam mit einer DICOM-Bilddatei gesendet, wenn diese für eine IVA-Aufnahme notwendig ist. Bei Markierung dieses Kontrollkästchens und des Knotens für Storage Commitment werden Commitment-Anforderungen sowohl für Bild- als auch für DICOM-GSPS-Dateien erzeugt.

Tabelle 43 DICOM Send-Ziele

Parameter	Funktion
IVA-Ergebnisdatei	Bei Markierung dieses Kontrollkästchens wird eine DICOM-IVA-Ergebnisdatei gemeinsam mit einer DICOM-Bilddatei gesendet, wenn diese für eine IVA-Aufnahme notwendig ist. Bei Markierung dieses Kontrollkästchens und des Knotens für Storage Commitment wird eine Commitment-Anforderung sowohl für die Bilddatei als auch für die DICOM-IVA-Ergebnisdateien erzeugt.
Unicode	Bei Markierung dieses Kontrollkästchens werden DICOM-Dateien mit Unicode-Codierung gesendet. Bei der Verwendung von Unicode enthalten DICOM-Dateien das Attribut „Extended Character Set (Erweiterter Zeichensatz)“. Textattribute werden durch Einfachbytezeichen ausgefüllt, die unter Verwendung der UTF-8-Codierung aus Doppelbytezeichen umgewandelt werden. Wird Unicode nicht verwendet, enthalten die DICOM-Dateien <u>nicht</u> das Attribut „Erweiterter Zeichensatz“. Textattribute werden durch Einfachbytezeichen ausgefüllt, die unter Verwendung der UTF-8-Codierung aus Doppelbytezeichen umgewandelt werden.
Fester Speicherort	Bei Markierung dieses Kontrollkästchens muss das Ziel die Informationen speichern, die an das Ziel gesendet werden. Bei Markierung dieses Kontrollkästchens muss ein Storage Commitment-Anbieter festgelegt werden. Um einen Storage Commitment-Anbieter festzulegen, wählen Sie einen vorhandenen Anbieter aus der Dropdown-Liste, oder klicken Sie auf Add New Provider (Neuen Anbieter hinzufügen), um einen neuen Storage Commitment-Anbieter einzugeben (Einzelheiten zum Hinzufügen eines neuen Anbieters finden Sie unter Abschnitt 34.12.1 Der Dialog „DICOM-Abfrage-/Ladeziel hinzufügen/bearbeiten“ auf Seite 161). Storage Commitment-Anbieter können auch über Systemkonfiguration – Registerkarte „DICOM“ – Registerkarte „Commit“ hinzugefügt werden (Einzelheiten dazu siehe Abschnitt 34.11 DICOM Storage Commitment-Ziele auf Seite 155).

Tabelle 43 DICOM Send-Ziele

Parameter	Funktion
Verzeichnis des Messungsarchivs	<p>Zeigt an, ob die Option „Unternehmensdatenmanagement“ installiert ist.</p> <p>Bei Markierung dieses Kontrollkästchens wird ein Messungsarchivverzeichnis als Ziel verwendet und die P- und R-Dateien der DICOM-Datei werden eingefügt.</p> <p>P-Dateien sind QDR-Messungsdateien, die Verarbeitungsdaten für die Messung enthalten.</p> <p>R-Dateien sind QDR-Messungsdateien, die die Rohdaten für das Bild enthalten.</p> <p>Bei Markierung dieses Kontrollkästchens kann das Feld „Select Existing Provider (Vorhandenen Anbieter auswählen)“ leer bleiben, d. h., das Send-Ziel ist auch das Verzeichnis des Messungsarchivs. Sie können auch ein vorhandenes Messungsarchivverzeichnis aus der Dropdown-Liste auswählen oder auf „Add New Provider (Neuen Anbieter hinzufügen)“ klicken, um ein neues Messungsarchivverzeichnis einzugeben. Messungsarchivverzeichnisse können auch über Systemkonfiguration – Registerkarte „DICOM“ – Registerkarte „Query/Retrieve (Abfragen/Laden)“ hinzugefügt werden (Einzelheiten dazu siehe Abschnitt 34.12 DICOM Abfrage-/Ladeziele auf Seite 159).</p>
OK	<p>Validiert die Daten. Nach erfolgreicher Überprüfung wird der Dialog geschlossen und die Auswahlliste „Configure DICOM Send Destinations (DICOM Send-Ziele konfigurieren)“ wird mit neuen oder geänderten Daten aktualisiert. Schlägt die Überprüfung fehl, wird eine Warnmeldung angezeigt.</p>
Abbrechen	<p>Ignoriert alle Änderungen und schließt das Dialogfeld.</p>

34.10.2 DICOM Send konfigurieren

Tabelle 44 DICOM-Sendekonfiguration

Parameter	Funktion
Parameter für automatische Wiederholung	Wenn das Send-Ziel aus einem Grund nicht auf eine Anfrage reagiert (z.B. besetzt, offline), bestimmen die Steuerelemente in diesem Bereich, wie lange das QDR-System auf eine Reaktion wartet, und legen ein Zeitintervall bis zum erneuten Abfrageversuch fest.
Anzahl der Wiederholungen	Dies ist ein Eingabefeld mit der Bezeichnung Times (Anzahl), das festlegt, wie oft das QDR-System eine Wiederholung durchführen kann. Das Eingabefeld Retry Number (Anzahl der Wiederholungen) kann manuell auf eine Zahl zwischen 0 und 99 Tagen gesetzt werden.
Wiederholungsintervall	Dies ist ein Eingabefeld mit der Bezeichnung Min , das festlegt, wie lange das QDR-System zwischen den Wiederholungen warten muss. Das Eingabefeld Retry Interval (Wiederholungsintervall) kann manuell auf eine Zahl zwischen 1 und 1440 Minuten gesetzt werden.
Protokolleinträge löschen nach	Dies ist ein Eingabefeld mit der Bezeichnung Days (Tage). Der Wert in diesem Feld gibt eine Begrenzung für die Speicherung der DICOM Sende-Protokolleinträge an. Diese Einträge werden nach der festgelegten Anzahl von Tagen bereinigt (gelöscht). Das Eingabefeld Purge log entries after (Protokolleinträge löschen nach) kann manuell auf eine Zahl zwischen 0 und 99 gesetzt werden.
Auto-Zugangsnummer	Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird automatisch eine Zugangsnummer im Format SSSSSYYMMDDNNN erzeugt, wobei SSSSS die QDR-Seriennummer, YYMMDD das aktuelle Datum und NNN eine Zahl von 001 bis 999 ist.
Untersuchungsbeschreibung	Der Inhalt dieses Bearbeitungsfeldes wird in das Feld „Study Description (Untersuchungsbeschreibung)“ in den DICOM-Dateien in folgenden Fällen übernommen: <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Untersuchung keine Worklist-Untersuchung ist oder wenn die Untersuchung eine Worklist-Untersuchung ist, das Feld „Study Description (Untersuchungsbeschreibung)“ jedoch keinem Worklist-Attribut zugeordnet ist und • das Bearbeitungsfeld einen Texteintrag enthält (wenn das Feld leer bleibt, wird das Attribut für die Untersuchungsbeschreibung ausgelassen).

34.11 DICOM Storage Commitment-Ziele

Storage Commitment-Ziele definieren Ziele, auf die DICOM-Berichte übertragen und dort gespeichert werden können, wenn die **Send**-Funktion verwendet wird.

Storage Commitment-Ziele müssen vor der Definition der DICOM Send-Ziele als Storage Commitment-Ziele festgelegt werden.

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie einen entfernten Storage Commitment-Zielknoten konfigurieren, hinzufügen, bearbeiten und löschen und wie Sie alle Storage Commitment-Ziele konfigurieren.

Die Konfiguration der Send-Ziele erfolgt über **Systemkonfiguration** – Registerkarte „**DICOM**“ – Registerkarte **Commit** im Pulldown-Menü **Utilities (Dienstprogramme)** im Hauptfenster.

34.11.1 DICOM Send-Ziele konfigurieren

Die Auswahlliste vorhandener DICOM Storage Commitment-Ziele, die auf dem lokalen System konfiguriert sind.

Tabelle 45 DICOM Storage Commitment-Ziele

Parameter	Funktion
Ziel hinzufügen	Zeigt einen Dialog, mit dem Sie ein neues Storage Commitment-Ziel konfigurieren können.
Ziel bearbeiten	<i>Ist aktiviert, wenn ein Ziel ausgewählt ist.</i> Zeigt einen Dialog, mit dem Sie die Konfiguration des ausgewählten Storage Commitment-Zieles bearbeiten können.
Ziel löschen	<i>Ist aktiviert, wenn mindestens ein Ziel ausgewählt ist.</i> Löscht das ausgewählte Storage Commitment-Ziel.
Lokaler Ping	Überprüft, ob das lokale System mit einem Netzwerk verbunden ist.
Remoter Ping	<i>Ist aktiviert, wenn ein Ziel ausgewählt ist.</i> Überprüft, ob das System des konfigurierten Storage Commitment-Zieles mit dem gleichen Netzwerk wie das lokale System verbunden ist.
C-ECHO	<i>Ist aktiviert, wenn ein Ziel ausgewählt ist.</i> Überprüft, ob das System des konfigurierten Storage Commitment-Zieles ein Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem (PACS) ist.

Tabelle 45 DICOM Storage Commitment-Ziele

Parameter	Funktion
Parameter konfigurieren	<p>Klicken Sie auf Configure Parameters (Parameter konfigurieren), um die Parameter für die automatische Wiederholung des Storage Commitment-Zieles, den Zeitpunkt für die Bereinigung der Protokolleinträge und die Übertragung der DICOM Storage Commitment-Dateien an ein Ziel zu definieren.</p> <p>Nähere Informationen erhalten Sie unter Abschnitt 34.11.3 Storage Commitment konfigurieren auf Seite 158.</p>

1. So fügen Sie ein neues Ziel **hinzu**:
 - a. Klicken Sie auf **Add Destination** (Ziel hinzufügen).
 - b. Füllen Sie die Dialogfelder *Add / Edit Storage Commitment (Storage Commitment-Ziel hinzufügen/bearbeiten)* aus (Einzelheiten siehe [Abschnitt 34.11.2 Dialog „Add / Edit Storage Commitment Destination \(Storage Commitment-Ziel hinzufügen/bearbeiten\)“](#) auf Seite 157).
 - c. Klicken Sie auf **OK**.
2. So konfigurieren Sie ein bestehendes Ziel **neu**:
 - a. Wählen Sie das Ziel in der Auswahlliste aus.
 - b. Klicken Sie auf **Edit Destination** (Ziel bearbeiten).
 - c. Bearbeiten Sie ggf. das Dialogfeld *Add / Edit Storage Commitment (Storage Commitment-Ziel hinzufügen/bearbeiten)* (Einzelheiten siehe [Abschnitt 34.11.2 Dialog „Add / Edit Storage Commitment Destination \(Storage Commitment-Ziel hinzufügen/bearbeiten\)“](#) auf Seite 157).
 - d. Klicken Sie auf **OK**.
3. So **aktivieren/deaktivieren** Sie ein Ziel:
 - a. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen in der Spalte „Active (Aktiv)“ der Auswahlliste, um das Ziel zu markieren bzw. die Auswahl aufzuheben (markiert heißt aktiviert).
4. So **prüfen Sie, ob das lokale System mit einem lokalen Netzwerk verbunden ist**:
 - a. Klicken Sie auf **Local Ping** (Lokaler Ping)
 - b. Klicken Sie auf **OK**, um die angezeigte Meldung zu schließen.
5. So **prüfen Sie, ob das Ziel mit dem gleichen Netzwerk wie das lokale System verbunden ist**:
 - a. Wählen Sie das Ziel in der Auswahlliste aus.
 - b. Klicken Sie auf **Remote Ping**.
 - c. Klicken Sie auf **OK**, um die angezeigte Meldung zu schließen.

6. So **überprüfen** Sie, ob das Ziel ein PACS ist:
 - a. Wählen Sie das Ziel in der Auswahlliste aus.
 - b. Klicken Sie auf **C-ECHO**.
 - c. Klicken Sie auf **OK**, um die angezeigte Meldung zu schließen.
7. So **löschen** Sie ein Ziel:
 - a. Wählen Sie das Ziel in der Auswahlliste aus.
 - b. Klicken Sie auf **Delete Destination** (Ziel löschen).
8. So **definieren Sie die automatischen Abfrageparameter** für *alle* konfigurierten Storage Commitment-Ziele:
 - a. Klicken Sie auf **Configure Parameter** (Parameter konfigurieren).
 - b. Bearbeiten Sie ggf. das Dialogfeld Configure Storage Commitment (Storage Commitment-Ziel konfigurieren) (Einzelheiten siehe [Abschnitt 34.11.3 Storage Commitment konfigurieren](#) auf Seite 158).
 - c. Klicken Sie auf **OK**.
9. Klicken Sie auf **OK**, um zum **Hauptfenster** zurückzukehren.

34.11.2 Dialog „Add / Edit Storage Commitment Destination (Storage Commitment-Ziel hinzufügen/bearbeiten)“

Tabelle 46 Storage Commitment-Ziel bearbeiten



Parameter	Funktion
AE-Titel	<p>Application Entity (Anwendungseinheit) Gibt einen eindeutigen Namen für das Zielsystem an. <i>Akzeptiert bis zu 16 alphanumerische Zeichen.</i></p> <p> Um die QDR-Arbeitsstation als Zielknoten hinzuzufügen, geben Sie „local“ im Feld AE-Titel ein.</p>
Hostname oder IP-Adresse	<p>Name oder IP-Adresse des Ziels. <i>Der Hostname oder die IP-Adresse müssen sich in dem gleichen Netzwerk befinden wie die QDR-Arbeitsstation.</i> <i>Akzeptiert bis zu 120 alphanumerische Zeichen.</i></p> <p> Um die QDR-Arbeitsstation als Zielknoten hinzuzufügen, geben Sie localhost im Feld Host Name or IP Address (Hostname oder IP-Adresse) ein.</p>
SCP-Port	<p>Portnummer des Ziels. Der Standardwert für die Portnummer des Dienstklassenanbieters ist 104. Akzeptiert bis zu 5 numerische Zeichen im Bereich von 1 bis 65535.</p>
Name des Ziels	<p>Aliasname für die Auswahl eines Ziels. Akzeptiert bis zu 120 alphanumerische Zeichen.</p>

Tabelle 46 Storage Commitment-Ziel bearbeiten

Parameter	Funktion
OK	Validiert die Daten. Nach erfolgreicher Überprüfung wird der Dialog geschlossen und die Auswahlliste „Configure DICOM Storage Commitment Destinations (DICOM Storage Commitment-Ziele konfigurieren)“ wird mit neuen oder geänderten Daten aktualisiert. Schlägt die Überprüfung fehl, wird eine Warnmeldung angezeigt.
Abbrechen	Ignoriert alle Änderungen und schließt das Dialogfeld.

34.11.3 Storage Commitment konfigurieren

Tabelle 47 Storage Commitment konfigurieren

Parameter	Funktion
Parameter für automatische Wiederholung	Wenn das Storage Commitment-Ziel aus einem Grund nicht auf eine Anfrage reagiert (z. B. besetzt, offline), bestimmen die Steuerelemente in diesem Bereich, wie lange das QDR-System auf eine Reaktion wartet, und legen ein Zeitintervall bis zum erneuten Abfrageversuch fest.
Anzahl der Wiederholungen	Dieses Eingabefeld mit der Bezeichnung Anzahl legt fest, wie oft das QDR-System eine Wiederholung durchführt. Das Eingabefeld Retry Number (Anzahl der Wiederholungen) kann manuell auf eine Zahl zwischen 0 und 99 Tagen gesetzt werden.
Wiederholungsintervall	Dieses Eingabefeld mit der Bezeichnung Min legt fest, wie lange das QDR-System zwischen den Wiederholungen warten muss. Das Eingabefeld Retry Interval (Wiederholungsintervall) kann manuell auf eine Zahl zwischen 1 und 1440 Minuten gesetzt werden.
Mode (Modus)	DICOM-Dateien können einzeln oder gemeinsam an ein Storage Commitment-Ziel gesendet werden.
Bild für Bild	Dieses Optionsfeld legt bei Auswahl fest, dass das QDR-System eine einzelne Storage Commitment-Anforderung für alle DICOM-Dateien ausstellt, die gesendet werden sollen.
Stapel	Dieses Optionsfeld legt bei Auswahl fest, dass das QDR-System eine Storage Commitment-Anforderung für alle DICOM-Dateien ausstellt, die gesendet werden sollen.

Tabelle 47 Storage Commitment konfigurieren

Parameter	Funktion
Protokolleinträge löschen nach	Dies ist ein Eingabefeld mit der Bezeichnung Days (Tage). Der Wert in diesem Feld gibt eine Begrenzung für die Speicherung der DICOM Sende-Protokolleinträge an. Diese Einträge werden nach der festgelegten Anzahl von Tagen bereinigt (gelöscht). Das Eingabefeld Purge log entries after (Protokolleinträge löschen nach) kann manuell auf eine Zahl zwischen 0 und 99 gesetzt werden.

34.12 DICOM Abfrage-/Ladeziele

Mit der Funktion „Query/Retrieve (Abfragen/Laden)“ kann der Benutzer in einem entfernten Verzeichnis (PACS) Messungen abfragen, die den angegebenen Parametern und Filtern entsprechen, und ausgewählte Messungen auf den aktuellen Computer laden. Die Messungen müssen in dem entfernten Verzeichnis gespeichert sein, bevor die Funktion „Query/Retrieve (Abfragen/Laden)“ verwendet werden kann.

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie einen entfernten Zielknoten konfigurieren, hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Die Konfiguration der Abfrage-/Ladeziele erfolgt über **Systemkonfiguration – Registerkarte „DICOM“ – Registerkarte Query/Retrieve (Abfragen/Laden)** im Pulldown-Menü **Utilities** (Dienstprogramme) im Hauptfenster.

Tabelle 48 DICOM Abfrage-/Ladeziele

Parameter	Funktion
Konfigurieren der DICOM Abfrage-/Ladeziele	Die Auswahlliste der vorhandenen DICOM Abfrage-/Ladeziele, die auf dem QDR-System konfiguriert sind.
Ziel hinzufügen	Zeigt einen Dialog, mit dem Sie ein neues Abfrage-/Ladeziel konfigurieren können.
Ziel bearbeiten	<i>Ist aktiviert, wenn ein Ziel ausgewählt ist.</i> Zeigt einen Dialog, mit dem Sie die Konfiguration des ausgewählten Abfrage-/Ladezieles ändern können.
Ziel löschen	<i>Ist aktiviert, wenn mindestens ein Ziel ausgewählt ist.</i> Löscht das/die ausgewählte(n) Abfrage-/Ladeziel(e).
Lokaler Ping	Überprüft, ob das lokale System mit einem Netzwerk verbunden ist.

Tabelle 48 DICOM Abfrage-/Ladeziele (Continued)

Parameter	Funktion
Remoter Ping	<i>Ist aktiviert, wenn ein Ziel ausgewählt ist.</i> Überprüft, ob das System des konfigurierten Abfrage-/Ladezieles mit dem gleichen Netzwerk wie das lokale System verbunden ist.
C-ECHO	<i>Ist aktiviert, wenn ein Ziel ausgewählt ist.</i> Überprüft, ob das System des konfigurierten Abfrage-/Ladezieles ein Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem (PACS) ist.

1. So fügen Sie ein neues Ziel **hinzu**:
 - a. Klicken Sie auf **Add Destination** (Ziel hinzufügen).
 - b. Füllen Sie die Dialogfelder *Add DICOM Query/Retrieve Destination* (DICOM-Abfrage-/Ladeziel hinzufügen) aus.
 - c. Klicken Sie auf **OK**.
2. So konfigurieren Sie ein bestehendes Ziel **neu**:
 - a. Wählen Sie das Ziel in der Auswahlliste aus.
 - b. Klicken Sie auf **Edit Destination** (Ziel bearbeiten).
 - c. Bearbeiten Sie ggf. das Dialogfeld *Edit DICOM Query/Retrieve Destination* (DICOM-Abfrage-/Ladeziel bearbeiten).
 - d. Klicken Sie auf **OK**.
3. So **aktivieren/deaktivieren** Sie ein Ziel:
 - a. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen in der Spalte „Active (Aktiv)“ der Auswahlliste, um das Ziel zu markieren bzw. die Auswahl aufzuheben (markiert heißt aktiviert).
4. So **prüfen Sie, ob das lokale System mit einem lokalen Netzwerk verbunden ist**:
 - a. Klicken Sie auf **Local Ping** (Lokaler Ping).
 - b. Klicken Sie auf **OK**, um die angezeigte Meldung zu schließen.
5. So **prüfen Sie, ob das Ziel mit dem gleichen Netzwerk wie das lokale System verbunden ist**:
 - a. Wählen Sie das Ziel in der Auswahlliste aus.
 - b. Klicken Sie auf **Remote Ping**.
 - c. Klicken Sie auf **OK**, um die angezeigte Meldung zu schließen.
6. So **überprüfen** Sie, ob das Ziel ein PACS ist:
 - a. Wählen Sie das Ziel in der Auswahlliste aus.
 - b. Klicken Sie auf **C-ECHO**.
 - c. Klicken Sie auf **OK**, um die angezeigte Meldung zu schließen.

7. So **löschen** Sie ein Ziel:
 - a. Wählen Sie das Ziel in der Auswahlliste aus.
 - b. Klicken Sie auf **Delete Destination** (Ziel löschen).
8. Zur Konfiguration der **Lade-/Abfrageparameter**:
 - a. Klicken Sie auf **Configure Parameters** (Parameter konfigurieren) ([Abschnitt 34.12.2 Abfragen/Laden konfigurieren](#) auf Seite 161).
9. Klicken Sie auf **OK**, um zum **Hauptfenster** zurückzukehren.

34.12.1 Der Dialog „DICOM-Abfrage-/Ladeziel hinzufügen/bearbeiten“

Tabelle 49 DICOM-Abfrage-/Ladeziel hinzufügen/bearbeiten

Parameter	Funktion
AE-Titel	<i>Anwendungseinheit</i> . Gibt einen eindeutigen Namen für das Zielsystem an. Akzeptiert bis zu 16 alphanumerische Zeichen.
Hostname oder IP-Adresse	Name oder IP-Adresse des Ziels. Der Hostname oder die IP-Adresse müssen sich in dem gleichen Netzwerk befinden wie die QDR-Arbeitsstation. Akzeptiert bis zu 120 alphanumerische Zeichen.
SCP-Port	Portnummer des Ziels. Der Standardwert für die Portnummer des Dienstklassenanbieters ist 104. Akzeptiert bis zu 5 numerische Zeichen im Bereich von 1 bis 65536.
OK	Validiert die Daten. Nach erfolgreicher Überprüfung wird der Dialog geschlossen und die Auswahlliste „Configure DICOM Query/Retrieve Destinations (DICOM Storage Commitment-Ziele konfigurieren)“ wird mit den neuen bzw. geänderten Daten aktualisiert. Schlägt die Überprüfung fehl, wird eine Warnmeldung angezeigt.
Abbrechen	Ignoriert alle Änderungen und schließt das Dialogfeld.

34.12.2 Abfragen/Laden konfigurieren

Tabelle 50 Abfragen/Laden konfigurieren

Parameter	Funktion
Suchen nach Untersuchung	Wählen Sie aus, welche Ladeoperationen auf Untersuchungsebene ausgeführt werden sollen, das heißt, die gesamte Messungsgruppe für die gleiche DICOM-Untersuchung, wenn die ausgewählte Messung geladen wird.

Tabelle 50 Abfragen/Laden konfigurieren

Parameter	Funktion
Suchen nach Serie	Wählen Sie eine Ladeoperation für die Serie aus, das heißt, es wird eine Einzelmessung entsprechend den gegebenen DICOM-Serien geladen.

34.13 Host

Host-Computer definieren Ihr System, wenn Sie die DICOM-Funktionen verwenden. Der Host Computer wird durch Auswahl der Registerkarte **System Configuration – DICOM** (Systemkonfiguration – DICOM) – Registerkarte **Host** im Pulldown-Menü **Utilities** (Dienstprogramme) im Hauptfenster konfiguriert.

Wichtig: Wenn Änderungen am AE-Titel oder an den Daten für den Empfangsport vorgenommen werden, muss die APEX-Anwendung neu gestartet werden, damit die Änderungen übernommen werden.

Tabelle 51 Hostkonfiguration

Parameter	Funktion
Host-DICOM-Konfiguration	Wird zur Konfiguration des Host-Computers verwendet.
AE-Titel	<i>Application Entity</i> (Anwendungseinheit) Gibt einen eindeutigen Namen für das QDR-System an. Akzeptiert bis zu 16 alphanumerische Zeichen.
Stationsname	Name des QDR-Systems Akzeptiert bis zu 120 alphanumerische Zeichen.
Empfangsport	Portnummer für den Empfang des QDR-Systems. Der Standardport ist Portnummer 104. Akzeptiert bis zu 5 numerische Zeichen im Bereich von 1 bis 65536.
DICOM-Send-Modalität	Definiert den Wert, der in dem Feld „Modality (Modalität)“ die DICOM-Dateien für DICOM-Send- und DICOM-Speicheroperationen eingetragen wird.
Modalität	Dieses Bearbeitungsfeld legt fest, welcher Wert in dem Feld „Modality (Modalität)“ in DICOM-Dateien eingegeben wird. Der Standardwert ist „OT“ bzw. der letzte gespeicherte Wert.

Tabelle 51 Hostkonfiguration

Parameter	Funktion
Worklist legt Modalität fest.	<p>Wenn dies markiert ist, gilt Folgendes: Existiert in der Worklist-Datenbank ein Eintrag für eine zu speichernde oder zu versendende Messung, wird die Modalität aus der Worklist verwendet. Existiert kein Eintrag in der Worklist-Datenbank (weil die Messung entweder nicht über die Worklist initiiert wurde oder weil der Eintrag der Worklist bereits gelöscht wurde), wird der Wert aus dem Bearbeitungsfeld „Modality (Modalität)“ verwendet.</p>
OK	<p>Validiert die Daten. Wenn die Prüfung erfolgreich war, schließt sich das Fenster „Systemkonfiguration“ und das Hauptfenster wird wieder angezeigt. Schlägt die Überprüfung fehl, wird eine Warnmeldung angezeigt.</p>
Abbrechen	<p>Ignoriert alle Änderungen, schließt das Fenster „System Configuration (Systemkonfiguration)“ und kehrt zum Hauptfenster zurück.</p>

35 Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu FRAX

In der klinischen Praxis würde ich lieber die Wahrscheinlichkeit für ein Jahr verwenden – warum sollte ich mit einem 10-Jahres-Frakturrisiko arbeiten?

Bei jungen gesunden Personen (mit einer niedrigen Sterberate) entspricht das 1-Jahres-Risiko ca. 10 % des 10-Jahres-Risikos. Deshalb hat eine Person mit einem 10-Jahres-Frakturrisiko von 40 % ein 1-Jahres-Risiko von 4 %. Höhere Prozentzahlen sind für Patienten und Ärzte verständlicher.

Die klinischen Risikofaktoren lassen sich nur mit Ja oder Nein beantworten. Zwei vorherige klinische Frakturen deuten jedoch auf ein größeres Risiko hin als eine einzige vorherige Fraktur. Warum wird dies nicht berücksichtigt?

Es ist bekannt, dass für viele klinische Risikofaktoren abgestufte Antworten vorliegen. Neben der Anzahl der vorherigen Frakturen gehören das Rauchen, die Anwendung von Glucocorticoiden und der Alkoholkonsum dazu. Das Modell beruht jedoch auf Informationen, die bei allen zur Entwicklung des Modells herangezogenen Kohorten vorhanden sind, sodass solche Einzelheiten nicht zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass die klinische Beurteilung bei der Auswertung der Wahrscheinlichkeitsangaben notwendig ist. Bei einer überdurchschnittlich hohen Glucocorticoid-Dosis liegt die Wahrscheinlichkeit über dem angezeigten Ergebnis. Umgekehrt bedeutet eine niedrigere Dosis eine geringere Wahrscheinlichkeit.

Eine vorherige Wirbelkörperfraktur weist auf ein höheres Risiko als eine vorherige Unterarmfraktur hin. Wie wird dies in den Algorithmen berücksichtigt?

Dies wird aus den in der vorhergehenden Frage genannten Gründen nicht berücksichtigt. Es sollte jedoch beachtet werden, dass eine vorherige morphometrisch nachweisbare und asymptomatische Wirbelkörperfraktur ungefähr das gleiche Risiko birgt wie eine beliebige andere vorherige Fraktur. Eine klinische Wirbelkörperfraktur deutet jedoch auf ein viel höheres Risiko hin (siehe Referenzen, Johnell et al. 2006).

Wie werden ethnische Minderheiten berücksichtigt?

Sie werden nicht berücksichtigt – außer in den Vereinigten Staaten, wo ausreichende epidemiologische Informationen vorliegen, um entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Warum kann ich das Tool nicht verwenden, um das Frakturrisiko für einen 30-jährigen Patienten zu berechnen?

Das Modell wurde mit realen Daten aus weltweit durchgeführten populationsbasierten Kohortenstudien erstellt, die einen begrenzten Altersbereich besitzen. Wenn Sie ein Alter unter 40 Jahren eingeben, berechnet das Tool die Frakturwahrscheinlichkeit für das Alter von 40 Jahren. Sie müssen das Risiko mit Ihrer klinischen Beurteilung bewerten.

Bei klinischen Risikofaktoren enthält das Programm keine Option für fehlende Werte (z. B. als Kategorie „Nicht bekannt“). Was sollte ich dem Fall tun?

Fehlende Werte sind in unserem Programm nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung der 10-Jahres-Wahrscheinlichkeit wird davon ausgegangen, dass jede Frage (mit Ausnahme der Knochenmineraldichte) beantwortet werden kann. Wenn Informationen fehlen, z. B. zur Familiengeschichte, sollten Sie mit Nein antworten.

Warum wird nicht die Wahrscheinlichkeit für alle Osteoporosefrakturen ermittelt? Dadurch würden sich größere Werte ergeben.

Die Berücksichtigung aller Osteoporosefrakturen ist aufgrund der begrenzten Informationen zur ihrer Epidemiologie problematisch. Bei schwedischen Daten würde die Berücksichtigung anderer größerer Osteoporosefrakturen (z. B. Beckenfrakturen, andere Oberschenkelfrakturen und Schienbeinfrakturen) den Wert um ca. 10 % erhöhen (beispielsweise könnte bei einem Patienten mit einer berechneten Wahrscheinlichkeit von 5 % für eine größere Osteoporosefraktur dieser Wert auf 5,5 % steigen). Die Berücksichtigung von Rippenfrakturen hätte noch viel größere Auswirkungen. Diese lassen sich jedoch schwerer diagnostizieren.

Warum werden Stürze nicht berücksichtigt, die schon lange als klinischer Risikofaktor für eine Fraktur gelten?

Aus zwei Gründen: Erstens stellten die zur Erstellung des Modells verwendeten Kohortendaten Stürze unterschiedlich dar, sodass es nicht möglich war, eine standardisierte Metrik abzuleiten. Zweitens konnte nicht nachgewiesen werden, dass durch pharmazeutische Eingriffe das Frakturrisiko bei auf der Basis eines vorausgegangenen Sturzes ausgewählten Patienten reduziert werden konnte, obwohl dies plausibel erscheint. Es ist wichtig, dass die Risikobewertungsmodelle ein Risiko identifizieren, das durch eine Behandlung verringert werden kann.

Warum haben Sie mit einem Röntgengerät diagnostizierte Frakturen ignoriert und sich auf klinische Wirbelkörperfrakturen konzentriert?

Eine vorherige morphometrisch nachweisbare Fraktur besitzt die gleiche Bedeutung wie eine andere vorherige Fragilitätsfraktur und kann in das FRAX[®]-Modell eingegeben werden. Das Ergebnis schließt jedoch nicht die Wahrscheinlichkeit einer morphometrisch nachweisbaren Fraktur ein. Dabei handelt es sich um einen konservativen Ansatz, da die klinische Bedeutung kontrovers ist (anders als bei der Risikovorhersage). Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Auswahl eines Patienten für eine Behandlung.

Wie entscheide ich, wer behandelt werden muss?

Die FRAX-Bewertung gibt keine Auskunft darüber, wer behandelt werden soll; dies kann nur der behandelnde Arzt entscheiden. In vielen Ländern stehen Richtlinien zur Verfügung, die sich auf Expertenmeinungen und/oder gesundheitsökonomische Begründungen stützen.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der WHO-Website (www.who.int).

HOLOGIC®



Hologic, Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA

Kontakt in Brasilien Imex Medical Group do Brasil
Rua das Embaúbas, 601 – Fazenda Santo Antônio
São José/SC – Brasil – 88104-561
Tel: +55 48 3251 8800
www.imexmedicalgroup.com.br



Hologic BVBA
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgien
Tel.: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87

