

## 1.1 Instruktioner för användning av MammoPad bröstdynor

MammoPad® bröstdynor är medicinska produkter för engångsbruk. De är genomsläppliga och latexfria. Använd en ny dyna för varje patient. Följ den här proceduren för att se till att dynan är korrekt installerad.

1. Öppna påsen som innehåller MammoPad bröstdynor, ta ur en dyna och förslut påsen igen.



**OBS!**

Dynorna måste förvaras i en förseglad plastpåse för att förhindra kontaminering som kan påverka bildkvaliteten.


2. Dra bort papperet på baksidan av dynan och släng det.
3. Applicera den självhäftande sidan på bildplattformen i enlighet med instruktionerna i följande anmärkning för din typ av system. Lägg inte dynan över målade dekaler.



**OBS!**

Selenia® och de flesta andra FFDM-system – Rikta in det rundade hörnet längst ner till vänster på detektorn. Slåta ut dynan från baksidan och framåt på bildplattformen.

Mått® och GE-system – Rikta in det rundade hörnet längst ner till höger på detektorn. Slåta ut dynan från baksidan och framåt på bildplattformen.

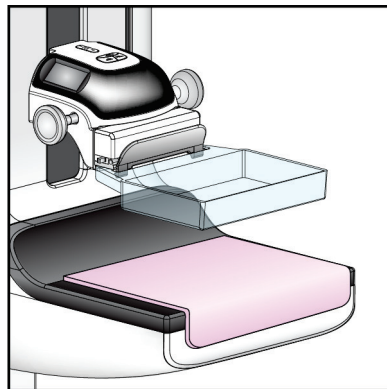

Figur 1: MammoPad installerad på en bildplattform

4. Följ din normala positioneringsrutin för alla screeningvyer.
5. När undersökningen är klar tar du bort dynan från bildplattformen och kasserar den.



**OBS!**

Om dynan utsattes för blod eller kroppsvätskor följer du förfarandet för bortskaffande av biologiskt riskavfall för din anläggning.

Om du vill ha hjälp med MammoPad-produkten kan du kontakta produktsupport på 1-877-371-4372.

Auktoriserad EU-representant

Hologic BV  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgien

