

## Kitul Aptima Auto Detect

Pentru utilizarea in diagnosticarea *in vitro*.

Rx only

### Destinatia Utilizarii

Kitul Aptima Auto Detect este conceput pentru utilizarea cu Luminometrul Leader™ HC+ si sistemul instrumentului Tigris™.

### Materiale Furnizate

Kit Aptima Auto Detect – Nr. de Cat. 301048

Simbol	Componente	Descriere	Cantitate
R1	Aptima Auto Detect 1	Solutie Apoasa continand peroxid de hidrogen de 0,1% si 0,001 N acid nitric	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N hidroxid de sodiu	1 x 245 mL

### Atentionari si Masuri de Precautie

- A. Pentru utilizarea in diagnosticarea *in vitro*.**
- B. Evitati contactul Auto Detect 2 cu pielea, ochii si membranele mucoase. În cazul în care acest lichid intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți cu apă. În cazul în care acest lichid se varsă, diluați substanța vărsată cu apă înainte de a o șterge.
- C. Unii reactivi din acest set sunt etichetați cu simbolurile de risc și siguranță.

**Notă:** Informațiile de comunicare a pericolelor pentru etichetarea produselor vândute la nivel global reflectă clasificările fișelor cu date de securitate SUA și UE (FDS). Pentru informații de comunicare a pericolelor specifice regiunii dvs., consultați FDS-urile specifice regiunii în biblioteca fișelor cu date de securitate la [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com).

### Informații pericole SUA



#### **Auto Detect 2**

**SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%**

#### **DANGER**

H314 – Causes severe skin burns and eye damage  
 P260 – Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray  
 P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling  
 P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection  
 P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician  
 P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing  
 P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician  
 P303 + P361 + P353 – IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower  
 P363 – Wash contaminated clothing before reuse  
 P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing  
 P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician  
 P301 + P330 + P331 – IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting  
 P405 – Store locked up

## Informații pericole UE



### Auto Detect 2

**SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%**

#### Pericol

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

P260 - Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

P280 - Purtați echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

## Condiții de Pastrare și Manipulare

Lichidele incluse în Kitul Aptima Auto Detect trebuie pastrate la 15°C până la 30°C. În cazul în care lichidele îngheață în timpul transportului sau al depozitării, se poate forma un precipitat. Încalzirea lichidelor la 37°C până la 60°C facilitează dizolvarea precipitatului. Dacă produsul necesită încălzire, lăsați lichidul să se răcească până la temperatura camerei și amestecați temeinic înainte de utilizare. Lichidele trebuie pastrate la 18°C până la 28°C înainte de utilizarea cu Luminometrul Leader HC+ și la 15°C până la 30°C înainte de utilizarea cu Sistemul Tigris.

## Procedura

1. Înlăturați flacoanele Auto Detect existente în echipament.
2. Pozitionați noile flacoane Auto Detect în instrument conform descrierii din Manualul Operatorului instrumentului corespunzător.

## Note Procedurale

1. Înainte de utilizare, asigurați-vă de faptul că instrumentul este alimentat cu lichidele Auto Detect.
2. Între posibilele surse de eroare sunt incluse și erorile de operator în timpul pozitionării flacoanelor sau utilizarea unor lichide Auto Detect 1 și Auto Detect 2 expirate.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

Serviciu de asistență clienți: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Asistență tehnică: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Pentru date de contact suplimentare, vizitați [www.hologic.com](http://www.hologic.com).



### Hologic N.V.

Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Este posibil ca acest produs să fie acoperit de unul sau mai multe brevete S.U.A. identificate la adresa [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2001-2018 Hologic, Inc. Toate drepturile rezervate.

IN0055-01-RO Rev. 003  
2018-05