

# Faxitron® Core

Røntgenfotoferingssystem til prøver

## STARTVEJLEDNING

### 1. TÆND FOR STRØMMEN

- Sørg for, at afbryderen på bagsiden af Faxitron Core-kabinettet er indstillet til positionen **ON** (TIL)
- Drej **nøglen** på forsiden af Faxitron Core-kabinettet til **on** (til)
- Tænd for computeren og skærmen på **on** (til)

### 2. START SOFTWAREN

- Kontroller, at der ikke er noget i Faxitron Core-prøveskuffen
- Dobbeltklik på **Vision**-ikonet i midten af skrivebordet

### 3. KALIBRER

- Du vil blive bedt om at kalibrere, når du logger ind  
Tryk på knappen **"Calibrate"** (Kalibrer) for at fortsætte

### 4. PATIENTDATA

- Klik på **"Start procedure"** (Start procedure)
- Klik på **"Select from Worklist"** (Vælg fra arbejdsliste)
- Find patientens navn, og dobbeltklik på det
- Indtast eventuelle manglende obligatoriske felter, f.eks. Laterality (Lateralitet)
- Klik på **"Accepter"** (Accepter)

### 5. RØNTGENSCANNING

- Placer prøven/prøverne i Faxitron Core-prøvebakken
- Placer prøvebakken i skuffen
- Luk Faxitron Core-skuffen
- Tryk på den grønne knap **"X-ray"** (Røntgen) for at aktivere røntgenstråler - billedet vises efter et par sekunder

### 6. BILLEDMANIPULATION

- Hold **venstre museknap** nede, og træk musen for at ændre lysstyrke og kontrast for vindue/niveaufunktion
- **Tilpas zoom** for at forstørre billedet til visning

### 7. LAGRING TIL PACS

- Klik på knappen **"PACS Store"** (PACS Gem) til venstre på skærmen

### 8. UDSKRIVNING

- Klik på knappen **"PACS Print"** (PACS Udskriv) til venstre på skærmen

### 9. NEDLUKNING

- Klik på knappen **"System Shutdown"** (Lukning af system) til venstre, og klik derefter på **"OK"** (OK)
- Drej nøglen i Faxitron Core-kabinettet til **off** (fra)



[www.hologic.com/package-inserts](http://www.hologic.com/package-inserts)



**Hologic, Inc.**  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA  
1.800.447.1856  
[www.hologic.com](http://www.hologic.com)

**EC REP**

**Hologic, BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgien  
Tlf.: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87

**AU SPONSOR**

**Hologic Pty Ltd**  
Suite 302, Level 3  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113  
Tlf.: 02 9888 8000



*Faxitron Core-systemet er også kendt som CoreVision-systemet.*

04-4046-00-1901 Rev. 032 (8/21) Hologic Inc. ©2021 Alle rettigheder forbeholdes. Hologic, Core, CoreVision, Faxitron og The Science of Sure er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Hologic, Inc., og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Disse oplysninger er beregnet til læger på det amerikanske marked og andre markeder og er ikke tiltænkt som produktpromovering eller -godkendelse, hvor sådanne aktiviteter er forbudt. Da Hologic-materialer distribueres via websites, eBroadcasts og messer, er det ikke altid muligt at kontrollere, hvor sådanne materialer vises. Kontakt din lokale Hologic-repræsentant for at få specifikke oplysninger om, hvilke produkter der er tilgængelige i et bestemt land.