

Tuumavärv ThinPrep™

Kasutusjuhend



KASUTUSOTSTARVE

Tuumavärv ThinPrep™ on mõeldud kasutamiseks Papanicolaou värvimisprotseduuris koos mistahes värvi loputuslahusega ThinPrep, värvi sinetamislahusega ThinPrep, värvilahusega ThinPrep Orange G ja värvilahusega ThinPrep EA. Professionaalseks kasutamiseks.

KOKKUVÕTE JA SELGITUS

Tuumavärv ThinPrep on vesilahus, mida kasutatakse rakutuumade värvimiseks tsütoloogiliseks hindamiseks mõeldud alusklaaside ettevalmistamisel.

PROTSEDUURI PÕHIMÕTTED

Kasutamisel koos värvimislahustega ThinPrep ja tsütoloogiliste alusklaaside ettevalmistamisel värvib tuumavärv ThinPrep rakutuumad erinevalt, ilma et see mõjutaks tsütoplasmaatilist värvimist või morfoloogiat.

KOOSTIS

Äädikhappe, alumiiniumsulfaadi, etüleenglükooli, hematoksyliini ja naatriumjodaadi vesilahus. CAS 107-21-1, CAS 10043-01-3

HOIATUSED

HOIATUS. Sisaldab alumiiniumsulfaati, jää-äädikhapet, etüleenglükooli.

H302. Allaneelamisel kahjulik.

In vitro diagnostiliseks kasutamiseks. Ei ole mõeldud väliseks ega sisemiseks kasutamiseks inimestel ega loomadel. Allaneelamisel võib olla kahjulik. Võib kokkupuutel ärritada silmi.

ETTEVAATUSABINÕUD

P264. Pärast käsitlemist peske käsi põhjalikult.

P280. Kandke kaitsekindaid ja silma-/näokaitset.

Vältige kokkupuudet silmadega. Kui seda otseselt ei kasutata, hoidke anum suletuna. Kasutada 60 päeva jooksul pärast pakendi esmakordset avamist. Tulemusi mitte-ThinPrepi tsütoloogia proovidega pole hinnatud. Ärge kasutage, kui esmane pakend on kahjustatud.

EELTÖÖTLEMINE

Lahustada, segada ega lahjendada pole vaja.

HOIULEPANEK

Hoida temperatuuril 15 °C (59 °F) kuni 25 °C (77 °F). Kasutada 60 päeva jooksul pärast pakendi esmakordset avamist või pakendile märgitud kõlblikkusaega, olenevalt sellest, kumb on varasem.

VÄLIMUS JA TERVIKLIKKUS

Läbipaistmatu mittesteriilne lahus.

Tuumavärv ThinPrep™

PROOVIDE KOGUMINE JA ETTEVALMISTAMINE

Kasutamiseks günekoloogiliste tsütoloogia proovidega, mis on ette valmistatud mis tahes töötles ThinPrep™.

PROTSEDUUR

Vaadake konkreetseid värvimisprotokolle värvi ThinPrep kasutusjuhendist.

PROTSEDUURI PIIRANGUD

Tuleb kasutada värvi ThinPrep kasutusjuhendis toodud juhiste järgi. Tuumavärvi ThinPrep ei saa asendada ühegi teise lahusega.

OHUTUS JA TOIMIVUSNÄITAJAD

Suuniste järgi kasutamisel värvib tuumalahus ThinPrep rakutuomad tsütoloogilisel alusklaasil.

Selle tootega või sellega kasutatavate komponentidega seotud tõsiste juhtumite korral teatage sellest ettevõtte Hologic tehnilisele toele ning patsiendi ja/või kasutaja kohalikule pädevale asutusele.

Lugege kuvamissüsteemi ThinPrep kasutusjuhendit.

KÕRVALDAMINE

Kõrvaldage kehtivate eeskirjade kohaselt.

ESMAABIMEETMED

ALLANEELAMISEL: kui tunnete end halvasti, helistage MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile. Kogu ohutuskaardi leiate veebisaidilt www.hologicsds.com.

Läbivaatamise ajalugu

Läbivaatamine	Kuupäev	Kirjeldus
AW-24892-2702 vers 001	03.2022	Juhiste täpsustamine. Lisatud juhised seoses tõsistest juhtumitest teatamisega.

Tuumavärv ThinPrep™



Tootja



Kõlblikusaeg



Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses



Vaadake kasutusjuhendit



Partii kood



Kataloogi number



In vitro diagnostiline meditsiiniseade



Temperatuuri piirid



Ärritav, hingamisteede ärritus,
naha sensibilisaator



Kogus



Valmistatud USA-s



Avage siit



Toode vastab CE-märgise nõuetele vastavalt EL-i IVD määrusele 2017/746



Ettevaatust! Föderaalsete (USA) piirangute kohaselt tohib seda seadet müüa ainult arst või mistahes muu praktiseeriv meditsiinitöötaja, kes on litsentseeritud selle osariigi seaduste alusel, kus meditsiinitöötaja seadet kasutab või annab ettekirjutuse selle kasutamiseks, ning kes on koolitatud ja kogunud toote kasutamise alal, või tohib seda müüa sellise meditsiinitöötaja ettekirjutusel.



Ühendkuningriigi vastavushindamine (Suurbritannia)



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Tel: +32 2 711 46 80

Austraalia sponsor: Hologic (Austraalia ja Uus-Meremaa) Pty Ltd. • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Austraalia • Tel: 02 9888 8000

Vastutav isik Ühendkuningriigis: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Ühendkuningriik