

ThinPrep™ kodolu krāsviela

Lietošanas instrukcija



PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

ThinPrep™ kodolu krāsvielu ir paredzēts lietot ginekoloģiskā materiāla citoloģiskās izmeklēšanas procedūrā kopā ar jebkuru ThinPrep šķīdumu krāsvielai skalošanai, ThinPrep šķīdumu iekrāsošanai zilā krāsā, ThinPrep krāsvielai Orange G šķīdumu un ThinPrep krāsvielai EA šķīdumu. Profesionālai lietošanai.

KOPSAVILKUMS UN SKAIDROJUMS

ThinPrep kodolu krāsviela ir ūdens šķīdums, kas paredzēts šūnu kodolu iekrāsošanai preparātiem uz priekšmetstikliņa citoloģiskai izvērtēšanai.

PROCEDŪRAS PRINCIPI

Lietojot kopā ar ThinPrep iekrāsošanas šķīdumiem un citoloģiskajiem preparātiem uz priekšmetstikliņiem, ThinPrep kodolu krāsviela atšķirīgi iekrāso šūnu kodolus, neietekmējot citoplazmas krāsojumu un morfoloģiju.

SASTĀVS

Etiķskābes, alumīnija sulfāta, etilēnglikola, hematoksilīna un nātrija jodāta ūdens šķīdums. CAS 107-21-1, CAS 10043-01-3

BRĪDINĀJUMI

BRĪDINĀJUMS. Satur alumīnija sulfātu, ledus etiķskābi, etilēnglikolu.

H302. Kaitīgs, ja norij.

Lietošanai *in vitro* diagnostikā. Nav paredzēts ārīgai vai iekšējai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem. Var būt kaitīgs, ja norij. Saskaroties ar acīm, var izraisīt kairinājumu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

P264. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.

P280. Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus/sejas aizsargus.

Izvairieties no saskares ar acīm. Kad produkts netiek lietots, turiet tvertni aizvērtu. Izlietot 60 dienu laikā pēc pirmās tvertnes atvēršanas reizes. Citoloģijas paraugu, kas nav krāsoti ar ThinPrep, rezultāti nav novērtēti. Nelietojiet, ja primārais iepakojums ir bojāts.

PRIEKŠAPSTRĀDE

Nav nepieciešama izšķīdināšana, sajaukšana vai atšķaidīšana.

GLABĀŠANA

Uzglabājiet temperatūrā no 15 °C (59 °F) līdz 25 °C (77 °F). Izlietot 60 dienu laikā pēc pirmās tvertnes atvēršanas reizes vai līdz derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz tvertnes, atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk.

IZSKATS UN STRUKTŪRA

Necaurspīdīgs, nesterils šķīdums.

ThinPrep™ kodolu krāsviela

PARAUGU PAŅEMŠANA UN SAGATAVOŠANA

Lietošanai kopā ar ginekoloģiskiem citoloģijas paraugiem, kas ir apstrādāti ar jebkuru ThinPrep™ apstrādātāju.

PROCEDŪRA

Konkrētus iekrāsošanas protokolus skatiet ThinPrep krāsvielas lietotāja rokasgrāmatā.

PROCEDŪRAS IEROBEŽOJUMI

Produkts jālieto atbilstoši ThinPrep krāsvielas lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. ThinPrep kodolu krāsvielu nevar aizvietot ar kādu citu šķīdumu.

DROŠUMA UN VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI

Lietojot, kā norādīts, ThinPrep kodolu krāsviela nokrāsos šūnu kodolus citoloģijas preparātos uz priekšmetstikliņiem.

Ja rodas nopietns negadījums, kas ir saistīts ar produktu vai kopā ar produktu izmantojamo daļu, ziņojiet par to Hologic tehniskā atbalsta dienestam un pacienta un/vai lietotāja reģionā esošajai kompetentajai iestādei.

Skatīt ThinPrep attēlveidošanas sistēmas operatora rokasgrāmatu.

LIKVIDĒŠANA

Likvidējiet saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: ja jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Visu drošības datu lapu skatiet www.hologicsds.com.

Iepriekšējās redakcijas

Redakcija	Datums	Apraksts
AW-24892-2902 Rev. 001	03.2022.	Precizēti norādījumi. Pievienoti norādījumi saistībā ar ziņošanu par nopietniem negadījumiem.

ThinPrep™ kodolu krāsviela



Ražotājs



Izlietot līdz



Pilnvarotais pārstāvis
Eiropas Kopienā



Skatīt lietošanas instrukciju



Partijas numurs



Kataloga numurs



Medicīniskā ierīce *in vitro*
diagnostikai



Temperatūras ierobežojums



Kairinošs, elpceļu kairinājums,
ādas sensibilizators



Daudzums



Ražots ASV



Atvērt šeit



Izstrādājums atbilst CE marķējuma
prasībām saskaņā ar Regulu (ES)
2017/746 par IVD ierīcēm



Uzmanību! Federālajos (ASV) tiesību aktos šīs ierīces pārdošana atļauta tikai ārstam
vai jebkurai citam praktizējošajam ārstam, kas ir licencēts saskaņā ar tās valsts
likumiem, kurā viņam ir prakse, vai pēc ārsta vai praktizējošā ārsta pasūtījuma, lai
lietotu vai norādītu lietot ierīci, un kurš ir apmācīts un pieredzējis produkta lietošanā.



Apvienotās Karalistes atbilstības
novērtējums (Lielbritānija)



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 ASV • Tālr.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Beļģija • Tālr.: +32 2 711 46 80

Sponsors Austrālijā: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Austrālija • Tālr.: 02 9888 8000

Atbildīgā persona Apvienotajā Karalistē: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe
Manchester M23 9HZ • Apvienotā Karaliste