

# ThinPrep™ krāsvielas Orange G šķīdums

## Lietošanas instrukcija



### **PAREDZĒTĀ LIETOŠANA**

ThinPrep™ krāsvielas Orange G šķīdums ir paredzēts lietošanai ginekoloģiskā materiāla citoloģiskās izmeklēšanas procedūrā kopā ar jebkuru ThinPrep kodolu krāsvielu, ThinPrep šķīdumu krāsvielu skalošanai, ThinPrep šķīdumu iekrāsošanai zilā krāsā un ThinPrep krāsvielas EA šķīdumu. Profesionālai lietošanai.

### **KOPSAVILKUMS UN SKAIDROJUMS**

ThinPrep Orange G šķīdums ir spirta šķīdums, ar ko iespējams iekrāsot šūnu citoplazmu preparātiem uz priekšmetstikliņiem citoloģiskai izvērtēšanai.

### **PROCEDŪRAS PRINCIPI**

Lietojot kopā ar ThinPrep krāsvielu šķīdumiem un citoloģijas preparātiem uz priekšmetstikliņiem, ThinPrep Orange G šķīdums nokrāsos šūnu citoplazmu, neietekmējot kodolu krāsojumu un morfoloģiju.

### **SASTĀVS**

Spirta šķīdums, kas sastāv no etanola, metanola un izopropilspirta. CAS 64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0  
Šķīdums satur krāsvielu Orange G.

### **BRĪDINĀJUMI**

**Bīstami!** Uzliesmojošs. Satur etanolu, metanolu, izopropilspirtu.

H302. Kaitīgs, ja norij.

H312. Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H319. Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H371. Var izraisīt orgānu bojājumus.

H225. Viegli uzliesmojošs šķīdums un tvaiki.

Lietošanai *in vitro* diagnostikā. Nav paredzēts ārīgai vai iekšējai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem. Nav iespējams padarīt nekaitīgu.

### **PIESARDZĪBAS PASĀKUMI**

P210. Sargāt no karstuma, dzirkstelēm, atklātas uguns un karstām virsmām.

P280. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P260. Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

P308 + P313. JA saskaras vai saistīts ar: sazinieties ar ārstu.

P301 + P310. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

P305 + P351 + P338. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

## ThinPrep™ krāsvielas Orange G šķīdums

P303 + P361 + P353. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.

P304 + P340. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

P403 + P233. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

P370 + P378. Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet sausas smiltis, sausas putas, kas ir izturīgas pret ķīmiskajām vielām vai spirtu.

P501. Likvidēt saturu/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskiem noteikumiem.

Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet. Kad produkts netiek lietots, turiet tvertni aizvērtu. Izmantot vietās ar pietiekamu ventilāciju. Citoloģijas paraugu, kas nav krāsoti ar ThinPrep, rezultāti nav novērtēti. Nelietojiet, ja primārais iepakojums ir bojāts.

### **PRIEKŠAPSTRĀDE**

Nav nepieciešama izšķīdināšana, sajaukšana vai atšķaidīšana.

### **GLABĀŠANA**

Glabājiet ThinPrep Orange G šķīdumu temperatūrā no 15 °C (59 °F) līdz 30 °C (86 °F) nodrošinātājā tvertnē. Nelietojiet ThinPrep Orange G šķīdumu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz tvertnes.

### **IZSKATS UN STRUKTŪRA**

Dzidrs, nesterils šķīdums.

### **PARAUGU PANEMŠANA UN SAGATAVOŠANA**

Lietošanai kopā ar ginekoloģiskajiem citoloģijas paraugiem, kas ir apstrādāti ar jebkuru ThinPrep™ apstrādātāju.

### **PROCEDŪRA**

Konkrētus iekrāsošanas protokolus skatiet ThinPrep krāsvielas lietotāja rokasgrāmatā.

### **PROCEDŪRAS IEROBEŽOJUMI**

Produkts jālieto atbilstoši ThinPrep krāsvielas lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. ThinPrep Orange G šķīdumu nevar aizvietot ar kādu citu šķīdumu.

### **DROŠUMA UN VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI**

Lietojot, kā norādīts, ThinPrep Orange G šķīdums nokrāsos šūnu citoplazmu citoloģijas preparātos uz priekšmetstikliņiem.

Ja rodas nopietns negadījums, kas ir saistīts ar produktu vai kopā ar produktu izmantojamo daļu, ziņojiet par to Hologic tehniskā atbalsta dienestam un pacienta un/vai lietotāja reģionā esošajai kompetentajai iestādei.

Skatīt ThinPrep attēlveidošanas sistēmas operatora rokasgrāmatu.

### **LIKVIDĒŠANA**

Likvidējiet saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem.

### **PIRMĀ PALĪDZĪBA**

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: ja jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Visu drošības datu lapu skatiet [www.hologiccsds.com](http://www.hologiccsds.com).

### **Iepriekšējās redakcijas**

Redakcija	Datums	Apraksts
AW-24894-2902 Rev. 001	03.2022.	Precizēti norādījumi. Pievienoti norādījumi saistībā ar ziņošanu par nopietniem negadījumiem.

## ThinPrep™ krāsvielas Orange G šķīdums



Ražotājs



Izlietot līdz



Uzliesmojošs



Skatīt lietošanas instrukciju



Partijas numurs



Kairinošs, elpceļu kairinājums, ādas sensibilizators



Medicīniskā ierīce *in vitro* diagnostikai



Temperatūras ierobežojums



Elpceļu sensibilizators, mērķorgānam toksisks



Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā



Atvērt šeit



Daudzums



Kataloga numurs



Ražots ASV

EtOH

Etanols



Izstrādājums atbilst CE marķējuma prasībām saskaņā ar Regulu (ES) 2017/746 par IVD ierīcēm



Apvienotās Karalistes atbilstības novērtējums (Lielbritānija)



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 ASV • Tālrunis: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Beļģija • Tālrunis: +32 2 711 46 80

Sponsors Austrālijā: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Austrālija • Tālrunis: 02 9888 8000

Atbildīgā persona Apvienotajā Karalistē: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Apvienotā Karaliste