

## ThinPrep™ krāsvielas EA šķīdums

## Lietošanas instrukcija

**PAREDZĒTĀ LIETOŠANA**

ThinPrep™ krāsvielas EA šķīdums ir paredzēts lietošanai ginekoloģiskā materiāla citoloģiskās izmeklēšanas procedūrā kopā ar jebkuru ThinPrep kodolu krāsvielu, ThinPrep šķīdumu krāsvielu skalošanai, ThinPrep šķīdumu iekrāsošanai zilā krāsā un ThinPrep krāsvielas Orange G šķīdumu. Profesionālai lietošanai.

**KOPSAVILKUMS UN SKAIDROJUMS**

ThinPrep EA šķīdums ir spirta šķīdums, ar ko iespējams iekrāsot šūnu citoplazmu preparātiem uz priekšmetstikliņiem citoloģiskai izvērtēšanai.

**PROCEDŪRAS PRINCIPI**

Lietojot kopā ar ThinPrep krāsvielu šķīdumiem un citoloģijas preparātiem uz priekšmetstikliņiem, ThinPrep EA šķīdums nokrāsos šūnu citoplazmu, neietekmējot kodolu krāsojumu un morfoloģiju.

**SASTĀVS**

Spirta šķīdums, kas sastāv no etanola, izopropilspirta, metanola un patentētām bioloģiskajām krāsvielām. CAS-64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0

**BRĪDINĀJUMI**

**Bīstami!** Uzliesmojošs. Satur etanolu, izopropilspirtu, metanolu.

H302. Kaitīgs, ja norij.

H312. Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H319. Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H371. Var izraisīt orgānu bojājumus.

H225. Viegli uzliesmojošs šķīdums un tvaiki.

Lietošanai *in vitro* diagnostikā. Nav paredzēts ārigai vai iekšķīgai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem. Nav iespējams padarīt nekaitīgu.

**PIESARDZĪBAS PASĀKUMI**

P210. Sargāt no karstuma, dzirkstelēm, atklātas uguns un karstām virsmām. Nesmēķēt.

P280. Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus/sejas aizsargus.

P260. Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smīdinājumu.

P301 + P310. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

P303 + P361 + P353. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.

P305 + P351 + P338. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P304 + P340. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

P309 + P311. Ja nokļūst saskarē vai jums ir slikta pašsajūta: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P370 + P378. Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet sausas smiltis, sausas putas, kas ir izturīgas pret ķīmiskajām vielām vai spirtu.

P403 + P233. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

P501. Atbrīvojoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/valsts/starptautiskajiem noteikumiem.

# ThinPrep™ krāsvielas EA šķīdums

Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas. Kad produkts netiek lietots, turiet tvertni cieši aizvērtu. Izmantot vietās ar pietiekamu ventilāciju. Citoloģijas paraugu, kas nav krāsoti ar ThinPrep, rezultāti nav novērtēti. Nelietojiet, ja primārais iepakojums ir bojāts.

## **PRIEKŠAPSTRĀDE**

Nav nepieciešama izšķīdināšana, sajaukšana vai atšķaidīšana.

## **GLABĀŠANA**

Glabājiet ThinPrep EA šķīdumu temperatūrā no 15 °C (59 °F) līdz 30 °C (86 °F) nodrošinātājā tvertnē. Nelietojiet ThinPrep EA šķīdumu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz tvertnes.

## **IZSKATS UN STRUKTŪRA**

Necaurspīdīgs, nesterils šķīdums.

## **PARAGU PAŅEMŠANA UN SAGATAVOŠANA**

Lietošanai kopā ar ginekoloģiskajiem citoloģijas paraugiem, kas ir apstrādāti ar jebkuru ThinPrep™ apstrādātāju.

## **PROCEDŪRA**

Konkrētus iekrāsošanas protokolus skatiet ThinPrep krāsvielas lietotāja rokasgrāmatā.

## **PROCEDŪRAS IEROBEŽOJUMI**

Produkts jālieto atbilstoši ThinPrep krāsvielas lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. ThinPrep EA šķīdumu nevar aizvietot ar kādu citu šķīdumu.

## **DROŠUMA UN VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI**

Lietojot, kā norādīts, ThinPrep EA šķīdums nokrāsos šūnu citoplazmu citoloģijas preparātos uz priekšmetstikliņiem.

Ja rodas nopietns negadījums, kas ir saistīts ar produktu vai kopā ar produktu izmantojamo daļu, ziņojiet par to Hologic tehniskā atbalsta dienestam un pacienta un/vai lietotāja reģionā esošajai kompetentajai iestādei.

Skatīt ThinPrep attēlveidošanas sistēmas operatora rokasgrāmatu.

## **LIKVIDĒŠANA**

Likvidējiet saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem.















## **PIRMĀ PALĪDZĪBA**

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: ja jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Visu drošības datu lapu skatiet [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

## **Iepriekšējās redakcijas**

Redakcija	Datums	Apraksts
AW-24896-2902 Rev. 001	03.2022.	Precizēti norādījumi. Pievienoti norādījumi saistībā ar ziņošanu par nopietniem negadījumiem.

## ThinPrep™ krāsvielas EA šķīdums

	Ražotājs		Kataloga numurs		Uzliesmojošs
	Skafīt lietošanas instrukciju		Izlietot līdz		Kairinošs, elpceļu kairinājums, ādas sensibilizators
	Medicīniskā ierīce <i>in vitro</i> diagnostikai		Partijas numurs		Elpceļu sensibilizators, mērķorgānam toksisks
	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā		Temperatūras ierobežojums		Atvērt šeit
	Daudzums		Ražots ASV		Apvienotās Karalistes atbilstības novērtējums (Lielbritānija)
EtOH	Etanols		Izstrādājums atbilst CE marķējuma prasībām saskaņā ar Regulu (ES) 2017/746 par IVD ierīcēm		

 Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 ASV • Tālr.: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

 Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Beļģija • Tālr.: +32 2 711 46 80

Sponsors Austrālijā: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Austrālija • Tālr.: 02 9888 8000

Atbildīgā persona Apvienotajā Karalistē: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Apvienotā Karaliste