

ThinPrep™ šķīdums iekrāsošanai zilā krāsā

Lietošanas instrukcija



PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

ThinPrep™ šķīdums iekrāsošanai zilā krāsā ir paredzēts lietošanai ginekoloģiskā materiāla citoloģiskās izmeklēšanas procedūrā kopā ar ThinPrep kodolu krāsvielu, ThinPrep šķīdumu krāsvielu skalošanai, ThinPrep krāsvielas Orange G šķīdumu un ThinPrep krāsvielas EA šķīdumu. Profesionālai lietošanai.

KOPSAVILKUMS UN SKAIDROJUMS

ThinPrep šķīdums iekrāsošanai zilā krāsā ir sārmais šķīdums uz ūdens bāzes, kas šūnu komponentus, kas krāsoti ar ThinPrep kodolu krāsvielu, padara tumšākus, un citoloģiskās izvērtēšanas laikā tie redzami zili/violeti.

PROCEDŪRAS PRINCIPI

Lietojot kopā ar ThinPrep krāsvielu šķīdumiem un citoloģijas preparātiem uz priekšmetstikliņiem, ThinPrep šķīdums iekrāsošanai zilā krāsā padarīs tumšākus šūnu komponentus, kas krāsoti ar ThinPrep kodolu krāsvielu, izceļot kodolu morfoloģiju.

SASTĀVS

Litija karbonāta ūdens šķīdums.

BRĪDINĀJUMI

Lietošanai *in vitro* diagnostikā.

Nav paredzēts arīgai vai iekšķīgai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem.

Saskaroties ar acīm, var izraisīt kairinājumu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Izvairieties no saskares ar acīm.

Rīkojoties ar šķīdumu, lietojiet cimdus un acu aizsardzības līdzekļus.

Kad produkts netiek lietots, turiet tvertni aizvērtu.

Citoloģijas paraugu, kas nav krāsoti ar ThinPrep, rezultāti nav novērtēti.

Nelietojiet, ja primārais iepakojums ir bojāts.

PRIEKŠAPSTRĀDE

Nav nepieciešama izšķīdināšana, sajaukšana vai atšķaidīšana.

GLABĀŠANA

Nelietotu ThinPrep šķīdumu iekrāsošanai zilā krāsā glabājiet temperatūrā no 15 °C (59 °F) līdz 30 °C (86 °F) nodrošinātājā tvertnē.

Nelietojiet ThinPrep šķīdumu iekrāsošanai zilā krāsā pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz tvertnes.

IZSKATS UN STRUKTŪRA

Dzids, nesterils šķīdums.

PARAUGU PAŅEMŠANA UN SAGATAVOŠANA

Lietošanai kopā ar ginekoloģiskajiem citoloģijas paraugiem, kas ir apstrādāti ar jebkuru ThinPrep™ apstrādātāju.

ThinPrep™ šķīdums iekrāsošanai zilā krāsā

PROCEDŪRA

Konkrētus iekrāsošanas protokolus skatiet ThinPrep krāsvielas lietotāja rokasgrāmatā.

PROCEDŪRAS IEROBEŽOJUMI

Produkts jālieto atbilstoši ThinPrep krāsvielas lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. ThinPrep šķīdumu iekrāsošanai zilā krāsā nevar aizvietot ar kādu citu šķīdumu.

DROŠUMA UN VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI

Lietojot citoloģijas preparātiem uz priekšmetstikliņiem, kā norādīts, ThinPrep šķīdums iekrāsošanai zilā krāsā padarīs tumšākus šūnu komponentus, kas krāsoti ar ThinPrep kodolu krāsvielu.

Ja rodas nopietns nelaimes gadījums, kas ir saistīts ar ierīci vai kopā ar ierīci izmantojamo daļu, ziņojiet par to Hologic tehniskā atbalsta dienestam un pacienta un/vai lietotāja reģionā esošajai kompetentajai iestādei.

Skatīt ThinPrep attēlveidošanas sistēmas operatora rokasgrāmatu.

LIKVIDĒŠANA

Likvidējiet saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Nav paredzama nelabvēlīga ietekme. Visu drošības datu lapu skatiet www.hologicds.com.

Iepriekšējās redakcijas

Redakcija	Datums	Apraksts
AW-24898-2902 Rev. 001	03.2022.	Precizēti norādījumi. Pievienoti norādījumi saistībā ar ziņošanu par nopietniem nelaimes gadījumiem.



Ražotājs



Pilnvarotais pārstāvis
Eiropas Kopienā



Partijas numurs



Skatīt lietošanas instrukciju



Kataloga numurs



Temperatūras ierobežojums



Medicīniskā ierīce *in vitro*
diagnostikai



Izlietot līdz



Atvērt šeit



Daudzums



Ražots ASV



Apvienotās Karalistes
atbilstības novērtējums
(Lielbritānija)



Izstrādājums atbilst CE marķējuma
prasībām saskaņā ar Regulu (ES)
2017/746 par IVD ierīcēm



Uzmanību! Federālajos (ASV) tiesību aktos šīs ierīces pārdošana atļauta tikai ārstam vai jebkuram citam praktizējošajam ārstam, kas ir licencēts saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā viņam ir prakse, vai pēc ārsta vai praktizējošā ārsta pasūtījuma, lai lietotu vai norādītu lietot ierīci, un kurš ir apmācīts un pieredzējis produkta lietošanā.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 ASV • Tālr.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Beļģija • Tālr.: +32 2 711 46 80

Sponsors Austrālijā: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Austrālija • Tālr.: 02 9888 8000

Atbildīgā persona Apvienotajā Karalistē: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe
Manchester M23 9HZ • Apvienotā Karaliste

ThinPrep šķīdums iekrāsošanai zilā krāsā

Lietošanas instrukcija

Latviešu AW-24898-2902 Rev. 001 03.2022.

