

ThinPrep™ šķīdums II skalošanai

Lietošanas instrukcija

UK
CA CE**PAREDZĒTĀ LIETOŠANA**

ThinPrep™ šķīdums II krāsvielu skalošanai ir paredzēts lietošanai ginekoloģiskā materiāla citoloģiskās izmeklēšanas procedūrā kopā ar ThinPrep kodolu krāsvielu, ThinPrep šķīdumu II iekrāsošanai zilā krāsā, ThinPrep krāsvielas Orange G šķīdumu un ThinPrep krāsvielas EA šķīdumu. Profesionālai lietošanai.

KOPSAVILKUMS UN SKAIDROJUMS

ThinPrep šķīdums II skalošanai ir šķīdums uz spirta bāzes, kas ļauj atbrīvoties no liekās ThinPrep kodola krāsvielas šūnu komponentos preparātos uz priekšmetstikliņiem citoloģiskai izvērtēšanai.

PROCEDŪRAS PRINCIPI

Lietojot kopā ar ThinPrep krāsvielu šķīdumiem un citoloģijas preparātiem uz priekšmetstikliņiem, ThinPrep šķīdums II skalošanai ļaus atbrīvoties no liekās ThinPrep kodolu krāsvielas šūnu komponentos, uzlabojot kodolu krāsojumu un padarot citoplazmas saturu skaidrāku.

SASTĀVS

Etilspirta, etilēnglikolu un izopropanolu šķīdums. CAS 64-17-5, CAS 107-21-1, CAS 67-63-0

BRĪDINĀJUMI

Bīstams. Uzliesmojošs. Satur etilspirtu, etilēnglikolu.

H302. Kaitīgs, ja norij.

H319. Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H225. Viegli uzliesmojošs šķīdums un tvaiki.

Lietošanai *in vitro* diagnostikā. Nav paredzēts ārīgai vai iekšējīgai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

P210. Sargāt no karstuma, dzirkstelēm, atklātas uguns un karstām virsmām. Nesmēķēt.

P280. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P308 + P313. JA saskaras vai saistīts ar: sazinieties ar ārstu.

P301 + P312. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P305 + P351 + P338. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņem kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P302 + P352. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P403 + P233. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

P370 + P378. Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet sausas smiltis, sausas putas, kas ir izturīgas pret ķīmiskajām vielām vai spirtu.

P501. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/valsts/starptautiskajiem noteikumiem.

PRIEKŠAPSTRĀDE

Nav nepieciešama izšķīdināšana, sajaukšana vai atšķaidīšana.

ThinPrep™ šķīdums II skalošanai

GLABĀŠANA

Glabājiet nelietotu ThinPrep šķīdumu II skalošanai temperatūrā no 15 °C (59 °F) līdz 30 °C (86 °F) nodrošinātājā tvertnē vēsā, sausā, labi ventilētā vietā prom no siltuma avotiem, uzliesmojošiem materiāliem, tiešas saules gaismas un nesaderīgām vielām. Nelietojiet ThinPrep šķīdumu II skalošanai pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz tvertnes.

IZSKATS UN STRUKTŪRA

Dzids, nesterils šķīdums.

PARAUGU PAŅEMŠANA UN SAGATAVOŠANA

Lietošanai kopā ar ginekoloģiskajiem citoloģijas paraugiem, kas ir apstrādāti ar jebkuru ThinPrep™ apstrādātāju.

PROCEDŪRA

Konkrētus iekrāsošanas protokolus skatiet ThinPrep krāsvielas lietotāja rokasgrāmatā.

PROCEDŪRAS IEROBEŽOJUMI

Produkts jālieto atbilstoši ThinPrep krāsvielas lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. ThinPrep šķīdumu II skalošanai nevar aizvietot ar kādu citu šķīdumu.

DROŠUMA UN VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI

Lietojot citoloģijas preparātiem uz priekšmetstikliņiem, kā norādīts, ThinPrep šķīdums II skalošanai ļauj atbrīvoties no liekās ThinPrep kodola krāsvielas šūnu komponentos.

Ja rodas nopietns negadījums, kas ir saistīts ar ierīci vai kopā ar ierīci izmantojamo daļu, ziņojiet par to Hologic tehniskā atbalsta dienestam un pacienta un/vai lietotāja reģionā esošajai kompetentajai iestādei.

Skatīt ThinPrep attēlveidošanas sistēmas operatora rokasgrāmatu.

LIKVIDĒŠANA

Likvidējiet saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: ja jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Visu drošības datu lapu skatiet www.hologicsds.com.

Iepriekšējās redakcijas

Redakcija	Datums	Apraksts
AW-24900-2902 Rev. 001	03.2022.	Precizēti norādījumi. Pievienoti norādījumi saistībā ar ziņošanu par nopietniem nelaimes gadījumiem.

ThinPrep™ šķīdums II skalošanai



Ražotājs



Kataloga numurs



Uzliesmojošs



Skatīt lietošanas instrukciju



Izlietot līdz



Kairinošs, elpceļu kairinājums, ādas sensibilizators



Medicīniskā ierīce *in vitro* diagnostikai



Partijas numurs



Atvērt šeit



Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā



Temperatūras ierobežojums



Daudzums



Ražots ASV



Apvienotās Karalistes atbilstības novērtējums (Lielbritānija)

EtOH Etanols



Izstrādājums atbilst CE marķējuma prasībām saskaņā ar Regulu (ES) 2017/746 par IVD ierīcēm



Uzmanību! Federālajos (ASV) tiesību aktos šīs ierīces pārdošana atļauta tikai ārstam vai jebkuram citam praktizējošajam ārstam, kas ir licencēts saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā viņam ir prakse, vai pēc ārsta vai praktizējošā ārsta pasūtījuma, lai lietu vai norādītu lietot ierīci, un kurš ir apmācīts un pieredzējis produkta lietošanā.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 ASV • Tālr.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Beļģija • Tālr.: +32 2 711 46 80

Sponsors Austrālijā: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Austrālija • Tālr.: 02 9888 8000

Atbildīgā persona Apvienotajā Karalistē: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Apvienotā Karaliste