

ThinPrep™ šķīdums II iekrāsošanai zilā krāsā

Lietošanas instrukcija



PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

ThinPrep™ šķīdums II iekrāsošanai zilā krāsā ir paredzēts lietošanai ginekoloģiskā materiāla citoloģiskās izmeklēšanas procedūrā kopā ar ThinPrep kodolu krāsvielu, ThinPrep šķīdumu II krāsvielu skalošanai, ThinPrep krāsvielas Orange G šķīdumu un ThinPrep krāsvielas EA šķīdumu. Profesionālai lietošanai.

KOPSAVILKUMS UN SKAIDROJUMS

ThinPrep šķīdums II iekrāsošanai zilā krāsā ir sārmais šķīdums uz ūdens bāzes, kas šūnu komponentus, kas krāsoti ar ThinPrep kodolu krāsvielu, padara tumšākus, un citoloģiskās izvērtēšanas laikā tie redzami zili/violeti.

PROCEDŪRAS PRINCIPI

Lietojot kopā ar ThinPrep krāsvielu šķīdumiem un citoloģijas preparātiem uz priekšmetstikliņiem, ThinPrep šķīdums II iekrāsošanai zilā krāsā padarīs tumšākus šūnu komponentus, kas krāsoti ar ThinPrep kodolu krāsvielu, izceļot kodolu morfoloģiju.

SASTĀVS

Trīs buferšķīdums uz ūdens bāzes.

BRĪDINĀJUMI

Lietošanai *in vitro* diagnostikā.

Nav paredzēts ārīgai vai iekšīgai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem. Var izraisīt acu kairinājumu. Var izraisīt ādas kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var būt kaitīgs norijot.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

Kad produkts netiek lietots, turiet tvertni cieši aizvērtu.

Citoloģijas paraugu, kas nav krāsoti ar ThinPrep, rezultāti nav novērtēti.

Nelietojiet, ja primārais iepakojums ir bojāts.

PRIEKŠAPSTRĀDE

Nav nepieciešama izšķīdināšana, sajaukšana vai atšķaidīšana.

GLABĀŠANA

Glabājiet nelietotu ThinPrep šķīdumu II iekrāsošanai zilā krāsā temperatūrā no 15 °C (59 °F) līdz 30 °C (86 °F) nodrošinātājā tvertnē vēsā, sausā, labi ventilētā vietā prom no siltuma avotiem, uzliesmojošiem materiāliem un nesaderīgām vielām. Nelietojiet ThinPrep šķīdumu II iekrāsošanai zilā krāsā pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz tvertnes.

IZSKATS UN STRUKTŪRA

Dzidrs, nesterils šķīdums.

PARAUGU PAŅEMŠANA UN SAGATAVOŠANA

Lietošanai kopā ar ginekoloģiskiem citoloģijas paraugiem, kas ir apstrādāti ar jebkuru ThinPrep™ apstrādātāju.

PROCEDŪRA

Konkrētus iekrāsošanas protokolus skatiet ThinPrep krāsvielas lietotāja rokasgrāmatā.

ThinPrep™ šķīdums II iekrāsošanai zilā krāsā

PROCEDŪRAS IEROBEŽOJUMI

Produkts jālieto atbilstoši ThinPrep krāsvielas lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. ThinPrep šķīdumu II iekrāsošanai zilā krāsā nevar aizvietot ar kādu citu šķīdumu.

DROŠUMA UN VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI

Lietojot citoloģijas preparātiem uz priekšmetstikliņiem, kā norādīts, ThinPrep šķīdums II iekrāsošanai zilā krāsā padarīs tumšākus šūnu komponentus, kas krāsoti ar ThinPrep kodolu krāsvielu.

Ja rodas nopietns negadījums, kas ir saistīts ar ierīci vai kopā ar ierīci izmantojamo daļu, ziņojiet par to Hologic tehniskā atbalsta dienestam un pacienta un/vai lietotāja reģionā esošajai kompetentajai iestādei.

Skatīt ThinPrep attēlveidošanas sistēmas operatora rokasgrāmatu.

LIKVIDĒŠANA

Likvidējiet saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.

Visu drošības datu lapu skatiet www.hologicsds.com.

Iepriekšējās redakcijas

Redakcija	Datums	Apraksts
AW-24902-2902 Rev. 001	03.2022.	Precizēti norādījumi. Pievienoti norādījumi saistībā ar ziņošanu par nopietniem nelaimes gadījumiem.



Ražotājs



Kataloga numurs



Partijas numurs



Skatīt lietošanas instrukciju



Izlietot līdz



Temperatūras ierobežojums



Medicīniskā ierīce *in vitro* diagnostikai



Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā



Atvērt šeit



Ražots ASV



Apvienotās Karalistes atbilstības novērtējums (Lielbritānija)



Daudzums



Izstrādājums atbilst CE marķējuma prasībām saskaņā ar Regulu (ES) 2017/746 par IVD ierīcēm



Uzmanību! Federālajos (ASV) tiesību aktos šīs ierīces pārdošana atļauta tikai ārstam vai jebkurai citam praktizējošajam ārstam, kas ir licencēts saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā viņam ir prakse, vai pēc ārsta vai praktizējošā ārsta pasūtījuma, lai lietotu vai norādītu lietot ierīci, un kurš ir apmācīts un pieredzējis produkta lietošanā.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 ASV • Tālr.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Beļģija • Tālr.: +32 2 711 46 80

Sponsors Austrālijā: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Austrālija • Tālr.: 02 9888 8000

Atbildīgā persona Apvienotajā Karalistē: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Apvienotā Karaliste

ThinPrep šķīdums II iekrāsošanai zilā krāsā

Lietošanas instrukcija

Latviešu AW-24902-2902 Rev. 001 03.2022.

