

Artwork and Signature File for:



MAN-05480-702 “MNL, TRIDENT HD, QUICK REFERENCE GUIDE, ITALIAN”

Artwork consists of:

- Two (2) 11 inch x 17 inch sheet(s) attached.

REV AUTHORED BY	DATE	HOLOGIC [®]	 SIGNATURES ON FILE	
S.HOLMES	12/3/19			
REV DRAFTED BY	DATE			
S.HOLMES	12/3/19			
PROPRIETARY INFORMATION: The content of this document is the exclusive property of Hologic and may not, without prior written permission of Hologic, be reproduced, copied or used for any purpose whatsoever.		TITLE	DOCUMENT NUMBER	REV
		AW, MNL, TRIDENT HD, QUICK REFERENCE GUIDE, ITALIAN	AW-17491-702	004
		ARTWORK	SIZE A	SHEET 1 OF 1

10 Riesaminare l'immagine.

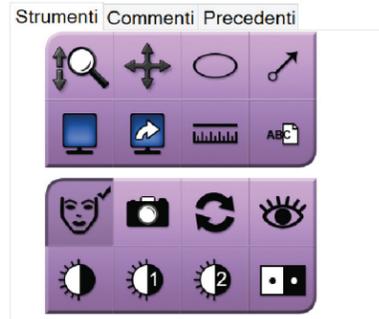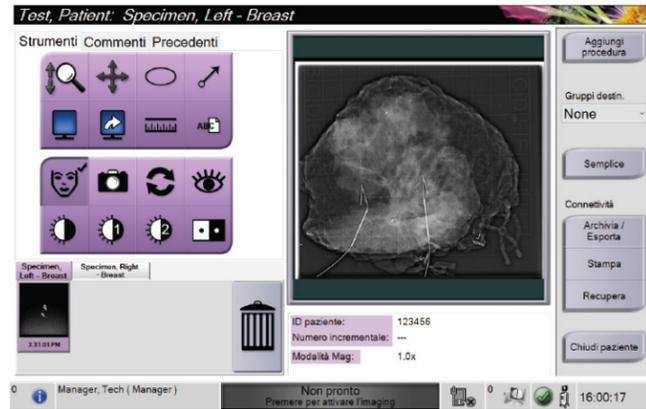


11



Archiviare o esportare le immagini, quindi chiudere la cartella paziente.



12 Rimuovere il vassoio portacampioni dall'unità di imagingografia. Seguire i criteri della struttura per la gestione dei campioni.

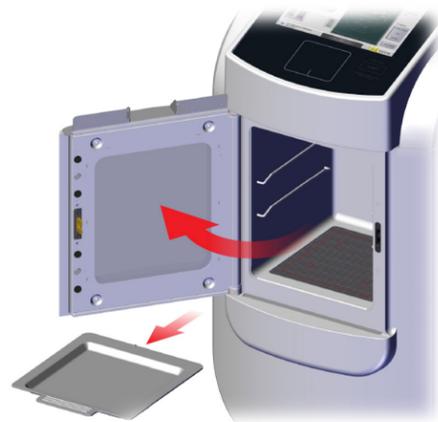

13 Spegner il sistema.

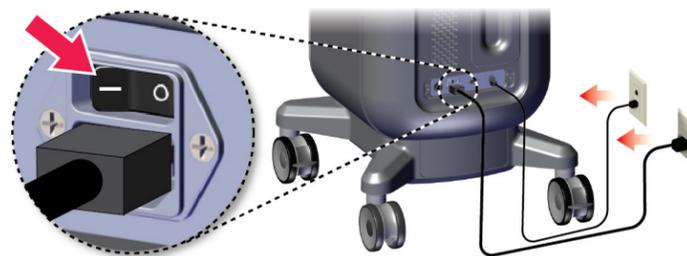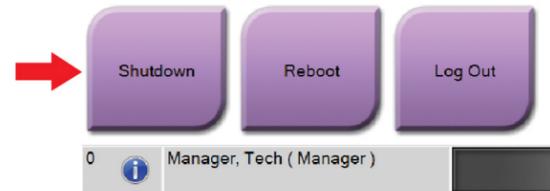

Faxitron™ Trident® HD

Specimen Radiography System

GUIDA RAPIDA DI RIFERIMENTO



- 1 Schermo di visualizzazione delle immagini
- 2 Display di comando con Touchpad integrato e Pulsante di attivazione dei raggi X
- 3 Unità di imagingografia

! Per informazioni di sicurezza e istruzioni complete, consultare la Guida dell'utente.


1 Spostare la console nella posizione corretta.



2 Bloccare le ruote.



3 Collegare il sistema all'alimentazione e alla rete.

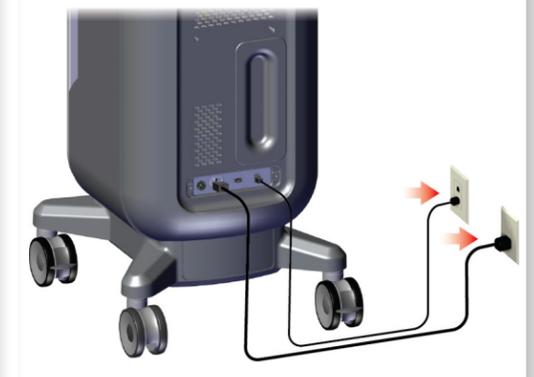

Hologic Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
Tel: +1.877.371.4372



Brazilian Contact: Imex Medical Group do Brasil
Rua das Embaúbas, 601- Fazenda Santo Antônio
São José /SC - Brasil - 88104-561
+55 48 3251-8800
www.imexmedicalgroup.com.br

HOLOGIC®


Per ulteriori sedi in altri paesi consultare il sito Web della società.
© 2019 Hologic, Inc. Stampato negli USA. Questo manuale è stato originariamente scritto in inglese.

Hologic, Faxitron, Trident e i logo associati sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Hologic, Inc., e/o delle sue sussidiarie negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi commerciali, marchi registrati e nomi di prodotto sono dei rispettivi titolari. Questo prodotto può essere protetto da uno o più brevetti statunitensi e/o di altri Paesi identificati sul sito Web www.Hologic.com/patents..



4 Avviare il sistema ed effettuare il login.

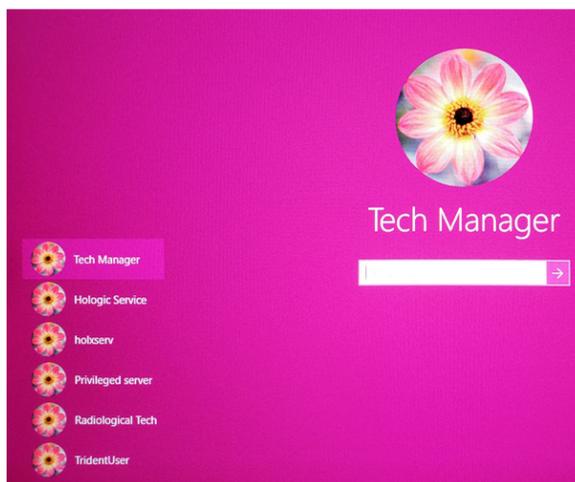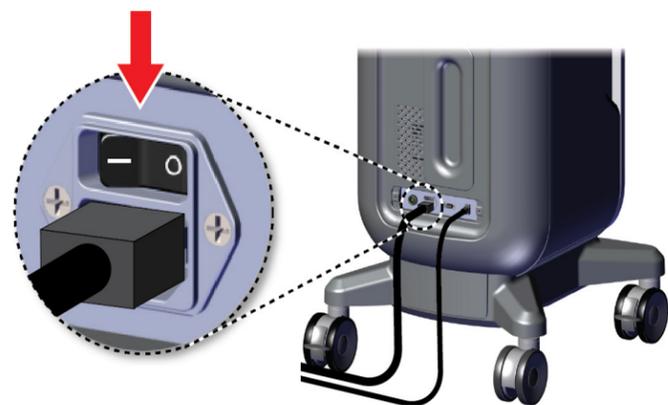


5 Selezionare paziente e procedura.

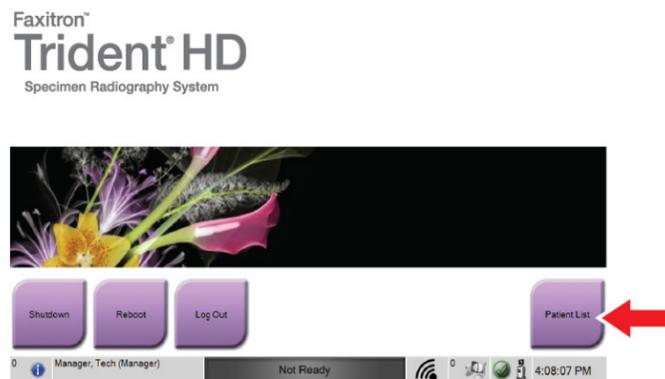


Nome	Data di nascita	Esame
Patient patient*Test	08/04/1973	Specimen, Un...
Test*Patient	02/01/1965	Specimen, Left...
Patient*Test	04/02/1979	Specimen, Rig...
Test test*Patient	06/03/1962	Specimen, Left...

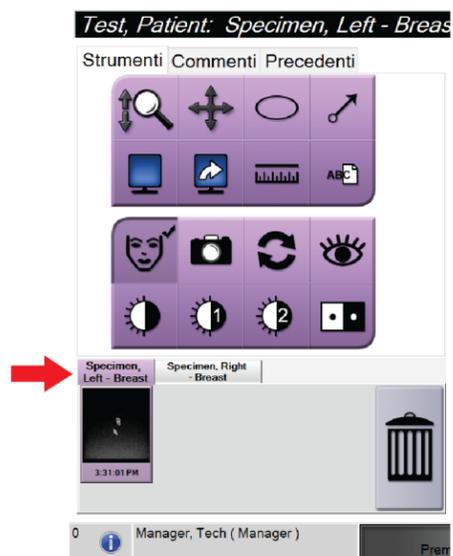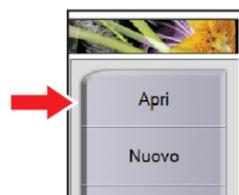

6 Preparare il campione conformemente ai criteri della struttura e centrarlo sul vassoio portacampioni.

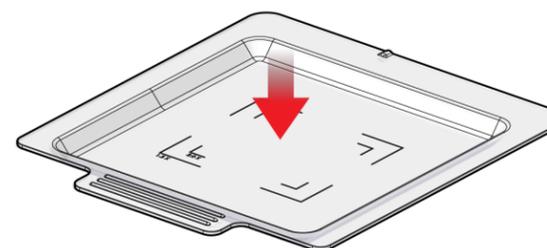

7 Posizionare il vassoio portacampioni nell'unità di immaginografia per ottenere il livello di ingrandimento richiesto.

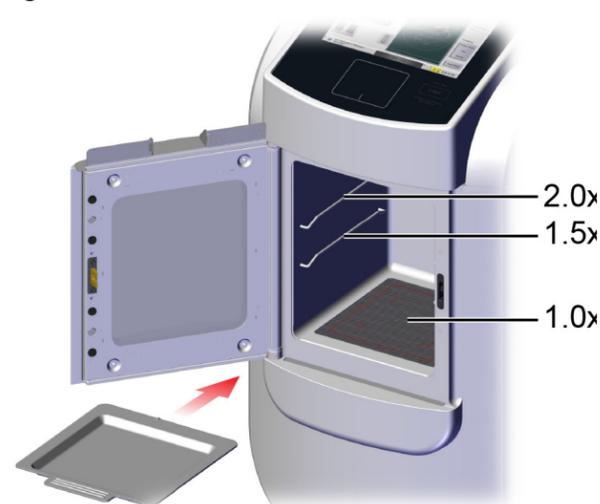

8 Chiudere lo sportello.



9 Acquisire l'immagine.

