



**Artwork and Signature File for:**


**MAN-05480-802 “MNL, TRIDENT HD, QUICK REFERENCE GUIDE, GERMAN”**

Artwork consists of:

- Two (2) 11 inch x 17 inch sheet(s) attached.


REV AUTHORED BY	DATE			
S.HOLMES	12/3/19			
REV DRAFTED BY	DATE			
S.HOLMES	12/3/19			
PROPRIETARY INFORMATION: The content of this document is the exclusive property of Hologic and may not, without prior written permission of Hologic, be reproduced, copied or used for any purpose whatsoever.	TITLE	DOCUMENT NUMBER	REV	
	AW, MNL, TRIDENT HD, QUICK REFERENCE GUIDE, GERMAN	AW-17491-802	004	
	ARTWORK	SIZE A	SHEET 1 OF 1	

10 Überprüfen Sie das Bild.

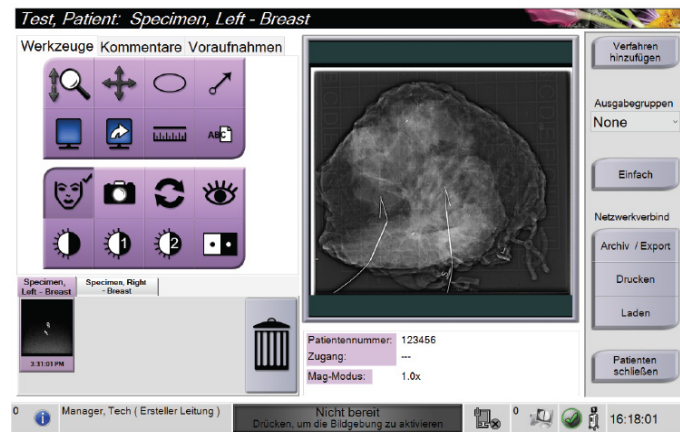


11 Archivieren oder exportieren Sie die Bilder und schließen Sie dann den Patienten.



Archivieren oder exportieren Sie die Bilder und schließen Sie dann den Patienten.

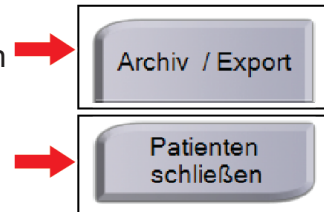

12 Nehmen Sie das Probenblett aus der Bildgebungskonsole heraus. Befolgen Sie bei der Handhabung der Proben die Richtlinien der Einrichtung.

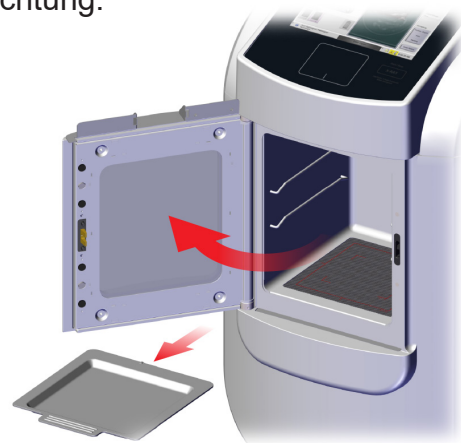

13 Schalten Sie das System aus.

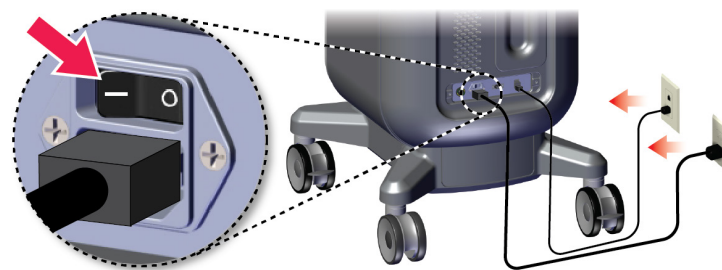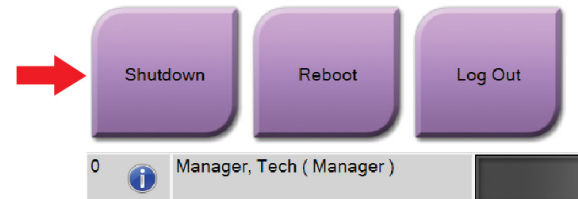

# Faxitron™ Trident® HD

## Specimen Radiography System

### KURZANLEITUNG



- 1 Bildanzeige-Monitor
- 2 Kontrollanzeige mit integriertem Touchpad und Aktivierungstaste „Röntgen“
- 3 Bildgebungskonsole

**! Sicherheitsinformationen und vollständige Anleitungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.**


1 Bringen Sie die Konsole in die korrekte Position.



2 Stellen Sie die Laufrollen fest.



3 Schließen Sie das System an das Stromnetz und das Netzwerk an.

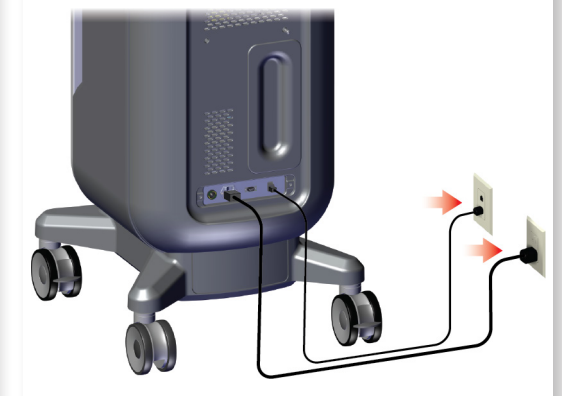

Hologic Inc.  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA  
Tel: +1.877.371.4372



Brazilian Imex Medical Group do Brasil  
Contact: Rua das Embaúbas, 601- Fazenda  
Santo Antônio  
São José /SC - Brasil - 88104-561  
+55 48 3251-8800  
www.imexmedicalgroup.com.br

**HOLOGIC®**

Weitere internationale Standorte können Sie auf unserer Unternehmenswebseite finden.  
© 2019 Hologic, Inc. Gedruckt in den USA. Diese Bedienungsanleitung wurde ursprünglich in der englischen Sprache verfasst.


Hologic Faxitron, Trident und zugehörige Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle Marken, eingetragenen Marken und Produktnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.  
Dieses Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische oder ausländische Patente, wie unter [www.Hologic.com/patents](http://www.Hologic.com/patents) angegeben, geschützt sein.

4 Starten Sie das System und melden Sie sich an.

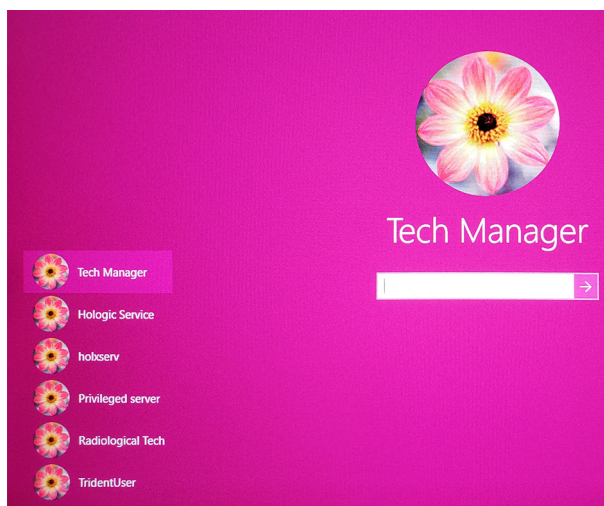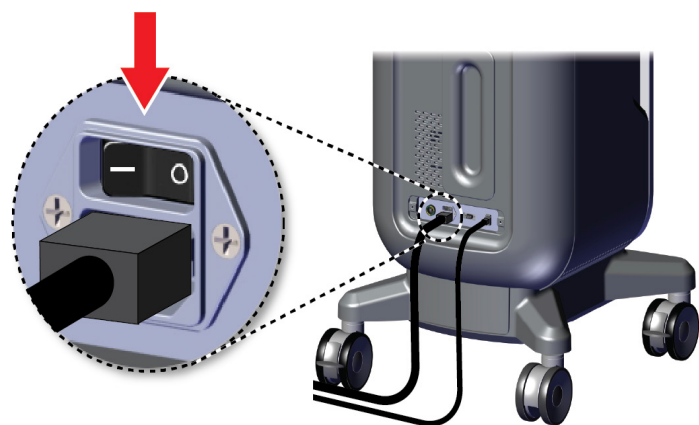

5 Wählen Sie den Patienten und das Verfahren aus.


Faxitron®  
Trident® HD  
Specimen Radiography System

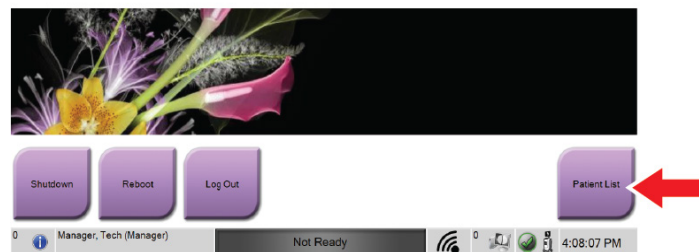


Name	Geburtsdatum	Untersuchung
Patient patient*Test	08.04.1973	Specimen, Un...
Test*Patient	02.01.1965	Specimen, Left...
Patient*Test	04.02.1979	Specimen, Rig...
Test test*Patient	06.03.1962	Specimen, Left...




6 Bereiten Sie die Probe gemäß der Richtlinie der Einrichtung vor und zentrieren Sie sie auf dem Probenblett.

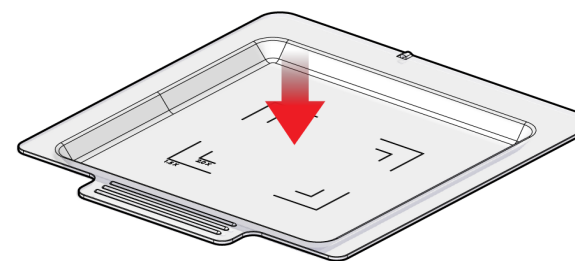

7 Positionieren Sie das Probenblett entsprechend der gewünschten Vergrößerung in der Bildgebungskonsole.

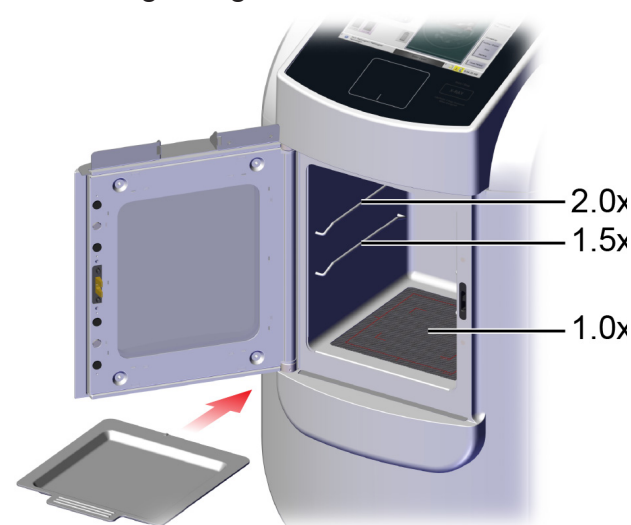

8 Schließen Sie die Tür.

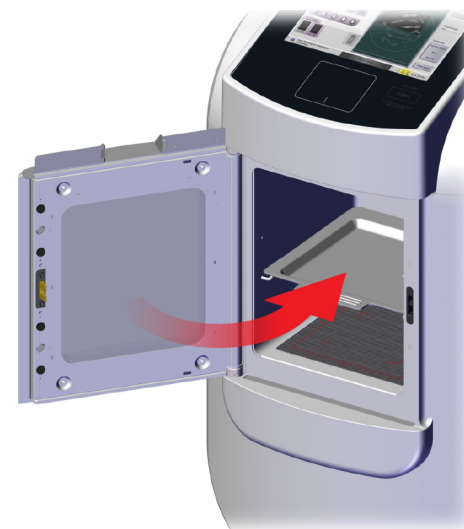

9 Nehmen Sie das Bild auf.

