

**Patsiendilt kogutud proovide jaoks kogumiskomplekti Hologic® RespDirect™
kasutusjuhised**

ÜLDJUHISED NINAKAAPE PROOVIDE KOGUMISEKS JA KÄITLEMISEKS


Usaldusväärsete tulemuste saamiseks järgige protseduure hoolikalt. Kui teil on protseduuri kohta küsimusi, pöörduge tervishoiuteenuse osutaja poole.

1. Peske enne alustamist käed. Kui seep ja vesi pole käepärast, kasutage desinfitseerivat ainet.
2. Avage komplekti pakend. Eemaldage tampoon ja katsuti. Pange katsuti kõrvale, enne kui hakkate koguma juhiste kohaselt proovi või proove, mida tervishoiuteenuse osutaja on palunud.
3. Kasutage ainult kaasasolevat tampooni. Kaasasoleva tampooni mittekasutamine võib muuta analüüsitulemused kehtetuks.
4. Ärge kasutage, kui tampoon, katsuti või pakend on nähtavalt kahjustunud (nt kui tampooni ots või vars on paindunud või katki).
5. Ärge painutage ega muutke tampooni kuju enne kogumist. Ärge kasutage proovi võtmisel liigset jõudu, survet ega painutage seda, kuna selle tulemusel võib tampoon kogemata katki minna.
6. Ärge kandke transpordikatsutis olevat sisu otse nahale või limaskestale ega võtke sisse.
7. Kui transpordikatsuti sisu voolab kogumise ajal maha, kasutage uue proovi kogumiseks uut kogumiskomplekti Hologic RespDirect. Uue komplekti mittekasutamine võib muuta analüüsi tulemused kehtetuks.
8. Ärge kasutage komplekti proovi kogumiseks pärast selle aegumiskuupäeva.

NINAKAAPE PROOVIDE KOGUMINE JA KÄITLEMINE

Märkus patsiendile. Kui teil on protseduuri kohta küsimusi, pöörduge tervishoiuteenuse osutaja poole.

Ninakaape proovi kogumise juhised:

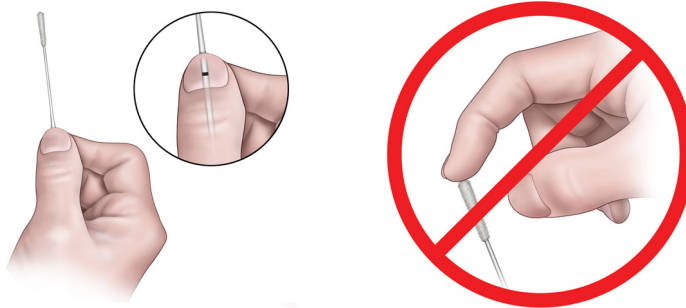

1. Avage tampooni pakend osaliselt. Eemaldage tampoon. Ärge puudutage pehmet otsa ega asetage tampooni käest. Kui pehmet otsa puudutatakse või pillatakse see maha, siis visake kogumiskomplekt Hologic RespDirect ära ja võtke uus.
2. Hoidke tampoonist, asetades põidla ja nimetissõrme tampooni varrel sälguga joonele.

Märkus: Tegelik toode võib selles jaotises näidatust veidi erineda.




3. Sisestage tampoon ettevaatlikult esimesse ninasõõrmesse, kuni tamponi ots pole enam nähtav (st 1,25–2 cm või $\frac{1}{2}$ kuni $\frac{3}{4}$ tolli sügavusele). Pöörake tamponi mõõduka survega ja suruge võimalikult vastu ninasõõrme seina, tehke nina sees suuri ringikujulisi liigutusi vähemalt neli korda (ligikaudu 10–15 sekundit), puutudes vastu ninaseina, seejärel eemaldage see ninasõõrmest. Jätkake proovi võtmist teisest ninasõõrmest, kasutades sama tamponi.¹

Märkus: Tamponi lihtsalt vastu ühte ninaseina keerutamine või tamponi 10–15 sekundiks ninna jätmine ei ole õige tehnika ja selle tulemuseks võib olla mittepiisav proov.

Märkus: Peate võtma proovi mõlemast ninasõõrmest.


4. Hoides tamponi sama käega, keerake katsuti kork lahti. Ärge laske katsuti sisul välja voolata. Kui katsuti sisu voolab kogumise ajal maha, kasutage uue proovi kogumiseks uut kogumiskomplekti Hologic RespDirect.

Hoiatus: Kui puutute kokku katsutis oleva vedelikuga, peske käsi vee ja seebiga 30 sekundit.

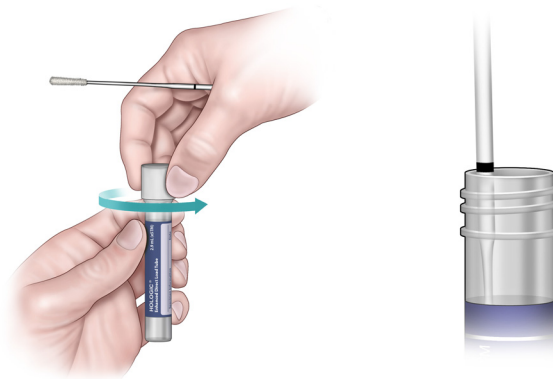

5. Asetage tampoon kohe transpordikatsutisse, nii et sälguga joon oleks katsuti ülaosas.
6. Murdke tamponi vars ettevaatlikult sälguga joone juurest vastu katsuti külge ära.
7. Visake tamponi varre ülemine osa ära.

¹ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html>

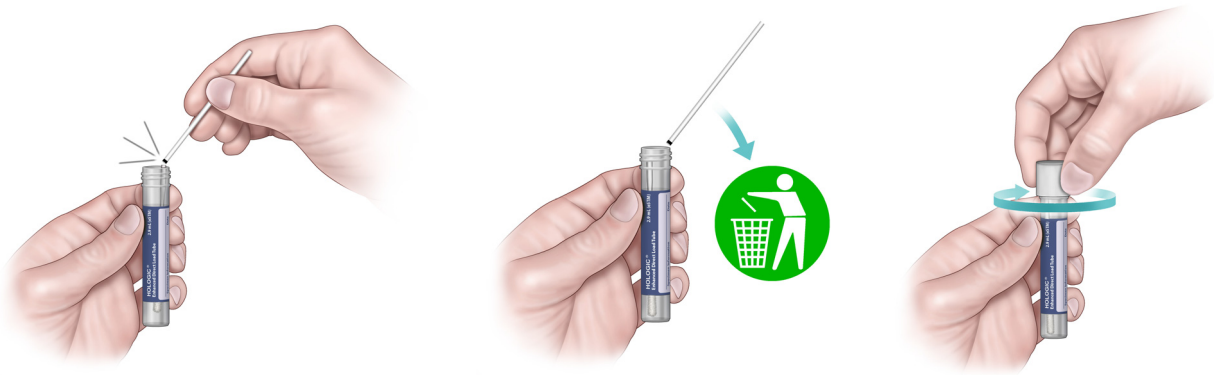

8. Keerake kork tihedalt katsutile.

Märkus: Katsuti sildil on ala prooviallika märkimiseks.

Kontaktteave ja muudatuste ajalugu



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Riigispetsiifilised tehnilise toe ja klienditeeninduse e-posti aadressid ja telefoninumbrid leiate aadressilt www.hologic.com/support.

Kõikidest seadmega seotud tõsistest vahejuhtumisest Euroopa Liidus tuleb teavitada tootjat ning kasutaja ja/või patsiendi asukohajärgse liikmesriigi pädevat asutust.

Hologic ja seotud logod on ettevõtte Hologic, Inc. ja/või selle tütarettevõtete kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Kõik muud kaubamärgid, mis võivad sellel pakendi infolehel esineda, kuuluvad nende omanikele.

Toode võib olla ühe või enama USA patendi kaitse all, mis on välja toodud veebisaidil www.hologic.com/patents.

©2023 Hologic, Inc. Kõik õigused kaitstud.

AW-29024-2701 Rev. 002

2023-07

Muudatuste ajalugu	Kuupäev	Kirjeldus
AW-29024 Rev. 001	Mai 2023	• Algne väljalase
AW-29024 Rev. 002	Juuli 2023	• Updates to translations only for administrative update. No change to content. (Tõlgete uuendamine ainult halduslikuks ajakohastamiseks. Sisulisi muudatusi ei tehta.)