

Aptima prøvetakingssett med vattpinner for begge kjønn, for endocervikale prøver og urinprøver fra menn

Til *in vitro* diagnostisk bruk.

Kun for eksport til USA.

Beregnet bruk

Aptima prøvetakingssett med vattpinner for begge kjønn, for endocervikale prøver fra kvinner og urinprøver fra menn, er beregnet for bruk med Aptima-analyser. Aptima prøvetakingssett med vattpinner for begge kjønn er beregnet for samling av endocervikale prøver fra kvinner eller urinprøver fra menn.

Materiale som leveres

50 Aptima prøvetakingssett med vattpinner, for begge kjønn, for endocervikale prøver og urinprøver fra menn (Kat. nr. 301041)

Hvert sett inneholder:

Komponent	Kvantitet	Beskrivelse
Vattpinne for prøvetaking for begge kjønn	1	Vattpinne for endocervikale prøver eller urinprøver fra menn.
Vattpinne for rengjøring	1	Rengjøringsvattpinne for kvinner.
Transportrør	1	Rør inneholdende Aptima transportmedium for vattpinne (2,9 ml).

Advarsler og forholdsregler

- A. Transportmedium skal ikke brukes direkte på hud eller slimhinner eller brukes innvortes.

Krav til oppbevaring av prøvetakingssett

Oppbevar prøvetakingssettet ved romtemperatur (15 °C til 30 °C).

Vattpinneprøvens ytelse

Analyseytelsesegenskapene for endocervikale vattpinneprøver fra kvinner og urinvattpinneprøver fra menn finnes i pakningsvedlegget for den passende Aptima-analysen. Pakningsvedlegget for Aptima-analysen kan du finne online på www.hologic.com. Ytelsen av den mannlige urinvattpinneprøven har ikke blitt etablert for alle Aptima-analyser.

Innsamling og håndtering av prøver

- A. Endocervikale vattpinneprøver

Merknad: Hvis innholdet i røret søles ut, må røret kastes og byttes ut med et nytt Aptima-transportrør til unisex-vattpinner.

- Fjern slim fra livmorhalsåpningen og omgivende mucosa ved bruk av rengjøringsvattpinnen (vattpinnen med hvitt skaft i pakningen med rødt trykk). Kast denne vattpinnen.
Merk: For å fjerne slim fra livmorhalsåpningen, kan en vattpinne med stor spiss (medfølger ikke) brukes.
- Sett inn vattpinnen for prøvetaking (vattpinne med blått skaft i pakningen med grønt trykk) i den endocervikale kanalen.
- Roter vattpinnen forsiktig i retning med klokken i 10 til 30 sekunder i den endocervikale kanalen for å sikre nok prøve.
- Trekk ut vattpinnen forsiktig, unngå kontakt med vaginal mukosa.

5. Ta av lokket fra vattpinneprøvens transportrør og plasser øyeblikkelig vattpinnen for prøvetaking i transportrøret.
6. Knekk forsiktig vattpinnens skaft ved den hakkede linjen mot siden av røret, og kast den øverste delen av vattpinnens skaft, mens du utviser forsiktighet for å ikke søle innholdet.
7. Sett på lokket på vattpinneprøvens transportrør og stram godt.

B. Urinvattpinneprøver fra menn

1. Pasienten må ikke ha urinert i løpet av minst 1 time før prøvetakingen finner sted.
2. Sett ivattpinnen for prøvetaking (vattpinne med blått skaft i pakningen med grønt trykk) 2 til 4 cm inn i uretra.
3. Roter vattpinnen forsiktig i retning med klokken i 2 til 3 sekunder i uretra for å sikre nok prøve.
4. Trekk ut vattpinnen forsiktig.
5. Ta av lokket fra vattpinneprøvens transportrør og plasser øyeblikkelig vattpinnen for prøvetaking i transportrøret.
6. Knekk forsiktig vattpinnens skaft ved den hakkede linjen mot siden av røret, og kast den øverste delen av vattpinnens skaft, mens du utviser forsiktighet for å ikke søle innholdet.
7. Sett på lokket på vattpinneprøvens transportrør og stram godt.

Oppbevaring og transport av prøver

Etter prøvetaking, transporter og oppbevar vattpinnen i vattpinneprøvens transportrør ved 2 °C til 30 °C frem til testing. Prøver må analyseres med Aptima-analysen innen 60 dager etter prøvetaking. Se pakningsvedlegg for passende Aptima-analyse ved behov for lengre oppbevaring.

Merk: Prøvematerialer må forsendes i tråd med gjeldende nasjonale og internasjonale transportbestemmelser.

Begrensninger

- A. Bruk dette prøvetakingssettet kun med Aptima-analyser. Ytelsen med andre produkter er ikke vurdert.
- B. Ytelsen av den mannlige urinvattpinneprøven har ikke blitt etablert for Aptima Trichomonas vaginalis-analysen.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Kundestøtte: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Du finner flere kontaktopplysninger på www.hologic.com.

Hologic, Aptima, og Aptima Combo 2 er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Alle andre varemerker som kan finnes i dette pakningsvedlegget, eies av sine respektive eiere.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

© 2001–2017 Hologic, Inc. Med enerett.

502135NO Rev. 004

2017-04