


Aptima® Kit de recolección de muestras de hisopado para múltiples análisis


Guía del procedimiento de recolección para la paciente

Recolección de muestras de hisopado vaginal

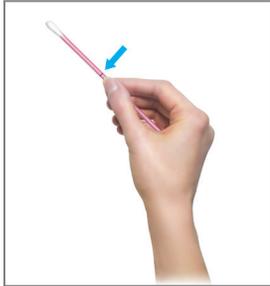

Lávese las manos antes de comenzar. Si tiene alguna pregunta sobre este procedimiento, consulte a su proveedor de atención médica.

Desprenda parcialmente el paquete del hisopo y retire el hisopo. No toque la punta blanda ni apoye el hisopo. **Si toca la punta blanda, apoya el hisopo o se le cae, solicite un nuevo kit de recolección de muestras de hisopado para múltiples análisis Aptima.** Sujete el hisopo, colocando el pulgar y el índice en el medio del mango del hisopo sobre la ranura negra.

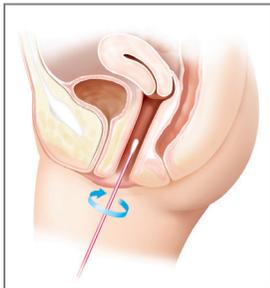

Introduzca con cuidado el hisopo en el orificio de la vagina, unas 2 pulgadas (5 cm), y gire suavemente el hisopo durante 10 a 30 segundos. Asegúrese de que el hisopo toque las paredes de la vagina, de modo tal que absorba la humedad. Retire el hisopo sin tocar la piel.



Mientras sujeta el hisopo con la mano, desenrosque la tapa del tubo. No derrame el contenido del tubo. **Si se derrama el contenido del tubo, solicite un nuevo kit de recolección de muestras de hisopado para múltiples análisis Aptima.** Coloque de inmediato el hisopo en el tubo de transporte, de modo tal que la ranura negra quede en la parte superior del tubo. Alinee la ranura con el borde superior del tubo y parta cuidadosamente el mango del hisopo. El hisopo caerá al fondo del frasco. Deseche la parte superior del mango.



Enrosque la tapa bien ajustada al tubo.
Devuelva el tubo según las indicaciones de su proveedor de atención médica.

Hologic brinda esta guía del procedimiento de recolección como una herramienta informativa general únicamente; no es una indicación afirmativa ni una garantía de cumplimiento. Es responsabilidad exclusiva del médico clínico leer y entender el prospecto apropiado, y cumplir con las normas y regulaciones locales, estatales y federales vigentes.

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | +1.888.484.4747

DS-09716-301 Rev. 003 © 2017 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados. Hologic, The Science of Sure, Aptima y los logotipos asociados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. o sus filiales en Estados Unidos u otros países. Esta información está destinada a los profesionales médicos de los EE. UU. y otros mercados, y no tiene como fin ofrecer ni promocionar productos donde tales actividades estén prohibidas. Dada la distribución del material de Hologic a través de sitios web, retransmisiones electrónicas y exhibiciones comerciales, no siempre es posible controlar dónde aparece dicho material. Para obtener información específica sobre cuáles son los productos que están a la venta en un país en particular, póngase en contacto con su representante de Hologic o escriba a diagnostic.solutions@hologic.com.