

# Aptima<sup>®</sup> Multitest 棉棒檢體採集套組


## 患者採集程序指南

### 陰道棉棒檢體的採集




**開始採集前先洗手。如果您對此程序有任何疑問，請詢問您的醫療保健提供者。**

將棉棒包裝撕開一部分，再取出棉棒。請勿碰觸軟質棉棒頭或平放棉棒。**如果碰到了軟質棉棒頭、平放了棉棒或將其掉落，請索取新的 Aptima Multitest 棉棒檢體採集套組。**將拇指和食指放在棉棒柄中間有黑色劃痕線處，捏住棉棒。

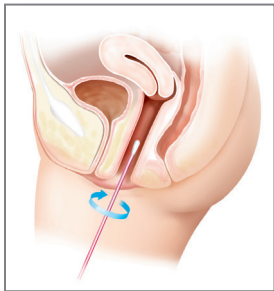

小心將棉棒伸入陰道口內約 2 英寸（5 公分）處，然後輕輕旋轉棉棒 10 到 30 秒。確保棉棒碰觸陰道壁，讓棉棒吸收其上水分。抽出棉棒，不要讓其碰觸到皮膚。

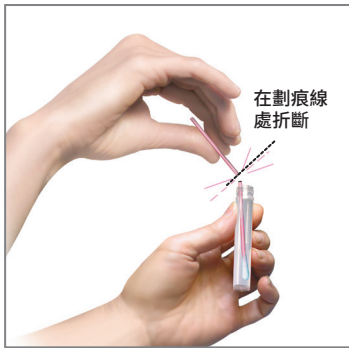

手中握住棉棒時，旋開試管蓋。請勿濺灑試管內內容物。**若試管內容物灑出，請索取新的 Aptima Multitest 棉棒檢體採集套組。**立即將棉棒放入運送試管內，讓黑色劃痕線處於試管頂端。將劃痕線與試管上緣對齊，然後小心折斷棉棒柄。棉棒會落到瓶管底。丟棄棉棒柄上方的部分。



將蓋子蓋回試管，旋緊。  
依照醫療保健提供者的指示交回試管。

Hologic 提供本採集程序指南，僅作提供一般資訊之用；該指南並非確然性質之指示或採集性能之保證。臨床醫師須負起閱讀和了解合適仿單之全責，並遵從適用之當地、州府和聯邦的規定和法規。

[hologic.com](http://hologic.com) | [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com) | +1.888.484.4747

DS-01553-501 修訂版 003 © 2017 Hologic, Inc. 保留所有權利。Hologic、The Science of Sure、Aptima 以及相關標誌是 Hologic, Inc. 和/或其子公司在美國和/或其他國家或地區的商標和/或註冊商標。這些資訊專為美國和其他市場的专业醫護人員設計，無意於在禁止產品招攬或促銷活動的區域用作此類活動的資料。由於 Hologic 的資料是透過網站、網路直播和貿易展覽分發的，因此有時無法控制此類資料會出現在哪個區域。如需某一特定國家或地區銷售哪些產品的具體資訊，請聯絡您的 Hologic 代表或寫信至：[diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com)